



H-sele, flex-kontroll

Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
5.81001.1	216480	S
5.81001.2	216481	M
5.81001.3	216482	L
5.81001.4	216483	XL

# Kinetic Balance

## H-sele Flex-Control

BRUKERVEILEDNING



**KINETIC BALANCE**

## Produkt

KB Vest herre, flex kontroll, non stretch  
# 5.81001

## Innhold

4 rørklemmer  
4 båndholdere  
4 klemspenner  
4 beltespenner  
1 brystvest  
1 bruksanvisning

## Bruk

Sele for bekkenposisjonering.

Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

## Advarsel

Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport. Bruk alltid vesten sammen med et hoftebelte! Åpne alltid vesten før du åpner hoftebeltet.

## Montering

Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.

Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

## Monteringsinstruksjoner

1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene. Juster avstanden mellom de øvre beltene, slik at de krysses midt på skuldrene uten å berøre nakken.  
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.  
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspenner.
5. Juster posisjonen på de øvre båndene, slik at polstringen hviler mot skuldrene. Bruk den fleksible kontrollen til å justere mengden med elastisitet i de øvre beltene. Hvis det er litt elastisitet, trekk i enden på båndet for å gjøre det lenger. Hvis det er mer elastisitet, trekk i den oransje løkken for å gjøre enden på beltet kortere.
6. Juster de nedre båndene.
7. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet regelmessig.
10. Når det er i bruk, kan H-plasseringsutstyret åpnes og lukkes med de øvre sideutløserne på produktet. Den midtre festeordningen kan brukes til å justere avstanden mellom de to polstrede delene, og den kan åpnes og lukkes med fasteordningen med sideutløsning.

## Vedlikehold

Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.

Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3  
1540 VESTBY  
T: 66 96 38 00  
E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)  
[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)