



Skrittsele non-stretch

Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
7.70001.1	216526	S
7.70001.2	216527	M
7.70001.3	216528	L
7.70001.4	216529	XL

Kinetic Balance

Skrittsele non-stretch

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB Sele skritt, non stretch # 7.70001

Innhold

2 rørklemmer
3 båndholdere
3 klemspenner
3 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Bruk

Sele for bekkenposisjonering.

Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel

Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering

Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.

Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner

1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
1. For enklere montering, fjern seteputen hvis det lar seg gjøre. Fastsett plasseringen av klemspennene på hver side for bånd 1 og 2. Fest båndet 3 midt bak på stolen.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person. Fest klemspennene ved bruk av riktig verktøy og materialer.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
2. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen.
3. Plasser bekkenbåndet, skyv båndene 1 og 2 gjennom klemspennene, og fest disse i riktig trekkretning.
4. Juster båndene 1, 2 og 3. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukersens mage presses inn.
5. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
6. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
7. Under bruk kan bekkenbåndet åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på bånd 1 og 2.

Vedlikehold

Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.

Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no