



medemagruppen



Bruksanvisning  
**BSW luftstøttemadrasser**

Gratulerer med valget av BSW luftstøttemadrass som er et vakumsystem for ekstra støtte i badekaret.

### Informasjon

Varenummer 4320-1001, Luftstøttemadrass for badekar, 120 cm

Varenummer 4320-1002, Luftstøttemadrass for badekar, 180 cm


BSW luftstøttemadrasser formes etter brukerens kropp, hvoretter luften trekkes ut slik at madrassen opprettholder formen.

### Sikkerhetsforanstaltninger

Vann eller fuktighet må ikke komme inni systemet som består av håndpumpe, ventil, slange og madrass. Vann eller annen fuktighet i systemet vil nedsette funksjonen vesentlig, og vil medføre bortfall av garanti.

### Forsiktighetsforanstaltninger

- Bruk ikke systemet før du har gjort deg godt kjent med funksjonen
- Madrassen må festes i badekaret med alle sugekopper før bruk.
- For å fjerne madrassen må sugekopper løsnes enkeltvis ved å pirke løs foten på hver sugekopp.

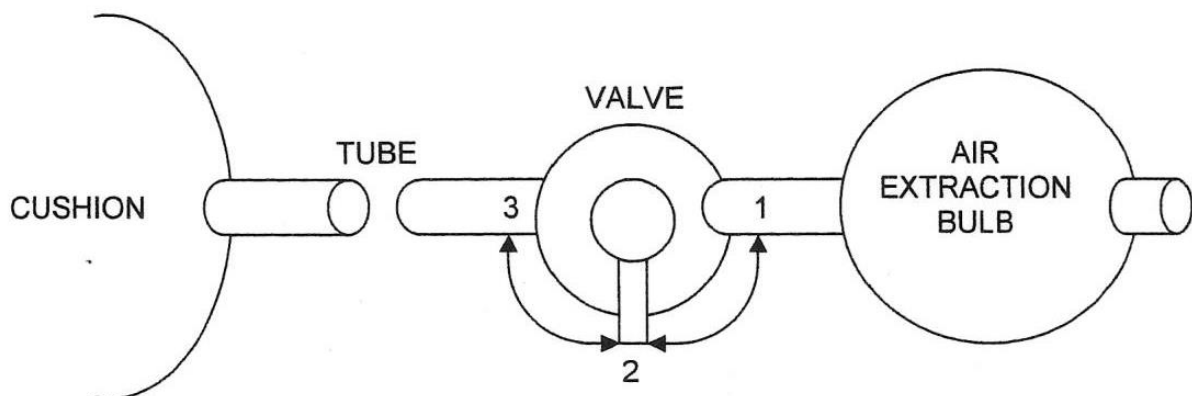

Den etterfølgende bruksanvisningen refererer til systemet koblet opp som vist i dette diagrammet. Madrass og pumpe skal alltid være tilkoblet ventilen som vist her.

## Bruksanvisning

1. Sett ventilen i posisjon 1 og la madrassen ligge i ro for to minutter slik at lufttrykket utlignes.
2. Sjekk at overflaten i badekaret som madrassen skal festes til er rengjort og tørr.
3. Plasser madrassen i ønsket posisjon og fest sugeskopper med et bestemt trykk.
4. Prefyll badekaret hvis ønskelig.
5. Plasser personen i badekaret på madrassen i ønsket posisjon.
6. Hvis nødvendig, juster madrassen til ønsket for slik at adekvat støtte oppnås.
7. Sett ventilen i posisjon 2 og klem på pumpen slik at luften trekkes ut og danner et vakum, inntil ønsket grad av støtte er oppnådd.
8. Sett ventilen i posisjon 3 for å opprettholde den oppnådde støtten.
9. For å redusere vakumstøtten, vri ventilen til posisjon 1.

## Rengjøring

Madrassen skal kun rengjøres med alminnelige såpebaserte rengjøringsmidler uten skurepulver. Ved behov kan den desinfiseres med klorbaserte midler, type Virkon 15 eller lignende.



Posisjon 1.

Med ventilen i denne posisjonen utlignes trykket til omgivelser.



Posisjon 2.

Med ventilen i denne posisjonen kan madrassen vakumformes til pasienten støttebehov.



Posisjon 3.

Med ventilen i denne posisjonen er systemet lukket for å opprettholde ønsket vakum.

Dette produktet importeres og omsettes av:

**Medema Norge AS**  
**Postboks 133**  
**1483 Skytta**

**Telefon: 67 06 49 00**

**Telefaks: 67 06 49 90**

**e-post: [firmapost@medema.no](mailto:firmapost@medema.no)**

**Web: [www.medema.no](http://www.medema.no)**

*Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet, og de skader dette måtte medføre på personer og eiendom.*