



Vest med glidelås

Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
Z5.71022.1	216812	S
Z5.71022.2	216813	M

Kinetic Balance

Vest - Glidelås

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB Vest herre, glidelås # Z5.71022

Innhold

4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 brystvest
1 bruksanvisning

Bruk

Sele for bekkenposisjonering.

Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel

Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport. Bruk alltid vesten sammen med et hoftebelte! Åpne alltid vesten før du åpner hoftebeltet.

Montering

Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.

Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner

1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Kontroller at glidelåsen midt på vesten er lukket helt igjen før du monterer den. Juster plasseringen av klemspennene. Juster avstanden mellom de øvre beltene, slik at de krysses midt på skuldrene uten å berøre nakken.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Juster posisjonen på de øvre båndene, slik at polstringen hviler mot skuldrene.
6. Juster de nedre båndene.
7. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet regelmessig.
10. Under bruk kan vesten åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på produktet. Glidelåsen midt på vesten brukes til å åpne og lukke den. Før du åpner glidelåsen, kontroller at det ikke er for mye trykk på produktet og beltene.

Vedlikehold

Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.

Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no