



Bruksanvisning
Mendo Medic 2 overmadrass

BANO LIFE

Fjern all emballasje før du tar produktet i bruk. Legg madrassen direkte på hovedmadrassen. Madrassen er vendbar. Madrassen er rullkomprimert for å lette håndtering og transport. Dette forringer ikke madrassens kvalitet eller levetid. Det vil derfor ta et døgn tid etter åpning før den oppnår sin opprinnelige form og mål.

Det anbefales at madrassene benyttes med trekk. Dette beskytter skummet og forlenger både madrassens yteevne og levetid. Trekket er elastisk og gir brukeren økt komfort samt øker skumkjernens yteevne. For å oppnå best mulig effekt av madrassen, anbefaler vi at det ikke brukes mer enn et vanlig laken. Lakenet bør ligge ”løst” på madrassen.

Vedlikehold

Sjekk madrassen regelmessig. Hvis trekket blir ødelagt, bør ikke madrassen brukes før man legger på nytt trekk. Når trekk legges på madrassen, sørg da for at hjørnene på madrassen passer i trekkets hjørner. Dette skal være enkelt med at det er glidelås på 3 sider.

Eftersyn

Vi anbefaler at madrassen vendes med jevne mellomrom. Selv om madrassen har trykksårforebyggende egenskaper er det fortsatt viktig at brukeren flyttes regelmessig hvis han/hun ikke er i stand til å flytte seg selv. Dette hjelper på trykkavlastningen og forebygger trykksår.

Rengjøring trekk

Inkontinenstrekket rengjøres med et vanlig rengjøringsmiddel og en fuktig klut. Det kan også vaskes på 90°C. Bomullstrekket kan vaskes på 60 °C. Trekket skal være tørt før det legges på igjen. Må ikke tørkes i tørketrommel.

Rengjøring skumkjerne

Skummet kan vaskes på 90 °C i 20 minutter, men vi anbefaler en skånsom vask. Skummet skal drypptørkes. Sørg for at skummet er helt tørt før trekket legges på igjen.



BANO LIFE

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life
Berghagan 7, 1405 Langhus
post@banolife.com
tlf. 64 91 80 60

banolife.no