



Kinetic Balance

Raindek long

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Tiltenkt bruksområde

Produktet er ment brukt til å beskytte rullestolbrukere fra livet og ned til føttene mot regnvær utendørs. Produktet kompletteres med eget fottøy.

Bruk

Hvordan vi velger å kle på oss vil variere, blant annet ut fra muligheter og preferanser. I denne bruksanvisningen finner du et forslag, som også forteller om de ulike mulighetene i plagget.

Du kan forbli sittende i stolen under hele prosessen.

Regntrekket festes rundt livet ved hjelp av spennen. Stram til etter eget ønske. Det er lange reguleringsbånd, noe som fasiliterer for at festespennen kan plasseres i siden. Fest i knehasen og rundt anklene ved hjelp av spennene og stram til etter ønske. Sørg for at sidestykkene dekker hoftene og leggene på begge sider. For ytterligere reguleringer kan du benytte snorstrammer i midje og på hver side. Produktet kan pakkes sammen i egen lomme for enkel oppbevaring.

Vedlikehold

Kontroller produktet jevnlig for slitasje på trekk og glidelås.

Daglig renhold:

Tørk over regntrekket med en ren klut og mildt såpevann. Tørk over med fuktig fille for å fjerne såperester. Maskinvask 40°. Må ikke tørkes i tørketrommel.



Tekniske spesifikasjoner

Yttermateriale: 92% polyester, 8% elasthan.

Vindtett, vanntett, vannsøyle 10.000 mmH₂O.

Art.nr.	Størrelse	Farge	Lengde
KBRDLBL.001	XS	Svart	78cm
KBRDLBL.002	S	Svart	85cm
KBRDLBL.003	M	Svart	89cm
KBRDLBL.004	L	Svart	93cm
KBRDLBL.005	XL	Svart	99cm
KBRDLB.001	XS	Blå	78cm
KBRDLB.002	S	Blå	85cm
KBRDLB.003	M	Blå	89cm
KBRDLB.004	L	Blå	93cm
KBRDLB.005	XL	Blå	99cm
KBRDLDG.001	XS	Mørk grå	78cm
KBRDLDG.002	S	Mørk grå	85cm
KBRDLDG.003	M	Mørk grå	89cm
KBRDLDG.004	L	Mørk grå	93cm
KBRDLDG.005	XL	Mørk grå	99cm
KBRDLLG.001	XS	Lys grå	78cm
KBRDLLG.002	S	Lys grå	85cm
KBRDLLG.003	M	Lys grå	89cm
KBRDLLG.004	L	Lys grå	93cm
KBRDLLG.005	XL	Lys grå	99cm
KBRDLLWDG.001	XS	Grønn	78cm
KBRDLLWDG.002	S	Grønn	85cm
KBRDLLWDG.003	M	Grønn	89cm
KBRDLLWDG.004	L	Grønn	93cm
KBRDLLWDG.005	XL	Grønn	99cm
KBRDLRE.001	XS	Rød	78cm
KBRDLRE.002	S	Rød	85cm
KBRDLRE.003	M	Rød	89cm
KBRDLRE.004	L	Rød	93cm
KBRDLRE.005	XL	Rød	99cm

Garanti: Alle Kinetic Balance produkter er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. Alle Kinetic Balance produkter garanteres mot fabrikkasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt som tiltenkt. Dersom det oppstår en fabrikkasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte produktet uten omkostninger for kunden. Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på produktet.

