

SUMED®

FlowForm

Dusj-/toalett-/badepute og bademadrass

Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

FlowForm Bade/dusjpute, Bade Madrass og Toalett/Dusjpute er designet for å gi komfort og trykkavlastning under bading, dusj eller bruk av toalettstol. De er egnet for bruk når hudbeskyttelse eller ekstra komfort er nødvendig.

Putene inneholder en kraftig FlowForm væske som muliggjør omfordeling av trykk og komfort og vil forbli på plass selv når den er nedsenket i vann. Sugekoppene kan anvendes for ekstra sikkerhet.

Puten er produsert for å maksimere effektiviteten av trykkfordeling og forhindre ”hengekøyeeffekt”.

Håndteringsinstruksjoner

Flytende badepute og badmadrass. Puten eller madrassen skal plasseres på bunnen av badeplaten før det fylles med vann. Sugekoppene skal fuktes litt og brukes til å feste puten eller madrass til bunnen av badeplaten.

Brukeren skal ALDRI stå på puten/madrassen, og ytterligere forsiktighet bør utvises når den brukes av en person som har utfordringer ved forflytning. For å fjerne puten / madrassen, løsne sugekoppene fra bunnen. Hvis de faller av, kan de lett festes igjen ved å skyve dem tilbake i hjørnehullene.

FlowForm Toalett/dusjpute

Toalett/dusjpute leveres med 4 festestropper med krok og sløyfe som kan brukes til å feste puten på en rekke overflater. Stroppene skal plasseres på begge sider, og på baksiden og foran på puten. Stroppene skal plasseres rundt puten og eksisterende sete, og festes forsvarlig.

Spennene skal plasseres vekk fra brukerens kropp.

Tiltenkt bruk

Dusjputen og badmadrassen er egnet for forebyggende og terapeutisk bruk, opp til trykkskade grad 1-2 og for personer som tidligere har opplevd trykkskader. Ikke for brukere med trykkskade grad 3 og oppover.

Dusj/toalettpute er egnet for forebyggende og terapeutisk bruk, opp til trykkskade grad 1-2 og for personer som tidligere har opplevd trykkskader. Ikke for brukere med trykkskade grad 3 og oppover. Maksimal brukervekt 102 kg.

Rengjøring

Produktets overflate bør rengjøres regelmessig manuelt med såpe og vann og deretter tørkes.

Produktet kan rengjøres ved hjelp av en rekke kjemiske desinfeksjonsmidler, inkludert klorbaserte løsninger.

Bruk av fenoler anbefales IKKE.

Etter rengjøring eller overflatedesinfisering bør produktet skylles for å fjerne overflødige rester og la det tørke godt før bruk.

Resirkulering

Sørg for at du kaster produktet i henhold til lokale forskrifter

Brennbarhet

Faren for antenning av badeputene og bademadrassen anses å være lav.

Hjelpemiddeleksperter AS

Vassbygdevegen 104
7512 stjørdal

Tlf: 906 86 881
E-post: post@h-e.no

