



Bruksanvisning

Dot Watch Punktskriftklokke



Innholdsfortegnelse

- I. Innledning
 - 1. Hva er Dot Watch?
 - 2. Navn på deler og funksjoner
- II. Bruksmåte
- III. Slå av/på og batteri
 - 1. Slå av/på
 - 2. Lading
 - 3. Sjekk gjenværende batteri og varsel for lavt batteri
 - 4. Dvalemodus
- IV. Dot Watch-app
 - 1. Slik laster du ned appen
 - 2. Pare Dot Watch
- V. App-meny
 - 1. Min klokke
 - 2. Klokke
 - 3. funksjoner
 - 4. Notater
 - 5. Finn min Dot Watch
- VI. Innstillinger
 - 1. Enhet
 - 2. Brukerstøtte
- VII. Bruke Dot Watch i punktskriftmodus
 - 1. Dato og tid
 - 2. Motta varsler
 - 3. Stoppeklokke
 - 4. Nedtelling
 - 5. Notat
 - 6. Annet
 - 7. innstillinger
- VIII. Hvordan bruke Dot Watch i taktil modus
 - 1. Sjekk tid
 - 2. Motta meldinger
 - 3. Stoppeklokke
 - 4. Timer
 - 5. Notat
 - 6. Annet
 - 7. Innstillinger
- IX. Forholdsregler for håndtering og sikkerhet
- X. Komponenter og spesifikasjoner
 - 1. I pakken
 - 2. spesifikasjoner

Denne brukerhåndboken tar utgangspunkt i standardinnstillingene i Dot Watch. Dette kan medføre mindre forskjeller, avhengig av mobilenhet, modelltype, eller innstillingene på din mobiltelefon. Videre er ikke dette produktet kompatibelt med nettbrett.

I. Innledning

1. Hva er Dot Watch?

Dot Watch er en smartklokke med punktskrift, som kobles til brukerens smarttelefon ved å laste ned Dot Watch appen. Dot Watch kan brukes i punktskriftmodus, hvor informasjonen fremkommer i punktskrift, og i taktil modus, hvor informasjonen mottas gjennom antall punkter. Flere funksjoner er tilgjengelige når du kobler til Dot Watch app'en med Blåtann.

2. Navn på deler og funksjoner

Dot Watch skjermen: Denne viser hovedinnholdet i Dot Watch. Skjermen består av fire celler, to på hver side av midten. Cellene beskyttes av et beskyttelseslag.

Berøringssensorer: Disse er lokalisert under andre og tredje celle, og kan brukes til å bla frem og tilbake (venstre og høyre).


Krone: Plassert mellom de to knappene på siden av klokken. Roterer for å bytte mellom funksjoner.

Velg-knapp: Velg-knappen er til høyre på klokken, over kronen.

Hjem-knapp: Denne er lokalisert under kronen, på klokkens høyre side. Trykk en gang for ventemodus. Cellene vil da deaktiveres, men alle knappene fungerer. På samme måte vil cellene også deaktiveres når klokken står i dvalemodus. Ettersom kronen imidlertid ikke fungerer nå, må det trykkes på en hvilken som helst knapp for å gå ut fra dvalemodus.

II. Bruksmåte

Legg lenken rundt handleddet, og tilpass ved å stramme lenken så den kjennes behagelig. Dersom lenken faller ut av metallsløyfen, før magnetsluttstykket gjennom sløyfen og tilpass den. Vær oppmerksom på at lenken kan separeres fra klokken, eller bli skadet, dersom den strammes for hardt.

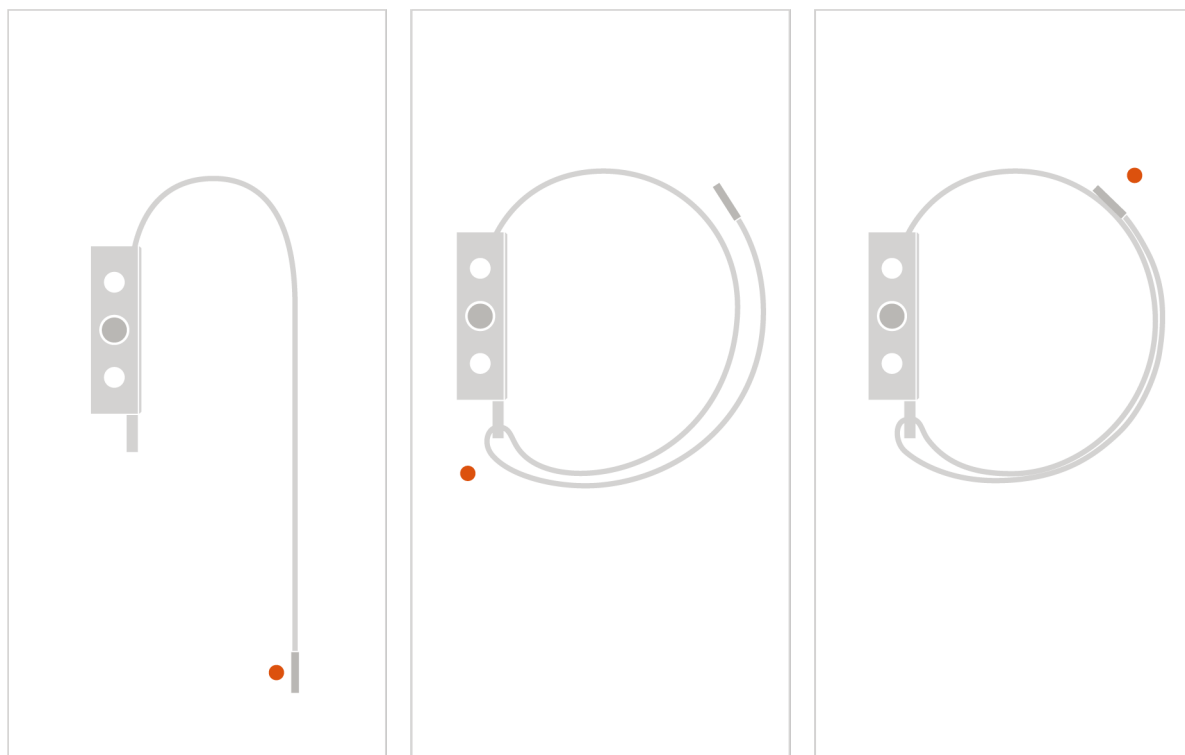

Figuren over illustrerer hvordan Dot Watch skal brukes.

III. Slå av/på og batteri

1. Slå av/på

A. Slå på strømmen

Hold nede hjem-knappen i cirka 3 sekunder for å slå på enheten. Enheten vil så vibrere, og alle punktskriftcellene vil heves i 3 sekunder, for så å forsvinne igjen.

B. Slå av strømmen

Hold nede hjem-knappen i 3 sekunder når klokken er på. Alle cellene vil senkes med en kort viberingssekvens, og enheten vil slås av.

2. Lading

Lad batteriet ved å bruke den magnetiske ladestasjonen. Denne er utstyrt for å gi optimal ladeeffekt. Du vil merke at Dot Watch og ladestasjonen bare passer skikkelig sammen den ene veien, og da vet du plasseringen er riktig. Koble laderen til en strøm-adapter eller en USB-utgang. Klokken slår seg på når den lades. Dersom batteriet er tomt vil det ta noe tid før klokken vibrerer. Det anbefales å lade klokken i mer enn tretti minutter.

Dot Watch går ikke i dvalemodus når den lades. Enheten vil vise hvor mye batteriet trenger å lade. Når batteriet er fullt går alle punktene ned, og enheten vil vibrere og returnere til dvalemodus.

3. Sjekk gjenværende batteri og varsel for lavt batteri

A. Sjekke batteriet

Skru kronen med klokken en gang for å se hvor mye batteri som gjenstår. I punktskriftmodus vises tallet i tiere, uten prosenttegn.

F. eks. 10 % (punkter 3-4-5-6/ punkt 1/ punkter 2-4-5).

I taktil modus indikeres gjenværende batteriprosent med antall punkt.

F.eks. 50%: [punkt 1-2-3-4-5-6 / punkt 1-2-3-4-5-6 / punkt 3-6 / punkt 3-6]

B. Advarsel om lite batteri

Når batteriet er 20% og 10%, vil det komme en varselmelding med tre vibrasjoner. Det anbefales å lade Dot Watch før den er fullstendig utladet.

4. Dvalemodus

Klokken går i dvalemodus om den ikke er i bruk på 1 minutt, noe som optimaliserer batteriets levetid. Mens du er i dvalemodus vil kronen deaktiveres. For å aktivere på nytt, trykk på Hjem-knappen.

IV. Dot Watch-app

1. Slik laster du ned appen

Du kan installere Dot Watch-app`en på smarttelefonen din ved å søke etter "Dot Watch" i iOS App Store eller Google Play Store. Dot Watch-applikasjonen er levert av Dot Incorporation.

-iOS: støttes for versjon 9.0.0 og nyere i Apple App Store

-Android: støttes for versjon 4.4.4 og nyere i Google Play-butikken

2. Pare Dot Watch

Følg trinnene nedenfor for å pare Dot Watch med smarttelefonen:

1) Slå på Bluetooth i smarttelefoninnstillingene. Slå på Dot Watch.

2) Kjør Dot Watch-appen, og velg "Start paring".

3) Fra listen over Bluetooth-enheter, søk på enheten din med serienummer "Dot Watch XXXX".

XXXX betyr de fire siste sifrene i produktets serienummer.

4) Angående Android:

- Velg "Dot Watch XXXX" for å fullføre sammenkoblingen.

- Etter "Dot Watch er tilkoblet" vil opplæringen vises.

5) Angående iOS:

- Velg "par" på Bluetooth pareforslag.

- På neste trinn, velg "tillat" for å vise iPhone-varslene dine.

- Opplæringen vises

6) Velg "Norsk" på popup-siden Hovedspråk.

7) Nå kan du se meldingen "Velkommen til Dot".

Hvis du har problemer med å koble til enheten din, kan du sende oss en e-post.

- E-post: post@aasto.no

V. App-meny

1. Min klokke

A. Før paring

Du kan starte sammenkoblingen med Dot Watch ved å velge "par" -knappen.

B. Etter sammenkoblingen

Når Dot Watch er sammenkoblet med app'en, kan du se gjenværende batteriprosent.

2. Klokke

A. Alarm

Du kan legge inn opptil 10 alarmer, og enheten vil vibrere til ønsket innstilt tid.

B. Timevarsling

Hvis du ønsker at Dot Watch skal vibrere hver hele time kan du aktivere denne funksjonen.

3. funksjoner

A. Lagrede meldinger

Du kan sjekke meldinger du har lagret fra Dot Watch. Den lagrede meldingen forblir her selv om den er fjernet på klokken.

B. Lær punktskrift

Bokstaver oversettes til punktskrift og vises på klokken. Du kan gå til forrige og neste bokstav ved å trykke på berøringssensorene.

i. Lær tall

Du kan lære tallene med punktskrift på Dot Watch. Det tallet du velger i app`en vises på Dot Watch.

F.eks. Hvis brukeren velger 7, vil enheten vise nummertegnet og syv i punktskrift.

※ Nummertegn: [punkter 3-4-5-6]

※ Nummer 7: [punkter 1-2-4-5]

Hvis 0-9 er valgt, vil tallene fra 0 til 9 vises. Du kan lese tallene med berøringssensorene. Nummerindikatoren vises bare foran 1.

ii. Bokstaver

I bokstavmenyen vises bare små bokstaver.

- Fra A til Å

Bokstavene fra A til Å vises på Dot Watch. Les hele alfabetet ved å trykke på berøringssensorene.

- Du kan skrive en bokstav i app`en og sende den til Dot Watch.

iii. Prøv ut

Skriv ned ønsket innhold. Det vil bli oversatt til punktskrift og vises på Dot Watch. Du kan lese lange tekster ved å bla med berøringssensorene. Visningen vil bli forskjellig utfra hvilken punktskrift-grad du har valgt. For Norsk er bare grad 1 tilgjengelig.

4. Notater

Du kan skrive et notat/huskelapp og lagre på app`en, da kan du lese notatene i app`en og på klokken.

Les notater ved å bla med berøringssensorene. Du kan lagre opptil ti notater. Hvert notat er begrenset til 240 tegn.

5. Finn min Dot Watch

Finn Dot Watch gjennom appen. Trykk på Finn min Dot Watch, så vibrerer enheten din i fem minutter, og viser "find" på displayet. Hvis det ikke gjøres noen tiltak i løpet av de fem minuttene, vil enheten stoppe vibrasjonen. Trykk på Valg-knappen for å gå tilbake til Hjem-menyen.

※ Find: [punkter 1-2-4 / punkter 2-4 / punkter 1-3-4-5 / punkter 1-4-5] (I både punktskrift og taktil modus)

VI. Innstillinger

1. Enhet

A. Innstillinger for visning

- Auto-Scroll hastighet: angi punktskriftens hastighet i auto-scroll-modus.
- Vibrasjonsintensitet: angi intensiteten på vibrasjoner som oppstår når du mottar varsler, innkommende anrop, etc.
- Ventetid: angi tidspunktet for å lage punktskrift når det ikke er gjort noen tiltak.
- Antall celler som auto-scroller: tilpasser antall celler som blir automatisk scrollet etter dine preferanser. Du kan velge mellom 1 til 4 celler.

B. Innstillinger for celler

- Klokke: i punktskriftmodus vises all informasjon i punktskrift; I taktil modus kan brukeren telle antall punkter og føle formen til punktene for forskjellige funksjoner.
- Dato: bytt rekkefølgen på måneder og dager. F.eks. 24. desember blir 24. desember eller Desember 24.
- Timemodus: standard er 12-timersmodus med AM- og PM-indikasjon. Du kan også bytte til 24-timersmodus.
- Omvendtmodus: for brukere som ønsker å snu Dot Watch slik at knappene kommer på klockens høyre side. Da bytter «velg-knapp» og «hjem-knapp» plass.

C. Varslingsinnstillinger

- Varsler: Du kan skru varsler av eller på. Hvis du slår dem av, blir ingen varsler eller samtaler sendt til Dot Watch.
- Samtaler: Du kan få eller avslå et anrop på Dot Watch når en samtale kommer inn.
- Andre: Du kan velge å ta imot varsler fra applikasjoner unntatt samtaler. Hvis du velger "Av", får du ikke varsler på klokken.

Når det gjelder Android, kan du spesifisere dette for hver applikasjon. Dette er mer begrenset med iOS.

D. Språkinnstillinger

Brukere kan stille inn ønsket språk for varsler, notater, etc. Brukere kan velge språk og punktskrift.

E. Firmware-oppdatering

Du kan sjekke den gjeldende firmware-versjonen og om det finnes nyere firmware-versjoner. Du kan også oppgradere firmware.

F. Klokke-informasjon

Sjekk informasjon som enhetstype, serienummer, firmware-versjon, protokollversjon, applikasjonsversjon og OS-versjon.

G. Fjern paring

Hvis du vil bruke Dot Watch frittstående, kan du frikoble Dot Watch fra smarttelefonen. Vær oppmerksom på at alle data blir tilbakestilt. For iOS-brukere, fullfør frakoblingen ved å gå til Innstillinger - Bluetooth - velg "glem denne enheten" på smarttelefonen.

2. Brukerstøtte

A. Kontakt Dot Mate

Foreløpig bare tilgjengelig i Korea

B. Kontakt oss via e-post

Send spørsmål via e-post.

C. Brukerhåndbok

Få mer informasjon om hvordan du bruker Dot Watch.

D. Retningslinjer

Du kan sjekke vilkår, personvernregler, diagnostikk- og bruksdata samt lisenser for åpen kildekode.

VII. Bruke Dot Watch i punktskriftmodus

1. Dato og tid

A. Tid

Trykk på Velg-knappen fra hjem-visning eller hvilemodus. Klokken viser time og minutt uten tallindikatoren. Hvis du trykker på valgknappen en gang til, indikerer de to venstre cellene sekunder og de to høyre cellene viser AM eller PM. AM / PM vises ikke i 24-timersmodus.

※ AM: [punkter 1 / 1-3-4]

※ PM: [punkter 1-2-3-4 / 1-3-4]

B. Dato

Trykk på valg-knappen 3 ganger, altså ett trykk mer enn når du sjekker sekunder. De to venstre cellene viser måneden, og de to høyre cellene viser dagen uten tallindikatoren.

2. Motta varsler

Dot Watch lar brukere motta varsler fra applikasjonene sine, for eksempel fra tekstmeldinger, Facebook, WhatsApp, værapper, e-post, etc. Klokken vil vibrere to ganger når den mottar varsler. Varsler vises i punktskrift med henholdsvis applikasjonsnavn, avsenderinformasjon, innhold og tidsstempel, i denne rekkefølgen. Brukeren kan lese dem ved hjelp av berøringssensoren. Den nyeste varslingen vil alltid være varsling nummer én.

A. Lese varsler

Når du mottar en varsling, vibrerer enheten kort to ganger. Drei kronen nedover (mot klokken) en gang til varslingsmenyen. Trykk så på valgknappen, så vil antall varsler vises. Du kan flytte en og en melding ved å vri kronen eller flytte 10 meldinger av gangen ved å trykke på berøringssensoren.

Trykk på valgknappen på varslingsnummeret for å lese meldingen. Det er to måter å lese en melding på: ved å bruke berøringssensoren eller bruke auto-scroll-modus ved å trykke på valgknappen. Klokken vil vibrere når det ikke er flere meldinger å lese. Om du snur kronen mens du leser meldingen, kan du gå tilbake til visning av antall varsler.

※ Noti: [punkter 1-3-4-5 / 1-3-5 / 2-3-4-5 / 2-4]

B. Lagre varsler på applikasjonen

Du kan lagre meldingen på app`en når du leser varslingen; trykk og holder nede valgknappen for å lagre. Meldingen vil bli lagret på Dot Watch-appen med en kort vibrasjon som bekreftelse.

C. Slette varsler

iv. Slette alle

Hvis du ønsker å slette alle varsler, trykker du på startknappen i 3 sekunder visning av antall varsler. Sletting bekreftes med vibrasjoner, og "none" vises

※ none: [punkter 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5]

v. Slett valgt melding

Når du leser en bestemt melding, trykk på Hjem-knappen til du kjenner en vibrasjon. Den aktuelle meldingen blir slettet, og du vil gå tilbake til varslingsmenyen.

3. Stoppeklokke

For å bruke stoppeklokkefunksjonen, vri kronen to ganger mot klokken. Trykk på valgknappen for å vise stoppeklokkeskjerm med bokstavene "stop". Du kan starte stoppeklokken ved å trykke på valgknappen en gang, og stoppe funksjonen ved å trykke på knappen en gang til.

Stoppeklokken kan brukes opptil 24 timer. Timer og minutter vises opptil 59 minutter og 59 sekunder, og etter 60 minutter viser klokken timer og minutter. Hvis du trykker på valgknappen, går brukerne tilbake til stoppeklokke-skjermen, og etter maksimal tid vil den bli tilbakestilt. Stoppeklokken tilbakestilles hvis du bruker andre funksjoner etter å ha satt den på pause, og hvis du bruker andre funksjoner uten å pause, vil den fortsette å telle.

※ Stop: [punkter 2-3-4 / 2-3-4-5 / 1-3-5 / 1-2-3-4]

4. Nedtelling

Drei kronen tre ganger mot klokken, og trykk på valgknappen på nedtellings-skjermen. Skjermen for å stille inn tidtakeren vises. Hvis du trykker på valgknappen, stoppes timerfunksjonen, og hvis du trykker på knappen en gang til, vil funksjonen starte på nytt. Funksjonen kan telle opptil 59 minutter og 59 sekunder. Angi minutter med de to venstre cellene og sekunder med de to høyre cellene. Du endrer ti og ti med berøringssensoren, eller fininstiller en og en med kronen. Trykk deretter på valgknappen for å begynne å telle.

Når nedtellingen er fullført, vises «tout» (timeout) med vibrasjoner for å varsle. Trykk på hjem-knappen for å stoppe timervarslingen, ellers blir den automatisk stoppet etter 5 minutter.

※ Timr: [punkter 2-3-4-5 / punkter 2-4 / punkter 1-3-4 / punkter 1-2-3-5]

※ Tout: [punkter 2-3-4-5 / punkter 1-3-5 / punkter 1-3-6 / punkter 2-3-4-5]

5. Notat

Lag et notat på Dot-appen og sjekk notatet ditt på Dot Watch. For å sjekke notat, vri kronen fire ganger mot klokken, "memo" vises på displayet. Hvis du trykker på valgknappen her, vises antall notater med nummerindikator. Hvis det ikke er noen notat, vil "none" vises med punktskrift.

※ Memo: [punkter 1-3-4 / 1-5 / 1-3-4 / 1-3-5]

※ None: [punkter 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5]

6. Annet

A. Motta samtaler

Når du har et innkommende anrop, vil Dot Watch vibrere og "call" vises på displayet. Det innkommende anropet blir avvist hvis du trykker på Hjem-knappen, eller anrop-informasjonen vises hvis du trykker på Valg-knappen. Innringer-informasjonen vises som navnet som er lagret på enheten eller kontaktnummer om den ikke er lagret.

Når du har mottatt eller avvist samtalen, går displayet tilbake til startskjermen.

* Når det gjelder Android, kan denne funksjonen begrenses avhengig av enhetsmodell og OS-versjon.

※ Call: [punkter 1-4 / 1 / 1-2-3 / 1-2-3]

B. Alarmer

Hvis du stiller inn alarmer på app`en, vil Dot Watch vibrere på det gitte tidspunktet. "Al" (alarm) vises på de to venstre cellene. På de to cellene til høyre vises nummeret på alarmen med nummerindikator. Alarm nr. 10 vises som nr.0.

Hvis du trykker på valgknappen eller hvis det ikke gjøres noe, vil alarmen bli satt på pause, og den midlertidige alarmen vil vibrere igjen 5 minutter senere. Trykk på Hjem-knappen for å slå av alarmen og gå tilbake til startskjermen.

※ Alarm nr.10: [punkter 1 / 1-2-3 / 3-4-5-6 / 2-4-5]

C. Finn smarttelefonen min

Når smarttelefonen er koblet til Dot Watch, trykker du på både Hjem-knappen og valgknappen samtidig to ganger, og smarttelefonen vil vibrere og lage lyd. Bruk denne funksjonen til å enkelt finne smarttelefonen din.

7. innstillinger

A. Bytte klokkemodus

Trykk på Hjem-knappen - valg-knapp - Hjem-knappen, og trykk deretter og hold nede valgknappen for å bytte mellom taktil modus / punktskrift. Enheten vil vibrere og varsle om at modusen er endret.

B. Bytte til omvendt modus

Trykk på knappene i følgende rekkefølge for å veksle mellom standardmodus og omvendt modus: trykk på start-knappen to ganger – valg-knappen to ganger – hjem-knappen to ganger – valg-knappen to ganger - trykk deretter og hold nede valg-knappen. Modusen byttes med vibrasjoner.

Legg merke til at valg-knappen og hjem-knappen har «byttet plass», og at kronen og berøringssensorene går motsatt vei.

C. Endre tid og dato visningsrekkefølge

vi. Endre timemodus

Du kan bytte visning fra 12 timers-modus til 24 timers-modus, trykk og hold valgknappen.

vii. Endre datovisningsrekkefølge

Trykk og hold nede valgknappen mens du ser på datoen for å endre rekkefølgen på måneder og dato - fra MMDD til DDMM og omvendt.

D. Innstilling av tid og dato

Når Dot Watch er koblet til smarttelefonen din, kan du ikke angi klokkeslett og dato manuelt. To raske vibrasjoner vil indikere at du ikke får tilgang til manuelle innstillinger.

viii. Still klokke

Fra standby-status trykker du og holder inne både valgknappen og hjemknappen samtidig for å stille klokka manuelt - når "set" vises på klokken, trykk på valgknappen. Still inn tiden ved å vri på kronen for å endre enerne, og bruk berøringssensoren til å endre tierne. Still time på de to venstre cellene og minutt på de to høyre cellene. Hvis du trykker på valgknappen her, kan brukeren stille inn sekunder på venstre to celler og am / pm på de høyre to cellene. Hvis du trykker på valgknappen, vil innstillingen fullføres med vibrasjoner. I 24-timersmodus, gjør innstillinger for minutt, før du fullfører.

※ Set: [punkter 2-3-4 / 1-5 / 2-3-4-5]

※ AM: [punkter 1 / 1-3-4]

※ PM: [punkter 1-2-3-4 / 1-3-4]

ix. Still dato

Når klokken er koblet til smarttelefon og Bluetooth, er denne innstillingen ikke tilgjengelig, og den indikeres med to korte vibrasjoner. Fra startskjermen holder du inne både valgknappen og startknappen samtidig. Når "set" vises på klokken, trykker du og holder nede valgknappen for å stille inn datoen. Året vises med punktsskrift.

For å stille inn datoen, vri kronen opp (+1 år) eller ned (-1 år) for å stille inn året eller bruk berøringssensoren til å endre tierens plassering. Etter å ha stilt inn året, trykker du på valgknappen for å gå videre for å stille inn måned og dato. Angi måneden på de to venstre cellene og dagen på de to høyre cellene. Hvis du trykker på valgknappen, vil innstillingen fullføres med vibrasjoner.

* Året kan ikke sjekkes på Dot Watch. Året må settes for å få skuddårsdagen på riktig år.

E. Bluetooth-signal

Hvis du ønsker å bruke Dot Watch uten å koble til en smarttelefon, kan du slå av eller på Bluetooth-signalet. Merk at det kan føre til funksjonsfeil å slå av Bluetooth-signalet når enheten er koblet til en smarttelefon.

Trykk og hold nede valg-knappen på statusskjermen for Bluetooth-tilkobling.

※ off: [punkter 1-3-5 / 1-2-4 / 1-2-4]

F. Nullstille

x. Tilbakestill Bluetooth

For å koble Dot Watch til en annen smarttelefon, må du tilbakestille Bluetooth-minnet som er lagret på enheten. Drei kronen to ganger med klokken fra startskjermen for å komme til statusskjerm bildet for Bluetooth-tilkobling. Trykk og hold inne valg-knappen og hjem-knappen samtidig, så vil alle punktene heves og senkes med vibrasjoner, og tilbakestillingen starter.

xi. Tilbakestill innstillingene

Du kan tilbakestille alle innstillinger som tid, klokkemodus (punktskrift, taktil, omvendt), tid og dato, skjerminnstilling og så videre. Forsikre deg om at Dot Watch er slått av. Trykk og hold inne både hjem-knappen og valg-knappen. Tilbakestillingen er nå fullført, slå på Dot Watch.

VIII. Hvordan bruke Dot Watch i taktil modus

1. Sjekk tid

Brukere kan ha kontroll på tiden med antall punkter, ved å trykke på valg-knappen på startskjermbildet eller i hvilemodus. Timen vises på de to venstre cellene og minuttene på de to høyre cellene. Hvert punkt på de to venstre cellene indikerer en time, og hvert punkt på de to høyre cellene indikerer 5 minutt.

For eksempel, dersom det er 3 punkter på de to venstre cellene, betyr det at klokka er 3 og punkt 1-2-4 på den første cellen vil bli vist. Hvis 8 punkter er hevet på de to høyre cellene, indikerer det 40 – 44 minutt, og da vil punkt 1-2-3-4-5-6 på den tredje cellen vises og punkt 1-4 i den fjerde cellen vises..

Trykk på valgknappen en gang til for å sjekke de nøyaktige minuttene. De to venstre cellene viser antall tiere og de to høyre cellene viser antall enere. For eksempel når det kommer til 44 minutter heves punktene 1-2-4-5 to ganger.

2. Motta meldinger

Dot Watch lar brukere motta meldinger fra applikasjonene sine, for eksempel fra SMS, Facebook, WhatsApp, vær-apper, e-post, etc. Klokken vil vibrere to ganger når den mottar meldinger. Varsler vises i punktskrift med henholdsvis applikasjonsnavn, avsenderinformasjon, innhold og tidspunkt, i den rekkefølgen. Brukeren kan lese meldingene, og bla i dem ved å bruke berøringssensoren. Den nyeste meldingen vil alltid være melding nummer én.

A. Lese meldinger

Drei kronen nedover (mot klokken) en gang til meldingsmenyen. Trykk på valgknappen på meldingsmenyen, så vil antall meldinger vises. Du kan flytte til hver melding ved å vri kronen eller flytte 10 meldinger av gangen ved å trykke på berøringssensoren.

Brukere kan sjekke meldingsnummeret med antall punkter og den andre cellen vil vise tierplassen og tredje og fjerde celle vil vise enhetens siffer. For eksempel når det kommer til melding nr.27, vil punktene 1-4 fra den andre cellen, 1-2-3-4-5-6 punktene fra den tredje cellen og en pinne i den fjerde cellen være hevet.

Trykk på valg-knappen på meldingsnummeret for å lese meldingen. Det er to måter å lese en melding på: ved å bruke berøringssensoren eller bruke auto-scroll-modus ved å trykke på valg-knappen. Klokken vil vibrere når det ikke er flere meldinger å lese. Når du snur kronen mens du leser meldingen, kan brukerne gå tilbake til menyen der antall meldinger vises.

※ «Noti»: [punkter 4-5-6 / 2-6 / 3-5 / 1-2-3]

※ Hvis det ikke er noen ny melding «none»: [punkter 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5]

B. Lagre meldinger på applikasjonen

Om du vil lagre meldingen etter at du har lest den, trykker du og holder nede valgknappen for å lagre. Meldingen blir lagret på Dot Watch-appen, bekreftet med vibrasjoner.

C. Slette varsler

xii. Slette alle

Hvis du ønsker å slette alle varsler, trykker du på start-knappen i 3 sekunder fra menyen der antall meldinger vises. Dette bekreftes med en vibrasjon, og «none», som betyr ingen meldinger, vises.

※ none: [punkter 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5]

xiii. Slett valgt melding

Når du leser en melding, trykk på Hjem-knappen til du kjenner en vibrasjon. Den aktuelle meldingen vil bli slettet, og brukerne vil gå tilbake til meldingsmenyen.

3. Stoppeklokke

For å bruke stoppeklokkefunksjonen, vri kronen to ganger mot klokken. Trykk på valgknappen for å vise stoppeklokkeskjermen. Du kan starte og stoppe stoppeklokken ved å trykke på valgknappen.

Stoppeklokken kan brukes opptil 6 minutter og 59 sekunder. Den første cellen viser antall minutter med antall punkter. Den andre cellen viser tierne for antall sekunder, og de to siste cellene viser enerne for sekunder. Hvis du trykker på og holder nede valgknappen, nullstilles stoppeklokken. Den tilbakestilles også etter maksimal tid. Stoppeklokken tilbakestilles hvis du bruker andre funksjoner etter pause. Hvis du bruker andre funksjoner uten å pause, vil den fortsette å telle.

※ Stop: [punkter 4-5-6 / 1-2-3]

4. Timer

Drei kronen tre ganger mot klokken, og trykk på valgknappen. Deretter vises timerstandby-skjermen. Hvis du trykker på valgknappen, starter timerfunksjonen, og hvis du trykker på knappen en gang til, blir funksjonen satt på pause. Funksjonen kan telle opptil 4 minutter. Hvert punkt indikerer 10 sekunder, som vil si at en vertikal linje med tre punkter betyr 30 sekunder. Punkt 1 av første celle begynner å blinke, og etter 30 sekunder vil punkt 1-2-3 heve seg. Etter det blinker punkt 4 av den første cellen til 60 sekunder, og da vil alle punktene på den første cellen heves.

Når nedtellingen er fullført, vises timeout-skjermen. Trykk på Hjem-knappen for å fullføre funksjonen. Timeren tilbakestilles ved å trykke og holde nede valgknappen, eller ved å flytte til andre menyer etter pause. Funksjonen fortsetter å telle ned hvis du flytter til andre menyer uten å pause.

※ Timer Screen: [Første celle har punkt 1-2-3-4-6 / andre celle har punkt 1-2-4-6]

※ Time Out: [Tredje celle har punkt 1-3-4-6 / fjerde celle har punkt 1-3-4-5-6]

5. Notat

Lag et notat, også kalt memo, på Dot-appen og sjekk notatet ditt på Dot Watch. App`en kan lagre opptil 10 notater. For å sjekke notatet, vri kronen fire ganger mot klokken. Hvis du trykker på valgknappen her, vises antall notater som antall punkter. Den andre cellen viser tierne, og den tredje og fjerde cellen indikerer enerne.

For eksempel for notat nr.8, vil det vises punkt 1-2-3-4-5-6 i tredje celle og punkt 1-4 i den fjerde cellen, totalt 8 punkter. Snu kronen til du finner notatet du vil lese, og trykk på valgknappen. Notater kan leses med berøringssensoren. App`en kan lagre opptil 10 notater, og hvis det ikke er lagret et notat, vises "none".

※ Memo: [punkt 1-2-3-4-6 / 1-3-4-6 / 1-3-4-6 / 1-3-4-5-6]

※ None: [punkt 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5]

6. Annet

A. Motta samtaler

Når du har et innkommende anrop vil Dot Watch vibrere.

Ved å trykke på hjem-knappen, kan du avvise samtalen, og ved å trykke på valgknappen vises innringer-informasjonen. Informasjonen vises som et lagret navn eller lagret kontaktnummer. Når du har mottatt eller avvist samtalen, går displayet tilbake til startskjermen.

* Når det gjelder Android, kan denne funksjonen begrenses avhengig av enhetsmodell og OS-versjon.

※ Samtalevisning: [1., 2., 3. celle punkt 2-5 / 4. celle punkt 2-4 og 2-6 vekselvis]

B. Alarmer

Hvis du stiller inn alarmer på app`en, vil Dot Watch vibrere på det gitte tidspunktet. "Al" (alarm) vises på de to venstre cellene. På de to cellene til høyre vises nummeret på alarmen med nummerindikator. I de to cellene til høyre vises antall alarmer med antall punkter.

Hvis du trykker på valgknappen eller hvis det ikke gjøres noe, vil alarmen bli satt på pause, og den midlertidige alarmen vil vibrere igjen 5 minutter senere.

Trykk på Hjem-knappen for å slå av alarmen og gå tilbake til startskjermen. For eksempel vil alarmen nr. 4 vises med alarmbokstaver, og nr.4

※ Alarmbokstaver: [punkt 1-2-3-4-6 / 1-3-5-6]

※ nr. 4: [punkt 1-2-4-5]

C. Finn smarttelefonen min

Når smarttelefonen er koblet til Dot Watch, trykker du på både Hjem-knappen og valg-knappen samtidig to ganger, og smarttelefonen vil vibrere og lage lyd. Bruk denne funksjonen til å enkelt finne smarttelefonen din.

7. Innstillinger

A. Bytte klokkemodus

Trykk på Hjem-knappen - valg-knapp - Hjem-knappen, og trykk deretter og hold nede valgknappen for å bytte mellom taktil modus / punktskrift. Enheten vil vibrere og varsle om at modusen er endret.

B. Bytte til omvendt modus

Trykk på knappene i følgende rekkefølge for å veksle mellom standard modus og omvendt modus: trykk på start-knappen to ganger – valg-knappen to ganger – hjem-knappen to ganger – valg-knappen to ganger - trykk deretter og hold nede valg-knappen. Legg merke til at valg-knappen og hjem-knappen har «byttet plass», og at kronen og berøringssensorene går motsatt vei.

C. Innstilling av tid og dato

Når Dot Watch er koblet til smarttelefonen din, kan du ikke angi klokkeslett og dato manuelt. To raske vibrasjoner vil indikere at du ikke får tilgang til manuelle innstillinger. Hvis du trykker på og holder valg-knappen og hjem-knappen sammen, vises innstillingsskjermen, og ved å trykke på valg-knappen, kan brukerne stille inn klokkeslettet. Endre tiden ved å vri på kronen for å endre enerne nummer, og bruk berøringssensoren til å endre tierne. De to venstre cellene viser timer, og de to høyre cellene viser minutter. Trykk på valg-knappen for å fullføre tidsinnstillingen.

※ klokkeslett-skjerm: [Andre celle viser punkt 1-2-3-4-6 / tredje celle viser punkt 1-3-4-5-6]

D. Bluetooth-signal

Hvis du vil bruke Dot Watch uten å koble til en smarttelefon, kan du slå av eller på Bluetooth-signalet ved å trykke på valgknappen på skjermen for Bluetooth-tilkobling. Merk at det kan føre til funksjonsfeil å slå av Bluetooth-signalet når enheten er koblet til en smarttelefon.

※ Viser når Bluetooth-signalet er av: [punkt 2-5 / 2-5 / 2-5 / 2-5]

E. Nullstille

xiv. Tilbakestill Bluetooth

For å koble Dot Watch til en annen smarttelefon, må du tilbakestille Bluetooth-minnet som er lagret på enheten. Drei kronen to ganger med klokken fra startskjermen for å komme til statusskjerm bildet for Bluetooth-tilkobling. Trykk og hold inne velg-knappen og hjem-knappen samtidig, da hever og senker alle punktene seg med vibrasjoner, og tilbakestillingen starter.

xv. Tilbakestill innstillingene

Du kan tilbakestille alle innstillinger som tid, klokkemodus (punktskrift, taktil, reversert), tid og dato, skjerminnstilling og så videre. Forsikre deg om at Dot Watch er slått av. Trykk og hold inne både hjem-knappen og valg-knappen. Når tilbakestillingen er fullført, slå på Dot Watch.

IX. Forholdsregler for håndtering og sikkerhet

Denne håndboken kan være forskjellig avhengig av programvareversjonen av enheten, modellen og brukerinnstillingen til enheten. Enheten kan brukes til andre formål. Dot Watch kan bli skadet om den blir utsatt for elektrisk støt.

- Hold Dot Watch tørr. Fuktighet og alle typer væsker kan forårsake funksjonsfeil.
- Ikke bruk enheten i støvete, skitne områder. Det kan gjøre at enheten ikke virker godt.
- Dot Watch inneholder magneter. Ikke oppbevar Dot Watch i nærheten av magnetfelt.
- Bruk produsentgodkjent tilbehør. Hvis du bruker tilbehør som ikke er godkjent av Dot Incorporation kan det føre til at enheten ikke fungerer som den skal, og Dot Incorporation kan ikke være ansvarlig for brukerens sikkerhet.
- Ikke rør klokkeskjermen når punktcellene beveger seg, dette kan påvirke hvilke punkter som heves. Om dette skjer, prøv en gang til.
- Det kan hende at Dot Watch ikke viser punktskriften riktig om klokken holdes oppned.
- Spesifikasjonene til Dot Watch kan endres uten varsel for å gi bedre ytelse.
- Ikke endre firmware eller app`en. Det kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal eller blir skadet, og garantien blir ugyldig.
- Dot Incorporation er ikke ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå på grunn av elektrisk interferens med Dot Watch.
- Temperaturen på enheten kan stige når den lades. Ladingen kan stoppe midlertidig hvis temperaturen blir for høy.

[Fare for tordenvær]

Når det er kraftig lyn og torden, anbefales det at du ikke bruker enheten. Koble laderen fra strømkilden. Det kan forårsake personskader eller forårsake brann.

[Bruk i begrensede områder]

Ikke bruk enheten i områder der bruk av elektronisk enhet er forbudt, for eksempel på fly, sykehus osv. Det kan forstyrre radioen og de elektroniske navigasjonsinstrumentene til flyet.

[Forholdsregler ved demontering]

Ikke demonter eller gi enheten støt. Det kan være fare for elektrisk støt, kortslutning eller brann. Eventuelle endringer på enheten din kan føre til at produsentens garanti blir ugyldig.

Bruk aldri en skadet enhet. Det kan forårsake brann eller kortslutning. Kontakt leverandøren for service.

[Forholdsregler om lading]

Forsikre deg om at USB-kabelen er riktig tilkoblet ladeutstyret.

Ikke bøyd eller ødelegg ladekabelen. Dette kan skade kabelen og forårsake brann eller elektrisk støt.

Ikke plasser tunge materialer på laderen.

Ved rengjøring anbefales det å koble fra kabelen, da det kan være fare for brann eller elektrisk støt.

Unngå vibrasjoner eller støt, og koble fra laderen når den ikke er i bruk.

Ikke bruk laderen hvis USB-kontakten er løs eller skadet. Hvis tilkoblingen er ustabil, kan det føre til skade eller antenning.

[Forholdsregler ved høy temperatur og fuktighet]

Ikke bruk enheten i varme eller fuktige omgivelser. Slå av enheten og tørk den når den er våt. Ikke utsett enheten for direkte sollys eller ekstreme temperaturer i lengre perioder (for eksempel på bilens instrumentpanel), eller miljøer med høye temperaturer og høy luftfuktighet. Enheten kan eksplodere eller slutte å fungere. Det anbefales å bruke Dot Watch når temperaturen er mellom 0 og 40 grader.

[Kjemiske forsiktighetsregler]

Ikke bruk kjemikalier som alkohol, benzen, aceton, etc. for å rengjøre enheten. Det kan forårsake brann. Rengjør enheten og laderen med en myk klut.

[Forsiktighetsregler om kortslutning]

Ikke oppbevar Dot Watch med metallgjenstander som mynter, nøkler og halskjeder. Hvis ladeterminale (på undersiden) er i kontakt med metallgjenstander, kan enheten eksplodere.

[Forsiktighetsregler om barn og kjæledyr]

Oppbevar enheten, laderen og deler borte fra barn og kjæledyr.

Enheden kan forårsake elektrisk støt eller eksponering for elektromagnetiske bølger når den er skadet eller i kontakt med spytt. Forsikre deg om at barn og kjæledyr ikke svelger enheten.

Å svelge eller bite enheten, lader eller deler kan forårsake kvelning, eksplosjon og brann.

[Forholdsregler for farlig område]

Ikke bruk enheten i eksplosjonsfarlige områder. Det kan påvirke høyfrekvent utstyr i nærheten. Ikke lagre enheten på ustabil underlag. Hvis enheten din faller, kan den bli skadet eller føre til personskade.

[Forsiktighetsregler for brann]

Ikke dekk enheten med tepper eller lignende ved bruk eller under lading.

Sørg for å resirkulere den riktig, den skal ikke kastes i restavfallet. Det kan forårsake brann, eksplosjon og ødeleggelse av miljøet.

[Forholdsregler mot hudskader]

Når du bruker enheten i lang tid, kan temperaturen på overflaten på enheten stige. Hvis du fortsetter å bruke enheten på denne måten, kan det føre til hudflekker, pigmentering eller svie. Hvis enheten forårsaker allergisk reaksjon, må du slutte å bruke enheten umiddelbart og oppsøke lege.

[Forholdsregler om lagring]

Når enheten ikke er i bruk, koble ladekabelen fra stikkontakten og lagre den på et trygt sted.

[Forholdsregler om batteri]

- I varme eller fuktige omgivelser kan det hende at batteriet ikke lades skikkelig, eller det kan tømmes raskere enn vanlig.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys eller bruk den et sted med høy luftfuktighet, for eksempel et bad.
- Hvis du vil bruke enheten igjen etter at du ikke har brukt den på en stund bør du full-lade enheten først.
- Å fjerne batteriet med makt kan ødelegge enheten.

- Ikke demonter, skad og bygg om enheten eller utsett den for væsker.
- Koble fra laderen når ladingen er fullført for å redusere strømforbruket.
- Send både enheten og laderen når du sender Dot Watch til servicesenter for å få den reparert på grunn av et batteriproblem.
- Hvis enheten blir for varm under lading, må du bruke hansker eller lignende når du kobler enheten fra laderen.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake skade på enheten. I denne situasjonen må du koble fra USB-kabelen og kontakte servicesenteret.

X. Komponenter og spesifikasjoner

1. I pakken

Enhet: Dot Watch

Modell: DW-01

Lader: Magnetisk lader

Produsent: Dot Incorporation

Laget i: Sør-Korea

Braille Manual: hurtigveiledning (engelsk)

Garanti

Beskyttelseslag

* Beskyttelseslaget er montert på Dot Watch ved levering, og det følger med ekstra beskyttelseslag.

Hvis du har spørsmål om manglende komponenter, problemer med komponenter eller kjøp av komponenter, kan du kontakte selgeren eller nettstedet: <https://www.dotincorp.com>

2. spesifikasjoner

[PLATTFORM]

Plattform: Trådløs MCU-plattform

Bluetooth: Bluetooth LE (Low Energy) 4.2

[DISPLAY]

Celler: 4 punktskriftceller med 6 punkter hver

[FUNKSJONER]

Knapper / bryter: 2 knapper, 1 krone

Motor: Horisontal Vibrasjons-Motor

Sensorer: To berøringssensorer foran

[Batteri]

Batteri: DC3.7V 400mAh Li-Polymer-batteri

[Lader]

Lader: USB B Type DC5V Dockingstasjon

[DIMENSJONER]

Hus: 43,0 D x 12,5 T (mm)

Rem: 22 x 210 (Liten) / 250 (Stor) (mm)

Lader: 45,0 D x 7,0 T (mm)

[VEKT]

Hus: 27g

Rem: 8g

Lader: 20g

Alt innhold i pakken: Rundt 500 g

[MATERIALE]

Hus: 6000-serie aluminium

Rem: Vevd, magnetisk netting

Lader: plast

[FARGE]

Foran: Off-White

Hus: Sølv

Rem: Sølv

Lader: Grå

[SERTIFISERING]

Sør-Korea: KC (R-CRM-D0T-DW01)

Europa: CE2200 ROHS, WEEE

United States of America: FCC (ID: 2AKDG-DW01)

Kina: SRRC (CMIT ID: 2017DJ2939)

Japan: TELEC (208-170092)

Internasjonale standarder: SIG Bluetooth

Kontaktinfo Norge:
Aasto Hjelpemidler AS
Telefon 47462722

www.aasto.no
post@aasto.no

