



Kinetic Balance

Raincape Plus

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Tiltenkt bruksområde

Produktet er ment brukt til å beskytte rullestolbrukeres overkropp og framside av ben og føtter mot regnvær utendørs.

Bruk

Hvordan vi velger å kle på oss vil variere, blant annet ut fra muligheter og preferanser. I denne bruksanvisningen finner du et forslag, som også forteller om de ulike mulighetene i plagget.

Regncapen tas over hodet og føres ned over armer og overkropp. Før armene på plass i ermene. Fotenden trekkes rundt føttene. Hette justeres med snorstopper.

Vedlikehold

Kontroller produktet jevnlig for slitasje på trekk og glidelås.

Daglig renhold:

Tørk over regncapen med en ren klut og mildt såpevann. Tørk over med fuktig fille for å fjerne såperester.

Maskinvask 40°. Må ikke tørkes i tørketrommel.



Tekniske spesifikasjoner

Yttermateriale: 100% Nylon.

Yttermateriale: GEO TECH STORM 3. 92% polyester, 8% elastan. Pustende, vindtett, vanntett, vannsøyle 10.000 mmH₂O. Forsterket med Cordura® på innsiden av ermene og på delen som går under føttene for økt holdbarhet.

Art.nr.	Størrelse	Farge	Lengde fremside	Lengde bakside
KBRCPDG.001	XS	Mørk grå	104cm	52cm
KBRCPDG.002	S	Mørk grå	116cm	54cm
KBRCPDG.003	M	Mørk grå	124cm	56cm
KBRCPDG.004	L	Mørk grå	136cm	56cm
KBRCPDG.005	XL	Mørk grå	148cm	58cm

Garanti: Alle Kinetic Balance produkter er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. Alle Kinetic Balance produkter garanteres mot fabrikkasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt som tiltenkt. Dersom det oppstår en fabrikkasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte produktet uten omkostninger for kunden. Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på produktet.

