

Bruksanvisning

Regncape Omega

Lett og pustende regncape til rullestoler med høy rygg og eventuelt nakkestøtte. Leveres i barn- og voksenstørrelser. Produsert i et mykt vind- og vanntett kvalitetsmateriale med tapede sømmer og mange funksjonelle detaljer.

Vanntett



Vindtett



Pustende



Tapede sømmer



Vaskbar




Kjære kunde,

Takk for at du valgte et produkt fra Varodd Velferdsteknologi AS og DARO. Vi håper du liker det og får mange gode opplevelser utendørs.

Les denne bruksanvisningen før du bruker regncapen.



Sikkerhetsregler

-  Bruk bare en regncape som passer til brukerens størrelse.
-  Bruk kun regncapen sammen med en rullestol som har høy rygg og eventuelt nakkestøtte.
-  Bruk **aldri** regncapen hvis deler er løse, i stykker eller mangler. Det er fare for at de kan sette seg fast i hjulene.
-  Immobile eller pleietrengende brukere må **IKKE** etterlates alene eller være uten oppsyn når regncapen er på.
-  Vær oppmerksom på brukerens temperatur og reguler påkledningen etter forholdene. Dette for å unngå overoppheting.
-  Brukes det sikkerhetssele skal denne **alltid** være påspent når regncapen brukes, slik at bruker ikke sklir ut av sete.

Garantibetingelser

Det er 2-års garanti på produktet. Det inkluderer material- og produksjonsfeil. Gjelder **IKKE** ved:

- Feil bruk.
- Feil vask.
- Feil vedlikehold.
- Ikke godkjente endringer.
- Vanlig bruksslitasje.

Regncapens funksjoner

- Vanntett opp til 10.000 mm.
- Pustbarhet på 5.000g/m².
- Tapede sømmer.
- Justerbar hette med snøre.
- Skyggekant på hette som beskytter ansikt mot regn, sludd og snø.
- Vannavvisende glidelås i halsåpningen med et vanntett understykke. Vendbar gripetapp på glidelås slik at bruker kan åpne/lukke glidelåsen fra innsiden av regncapen.
- Stropp på glidelåstappen slik at brukeren lettere kan få tak i den.
- Romslig fasong som dekker hele brukerens kropp og går ned over stolryggens bakside.
- Armer med strikk ved håndleddene.
- Innsydd strikk rundt hele kanten av regncapen, slik at den sitter tett rundt stolen.
- Sikkerhetsrefleks foran, bak og rundt hettens skyggekant for bedre synlighet i mørke.
- Pose til oppbevaring.

Slik brukes regncapen

MERK: Denne regncapen er kun egnet til rullestoler som har høy rygg og eventuelt nakkestøtte.

1. Åpne glidelås i halsåpningen og trekk regncapen over hodet. Den skal dekke hele brukerens kropp.
2. Trekk regncapen ut over ryggen på stolen, samt ned over brukerens føtter. Dette slik at regncapen plasseres **mellom** brukerens føtter og rullestolens fothviler.
3. Kontroller at regncapen sitter godt og **ikke** går inn i hjulene.

OBS! Regncapen må være helt tørr før det pakkes i den medfølgende posen.



Regncapen skal plasseres **mellom** brukerens føtter og stolens fothviler.

Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisningen **SKAL** følges. Vaskes produktet feil er det fare for skade og redusert levetid.
- ⚠ Bruk **IKKE** skyllemiddel, bløtemiddel eller vaskemiddel med blekestoff.

TIPS! Den mest skånsomme måten å vaske en regncape på er å skylle av synlig smuss under rennende vann. Dermed beholder regncapen egenkapene så lenge som mulig. Ikke bruk en børste eller klut ved synlig sand på regncapen, da dette kan skade det vanntette belegget. La regncapen lufttørke.

Vask i maskin

1. Skyll løst smuss og skitt av under rennende vann. Trekk glidelåsen opp og legg regncapen i vaskemaskinen med innsiden ut.
2. Bruk bare en liten mengde flytende vaskemiddel **uten** blekemiddel.
3. Vask regncapen på **max. 40°C** og unngå sentrifugering.
4. Regncapen må **IKKE** tørkes i tørketrommel, men lufttørkes.



Ingen blekemiddel



Finvask max. 40°C



IKKE tørketrommel



Luft/drypp tørking



Rens er mulig

MERK! For hver maskinvask brytes en liten del av det vanntette belegget ned, noe som vil forkorte regncapens levetid.

Vedlikehold

- Sjekk jevnlig regncapen for skader.
- Bruk **aldri** regncapen hvis det er løse deler, i stykker eller mangler.
- Sørg for at regncapen er helt tørr før det pakkes ned.

Materiale

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.



- 100% polyester med PU-coating.

Teknisk info

- Vannsøyletrykk: 10.000 mm.
- Pustbarhet: 5.000g/m².
- Kvadratmetervekt: 135g/m².

PRODUSENT:

DARO

by able 

able nordic a/s
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22
daro@ablenordic.dk
www.daro.dk

FORHANDLER:

 **Varodd**
Velferdsteknologi

Varodd Velferdsteknologi AS

Besøksadresse:
Rigedalen 41
4626 Kristiansand
Norge

Postadresse:
Postboks 8343
4676 Kristiansand

Tlf. (+47) 38 14 48 00
hjelpemidler@varodd.no
www.hjelpemidler.varodd.no

DARO - dansk produsent av tøy til alle typer funksjonshemming.

Hos DARO brenner vi for å lage klær for alle typer funksjonshemminger – klær som kan gi deg økt livskvalitet, komfort og lette hverdagen din. DARO har mer enn 35 års erfaring med å designe og sy fasjonable og funksjonelle klær for både barn og voksne. Vi kan tilpasse klærne akkurat for deg og hjelper deg gjerne med nye løsninger hvis du har spesifikke behov. Se DAROs hele produktsortiment på www.daro.dk.

DARO er klær for DEG og klær med omtanke. 