



Zippie

Varmepose

BRUKERVEILEDNING



zippie®

Tiltenkt bruksområde

Produktet er ment brukt i rullestol, vogn og lignende til å beskytte mot kaldt klima utendørs.

Bruk

Varmeposen åpnes med funksjonelle glidelåser på hver side av posen.

Varmeposen er klargjort for belter, seler, vester, sidestøtter og fotstropper. Legg varmeposen flatt på et fast underlag. Beskytt underlaget om nødvendig. Benytt en skarp kniv for å åpne mellom de sydde forsterkningene. Vær forsiktig slik at du ikke skjærer utenfor forsterkningene.



Vær varsom med fingre!

Varmeposen kan festes i rullestol, vogn eller lignende ved hjelp av festebånd på bakstykkets øvre del. Før festebåndet rundt ryggen på rullestolen/vognen og fest med plastspennen. Fest varmeposen i fotenden ved hjelp av festesnorer som knytes rundt egnet struktur på rullestol/vogn. Vær obs på plassering av festesnorene dersom produktet skal sitte i vognen mens denne slås sammen.

Monter eventuelle belter/seler før begge glidelåser lukkes. Reguleringsmuligheter ved hjelp av snorstrammer i øvre og nedre del av varmeposens åpning.

Ved opphold innendørs over tid, kan frontstykke på varmeposen løsnes helt og oppbevares separat.

Vedlikehold

Kontroller produktet jevnlig for slitasje på trekk og glidelås.

Daglig renhold:

Børst av varmeposen ved behov. Tørk over varmeposen med en ren klut og mildt såpevann. Tørk over med fuktig fille for å fjerne såperester. Maskinvask 40°. Må ikke tørkes i tørketrommel.



Tekniske spesifikasjoner

Yttermateriale: Wr water repellent nylon taslan ripstoff 150gram på oversiden, og Nylon ripstopp coated 2 times på undersiden (vanntett). Anti-skli materiale på undersiden. Vindtett.

Fyll: Polyesterfiber.

Art.nr.	Størrelse	Farge	Lengde fremside	Lengde bakside	Livvidde
555100	100	Svart	78cm	100cm	106cm
555110	110	Svart	88cm	110cm	110cm
555125	125	Svart	103cm	125cm	114cm
555135	135	Svart	110cm	135cm	120cm
555145	145	Svart	120cm	145cm	120cm
555160	160	Svart	130cm	160cm	126cm
555180	180	Svart	150cm	180cm	126cm



Garanti: Produktet er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. Produktet garanteres mot fabrikkasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt som tiltenkt. Dersom det oppstår en fabrikkasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte produktet uten omkostninger for kunden. Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på produktet.

