

## Bruksanvisning

# Kjørepose vinter Facon II

Myk og fasongsydd vinterkjørepose med høy rygg og avtakbar frontdel. Leveres i barn- og voksenstørrelser. Produsert i et pustende, vind- og vanntett kvalitetsmateriale og isolert med varm Thinsulate.

### Vannavvisende



### Vindtett



### Pustende



### Vaskbar








**Kjære kunde,**

**Takk for at du valgte et produkt fra Varodd Velferdsteknologi AS og DARO. Vi håper du liker det og får mange gode opplevelser utendørs.**

**Les denne bruksanvisningen før du bruker kjøreposen.**



### Sikkerhetsregler

-  Bruk bare en kjørepose som passer brukerens størrelse.
-  Bruk **aldri** kjøreposen hvis deler er løse, i stykker eller mangler. Det er fare for at de kan sette seg fast i hjulene.
-  Immobile eller pleietrengende brukere må **ikke** etterlates alene eller være uten oppsyn når kjøreposen er på.
-  Vær oppmerksom på brukerens temperatur og reguler påkledningen etter forholdene. Dette for å unngå overoppheting.
-  Brukes det sele skal denne **alltid** være påspent når kjøreposen brukes, slik at bruker ikke sklir ut av sete.

### Garantibetingelser

Det er 2-års garanti på produktet. Det inkluderer material- og produksjonsfeil. Gjelder **IKKE** ved:

- Feil bruk.
- Feil vask.
- Feil vedlikehold.
- Ikke godkjente endringer.
- Vanlig bruksslitasje.

### Kjøreposens funksjoner

- Vintermodell.
- Vind- og vannavvisende kjørepose.
- Pustende.
- Varm Thinsulate-isolering og myk fleeceforing.
- Fasongsydd med høy rygg.
- Setestykke i sklisikkert stoff.
- Delbar 2-veis glidelås med lange gripe-tapper, som samles i livet og lukkes ned langs siden til bunnplaten.
- Framdelen og bunnplaten kan skilles fra bakdelen.
- Bunnplate utvendig og innvendig i sort kunstig lær og med Thinsulate-isolering mellom. Stropp for feste i fotplate.
- Bakstykke med strikk og gripebånd, for feste til rullestolen.
- Sikkerhetsreflekser foran for bedre synlighet i mørket.
- Strikk i livet.
- Huller til hofteseler.
- Åpning for fotrem.
- Forsyet til abduktionsklods.

## Slik brukes kjøreposen

1. Ta fra hverandre bakstykket fra forstykket og plasser bakstykket i stolen.
2. Fest bakstykket til stolen med stropper båndene og før ryggdelens strikk om hvert ryggør.
3. Før hofteselene ut gjennom hullene i hver side og plasser brukeren i stolen og spenn fast.
4. Legg forstykket på brukeren og sørg for at bunnplaten plasseres **mellom** brukers føtter og stolens fotplate.
5. Fest bunnplaten stroppbånd under stolens fotplate.

Lukk begge glidelåsen i livet og dra glidelåsen ned mot bunnplaten på begge sider.

**TIPS!** Ved bruk av abduksjonskloss klippes den forsydde delen forsiktig opp. Klipp **IKKE** i sømmene men i midten.



Kjøreposen skal plasseres **mellom** brukers føtter og rullestolens fotplate.

## Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisningen **SKAL** følges. Vaskes produktet feil er det fare for skade og redusert levetid.
- ⚠ Bruk **IKKE** skyllemiddel, bløtemiddel eller vaskemiddel med blekestoff.

### Vask i maskin

1. Lukk stropper og glidelås og legg kjøreposen i vaskemaskinen med innsiden ut.
2. Bruk kun en liten mengde vaskemiddel uten blekemiddel.
3. Vask kjøreposen ved **max. 60°C** og bruk lav sentrifugering.
4. Heng kjøreposen til tork. Den kan også tørkes i tørketrommel på lav varme.



Ingen blekemiddel



Finvask max. 60°C



Tørketrommel ved lav varme



Strykin på lav varme



Rens er mulig

## Vedlikehold

- Sjekk jevnlig kjøreposen for skader.
- Bruk **aldri** kjøreposen hvis det er løse deler, er ødelagt eller har mangler.

## Materiale

### Ytterstoff

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.



- 100% polyester med PU-coating.

## Isolering

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.
- Thinsulate P100.



## Fôr

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.
- 100% polyester fleece.

## Teknisk info

### Ytterstoff

- Vannsøyletrykk: 10.000 mm.
- Pustbarhet: 5.000g/m<sup>2</sup>.
- Kvadratmetervekt: 135g/m<sup>2</sup>.

### Isolering

- Evne: Bevarer isoleringen i fuktige omgivelser og tørker hurtig.
- Kvadratmetervekt: 95g/m<sup>2</sup>.
- Isolering: 0,30 Rct.
- Tykkelse: 1,1 cm.

### Fôr

- Anti-peeling.
- Kvadratmetervekt: 300g/m<sup>2</sup>.

### PRODUSENT:

# DARO

by able 

able nordic a/s  
Skavholmvej 8C, 1.  
DK-8520 Lystrup  
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22  
daro@ablenordic.dk  
www.daro.dk

### FORHANDLER:



Varodd Velferdsteknologi AS

Besøksadresse:  
Rigedalen 41  
4626 Kristiansand  
Norge

Postadresse:  
Postboks 8343  
4676 Kristiansand

Tlf. (+47) 38 14 48 00  
hjelpemidler@varodd.no  
www.hjelpemidler.varodd.no

## DARO - dansk produsent av tøy til alle typer funksjonshemming.

Hos DARO brenner vi for å lage klær for alle typer funksjonshemminger – klær som kan gi deg økt livskvalitet, komfort og lette hverdagen din. DARO har mer enn 35 års erfaring med å designe og sy fasjonable og funksjonelle klær for både barn og voksne. Vi kan tilpasse klærne akkurat for deg og hjelper deg gjerne med nye løsninger hvis du har spesifikke behov. Se DAROs hele produktsortiment på [www.daro.dk](http://www.daro.dk).

DARO er klær for DEG og klær med omtanke. 