


Bruksanvisning

Slik bruker du og vedlikeholder din nye Komfy pute. Legg puten i midten av stolen eller det stedet du skal bruke den slik som dette:

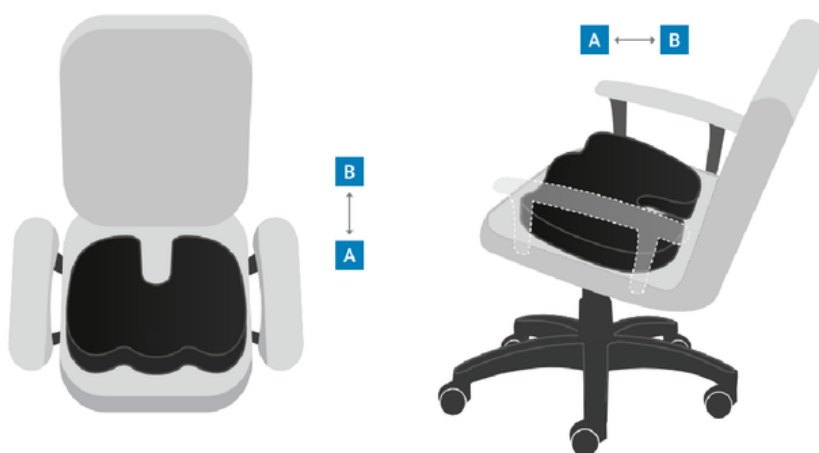

U-formen skal være vendt mot ryggen, som illustrert over **P**.


Rengjøring



1 Åpne glidelåsen på siden av puten.



2 Dra puten forsiktig ut av trekket.

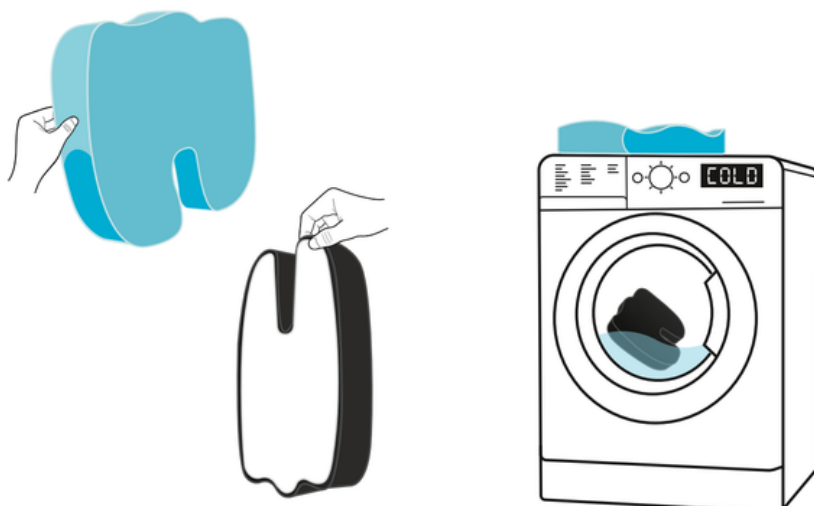

3 Ta av trekket. Kjenner du motstand kan du brette puten.

4 Trekket vaskes på max 30° i maskinen. Luft tørkes eller i tørketrommel på lav varme.

VIKTIG! VASK IKKE MINNESKUMMET I VASKEMASKINEN! Om skummet har fått en liten lukt, lufttørk puten ute eller ha den i tørketrommelen på svak varme i 30-40 min.

Feil med puten?

Ikke nøl med å ta kontakt! Få rask hjelp av våre dyktige medarbeidere.

Email: hei@sittbedre.no

Ønsker du mer informasjon besøk:

www.sittbedre.no

Email: hei@sittbedre.no