

# Bruksanvisning

Hodebøylemikrofon modell 3,  
med VA sender

**HODEB3-VAS**

VAREN.R.: 1762



HODEB3-VAS er en solid mikrofon av meget høy kvalitet som framhever konsonantene i talen og dermed taleforståelsen. Diskret utforming, justerbar bom, men ingen justering av bøylene. Kulekarakteristikk. Leveres med oppladbart batteri, men senderen kan benytte alkalisk AA batteri, fordi den har beskyttelse mot feillading. Beige.

Pakkens innhold: Hodebøylemikrofon mod. 3-4 og Vestfold Audio mikrofonsender (VAS).

### Virkemåte



Indikatorlampe

Mikrofonsenderen betjenes med på/av-bryteren på toppen.

Mikrofonsenderen betjenes med av/på-bryteren på toppen.

Når den er i bruk lyser en grønn indikatorlampe på toppen av senderen. Senderen bør være avslått når den ikke er i bruk.

Senderen og korresponderende mottaker i Vestfold Audio systemet må være innstilt på samme kanal. Se avsnittet *Kanalvalg* nedenfor.

### Montering

Før første gangs bruk må senderen lades helt opp. Se avsnitt *Lading*.


Still inn kanal tilsvarende mottakeren. Se avsnitt *Kanalvalg*.

Mikrofonen kobles til kontakten på toppen av senderen.



### Ta på deg mikrofonen

Mikrofonen bæres med krokene hengende over ørene bakfra.

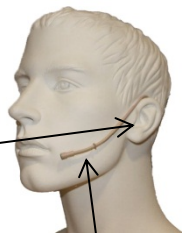

1. Bøy bommen slik at mikrofonen kommer nærmere og peker mot munnen din uten å komme i direkte kontakt med huden.
2. Hvis bøylene sitter løst kan det settes på en pakkestrikk på tvers av bøylene i nakken. Denne vil holde mikrofonen stødig.

**NB!!** Feil tilpasning av mikrofonen medfører ofte "feedback" og kraftig hyling i høyttalerne.

### Batteri

Mikrofonsenderen drives av ett AA-batteri.

Som standard leveres mikrofonsenderen med et spesial NiMh oppladbart batteri, som skal lades i senderen når denne står i AudioLink mikrofonlader.

Du kan også bruke ordinære alkaline AA-batterier, men disse kan selvsagt ikke lades.

### Lading

Slå av senderen. Sett den i en ladebrønn i mikrofonladeren (Tilbehør). Kontroller at indikatorlampen på laderen tennes idet senderen settes i ladebrønnen.

Lampen på laderen lyser med fast, rødt lys under lading, og skifter til fast, grønt lys når batteriet er helt oppladet.

### Kanalvalg


Sender og korresponderende mottaker må være innstilt på samme kanalbank og kanal.

Slik kommer du til bank- og kanalvelgerne:

1. **Åpne batteridekselet**  
Slå av senderen. Ta av batteridekselet.

2. **Valg av kanal**  
Med en liten flat skrutrekker dreier man bankvelgeren til ønsket bank, og kanalvelgeren til ønsket kanal.

3. **Lukk batteridekselet**  
Sett batteridekselet på plass. Slå på senderen igjen.

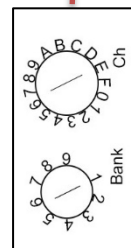

### Kanaloversikt

Alle mikrofonene i Vestfold Audio systemet er beregnet for 823-832 MHz båndet. Det er 37 tilgjengelige kanaler i dette området. Kanalene er fordelt på 3 banker med 16 + 16 + 5 kanaler slik:

#### Bank 1 – Posisjon 1

Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens
0	823,000	8	830,750
1	829,750	9	823,500
2	825,000	A	825,750
3	826,750	B	831,250
4	829,000	C	824,000
5	832,000	D	828,250
6	827,750	E	826,250
7	824,500	F	830,250

#### Bank 2 – Posisjon 2

Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens
0	823,250	8	831,000
1	830,000	9	823,750
2	825,250	A	826,000
3	827,000	B	831,500
4	829,250	C	824,250
5	825,500	D	828,500
6	828,000	E	826,500
7	824,750	F	830,500

#### Bank 3 – Posisjon 3

Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens
0	829,500	8	x
1	827,500	9	x
2	831,750	A	x
3	827,250	B	x
4	828,750	C	x
5	x	D	x
6	x	E	x
7	x	F	x

Bank 4-9 er ikke i bruk.

Dersom bankvelger stilles til 4-9, eller kanalvelger stilles til en kanal høyere enn 4 i bank 3, vil indikatorlampen gi en feilvarsling. (Se under avsnittet «Enkel feilretting», pkt. 3, nedenfor)

### Lys-indikatorer / LED

Når batteriet i senderen er nær ved å gå tomt for strøm, vil den grønne indikatorlampen ved av/på-bryteren blinke. Batteriet bør da lades, eller erstattes med et fullt oppladet batteri eller et vanlig AA alkaline batteri.

### Mikrofonvolum (følsomhet)

Mikrofonvolumet er fabrikkinnstilt, men det kan være behov for justering av følsomheten for å tilpasse til brukerens stemme eller ved bytte av mikrofontype.




Følsomhetsjustering

### Juster følsomhet

Prat i mikrofonen og juster til best lyd kvalitet uten forvrenging. Nivået bør være tilnærmet likt evt. håndholdt mikrofon i systemet.

### Halssnor

Mikrofonsenderen leveres med en halssnor som kan være praktisk:

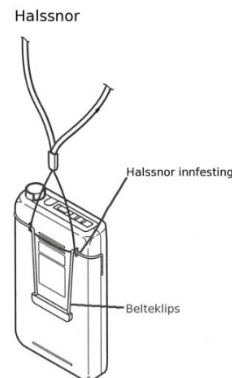

### Sendereffekt



**Bryter for å endre sendereffekten.**

(under kanalvelger)  
N = Normal  
L = Redusert effekt

Sendereffekten skal normalt ikke endres, da den normale effekten generelt gir riktig rekkevidde.

### Enkel feilretting

1. Ikke lys i indikatorlampen.  
Lad mikrofonen eller bytt batteri.
2. Ikke lyd i høyttalere.  
Kontrollere om mikrofonen og mottaker er innstilt på samme kanal.
3. Rødt blinkende lys betyr at kanal eller kanalbank er valgt utenfor gyldig valg.
4. Grønt blinkende lys betyr at batteriet er på vei til å bli utladet.

Hvis lyden er dårlig eller det hylr i høyttaleren:

1. Tilpass mikrofonen til brukeren – bøy til nær munnviken!
2. Skru ned volumet på forsterkeren.
3. Unngå å stå rett foran en høyttaler.

### Tekniske spesifikasjoner

Audio frekv.: 100 – 11000 Hz  
Radio båndbredde: 823 – 832 MHz  
Sendereffekt: 5 – 20 mW  
Rekkevidde: Opp til 120 meter, fri sikt  
Dynamikk, sender: >95dB  
Batteri: AA  
Brukstid: 14t  
Vekt, sender: 102g  
Dim. sender: 100x62x27mm

### Vedlikehold

Mikrofon og sender kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Produktene må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

Plasser mikrofonsenderen i mikrofonladeren for å lade batteriet.

### Bytte av batteri:

1. Åpne dekselet på fremsiden av senderen.
2. Ta ut det gamle batteriet, og sett inn et nytt batteri.
3. Sett dekselet på igjen.

**NB!** Vanlig AA alkaline-batteri kan brukes, men det er bare originale Vestfold Audio oppladbare batterier som vil lades i mikrofonsenderen.

### Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

### Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettsadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

### Leverandør

Vestfold Audio AS  
Nordre Fokserød 12  
3241 Sandefjord  
Tel. 3347 3347  
Epost: [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no)