



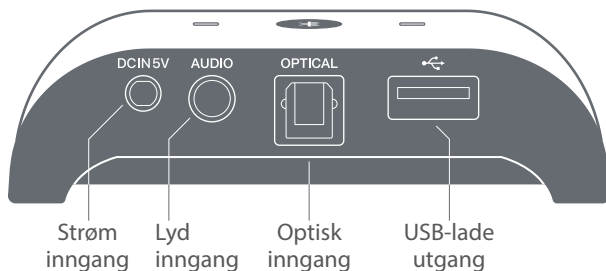

**NORSK**

# BE2022 Maxi Pro TV-streamer

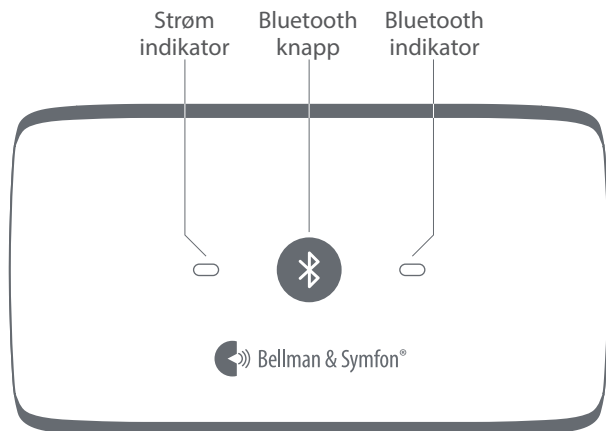

## Om TV-streamer

Med Maxi Pro TV-streamer kan du høre TV-lyden med den lydstyrken som passer for deg, uten at det påvirker lydstyrken for noen andre i rommet. Den strømmer lyden i stereo via Bluetooth til din Maxi Pro samtaleforsterker (selges separat).

## Innhold i esken

I tillegg til TV-streamer er følgende elementer inkludert:

En mini-stereokabel



En mini-stereo-til-RCA-adapter



En fiberoptisk kabel



En strøm kabel med USB-kontakt




## Hva du trenger for å komme i gang

Du trenger også følgende for å sette opp din TV-streamer:

Et TV-apparat med RCA-, hodetelefon- eller optisk lydutgang

En Maxi Pro samtaleforsterker

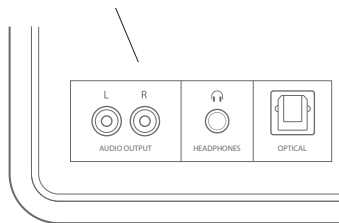

# Sette opp TV-streamer


## Trinn 1: Koble til lyd

TV-streamer kan kobles til TV-apparatet på flere måter. Det avhenger av hvilke lydutganger TV-apparatet har.

### Bruke TV-apparatets RCA-utgang

- 1 Koble den ene enden av mini-stereokabelen til lydinngangen på baksiden av TV-streamer.
- 2 Koble den andre enden til mini-stereokabelen-til-RCA-adapteren.
- 3 Koble RCA-pluggene til lydutgangen på TV-apparatet.

**Merk:** Vær oppmerksom på at dette kan medføre at høytalerlyden kan stenges av på visse TV modeller.

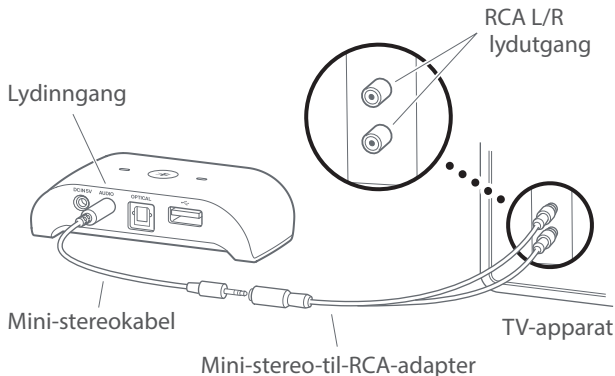


### Bruke TV-apparatets optiske utgang

Hvis TV-apparatet har en optisk utgang, kan du bruke den fiberoptiske kabelen til å koble TV-streamer til TV-apparatet. Slik kobler du den til:

- 1 Koble den ene enden av kabelen til den optiske lydinngangen på baksiden av TV-streamer.
- 2 Koble den andre enden til den optiske utgangen på TV-apparatet.


Fiberoptisk kabel

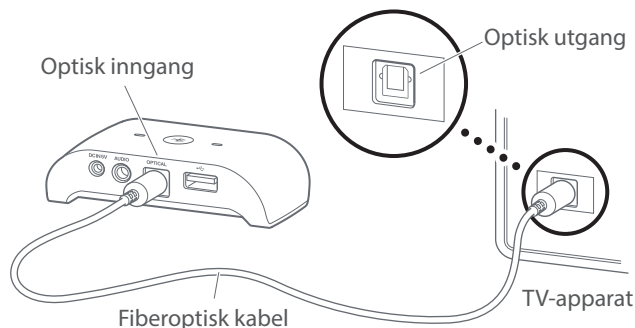

## Trinn 2: Koble til strømledningen

- 1 Monter riktig type støpsel på strømadapteren.
- 2 Koble USB-enden av strømkabelen til strømadapteren
- 3 Koble andre enden til streamer.
- 4 Sett strøm adapteren i vegguttaket. Nå vil strømindikatoren lyse grønt.

**Merk:** Den kan også få strøm ved å koble USB-enden av strømledningen til en USB-inngang i TV. Dette kan gjøre at Streamer bruker litt lengre tid for å slå seg på.

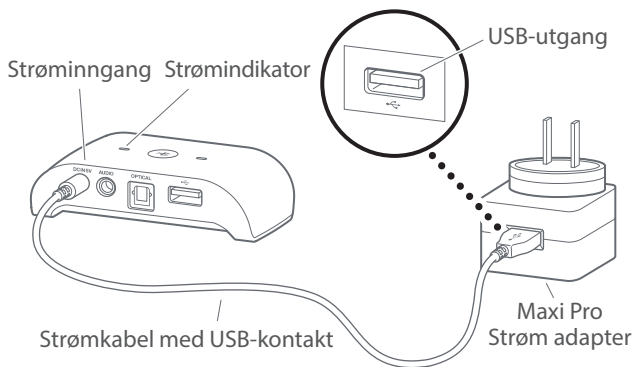

## Trinn 3: Parkobling

**Merk:** Hvis TV streamer fulgte med Maxi Pro-enheten, trenger du ikke å parkoble enhetene.

- 1 **På TV streamer:** Hold inne Bluetooth-knappen til Bluetooth-velgeren begynner å blinke blått.
- 2 **På Maxi Pro-enheten:** Trykk på mikrofonvelgeren. Hold inne Bluetooth-velgeren til Bluetooth-indikatoren begynner å blinke blått.
- 3 Begge Bluetooth-indikatorene lyser fast med blått lys for å vise at parkoblingen var vellykket.

## Bruke TV-streamer


TV-streameren vil være på og automatisk koble seg til Maxi Pro når du igjen er innenfor Bluetooth-rekkevidden, så lenge Maxi Pro er koblet til strømnettet. Begge Bluetooth-indikatorene vil lyse blått når enhetene er koblet til hverandre.

**Merk:** Hvis TV-streameren får strøm fra TV-en, vil den starte automatisk når du slår på TV-en og koble seg til Maxi innen 10 sekunder.

## Lade Maxi Pro samtaleforsterker

Slik lader du Maxi Pro TV-streameren:

- 1 Koble USB-enden av Maxi-ladekabelen til USB-ladeutgangen på baksiden av TV-streameren.
- 2 Koble den andre enden til Maxi-ladekontakten som er merket med gult.
- 3 Batteriindikatoren på Maxi-enheten blinker grønt under lading.

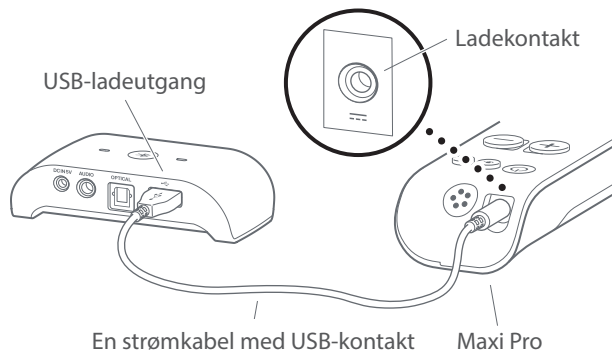

# Feilsøking

Hvis	Prøv dette
Ingenting skjer når jeg trykker på Bluetooth-knappen på TV-streamer.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at TV-streamer er koblet til strøm. Se <b>Koble til strømledningen</b>.</li></ul>
Jeg hører ikke lyden fra TV-apparatet i hodetelefonene.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at Maxi Pro er innenfor rekkevidde og at den er parkoblet med din TV-streamer. Se <b>Parkobling</b>.</li></ul>
Lyden på TV-apparatet forsvinner når jeg kobler mini-stereokabelen til hode-telefonutgangen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dette er en funksjon på noen TV-apparater. Bruk RCA-utgangen eller den optiske utgangen på TV-apparatet i stedet. Se <b>Koble til lyd</b>.</li></ul>

## Pleie og vedlikehold

Bruk produktet i et tørt miljø der temperaturen alltid er mellom 0°C og 35 °C.

Rengjør produktet med en myk, løfri klut. Unngå at det kommer fuktighet inn i åpningene. Ikke bruk vindusrens, husholdningsvaskemidler, aerosolspray, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller skuremidler.

Følg instruksjonene i dette heftet hvis produktet ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som det skal. Hvis produktet fortsatt ikke fungerer som det skal, kontakter du den lokale leverandøren for å få informasjon om service og garanti.

Europeisk hovedkontor  
Bellman & Symfon AB  
Södra Långebergsgatan 30  
436 32 Askim  
Sweden  
Phone +46 31 68 28 20  
E-mail [info@bellman.com](mailto:info@bellman.com)



[bellman.com](http://bellman.com)

BE2022\_047MAN003-NO