

Bruksanvisning

Blåtann Audiosender BLT-SEND3

VAREN.R.: 1864




Blåtann Audiosender (**BLT-SEND3**) tilkobles lydkilder som TV, forsterkere o.l. og overfører lyden trådløst og med lav tidsforsinkelse til blåtannmottakere som for eksempel den bærbare nærlydhøytaleren (**BLUNO**).

1. I pakken


- Blåtannsender, (BLT-SEND3, varenr. 1864)
- Mini-jack kabel
- Optisk kabel
- Phono kabel
- Mini-jack til 2 x phono kabel
- Strømforsyning til BLT-SEND3 med tilhørende USB kabel

2. Senderen

Blåtannsender overfører lyd trådløst til blåtannmottakere. Den er kompatibel med optisk, koaksial, RCA og AUX lydutganger. Blåtannsender har to «kanaler», for tilkobling av to blåtannmottakere (1) og (2). Nærløydshøytaleren leveres som standard ferdig tilkoblet (1). Senderen benytter en strømforsyning, som plugges inn i USB kontakten (7) på baksiden av senderen.

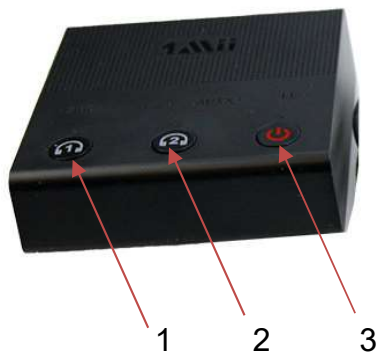

1. Blåtann tilkoblingsknapp
2. Blåtann tilkoblingsknapp
3. AV/PÅ-knapp

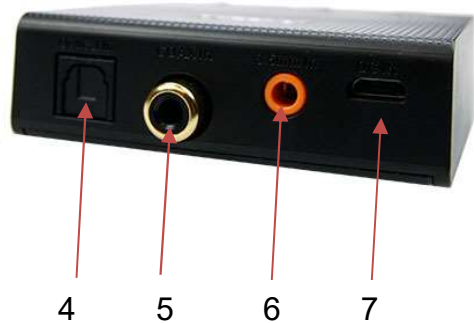

4. Digital Toslink lydinnngang
5. Digital coaxial lydinnngang
6. Analog mini-jack lydinnngang.
7. USB strømtilkobling.

3. Tilkoblingskabler

Medfølger i esken:

- Mini-jack kabel: for analoge lydutganger, som f.eks hodetelefonutgang. Tilkobles (6).
- Mini-jack til 2 x phono kabel: for analoge lydutganger med phonokontakter. Tilkobles (6)
- Optisk kabel: for digitale TOS link lydutganger. Tilkobles (4).
- Phono kabel: for digitale COAX lydutganger. Tilkobles (5).

4. Bruksveiledning

1. Koble Blåtannsender til lydutgangen på enheten den skal strømmes fra med en av kablene.
2. Koble strømkabelen til Blåtannsender (7).
3. Senderen slås på/av med-bryteren (3) på toppen.
4. Slå på mottakeren
5. Utfør om nødvendig sammenkobling.

Senderen bør være avslått når den ikke er i bruk.

5. Sammenkobling

Følg disse punktene dersom du må sammenkoble på nytt, eller om du skal sammenkoble med en annen blåtannmottaker.

1. Hold enhetene som skal tilkobles i nærheten av hverandre (ca. 1 meters avstand).
2. Sett den ledige blåtann-tilkoblingsknappen i tilkoblingsmodus ved å trykke knappen (2). (Knapp (1) er forbeholdt tilkobling av nærlydhøytaleren.) LED lampen blinker vekselvis blått/rødt.
3. Sett blåtannmottakeren (hodetelefoner e.l.) i tilkoblingsmodus.
4. Vent noen sekunder til sammenkoblingen er utført. Sammenkoblingen bekreftes ved at LED lampen lyser fast blått.

6. Lydinnstillinger på Blåtannsender

Senderen er på forhånd innstilt til å overføre lyd med lavest mulig tidsforsinkelse (LL).

Dette skal IKKE endres.

Hvis du merker sjenerende tidsforsinkelse kan du trykke på/av knappen (3) to ganger for å slå HD-lyd på eller av.

7. Fabrikkinnstilling

Dersom du opplever feil, og at enhetene ikke fungerer, kan du nullstille blåtann-sammenkoblingen, og utføre ny sammenkobling.

Hold knappene (1) og (2) samtidig i ca. 5 sekunder. Alle led lamper blinker 1 gang for å bekrefte at alle blåtann-sammenkoblinger er nullstilt.

Senderen settes automatisk i tilkoplingsmodus. Led lampen blinker vekselvis blått/rødt.

Sammenkoble enhetene på nytt, som beskrevet i kapittel 5.

8. Vedlikehold

Senderen kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

Lagring når ikke i bruk
Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

9. Resirkulering

Produkter og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktene kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

10. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

11. Tekniske spesifikasjoner

Blåtann Sender:

Tilgjengelige profiler: A2DP, AVRCP

Audio kodek: aptX, aptX-HD, aptX-LT, SBC

Rekkevidde innendørs: ca. 30 m fri sikt

Strøm: Micro USB DC5V 500mA

Størrelse: 111x100x32 mm

Vekt: 126g

12. Leverandør

Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12

3241 Sandefjord

Tel. 3347 3347

Epost: post@vestfoldaudio.no

13. Feilsøking

Problem	Feilretting
Ikke lys i lampen på senderen.	Er senderen slått på?
	Kontroller at strømmen er riktig tilkoblet.
Ingen lyd i mottakeren	Skru opp volumet for sterkere signal.
	Er senderen riktig tilkoblet lydkilden og er det signal på lydutgangen?
Får ikke sammenkoblet ny blåtann-enhet	Er senderen og mottaker i nærheten av hverandre (ca. 1 meter)?
	Er både senderen og mottaker i tilkoblingsmodus.



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

