

Bruksanvisning

Nærlydpakke med blåtannsender og blåtann nærlydhøytaler

NÆRLYD2

VARENr.: 1859



NÆRLYD2 er en «alt i ett» pakke for trådløs strømming av lyd til nærlyd-høytaler. Blåtannsender (**BLT-SEND3**) tilkobles lydkilder som TV, forsterkere o.l. og overfører lyden trådløst og med lav tidsforsinkelse til den bærbare nærlydhøytaleren (**BLUNO**).

Innholdsfortegnelse


1. I pakken	3
2. Senderen	3
3. Tilkoblingskabler	3
4. Nærlydhøytaleren	4
5. Bruksveiledning	5
6. Sammenkobling	5
7. Lydinnstillinger på Blåtann-sender	5
8. Fabrikkinnstilling	5
9. Tilkoblinger.....	6
Lydinngang	6
Lydutgang	6
10. Vedlikehold	6
11. Resirkulering.....	6
12. Samsvarserklæring.....	6
13. Tekniske spesifikasjoner.....	6
14. Leverandør	6
15. Feilsøking	7

1. I pakken

- Blåtanssender, (BLT-SEND3, varenr. 1864)
- Bærbar høyttaler, med innebygget blåtannmottaker (BLUNO, varenr. 1865)
- Mini-jack kabel
- Optisk kabel
- Phono kabel
- Mini-jack til 2 x phono kabel
- Strømforsyning til BLT-SEND3 med tilhørende USB kabel
- Strømforsyning til BLUNO

2. Senderen

Blåtanssenderoverfører lyd trådløst til blåtannmottakere. Den er kompatibel med optisk, koaksial, RCA og AUX lydutganger. Blåtanssender har to «kanaler», for tilkobling av to blåtannmottakere (1) og (2). Nærlydshøyttaleren leveres som standard ferdig tilkoblet (1). Senderen benytter en strømforsyning, som plugges inn i USB kontakten (7) på baksiden av senderen.

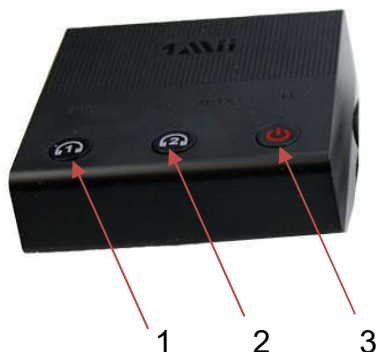

1. Blåtann tilkoblingsknapp
2. Blåtann tilkoblingsknapp
3. AV/PÅ-knapp





4. Digital Toslink lydinngang
5. Digital coaxial lydinngang
6. Analog mini-jack lydinngang.
7. USB strømtilkobling.

3. Tilkoblingskabler

Medfølger i esken:

- Mini-jack kabel: for analoge lydutganger, som f.eks hodetelefonutgang. Tilkobles (6).
- Mini-jack til 2 x phono kabel: for analoge lydutganger med phonokontakter. Tilkobles (6)
- Optisk kabel: for digitale TOS link lydutganger. Tilkobles (4).
- Phono kabel: for digitale COAX lydutganger. Tilkobles (5).

4. Nærlydhøytaleren

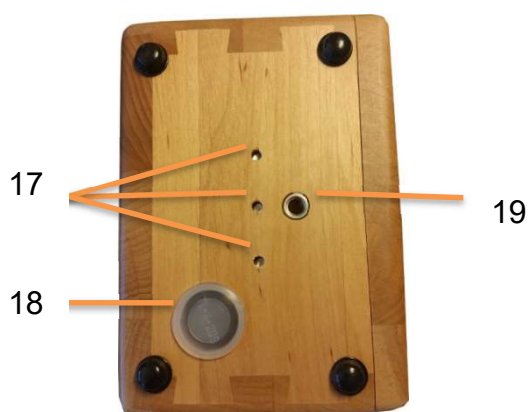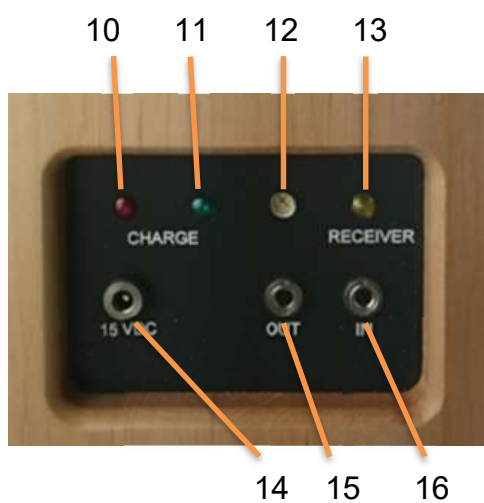

- 8. PÅ/AV og volumkontrol
- 9. Grønt lys = PÅ
- 10. Lading pågår
- 11. Batteri oppladet
- 12. Justering av signalnivå på OUT linjeutgang (15)
- 13. Ikke i bruk
- 14. Ladekontakt 15VDC (+ på senter)
- 15. Linje ut (stereo jack)
- 16. Linje inn (stereo jack)
- 17. Feste for stativ (1/4" UNC)
- 18. Ikke i bruk
- 19. Ladekontakter for ladestasjon (tilbehør).
- 20. Blåtann tilkoblingsknapp. (Under proppen.)

5. Bruksveiledning

1. Koble Blåtannsender til lydutgangen på enheten den skal strømme fra med en av kablene.
2. Koble strømkabelen til Blåtannsender (7).
3. Finn egnet plassering for nærlydshøytaleren og koble den til strøm (14).
4. NÆRLYD2 fungerer «rett ut av boksen» – blåtannsenderen og nærlyd-høytaleren leveres ferdig sammenkoblet.
5. Senderen slås på/av med-bryteren (3) på toppen.
6. Slå på nærlydhøytaleren med (8)
7. Juster lydnivået på høytaleren med volumkontrollen (8).

Senderen bør være avslått når den ikke er i bruk.

6. Sammenkobling

Følg disse punktene dersom du må sammenkoble på nytt, eller om du skal sammenkoble med en annen blåtannmottaker.

1. Hold enhetene som skal tilkobles i nærheten av hverandre (ca. 1 meters avstand).
2. Sett den ledige blåtann-tilkoblingsknappen i tilkoblingsmodus ved å trykke knappen (2). (Knapp (1) er forbeholdt tilkobling av nærlydhøytaleren.) LED lampen blinker vekselvis blått/rødt.
3. Sett blåtannmottakeren (hodetelefoner e.l.) i tilkoblingsmodus.
4. Vent noen sekunder til sammenkoblingen er utført. Sammenkoblingen bekreftes ved at LED lampen lyser fast blått.

7. Lydinnstillinger på Blåtannsender

Senderen er på forhånd innstilt til å overføre lyd med lavest mulig tidsforsinkelse (LL).

Dette skal IKKE endres.

Hvis du merker sjenerende tidsforsinkelse kan du trykke på/av knappen (3) to ganger for å slå HD-lyd på eller av.

8. Fabrikkinnstilling

Dersom du opplever feil, og at enhetene ikke fungerer, kan du nullstille blåtann-sammenkoblingen, og utføre ny sammenkobling.

Hold knappene (1) og (2) samtidig i ca. 5 sekunder. Alle led lamper blinker 1 gang for å bekrefte at alle blåtann-sammenkoblinger er nullstilt.

Senderen settes automatisk i tilkoplingsmodus. Led lampen blinker vekselvis blått/rødt.

Sammenkoble enhetene på nytt, som beskrevet i kapittel 6. Bruk knapp (1) til nærlydshøytaleren.

Ta ut proppen (20) på nærlyd-høytaleren. Bruk en butt penn og trykk tilkoblingsknappen på nærlydhøytaleren for å koble den til blåtannsenderen.

9. Tilkoblinger

Lydinngang

UNO har en kontakt (16) for tilkobling av eksterne lydtkilder, som f.eks. mobiltelefon, TV, PC o.l. Du kan benytte 3-polet mini-jack plugg.

Lydutgang

Lydutgangen (15) er justert til standard linjenivå fra fabrikken. Hvis linjenivået er for kraftig for den enheten du kobler til, kan nivået justeres ved å vri på kontrollen (12). Bruk en liten skrutrekker.

10. Vedlikehold

Høytaleren og senderen kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

Lagring når ikke i bruk
Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

11. Resirkulering

Produkter og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktene kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

12. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

13. Tekniske spesifikasjoner

Blåtann Sender:

Tilgjengelige profiler: A2DP, AVRCP
Audio kodek: aptX, aptX-HD, aptX-LL, SBC

Rekkevidde innendørs: ca. 30 m fri sikt

Strøm: Micro USB DC5V 500mA

Størrelse: 111x100x32 mm

Vekt: 126g

Nærlydshøytaler:

Dim (HxBxD): 188x132x96 mm

Vekt: 1,5 Kg

Ladetid: 6 timer

Brukstid: 13 timer

Strømforbruk: 300mA, 15 VDC

Frekvensområde: 125-16000 Hz

Uteffekt (max): 7W

14. Leverandør

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord
Tel. 3347 3347
Epost: post@vestfoldaudio.no

15. Feilsøking

Problem	Feilretting
Ikke lys i av/på knapp på BLUNO Nærlydhøytaler	Lad opp batteriet.
Ikke lys i lampen på BLT-SEND3 senderen.	Er senderen slått på? Kontroller at strømmen er riktig tilkoblet.
Ingen lyd i høyttaleren	Skru opp volumet for sterkere signal i høyttaleren. Er senderen riktig tilkoblet lydkilden og er det signal på lydutgangen?
Får ikke sammenkoblet ny blåtann-enhet	Er senderen og mottaker i nærheten av hverandre (ca. 1 meter)? Er både senderen og mottaker i tilkoblingsmodus.



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

