

Knop RX 901B Mottager
Bruker- og vedlikeholds veiledning



DENNE BRUKERVEILEDNING GJELDER FOR SOFTWARE VERSJON 3.3.X

KNOP
Brukerveiledning for



RX901B



Mottager Knop RX901B

HMS art. nr.:

Best. nr.: 2220050

KNOP ELEKTRONIK A/S

Fabriksvej 20 ● 7600 Struer ● Mail: knop@knop.dk ● Web: www.knop.dk ● Tlf.: 9784 0444 ● Fax.: 9784 0666

Innholdsfortegnelse

Tilsiktet anvendelse	3
Ta i bruk	4
Startskjerm	5
Mottak av alarm	6
Nød anrop	7
Batterialarm	8
Hovedmeny	9
Hovedmeny – Seneste anrop	10
Hovedmeny – Slå av (dvale)	11
Hovedmeny – Gruppevalg.....	12
Hovedmeny - Vibrator.....	13
Hovedmeny - Lyd.....	14
Hovedmeny - Innstillinger	15
Hovedmeny - Innstillinger - Klienter	16
Hovedmeny - Innstillinger – Grupper.....	33
Hovedmeny - Innstillinger – Innstill Klokke	37
Hovedmeny - Innstillinger – Tastelyd.....	39
Hovedmeny - Innstillinger – Navn.....	40
Hovedmeny - Innstillinger – Adgangskode.....	41
Hovedmeny - Innstillinger – Utgående	42
Hovedmeny - Innstillinger – System meny.....	43
Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner.....	45
Hovedmeny - Innstillinger – Språk.....	51
Hovedmeny – Innstillinger – Slå av	52
Vedlikehold	53
Oppdatering av RX901B	53
Rengjøring	53
Avhending	53
Kontroll av dekningsområde	53
Tilbehør	53
Tekniske data RX901B:.....	54

Tilsiktet anvendelse

RX901B er en mottager, som er designet til å fungere sammen med trådløse enheter i KNOP's 90X-serie. Enheten kan bæres i lommen eller i en snor om halsen.

Det kan programmeres 250 sendere, som man kan tildele et navn etter eget valg.

De siste 50 anrop lagres i en liste, hvor man kan se tidspunktet for anropet, samt hvor anropet har kommet fra, og om den er kvitteret.

Med en RX901B er det f.eks. mulig, å skille klienter (beboerne) på et hjem i grupper, f.eks. i forbindelse med vaktplaner, hvor en nattevagt f.eks. skal ta hånd om flere klienter enn dagvakten.

RX901B er med posisjonsleser, så kan anvende i KNOP's posisjonssystem.

Det er med RX901B mulig å foreta et nødanrop til en anden kollega med et enkelt trykk.

Betjeningen er meny basert i en grafisk skjerm og betjenes på tastaturet.

RX901B er med oppladbart batteri og trådløs Lading.

Produktet er vanntett (IP65).

Ta i bruk

Det anbefales, at RX901B lades til 100 %, før bruk.

Den medfølgende trådløse laderen tilsluttes adapteren via USB kablet.

RX901B legges på ladeplaten og displayet på RX901B tennes og viser batteriets lading i prosent.

Hvis enheten er helt utladet, kan som gå opp til 5 minutter, før displayet lyser opp.

Pakkens innhold:




RX901B på laderen:



Første gang produktet slås på, skal det ønsket språk velges.



Trykk   for å flytte den grønne pil til ønsket språk.

Trykk  for å velge språket.

Startskjerm

Første gang enheten skal slås på etter utpaking, skal den legges på laderen.

Når RX901B ikke ligger på laderen, slukker skjermen ca. 10 sekunder etter siste betjening.




Ved trykk på en av tastene lyser displayet, klokke og dato vises.

Øverste vises navnet på brukeren, hvis denne er lagt inn.





Betydning av symbolerne i statuslinjen:



Batteritilstand:

-  Batteri ok.
-  Lading anbefales.
-  Batteriet er nesten tomt, skal lades snarest.





Alarmlyd:


-  Alarmlyd er slått på.
-  Alarmlyd er slått av.

Vibrator:

-  Vibrator er slått på.
-  Vibrator er slått av.

System – vises kun hvis system er tilkoblet:

-  Systemet er tilkoppelt.
-  Forbindelse til systemet.
-  Systemsignal utfall.
-  Systemsignal mangler.

Trykk  for se anropslisten.

Mottak av alarm

Når mottageren mottar en alarm fra en innkodet sender, vises navn, type samt tidspunkt for anropet samt eventuelt posisjon.



Navnet på klienten.

Valgfri på klienten.

Produktet eller en programmert tekst som har sendt alarmen.

Posisjonen på avsender produktet .

Alarm typen.

De enkelte tekster vises kun, hvis de er programmert eller kjent.

Trykk **Ent** for å bekrefte alarmen.

Trykk **Esc** for å avvise.

Merk: I "standalone" systemer håndteres alarmanropet likt, uansett om anropet aksepteres eller avvises fremfor som i KNOP's repeater system, hvor alarmen viderestilles automatisk til andre mottagere.

Såfremt alarmen er ubesvart, vil det komme korte pipelyder ca. hvert 5. minutt.

Når det mottas en beskjed fra en sender, som f.eks. har dårlig batteri vises nedenstående beskjed.



Trykk **Ent** for å bekrefte alarmen.

Note: "Siste anrop" vil man kunne se beskjed "Lavt batteri" for senderen, som trenger nytt batteri.

Nød anrop

Det er mulig, å sende et nød anrop (eller alarm) fra mottageren til f.eks. andre bruker til å indikere ” jeg trenger hjelp” hos en klient eller som overfallsalarm.

Nød anropet aktiveres ved å trykke på KNOP logoen.




Når nød anropet sendes, vibrerer mottageren en gang, og når nød anropet er mottatt hos en annen bruker, vibrerer den 3 gange.

Nødkald	Nødkald	Nødkald
Sender nødkald!	Sender nødkald!	Sender nødkald!
	Fejl!	OK

Batterialarm

Mottagerens indikerer batterier status på skjermen samt ved lavt batteri med lyd indikereringer.

Batteritilstand:

-  Batteri ok.
-  Lading anbefales.
-  Batteriet er nesten tomt, skal lades snarest.

Skifter symbolet til rødt, bør man straks legge enheten på laderen.

Samtidig kommer det et par korte pipe-lyder ca. hver 5. minutt, som indikerer lav batteri, samtidig med at følgende skerm vises:




Hovedmeny


Ved å trykke på  og  samtidig, enten ved slukket skjerm eller i startskjermen, vises hovedmenyen.


Den grønne pil i venstre side viser hvilken linje i menyen, som kan velges.

Hovedmenu	Hovedmenu
→ Seneste kald	← Sluk (dvale)
Sluk (dvale)	Gruppevalg
Gruppevalg	Vibrator: Til
Vibrator: Til	Lyd: Høj
↓ Lyd: Høj	→ Indstillinger

Betjening:

Trykk  for å flytte den grønne pilen enten opp eller til høyre i menyen.

Trykk  for å flytte den grønne pilen enten ned eller til venstre i menyen.

Trykk  for å forlate menyen.

Trykk  for å velge meny punktet hvor den grønne pilen står ved.

Merk: Etter ca. 15 sekunders inaktivitet forlates menyen automatisk.

Hovedmeny – Seneste anrop



Velg i hovedmenyen punktet "Seneste anrop". Sett den grønne pilen på meny-punktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



I listen kan det vises opp til de 50 siste anropene med den nyeste øverst.



Betyr at anropet ble aksepterte.

Betyr at anropet ble avvist.

Betyr at anropet ikke ble besvart.

Trykk **Ent** for å se ytterligere informasjon om klienten.



Trykk **↓** **↑** for å bla imellom andre alarmopene.

Trykk **Ent** for å se ytterligere informasjoner.

Trykk **Esc** for å gå tilbake til den forrige menyen.

Ønskes oppkallslisten slettet, sett den grønne pilen på meny-punktet "Slett alle" og trykk **Ent**.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Hovedmeny – Slå av (dvale)



Velg i hovedmenyen punktet " Slå av (dvale)". Sett den grønne pilen på meny-punktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

RX901B mottageren slås på enten ved å trykke på en av tastene eller ved å legge enheten på laderen. Ønskes mottageren slukket helt, kan dette gjøres i meny-punktet " Innstillinger ➔ Sluk".

Dvale kan benyttes, hvis man er i møte, pause eller lignede mottas som ikke oppkall.

Dvale bruker mere strøm enn slå av funksjonen.

Hovedmeny – Gruppevalg

Grupper anvendes f.eks. i forbindelse med vaktplaner i løpet av døgnet, hvor en nattevagt f.eks. har flere grupper å ta hånd om enn en dagvakt.



Velg i hovedmenyen punktet ”Gruppevalg”. Sett den grønne pilen på meny-punktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å legge til eller fjerne gruppe.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Trykk **↓** **↑** for å flytte pilen til gruppen som ønskes endret.

1 Gruppe valgt.

1 Gruppe ikke valgt.

Programmering av de enkelte gruppe/gruppetekster foretas i menyen ”Innstillinger ➔ Gruppe” og ”Innstillinger ➔ Klient”.

Det er praktisk å navngi gruppen.

Hovedmeny - Vibrator



Velg i hovedmenyen punktet "Vibrator". Sett den grønne pilen på meny-punktet og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å legge til eller fjerne vibrator funksjon.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Vibrator funksjon gjør, at produktet vibrerer, når en alarm mottas.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Lyd



Velg i hovedmenyen punktet "Lyd". Sett den grønne pilen på meny-punktet og trykk **Ent**.

Trykk **Ent** for å velge imellom høy, lav eller slå av lyd, ved alarmmottak.



Trykk **↑** for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk **↓** for å flytte den grønne pilen ned menyen.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Trykk **Ent** for å endre lyden.

Som lagres automatisk.


Hovedmeny - Innstillinger



Velg i hovedmenyen punktet "Innstillinger". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**.
Innstillingsmenyen vises nu:



Som vises software version og ID i de to første linjer, disse kan ikke endres.

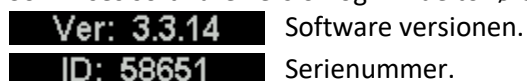

Trykk **↑** for å flytte den grønne pil opp menyen.

Trykk **↓** for å flytte den grønne pil ned menyen.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger - Klienter

Klienter er f.eks. beboer eller anden personale som har en sender eller flere sendere som man ønsker å motta alarm anrop fra.





Velg i menyen punktet "Klienter". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**. Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Klienter menyen vises nå:



Listen viser de innkodet klienter, som kan blas imellom dem med piltastene.

Trykk  for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk  for å flytte den grønne pilen ned menyen.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – Tilføy klient



Velg i menyen punktet "Tilføy klient". Sett den grønne pilen på meny punktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Inntast et navn på den nye klient, her vises "Andersen".

Trykk **↑** for å flytte den grønne pilen til bokstav til venstre.

Trykk **↓** for å flytte den grønne pilen til bokstav til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstaven.

Trykk **Esc** for å slette det siste bokstav.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.



For å lagre navnet velges symbolet ♦ og trykk **Ent**.

Det er nå mulig å taste inn en tekst til klienten, det kan f.eks. være "Stue 10". Teksten er valgfri.



For å lagre navnet velges symbolet ♦ og trykk **Ent**.


Hvis ingen tekst ønskes, velg symbolet ♦ og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn:


Endring av klientens innstillinger og innkodet senderer gjøres ved velge klientens navn i menyen.



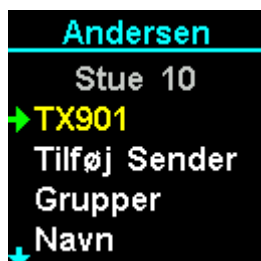

I dette eksempel, velg i menyen punktet "Andersen". Sett den grønne pilen på meny punktet og trykk **Ent**.



Klienten
Klienten valgfri tekst
Et produkt allerede innkodet.

Trykk  for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk  for å flytte den grønne pilen ned menyen.

Trykk  for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Tilføy sender

Tilføy ny sender til klienten.



Velg i menyen punktet "Tilføy Sender". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**.



Aktivere nå den ønskede sender.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Hvis senderen allerede er innkodet vises nedstående meny, som gjør det mulig å flytte en sender imellom klienter.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Ved bekreftelse fortsettes automatisk til menypunktet.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Grupper

Grupper anvendes f.eks. i forbindelse med vaktplaner igjennom døgnet slik at en nattevagt f.eks. har flere grupper og servicer enn en dagvakt.

Tilføy klient til de ønskede gruppe(r). Ved ny innkodning er alle grupper er automatisk valgt bort.



Velg i menyen punktet "Grupper". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å legge til eller fjerne gruppen.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Trykk **↓** **↑** for å flytte pilen til gruppen som ønskes endret.

1 Gruppe valgt.


1 Gruppe ikke valgt.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – Klientnavn – Navn

Endring av klientens navn.



Velg i menyen punktet "Navn". Sett den grønne pilen på menyunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

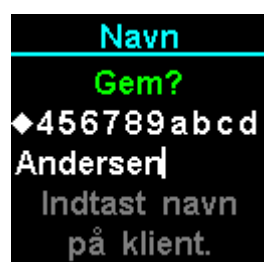

Inntast et navn på klienten, her vises "Andersen".

Trykk **←** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **→** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstaven.

Trykk **Esc** for å slette den siste bokstav.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

For å lagre navnet velges symbolet **◆** og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – Klientnavn – Tekst

Ændring af klientens navn.



Velg i menyen punktet "Tekst". Sæt den grønne pil på menupunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Inntast et navn på klienten, her vises " JENSEN".

Trykk **←** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **→** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstaven.

Trykk **Esc** for å slette det siste bokstav.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

For å lagre navnet velges symbolet **◆** og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – Klientnavn – Slet klient

Slett klienten, hvis klienten slettes, slettes også de innkodete sendere på tilhørende klienten.




Velg i menyen punktet "Slett klient". Sett den grønne pilen på meny punktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Sender

Endring av innstillinger på den innkodet sender.

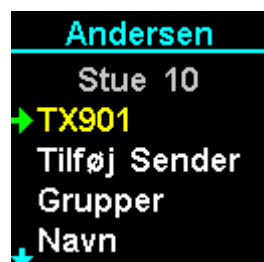



Velg i dette eksempel menyenpunktet "TX901" og en grønne pilen på menyenpunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



De første linjer viser informasjon om senderen:

TX901	Senderens produktnavn.
ID: 60372	Senderens ID
Ver.: 1.0	Senderens software versjon.
Signaltone 1	Den valgt signaltone, når senderen mottas.

Trykk  for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk  for å flytte den grønne pilen ned menyen.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Sender – Tekst

Endring av produktets tekst, som vises på informasjons skjærmen ved alarmmottak. Som standard er det lagret Knops produktnavn f.eks. TX901.



Velg meny-punktet "Tekst" og en grønne pilen på meny-punktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Inntast et produktnavn f.eks." Håndsender".

Trykk **↑** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **↓** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstaven.

Trykk **Esc** for å slette det siste bokstav.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

For å lagre teksten velges symbolet ♦ og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Sender – Endre signal

Endring av signaltonen ved alarmanrop. Som standard er valgt signaltone 1.



Velg meny punkt "Signaltone". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Velg en ny signaltone ved å flytte pilen, den nye signaltone avspilles ved flytning.

Trykk **↓** **↑** for å velge ny signaltone.

Trykk **Ent** for å velge signaltonen.

Trykk **Esc** for å forlate meny.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Sender – Anropstekster

Det er mulig å endre anropsteksten som blir vist ved alarmmottak. Anropsteksten viser hvilken alarm som er sendt fra den gjeldende sender. Antallet anropstekster varierer alt etter produktet som er lagret.



Velg meny-punktet "Anropstekster". Sett den grønne pilen på meny-punktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Nedenstående eksempel viser en TX901.



Trykk **Ent** for å den ønskede tekst.

Trykk **↓** **↑** for å velge anropsteksten som ønskes endret.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Note: Det er mulig via KNOPtool å lage brukerdefinerte tekster og endre tekster.

Note: Eldre produkter i 900-serien har begrenset funksjonalitet.

Note: Endres teksten når mottageren er en del av et KNOP repeatersystem endres teksten for alle mottakere.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Sender – Anropstekster – Nullstill

Nullstill tekster setter alle endringer av anropstekster tilbake til fabriksinnstillinger.



Velg meny punkt "Anropstekster". Sett den grønne pila på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Nedenstående eksempel viser en TX901.



Velg meny punkt "Nullstill tekster". Sett den grønne pila på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Note: Endres teksten når mottageren er en del av et KNOP repeatersystem endres teksten for alle mottakere.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Sender – Anrop: Normal

Alle alarmopanrop fra denne klient behandles på nødanrop. Som standard er valgt normal. Produkter med nødopanrop tilvalgt i KNOP logoet blir alltid sendt som nødanrop.

Ændre tekst	Ændre tekst
↑ Tekst	↑ Tekst
Alarm signal	Alarm signal
Kaldstekster	Kaldstekster
→ Kald: Normal	→ Kald: Alle
↓ Tidsstyret	↓ Tidsstyret

Trykk **Ent** for å skifte imellom ” Normal” og ” Nød!”.

Trykk **Esc** for å forlate meny.

Forskjellen imellom normal og nød anrop er å nød anrop kommer før eventuelt andre anrop. I KNOP's repeater system sendes et nød anrop til alle mottager i motsetning til et normal anrop som videresendes imellom de enkelte mottager alt etter innstillingene.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Sender – Tidsstyrt

Tidsstyring av senderen.

Det er mulig å til- og frakoble senderen i to forskjellige tidsrom. Som standard er funksjonen frakoplet.



Velg menyunktet "Tidsstyring". Sett den grønne pilen på menyunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å skifte imellom "Fra" og "Til".

Trykk **Esc** for å forlate meny.

Trykk **↓** **↑** for å velge imellom menypunktene.

Eksempel på innkodning av aktivt tidsrom imellom 16:00 og 8:00 (neste dag).



Velg menyunktet "Start 1". Sett den grønne pilen på menyunktet og trykk **Ent**.





Trykk **↓** **↑** for å endre timer.

Trykk **Ent** for å skifte til minutter.

Trykk **Esc** for å avbryte.

Andersen	
Tidsstyret:Til	
Start 1	16:00
Stop 1	00:00
Start 2	00:00
Stop 2	00:00

Trykk   for å endre minutter.

Trykk  for å lagre.

Trykk  for å avbryte.

Gjenta det samme for " Stop 1" menypunktet.

Andersen	
Tidsstyret:Til	
Start 1	16:00
Stop 1	08:00
→ Start 2	00:00
Stop 2	00:00

Timeren på sender som er tilknyttet i dette tilfelle " Andersen" er nå innstilt imellom 16:00 og 8:00 hver dag.

Trykk  for å avbryte.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Sender – Slett sender

Sletting til sender hos klienten.



Velg meny punkt "Slett". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Hovedmeny - Innstillinger – Grupper

I gruppemenyen kan grupperne navngis og eventuel tidsstyring kan velges. Som standard er grupperne navngivet 1 til 8 og tidsstyring av.



Velg menyunktet "Grupper". Sett den grønne pilen på menyunktet og trykk **Ent**. Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Gruppemenyen vises nå:



Trykk **↓** **↑** for å flytte den grønne pilen imellom gruppene.

Trykk **Ent** for å velge den ønskede gruppe.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Fortsettes i neste menyunkt.

Hovedmeny - Innstillinger – grupper – gruppenavn – Tidsstyrt

Automatisk innkobling av gruppen i det innprogrammeret tidsrom.



Trykk **Ent** for å skifte imellom "Fra" og "Til".

Trykk **Esc** for å forlate meny

Tips: Husk å innstille tidspunkt i menypunkt "Tid".

Hovedmeny - Innstillinger – grupper – gruppenavn – Gruppenavn

Det er mulig å endre gruppenavn som vises på informationskermen ved alarmanrop. Som standard vises f.eks. "Gruppe 1" men kunne f.eks. gjøres om til "NATTEVAKT".



Velg meny punkt "Gruppenavn". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Inntast et gruppenavn f.eks. "Dagvakt".

Trykk **↑** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **↓** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstaven.

Trykk **Esc** for å slette det siste bokstav.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

For å lagre gruppenavnet velges symbolet **◆** og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – grupper – gruppenavn – Tid

Aktiveringstidpunktet, hvis tidsstyring er aktivert, kan denne innstilles i menen "Tid".



Velg meny punkt "Tid". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **↓** **↑** for å endre timer eller minutter.

Trykk **Ent** for å skifte imellom timer og minutter.

Trykk **Esc** for å forlede meny.

Hovedmeny - Innstillinger – Innstill Klokke

Det er viktig å klokkeslett og dato er innstilt korrekt slik at tidsstyringer fungerer korrekt.



Velg meny-punktet "Innstil klokke". Sett den grønne pilen på meny-punktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **↓** **↑** for å endre årstall.

Trykk **Ent** for å akseptere.

Trykk **Esc** for å forlate meny.



Trykk **↓** **↑** for å endre måned.

Trykk **Ent** for å akseptere.

Trykk **Esc** for å forlate meny.






Trykk **↓** **↑** for å endre dagen.


Trykk **Ent** for å akseptere.

Trykk **Esc** for å forlate meny.






Trykk   for å endre timer.


Trykk  for å akseptere.

Trykk  for å forlate meny.



Trykk   for å endre minutter.

Trykk  for å akseptere.

Trykk  for å forlate meny.

Den inntastede dato og klokkeslett vises heretter kort.

Merk: Såfremt mottageren anvendes et KNOP system (MR902/RP902) oppdateres klokken automatisk i alle mottager.

Hovedmeny - Innstillinger – Tastelyd

Som kan velges imellem lav, høy eller av tastelyd ved trykk på knappene.



Trykk **Ent** for å skifte imellom "Lav", "Høy" og "Av".

Trykk **Esc** for å forlate meny.

Hovedmeny - Innstillinger – Navn

Navn på denne RX901B kan endres til et mere forståelig navn f.eks. "BIRTHE", som i dette eksempel er brukeren av denne mottager. Det er en valgfri funksjon, som kan benyttes. Som standard vises RX901B.



Velg meny punkt "Navn". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Inntast et navn i dette eksempel "Mona".

Trykk **←** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **→** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velg bokstan.

Trykk **Esc** for å slette det siste bokstav.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

For å lagre navnet velges symbolet **◆** og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – Adgangskode

For å unngå utilsiktet endring i innstillingene, kan menyen beskyttes med en adgangskode. Adgangskoden er en fire sifferet kode.

Koden "0000" betyr ingen kode!

Når det er opprettet en adgangskode, skal denne testes inn, før som gis adgang til innstillingsmeny.



Velg menypunktet "Adgangskode". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **↑** **↓** for å endre verdien (0 til 9).

Trykk **Ent** for å velge tallet.

Trykk **Esc** for å slette det sist siffer.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

Trykk **Ent** for å lagre adgangskoden.

Merk: Som kan først lagres, når alle fire siffer er valgt.

Hovedmeny - Innstillinger – Utgående

KNOP logoet på motaget kan anvendes som anrop til andre, hvis denne er innprogrammeret på deres mottagerer. Knappen kan enten sende et normalt alarmanrop, nødopanrop eller frakoblet.



Velg menyunktet "Utgående". Sett den grønne pilen på menyunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å skifte imellom "Frakoblet", "Kall: Nød!" og "Kall: Normal".
Trykk **Esc** for å forlate meny.

Hovedmeny - Innstillinger – System meny


Når mottageren er koplet til KNOP's repeater system er enhetene konstant i kontakt med hverandre. Masteren sørger for å sende den innkommende alarm til den mottager, som den mener, kan være nærmest på klienten. Besvares den ikke, videresendes alarmen. Så snart alarmen er kvitteret avbrytes alarm i eventuell andre mottagere.

System meny anvendes til å tilkoble RX901 til KNOPs repeater system MR902/RP902. Som ved å inntastet system ID'et, typisk serienummeret på masteren i system, MR902. Deretter velge system "Til".


Som standard er dette frakoblet.



Velg meny punkt "System meny". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.

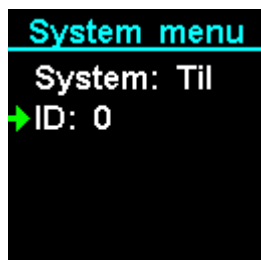



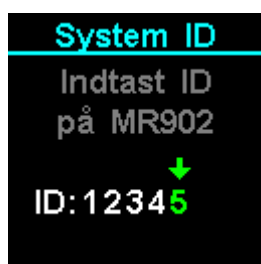

Trykk **Ent** for å skifte mellom "System: Fra" og "System: Til".
Trykk **Esc** for å forlate meny.



Velg meny punkt "ID:". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.
Trykk **↑** **↓** for å endre verdien (0 til 9).
Trykk **Ent** for å velge tallet.
Trykk **Esc** for å slette det siste siffer.
Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

På skjermens hovedside vises nå symbol som viser kvaliteten på linket til KNOP's repeater system.

Når systemet er tilkoblet vises som i start skjermen et forbindelsessymbol.

-  Systemet er tilkoplek.
-  Koplek til systemet.
-  Systemet signal utfall.
-  Systemet signal mistet.


Tips: Husk både riktig ID og tilkoble.

Info: Mister mottageren forbindelsen til systemet, f.eks. hvis man går utenfor rekkevidde, vises først et gult symbol og deretter et rødt symbol. Kortvarig etter mottageren igjen er kommet innenfor rekkevidde, forbindes mottageren automatisk igjen.

Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner

Posisjoner anvendes til å stedbestede lokaliten fra enten klient eller brukeren. Man f.eks. få en alarm hvis en dement går ut av døren. Systemet kan også brukes i forbindelse med overfall. Systemet nøyaktighet er bestemt av hvor mange posisjoner som er på systemet.

Posisjonsmeny programmeres posisjonsstave POS901 i mottageren eller i KNOP repeater systemet MR902. Posisjoner kan settes ved dør, gang, gulv, tak, utendørs kun fantasien setter begrensninger, posisjonssystem kan brukes både til klienter og bruker.

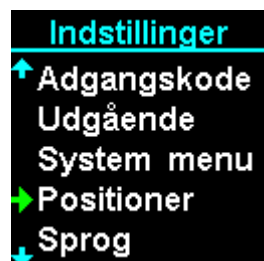

Velg meny punkt "Posisjoner". Sett den grønne pila på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Nåværende posisjon, vises hvis man er innen rekkevidde av en posisjonsstav POS901.
Allerede innkode posisjon.

Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Vis posisjon

Funktioner viser den samlede informationen omkring den nåværende posisjonen.



Velg menyunktet "Vis posisjon". Sett den grønne pilen på menyunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Hvis mottageren ikke er innenfor rekkevidde av en posisjonsstav POS901 vises " Ingen signal". Innenfor rekkevidde ses posisjonsnummeret (Pos.) i dette tilfellet 101. Er posisjonen navngitt vises denne også.

Trykk **Esc** for å forlate menyen

Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Tilføy posisjon

Funksjonen tilføyer ny posisjon.



Velg meny-punktet "Tilføy posisjon". Sett den grønne pilen på meny-punktet og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Mottageren skal være innenfor rekkevidde av posisjonsstav, POS901. Når en ny posisjon sees, kan denne tilføyes, merk det er posisjons ID på staven som vises.

Såfremt posisjonen allerede er innkodet, kan den ikke tilføyes igjen og kan naturligvis ikke tilføyes.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Trykk **Ent** for å lagre posisjonen.



Inntast et beskrivende navn i dette eksempel" Hoveddør".

Trykk **↑** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **↓** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstaven.

Trykk **Esc** for å slette det sist bokstav.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

For å lagre navnet velges symbolet **◆** og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Posisjonsnavn

Funksjonen endre navnet på en allerede innkodet position.



Velg i menyen en position f.eks. i dette tilfelde "Hoveddør". Sett den grønne pilen på "Hoveddør" og trykk **Ent**. Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Som fortsettes automatisk til menypunktet "Hovedmeny-Innstillinger-Posisjoner-Posisjonsnavn-Rett posisjon".

Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Posisjonsnavn – Navn

Rett posisjonsnavnet.



Velg meny punktet "Navn". Sett den grønne pilen på meny punktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Rett teksten i dette eksempel til "HOVEDDØR".

Trykk **←** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk **→** for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk **Ent** for å velge bokstaven.

Trykk **Esc** for å slette det siste bokstav.

Trykk **Esc** og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

For å lagre navnet velges symbolet **◆** og trykk **Ent**.

Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Posisjonsnavn – Slett

Sletter positionen.



Velg menypunktet "Slett". Sett den grønne pil på menypunktet og trykk **Ent**.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Trykk **Ent** for å slette posisjonen.


Hovedmeny - Innstillinger – Språk


Innstil det ønskede språk i mottageren RX901.



Velg menypunktet "Språk". Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk  for å flytte den grønne pilen til det ønskede språk.

Trykk  for å flytte den grønne pilen til det ønskede språk.

Trykk **Ent** for å velge språket.

Trykk **Esc** for å forlate menyen.

Hovedmeny – Innstillinger – Slå av

Funksjonen slå av for produktet og kan slås på hvis den ligger på laderen.



Velg meny punkt "Slå av". Sett den grønne pilen på meny punkt og trykk **Ent**.
Trykk **Esc** for å forlate menyen.



Trykk **Ent** for å bekrefte eller **Esc** for å avvise.

Ønskes mottageren RX901 kun i dvale, kan dette gjøres i meny punkt "Innstillinger ➔ Sluk".

Merk: Klokke og dato blir nullstilt.

Vedlikehold

Oppdatering av RX901B

Det er mulig å oppdatere softwaren i RX901B, samt downloade og uploade oppsetning med KNOPTool. For nærmere beskrivelse henvises til veiledningen for KNOPTool.

Rengjøring

Produktet kan rengjøres med en fuktig klut eller spritserviett.

Avhending

Produktet må ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall, men behandles etter kommunens anvisning for elektronikkavfall.



Kontroll av dekningsområde

En person aktiverer en sender (f.eks. TX901) med korte mellomrom, mens en annen går systematisk rundt i området og avmerker på en skisse over bygningen og området, hvor som er dekning. Skissen legges på kontoret, så alle, som skal betjene systemet, kan se, hvor som er dekning. Utenfor dekningsområdet kan som ikke motas alarmer.

Dekningsområdet kan økes ved bruk av KNOP's repeater system.

Kontakt din forhandler for nærmere opplysning.

Tilbehør

Trådløs lader og halssnor kan bestilles hos Cantec AS

Tekniske data RX901B:

Batteri:	1 stk. Li-Ion 3,7V 450 mAh
Drift tid på batteri:	Ca. 3 døgn med 50 alarmanrop pr. døgn.
Oppladning:	Trådløst, ca. 4 timer.
Frekvens:	869.2125 MHz
Rekkevidde:	Opptil 1500 m mellom 2 stk. RX901B *)
Display:	Grafisk LCD.
Meny tekster:	3 språk: Dansk, Norsk, Svensk.
Log funksjon:	Lagrer de siste 50 alarmene.
Minne:	250 sender 150 posisjonsstav POS901
Omgivelse miljø:	Innendørs bruk. <90 % fuktighet ikke kondenserende.
Omgivelse temperatur:	0-40° C
Kabinett type:	Hvid ABS
Kabinett dimensjoner:	45 x 90 x 16 mm. Inkl. halssnor med sikkerhetslås, som løser ut ved trekk.
Tetthet:	IP65
Vekt inkl. Batterier:	56g

Retten til endringer forbeholdes.

*) Målt utendørs med fri sikt mellom sender og mottager.

I bygninger, er rekkevidden redusert.

Kontrollere dekningsområdet som beskrevet i avsnittet kontroll av dekningsområde.

Dekningsområdet kan økes med en repeater fra KNOP's repeater system MR902/RP901 serie.

Cantec AS
Postboks 626
1411 Kolbotn
post@cantec.no
66996000

