



# TREX 2G

Bærbar alarmmottaker

Brukerveiledning

NE41 11005-04 V2.0

Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten varsel.

NEAT Electronics AB forbeholder seg retten til å utvikle sine produkter eller endre innholdet uten å meddele personer eller organisasjoner om slike endringer.

NEAT Electronics AB er ikke ansvarlig for data- eller inntektstap eller noen påfølgende skade. For mer informasjon, detaljer eller beskrivelser, besøk vår hjemmeside:

[www.neat-group.com](http://www.neat-group.com)

### Samsvarserklæring (DoC)

NEAT Electronics AB erklærer med dette at radioutstyret av typen TREX 2G, er i overensstemmelse med nødvendige krav i direktivet 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten angående EU-erklæringen kan lastes ned fra Internett-adressen:

[www.neat-group.com/es/en/downloads](http://www.neat-group.com/es/en/downloads)



© 2011 Legrand

Alle rettigheter forbeholdes.

Dokumentnummer: NE41 11005-04 v2.0

Revisjonsdato: 2021-04-27

NEAT Electronics AB

Varuvägen 2

SE-246 42 Löddeköpinge

Sweden

Phone: +46 (046) 707065

Fax: +46 (046) 707087

[www.neat-group.com/se](http://www.neat-group.com/se)

[infosweden@neat-group.com](mailto:infosweden@neat-group.com)

# Innhold

- 1 Delene i pakken
- 2 TREX 2G-enheten
- 3 Tastaturet
- 4 Strømkabel
  - 4.1 Lader
  - 4.2 CHARGE ladestasjon (tilbehør)
- 5 Kom i gang med TREX 2G
  - 5.1 Slå på enheten
  - 5.2 Slå av enheten
  - 5.3 Generelle funksjoner
  - 5.4 Statuslinje
  - 5.5 Stille inn dato og tid
- 6 Sender
  - 6.1 Legge til en sender
  - 6.2 Slette en sender
  - 6.3 Posisjoner
  - 6.4 Alarmmottak
  - 6.5 Flere alarmer
- 7 Assistansealarm
- 8 Andre innstillinger
  - 8.1 Lyd
  - 8.2 Vibrasjon
  - 8.3 Bakgrunnsbelysning
  - 8.4 Teknisk info
- 9 Avanserte innstillinger
  - 9.1 Mottaksmodus
  - 9.2 Konfigurasjon
  - 9.3 Frekvens
  - 9.4 Visning av alarm
  - 9.5 TREX2G Teknisk håndbok
  - 9.6 TREX 2G Programmer
- 10 Feilsøking
- 11 Viktig
  - 11.1 Sikkerhetsinfo
  - 11.2 Bruk
  - 11.3 Rengjøring
  - 11.4 Gjenvinning
- 12 Tekniske data


## 1 Delene i pakken

3	1 x TREX2G-enhet
3	1 x AC-adapter, 230 V*
4	1 x USB Miniadapter
4	1 x denne bruksanvisningen

\*Avhengig av marked selges ulike AC-adaptere.

Kontakt forhandleren hvis noen deler mangler eller er defekt


## 2 TREX 2G-enheten

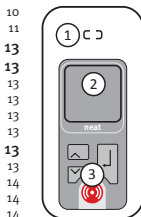

### # Betegnelse

1	Høytaler
2	Display
3	Tastatur

## 3 Tastaturet

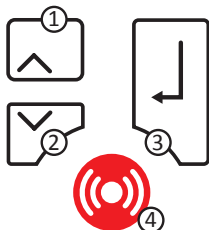

### # Betegnelse

1	Pil opp (B1)
2	Pil ned (B2)
3	Retur (B3)
4	Alarmknapp (B4)

## 4 Strømkabel



Batteriet bør lades helt opp før apparatet brukes første gang.

### 4.1 Lader

AC-adapteren kan brukes med enten Mini USB - adapteren (inkludert) eller ladestasjonen (tilbehør)

### 4.1.1 MiniUSB-adapter

Koble AC-adapteren til TREX 2G med Mini - USB-adapteren. Smekk fast MiniUSB-adapteren mot kontaktene på undersiden til den klikker på plass på forsiden (se bildet).



### 4.2 CHARGE ladestasjon (tilbehør)

Koble enhetens USB-kabel til CHARGE og enten den medfølgende AC-adapteren eller USB-porten på en datamaskin.



CHARGE støtter konfigurasjon bare i Single Kit!

Hvis TREX 2G er slått på når den er koblet til laderen, vises popup-bildet

### Lader batteri



## 5 Kom i gang med TREX 2G

### 5.1 Slå på enheten

Hold inne **B1** i 3 sekunder. Hovedskjerm-bildet vises etter oppstart.



### 5.2 Slå av enheten

Hold inne **B1** i 3 sekunder (koble fra USB-kabelen før enheten slås av).

### 5.3 Generelle funksjoner

- Naviger opp og ned i menyene ved å trykke på **B1** og **B2**.
- Gjeldende verdi/valg er uthevet i lyseblått.
- Bekreft/velg en verdi ved å trykke på **B3**
- Gå tilbake til hovedskjermen ved å velge **Avbryt** fra hovedmenyen.
- Velg **Tilbake** i en meny for å gå tilbake til forrige meny.
- Gå tilbake til hovedskjermen ved å velge **Tilbake** og holde inne **B3**.
- Popup-vindu lukkes automatisk etter 5 sekunder

## 5.4 Statuslinje



De seks ikonene i statuslinjen er fra venstre til høyre:

- Lyd på
- Vibrasjon på
- Ny alarm
- RFID aktivert
- USB tilkoblet
- Batteriet lader/batterinivå

### 5.4.1 Åpne menyene

Åpne menyene ved å trykke på **B2** i hovedskjermbildet



## 5.5 Stille inn dato og tid

Still inn dato og tid i **Hovedmeny** > **Innstillinger** > **Dato og tid**.



Angi timer og minutter ved å bla med **B1** og **B2**, og bekreft med **B3**.



Gjenta for å stille inn dato



Når dato/klokkeslett er bekreftet, vises gjeldende dato/klokkeslett.



## 6 Sender

### 6.1 Legg til en sender

Eksempel: legg til en SMILE som brukes i Rom 1.



Gå til **Hovedmeny > Programmering > Legg til sender.**

Et popup-vindu vises og ber om aktivering av senderen.



Aktiver senderen. Når en sender er mottatt, viser TRES 2G vinduet **Legg til sender**.



### 6.1.1 Velg identifikator

Velg **Rom** fra menylisten og bekræft.



Bla ned til det firesifrede feltet og skriv inn **1** i posisjonen lengst til høyre..



### 6.1.2 Velg utstyr

Velg **Alarmsender** fra menylisten med utstyr.








Bekreft ved å trykke **B3**.

Velg **Lagre** for å bekrefte senderinnstillingene eller **Avbryt** for å avbryte



Valget bekreftes.

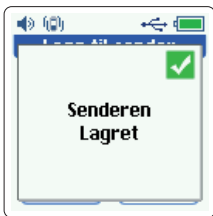

Senderen er lagret.

## 6.2 Slette en sender

Gå til Hovedmenyen > Programmering > Fjern sender.



Velg sender og trykk **B3**.



Trykk **B3** for å slette valgt sender (eller **B2** for å avbryte).



Senderen er nå slettet.



## 6.3 Posisjoner

For mer informasjon om å legge til/fjerne posisjoner, se D-POS/D-ATOM Posisjoneringsystem for teknisk håndbok, NE41 08001-02.

## 6.4 Alarmmottak

Aktivere en innlagt sender. TREX 2G piper og et popup-vindu viser alarmen.

**i** Brevsymbolet i statuslinjen viser at det finnes en ny alarm, og **1 (1)** i nedre kant viser at dette er den første av totalt 1 ny alarm

Informasjonen som vises:

- Senderen (**Rom**) og nummer (**1**).
- Utstyr (**Alarmsender**).
- Alarmårsak (**Alarm**)



Trykk **B3** for å bekrefte alarmen, lukke popup-vinduet og gå tilbake til hovedskjermen. For å se på alarmen igjen, gå inn i **Hovedmeny > Alarmliste**. Velg alarm og trykk **B3**. Alarmene vises i rekkefølgen: nyeste alarm først.



Alarmen vises, foruten brevsymbolet, og nå vises **o(o)** i nedre kant, dvs. det finnes ingen nye alarmer.



Trykk **B1/B2** eller **B3** for å gå tilbake til Alarmlisten.

**i** *Det er ikke mulig å slette alarmer fra alarmlisten!*

## 6.5 Flere alarmer

### 6.5.1 Normal modus

Hvis to eller flere alarmer mottas samtidig, viser displayet hvor mange nye alarmer som er mottatt.



Inntil alarmene bekreftes, vil TREX 2G avgi lyd og vibrere. Trykk **B2** for å dempe lyd og vibrasjon. Alarmene fortsetter å vises på skjermen.

Trykk **B3** for å vise den første/eldste alarmen i listen, som indikeres med **1(3)** (altså den første/eldste alarmen av totalt 3 nye alarmer) i nedre kant.



Trykk **B3** for å kvittere for den første/eldste alarmen og deretter vise den neste alarmen direkte i listen, indikert med **1(2)**.



For å kvittere for alarmene i rekkefølge, trykk helt enkelt ned **B3** flere ganger..

### 6.5.2 Bla gjennom alarmlisten

Hvis brukeren IKKE vil bekrefte den første/eldste alarmen i listen, bruker du pilene for å bla gjennom alarmlisten og trykker **B3** på ønsket alarm. Alle andre alarmer forblir i listen til brukeren eller en annen bruker kvitterer for det/dem.



*Det er ikke mulig å navigere i TREX 2G før alle alarmer er kvittert.*

### Loggingsmodus

I loggingsmodus vises bare den siste/nyeste alarmen i popup-vinduet. Brukeren må gå inn i **Hovedmeny** > **Alarmliste** for å kvittere for øvrige alarmer

Brevsymbolet i statuslinjen vises så lenge det finnes ikke-kvitterte alarmer i alarmlisten.

## 7 Assistansealarm

Trykk og hold **B4** inne i 3 sekunder for å sende en assistansealarm (standard er akuttalarm) til alle andre TREX 2G i systemet.

Når alarmen er sendt, vises popup-skjermen nedenfor



## 8 Andre innstillinger

### 8.1 Lyd

Juster lyden i **Hovedmeny > Innstillinger > Lydnivå**

### 8.2 Vibrasjon

Slå vibrasjon på eller av i **Hovedmeny > Innstillinger > Vibrator**.

### 8.3 Bakgrunnsbelysning

Slå på eller av bakgrunnsbelysningen på displayet og endre tidsparameterne i **Hovedmeny > Innstillinger > Belysning**.

**i** Ved å velge **Alltid** på reduseres standbytiden i batteridrift betydelig.

### 8.4 Teknisk info

Viser teknisk informasjon om TREX 2G.

## 9 Avanserte innstillinger

Disse innstillingene forklares mer inngående i TREX 2G Teknisk håndbok.

### 9.1 Mottaksmodus

Bestemmer om TREX 2G skal ta imot alarm fra:

- Programmerte sendere (standard)
- Alle sendere

## 9.2 Konfigurasjon

Velg om TREX 2G er alene i et system.

- En TREX 2G
- Mange TREX 2G (standard)

## 9.3 Frekvens

Velg hvilken frekvens TREX 2G skal jobbe i.

## 9.4 Visning av alarm

Velg om alarmer skal vises i

- Normal modus (standard)
- Loggingsmodus

## 9.5 TREX 2G Teknisk håndbok

TREX 2G Teknisk håndbok, NE41 11004-01, beskriver funksjonene mer detaljert og også hvordan man bruker programmet TREX 2G Programmer.

## 9.6 TREX 2G Programmer

TREX 2G Programmer er et kraftig verktøy for å konfigurere og skreddersy en TREX 2G. Alle parametere og verdier for TREX 2G kan fastslås med denne programvaren.

Programmet kan lastes ned fra vår hjemmeside. Kontakt forhandleren for mer informasjon.

## 10 Feilsøking

### Q: TREX 2G starter ikke

A: Er batteriet fulladet?

A: Er TREX 2G tilkoblet via USB til PC? Hvis ja, koble fra og prøv igjen.

### Q: TREX 2G reagerer ikke på alarmer fra innlagte sendere

A: Er senderen riktig lagt inn i TREX 2G? Se “Legge til en sender”

## 11 Viktig

### 11.1 Sikkerhetsinfo

- Les instruksjonene før bruk
- Test alltid systemet før bruk, og test alltid produktet etter justeringer. Produktet passer ikke alltid for alle brukere.
- Produktet skal ikke brukes som erstatning for pleierens rutinemessige overvåkningsrutiner, og skal ikke brukes i situasjoner der det kan medføre en potensielt dødelig omstendighet.
- Enhetene våre er IKKE beregnet på livsoppretholdende utstyr, der en eventuell teknisk feil kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.
- Kontroller enheten regelmessig og erstatt den om nødvendig.
- Integrer ikke med andre systemer enn det som er angitt i denne dokumentasjonen.
- Produktet forårsaker ikke elektromagnetisk stråling under normale forhold.
- Produktet kan plasseres i nærheten av andre produkter eller enheter så lenge vibrasjoner unngås.
- Ta batteriene ut av enheten hvis den ikke skal brukes eller oppbevares over lengre tid

### 11.2 Bruk

- Bruk bare originaldeler.
- Holdes borte fra støv, fuktighet og smuss.
- Kast, bank, vri eller rist ikke produktet.
- Apparatet må ikke varmes opp eller brukes nær åpen ild.
- Kontakt en NEAT-forhandler for reparasjon.

### 11.3 Rengjøring

- Alle delene i produktpakken kan rengjøres med mildt såpevann på en lett fuktet klut. Etttertørk med en tørr klut.
- Sterke kjemikalier, alkohol, fett eller andre skarpe stoffer skal ikke brukes ved rengjøring eller håndtering av delene i produktet.
- Produktet må kobles fra strømuttaket før rengjøring.
- Etter rengjøring må du kontrollere at produktet fungerer som det skal ved å foreta en testalarm til alarmsentralen.

### 11.4 Gjenvinning

Når produktet er ferdigbrukt, vennligst returner det til de gjenvinningsstasjonene som er ment for formålet. For informasjon om hvordan du kasserer eller gjenvinner produktet, ta kontakt med lokale myndigheter eller Electronics Industries Alliance (EIA, [www.eiae.org](http://www.eiae.org)). I EU betyr dette symbolet med søppelbøtten at produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. Det skal deponeres ved passende resirkuleringsanlegg eller returneres til forhandleren.

## 12 Tekniske data

Mål (B x H x D)	48 x 100 x 21 mm
Vekt	Ca. 60 g, inkl. batteri
Batteritype	Li-Po, 600 mAh
Standby-tid	Ca. 8 dager
Temp. område	+5 - +55 °C
Radiofrekvens	869.2 (sosiale alarmer, kategori I)
Sendereffektmax	10 mW (EIRP)