

Berøringsfri sender

IRHÅND-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	<u>3</u>
Batteriet	3
<u>2. Oversikt</u>	<u>3</u>
Utvendig	3
<u>3. Komme i gang</u>	<u>4</u>
Sammenkoble enheter	4
Sammenkoble første gang	4
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	4
Sammenkobling mislykkes	4
Avbryte sammenkobling	5
Nullstille sammenkoblingen	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Bytte/sette inn batteri	6
<u>4. I bruk</u>	<u>6</u>
<u>5. Strømsparing</u>	<u>6</u>
<u>6. Viktig informasjon</u>	<u>7</u>
Bruksbegrensninger:	7
<u>7. Resirkulering</u>	<u>7</u>
<u>8. Tekniske data</u>	<u>7</u>
<u>9. Samsvarserklæring</u>	<u>7</u>
<u>10. Feilsøking</u>	<u>8</u>

1. Innledning

Berøringsfri sensor med sender IRHÅND-L er et produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den benyttes for å varsle til FlexiBlink LIFE mottakere at brukeren trenger assistanse.

FlexiBlink LIFE er et trådløst varslingsystem med sendere og mottakere. Systemet kan brukes til de fleste varslingsoppgaver innen en bolig eller på en arbeidsplass, og systemet er enkelt å sette opp.

IRHÅND-L har innebygget en bevegelsessensor. Denne aktiveres ved at en hånd beveges foran øyet til sensoren.

IRHÅND-L benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Dette er montert i boksen. Batteriet må ikke lades opp.



2. Oversikt

Utvendig



- ① Berøringsfri sensor med lysindikator

Figur 1 Framside



- ② Plass til borrelås-tape
- ③ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ④ LIFE-knapp (Sammenkobling)
- ⑤ Lysindikator

Figur 2 Bakside /m åpent lokk



- ⑥ Feste for IRHÅND-L
- ⑦ Skruehull for festebrakett

Figur 3 Festebrakett

3. Komme i gang


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


Den finnes under lokket bak på IRHÅND-L. Se figur 2 på forrige side.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

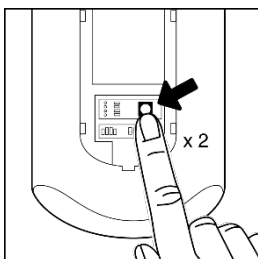

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

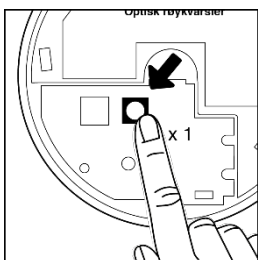

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

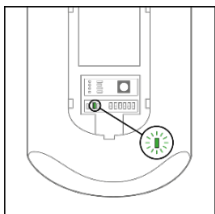

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

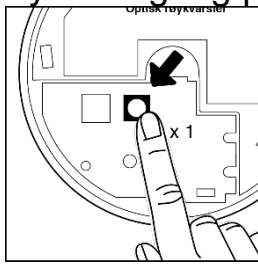

Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

Velg funksjon (ID-velger)

IRHÅND-L kan sende tilpassede Assistanse ønskes-meldinger.

Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

ID	Varsler om
0	Assistanse ønskes
1	Assistanse ønskes - soverom
2	Assistanse ønskes - bad
3	Assistanse ønskes - stue
4	Hjelp meg nå!
5	Hjelp meg nå!- soverom
6	Hjelp meg nå!- bad
7	Hjelp meg nå!- stue
8	Dørsignal
9	Barnet har stått opp
A	Kom snart
B	Assistanse ønskes
C	Sykesignal
D	Sykesignal 2
E	
F	

Montering

IRHÅND-L monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelåstapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med festebraketten til veggen.

NB! Senderen kan i noen tilfeller aktiveres ved raske lysforandringer. Unngå helst å plassere den slik at sollys eller kraftige lamper, og refleksjoner fra disse, kan treffe den direkte.



Tips

Test senderen ved å dra hånden foran enheten for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.

Bytte/sette inn batteri

Åpne boksen ved å skru ut de fire skruene på baklokket. Batteriet kobles inn i kontakten her.

Legg inn batteriet.

Ved tilkobling av batteri kan senderen blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for langtids bruk.



Figur 4 Batterikonnektor

Lukk boksen og skru inn de fire skruene før montering av IRHÅND-L.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende rødt/grønt</i>	Bytt batteri
<i>Oransje blink</i>	Mikrofonen oppfatter lyd

5. Strømsparing

For å spare batteriet bør IRHÅND-L slås av om den ikke skal være i bruk i en periode. Dette gjøres ved å nullstille sammenkoblingen (se kap.3 «Nullstille sammenkoblingen»). Da skrur sensoren av og enheten går i strømsparemodus.

6. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

7. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrus fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne det sorte lokket bak.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

8. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm

Vekt m/ batteri: 140 g

Batteri: Litium 3 V

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettsadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i mottakere	IRHÅND-L får ikke signal fra kilden/ lyser ikke grønt	Trykk på Test-knappen og se om varselet kommer fram.
	Batteriet i IRHÅND -L er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	IRHÅND -L mangler batteri	Sett inn batteri.
	Avstanden mellom IRHÅND-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
Etter aktivering, lyser senderen rødt	Enheten er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
Etter aktivering, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Det varsles med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skrue funksjonsvelgeren til riktig posisjon (se tabell s. 5).
Det blinker rødt/grønt i IRHÅND-L	Batteriet i IRHÅND-L er snart tomt.	Bytt batteri
IRHÅND-L aktiveres av seg selv.	Raske endringer/flikring i lysforhold fra sollys eller kraftige led lamper/lamper med dimmer.	Plasser senderen slik at den blir mer skjermet for direkte lys.



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

