

Mottaker m/ signalutgang

FBUT-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|----------|
| 1. Innledning | 3 |
| 2. Oversikt | 3 |
| Utvendig | 3 |
| Under lokket | 4 |
| Batteriet | 4 |
| Batterieliminatør | 4 |
| 3. Komme i gang | 4 |
| Sette inn batteriet | 4 |
| Sammenkoble enheter | 4 |
| Sammenkoble første gang | 5 |
| Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system | 5 |
| Sammenkobling mislykkes | 5 |
| Avbryte sammenkobling | 5 |
| Montering | 6 |
| 4. Signalutgangen | 6 |
| Trigging av utgangen | 6 |
| Tidsforsinkelse (holdetid) | 6 |
| 5. Viktig informasjon | 7 |
| Bruksbegrensninger: | 7 |
| 6. Tekniske data | 7 |
| 7. Resirkulering | 7 |
| 8. Sikkerhet | 7 |
| 9. Samsvarserklæring | 7 |
| 10. Feilsøking | 8 |

1. Innledning

FBUT-L er en mottaker/varsler som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink LIFE detektorer/ sendere montert i boligen din. FlexiBlink LIFE benyttes for å varsle om alvorlige hendelser som brannalarm og komfyrvakt så vel som daglige hendelser som dørklokke, telefon og andre relevante hendelser.

FBUT-L vil indikere varslingen ved å aktivere/lukke sluttekontakten (relé-utgang). Standard oppsett gir utgangssignal når FBUT-L mottar en FlexiBlink LIFE-melding.

Dersom du ønsker, kan du ved hjelp av en IRIS-L, sette FBUT-L til kun å reagere ved enkelte typer meldinger.

FBUT-L benytter vanligvis batterieliminatør og et spesialbatteri. Spesialbatteriet vil fungere som en backup ved et eventuelt strømbrudd.


2. Oversikt

Utvendig



Figur 1 Framside


Figur 2 Bakside

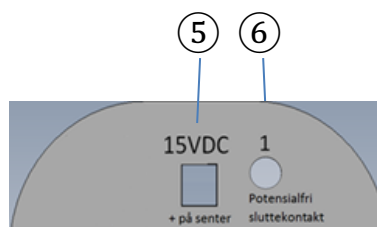

Figur 3 Bunn med 3,5mm jack-tilkobling og strømkontakt

- ① Lysindikator
- ② Lokk
- ③ Borrelås-tape
- ④ Hull for skruefeste
- ⑤ Tilkobling av medfølgende strømforsyning/ batterieliminatør.
- ⑥ Signalutgang for varsling til tredjeparts utstyr

Under lokket

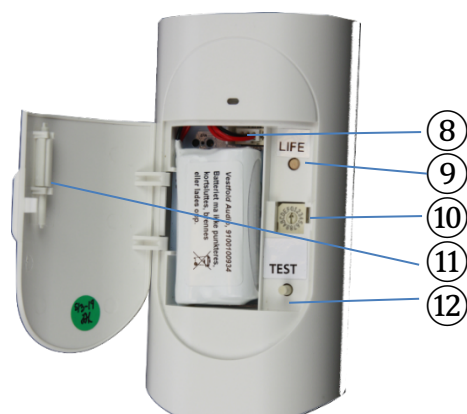

Figur 4 Under lokket

- ⑧ Batterikontakt
- ⑨ LIFE-knapp (sammenkobling)
- ⑩ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑪ Verktøy for innstillinger
- ⑫ Testknapp

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten hvis strømmen går. Batteriet må ikke lades opp.



Batterieliminatør

Den medfølgende batterieliminatøren kobles til kontakten ⑤ i bunnen av FBUT-L.

3. Komme i gang

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre.

Ved tilkobling av batteri kan FBUT-L blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for lang tids bruk.



Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


Den finnes under lokket foran på FBUT-L. Se figur 4.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

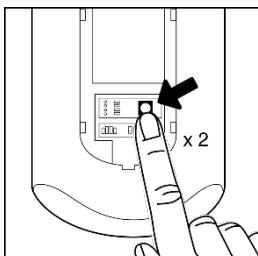

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

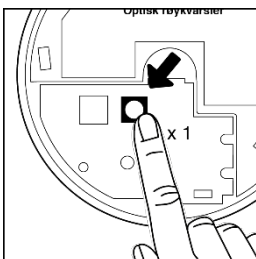

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

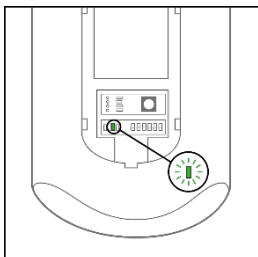

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

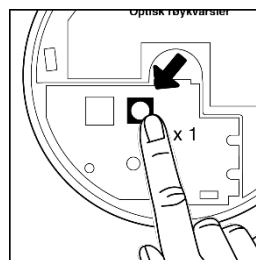

Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

Montering

FBUT-L monteres normalt på veggen med borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder. Alternativt kan enheten festes med skruer gjennom festehullet under batteriet.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

4. Signalutgangen

Benytt en 3,5 mm Jack for å sammenkoble FBUT-L og 3. parts utstyr som skal få signalet.

- Sluttekontakt-utgangen, er beregnet for lavstrøm/lavspent signalering.
- Utgangen er NO (Normally open).
- Utgangen er aktivert i 1 sekund (standard)
- Aktiveringstiden kan enkelt justeres med funksjonsbryteren. (1 – 30 sek.)

Trigging av utgangen

FBUT-L aktiverer utgangen når en sender som er sammenkoblet med FBUT-L, sender varselet "Assistanse ønskes".

Hvis du har behov for signal fra andre FlexiBlink LIFE-varslinger, må du benytte en IRIS LIFE mottaker. Se bruksanvisningen for IRIS-L.

Ved å trykke TEST på FBUT-L etter at den er satt opp, aktiveres utgangen. Da kan oppkoplingen til tredjeparts utstyr testes.



Viktig

Når systemet er koblet opp, må man ALLTID teste at det varsles som tiltenkt når alarmen utløses

Tidsforsinkelse (holdetid)

Med Funksjonsvelgeren kan du innstille hvor lenge utgangen skal være aktiv etter at et varsel er mottatt.

Standard holdetid er 1 sek.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

| ID | Holdetid (s) |
|----|--------------|
| 0 | 1 sek. |
| 1 | 2 sek. |
| 2 | 5 sek. |
| 3 | 10 sek. |
| 4 | 15 sek. |
| 5 | 30 sek. |

5. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

6. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
Vekt m/ batteri: 140 g
Batteri: Litium 3 V
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: -10 °C - +40 °C
Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz

7. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

8. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke skrus fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

| Problem | Mulig årsak | Løsninger |
|---|---|--|
| Det varsler ikke i mottakere | FBUT-L får ikke signal fra senderen. | Trykk på Testknappen på senderen og sjekk om varselet kommer fram. |
| | Batterieliminatoren er ikke tilkoblet | Sett i batterieliminatoren |
| | Enhetene er ikke sammenkoblet. | Utfør sammenkobling. |
| | Avstanden mellom FBUT-L og sender er for stor. | Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater. |
| | FBUT-L er satt opp til å varsle fra annen type varsling | Benytt IRIS-L for å sette opp FBUT-L til å lytte etter rett varsling |
| Sammenkobling fungerer ikke | Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt. | Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til. |
| Det varsler fra feil signal fra senderne. | Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon. | Skru funksjonsvelger til riktig posisjon. |
| Det blinker rødt/grønt i FBUT-L etter mottak av alarm | Lavt batteri i sender eller FBUT-L | Bytt batteri i sender eller FBUT-L |
| Det blinker rødt/grønt i FBUT-L etter TEST er trykket | Batteriet i FBUT-L er snart tomt. | Bytt batteri i FBUT-L |
| Det lyser rødt i dioden etter TEST-trykk | FBUT-L er ikke sammenkoblet | Utfør sammenkobling |

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS



Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47