

Varenr. 1657 (H)
1658 (R)
Artikkelnr. STROBOH-L
STROBOR-L

Mottaker med kraftig blinkede lys

STROBOH-L og STROBOR-L



Brukerhåndbok

1. Innledning

STROBOH-L (hvit/klar) og STROBOR-L (rød) er mottakere/varslere som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink LIFE systemet og varsler med kraftig blinkende lys.

FlexiBlink LIFE benyttes for å varsle om alvorlige hendelser som brannalarm og komfyrvakt så vel som daglige hendelser som dørklokke, telefon og andre relevante hendelser.

Varsling blir utløst når f.eks. en FlexiBlink LIFE Røykvarsler detekterer røyk eller en Telefonsender oppfatter at det ringer. Senderne varsler da trådløst til alle varslingsmottakere i boligen.

Du kan ha så mange varslingsmottakere og sendere som du trenger for sikkerhet og varsling.


STROBOH-L og STROBOR-L er monteringsfri – batterieliminatoren settes i kontakten på veggen. Sammenkoble med en enhet i systemet.

2. Oversikt

I pakken




STROBOH-L eller STROBOR-L

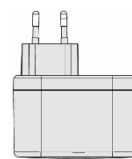

Strømforsyning


Utvendig

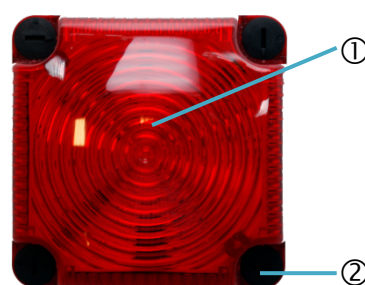

Figur 1 Framsiden

- ① Lys (Hvit eller rød)
- ② Låsespor i hvert hjørne

Under frontlokk

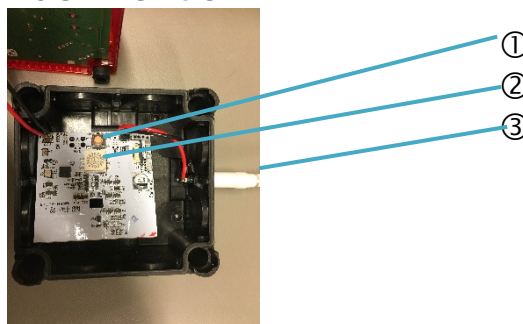

Figur 2 Under frontlokk

- ① LIFE-knapp (Sammenkobling)
- ② Funksjonsvelger
- ③ Strømtilkobling

3. Komme i gang

Plassering

Strobolysene festes på vegg med borrelåstape eller skruer.

Tilkobling


Sett strømforsyningen i kontakten på vegg og plugg ledningen inn i strobolyset.

Sammenkoble enheter


LIFE-knappen finnes under frontlokket på STROBOx-L. Se figur 2 på forrige side.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

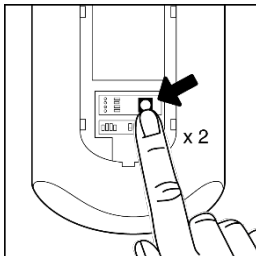

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

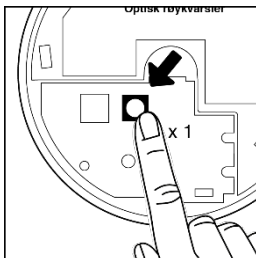

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

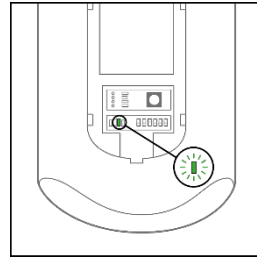

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Vennligst nullstill enheten for å sammenkoble på nytt. Se under.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

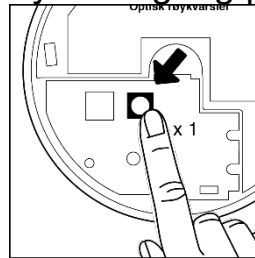

Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

Lengde på varslingen

Med Funksjonsvelgeren kan du velge hvor lenge strobelyset skal blinke som minimum når den mottar en varsling. Som standard varsler strobelyset minimum 15 sekunder. Tabellen viser de alternativene du kan velge imellom.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

Posisjon	Holdetid (s)
0	15 sek.
1	1 sek.
2	2 sek.
3	5 sek.
4	10 sek.
5	30 sek.
6	60 sek.

4. Daglig bruk

Varsling

Hendelser som oppstår i FlexiBlink LIFE-anlegget varsles automatisk med blinkende lys.

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut
- Produktet er for innendørs bruk
- Temperatur: 10 °C – 40 °C
- Nødstrømbatteri m/ kontinuerlig ladefunksjon finnes som tilbehør.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

6. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 85x85x65mm

Vekt: 150 gram
(uten strømforsyning)

Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Driftsspenning: 15 VDC

Temperatur: -10 °C - +40 °C

7. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Får ikke sammenkoblet – indikatorlampe lyser rødt	Sammenkobling mislykkes pga. for lang avstand	Flytt enhetene nærmere hverandre og prøv igjen
	Enheten er allerede sammenkoblet med andre enheter.	Nullstill sammenkobling. Vennligst prøv igjen.
	Feil rekkefølge på sammenkoblingen	Trykk to ganger på LIFE-knappen på en enhet i det eksisterende system, og kun én gang på den nye enheten
Indikatorlampen fortsetter å blinke grønt etter sammenkobling	Er det trykket to ganger på den ene enhetens LIFE-knapp?	Trykk en gang til på LIFE-knappene for å avbryte. Prøv igjen.
	Leter fortsatt etter nye enheter.	Trykk en gang til på LIFE-knappen for å avbryte. Prøv igjen.
Varsling mottas ikke	Ikke sammenkoblet	Koble ut siste enhet og koble sammen igjen
	Manglende dekning	Forsøk å flytte enhetene nærmere hverandre eller sett opp repeater
	Tomt batteri i sender	Bytt batteri i sender
	Sender virker ikke	Les bruksanvisning til sender

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord



www.vestfoldaudio.no

Tlf.: +47 33 47 33 47