



# Kinetic Balance

## Raindek

BRUKERVEILEDNING



**KINETIC BALANCE**

# Tiltenkt bruksområde

Produktet er ment brukt til å beskytte rullestolbrukere fra livet og ned til knærne mot regnvær utendørs. Produktet kompletteres med bukse og fottøy.

## Bruk

Hvordan vi velger å kle på oss vil variere, blant annet ut fra muligheter og preferanser. I denne bruksanvisningen finner du et forslag, som også forteller om de ulike mulighetene i plagget.

Du kan forbli sittende i stolen under hele prosessen.

Regntrekket festes rundt livet ved hjelp av spennen. Stram til etter eget ønske. Det er lange reguleringsbånd, noe som fasiliterer for at festespenningen kan plasseres i siden. Fest i knehasen

ved hjelp av spennen og stram til etter ønske. Sørg for at sidestykkene dekker hoftene og lårene på begge sider.

For ytterligere reguleringer kan du benytte snorstrammer i midje og på hver side.

Produktet kan pakkes sammen i egen lomme for enkel oppbevaring.

## Vedlikehold

Kontroller produktet jevnlig for slitasje på trekk og glidelås.

### Daglig renhold:

Tørk over regntrekket med en ren klut og mildt såpevann.

Tørk over med fuktig fille for å fjerne såperester.

Maskinvask 40°. Må ikke tørkes i tørketrommel.



## Tekniske spesifikasjoner

**Yttermateriale:** 92% polyester, 8% elastan.

Vindtett, vanntett, vannsøyle 10.000 mmH<sub>2</sub>O.

Art.nr.	Størrelse	Farge	Lengde
KBRDBL.001	XS	Svart	
KBRDBL.002	S	Svart	
KBRDBL.003	M	Svart	
KBRDBL.004	L	Svart	
KBRDBL.005	XL	Svart	
KBRDB.001	XS	Blå	
KBRDB.002	S	Blå	
KBRDB.003	M	Blå	
KBRDB.004	L	Blå	
KBRDB.005	XL	Blå	
KBRDDG.001	XS	Mørk grå	
KBRDDG.002	S	Mørk grå	
KBRDDG.003	M	Mørk grå	
KBRDDG.004	L	Mørk grå	
KBRDDG.005	XL	Mørk grå	
KBRDLG.001	XS	Lys grå	
KBRDLG.002	S	Lys grå	
KBRDLG.003	M	Lys grå	
KBRDLG.004	L	Lys grå	
KBRDLG.005	XL	Lys grå	
KBRDLWDG.001	XS	Grønn	
KBRDLWDG.002	S	Grønn	
KBRDLWDG.003	M	Grønn	
KBRDLWDG.004	L	Grønn	
KBRDLWDG.005	XL	Grønn	
KBRDRE.001	XS	Rød	
KBRDRE.002	S	Rød	
KBRDRE.003	M	Rød	
KBRDRE.004	L	Rød	
KBRDRE.005	XL	Rød	

**Garanti:** Alle Kinetic Balance produkter er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. Alle Kinetic Balance produkter garanteres mot fabrikkasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt som tiltenkt. Dersom det oppstår en fabrikkasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte produktet uten omkostninger for kunden. Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på produktet.

