



FAQ

Laget av
Smartbox

Innhold

1. Komme i gang med Grid for iPad

- | | | |
|-----|--|----|
| 1.1 | Hvilke språk støtter Grid for iPad? | 10 |
| 1.2 | Hvilke stemmer støttes av Grid for iPad? | 11 |
| 1.3 | Hva er et grid oppsett? | 12 |
| 1.4 | Hva er et grid? | 13 |
| 1.5 | Hva er Grid utforsker? | 14 |

2. Konto og abonnementer

- | | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Hvordan logger jeg av Grid for iPad? | 18 |
| 2.2 | Hvordan kan jeg endre passordet for Smartbox kontoen? | 19 |
| 2.3 | Hvor lenge har du prøveversjonen av Grid for iPad? | 20 |

3. Legge til og administrere rutenett

- | | | |
|-----|--|----|
| 3.1 | Hvordan legger jeg til et grid oppsett? | 24 |
| 3.2 | Hvordan åpner og lukker jeg et grid oppsett? | 26 |
| 3.3 | Hvordan fjerner jeg et grid oppsett? | 27 |

3.4	Kan jeg bruke fjernredigering med Grid for iPad?	28
3.5	Hvordan inviterer jeg noen til å fjernredigere oppsettet mitt?	29
3.6	Hvordan inviterer jeg noen til å fjernredigere oppsettet mitt?	30

4. Redigering

4.1	Hvordan går jeg til redigeringsmodus?	34
4.2	Hvordan bruker jeg redigeringsmenyen bar?	35
4.3	Hva er et skrivefelt?	37
4.4	Hvordan lager jeg et nytt skrive felt?	38
4.5	Hvordan endrer jeg teksten i et skrivefelt?	39
4.6	Hvordan lager jeg skrive felt der teksten er forskjellig fra etiketten på feltet?	40
4.7	Hvordan endrer jeg symbolet på et felt?	41
4.8	Hvordan merker jeg mer enn ét felt jeg redigerer?	42

Innhold

4.9	Hvordan flytter jeg et felt?	43
4.10	Hvordan bytter jeg plasseringen av to felt?	44
4.11	Hvordan gjør jeg et felt større eller mindre?	45
4.12	Hvordan kopierer og limer jeg inn felt?	46
4.13	Hva er en ordliste?	47
4.14	Hvordan legger jeg til et ord i en ordliste?	48
4.15	Hvordan fjerner jeg et ord fra en ordliste?	49
4.16	Hvordan endrer jeg hvor et ord vises i en ordliste?	50
4.17	Hvordan endrer jeg sorteringsrekkefølgen for en ordliste? (gjør det f.eks. alfabetisk)	51
4.18	Hvordan finner jeg et ord i en ordliste?	52
4.19	Hvordan legger jeg til en ny ordliste i en side?	53
4.20	Hvordan legger jeg til en kommando i et felt?	54

4.21	Hvordan legger jeg til en kommando som skjer hver gang et sideåpnes?	55
4.22	Hvordan lager jeg et felt som hopper til et annen side?	56
4.23	Hvordan hopper jeg fra et felt til et annet når jeg er i redigeringsmodus	57
4.24	Hvordan gir jeg nytt navn til en side?	58
4.25	Hvordan sletter jeg en side?	59
4.26	Hvordan lager jeg en kopi av en side?	60
4.27	Hvordan legger jeg til en ny side?	61
4.28	Hvordan legger jeg til en side fra et annet grid oppsett?	62
4.29	Hvordan skjuler jeg et felt eller hindrer den i å bli merket?	63
4.30	Hvordan legger jeg til en lydeffekt i et felt?	64
4.31	Hvordan legger jeg til ord i Meldingsbanken?	65

Innhold

5. Stil, utseende og layout

5.1	Hvordan endrer jeg utseendet på et felt?	68
5.2	Hva bruker jeg stiller til	69
5.3	Hvordan tilordner jeg en stil til et felt?	70
5.4	Hvordan redigerer jeg en stil og bruker den på alle feltene som er tilordnet den?	71
5.5	Hvordan lager jeg en ny stil?	72
5.6	Kan jeg raskt endre utseendet på et helt grid oppsett?	73
5.7	Hvordan endrer jeg hvor mye mellomrom det skal være mellom feltene?	74
5.8	Hvordan får jeg vist etiketten over symbolene?	75
5.9	Hvordan legger jeg til en ekstra rad eller kolonne?	76
5.10	Hvordan endrer jeg bakgrunnsfargen i en side?	77

6. Innstillinger og tilgang

- | | | |
|------|---|----|
| 6.1 | Hvordan kan jeg endre min stemme? | 80 |
| 6.2 | Hvordan retter jeg uttalen til et ord? | 81 |
| 6.3 | Hvordan endrer jeg språket i et grid oppsett? | 82 |
| 6.4 | Hvordan velger jeg hva som skjer når skriveområdet er valgt? | 83 |
| 6.5 | Hvordan slår jeg symboler i skrivefelt av og på? | 84 |
| 6.6 | Hvordan legger jeg til et symbolbibliotek? | 85 |
| 6.7 | Hvordan velger jeg hvilket symbolbibliotek som foreslås som standard? | 86 |
| 6.8 | Hvordan velger jeg et oppsett som standard når programmet startes? | 87 |
| 6.9 | Hvordan kontrollerer jeg når det leses opp tekst mens jeg skriver? | 88 |
| 6.10 | Hvordan konfigurerer jeg VoiceOver på iPad? | 89 |





Komme i gang med Grid
for iPad

1.1

Hvilke språk støtter Grid for iPad?

- Engelsk (Storbritannia, USA, CA, ZA, Aus, NZ)
- Spansk
- Portugisisk
- Italiensk
- Hebraisk
- Svensk
- Tsjekkisk
- Afrikaan
- Nederlandsk
- Flamsk
- Fransk
- Tysk
- Polsk
- Gresk
- Slovakisk
- Finsk og norsk

Hvilke stemmer støttes av Grid for iPad?

1.2

- i OS
- Acapela
- Nuance

1.3

Hva er et grid oppsett?

Et grid oppsett er som en app i Grid 3.

Et grid oppsett kan være et fullstendig oppsett med symboler. Vi har symbol oppsett som er bygget opp med tanke på effektiv kommunikasjon og oppsett som er bygget opp fra det enkle til mer avansert kommunikasjon.


Du kan bygge dine egne grid oppsett fra grunnen av, eller tilpasse grid oppsettene som følger med grid for iPad.

Hva er et grid?

En side er det du ser på skjermen når du er inne i et grid oppsett.

Et Grid oppsett kan bestå av mange sider, eller de kan bare inneholde en side.

Hver side består av kolonner, rader og felter med forskjellige kommandoer/funksjoner.

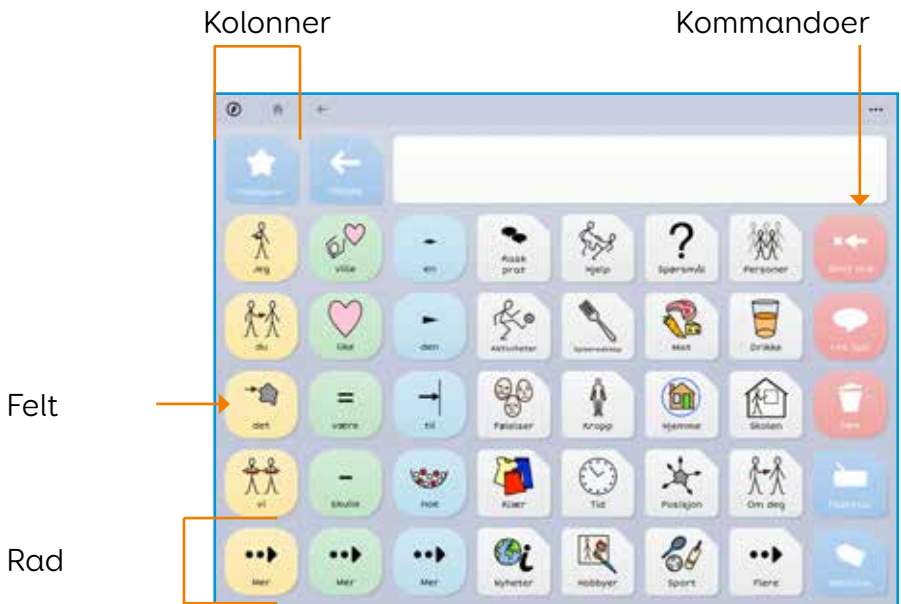

1.5

Hva er Grid utforsker?

Grid utforsker er startsidene.

Grid utforsker er Grid sin startskjerm. Herfra kan du bla gjennom og ordne gridoppsettene dine, legge til nye Grid oppsett og få tilgang til innstillingene.



Merknader





Konto og abonnementer


2.1

Hvordan logger jeg av Grid for iPad?

Trykk på redigeringsikonet



Trykk på innstillingshjulet

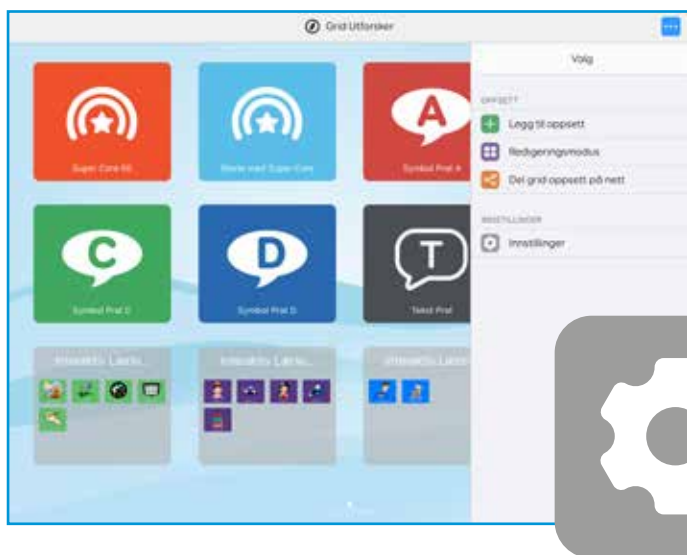

Trykk Innstillinger og deretter Fjern bruker. Dette fjerner alle grid oppsett fra enheten. Hvis du ikke er logget på Dropbox, slettes grid oppsettene permanent.

Hvordan kan jeg endre passordet for Smartbox kontoen?

2.2

Benytte Grid for iPad

Innstillinger - Kontoer: Trykk på Smartbox og deretter Tilbakestill passord. Du vil motta en e-postmelding med en lenke for tilbakestilling av passord. Følg denne koblingen og velg det nye passordet.

Bruke Online Grids

Logg deg på kontoen din på grids.thinksmartbox.com

Trykk på Rediger, og bla deretter til bunnen der du kan endre passordet.

2.3

Hvor lenge har du prøveversjonen av Grid for iPad?

Abonnementet på Grid for iPad leveres med en 30-dagers gratis prøveversjon.

Når du åpner Grid for iPad for første gang, blir du bedt om å starte prøveperioden eller logge inn med deres Smartbox konto.

vis du velger abonnementet, vises et App Store-vindu der du kan bekrefte prøveperioden. Hvis du vil avbryte abonnementet, åpner du <Innstillinger - abonnemeter osv.>

Merknader





3

Legge til og håndtere grid
oppsett

3.1

Hvordan legger jeg til et grid oppsett?

Når du starter Grid for iPad for første gang, eller vil legge til mer innhold i Grid Utforsker, trykker du på '+'-ikonet øverst til høyre.

Dette åpner vinduet Legg til grid oppsett, der du finner ferdige grid oppsett ordnet etter kategori og alternativer for å opprette nye oppsett.

Velg kategorien du vil legge til et grid oppsett fra, og bla deretter til grid oppsettet du ser etter. Til slutt trykker du på 'Legg til' for å laste ned oppsettet til Grid utforsker.




Velg legge til oppsett

- **Smartbox-Grid oppsett** - Dette er offisielle Smartbox-oppsett for Grid for iPad. Hvert oppsett er laget for berøringstilgang og har en rekke alternativer. Du kan velge mellom symbolkommunikasjon, tekstkommunikasjon, interaktiv læring og tilgjengelige apper.
- **Online Grids** - Du kan også få tilgang til Online grids, der du finner oppsett som lastes opp og deles av andre Smartbox-brukere
- **Ny** - Opprett et nytt tomt grid oppsett som er klart for ditt eget innhold og egne kommandoer.
- **Kopier grid oppsett** - Dette alternativet åpner et skjermbilde der du kan velge et hvilket som helst grid oppsett i utforskeren, og lage en kopi av det. Du kan bruke dette hvis du vil gjøre betydelige endringer i et oppsett, men likevel vil beholde en kopi av originalen, eller hvis du vil lage en alternativ høykontrastversjon av et grid oppsett.

3.2

Hvordan åpner og lukker jeg et grid oppsett?

Hvis du vil åpne et grid oppsett, trykker du på det i Grid. Når et grid oppsett er lastet inn, kan du gå tilbake til Grid utforsker på to måter.

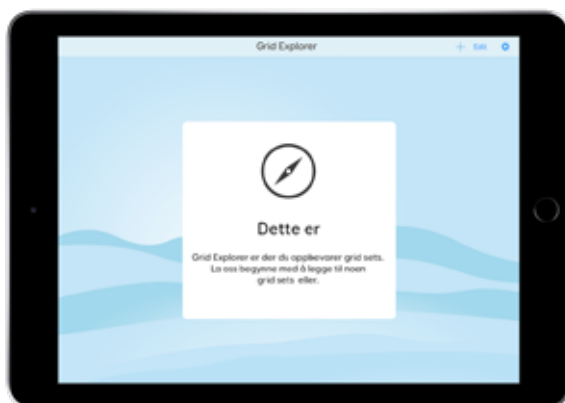

- Du kan trykke på ikonet for Grid utforsker øverst til venstre på skjermen.
- Du kan legge til et Grid utforsker felt i oppsettet for å gå tilbake til Grid utforsker. Noen grid oppsettinneholder allerede et Grid utforsker felte.

Noen oppsett har allerede et Grid Utforsker felt.



Hvordan fjerner jeg et grid oppsett?

3.3

Hvis du vil fjerne et grid oppsett, går du til Grid utforsker og trykker på 'Rediger' øverst til høyre. Dette gjør at du kan organisere og fjerne oppsett.

Hvis du vil fjerne et grid oppsett, trykker du på X øverst til høyre. Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen, siden dette er permanent, vil den også fjerne oppsettet fra alle andre synkroniserte enheter.


Når du er ferdig med å slette grid oppsett, trykker du Ferdig øverst til høyre for å gå tilbake til Grid utforsker.



3.4

Kan jeg bruke fjernredigering med Grid for iPad?

Du kan redigere Grid for iPad eksternt fra en Windows-enhet med Grid 3 installert. Det kreves ingen lisens for å benytte fjernredigering. .

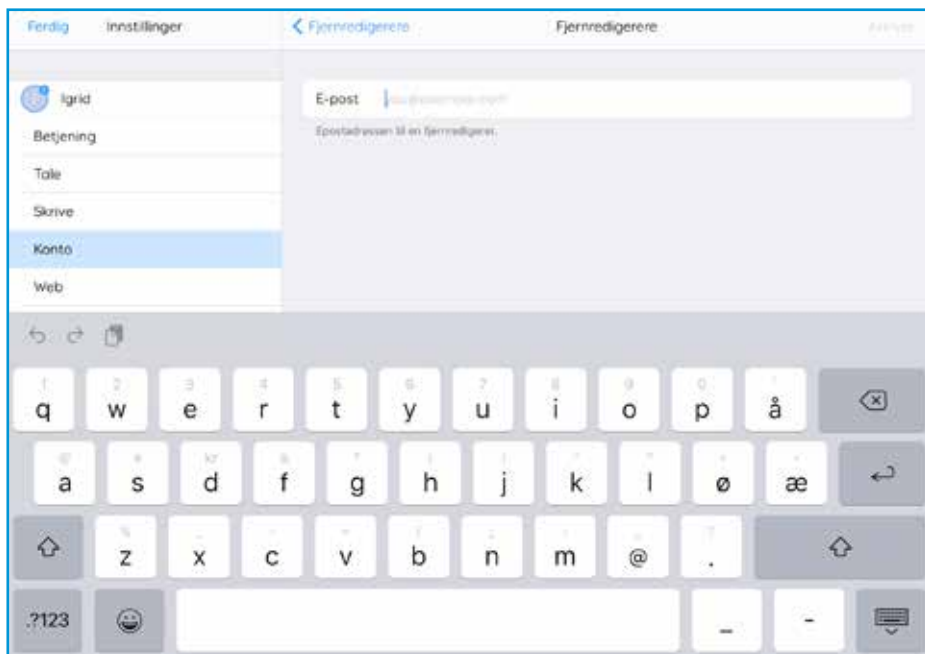

Hvordan inviterer jeg noen til å fjernredigere oppsettet mitt?

3.5

Gå til Innstillinger, Kontoer i Grid for iPad.

Kontroller at du er logget på Smartbox og Dropbox konto, velg deretter fjernredigerere.

Trykk på pluss symbolet for å legge til en ny f angi e-postadressen deres og trykk på lagre.

3.6

Hvordan inviterer jeg noen til å fjernredigere oppsettet mitt?

Gå til Innstillinger, Kontoer i Grid for iPad. Kontroller at du er logget på Smartbox og Dropbox konto, velg deretter fjernredigerere.

Trykk på pluss symbolet for å legge til en ny fangi e-postadressen deres og trykk på lagre.



Merknader





4

Redigering

4.1

Hvordan går jeg til redigeringsmodus?

Hvis du vil redigere et grid oppsett, må du være i redigeringsmodus.

Velg Rediger sider fra menylinjen. Hvis du redigerer et oppsett med en ordliste, får du muligheten til å Redigere siden eller Rediger ordliste. Med mindre du vil redigere ordlisten, må du velge Rediger sider.



Hvordan bruker jeg menylinjen for redigeringsmodus?

4.2

- **Fullfør redigering -**

velg Fullfør redigering for å lagre endringene og gå ut av redigeringsmodus

- **Angre -**

angrer den siste handlingen du kan trykke flere ganger for å reversere flere handlinger

- **Velg -**

brukes til å merke flere felt. En hake vises i hjørnet på hvert felt som er valgt

- **Navn på Grid oppsett -**

vises i midten av menylinjen slik at du vet hvilket oppsett du redigerer i

- **Ikon for grid oppsett -**

viser miniatyrbilder av alle sidene i grid oppsettet. Her kan du finne, gi nytt navn til, kopiere, slette og legge til sider.

- **Malerpensel-ikon -**

verktøy for å endre utseende på felter og sider.

4.2

- **Grid ikon**

verktøy for å endre layout (f.eks. legge til rader eller kolonner), bakgrunner og kommandoer.

- **Innstillinger**

juster innstillinger for tilgang, tale, skriving, kontoer, grid oppsett osv.e

Hva er et skrivefelt?

4.3

Et skrive felt er feltet du bruker til å si et ord, et uttrykk eller en setning.



4.4


Hvordan lager jeg et nytt skrive felt?

I redigeringsmodus trykker du på et tomt felt og velger Skriv og Les opp.



Skriv inn teksten for feltet, og velg Ferdig. Hvis du vil velge et annet symbol, trykker du på det gjeldende symbolet og velger et av alternativene som tilbys.

Du kan også velge Finn bilde for flere alternativer.

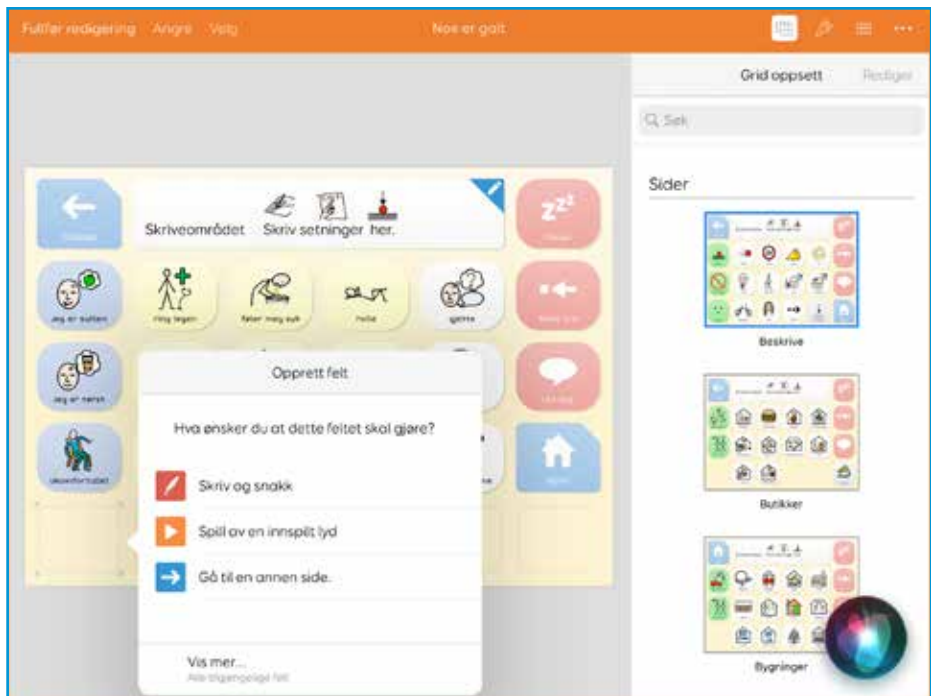


Hvordan endrer jeg teksten i et skrivefelt?

4.5

I redigeringsmodus merker du feltet og deretter Rediger felt.

Trykk på felt teksten til høyre på skjermen, gjør endringene, og velg Ferdig. Velg deretter redigering fullført.

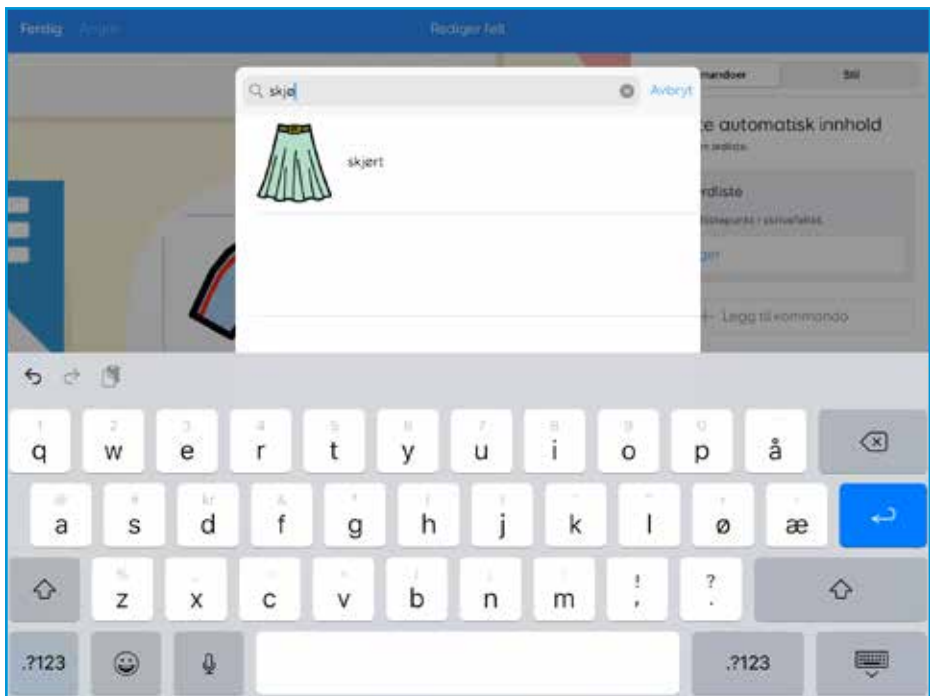


4.6

Hvordan lager jeg skrive felt der teksten er forskjellig fra etiketten på feltet?

I redigeringsmodus trykker du på feltet og velger Skriv og Les opp.

På kommandolinjen slå av Samme som etikettnavnet.

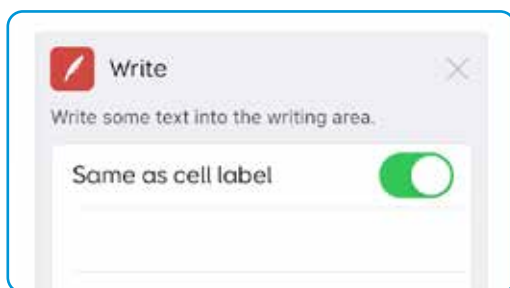


Nå kan etiketten redigeres separat fra teksten som sendes til skrivområdet.

Hvordan endrer jeg symbolet på et felt?

4.7

I redigeringsmodus merker du feltet og deretter Rediger felt og trykker på symbolet.

Du kan velge et nytt symbol fra de foreslåtte symbolene, eller du kan velge Finn bilde for å gå til bildelisten.

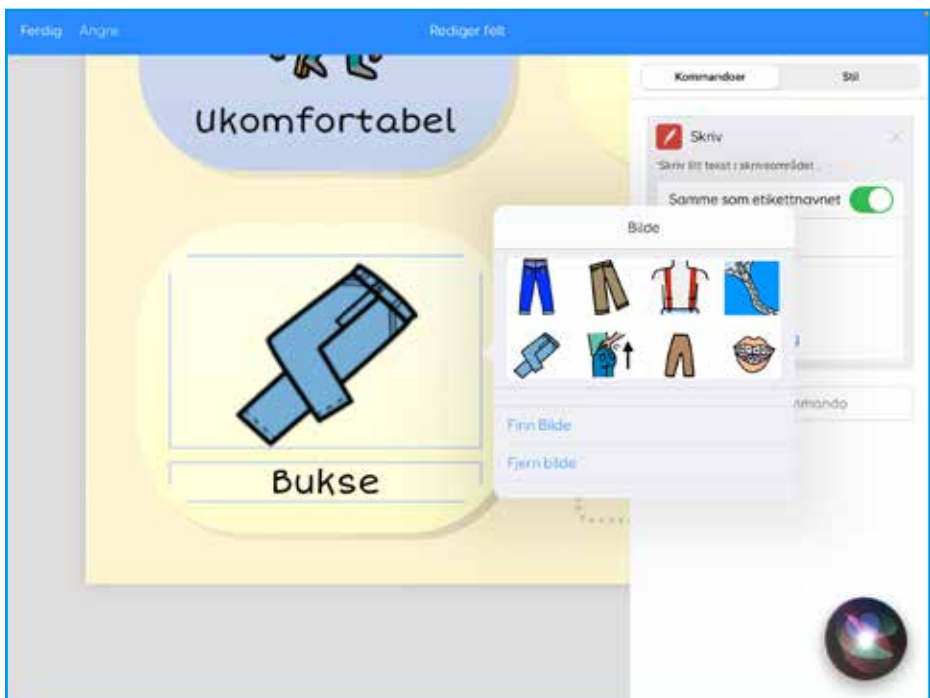


4.8

Hvordan merker jeg mer enn ét felt når jeg redigerer?

I redigeringsmodus trykker du på og holder nede et felt til du ser en hake i hjørnet, eller velger Velg på menylinjen.


Trykk deretter på feltene du vil merke, gjør endringene, og velg deretter Ferdig.

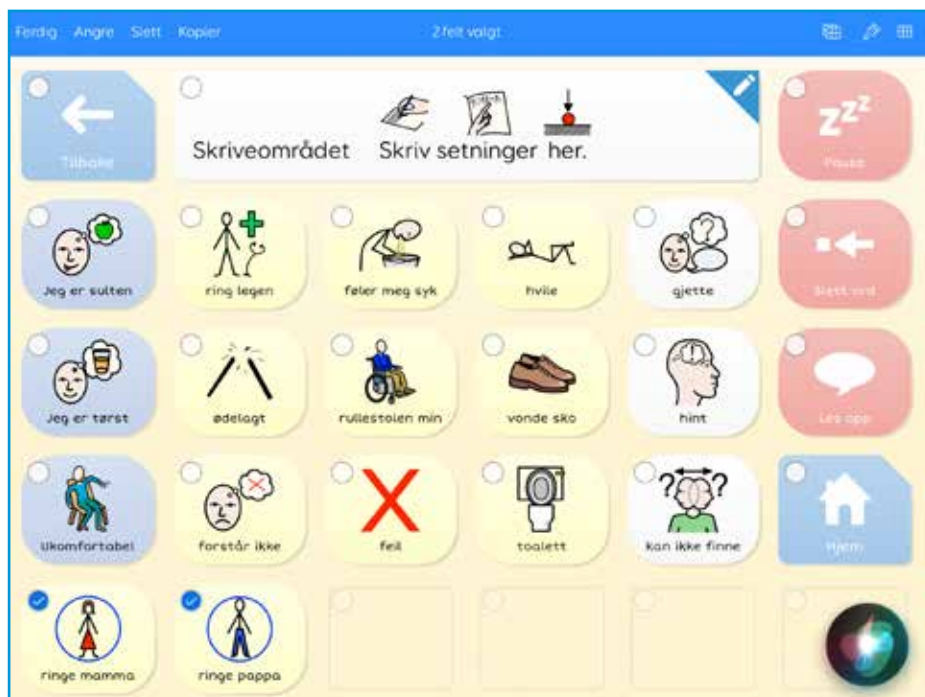

Hvordan flytter jeg et felt?

4.9

I redigeringsmodus trykker du på og holder nede feltet og drar den deretter til ønsket posisjon.

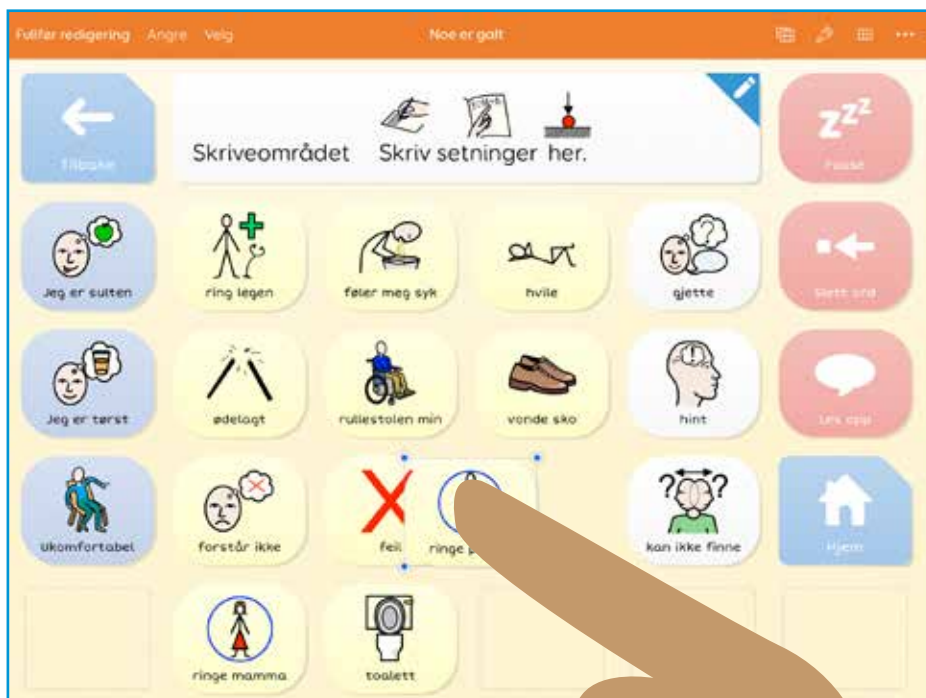

4.10


Hvordan bytter jeg plasseringen av to felt?

I redigeringsmodus trykker du på og holder nede det første feltet, deretter drar du den til plasseringen for det andre feltet

Hvordan gjør jeg et felt større eller mindre?

4.11

I redigeringsmodus merker du feltet og drar et av de blå hjørnehåndtakene til ønsket størrelse.

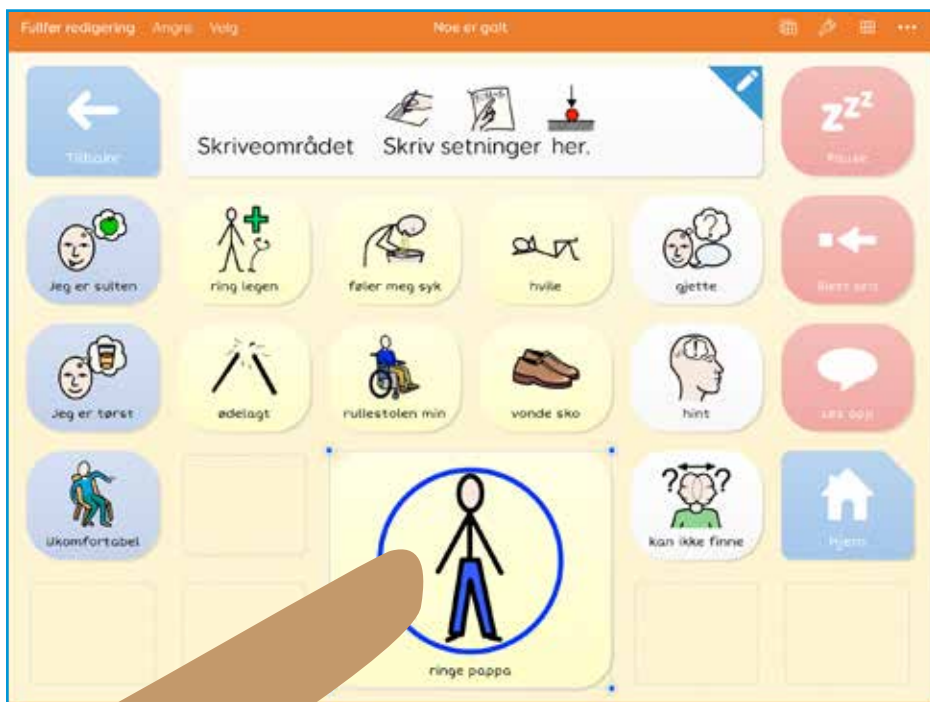


4.12

Hvordan kopierer og limer jeg inn felt?

I redigeringsmodus trykker du på Velg på menylinjen, merker feltet du vil kopiere, og deretter trykker du på Kopier

Deretter trykker du på mål feltet og velger Lim inn på menylinjen.

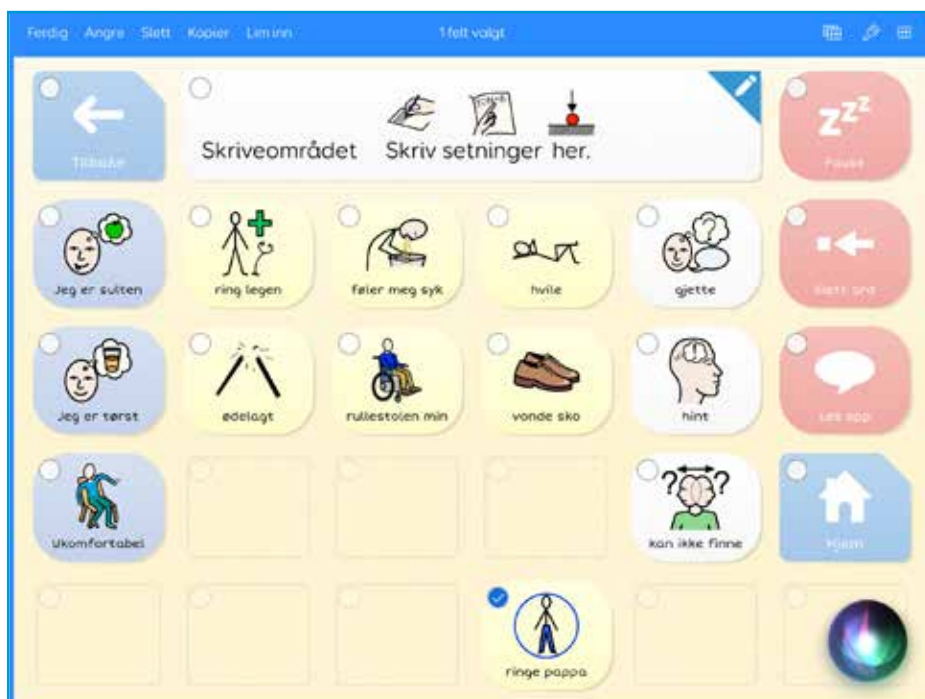

Ferdig Angre Slett Kopier Lim inn


Hva er en ordliste?

4.13

En ordliste er en dynamisk liste over ord som fyller ordlistefelt.

En ordliste kan brukes til å legge til en stor mengde ord i en side.

Ordlisten er en smart måte å la brukere legge til, eller fjerne ord i et grid oppsett.

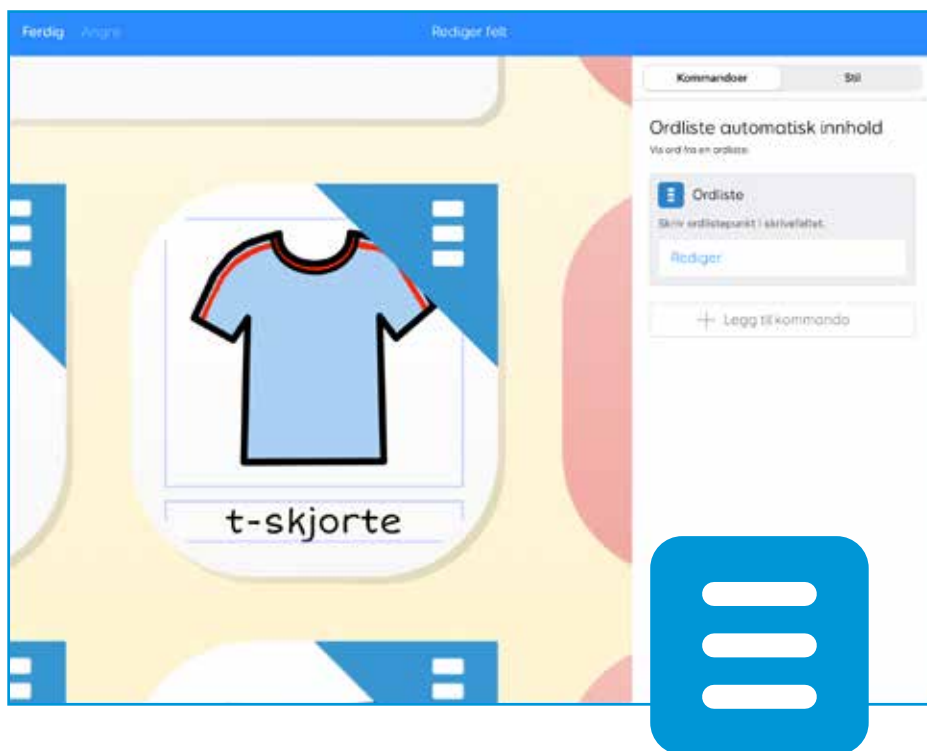


4.14

Hvordan legger jeg til et ord i en ordliste?

Velg Rediger på menylinjen, deretter Rediger ordliste, og velg plusstegnet.

Skriv inn det nye ordet og velg et symbol, og deretter Ferdig.

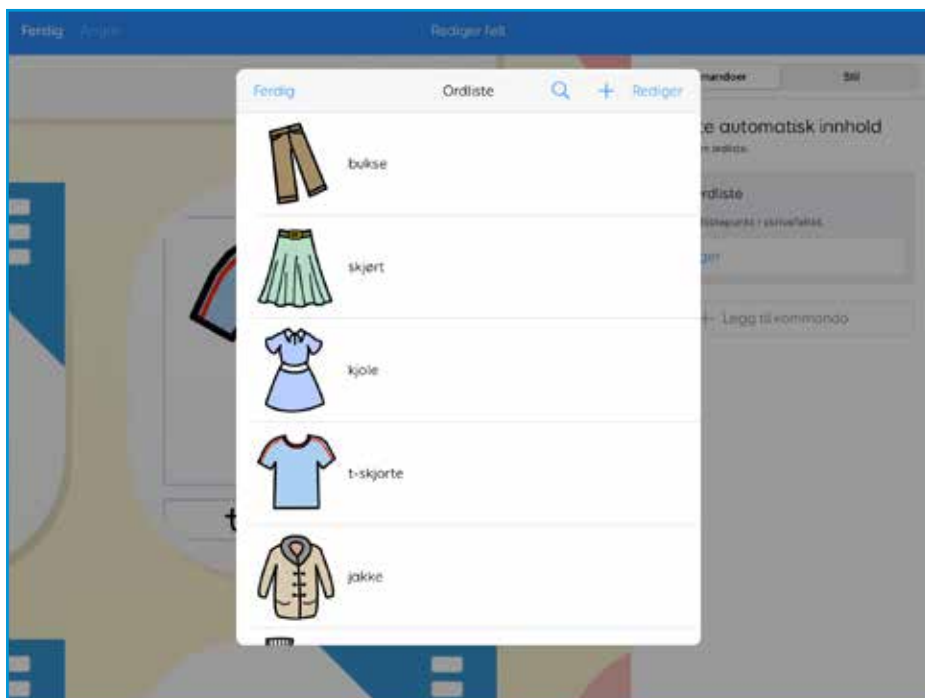

Hvordan fjerner jeg et ord fra en ordliste?

4.15

Velg Rediger på menylinjen, deretter Rediger -liste og deretter Rediger.

Finn ordet du vil fjerne, trykk på den røde sirkelen på venstre side og Fjern.




4.16

Hvordan endrer jeg hvor et ord vises i en ordliste?

Velg Rediger på menylinjen, deretter Rediger liste og deretter Rediger.

Finn ordet du vil flytte, og dra deretter ordet opp eller ned i listen ved hjelp av de tre linjene på høyre side.

(I redigeringsmodus kan du også trykke på og holde nede ordliste feltet og dra den til ønsket plassering.)

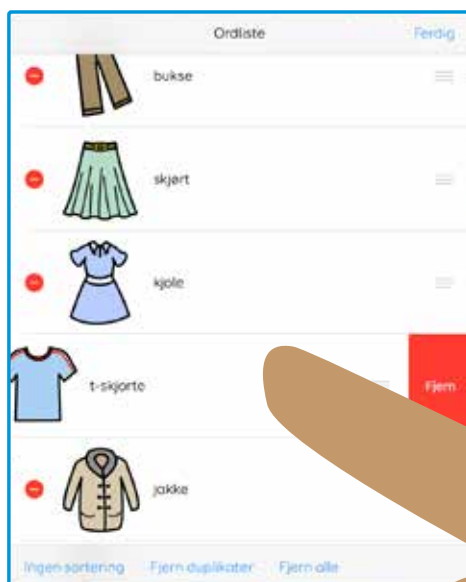


Hvordan endrer jeg sorteringsrekkefølgen for en ordliste? (gjør det f.eks. alfabetisk)

4.17

Velg Rediger på menylinjen, deretter Rediger ordliste, og trykk Rediger.

På venstre side av linjen nederst i ordlisten vises gjeldende sorteringsrekkefølge (standard er Ingen sorteringsrekkefølge).

Trykk på denne for å velge en ny sorteringsrekkefølge fra de tre alternativene.

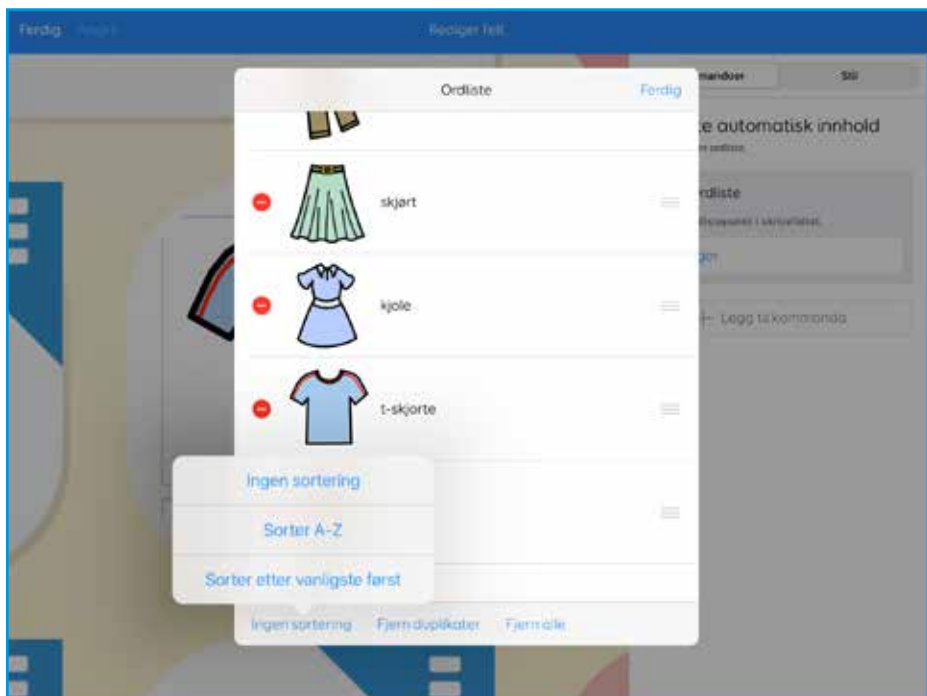


4.18

Hvordan finner jeg et ord i en ordliste?

Gå til menylinjen, trykk Rediger og deretter Rediger ordliste.

Velg søkeikonet, og skriv inn ordet du vil finne.

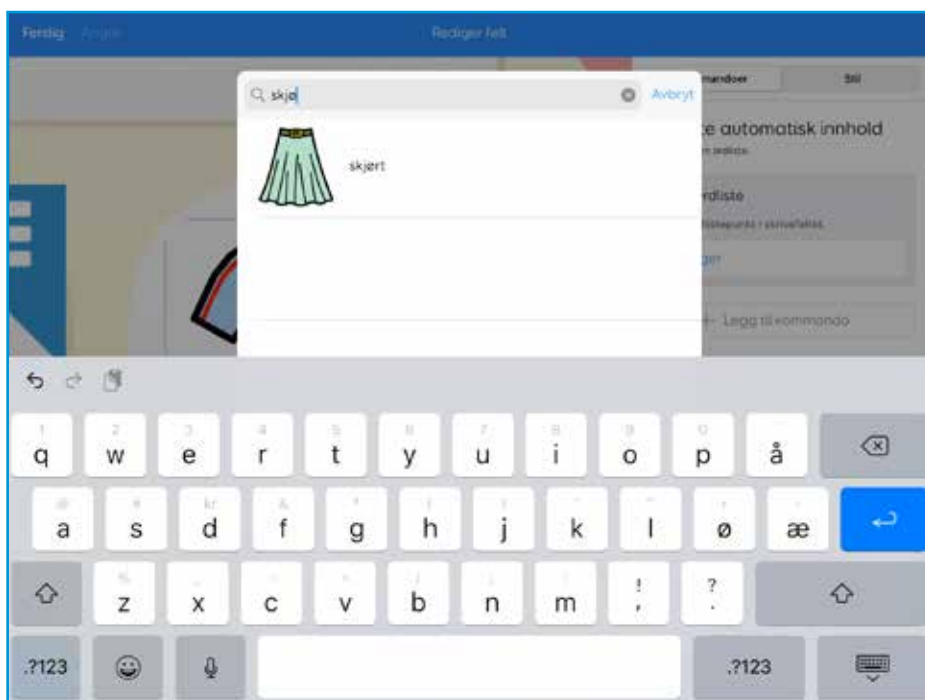


Hvordan legger jeg til en ny ordliste i en side?

4.19

Trykk på Velg på menylinjen i redigeringsmodus, og trykk deretter på de tomme feltene der du vil at ordlisten skal vises.

Velg Opprett felt på menylinjen, velg ord-listen, og trykk på Ferdig.

Trykk på en av de nye feltene i ordlisten, og rediger felt. Trykk Rediger i ordlisten på kommandolinjen, og velg plusstegnet for å begynne å legge til nye ord i listen.

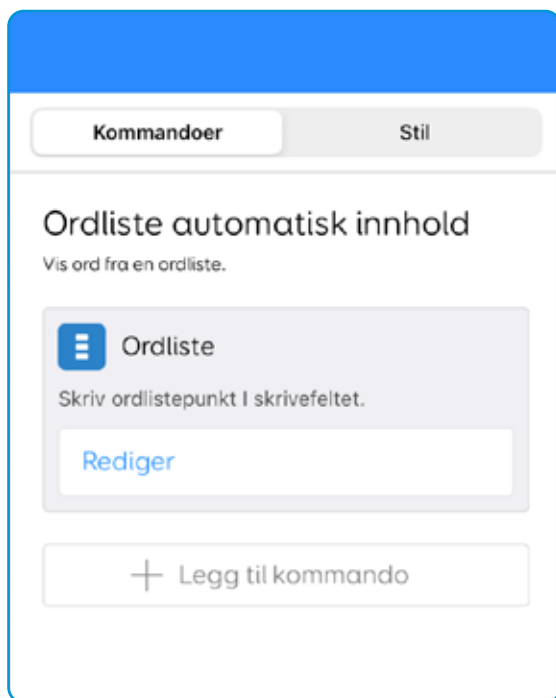


4.20

Hvordan legger jeg til en kommando i et felt?

I redigeringsmodus merker du feltet, trykker Rediger og velger deretter Legg til kommando på linjen til høyre på skjermen.



Du kan bla gjennom de forskjellige kommandoene etter kategori, eller du kan søke etter en bestemt kommando ved hjelp av forstørrelsesglassikonet.

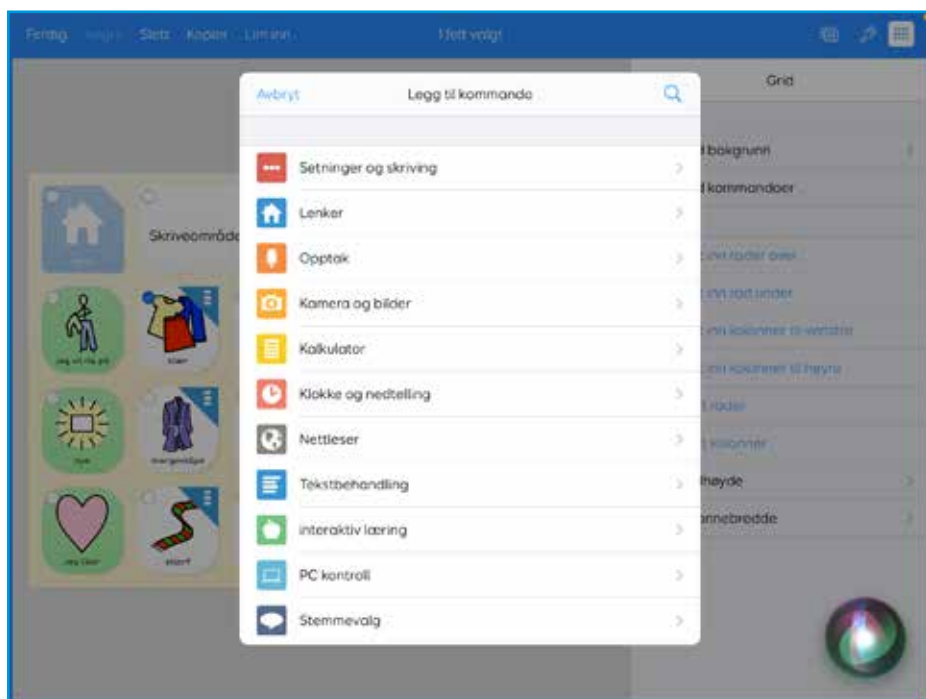

Hvordan legger jeg til en kommando som skjer hver gang et sideåpnes?

4.21

I redigeringsmodus velger du grid ikonet ved siden av innstillinger, trykker på kommandoer og legger til en kommando.



Setninger
& skrivning



Lenker



Opptak



Kamera
& bilder



Kalkulator



Klokke
& timer



Nettleser



Notater



Interaktiv
læring



PC
kontroll



Tale
innstillinger



Grid
innstillinger


4.22

Hvordan lager jeg et felt som hopper til et annen side?

Velg et tomt felt i redigeringsmodus, og trykk på Gå til en annen side.

Velg siden du vil hoppe til. Du kan velge Hjem, tilbake eller en side fra miniatyrbildene.

Du kan også velge å hoppe til en ny side eller en kopi av en eksisterende.

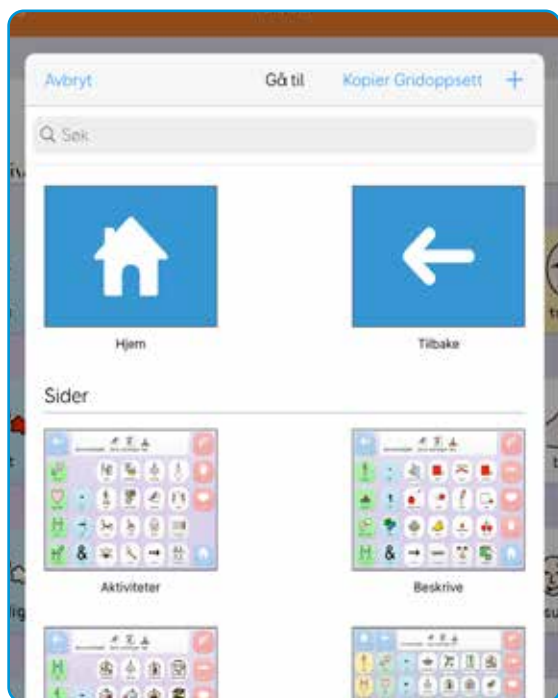

Hvordan hopper jeg fra en side til en annen mens jeg er i redigeringsmodus?

4.23

Velg feltet, og trykk deretter Følg lenke.




4.24

Hvordan gir jeg nytt navn til en side?

I redigeringsmodus velger du ikonet for innstilling av raster på menylinjen og trykker deretter på Rediger i innstillingslinjen for raster til høyre for skjermen.



Trykk på siden du vil endre, og velg gi nytt navn.

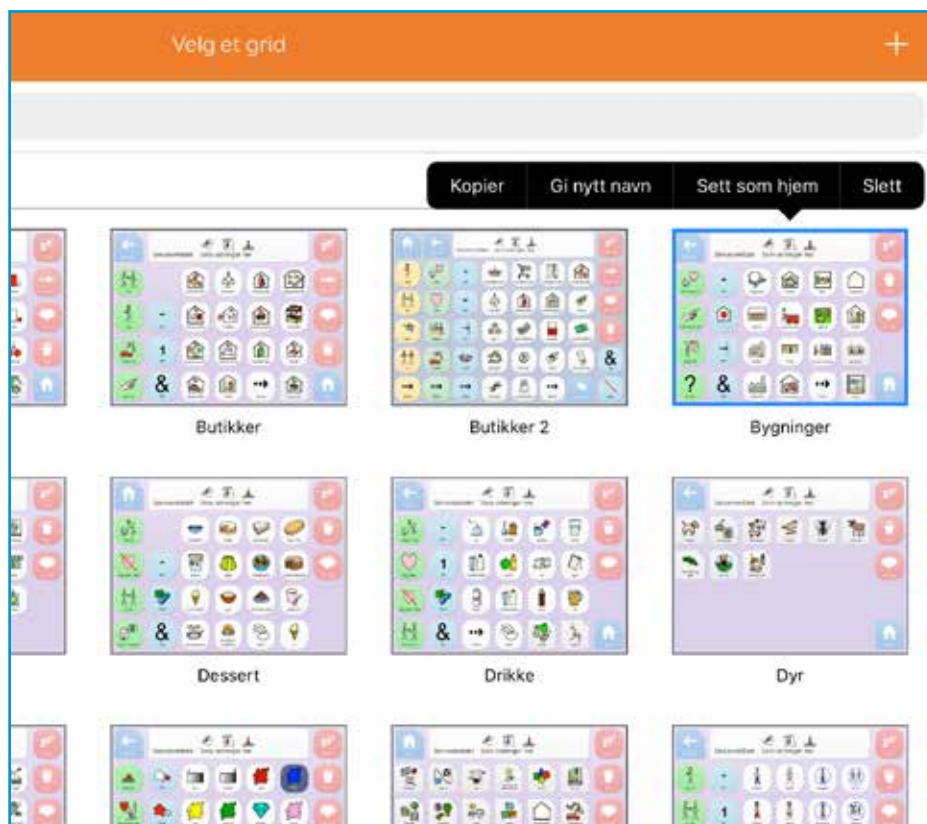

Hvordan sletter jeg en side?

4.25

I redigeringsmodus velger du ikonet for innstilling av raster på menylinjen og trykker deretter på Rediger i innstillingslinjen for raster til høyre for skjermen.

Trykk på siden du vil fjerne, og velg Slett.


4.26

Hvordan lager jeg en kopi av en side?

I redigeringsmodus velger du ikonet for innstilling av rutenett på menylinjen og trykker deretter på Rediger i innstillingslinjen for rutenettet til høyre for skjermen.



Velg en side, og deretter Kopier og gi den nye siden et navn.

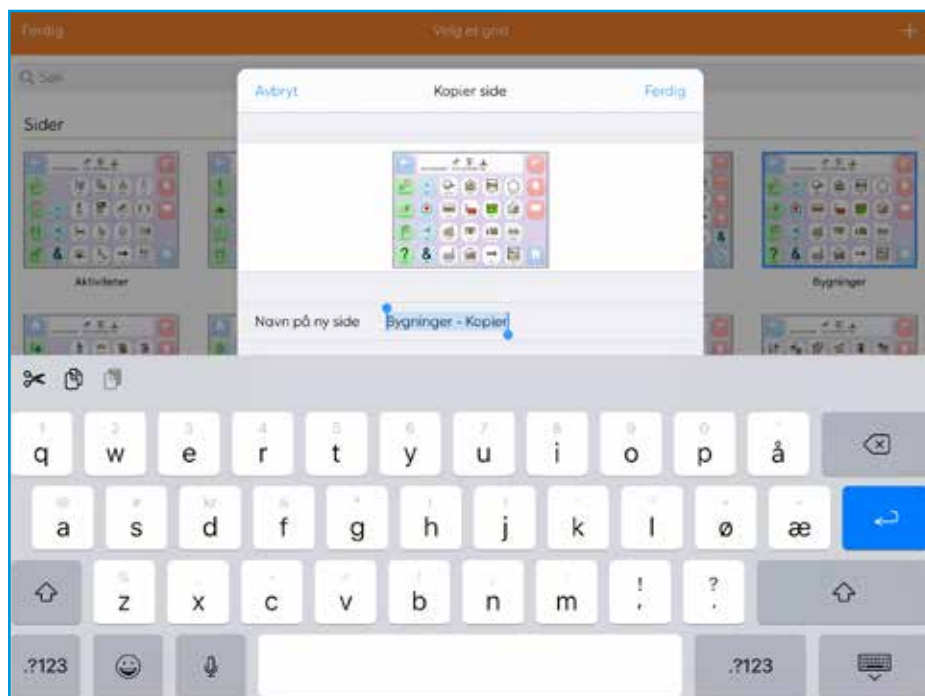


Hvordan legger jeg til en ny side?

4.27

I redigeringsmodus velger du ikonet for grid oppsettet på menylinjen og deretter Rediger.



Velg plusstegnet på menylinjen, gi den nye siden et navn, og velg ønsket antall rader og kolonner.

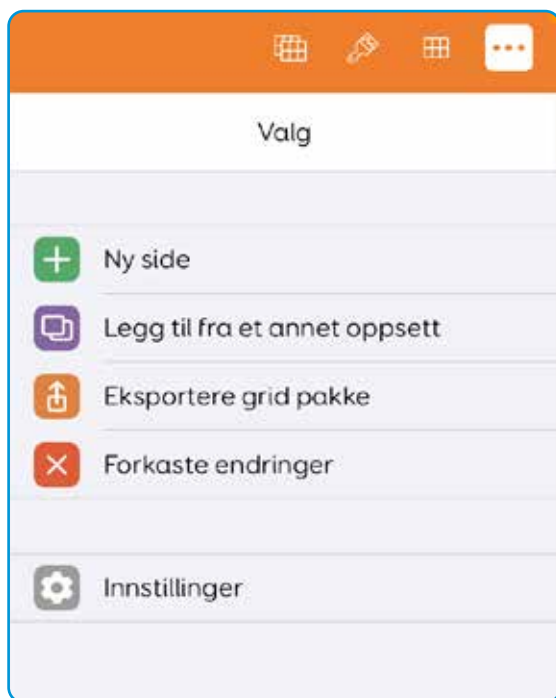


4.28

Hvordan legger jeg til en side fra et annet grid oppsett?

I redigeringsmodus velger du ikonet for innstilling av oppsett på menylinjen og trykker deretter på Rediger i innstillingsfeltet for oppsettet til høyre for skjermen.

Velg plusstegnet på menylinjen. Minimer tastaturet, og velg Legg til fra et annet oppsett nederst på skjermen.

Velg grid oppsettet som inneholder siden du vil legge til, velg ønsket side, og trykk på Ferdig.

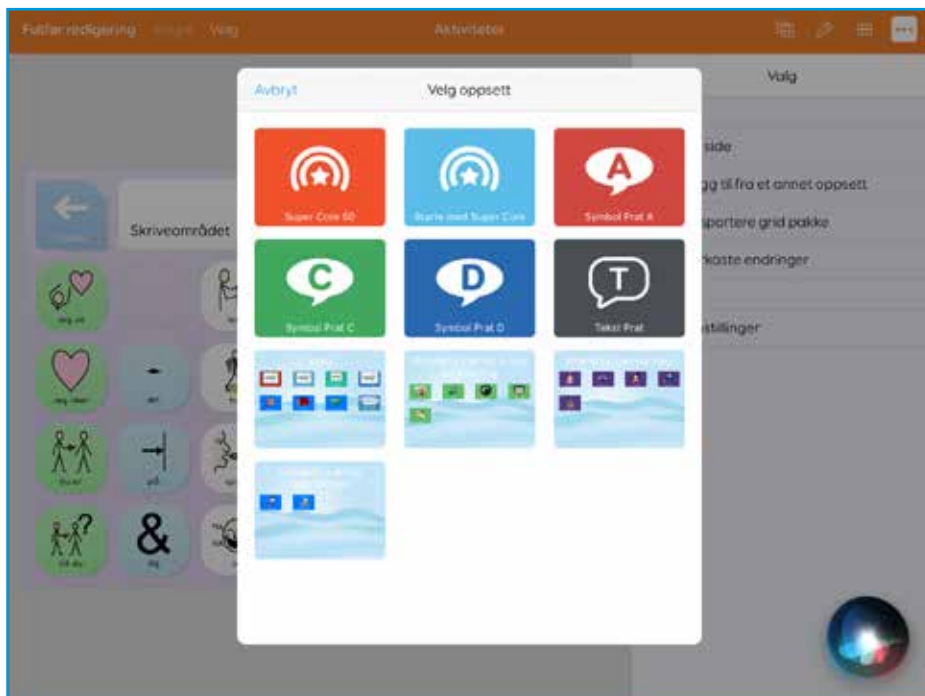


Hvordan skjuler jeg et felt eller hindrer den i å bli merket?

4.29

Velg feltet du vil skjule, i redigeringsmodus, og trykk på stil-ikonet på menylinjen (bilde).

Velg skjult eller ikke tilgjengelig under tilgang. Hvis feltet er skjult, er den usynlig utenfor redigeringsmodus, men hvis den ikke er tilgjengelig, vil den være nedtonet og kan ikke velges

Du kan også gjøre et felttilgjengelig bare ved hjelp av berøring

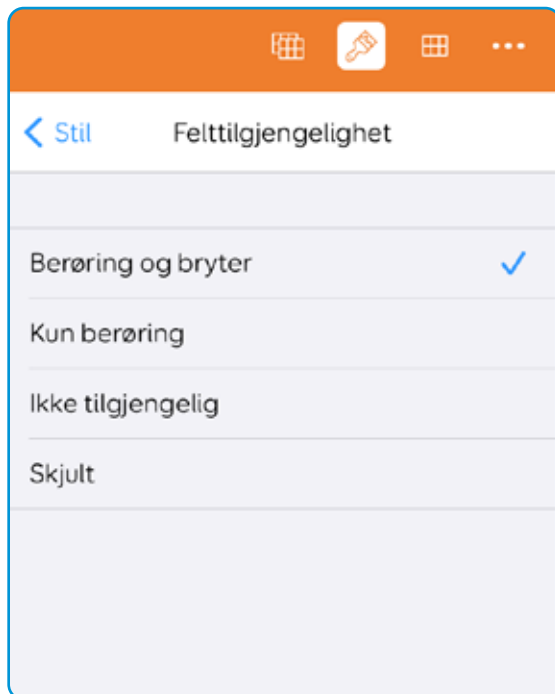


4.30

Hvordan legger jeg til en lydeffekt i et felt?

I redigeringsmodus trykker du to ganger på et tomt felt og velger Spill av et opptak. Du kan nå velge å ta opp en ny lyd eller bla gjennom eksisterende lyder.

Du finner en kategorisert liste over lydeffekter som er klar til bruk, eller du kan bla gjennom opptakene du har gjort tidligere.

Du vil kanskje bruke kommandoen Spill av lyd i tillegg til andre kommandoer, for eksempel for å spille av en lyd og hoppe til et annet rutenett samtidig. Du kan gjøre dette ved å trykke på Legg til kommando når du redigerer et felt.

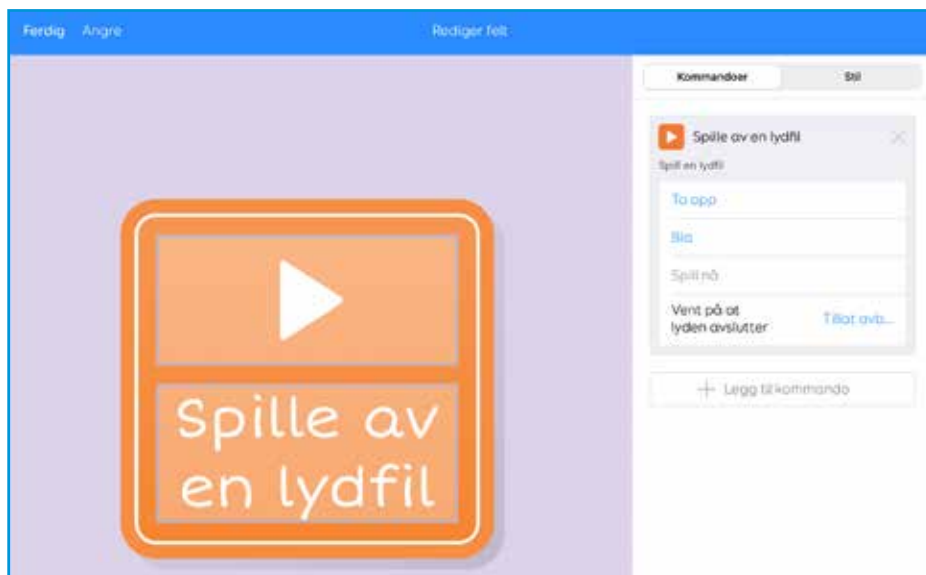


Hvordan legger jeg til ord i Meldingsbanken?

4.31

Gå til Innstillinger, tale, Meldingsbank og velg plusstegnet.

Gå til Innstillinger, tale, Meldingsbank og velg plusstegnet.

Du får nå muligheten til å skrive inn hele teksten på opptaket, legge til etiketten du vil skal vises på feltet, og velge kategorien eller kategoriene du vil at frasen skal vises i.

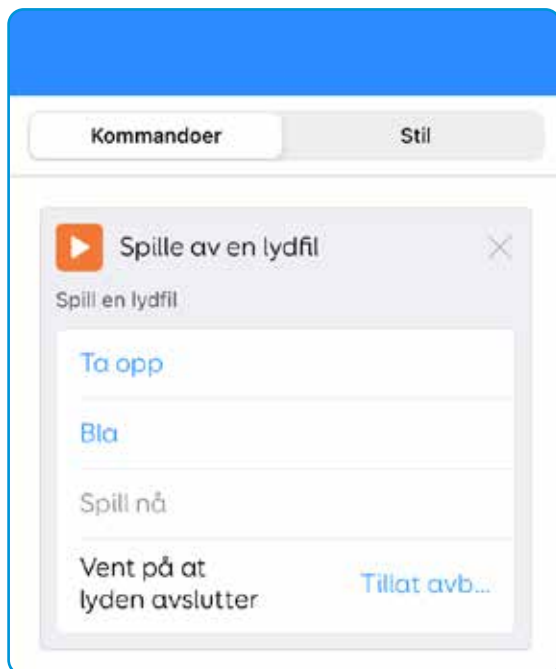





5

Styler, utseende og layout

5.1

Hvordan endrer jeg utseendet på et felt?

I redigeringsmodus merker du feltet du vil endre, redigerer felt og endrer kommandokommandoene til stil til høyre på skjermen.

Her kan du gjøre endringer i hvordan felte ser ut, ved å justere form, farge, skrift og mer.



Hva brukes stiler til?

5.2

Stiler gjør at du raskt kan endre utseendet til ulike typer felt i et helt grid oppsett

Du kan for eksempel fargekode et grid oppsett slik at ulike typer ordforråd er enkle å identifisere og konsekvente.

Du kan oppdatere en stil, og alle endringer du har gjort, kan brukes på alle felt som deler denne stilen.




5.3

Hvordan tilordner jeg en stil til et felt?

I redigeringsmodus merker du feltet og trykker på stillinjen til høyre på skjermen.

Navnet på stilen som for øyeblikket er tilordnet feltet, vises.

Trykk på gjeldende stil for å velge en annen fra listen, eller trykk på plusstegnet for å opprette en ny stil.

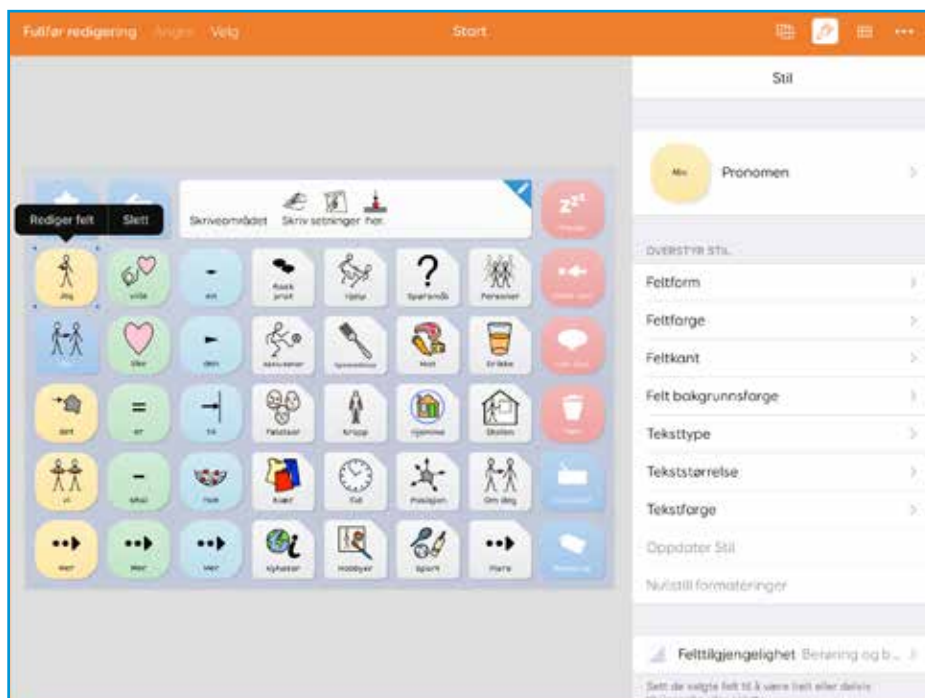

Hvordan redigerer jeg en stil og bruker den på alle feltene som er tilordnet den?

5.4

I redigeringsmodus merker du feltet du vil redigere, og trykker på stillinjen til høyre på skjermen.

Gjør de ønskede endringene i feltet, og trykk deretter Oppdater stil for å bruke disse endringene på andre felt i grid oppsettet som deler samme stil.

5.5

Hvordan lager jeg en ny stil?

I redigeringsmodus merker du et felt og gjør ønskede stilendringer for den nye stilen.

Trykk på navnet på den gjeldende stilen, velg pluss, gi den nye stilen et navn, og velg Ferdig.




Kan jeg raskt endre utseendet på et helt grid oppsett?

5.6

Det finnes tre forhåndsinnstilte temaer som du kan bruke på hele grid oppsettet.

Når du er i redigeringsmodus og ingen felter er merket, trykker du på penselikonet for pensel på menylinjen.

Velg Tema, velg enten Moderne, Boble eller Klumpete.

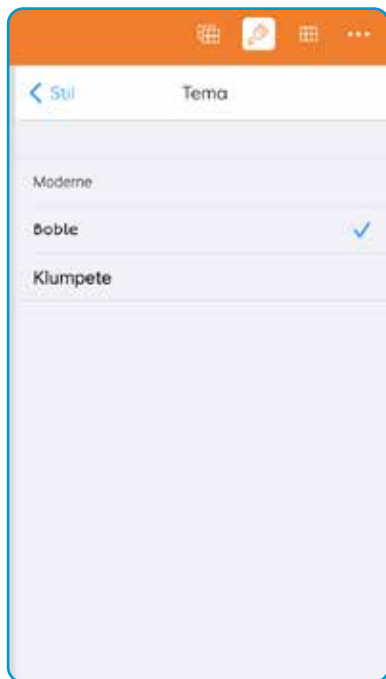


5.7


Hvordan endrer jeg hvor mye mellomrom det skal være mellom feltene?

Når du er i redigeringsmodus og ingen felt er merket, trykker du på penselikonet for pensel på menylinjen.

Trykk på felt avstand, og velg blant seks avstandsalternativer. Denne endringen gjelder for alle sider i oppsettet.

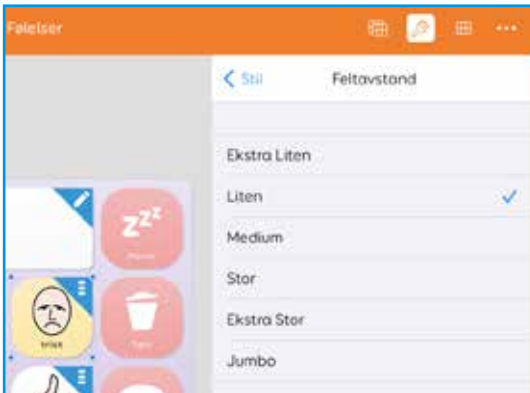

Small cell spacing

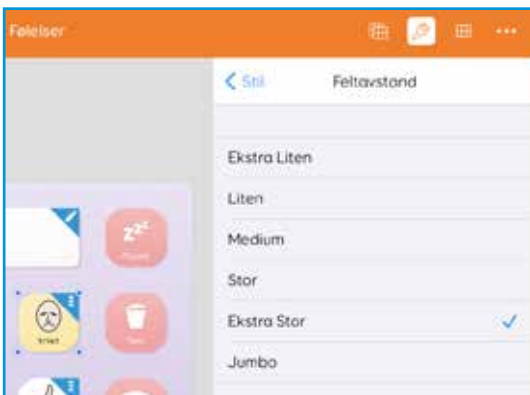


Extra large cell spacing

Hvordan får jeg vist etiketten over symbolene? over symbolene?

5.8

Når du er i redigeringsmodus og ingen felter er merket, trykker du på penselikonet for pensel på menylinjen.

Trykk på felt utseende, og velg etikett over bildet. (Denne endringen gjelder for alle feltene i grid oppsettet.)

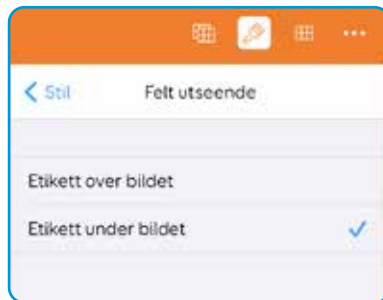

5.9

Hvordan legger jeg til en ekstra rad eller kolonne?

I redigeringsmodus trykker du på firkanten ved siden av malerpensel.



Merk et felt ved siden av der du vil ha den nye raden eller kolonnen, og sett inn.



Hvordan endrer jeg bakgrunnsfargen i en side?

5.10

I redigeringsmodus trykker du på grid ikonet ved siden av innstillingsvalgene og velger Grid Bakgrunn. Her kan du velge en farge eller et bilde for bakgrunnen i grid oppsettet.

Du kan endre bakgrunnen for alle sidene grid oppsettet ved å velge Aktiver for alle sider.








Innstillinger og tilgang

6.1

Hvordan kan jeg endre min stemme?

Hvis du vil endre stemmen du bruker, går du til Innstillinger, Tale og velger fra listen over tilgjengelige stemmer. Du kan også kjøpe og laste ned nye stemmer fra App Store på denne skjermen og finne stemmer på andre språk

Hvis du vil endre hastigheten og toneleie på stemmen, går du til Innstillinger, Tale og velger Konfigurer. Trykk på Les opp for å høre en forhåndsvisning av stemmen mens du justerer hastigheten, toneleie og volum.

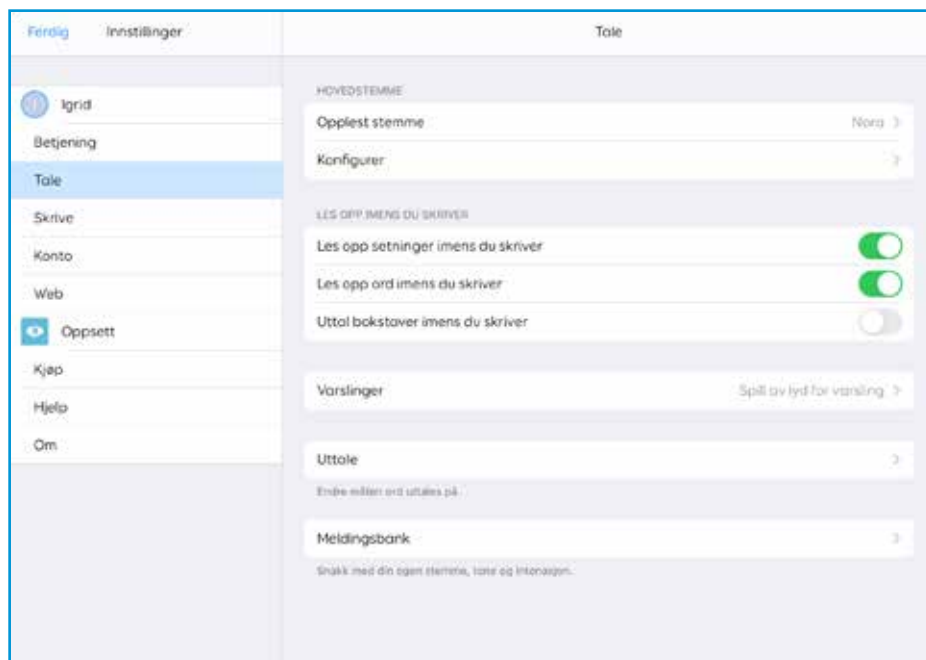


Hvordan retter jeg uttalen til et ord?

6.2

Gå til Innstillinger, Tale, Uttale og velg plusstegnet for å legge til en ny uttale.

Skriv inn ordet slik det vanligvis blir stavet ved siden av Ord, og skriv deretter inn hvordan du vil at det skal høres ved siden av uttale.

Trykk på Test, og når du er fornøyd med resultatet, trykker du på Lagre øverst i skjermbildet.

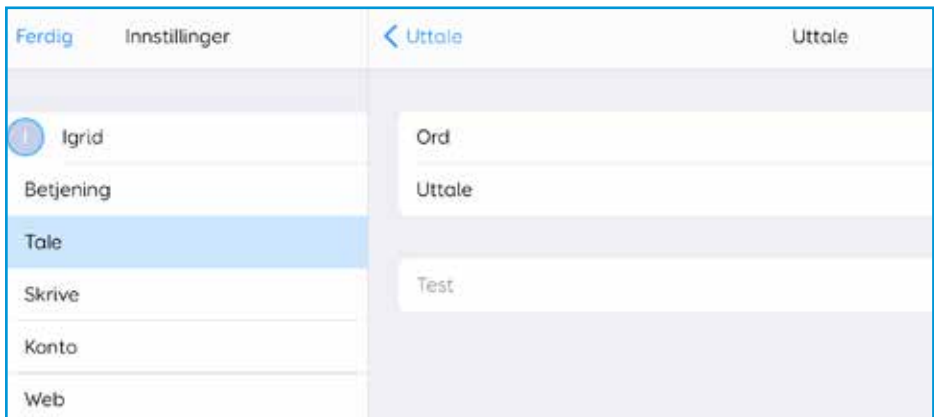

6.3

Hvordan endrer jeg språket i et grid oppsett?

Å gå til Innstillinger, oppsett, Språk

The screenshot shows the 'Oppsett' (Settings) page for 'Symbol Prat B'. The left sidebar is under 'Innstillinger' (Settings) and has 'Oppsett' selected. The main content area shows the following settings:

- Navn:** Symbol Prat B
- Språk:** Norsk bokmål (Norge) >
- INNSTELLINGER:**
 - Skriveområdeaktivering:** Trykk i skriveområdet for å flytte markøren >
 - Vis symboler:** Les og skriv med symboler >
 - Symbol biblioteker:** >
- SAMMENDRAG:** Symbol Prat er en pakke med kommunikasjonsoppsett for symbolbrukere. Her finner du sider for å uttrykke meninger, samt sider som omhandler ulike tema som skole, hjem, trening og mye mer. >
- DOKUMENTASJON:** >

Hvordan velger jeg hva som skjer når skriveområdet er valgt?

6.4

Gå til Innstillinger, Oppsett, Skriveområde aktivering.

Her kan du angi skriveområdet som skal snakke når det er merket, eller flytte markøren slik at du kan redigere meldingen

Trykk i skriveområdet for å snakke

Trykk i skriveområdet for å flytte markøren



6.5

Hvordan slår jeg symboler i skrivefelt av og på?

Du kan velge om symboler skal vises i skriveområdet ved å gå til Innstillinger, grid Oppsett, Vis symboler.


Les og skriv med symboler

Les og skriv uten symboler

Hvordan legger jeg til et symbolbibliotek?

6.6

For å legge til et ekstra symbolbibliotek (f.eks. SymbolStix eller Snaps-bilder), gå til Innstillinger, grid oppsett, Symbolbiblioteker og velg plusstegnet.

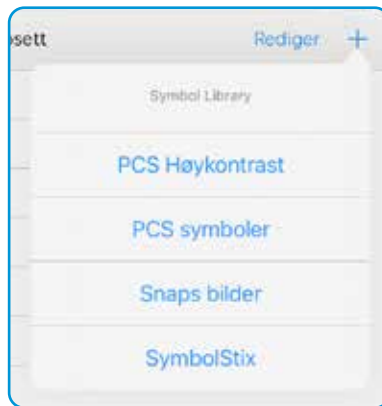


6.7

Hvordan velger jeg hvilket symbolbibliotek som foreslås som standard?

Du kan endre rekkefølgen som symboler foreslås i, ved å gå til Innstillinger, grid Oppsett, Symbolbiblioteker og Rediger.

Dra symbolbiblioteket opp eller ned på listen ved hjelp av de tre linjene til høyre på skjermen.

Symboler fra biblioteket øverst på listen foreslås først. Et symbolbibliotek kan fjernes ved å trykke på den røde sirkelen ved siden av.

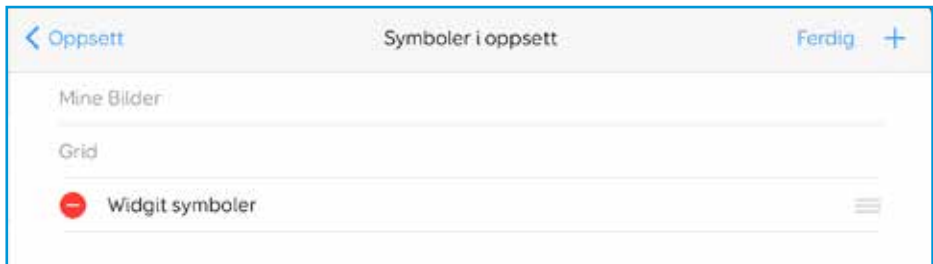


Hvordan velger jeg et oppsett som standard når programmet startes?

6.8

I Innstillinger velger du brukeren fra menyen til venstre.

Trykk oppstart, og velg grid oppsettet du vil åpne når Grid for iPad startes.

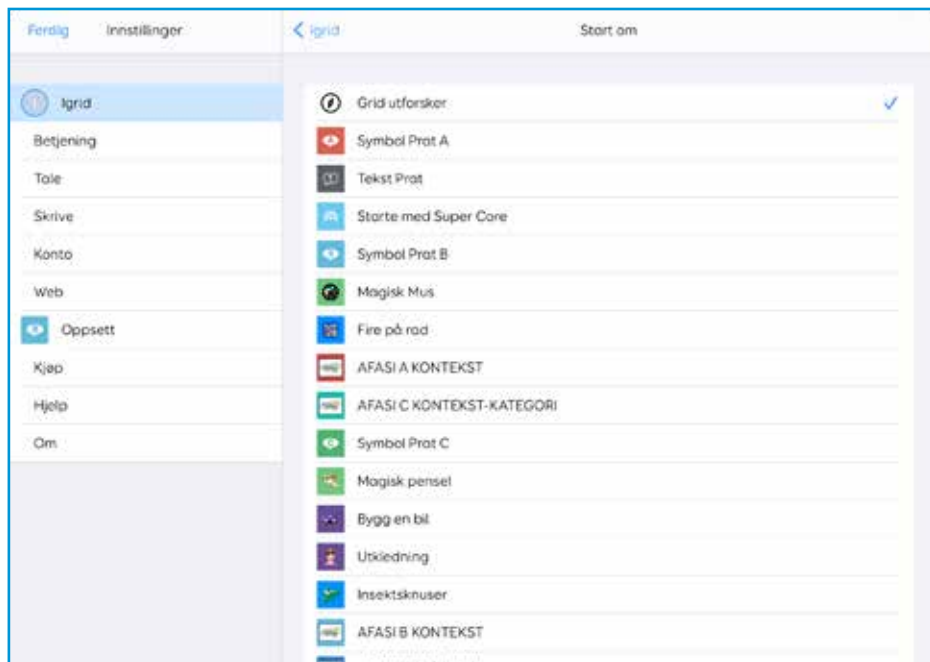

6.9

Hvordan kontrollerer jeg når det leses opp tekst mens jeg skriver?

Gå til Innstillinger, Tale.


Under Les opp mens du skriver kan du velge om teksten skal uttales etter hver setning, ord og tegn.



Hvordan konfigurerer jeg VoiceOver på iPad?

6.10

Gå til iPad-innstillingene - Generelt - tilgjengelighet VoiceOver for å slå på VoiceOver, og velg hvordan du vil at voiceover skal høres.

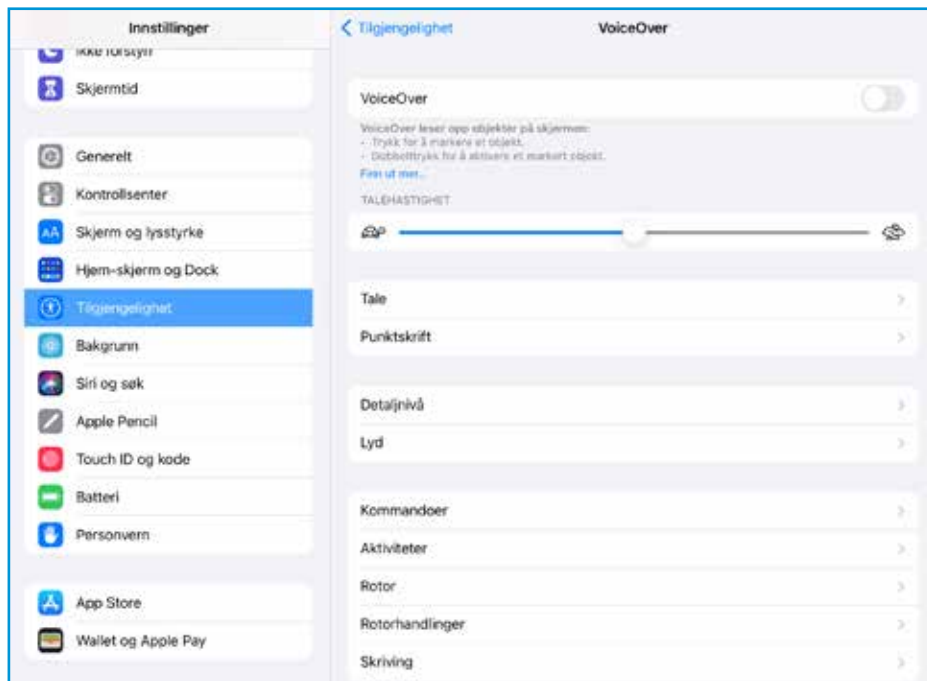

Grid for iPad

Smartbox
thinksmartbox.com

G4i-FAQS-A-NO