


Talk Pad

Din veiledning

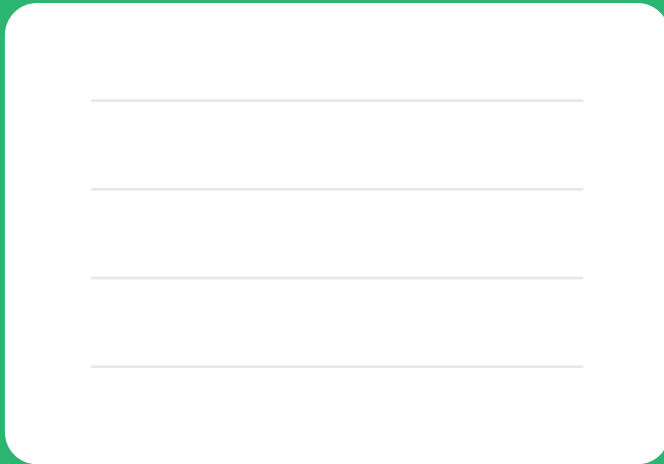

Bruke Talk Pad på en sikker måte

Bruke Talk Pad

Grid må ikke benyttes som eneste hjelpemiddel for å ringe nødnummer eller alarm.

Grid er ikke utviklet for å benyttes til medisinsk vurdering.

thinksmartbox.com/safety

Grid for iPad og dataene dine

Grid for iPad lagrer ikke data online uten din tillatelse. Alle data om sosiale kontoer og e-postkontoer lagres lokalt og deles aldri.

Når du oppretter en konto i Grid for iPad, vil du bli presentert med flere personvernsinnstillinger. Med din tillatelse kan Grid for iPad benytte chattehistorikk og bruke stedsdata for å forbedre forutsigelsen over tid. Disse dataene lagres alltid lokalt og sendes ikke til Smartbox.

Hvem er Talk Pad for?

En ASK bruker



- Kommunikasjon
- Tilgjengelige apper
- Tilgang til andre programvarer

Støtte en ASK bruker



- Endre innstillinger
- Opprette en Grid 3 brukerprofil
- Legge til Grid oppsett
- Redigere eller opprette Grid oppsett

Talk Pad benyttes sammen med Apple iPad

Sørg for at du har lest veiledningen og er kjent med bruken av enheten og operativsystem

Informasjon om Talk Pad

Denne Talk Pad er...

Talk Pad 8

Talk Pad 10

Talk Pad 13

Modellnummeret til denne enheten er...

Talk Pad serienummer er...

Hvem er ansvarlig for din Talk Pad?

Talk Pad er klar for bruk



Talk Pad er klar for å settes opp



Vi vet at det noen ganger kan være forvirrende å se etter en enhet, med alle de forskjellige kontoen og passordene. Bruk disse sidene til å registrere viktige detaljer og påminnelser.

Din Apple-ID er...

En påminnelse om Apple-ID-passordet ...

Din Smartbox konto...

En påminnelse om passordet til Smartbox konoen...

Passordet ditt er

Kode for veiledet tilgang

Hvem kan ringe etter hjelp og støtte ...

Support

Storbritannia: 01684 578868


Norge: +47-22121450

cognita.no




Hva er Talk Pad?

Talk Pad er en berørings-skjermenhet. Samhandle med skjermen ved å trykke med fingrene!

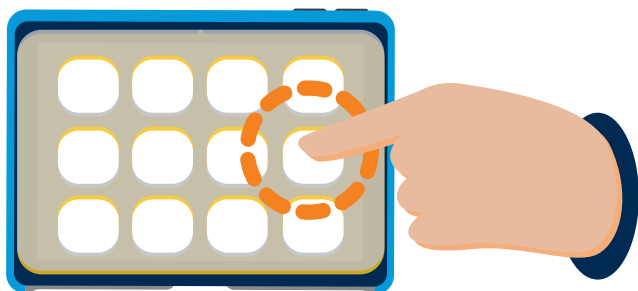

Du kan kommunisere ved hjelp av berørings-skjermen eller ved å konfigurere andre tilgangsmetoder som brytere eller pekeenheter.

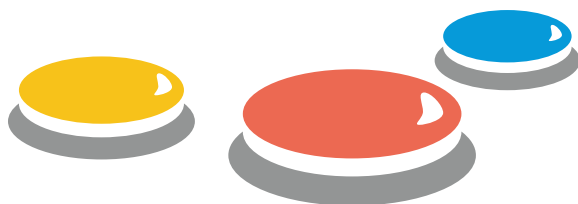

Det finnes flere avanserte funksjoner og innstillinger du kan få tilgang til ved å trykke på knappene og bruke mer enn én finger.




Talk Pad benytter Grid for iPad, en fullstendig ASK -app som har øyeblikkelig tilgang til et stort bibliotek med oppsett.

Det er innhold for alle – tekstoppsett for tekstbrukere til oppsett for kommunikasjon med symboler og utvikling av lese- og skriveferdigheter.

Alt om Grid er utformet for å gjøre det enkelt å bygge setninger, lære språk og snakke.


Sette opp enheten

Trinn 1

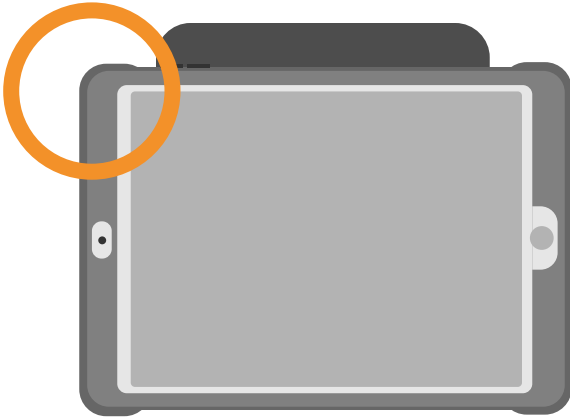

Slå på enheten ved å trykke av/på-knappen på venstre side av enheten.

Trinn 2


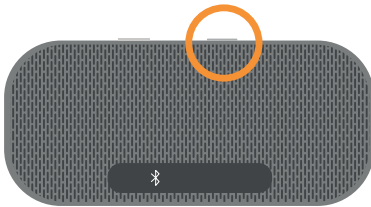


Slå på høyttaleren med knappen øverst.

Trinn 3

Talk Pad kan leveres klar til bruk eller tom.

En kort veiledning følger med for å hjelpe deg med konfigurasjonen.

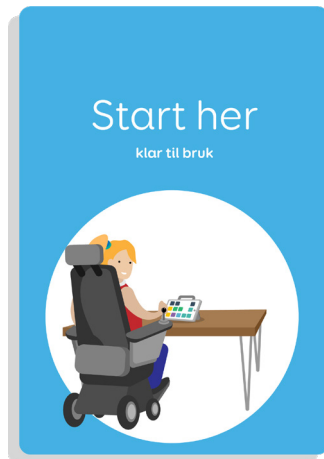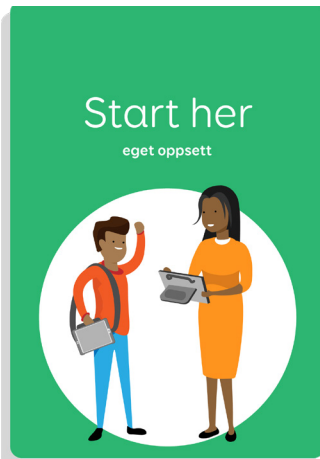

Husk å notere kontoopplysningene dine. Det er plass til dette foran på denne veiledningen.

Innhold

Samtalepartnerenheten 12

1	Talk Pad 8	14
2	Talk Pad 10	16
3	Talk Pad 13	18
4	Skru på Talk Pad	20
5	Slå av enheten	21
6	Lading av Talk Pad	22
7	Blåtann-høyttaleren	24
8	Plassere Talk Pad	26
9	Bruke stativet	28
10	Feste skulderstroppen	30
11	Monteringssett	31
12	Koble til hodetelefoner	32
13	Bruk av fingerguide	33

Komme i gang med iPad OS 34

14	Ved hjelp av berøringsskjermen	36
15	Startsiden for Talk Pad	38
16	Åpne og lukke programmer	40
17	Innstillinger	42
18	Konto og sikkerhet	43
19	Låse Talk Pad	44
20	Innstillinger for tilgjengelighet	45
21	Guidet tilgang	46
22	App Store	47

Komme i gang med Grid for iPad 48

23	Bli kjent med Grid 3	50
24	Smartbokens konto og profil	52
25	Grid utforsker	53
26	Alternativer for Grid utforsker	54
27	Grid oppsett	56
28	Grid meny	58
29	Redigeringsmodus	60
30	Skjule menyen	62

Se etter din Talk Pad 64

31	Benytte Grid for iPad	66
32	Oppdatere iPad OS	68
33	Sikkerhetskopiere oppsett med Dropbox	69
34	Sikkerhetskopiere Grid-brukeren	70
35	Support	72
36	Finne modell og serienummer	73
37	Ta ut iPad-en	74
38	Sette inn iPad-en	75
39	Sikkerhet	76

Samtalepartnerenheten

Denne delen dekker alt du trenger å vite om Talk Pad -maskinvaren.


Bruk denne til å bli kjent med porter og knappene Talk Pad har i tillegg til andre funksjoner på enheten, for eksempel høyttaleren, stropperinger og stativ.

1	Talk Pad 8	14
2	Talk Pad 10	16
3	Talk Pad 13	18
4	Skru på Talk Pad	20
5	Slå av enheten	21
6	Lading av Talk Pad	22
7	Blåtann-høyttaleren	24
8	Plassere Talk Pad	26
9	Bruke stativet	28
10	Feste skulderstroppen	30
11	Monteringssett	31
12	Koble til hodetelefoner	32

1


Talk Pad 8

- iPad mini i solid etui
- Stropp
- Ladekabel for iPad
- Ladekabel for høyttaler
- Skjermbeskytter
- Bæreeveske
- Benytte Grid for iPad

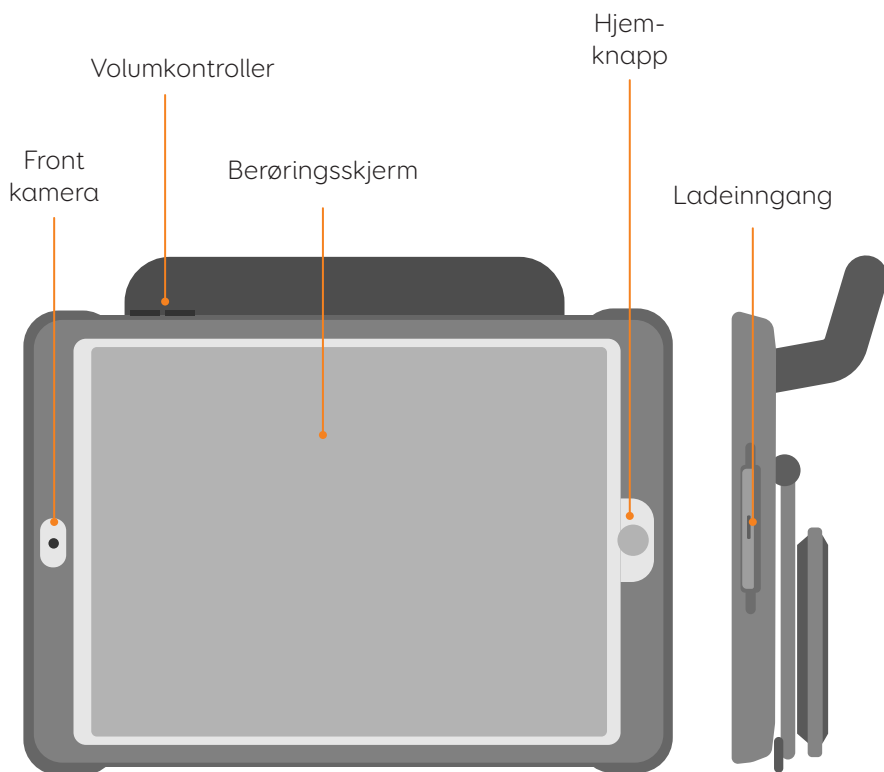

Talk Pad 8 har en liten 8-tommers skjerm og er lett nok til å bæres enkelt rundt med håndtaket eller den medfølgende skulderremmen.


Den robuste vesken og skjermbeskytteren holder iPad på plass, mens Bluetooth-høytaleren alltid er festet, slik at du kan høre den i enhver situasjon.

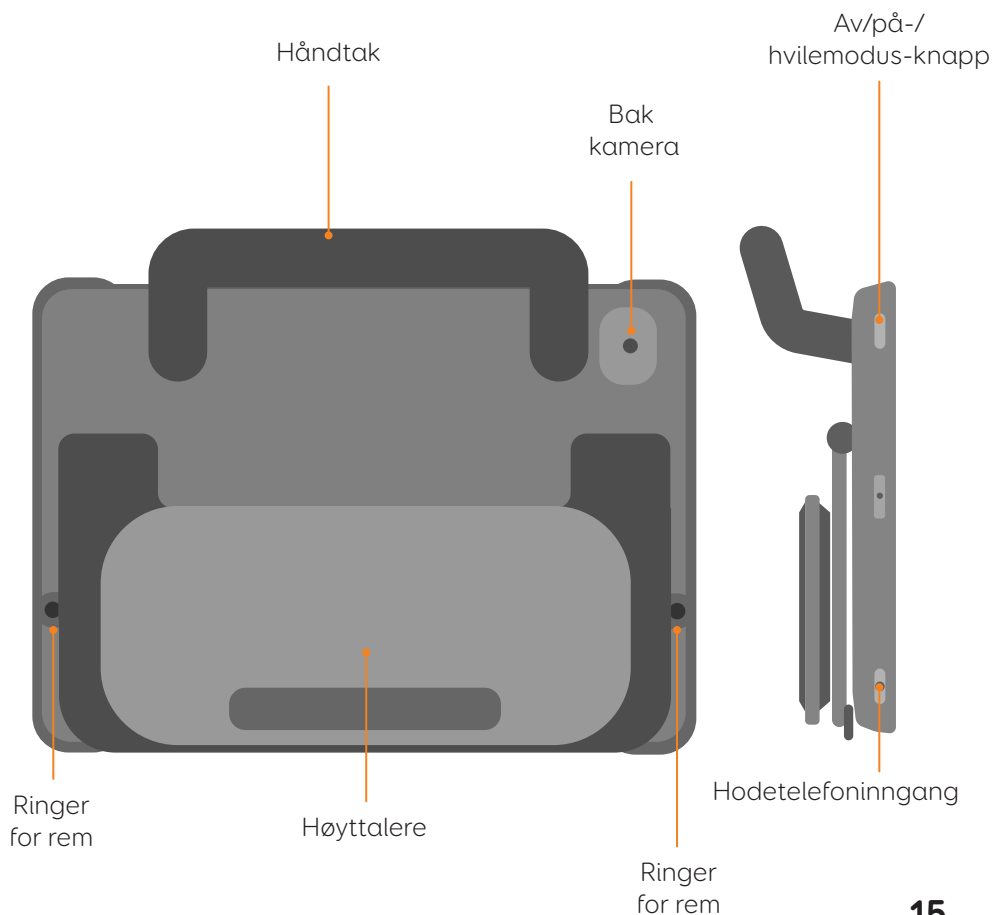

2

Talk Pad 10


- iPad i solid etui
- Stropp
- Ladekabel for iPad
- Ladekabel for høyttaler
- Skjermbeskytter
- Bæreveske
- Benytte Grid for iPad

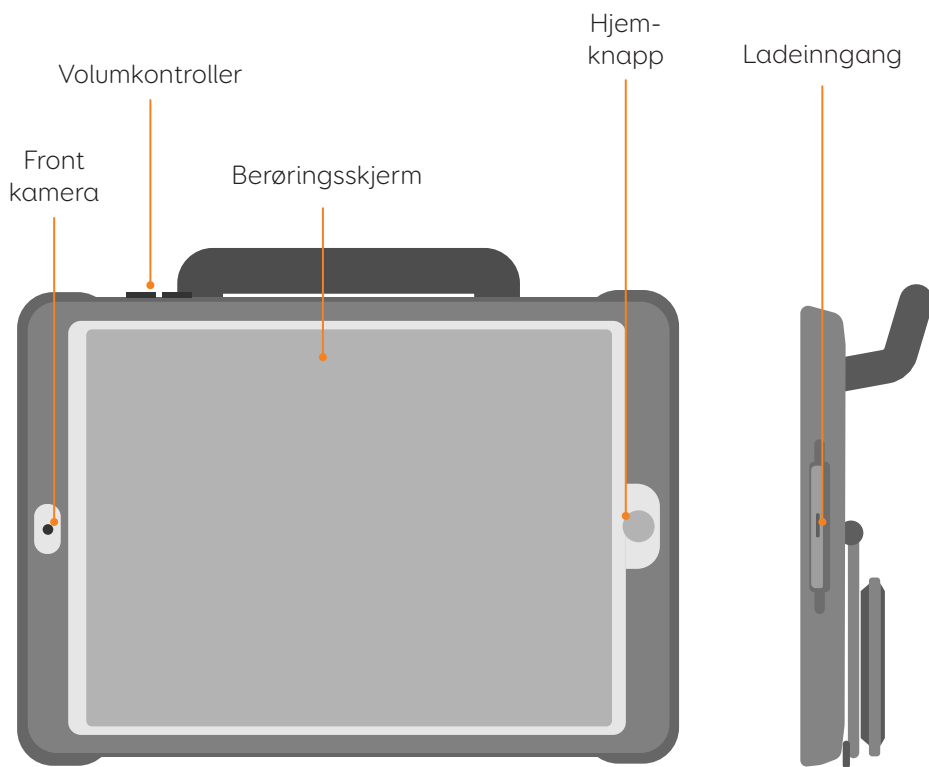

Talk Pad 10 har en 10-tommers skjerm og er lett nok til å kunne bæres rundt med håndtaket eller den medfølgende skulderremmen.

Den robuste vesken og skjermbeskytteren holder iPad på plass, mens Bluetooth-høytaleren alltid er festet.


Tilkoblingspunktene for monteringsplaten betyr at du kan montere enheten på en rullestol eller et stativ.

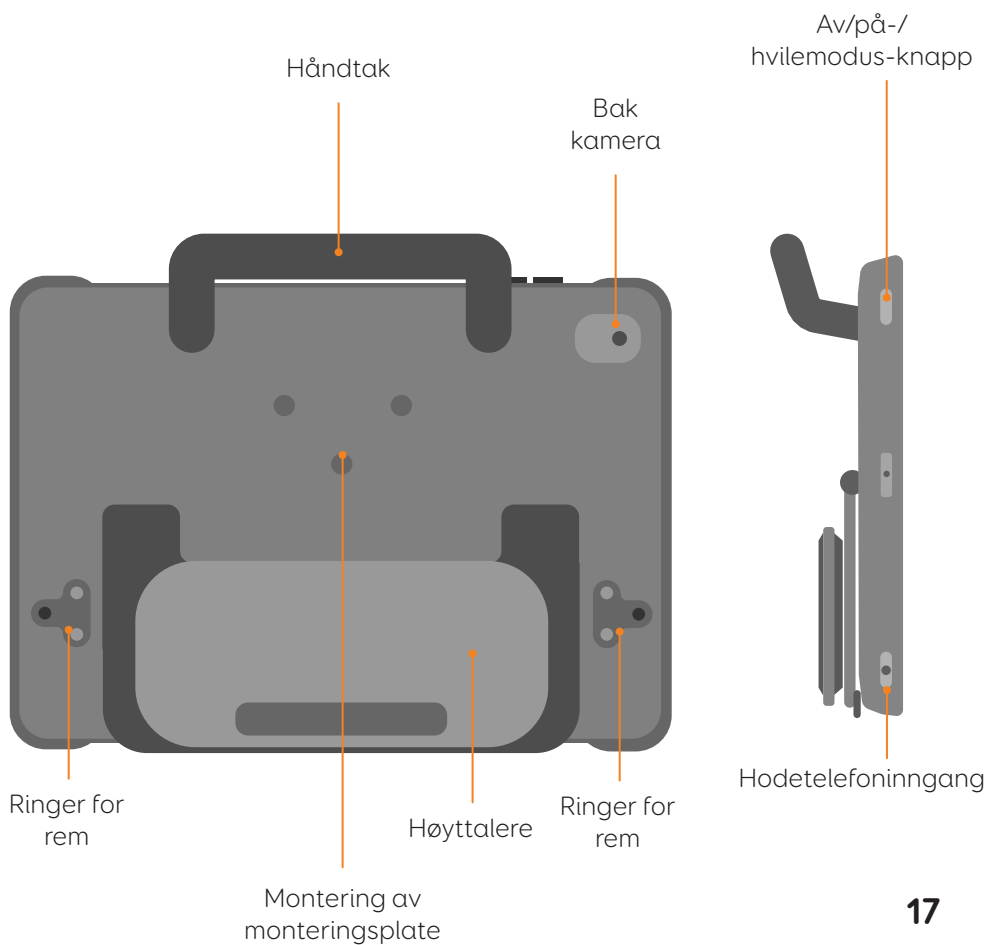

3

Talk Pad 13


- iPad Pro i solid etui
- Stropp
- Ladekabel for iPad
- Ladekabel for høyttaler
- Skjermbeskytter
- Bæreveske
- Benytte Grid for iPad

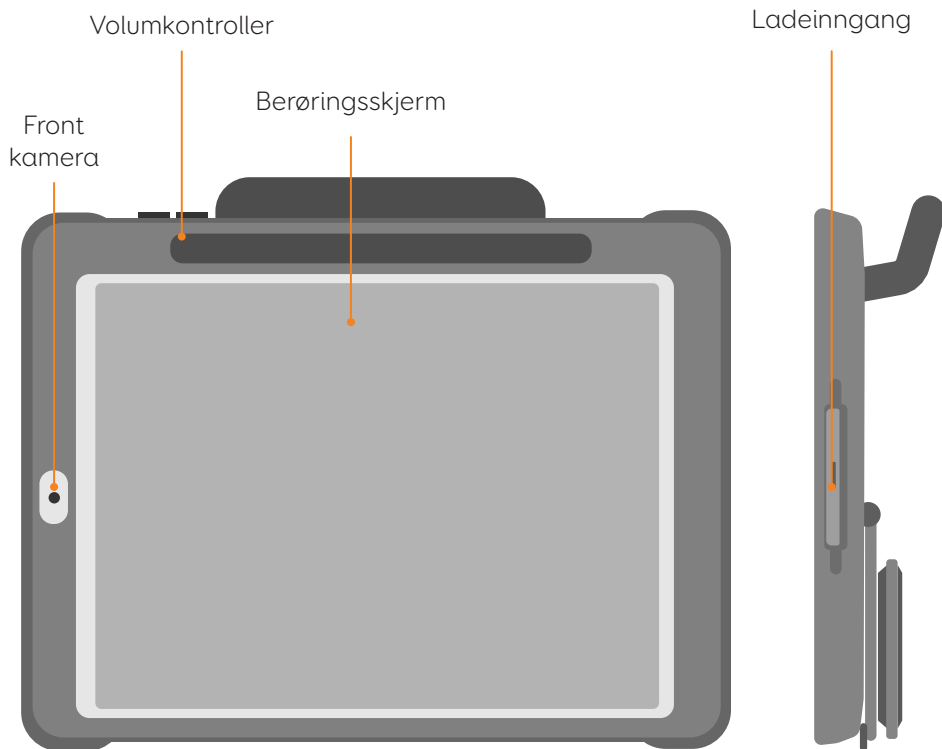

Talk Pad 13 har en 13-tommers skjerm og kan enkelt bæres rundt med håndtaket eller den medfølgende bære remen. Den store skjermen og den kraftige prosessoren gjør enheten rask og responsiv.

Den robuste vesken og skjermbeskytteren holder iPad på plass, mens Bluetooth-høytaleren alltid er festet.

Tilkoblingspunktene for monteringsplaten betyr at du kan montere enheten på en rullestol eller et stativ.

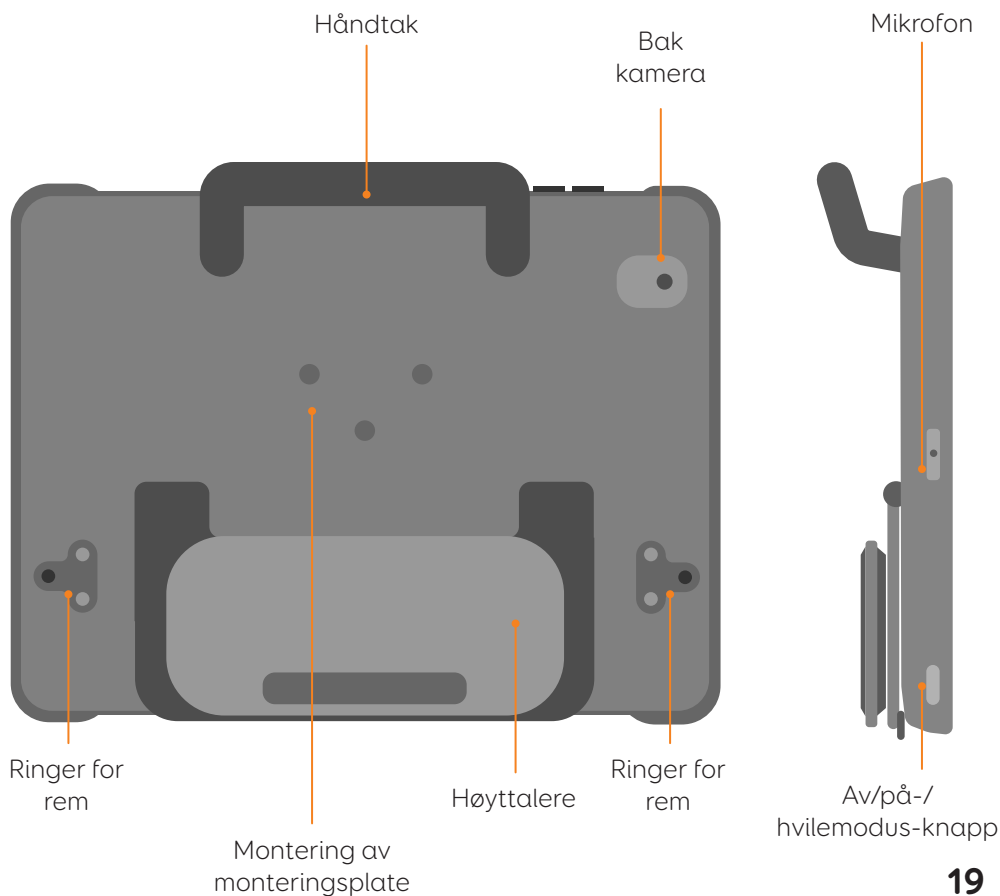


4

Skru på Talk Pad

Av/på-knappen finner du øverst til venstre på Talk Pad.

Når du skal slå på enheten, trykker du på og holder nede av/på-knappen i 3 sekunder.

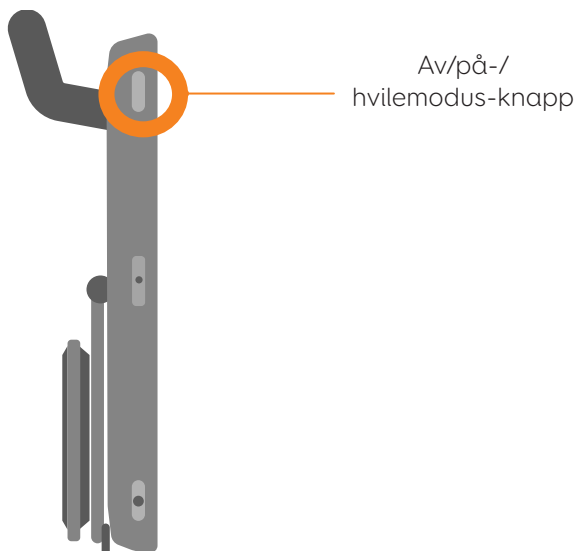

Sette Talk Pad i dvale

Hvilemodus er en modus med lavt strømnivå der enheten er inaktiv og skjermen er av.

Trykk på av/på-knappen for å sette enheten i dvalemodus.

Trykk på av/på-knappen igjen for å aktivere enheten.


Slå av enheten

5

Når du skal slå av enheten, trykker du på og holder nede av/på-knappen i 3 sekunder.

Hvis du har et Talk Pad 13, trykker du på og holder nede av/på-knappen og trykker på volum opp-knappen.

Skyv deretter knappen 'Slide to Power OFF'-bryteren på skjermen for å slå av enheten. Trykk på X for å avbryte avslåingen.

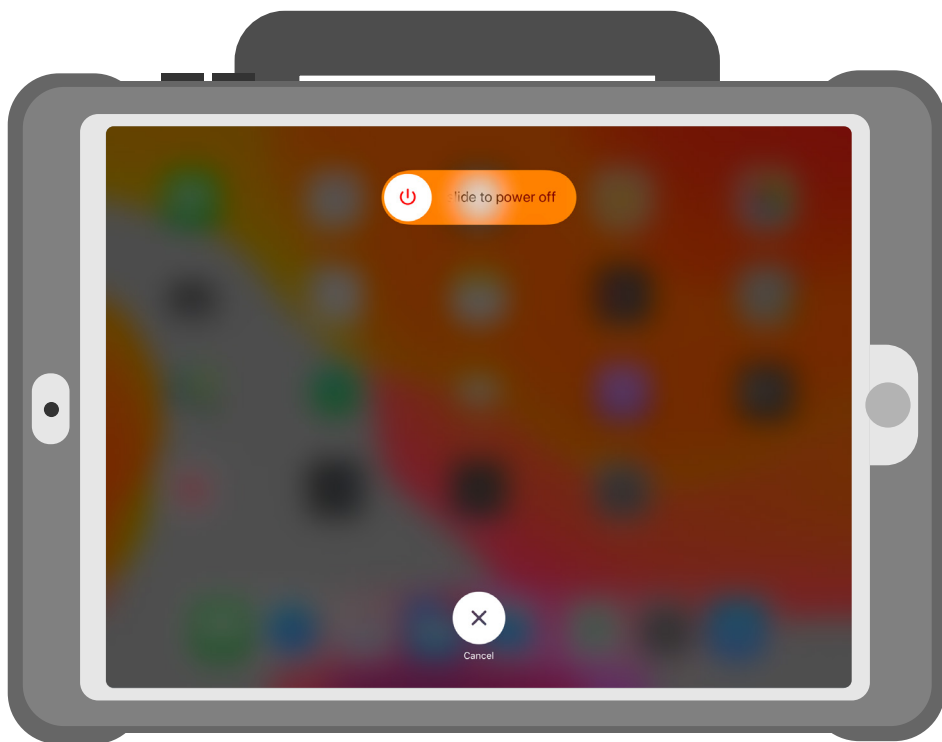

6

Lading av Talk Pad


Talk Pad og høyttaleren har separate batterier slik at begge må lades samtidig.


Koble Talk Pad-ladeporten til strømadapteren, adapteren er tydelig merket.

Koble høyttalerens ladeport til strømadapteren.

Koble strømadapteren til strømuttaket for å lade.


Det er best å lade Talk Pad når den ikke er i bruk.

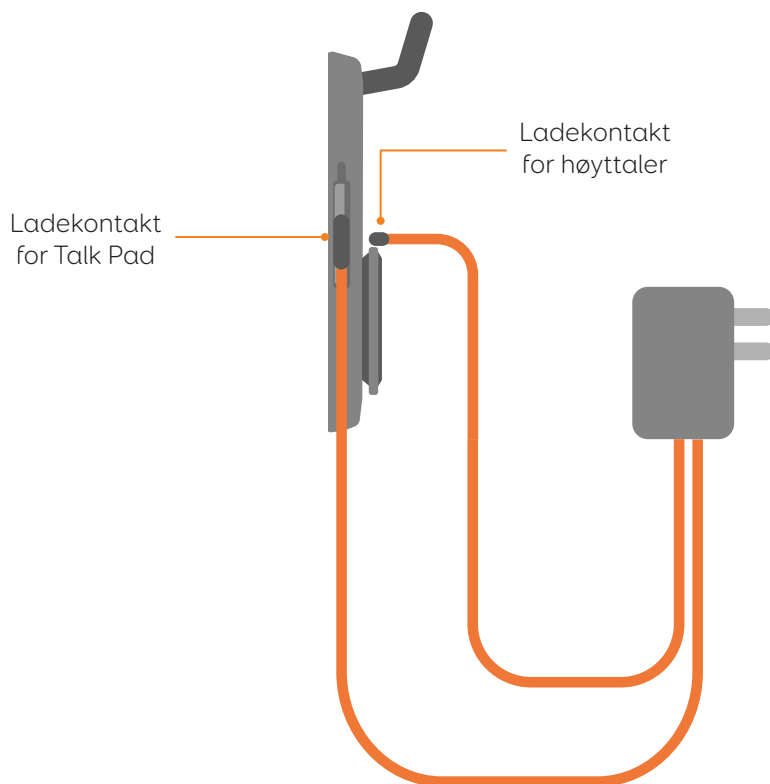

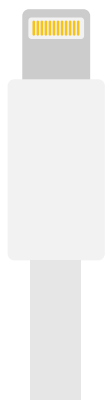


Lightning-kontakt

Talk Pad 8 og 10
ladeporter

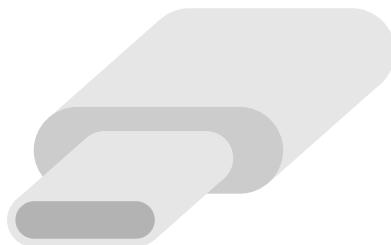

USB-C-kontakt

Ladeporter for Talk Pad
13 og høytaler

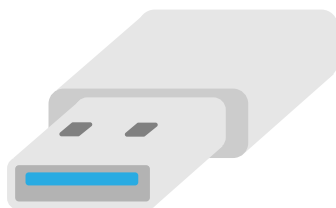

USB - A kontakt


Kobles til Lightning-
kabel og USB-kabel til
ladeadapter

7

Blåtann-høytaleren

Talk Pad har en innebygd Bluetooth-høytaler.


Avhengig av oppsettet av Talk Pad vil den være paret når du pakker ut enheten, eller du må pare høytaleren som en del av prosessen.

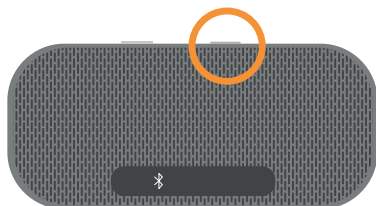

Høytaleren har en egen strømknapp og batteri. Husk å lade høytaleren når du lader enheten.

Hvor er blåtann -innstillingene?

Blåtann -innstillingene finner du i Innstillinger-appen. Velg Innstillinger og deretter blåtann for å vise en liste over alle tilkoblede enheter. Høytaleren er oppført som Lenovo 700BT.

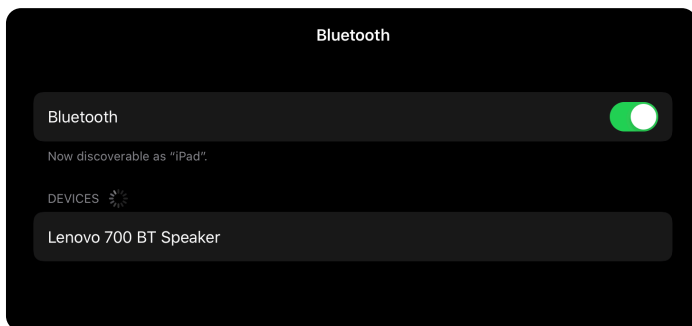


Koble til blåtann -høytaleren på nytt

Hvis høytaleren blir koblet fra enheten, er det enkelt å koble den til igjen.


Trinn 1

Hvis du har plassert SmartBox-klistremerket over høytaleren, må dette fjernes.

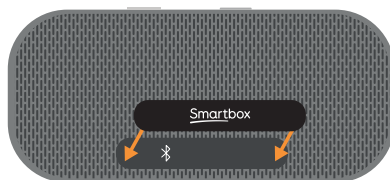

Trinn 2

Hold blåtann -knappen inne i flere sekunder til det vises et blått lys på høytaleren.

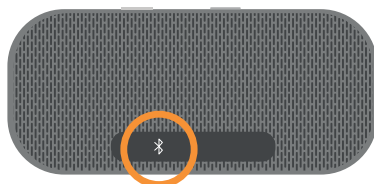

Trinn 3

Åpne Innstillinger-appen, og velg blåtann. Trykk Lenovo 700 BT høytaler for å koble til høytaleren.

8

Plassere Talk Pad

Talk Pad kan bæres med det kraftige håndtaket.

Stativet på baksiden av Talk Pad kan brukes til å plassere enheten på et bord eller på et skrivebord.

For ekstra sikkerhet kan du feste den medfølgende stroppen slik at du kan ha enheten rundt halsen.



Talk Pad 10 og 13 kan også monteres på stativ med den universale monteringsplaten Daessy (tilleggsutstyr) og Rehadapt.


Dette kan også la deg plassere Talk PAd på rullestol eller over en seng.




9

Bruke stativet

Stativet for Talk Pad kan brukes til å plassere den på et skrivebord eller et bord, slik at den kan brukes i alle vinkler.

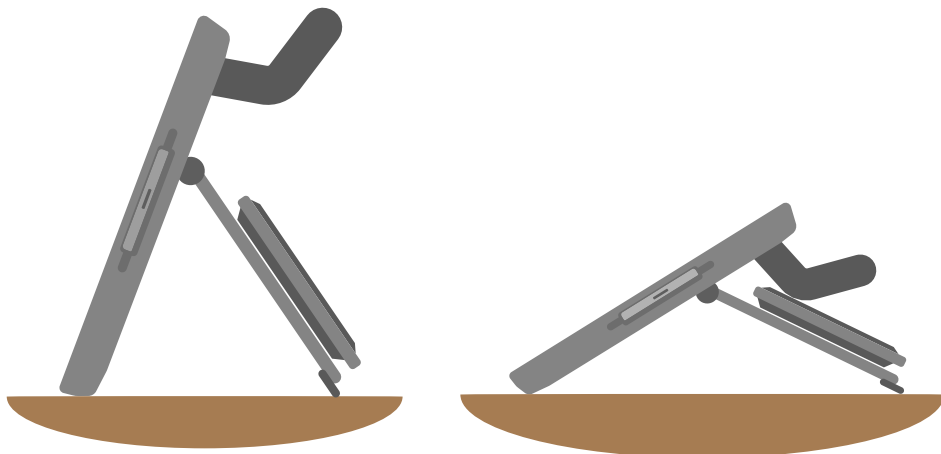


Vær oppmerksom på at hvis du har monteringsplaten festet til Talk Pad, må denne fjernes før du bruker stativet, da det kan skade høyttaleren.

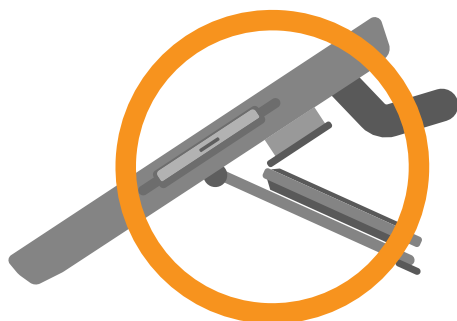

Justere stativet

Vi leverer stativet slik at det kan flyttes med en fast bevegelse, men blir værende på plass når det er i bruk. Hvis du vil justere stativets tiltrekkingsmoment, kan du bruke en unbrakonøkkel til å stramme låsemutteren. Ikke trekk til for mye.

Legg merke til at du må gjøre dette på begge hengslene!

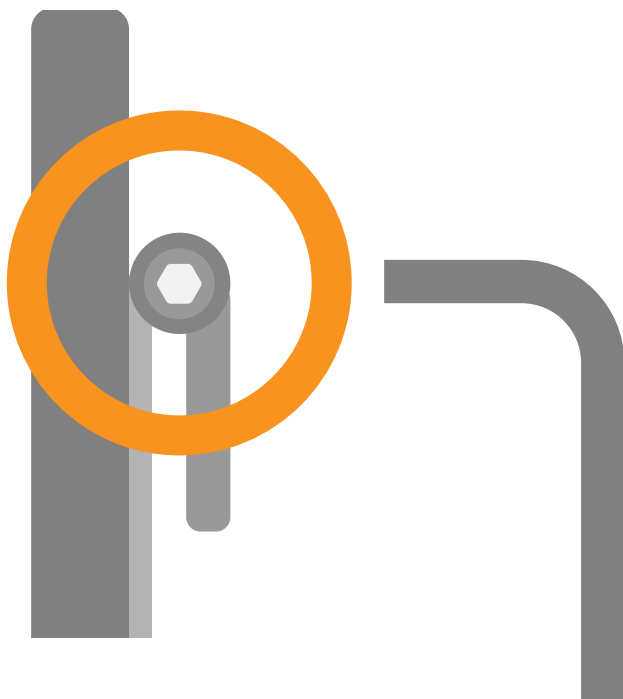


10

Feste skulderstroppen

Vesken leveres med en skulderrem som tilleggsutstyr.


Denne kan monteres gjennom stroppehull på baksiden av vesken.

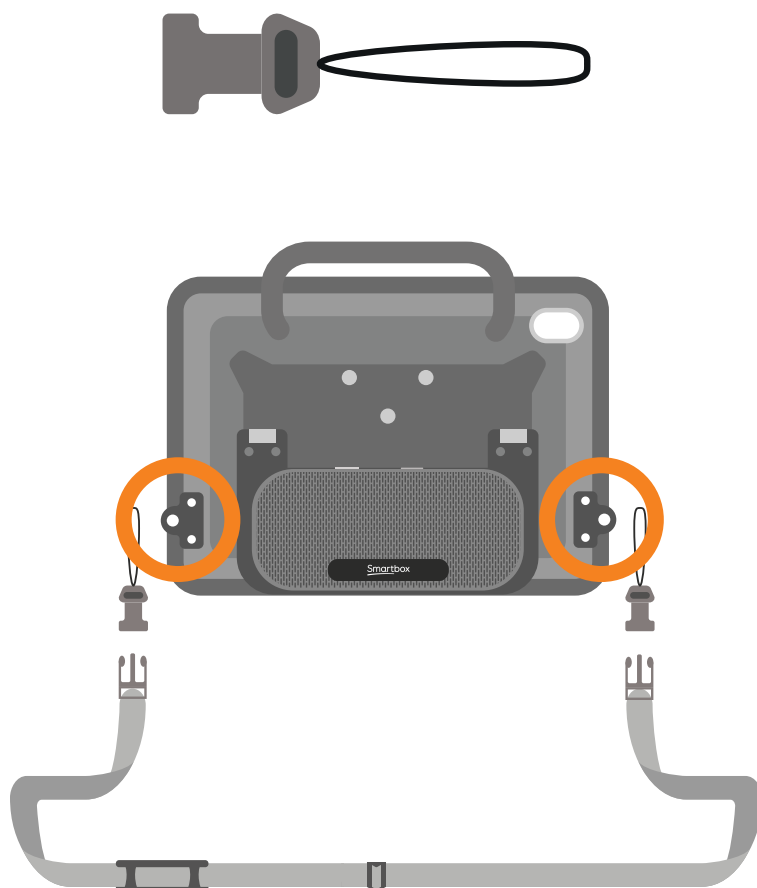

Monteringssett

11

Med iPad-beskyttelsen kan du feste en monteringsplate slik at du kan plassere enheten slik du vil.

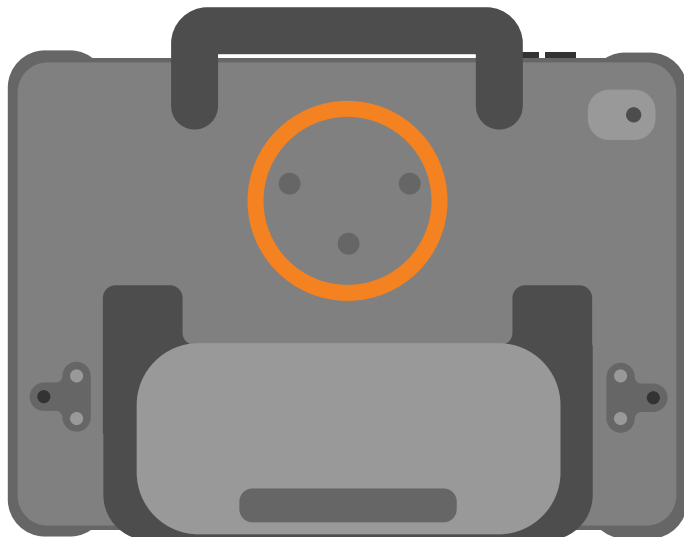

Monteringsplate selges separat.


Fest avstandsstykket og platen til de tre skruehullene bak på huset.



12

Koble til hodetelefoner

Talk Pad 8 og 10 har en 3,5 mm hodetelefonkontakt. Du kan bruke denne til å koble et par hodetelefoner til enheten for å lytte alene.

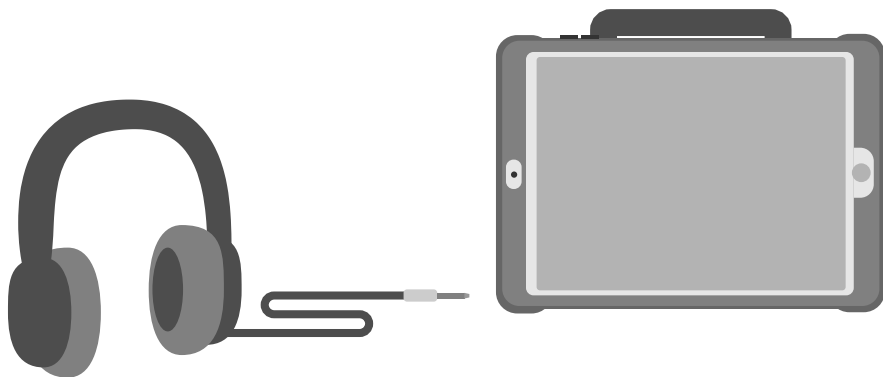

Når du kobler til hodetelefoner, stopper lyden fra Bluetooth-høytaleren.

Hvis du vil fortsette å bruke Talk Pad til kommunikasjon, kobler du fra hodetelefonene og lar Bluetooth-høytaleren koble til på nytt et øyeblikk.

Bruk av fingerguide

13

En fingerguide kan enkelt festes til samtalepartnerens skjerm.

Fingerguider er plastoverlegg for berøringsskjermen som er klippet ut for å passe til ulike oppsett i Grid for iPad. Dette hjelper deg med å foreta mer nøyaktige valg på berøringsskjermen.

Fingerguide på Talk Pad har et unikt grep. Dette holder fast til skjermen, men kan fjernes uten søl. De kan festes og fjernes flere ganger og rengjøres enkelt.

Bruke en fingerguide

Kontroller at skjermen er ren, og at fingerguide-beskyttelsen er fjernet fra baksiden.

Kontroller at Grid for iPad er åpen, og at oppsettet dere benytter er på.

Plasser fingerguide på skjermen og juster den etter oppsettet.

Trykk kantene på fingerguiden godt mot skjermen..

Fjerne en fingerguide

Før neglen, et kredittkort eller et annet flatt objekt mellom fingerguiden og skjermen og løft det forsiktig. Du kan fjerne fingerguiden.

Komme i
gang med
iPad OS

Talk Pad er bygd på en Apple iPad. iPad kjører på et operativsystem som kalles iPad OS (noen ganger kalt iOS).

iPad OS har en rekke funksjoner som hjelper deg med å navigere rundt på Talk Pad, i tillegg til tilgjengelighetsfunksjoner for større tilgang.

13	Ved hjelp av berørings skjermen	36
14	Startsiden for Talk Pad	38
15	Åpne og lukke programmer	40
16	Innstillinger	42
17	Konto og sikkerhet	43
18	Låse Talk Pad	44
19	Innstillinger for tilgjengelighet	45
20	Guidet tilgang	46
21	App Store	47

14

Ved hjelp av berøringsskjermen

Talk Pader hovedsakelig en berøringsskjermenhet. Når du navigerer iPad OS er det noen bevegelser som vil hjelpe deg med å komme deg rundt raskt.



Trykk på

Trykk fingeren mot skjermen, og fjern den raskt.

Når vil du gjøre dette? - Hvis du vil åpne appen Grid for iPad, følger du en kobling ved hjelp av tastaturet på skjermen.



Trykk på og hold nede

Trykk fingeren mot skjermen, og hold den der et øyeblikk.

Når vil du gjøre dette? - Åpne en hurtigmeny for å utheve et ord som skal kopieres.



Sveip

Beveg én finger raskt over skjermen.


Når vil du gjøre dette? - Hvis du vil flytte mellom sider, går du gjennom en liste eller en samling med bilder.



Bla

Trykk på skjermen, og flytt fingeren.

Når vil du gjøre dette? - for å navigere opp og ned på en webside eller et dokument eller rundt et bilde.

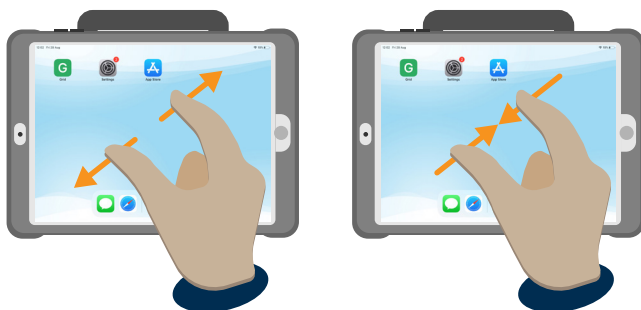

Zoom

Plasser to fingre på skjermen, og spre dem fra hverandre for å zoome inn, før dem sammen for å zoome ut.


Når vil du gjøre dette? - Vis liten tekst hvis du vil gjøre bildet større på skjermen.

Husk at disse bevegelsene kan kombineres! Hvis du for eksempel trykker og holder på tekst, og deretter sveiper du over teksten du passerer.


15

Startsiden for Talk Pad

Dette er startsiden for iPad OS. Avhengig av oppsettet kan det se litt annerledes ut, men det vil alltid fungere på samme måte.

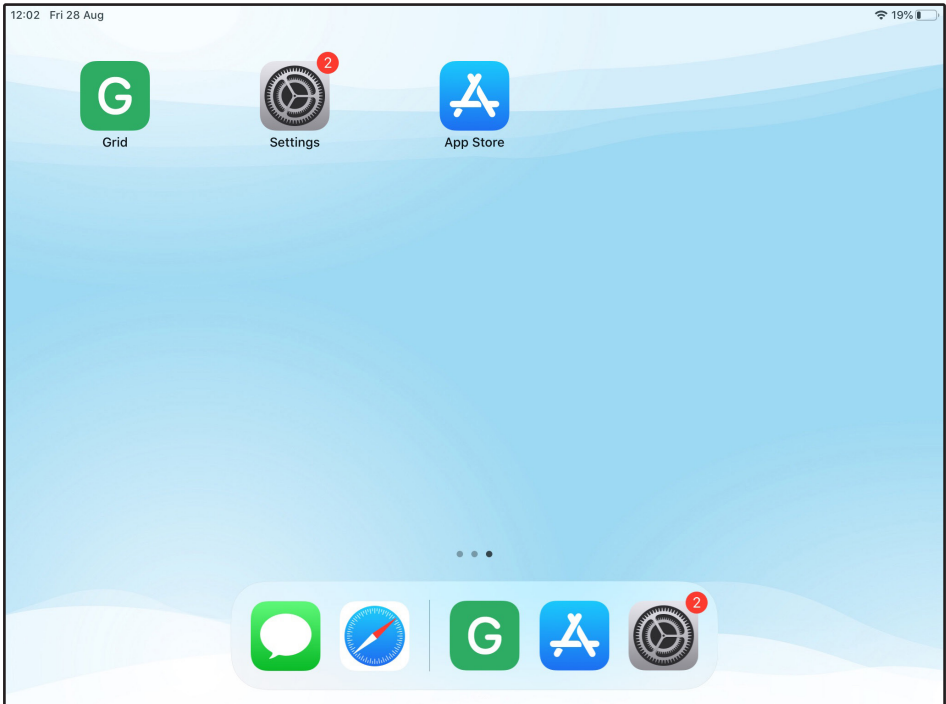

Hvis du laster ned flere programmer til Talk Pad , vil startskjermen fylles opp og ha flere sider. Du kan sveipe mellom sider.

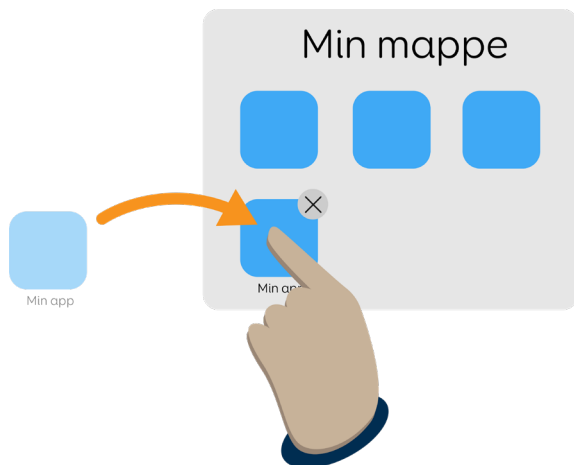

Apper kan organiseres i mapper. Du kan gjøre dette ved å trykke og holde på et program til det blir bredere. Dra den deretter over i mappen du vil plassere den i. Hvis du drar appen over en annen app, oppretter du en ny mappe.

Tips: Hvis du har satt opp enheten selv, har du mange apper som Apple har gitt deg som du kanskje ikke trenger! Hvis du vil slette et program, trykker og holder du på ikonets og velger **Slett program**.

Du kan også lage en mappe med apper som du kanskje ikke trenger hele tiden!

16

Åpne og lukke programmer


Hvis du vil åpne et program, trykker du på ikonet for det. Programmet åpnes.



Når et program åpnes, fyller det skjermen.

Lukke igjen et program på Talk Pad 8 og 10

Hvis du vil lukke et program og gå tilbake til hjem skjermen, trykker du én gang på Hjem-knappen.

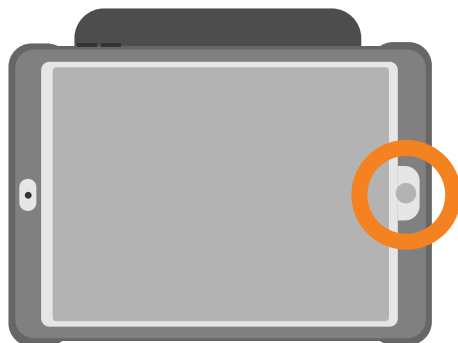

Lukke et program på Talk Pad 13

Hvis du vil lukke et program og gå tilbake til startskjermen, sveiper du opp fra bunnen av skjermen.

Lukker programmer

Når du går ut av et program og går tilbake til startskjermen, lukker du ikke programmet. I stedet er appen minimert. Dette betyr at du kan gå tilbake til hvor du var, for eksempel kan du hoppe rett tilbake til Gridfor iPad.

Hvis du bytter mellom dem, bør du for det meste la programmer stå på vent.

For å lukke et program på Talk Pad 8 og 10

Dobbeltrykk på Hjem-knappen. Dette viser alle åpne og skjulte programmer. Dra deretter appen du vil lukke, oppover.

Lukke et program på Talk Pad 13

Sveip opp fra bunnen av skjermen til midten. Dette viser alle åpne og skjulte programmer. Dra deretter appen du vil lukke, oppover.

Tilpassing av iPad OS og justering av opplevelsen gjøres i Innstillinger-appen.

Her kan du kontrollere nesten alle sider ved Talk Pad, fra å koble til Wi-fi, endre varslingslyder og mye mer.



Nyttige innstillingsområder

Wi-fi

Koble til internett og administrer nettverk.


Generelt

Finn ut mer om Talk Pad.

Skjerm og lysstyrke

Juster hvor lys skjermen er, veksle mellom lys- og mørk-modus og justere tekststørrelsen.

Noen innstillinger kan slås av og på. Trykk "Bytt" ved siden innstillingen for å veksle mellom dem.

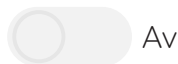

Av



På

iPad OS har en rekke konto- og sikkerhetsalternativer.

Din Apple-ID

Dette er den viktigste kontoen på enheten. Med denne kontoen kan du kjøpe apper fra AppStore, osv. Du vil ha opprettet denne kontoen under installeringen hvis du har et satt opp Talk Pad selv.

Passord

En sekssifret kode som brukes til å låse opp samtalepartnerplaten og bestemte innstillinger.

Tofaktors godkjenning

Dette er koblet til Apple-ID-en din og kobler kontoen din til en annen Apple-enhet eller mobiltelefon. Dette sender en annen enhet en godkjenningskode for å bekrefte pålogging, kjøp og andre sikre prosesser.

Touch ID

Talk Pad 8 og 10 har en fingeravtrykksleser i Hjem-knappen. Dette kan brukes i stedet for et passord for å låse opp enheten og bekrefte bestemte handlinger.

Ansikts-ID

Talk Pad 13 har et avansert kamera på forsiden som kan låse opp enheten med ansiktet ditt.

Kode for veiledet tilgang

Med denne koden kan du avslutte modus for veiledet tilgang.

19


Låse Talk Pad

Hvis du trykker på av/på-knappen på Talk Pad, settes enheten i hvilemodus.

For å vekke enheten må du angi passordet eller bruke berørings-IDen.

Hvis Talk Pad ikke var satt opp ved leveranse, vil du ha lagt til passordet eller berørings-IDen under oppsettsprosessen.

Du kan slå låsen av eller på i Innstillinger-appen under Trykk-ID og passord.

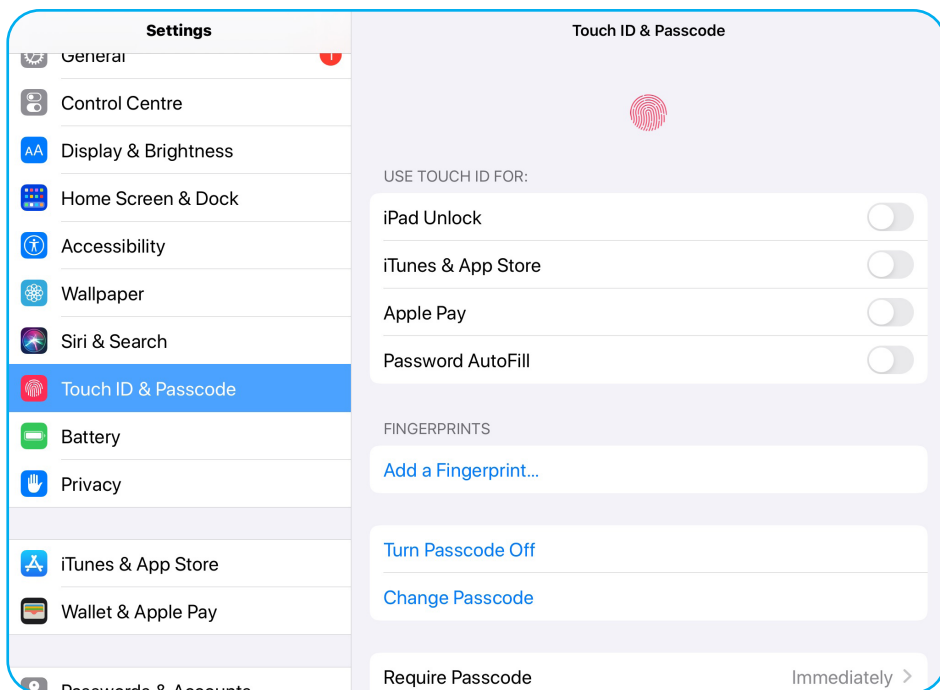

Innstillinger for tilgjengelighet


20

iPad OS har mange tilgjengelighetsfunksjoner som du kan bruke til å gjøre navigeringen enklere.

Du finner tilgjengelighetsfunksjonene i Innstillinger-appen.

Innstillingene for tilgjengelighet er utviklet for iPad OS. Grid for iPad er allerede utformet med tanke på tilgjengelighet, og krever derfor ikke alle funksjonene.

Vi anbefaler innstillingene for berøring og bryter.

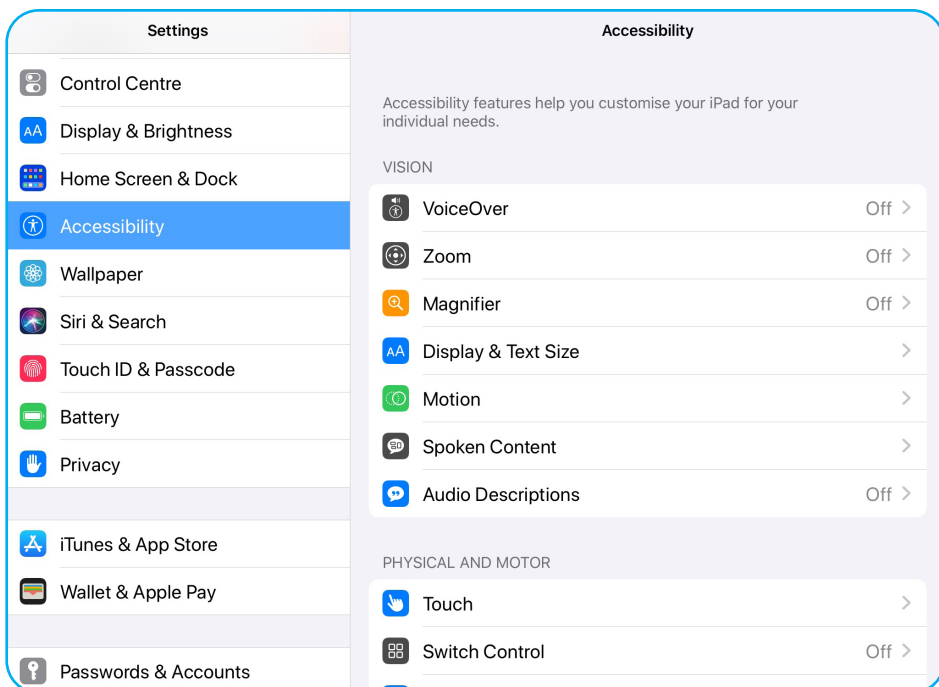

Du kan bruke veiledet tilgang til å låse Talk Pad til bare ett program.

Under **Innstillinger - tilgjengelighet** velger du begrenset tilgang, og deretter slår du på bryteren.

Du må angi en begrenset tilgangskode. Denne koden brukes til å avslutte modusen for begrenset tilgang. Pass på at du tar vare på et notat!

Du kan maskere et område på skjermen for å hindre tilgang, for eksempel for å dekke Grid Utforsker -knappen i Grid for iPad.

Slå på begrenset tilgang på Talk Pad 8 og 10

Trippelklikk på Hjem-knappen for å få tilgang til tilgjengelighetsmenyen.

Slå på begrenset tilgang på Talk Pad 13

Trippelklikk på av/på-knappen for å få tilgang til tilgjengelighetsmenyen.

Slå av begrenset tilgang på Talk Pad 8 og 10

Trippelklikk Hjem-knappen og angi tilgangskode. **Velg slutt.**

Slå av begrenset tilgang på Talk Pad 13


Trippelklikk på av/på-knappen og angi tilgangskode. **Velg slutt.**

Hvis du har konfigurert en Apple-ID, kan du bruke denne til å få tilgang til App Store. Her kan du laste ned nye Apper til Talk Pad

Du kan søke i App Store, bla gjennom etter kategori og vise kart over populære gratis og betalte apper.

Slik betaler du for apper

For å betale for en app må du ha en betalingsmåte knyttet til din Apple-ID.

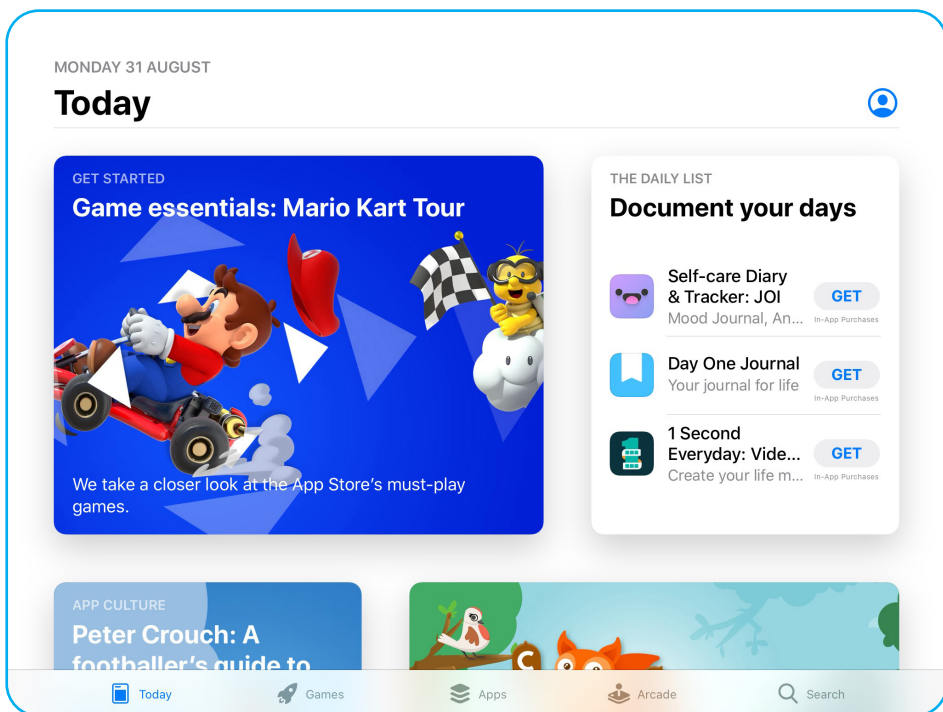

Komme i
gang med
Grid for iPad


Grid for iPad er en fullstendig ASK -app med tilgang til et stort bibliotek med oppsett. Med Grid for iPad kan du angi en stemme, bygge setninger, kommunisere med både tekst, symboler og mye mer.

22	Bli kjent med Grid 3	50
23	Smartbokens konto og profil	52
24	Grid utforsker	53
25	Alternativer for Grid utforsker	54
26	Grid oppsett	56
27	Grid meny	58
28	Redigeringsmodus	60
29	Skjule menyen	62




Profilen din

Brukerprofilen lagrer Smartbox -kontoen, oppsett og andre innstillinger.

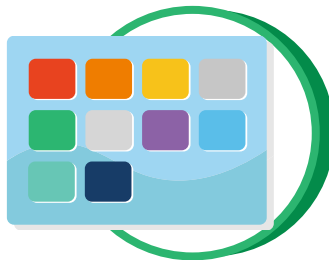

Grid utforsker

Grid utforsker er der du finner alle oppsettene dine.

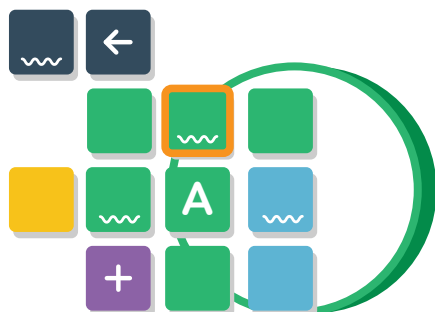

Grid oppsett

Et grid oppsett er som en app i Grid . Dette er ressursene du trenger for å kommunisere med mer.



Redigeringsmodus

Alle Grid oppsett kan personaliseres og enkelt endres for å tilpasse ditt behov. Du kan også lage et helt nytt oppsett

Smartbokens konto og profil

Når du starter Grid for iPad for første gang, går du gjennom noen få trinn for å opprette en SmartBox-konto og opprette profilen din.

Hvis du allerede har en SmartBox-konto, kan du logge deg på fra startskjermen for å aktivere mange av innstillingene.

Du trenger en e-postadresse for å konfigurere en Smartbox konto.

Du kan også koble kontoen din til Dropbox, en online lagringsløsning. Dette gjør at du kan sikkerhetskopiere oppsett og andre personaliseringer, i tillegg til at oppsett kan redigeres eksternt.

Smartbox kontoen din vil lagre


- Brukernavnet ditt
- Dine taleinnstillinger
- Innstillinger for tilgang til Dropbox

Dropbox-kontoen din lagres

- Grid oppsett
- Meldingsbanker

Grid utforsker

25

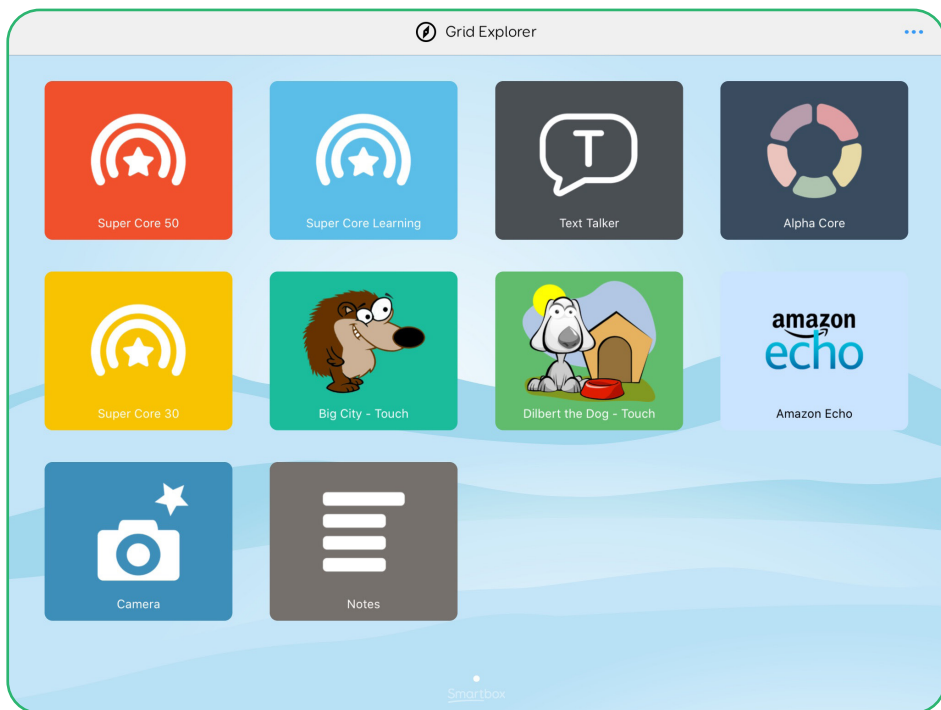


Dette er Grid utforsker , Grid for iPad-startsiden. Hver flis er et oppsett. Hvis du trykker på et Grid oppsett åpnes det.

Hvis Grid utforsker din ikke har oppsett , kan du legge dem til fra skjermen Legg til oppsett.

Alternativer for Grid utforsker

Hvis du trykker på de tre prikkene øverst til høyre i Grid utforsker, åpnes menyen Alternativer for Grid utforsker.

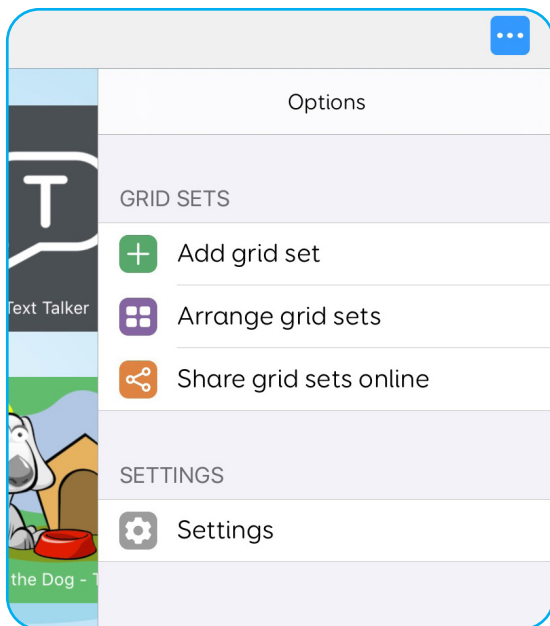

Legg til et oppsett

Åpne vinduet Legg til oppsett, der du kan bla gjennom oppsett etter kategori.



Tilpasse gridoppsett

Lage mapper og slette Grid oppsett fra Grid utforsker



Dele oppsett online

Du kan laste opp oppsett til online-grids, vår plattform for deling av oppsett. Oppsett som er lastet opp til Online Grids på Internett, er tilgjengelige for alle Grid brukere.



Innstillinger

Tilgang til dine Grid innstillinger Her kan du tilpasse hvordan oppsett fungerer , justere profilen din med mer.

Oppsett er organisert i kategorier. Du kan bla gjennom disse når du velger Legg til oppsett på Grid utforsker -menyen.



Symbolkommunikasjon

Symbol kommunikasjon kan brukes til å utforske kjernevokabularet eller bygge setninger utfra tema. Eksempler på dette er Super Core og Symbolpratserien vår.



Tekstkommunikasjon

Tekstprat oppsettene våre har en rekke forskjellige tastaturoppsett og tilleggsfunksjoner som ferdige setninger. Eksempler på dette er Rask Prat og Tekstprat.



Interaktiv læring


Morsomme aktiviteter kan benyttes til å introdusere årsak - virkning, valg og er en fin og motiverende måte å lære seg til å kommunisere.



Tilgjengelige apper

Søk på internett, ta bilder eller instruere et Amazon-ekko. Tilgjengelige apper er ekstra verktøy for brukere av Grid.

Grid for iPad har mange oppsett inkludert. Nedenfor finner du tre populære valg av oppsett.

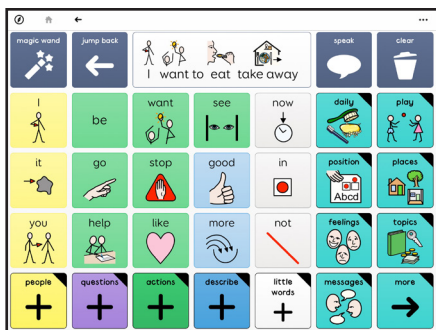


Super Core

Et symbolbasert kjernevokabular som er utformet for å hjelpe ASK-brukere med å lykkes med symbolkommunikasjon.

Tekstprat

Et kraftig oppsett for tastatur. Du kan raskt generere meldinger i øyeblikket og forberede samtaler på forhånd.

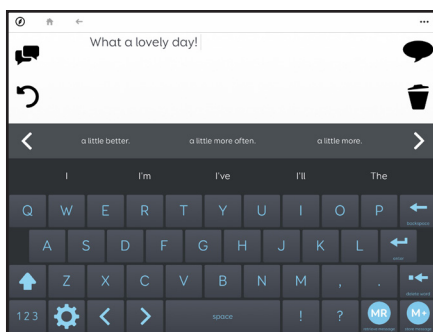

Alfa


Et tekstbasert ASK -ordforråd, utformet for å skrive voksne med skiftende tilgangsbehov.

28

Grid meny

Når du er i et Gridoppsett, endrer menylinjen seg og du får mer spesifikke valg.

Den øverste linjen i et oppsett har følgende alternativer:

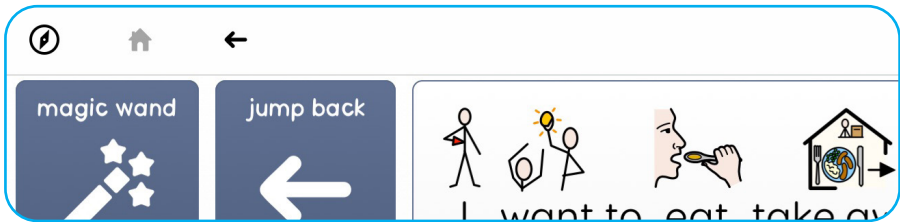

Grid utforsker

Avslutt Gridoppsettet og gå til Grid Explorer.



Hjem side

Gå tilbake til hjem siden.



Tilbake

Gå tilbake en side

Hvis du trykker på de tre prikkene øverst til høyre, åpnes alternativmenyen.



Redigering i Grid

Gå i redigeringsmodus og start redigering av ditt Grid oppsett



Redigere ordliste

Redigere ordliste i ditt oppsett, hvis der er en.



Innstillinger

Åpne innstillinger i Grid.



Finne ord

Trykk på finn ord knappen, den forteller deg om du har ordet i Grid oppsettet ditt og viser deg hvor det ordet ligger.



Manualen

Åpne nettleseren og last ned Grid oppsettet sin dokumentasjon.


29

Redigeringsmodus

I redigeringsmodus har du full kontroll på hvordan du vil at ditt oppsett skal se ut og du kan endre kommandoknappene akkurat som du ønsker inne i feltene.

I redigeringsmodus har du full kontroll på hvordan du vil at ditt oppsett skal se ut og du kan endre kommandoknappene akkurat som du ønsker inne i feltene.

Det kan være så enkelt som å legge til et ord i Grid og legge til et nytt felt, eller en mer avansert kommando som å ta et bilde med Grid kamera.

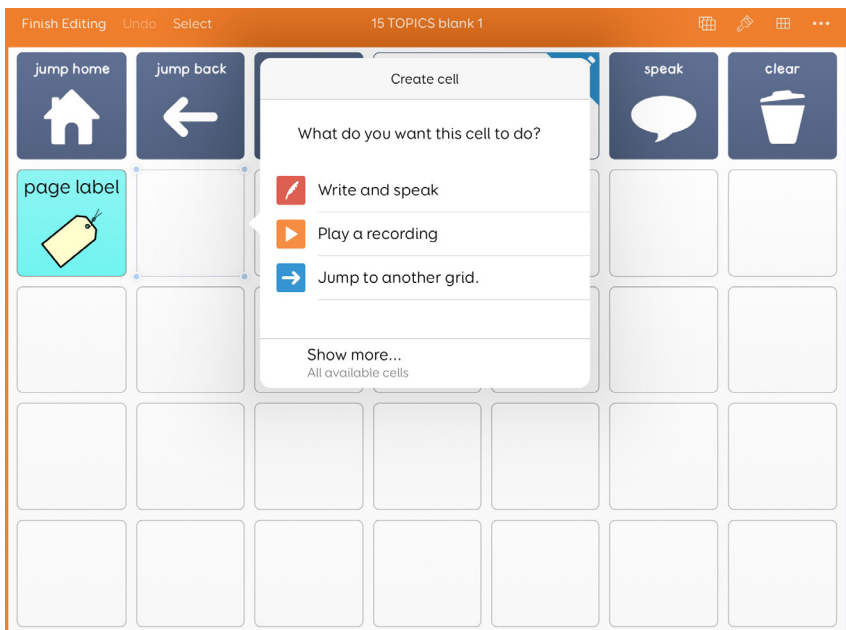




Utseende

Velg størrelse, farge og utseende på hvert felt.

Etikett

Juster størrelse og utseende på etiketten.

Hallo
Hallo
Hallo

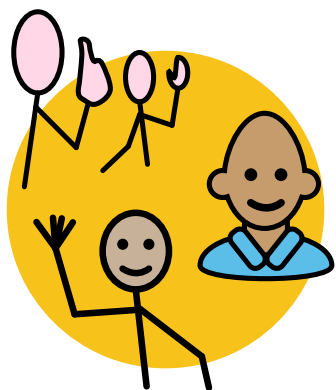

Symbol

Du kan endre eller redigere symbolet på hvert felt. Du kan til og med velge et bilde.


Lær mer i vårt Grid opplæringssted
thinksmartbox.com/training-centre

30

Skjule menyen

Du vil kanskje hindre tilgang til menyene Grid for iPad når den er i bruk.

Du kan fortsatt bruke Grid utforsker-, Hjem - og tilbake-knappene til å navigere. Hvis du vil forhindre tilgang til disse, må du sette opp begrenset tilgang.

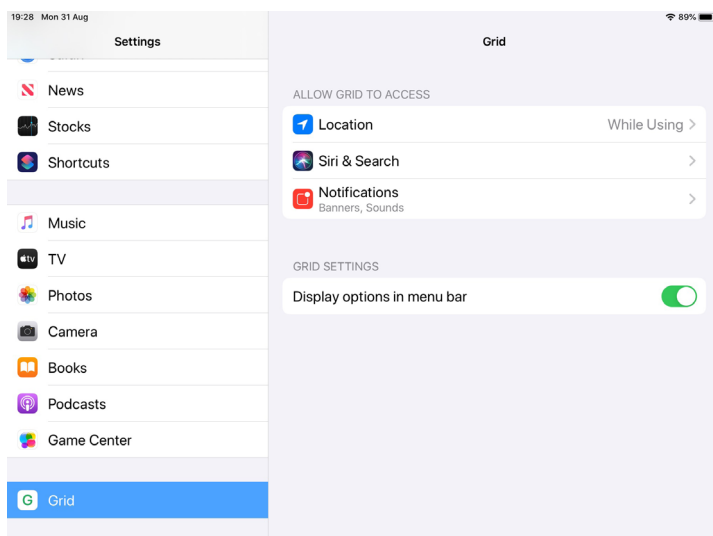

Menyinnstillingen finner du utenfor Grid for iPad i iPad OS innstillinger. Rull ned det venstre alternativet til du finner oppsett.

Velg av for alternativene 'Vis menylinje'.

Se etter din
Talk Pad

Denne delen beskriver hvordan du tar vare på Talk Pad, og hvordan du får hjelp.

Sikkerhetsmerknadene inneholder viktig informasjon om bruk.

31	Benytte Grid for iPad	66
32	Oppdatere iPad OS	68
33	Sikkerhetskopiere oppsett med Dropbox	69
34	Sikkerhetskopiere Grid-brukeren	70
35	Support	72
36	Finne modell og serienummer	73
37	Ta ut iPad-en	74
38	Sette inn iPad-en	75
39	Sikkerhet	76

Grid for iPad oppdateres kontinuerlig for å inneholde nye funksjoner, oppsett og dra nytte av nye iPad-funksjoner.


Automatiske oppdateringer

Hvis Talk Pad er koblet til internett, kan den laste ned oppdateringer automatisk.

Velg Apple-ID i iPad innstillinger-appen.

Velg iTunes & App Store.


Under overskriften automatisk nedlasting veksler bryteren App Updates til på.

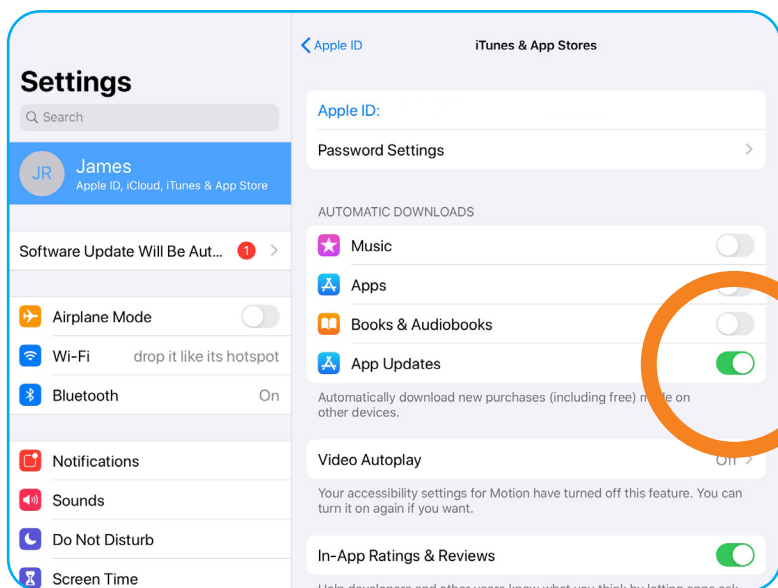

Manuelle oppdateringer

Du kan se etter en manuell oppdatering i App Store-appen.

Trykk på ikonet bruker øverst til høyre.

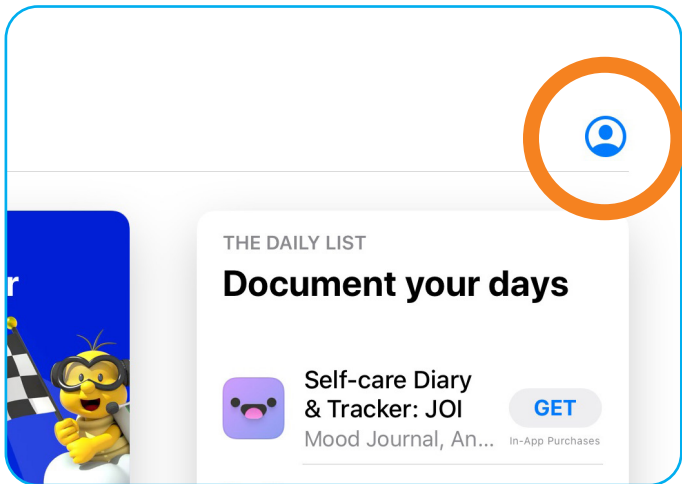


Bla nedover, og du vil se en liste over tilgjengelige oppdateringer med et nedlastingsikon til høyre.

32

Oppdatere iPad OS

iPad OS mottar regelmessige oppdateringer fra Apple. Hvis Talk Pad er tilkoblet, lastes disse automatisk ned.

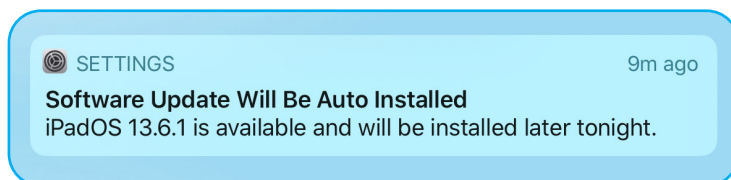

Det kan hende du ser et varsel på låseskjermen. Oppdateringer installeres bare hvis Talk Pad er aktivert.


Du kan søke etter oppdateringer manuelt i Innstillinger-appen under Generelt.



Sikkerhetskopier oppsett med Dropbox

33

Det er viktig å ha en sikkerhets kopi av oppsettene og brukerprofilen.

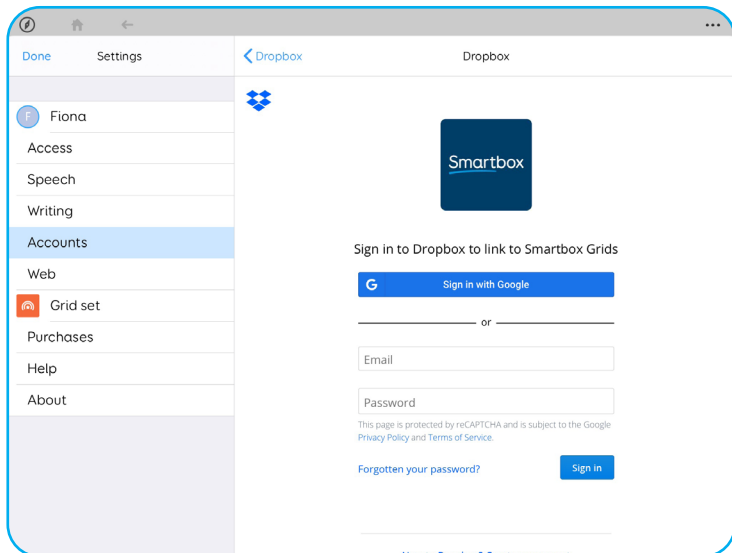

Du kan koble smartbox konto og Dropbox-konto under Innstillinger – Kontoer. Velg Dropbox og logg deg på for å koble sammen kontoene.


Når smartbox kontoen din er koblet til Dropbox, lastes grid oppsett og meldingsfilene opp automatisk.

Dette betyr også at du kan bruke Grid 3 på Windows og Grid for iPad og holde oppsettene synkronisert.

Sikkerhetskopier grid-brukeren


Du kan sikkerhetskopiere hele brukerprofilen i Grid for iPad.

Gå til Innstillinger, Kontoer i Grid for iPad.

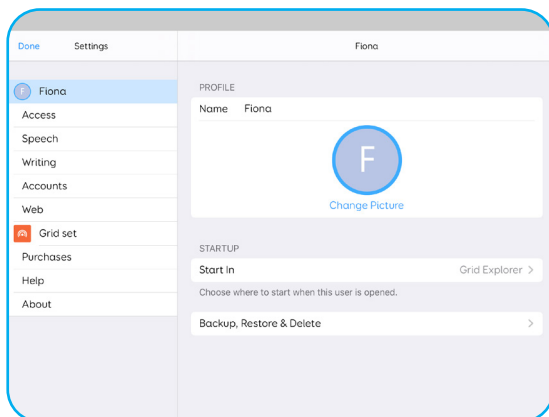


Fra brukerinnstillingene dine til å velgesikkerhetskopiering, gjenoppretting og sletting.

Du kan velge Sikkerhetskopi for å opprette en sikkerhetskopi. Gjenoppretting sletter brukeren og erstatter den med en tidligere sikkerhetskopi. Hvis du velger Slett, fjernes bruker- og oppsettene dine.

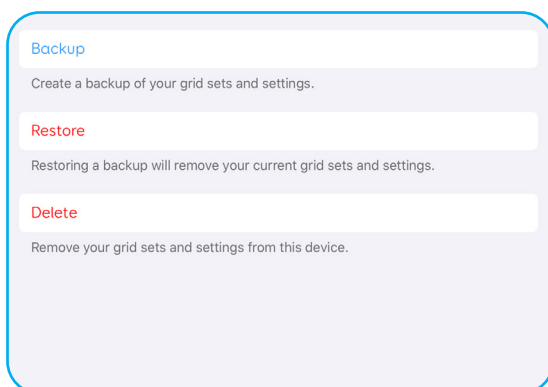

Når du velger Sikkerhetskopi, har du flere alternativer for hvor filen skal lagres eller sendes.

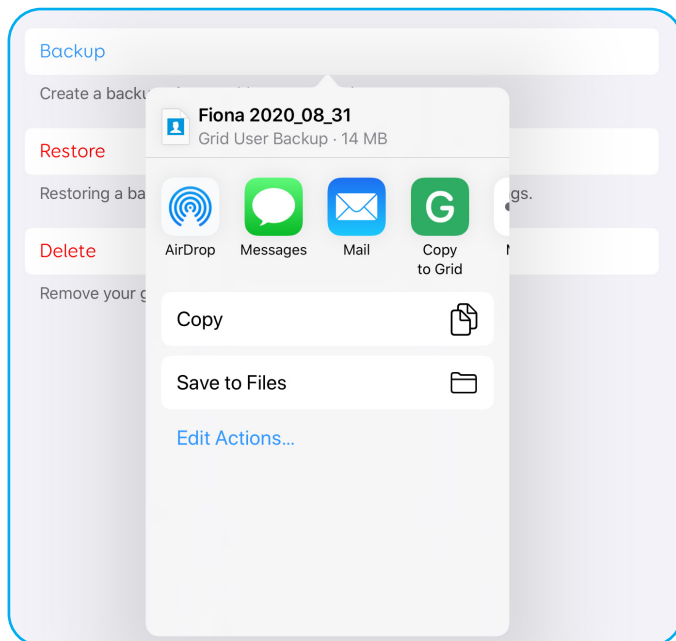

Hvis du velger Lagre på filer, kan du flytte sikkerhetskopien til en ekstern USB-pinne. Du kan også bruke e-postprogrammet til å sende sikkerhetskopien via e-post til en annen enhet.

35

Support

Vårt support team er her for å hjelpe deg.



Online chat

thinksmartbox.com /
Cognita.no

E-post

support@cognita.no




Telefon

UK: 01684 578868

NO: +47-22121450

Reparasjoner

Vårt reparasjons team kan ta vare på enheten din i tilfelle skade.

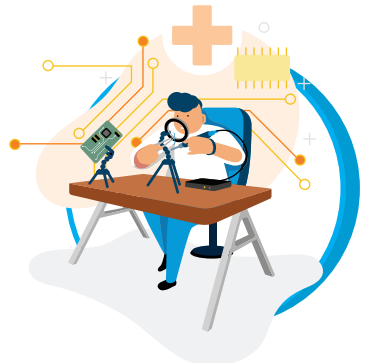

Finne modell og serienummer

36

Ha modell og serienummeret for hånden når du kontakter kundestøtteteamet. Dette hjelper oss med å identifisere enheten du har et problem med!


Du finner både modellnummeret og serienummeret på baksiden av Talk Pad.

Slik ser et modellnummer ut:

TP13B

Serienummeret for enheten er plassert under stativet, løft stativet opp, og serienummeret finner du her:



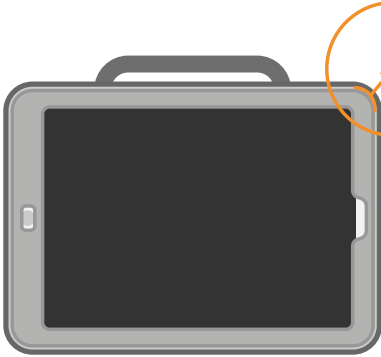

Sett en mynt eller lignende flat gjenstand inn i hjørnet for å dele forsiden og baksiden helt. Du ser etter sammenføyningen mellom den hardere plastfronten og gummibaksiden.

Løsne fronten på beskyttelsen fra fronten på iPad-en, og fjern den.



Sette inn iPad-en

38

Trykk fronten på vesken til fronten på.



Skyv iPad inn i den bakre delen, den nederste kanten først, deretter toppen, og hele veien rundt til kantene er godt festet.

Enhetsspesifikasjon

Talk Pad er et kommunikasjonshjelpemiddel designet for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan snakke eller har komplekse tilgangsbehov.

Se mer her::

thinksmartbox.com/talk-pad-specification

Modeller

Enhet	Talk Pad 8	Talk Pad 10	Talk Pad 13
Modell	TP08	TP10	TP13








Omgivelser

Temperatur	Temperatur 0-40 grader
------------	------------------------

Lager- og transportmiljø

Temperatur	Temperatur: -20 ° C - 60 ° C
------------	------------------------------

Symbolforklaring

Symbol	Betydning
	Hodetelefoninngang
HDMI	Media port
	Ladeinngang
	Samsvar europeisk symbol for å erklære samsvar med EU-lovgivningen.
	Federal communications commission symbol to declare conformity with US legislation.
	Søppel symbolet for elektrisk og elektronisk utstyr for å indikere at du skal kaste dette utstyret i samsvar med lokale forskrifter.
	Av på knapp symbol
+	Lyd symbol
-	Lyd symbol
	Les brukerveiledningen symbol

Sikkerhet

Grid for iPad er en medisinsk enhet i klasse 1. iPad og beskyttelsen er tilbehør til denne enheten, slik at den kan brukes i henhold til det tiltenkte formålet.

Spesifikasjoner og standarder er oppført i delen samsvar i denne håndboken.

Vennligst vurder disse sikkerhetsadvarslene for å sikre sikker bruk av maskinen.

Applikasjon

Tiltenkt bruk

- Den brukes til å generere syntetisert tale.

Tiltenkte brukere

Er designet for personer med kommunikasjonsvansker og for de som trenger alternativ betjeningsløsninger. Komplekse kommunikasjons- og/eller tilgangsproblemer kan oppstå som følge av en rekke forhold, inkludert, men ikke begrenset til,:

- Utviklingsforstyrrelser, f.eks. cerebral parese, utvikling verbalt dyspeksi, autistiske spektrumforstyrrelser (ASD), utviklingsforstyrrelser (DLD), global forsinkelse.
- Ervervede lidelser, f.eks. kardiovaskulær ulykke (CVA/slag), demens, traumatisk/ervertet hjerneskade (TBI/ABI)

Den kan også brukes av personer med komplekse tilgangskrav ved fravær av kommunikasjonsproblemer for datamaskinkontroll, omgivelser og kommunikasjon ansikt til ansikt, for eksempel, men ikke begrenset til personer med:

- Ryggmargsskade
- Degenerativ nevromuskulær sykdom (f.eks. muskeldystrofi, spinal muskulær atrofi)

Tiltenkt miljø

Den kan brukes i en rekke innstillinger der den enkelte sannsynligvis ønsker å bruke den for den ovenfor tiltenkte bruken. Disse innstillingene kan omfatte, men er ikke begrenset til:

- Private hjem
- Støtte for de som bor hjemme
- Støtte for sykepleie
- utdanning, skole og universitet
- Samfunnet, f.eks butikker og restauranter

Signifikante kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler

Selv om den er utformet for å bidra med ekspressiv kommunikasjon, bør den brukes i kombinasjon med en rekke metoder for forsterkninger og alternativ kommunikasjon (AAC), og derfor bør den ikke brukes isolert for å gjøre det mulig for en person å kommunisere .

Andre metoder for ASK kan omfatte bruk av papirbaserte systemer, tegnspråk eller annet. Til tross for dette er det innsett

at individer med betydning kommunikasjon og/eller tilgang vanskeligheter vil stole tungt på en VOCA (i dette tilfellet Talk Pad) å kommunisere med den betydelige forbedringen av ekspressive kommunikasjon som en VOCA ofte gir.

Selv om den er designet og produsert for å være ekstremt robust og pålitelig, er det mulig å miste funksjon på grunn av strømtap eller andre tekniske problemer. Av denne grunn skal det ikke

- bli brukt som et livsreddende hjelpemiddel
- brukes som grunnlag for trivsel
- stole på som det eneste hjelpemiddelet bruker har for å påkalle nødvendig hjelp eller som eneste alarm
- bli benyttet for å administrere medisin
- Brukes som den eneste måten å samhandle med EC-enheter på

Grid 3 har ikke som hensikt å benyttes for å gi informasjon eller ta viktige beslutninger i forhold til diagnose eller terapeutiske tiltak

Når enheten jobber med annet utstyr, kan det være en slutning mellom enheten og tilkoblingsutstyret. Av denne grunn skal ikke Talk Pad brukes:

- I områder med magnetisme /magneter osv.
- I røntgen miljø.
- I militære miljøer.
- I tøffe omgivelser.

Unngå hørselskade

Hvis du bruker hodetelefoner og høyttalere med høyt volum, kan det føre til permanent hørselstap. Hold alltid volumet på enheten på et sikkert nivå.

Holdbarhet

Talk Pad er tøff og robust, men den må behandles med forsiktighet når du beveger deg rundt. Den har blitt drop testet til en meter. Vær oppmerksom på at dette ikke inkluderer tilbehør.

Vann og væsker

Enheten er ikke beskyttet mot vanninntrengning. Ikke få vann eller væsker på enheten, spesielt ikke i portene eller ventilasjonsåpningene.

Hendelser

Hvis det oppstår en hendelse i forhold til enheten, må du rapportere til Smartbox (repairs@thinksmartbox.com)

Kontakt med bruker

Berøring av enheten med skadet hud kan forverre et sår.

Spedbarn eller høyrisikogrupper skal ikke berøre overflaten på enheten hvis det er fare for forbrenning.

Strømforsyning og batterier

Talk Pad inneholder et oppladbart litium-ion-batteri. Alle oppladbare batterier forringes over tid. Brukstiden for en enhet etter full lading kan bli kortere over tid.

For optimal ytelse bør ikke Talk Pad lades ved ekstreme temperaturer som under 0 grader C eller over 45 grader C. Ved disse temperaturene vil batteriet lades sakte eller ikke lade.

Ikke utsett Talk Pad for flamme eller temperatur over 90°C , da dette kan føre til overoppheting eller eksplosjon av batteriet.

Lad bare opp Talk Pad med strømledningen som følger med. Bruk av uoffisielle strømforsyninger kan forårsake alvorlige skader på Talk Pad og forårsake brann. Hvis Talk pad strømledning går tapt eller skades, kontakter du leverandøren.

Når batteriet i Talk Pad er tomt og enheten ikke er koblet til en strømkilde, slås enheten automatisk av for å unngå skade på batteriet og maskinvaren. Operativsystemet vil forsøke å gjøre dette så sikkert som mulig, men det anbefales at du kobler til strømledningen før Talk Pad slås av.

Batteriet som driver Talk Pad , er underlagt gjeldende forskrifter. Kontroller med postbudet eller budet før du sender enheten, for å sikre at den leveres på en sikker måte.

Ikke plasser enheten din et sted der det er vanskelig å koble strømadapterkontakten fra kontakten.

Det er bare vårt autoriserte personell som kan bytte batteriet. Ellers kan det oppstå personskaide eller skade på utstyret.

Ikke utfør service på eller vedlikehold på enheten mens enheten er i bruk. Sørg for å slå av enheten og koble fra alle kabler før du starter og utfører service eller vedlikehold på enheten.

Transport av Talk Pad

Når Talk Pad transporteres, må du forsikre deg om at Talk Pad er tilstrekkelig beskyttet mot slag og støt.

Det er strenge forskrifter for litiumbatterier i fly. Reglene varierer mellom flyselskaper, så det anbefales å kontakte flyselskapet ditt før du reiser.

Temperatur

Blokker ikke viftene.

Forsikre deg om at du slår av enheten før du oppbevarer eller legger den i en bag.

Hvis Talk Pad brukes i varme temperaturer eller direkte sollys, kan den nå temperaturer som kan utløse en automatisk stopp. Dette er en sikkerhetsfunksjon som forhindrer varig skade på enheten. Hvis dette skjer, må du vente til enheten er avkjølt før du starter på nytt.

Montering

Når du monterer Talk Pad , må du følge instruksjonene både til Talk Pad og i veiledningen fra produsenten av monteringsystemet. Vi har tatt alle forholdsregler for å gjøre dette til en enkel og sikker prosess, men det er opp til deg. å sikre at enheten er trygt montert.

Bruk den doble monteringsløsningen Daessy og Rehadapt(selges separat). Kontroller at monteringsystemet du velger, er riktig for deg, og utfør en risikoanalyse hvis det er nødvendig.

Porter og tilkoblinger

Tilbehør som er koblet til porter for SIGNALINNGANG/-UTGANG, må være i samsvar med IEC-standarden 60601-1 eller 60950-1/62368-1.

Annen sikkerhet

Hvis de små delene er skadet, kan de løsne fra Talk Pad. Dette kan medføre kvelningsfare. Barn og personer med lærevansker bør overvåkes når enheten brukes. Pass på at du også er under tilsyn når du pakker ut enheten. Emballasjen kan føre til kvelningsfare.

Talk Pad er ikke steril. Talk Pad er ikke steril, ikke benytt den dersom du har åpne sår, eller mens du gjennomgår intensiv medisinsk behandling.

Talk Pad leveres med en strømkabel og kan brukes med kablet

tilbehør. Disse kan utgjøre en kvelningsfare. Disse kan utgjøre en kvelningsfare.

Epilepsi advarsel

Noen personer med fotosensitiv epilepsi er mottakelige for anfall når de blir utsatt for visse lys- eller lysmønstre. Noen mennesker med lyssensitiv epilepsi kan oppleve anfall når de blir eksponert for spesielle lys og mønstre. Føler du deg dårlig eller svimmel når du sitter foran Talk Pad , spesielt om du bruker øyestyring, beveg deg bort fra Talk Pad og søk legehjelp.

Garanti

Talk Pad er dekket av standard garanti, avhengig av avtalen ved kjøp..

Reparasjoner og vedlikehold

Talk Pad er ikke en enhet som brukeren kan utføre service på. Hvis enheten trenger reparasjon, kan du ta kontakt med den lokale forhandleren.

Interferens fra medisinsk utstyr

iPad inneholder magneter som kan forstyrre medisinske enheter. Ta kontakt med produsenten av legen din og det medisinske utstyret for å få informasjon som er spesifikk for det medisinske utstyret, og om du må opprettholde en sikker avstand mellom det medisinske utstyret og iPad-enheten eller tilbehøret. Hvis du mistenker at iPad forstyrrer den medisinske enheten, må du slutte å bruke iPad.

Fare for kvelning

Talk Pad leveres med en stropp. Hvis det er fare for at brukeren kan kveles med stroppen, må du ikke bruke stroppen.

Feilsøking og kundestøtte

I de fleste tilfeller vil en omstart av enheten kurere eventuelle problemer. Du starter enheten på nytt ved å trykke på og holde nede av/på-knappen og deretter velge Slå av. Hvis enheten har krasjet, holder du av/på-knappen nede i 30+ sekunder for å slå den av. Trykk på den igjen for å slå den på igjen.

Hvis dette ikke løser problemet, kontakt support.

cognita.no

Ha serienummeret klart. Dette finner du under stativet på enheten.

EU / CE Statement

SmartBox assistive Technology Ltd. erklærer herved at dette produktet samsvarer med 2017/745 EU-forordning om medisinsk utstyr, 2014/53/EU-RED og 2011/65/EU-ROSH.

The full text of the EU declaration of conformity is available here: thinksmartbox.com/talk-pad-DOC

Gjeldende standarder

ISO 14971:2012 Bruk av risikostyring på medisinsk utstyr er blitt brukt på Talk Pad.

Følgende standarder for 'Informasjonsteknologi-utstyr' er brukt på iPad og tilbehør til veske. Dette gjenspeiler risikoen ved bruk av enheten slik det er tiltenkt, og nivået på de regulatoriske kontrollene som er nødvendige for å gi en rimelig sikkerhet og effektivitet.

Hvis bruken, brukeren eller miljøet krever et større kontrollnivå, kan SmartBox-Grid Pad være et bedre valg for deg.

Standarder for elektromedisinsk utstyr er brukt på Grid Pad.

Komponent	Høyttaler (Lenovo LX001)	12.9-tommers iP-ad-er	7.9-tommers, 10.2-tommers iP-ad-er
Lovgivning	2014/35/EU LVD 2014/53/EC RED 2011/65/EU ROHS	2009/125/EC ECO 2014/53/EU RED 2011/65/EU ROHS	2009/125/EC ECO 2014/53/EU RED 2011/65/EU ROHS
Sikkerhetsstand-arder	EN 60950-1:2006+A1: 2010+A11:2009+A12:2 011+A2:2013	EN 60950-1:2006+A1: 2010+A11:2009+A12:2 011+A2:2013 EN 50566:2017 EN 50665:2017	EN 60950-1:2006+A1: 2010+A11:2009+A12:2 011+A2:2013 EN 50566:2017
EMC-standarder	EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 300 328 V2.1.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.0	EN 301 489-1 V2.2.0 EN 303 417 V1.1.1 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 301 489-52 V1.1.0 EN 300 328 V2.1.1 EN 301 893 V2.1.1 EN 300 440 V2.1.1 EN 301 511 V12.5.1 EN 301 908-1 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 303 413 V1.1.1	EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 301 489-19 V2.1.1 EN 301 489-52 V1.1.0 EN 301 511 V12.5.1 EN 301 908-1 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1_11.1.9 EN 300 328 V2.1.1 / V2.2.1 EN 300 440 V2.1.1 / V2.2.1 EN 303 413 V1.1.1
Andre standarder	ROHS EN 50581:2012 EC 278/2009	ROHS EN 50581:2012 ENERGY: Regulation 1275/2008	ROHS EN 50581:2012

Samsvar med FCC- og ISED-Canada

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene og lisensfrie RSS-standarder uten lisens fra ISED Canada. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.



Få mer ut av Talk Pad

Få redigeringstips, og avanserte innstillinger i vår online gruppe

thinksmartbox.com/learn-at-home

Talk Pad 8, 10 and 13
Norsk
April 2021

Copyright 2020 Smartbox Assistive Technology
thinksmartbox.com

Talk Pad -Manual - NO - A