

Grid-eyeon™

Brukerveiledning

## Cognita support program

Våre medarbeidere er her for å sikre god personlig support mellom 08:00 og 16:00

Våre spesialister er tilgjengelige for å hjelpe deg med:

- Opplæring i Grid 3
- Feilsøking, tekniske og generelle spørsmål
- Grid 3 tilpasning og redigering

Les Brukerveiledning og Starte med Grid 3 manualen før du bruker Grid Eye On.

Kontakt oss på Telefon: +47 2212 1450 eller Mail [support@cognita.no](mailto:support@cognita.no)

## Produkt

### Inkludert i din Grid Eye On

- ✓ Grid Eye On-nettbrett
- ✓ Strømforsyning
- ✓ PowerGrip™  
(ekstra batteri pakke)
- ✓ Brukerveiledning
- ✓ Starte med Grid 3
- ✓ Pusseklut
- ✓ Monteringsplate for stativ

### Valgfritt tilbehør

- ✓ BumpGuard™  
(ekstra støtsikring)

## Batteri

Grid Eye On bruker et litium ion batteri som må kastes i samsvar med lokale forskrifter. For gjenvinning av batterier og enheter, gå til [sortere.no](http://sortere.no) eller ring 2212 1450.

Koble lader til enheten og lad den helt opp før første gangs bruk. Ladestatus lampen indikerer batterinivået.

Charge Status Light	Battery Level
Grønn	Full ladet til 100%.
Gul	Strømforsyningen tilkoblet, og batteriet lader.
Rød	Batterikapasiteten er mindre enn 15%.



### ADVARSEL!


- Grid Eye On er primært beregnet for innendørs bruk.
- Grid Eye On er vanntett, ikke sprutsikker og skal ikke brukes i regn.
- Omgivelses temperatur for drift er 0°C til +40°C.
- Omgivelses temperatur for lagring -20°C til +60°C.



**ADVARSEL:** Ikke la batteriet tømmes helt. Dette for å sikre at systemet lukkes ordentlig. Kast aldri batterier i ild fordi de kan eksplodere.

# Bli kjent med systemet


## Grid Eye On front

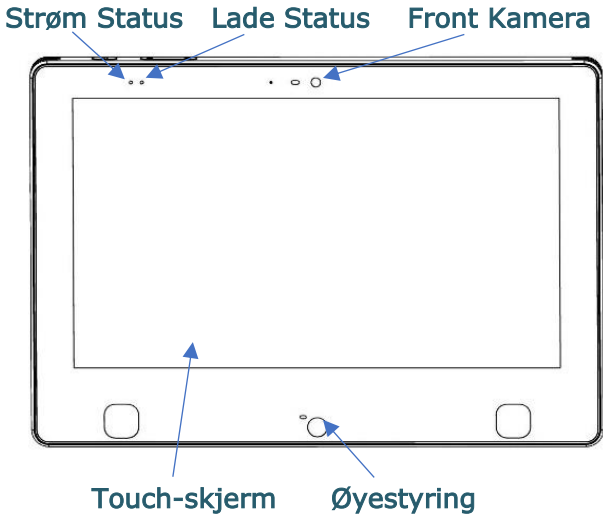

## Grid Eye On ovenfra




## Grid Eye On bakside

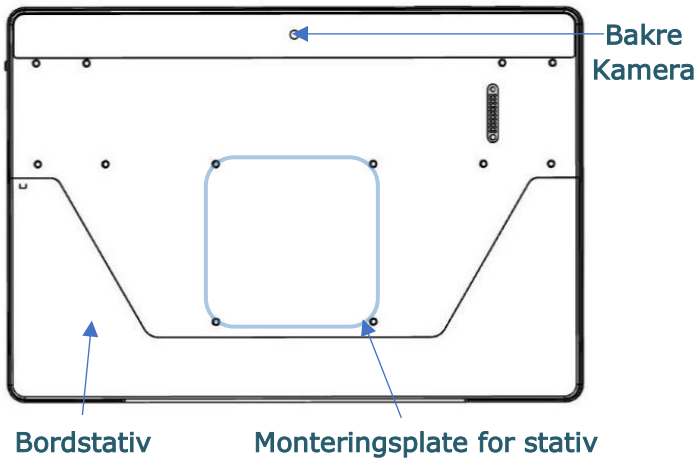


## Bli kjent med systemet

Grid Eye On sett fra venstre

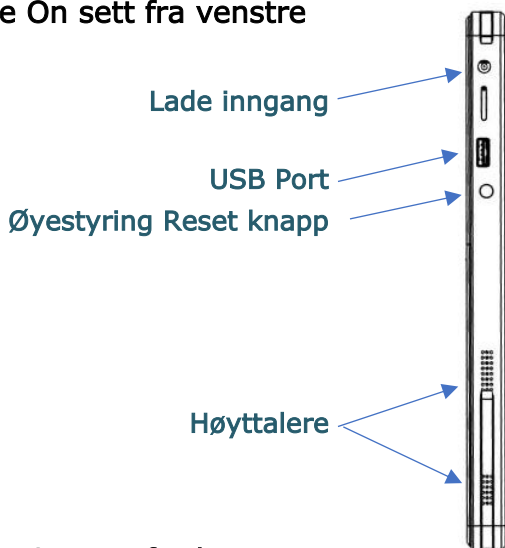

Grid Eye On sett fra høyre

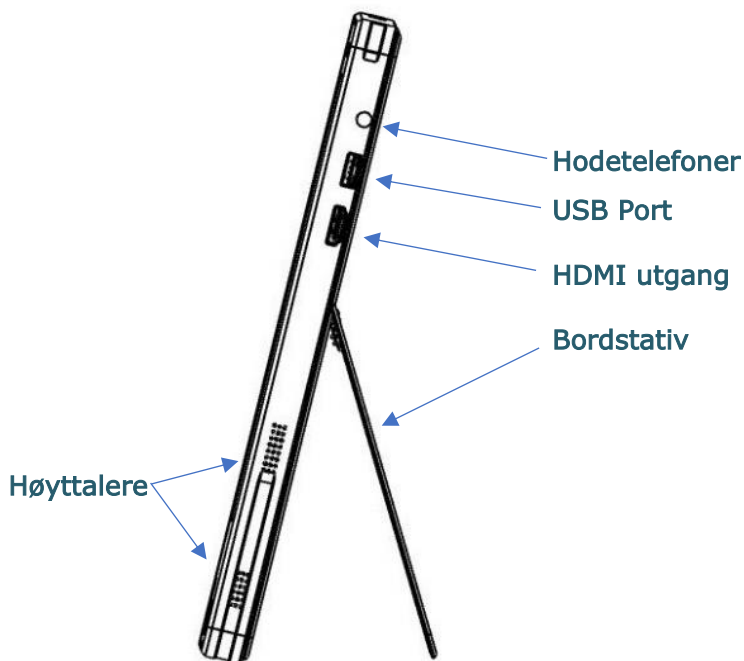

## Kom i gang

Funksjon	Strøm på knapp bruk
Start opp	Trykk Strøm på knappen en gang.
Skru av	Følg den vanlige prosedyren for å slå av enheten. Trykk på Windows startknapp i nedre venstre hjørne av skjermen, og trykk deretter "På/av", deretter "Avslutt".
Aktivere Hvilemodus	Trykk og slipp Strøm på knappen. <i>Maskinen er fortsatt aktiv i hvilemodus.</i>
På etter Hvilemodus	Trykk og slipp Strøm på knappen.
Maskin Reset	Trykk og hold Strøm på knappen i minimum 7 sekunder. <i>Bør ikke benyttes til "Skru av" funksjonen.</i>

## Juster lyd styrken

Juster lyd styrken med (+ eller -) på toppen av Grid Eye On maskinen. Trykk venstre for å øke (+) lyden eller venstre for å senke (-) lyden.

Lyd kan i tillegg justeres i Grid 3 programmet.



Hvis du foretrekker det, kan du velge "Lyd" -ikonet nederst til høyre på oppgavelinjen.

## Wi-Fi

Klikk på globus lignende ikon nede til høyre ved klokken for å se etter tilgjengelig trådløst nettverk.

## Omgivelseskontroll

Prosedyre for hvordan lære opp en fjernkontroll i Grid 3. Legg maskinen på bordet, og fjernkontrollen på høyre side litt over midten med IR øyet pekende mot maskinens høyre side.

I Grid 3, velg Meny, Innstillinger, Omgivelseskontroll, Legg til.

Velg Tilbehør (Eks. Dekoder tast eller TV). Klikk på Neste.

Klikk på Lær.

Trykk og slipp gjeldende knapp på fjernkontrollen (IKKE Hold nede knappen på fjernkontrollen slik det står på skjermen i denne delen av prosedyren).

Trykk og slipp knappen på fjernkontrollen igjen.

Ferdig når aktuelt symbol for gjeldende knapp er merket grønt.

Velg nytt symbol og gjenta prosedyren med rett knapp på fjernkontrollen.

## Vanlige spørsmål (FAQ)

- Sp** Øyestyringskamera ser ikke ut til å fungere, jeg får en melding om at det ikke er oppdaget noen øyestyring?
- Sv** Trykk og slipp Øyestyring Reset knapp på venstre side av maskinen (se side 4). Vent 10 sekunder før øyestyringskamera er resatt.
- Sp** Hvordan skal jeg slå av Grid Eye On? Bør jeg bruke Strøm på-knappen øverst på enheten?
- Sv** Slå av enheten som en tradisjonell Windows-maskin. Trykk på Windows startknapp i nedre venstre hjørne av skjermen, velg "På/av", deretter "Avslutt".  
*MERKNAD: En "Maskin reset" ved hjelp av Strøm på-knappen øverst på maskinen kan føre til tap av data og uforklarlige feil.*
- Sp** Hvordan rengjør jeg skjermen på Grid Eye On?
- Sv** Tørk av skjermen med en mikrofiberklut fuktet med skjermrensmiddel. Spray rengjøringsmiddelet direkte på kluten, ikke på enheten. Dette for å unngå skade på elektroniske komponenter.
- Sp** Hvor lenge skal maskinen fungere på batteri drift og hvor lang tid tar det før det er fullt oppladet?
- Sv** Maskinen fungerer ca. 10 timer på batteridrift. Når batteriene er tomme, tar det ca. 5 timer før de er fullt oppladet.
- Sp** Kan Grid Eye On brukes med bi-fokale, tri-fokale eller progressive linser?
- Sv** Ja, men for å oppnå best mulig resultat, anbefales en fokal linse beregnet for datamaskinbruk.
- Sp** Hva skjedde med oppgavelinjen i Windows? Alle programmene mine er i fullskjerm.
- Sv** Du kan være i nettbrettmodus. Sveip opp fra bunnen av skjermen, trykk på "Handler" -ikonet nederst til høyre på oppgavelinjen, og trykk deretter på Tablet-modus-knappen.

## Takk for at du valgte Grid Eye On.

For ytterligere informasjon knyttet til programvare henvises det til Starte med Grid 3 manualen.



eyetech™

Mesa, AZ 85203