

Widgit Snakkebok

En kommunikasjonsbok med Widgit Symboler





















Et produkt i NorMedia **ASK-Serie**



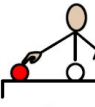






Widgit Symbols © Widgit Software 2002:2020. Norsk NorMedia AS

Innhold

- Forord
- Innhold i pakken
- Hvem passer Widgit Snakkebok til
- Hvordan tilpasse Widgit Snakkebok til eget behov
- Maler til InPrint 3

 jeg	 hva	 ikke	 hjelp
 du	 hvem	 liker	 er
 vi	 hvor	 vil	 ringe
 den	 hvorfor	 besøke	 gå
 gjenta	 når	 vet ikke	 takk

 personer	 følelser	 helse	 kropp
 aktiviteter	 transport	 inne	 ute
 steder	 klær	 mat	 tid
 beskrivelser	 dyr	 hjelpemidler	 verktøy
 data	 figurer	 feiring	 vær

NorMedia ASK-Serie er en rekke papirbaserte produkter for begynnende symbolbrukere og personer med behov for Alternativ og/eller supplerende kommunikasjon. Produktene er utformet med Widgit symboler, kommer ferdig trykket på slitesterkt papir og har mulighet til å redigeres eller videreutvikles i InPrint 3. InPrint 3 må kjøpes i tillegg. I produktserien finnes det Symbol Startpakke, Tematavler, Snakketavler og Snakkeboka i A4 og A5 format med Widgit Symboler. I tillegg har vi Startpakke, tematavler og en kommunikasjonsbok i A4 format med enten Tegn (fra Statped) eller Bliss-Symboler.

Forord








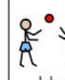



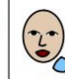
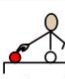







Originalen til denne kommunikasjonsboka er laget av Habiliteringstjenesten i Vestfold til det utgåtte programmet InPrint 2 og het orginalt "Snakkeboka". Ved hjelp av logoped Helmine Bratfoss ble kommunikasjonsboka videreutviklet til Widgit Snakkebok i 2017 og da tilpasset InPrint 3. Widgit Snakkebok anno 2020 har fått ny drakt med farger på forside og faner samt en gjennomgang og oppdatering av symboler og temaer. Boka har fått større og tydeligere faner slik at det skal bli lettere å bla, samt at det er lagt til en forside/innholdsfortegnelse som viser alle temaene. Dette er gjort for å gjøre det enklere for bruker å navigere i boka selv og for å finne den riktige fanen raskere. Widgit Snakkebok er laget i og kan redigeres i InPrint 3 (InPrint 3 må kjøpes/søkes om separat)
















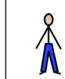
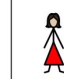

Widgit Snakkebok er på 76 sider, hvor den venstre siden består av snakkeord (ord tilpasset tema) og den høyre av temaord, det er totalt 38 temasider med tilhørende snakkeord på motstående venstre side. Boka leveres i A5 og A4 format og er trykket på et slitesterkt plastpapir. Boken er trykket og levert av NorMedia AS.

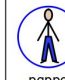Det er laget et miljø i kommunikasjonsappen vår Widgit Go som er tilsvarende Widgit Snakkebok men da som elektronisk versjon.

Det er også muligjort å bruke Widgit Online til å lage egne sider til boka, med en tilgjengelig sidemal, denne er uten mulighet for faneflik - det er dessverre ikke mulig å levere boka som en redigerbar fil i Widgit Online. Tilgang til Widgit Online og Widgit Go må også kjøpes eller søkes separat om.

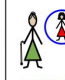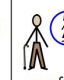Side fra Widgit Snakkebok

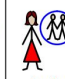 jeg	 hva	 ikke	 hjelp
 du	 hvem	 liker	 leke
 vi	 hvor	 vil	 ring
 den	 hvorfor	 besøke	 sms
 gjenta	 når	 vet ikke	 snill

 mennesker	 mamma	 pappa	 baby	
 søster	 bror	 mormor	 morfar	
 farmor	 farfar	 tante	 onkel	
 jente	 gutt	 mann	 dame	
 barn				

Pakkens innhold

- Kommunikasjonsbok med Widgit symboler på 76 sider i A5 eller A4 format med fanefliser i tydelige farger som matcher forsiden.
- USB med Widgit Snakkebok som redigerbar fil og en tom mal som kan brukes til å lage egne sider. Filene kan kun åpnes i In Print 3. Vær obs på at InPrint 3 må kjøpes ved siden av.
- Det leveres også PDF filer på USBen som kan åpnes uten å ha InPrint 3.
- Boken leveres med bokringer som kan åpnes, slik at en kan legge til eller ta bort sider.

Hvem passer Widgit Snakkebok til

Det å kunne kommunisere og gi uttrykk for egne behov og følelser er en viktig del av et menneskets liv. Denne boka er laget med tanke på personer som mangler helt eller delvis mangler talespråk. Det kalles ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), når noen bruker bilder for å kommunisere. Det kan gjelde både voksne og barn. Ofte gjelder dette personer med store fysiske funksjonshindringer, men det behøver ikke være det.

Denne boka er bygget opp slik at alle venstresidene stort sett er like gjennom hele boka. Det gjør at brukeren av boka kan sette sammen ord til setninger. Høyresiden inneholder temaer som er allmenne temaer som personer, følelser, helse, kropp, aktiviteter, transport, bolig, hage/park, steder, klær, mat, tid, beskrivelser, dyr, ting, hjelpemidler, verktøy, data, figurer, høytid, vær

Allmenne råd for å komme i gang med kommunikasjonsbok:

1. Når du sier et ord det finnes bilde av i boka, peker du på ordet samtidig som du sier det. Er det en hel setning kan du bygge setningen med bruk av venstresiden.
2. Hold boka slik at brukeren av boka kan se hvor du peker.
3. Legg kommunikasjonsboka tilgjengelig slik at brukeren av boka kan bli kjent med den på sin egen måte. I starten kan det være nyttig å leke med den, tullepeke eller peke flere ganger på samme bildet, da er det viktig at en hjelper er med og sier ordene høyt og samspiller med brukeren.
4. For å komme i gang med boka, kan det være lurt å finne en eller to kategorier man begynner på og trener på. For eksempel påkledning eller mat. Man kan også kopiere opp enkeltbilder fra boka og trene ordjakt i boka. Se hvor mange bilder man finner.


Hvordan tilpasse Widgit Snakkebok til eget behov

En forutsetning for å kunne tilpasse innholdet i kommunikasjonsboka er at en har programmet InPrint 3.

Alle filene ligger på en USB som følger pakken.

Dersom du har InPrint 3 installerer filene fra den installasjonsfilen som ligger på USB-en. Alle ressursene legges seg under

- **Ressurspakker** i InPrint og kan åpnes der.
Denne pakken heter *Snakkeboka*. Filene tilhørende boka er nummerert fra 1-5 og inneholder noen temaer pr fil.
- De tomme malene som følger med legges under **Maler**.
De heter *Snakkeboka Maler*.

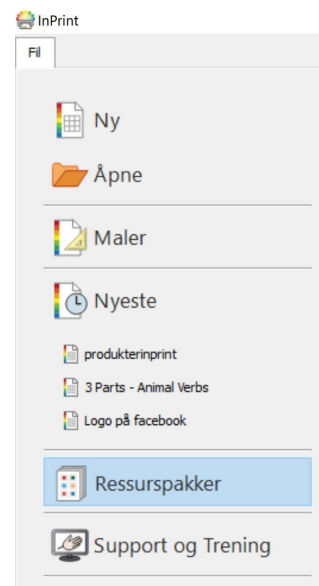


Du må kjøre installasjonsfila "Widgit Snakkebok" på den tilhørende USBen, for å få lagt inn InPrint filene. OBS du kan ikke kjøre innstallasjonsfilen uten å ha tilgang til Inprint 3 på maskinen din.


Det ligger tilgjengelige PDF Filer på USB hvis du ikke har InPrint 3.

Redigere innholdet med InPrint 3:

Finn filen du ønsker å redigere under *Ressurspakker - Snakkeboka*. Finn deretter fanen som heter "rediger" når du har åpnet filen.

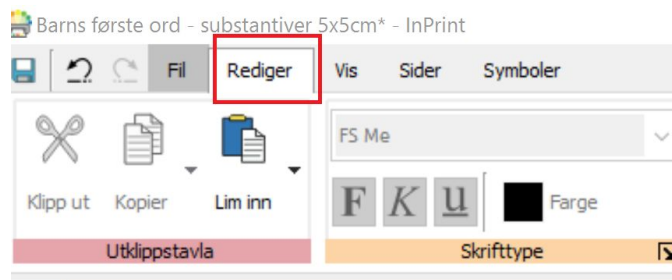


Eksempel fra en side i Widgit Snakkebok - Tema Høytid:
Velg det feltet du vil redigere. I bildet under er ordet **dåp** valgt

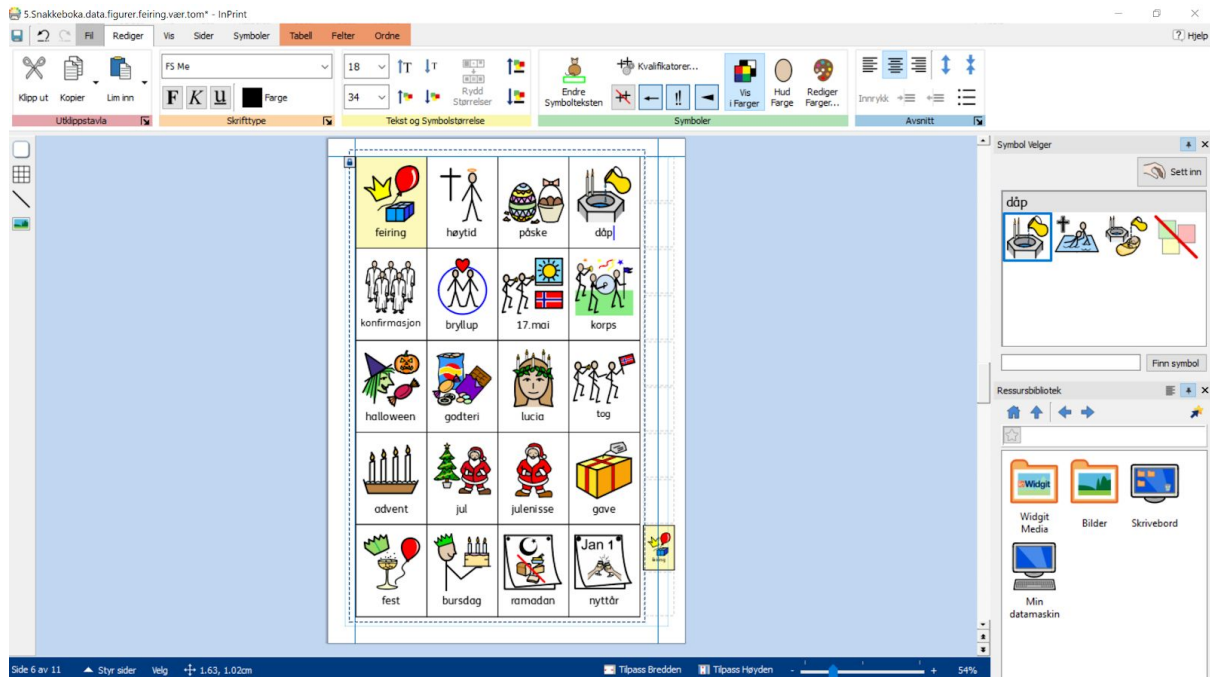

Du endrer symbol ved å trykke på en av de andre bildene, som vises på høyre side i skjermen. Ønsker du å bruke egne bilder, Velg "Bilder" for å komme til Mine bilder eller trykk på Min datamaskin for å bla gjennom hele datamaskinen. Bildet du ønsker kan ligge på en ekstern harddisk eller minnepenn. Du kan også hente inn bilder fra internett.


Hvis du ønsker å bytte et ord med et annet bruker du høyre musetast når markøren står i riktig felt og velger "Tøm feltinnhold" - Deretter kan du skrive inn nytt ønsket ord.

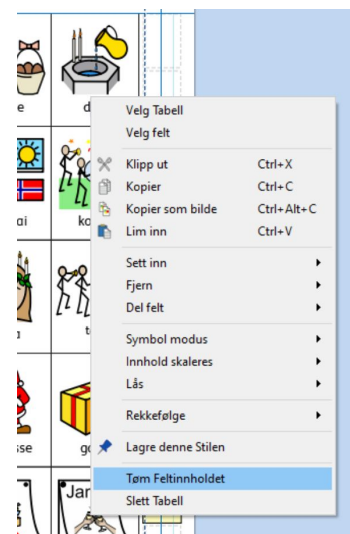

Maler til InPrint3

Hvis du ønsker å lage egne sider fra en tom tavle (mal), velger du *Maler - Snakkeboka* (og *antall sider 1-2-3*). Skriv ord i feltene og bruk tab-tasten for å gå fra felt til felt.

Symbolet kommer automatisk når du skriver. Ønsker du å endre symbolbildet kan dette gjøres på høyresiden i symbolvelgeren.

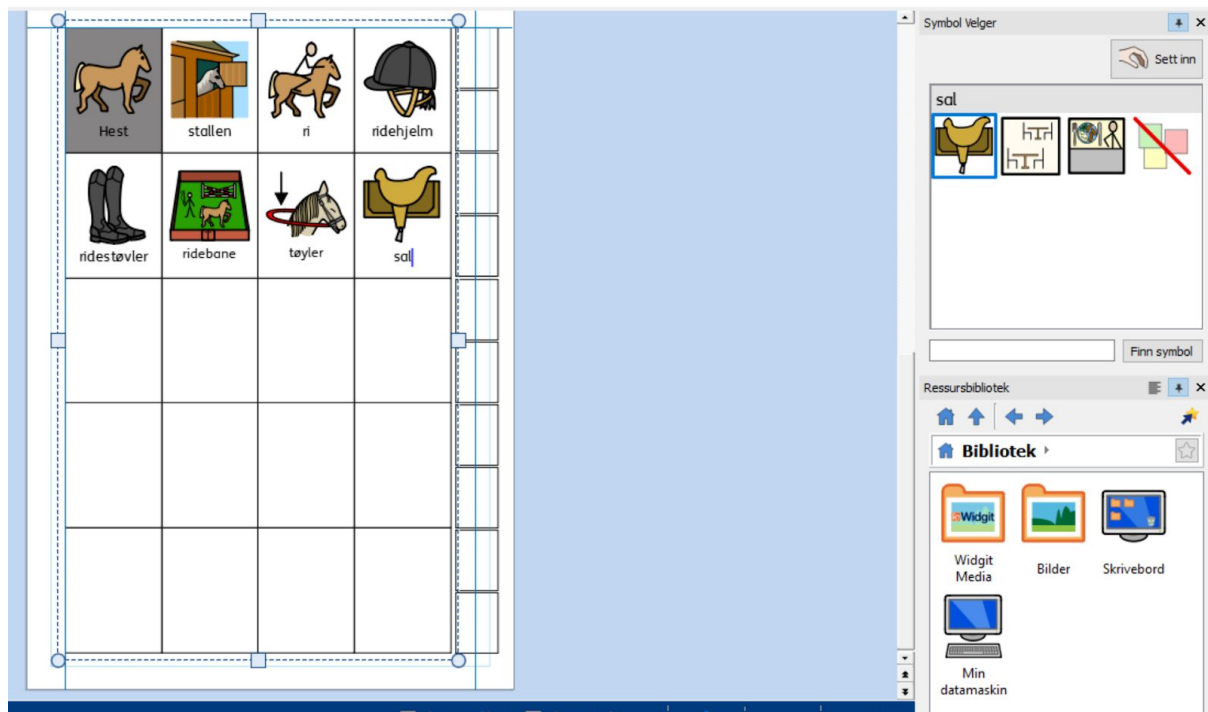

Pass på å lagre: Fil - lagre som - lagre dokument som.

Mer informasjon om redigering finner du i InPrint 3 manualen under **Support og trening** i programmet. Vi holder nettkurs og dette finner du informasjon om på våre nettsider www.normedia.no/aktiviteter

Videoer om programmet finner du her

https://www.youtube.com/results?search_query=inprint3

Copyright:

Widgit ressursene er kopibeskyttet. Widgit Software har kopirett til symbolene og innholdet hvis ikke annet er spesifisert. Du må ikke under noen omstendighet distribuere dette til noen utenom den organisasjonen som har kjøpt denne pakken. Materialet er kun til eget bruk
Kopiering til andre er forbudt.

Widgit Symbols © Widgit Software 2002 – 2020

Norsk versjon © NorMedia 2016-2020

Support

Har du spørsmål eller trenger hjelp kontakt oss på e-post

kontakt@normedia.no

eller ring oss på

Tlf 66 91 54 40.

Det ligger også en del informasjon under "Brukerstøtte" på våre hjemmesider

Følg oss gjerne på Facebook!

Lykke til!