

Bruksanvisning


Bærbar mottaker med hodetelefoner, ørepropper og lader FM-MVAHTL

VARENØ.: 1832




Bærbar stemmeforsterker med headset/ørepropp som gjør det mulig for bruker å ha en-til-en samtaler uten at andre oppfatter forsterket talelyd i rommet. Med denne løsningen kan brukeren også prate til en person på avstand, som feks. kan være kommunikasjon mellom familiemedlemmer i hjemmet, i butikk, på tur, i bil, og alle steder hvor det ikke er ønskelig at lyden forsterkes ut til omgivelsene. I støyende omgivelser en slik løsning avgjørende. Brukeren benytter en egnet AudioLink-mikrofon, som i dette tilfellet også kan være en mygg-mikrofon. (Ingen fare for feedback.) Overføringssystemet er av "studiokvalitet" og benytter EU-godkjente radiofrekvenser.

Mottakeren

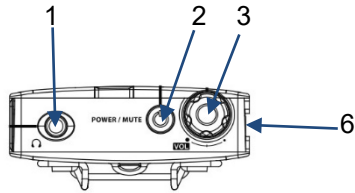

Figur 1 Mottakeren sett ovenfra

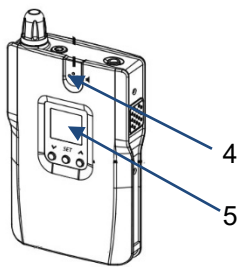

Figur 2 Mottakerens front

1. Tilkobling hodetelefon/ørepropper
2. På/Av-knapp og status LED
 - Fast grønt lys = på I
 - Av = mottaker avslått
3. Volumbryter
4. Innebygd høyttaler
5. LCD Display
6. Linjeutgang. For eventuell tilkobling av lyd ut til forsterker. NB! Mono-jack.

Virkemåte

Mottakeren betjenes med på/av-knappen (2) og volumbryteren (3) på toppen. Når den er i bruk lyser indikatorlampen/Status LED (2) på toppen av senderen. Senderen skal være avslått når den ikke er i bruk.

Senderen og korresponderende mottaker i Vestfold Audio systemet må være innstilt på samme kanal. Mottakeren har 16 kanaler som kan velges under innstillinger på LCD displayet. Still inn kanal tilsvarende den senderen/mikrofonen du skal lytte på.

Før første gangs bruk må mottakeren lades helt opp. Se avsnitt *Lading*.

Hodetelefon / ørepropper


Ledningen med jack i enden skal tilkobles mottakerens hodetelefon utgang (1).

Hodetelefonene tilpasses slik at de sitter behaglig over ørene.

Daglig bruk

Mottakeren bør stå i laderen når den ikke benyttes, slik at batteriet alltid er fulladet og mottakeren klar til bruk. Mottakeren kan henges rundt halsen i den medfølgende snoren, puttes i lommen eller festes i beltet.

Ta på hodetelefonen og slå mottakeren på. Juster lydstyrken til behagelig lydnivå oppnås.

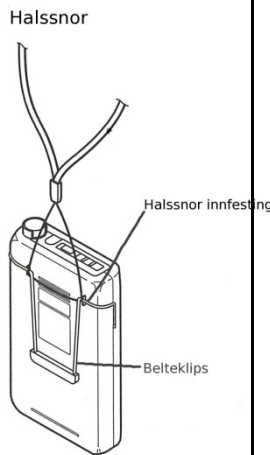


Batteri

Mottakeren drives av to 1.5V AA-batterier, som er plassert under dekslet på baksiden av mottakeren. Som standard leveres mottakeren med to NiMh oppladbare batterier, som skal lades i senderen når denne står i laderen.

Lading

Slå av mottakeren og sett den i laderen. Sørg for at mottakeren settes i riktig retning.


Indikatorlampen på laderen vil blinke i noen sekunder for å «lese» batteristatus. Deretter vil den lyse fast grønt mens enheten lades.

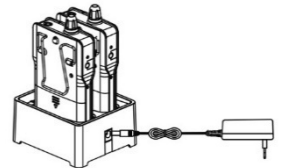

Indikatorlampen slår seg av når batteriet er fulladet.

NB! Indikatorlampen kan noen ganger begynne å blinke under lading, for selvtest og beskyttelse av batteriene.

Installasjon og funksjoner

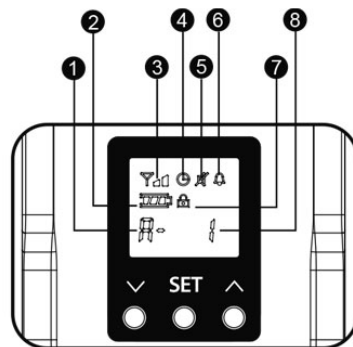

1. Bank
2. Batterinivå
3. RF signalnivå
4. Auto power av
5. Mute
6. Varsel for lavt batteri
7. Lås
8. Kanal



Sammenkobling med sender



NB! For at mottakeren skal kunne motta fra senderen, må sender og mottaker stilles på riktig BANK og riktig KANAL. NB! Bank «0» på mottaker tilsvarer Bank «1» på mikrofon. (Bank 1 = bank 2, bank 2 = bank 3 etc.).

1. Trykk og hold «SET» for å låse opp enheten for programmering.
2. Benytt piltastene «opp» og «ned» for å velge BANK. Trykk «SET» med et kort trykk når riktig BANK er valgt.
3. Benytt piltastene «opp» og «ned» for å velge KANAL. Trykk «SET» med et kort trykk når riktig KANAL er valgt.
4. Enheten lagrer innstillingene og går automatisk ut av menyen når riktig BANK og KANAL er valgt. Enheten er klar til bruk



Valg for at enheten skal slå seg av automatisk

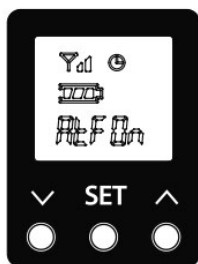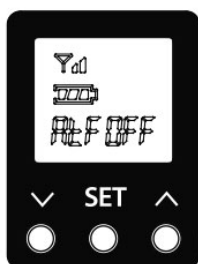

Med denne funksjonen påslått vil enheten slå seg av automatisk 30 minutter etter at senderen er avslått.


- a. Funksjonen er som standard satt til «off». Benytt piltastene for å slå funksjonen på.
- b. Det vises et klokkesymbol når funksjonen er på.
- c. Trykk «SET» for å lagre.

Varsel for lavt batteri

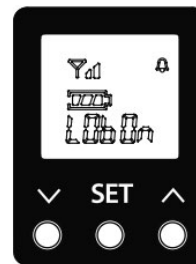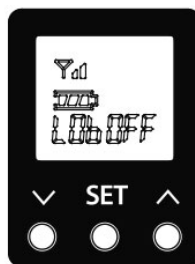

- a. Funksjonen er som standard satt til «off». Benytt piltastene for å slå funksjonen på.
- b. Det vises et alarmsymbol når funksjonen er på.
- c. Trykk «SET» for å lagre.

Lås menyen

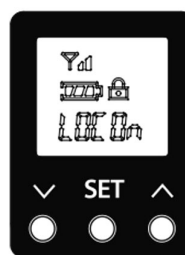

Med denne funksjonen låser du menyen, slik at man ikke utilsiktet endrer innstillingene.

- a. Hold begge piltastene inne samtidig til displayet viser «LOCK ON»
- b. Utfør samme prosedyre for å låse enheten opp igjen.

Enkel feilretting

Dersom mottakeren ikke virker, bør du sjekke følgende:

1. Slå mottakeren på. Status LED lampen (2) skal lyse fast grønt. Gjør den ikke det, må batteriet lades eller skiftes.
2. Hvis batterilevetiden begynner å bli kort, må batteriene skiftes. Kontakt leverandøren.

Rengjøring utført av bruker

Mottakeren og hodetelefonen kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

Tekniske spesifikasjoner

Frekvensområde: 100 – 15000 Hz

Radio båndbredde: 823 – 832 MHz

Mål (BxHxD): 62 x 20 x 98 mm

Rekkevidde: Opp til 120 meter,
avhengig av sender

Leverandør

Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12

3241 Sandefjord

Tel. 3347 3347

Epost: post@vestfoldaudio.no



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no

