
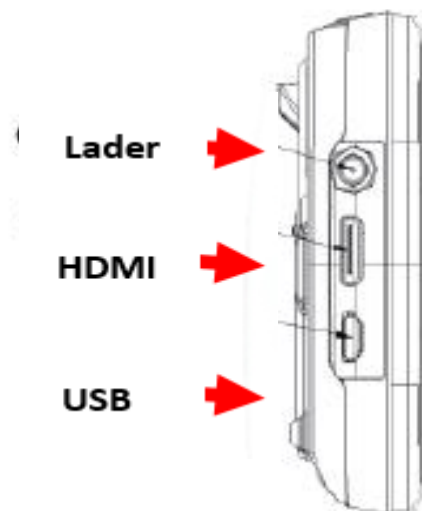
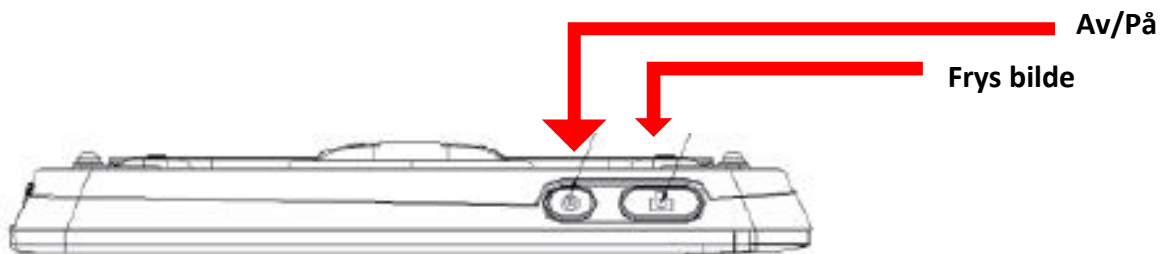


# Bruksanvisning Pangoo 5.5 HD

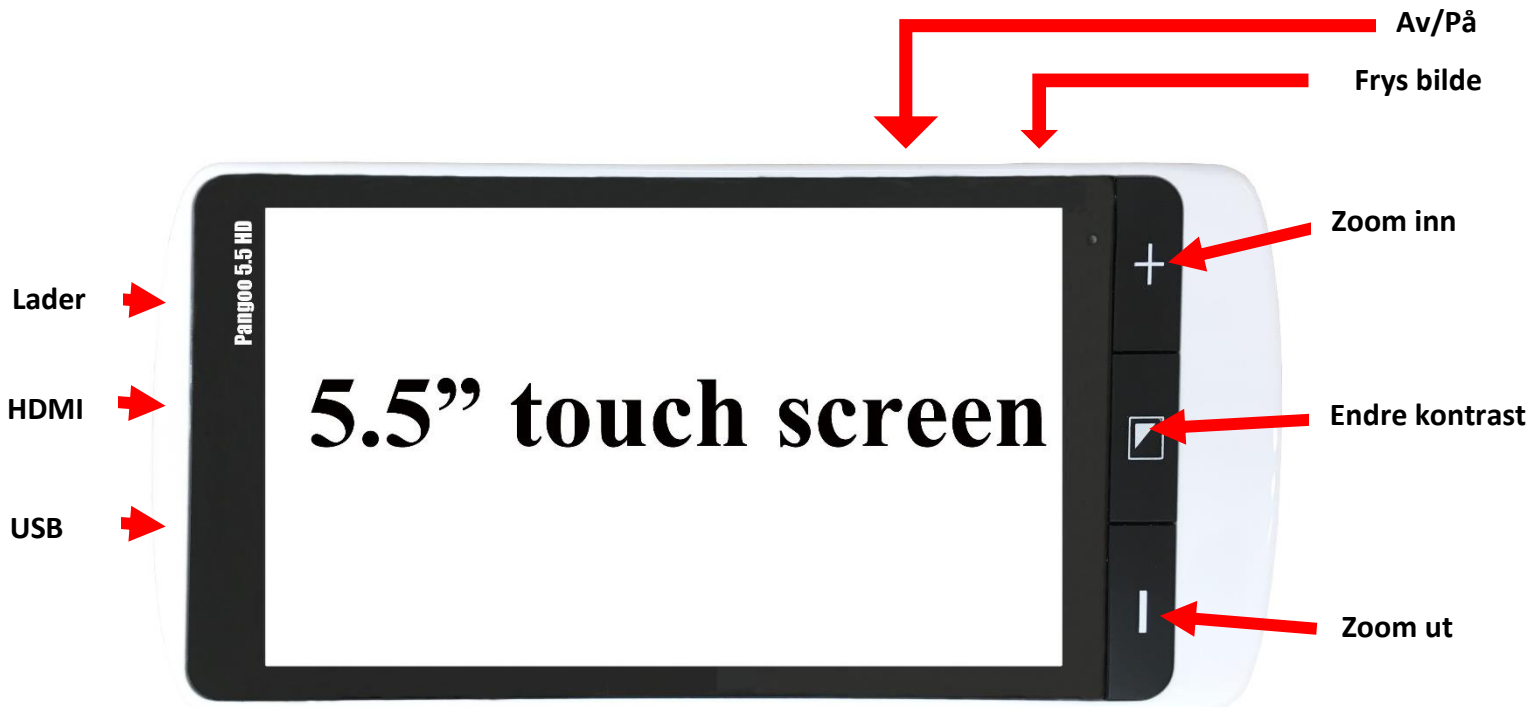

### Slå Av / På:

Trykk og hold inne Av/På-knappen i 3 sekunder til du hører en pipe-lyd for å slå på apparatet

Trykk og hold inne Av/På-knappen i 2 sekunder for å slå av apparatet.

### Bytt mellom Nærkamera og Avstandskamera:

Bytt mellom Nærkamera eller Avstandskamera ved å åpne eller lukke det innebygde bordstativet.

Når bordstativet er åpnet vil Nærkamera være aktivert, og når bordstativet er lukket vil avstandskameraet være aktivert.

### Slå Av/På kameralys:

Trykk og hold inne «Endre kontrast»-knappen i 5 sekunder for å slå Av og På kameralyset.

### Kontrastfarger:

Det finns 2 ulike moduser for kontrastfarger; Normal modus, og Favoritt modus.

Normal modus har 12 ulike kontrastfarger man kan velge mellom.

Favoritt modus har 3 ulike kontrastfarger man kan velge mellom (fullfarge og valgt farge og motsatt valgt farge).

Bytt mellom Normal og Favoritt ved å trykke og hold inne «Endre kontrast»-knappen i 2 sekunder.

Velg kontrastfarge i Favoritt ved å ved å trykke og hold inne «Endre kontrast»-knappen i 2 sekunder når aktuell farge vises på skjermen.

### Justere lysstyrke på skjermen:

Trykk og hold inne «Frys bilde» og «Zoom ut» samtidig for å komme til justering av lysstyrken (brightness). Trykk deretter «Zoom ut» for å redusere eller «Zoom inn» for å øke lysstyrken.

### Touch-skjermfunksjon:

Trykk på «Frys bilde» knappen for å fryse bildet. Du kan nå zoome inn og ut. Dra fingeren rundt på skjermen for å bevege deg rundt i bildet.

Trykk på «Frys bilde» knappen igjen for å gå tilbake til Live-bilde. Du vil nå få spørsmål om du vil lagre det fryste bildet. Trykk på høyre ikon for å lagre, og venstre ikon for ikke å lagre.

### Lagrede bilder:

Trykk og hold inne «Frys bilde» knappen i 3 sekunder for å komme til dine lagrede bilder. Bla i bildene ved å trykke på pilene på skjermen, og velg bilde ved å trykke på ikonet øverst i midten, eller slett bilde ved å trykke på ikonet nederst i midten.

Trykk og hold inne «Frys bilde» knappen i 3 sekunder igjen for å gå tilbake til Live-bilde.

#### HDMI utgang:

HDMI utgangen (mini) kan brukes til å koble lupa til en TV eller en monitor for å få større bilde.

#### Tekniske spesifikasjoner:

- 5,5 " skjermstørrelse
- 2x min zoom – 23x max zoom
- Kamera: 720p HD
- Fargekontraster: 12
- Autofokus
- Batteritid: 4 timer
- Ladetid: Ca. 5 timer
- HDMI utgang
- Strømforsyning: Input: 110-240V, Output: 5V, 2.5 A
- Størrelse: 80 x 180 x 18 mm
- Vekt: 250 gram

