

Synstekniske hjelpemidler
Dokumentasjon for
Evo E10 Daisy player



Revisjoner

Når det gjøres endringer i dokumentasjonen, vil denne bli datert og gitt en kort beskrivelse. Oversikten nedenfor lister opp dette.

Revisjonsoversikt

Dato	Navn	Beskrivelse
28.06.21	Bent-Håvard Sollid	Første versjon.

Innhold – EvoE 10 Daisy Player

1	Innledning	3
2	Bruksanvisning – komme i gang	3
2.1	Slå på/av Evo E10.....	3
2.2	Menyen	3
2.3	Spille av innhold.....	4
2.4	Stille inn volum	4
2.5	Tastelås funksjon	4
2.6	Batteri	4
2.7	Alarm.....	4
2.8	Sette inn og fjerne SD-kort.....	5
2.9	Filtype som støttes av Evo E10	5
2.10	Legge til eller endre innhold.....	5
3	Koble Evo E10 til nettverk	5
3.1	Metode 1	5
3.2	Metode 2	6
4	Daisy bok avspilling	6
5	Standard fabrikk innstilling	7
6	Funksjoner	7
7	Oversikt over knapper	8
8	Vedlikehold, renhold	8
9	Feilsøk	8
10	Tekniske data	9

1 Innledning


Dette dokumentet beskriver Evo E10 Daisy player som er et synsteknisk hjelpemiddel.

Dette er en Daisy spiller som også kan spille av lyd fra internett, ta opp memo, være alarmklokke, kalkulator, lydopptaker med mere.

2 Bruksanvisning – komme i gang

- I kapittel 6 er det liste over alle Funksjoner.
- I kapittel 7 er det Oversikt over knapper.

Det følger med ørepropp, lader og USB-kabel for lading samt bæreveske og bærestropp.

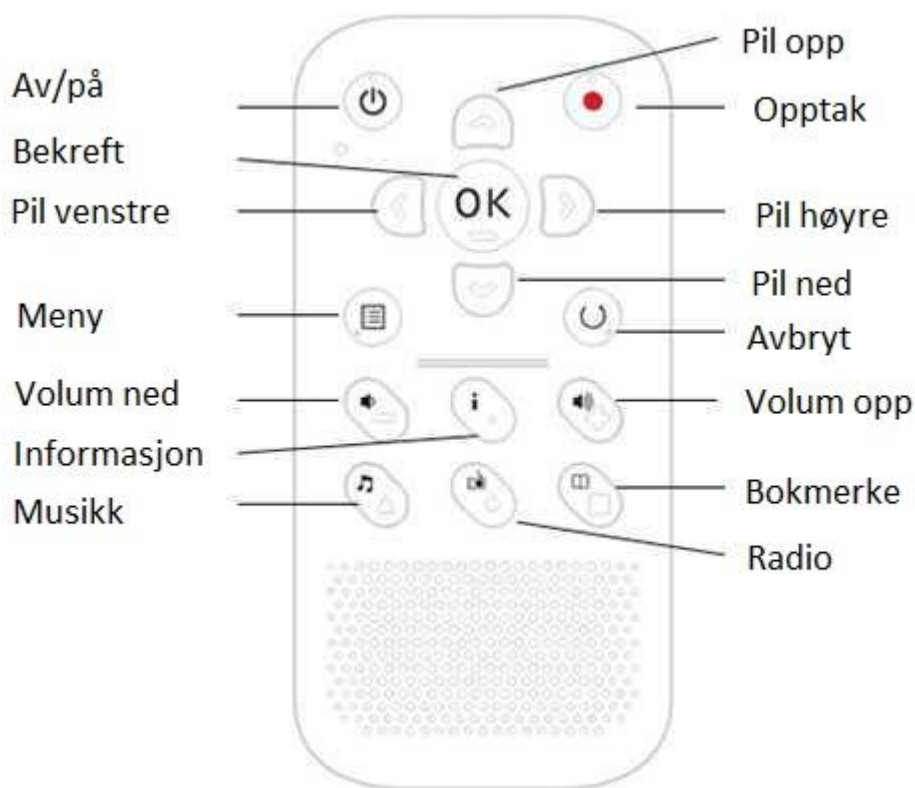

2.1 Slå på/av Evo E10

- For å slå på Evo E10 Daisy spiller trykk og hold inne av/på-knappen i 3 sekunder.
- For å slå av Evo E10 Daisy spiller og hold inne av/på-knappen i 3 sekunder.
- Evo E10 kan lades enten med medfølgende lader eller fra PC med medfølgende USB kabel. For å bruke Evo E10 samtidig som den lader fra pc, koble Evo E10 fra PC via sikker utløse funksjon, men ikke ta ut USB kabelen.

2.2 Menyen

Trykk meny-knappen og deretter navigasjonsknapp – ned for å høre.

Velg en undermeny: for eksempel når du hører «version information», trykk OK-knappen for å få tilgang. For å komme tilbake trykk på avslutt-knappen. Undermenyer:

«network», «version information», «device information», «time settings», «system voice», «alarms», «resume play settings», «hotkey settings», «recordings», «startup sound and vibration», «tools», «language (spiller med flere språk innlagt)», «check for update» and «default factory settings».

Menyene er utformet slik at når en kommer til siste punkt i listen og velger neste punkt, så hopper den til første punkt i listen.

2.3 Spille av innhold

Slå på Evo E10 Daisy-spiller, vent noen sekunder. Trykk på avslutt-knappen for å velge det minne som ønskes å benytte. En kan velge mellom «internal memory», «SD card» eller «USB disk». Deretter trykker en navigasjonsknapp – ned for å velge, så OK-knapp bekrefter valget.

Eksempel spille av Daisy lydbok: «internal memory – OK – main folder», «Daisy folder» - OK – velg bok med navigasjonsknapp opp/ned – OK – OK – lydbok spilles av.

Eksempel spille av internettradio: «internal memory – OK – main folder», «internet radio folder» – OK – velg forhånds lagret radio kanal med navigasjonsknapp opp/ned – OK – radio spilles av.

2.4 Stille inn volum

- Trykk volum knapp opp eller ned for å justere volumnivået. Volum varierer i trinn fra volum 0 til volum 16.
- Ved bruk av hodetelefoner anbefaler vi at du angir volum på komfortabelt nivå.
- Når det ikke lyttes til lydfiler: trykkes det på volum ned/opp-knappen for å høre hvilket volumnivå som er valgt.
- Når det lyttes til lydfiler og en trykker på volum ned/opp-knappen så vil en ikke få opplept volumnivå som er valgt. Dette for å få uavbrutt avspilling av lydfiler.

2.5 Tastelås funksjon

For å låse tastene, trykk på av/på-knappen først og trykk deretter på musikk-knappen. Tastene låst. For å låse opp igjen, gjenta prosedyren.

2.6 Batteri

Trykk informasjons-knappen 4 ganger under avspilling av internettradio, Daisy bok osv.

- Batteri status leses ut.
- Brukstid 10 timer.

2.7 Alarm

- Etter at du har slått på Evo E10, trykker du på meny-knappen og trykker på opp/ned-navigasjonsknappen igjen og igjen til du hører meldingen «alarms».
- Trykk deretter på OK-knapp for tilgang til alarm menyen, som inkluderer 5 sett med alarmer: Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, Alarm 4 og Alarm 5.
- Trykk opp/ned-navigasjonsknappen velg en av alarmene og trykk OK-knappen.

- Trykk deretter opp/ned navigasjonsknappen igjen og igjen vil du høre «time», «minute», «disable/enable», «recurrent», «alarmsignal», «alarm reminding mode» går i loop.
- Velg en parameter og trykk deretter på venstre/høyre navigasjonsknapp for å angi parameter og trykk OK-knappen lagre innstillingene dine, vil du høre «setting saved»
- Merk: Under alarm trykk på en knapp (unntatt Avslutt-knappen) og gå til 10 minutter snooze modus.
- Trykk på Avslutt-knappen for å stoppe alarm.

2.8 Sette inn og fjerne SD-kort

Vennligst følg instruksjonene nedenfor for å sette inn og fjerne SD-kort. Kontroller at Evo E10-spilleren er avslått når du setter inn eller tar ut SD-kort.

- Finn den lange rektangulære sporet øverst på Evo E10 Daisy-spilleren.
- Ett hjørne av SD-kortet er kuttet i en 45 graders vinkel. Den kuttete hjørnedelen skal være nederst til høyre. Sett SD-kort i kortsporet og dytt det ned. Hvis SD-kortet ikke er riktig vei, vil det ikke gå an å sette inn i lås.
- Skyv Forsiktig SD-kortet ned i spillerens SD-kortspor til det klikker på plass.
- For å ta ut SD-kortet, må du trykke ned på den øvre kanten av SD-kortet for å løsne det og deretter ta det ut.

2.9 Filtype som støttes av Evo E10

- Daisy format: Daisy 2.0.2, Daisy 3.0.
- Text-format: txt, doc/docx, HTML, HTM, EPUB, PDF, MOBI, RTF.
- Lydformat: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A, etc.
- Videoformat: RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT etc.
- Daisy Online-protokoll.
- Bookshare API Protocol (Valgfritt for bestemt område eller land).

2.10 Legge til eller endre innhold

For å legge til eller endre innhold på Evo E10 benyttes medfølgende USB kabel. Koble Evo E10 til PC via USB kabel. Evo E10 identifiseres som masselagringsenhet, det er txt-filer som heter Daisy, DODP, internet radio, PodcastReader, Record og wifi_password.

3 Koble Evo E10 til nettverk

Det finnes flere måter å koble Evo E10 til et WIFI-nettverk.

3.1 Metode 1

- Slå på spilleren.
- Trykk på menyknappen.
- Trykk opp eller ned navigeringsknappen til du hører «network».
- Trykk på OK-knappen og hør «wireless settings».
- Trykk på OK-knappen og velg deretter «wireless active».
- Trykk på OK-knappen «scanning please wait – scanning completed».

- Trykk opp eller ned navigeringsknappen for å velge wifi-nettverk etter WiFi nettverksskanning ferdig.
- Trykk OK-knappen for å velge nettverk når riktig nettverk leses opp.
- Trykk på bokmerkeknappen for å bytte mellom inndata bokstav, tall eller tegn.
- Velg bokstaver, tall eller tegn med opp eller ned-navigasjonsknapp, trykk på høyre-navigasjonsknapp for å bekrefte og for å hoppe til neste tegn, fortsett prosedyren til hele passordet er lagt inn.
- Trykk på OK-knappen for WiFi-tilkobling når passord er ferdig tastet inn.

Tips 1: hvis en skriver et tegn feil ved inntasting av passord kan en trykke på venstre navigasjonsknapp for å hoppe tilbake til forrige inntegn, for så å skrive inn riktig tegn.

Tips 2: om en glemmer hvilket tegn en har tastet inn kan en trykke på informasjonsknappen for å høre tegn eller tegn en har tastet inn.

3.2 Metode 2

- Koble Evo E10-spiller til PC via USB-kabel.
- Åpne txt-filen «wifi_password» fra Evo E10 mappe.
- Rediger passord på første rad i txt-filen, lagre og lukk txt-fil.
- Koble Evo E10 fra PC via sikker utløse funksjon.
- Trykk på meny-knappen.
- Trykk opp- eller ned-navigeringsknappen til du hører «network».
- Trykk OK-knappen og hør «wireless settings».
- Trykk på OK-knappen og velg deretter «wireless active» ved å trykke på venstre eller høyre-navigasjonsknapp.
- Trykk på opp eller ned-navigasjonsknappen for å velge WiFi-nettverk etter at WiFi-nettverksskanningen er fullført.
- Trykk på OK-knappen når du hører «WiFi network».
- Trykk menyknappen for å lese ut passord, lagret på «wifi_password» txt-filen.
- Trykk på OK-knappen for WiFi-nettverkstilkobling.

Tips: når en redigerer passord på «wifi_password» txt-filen og det er tilgjengelig forskjellige WiFi-nettverk med forskjellige passord så må en sørge for at passord er skrevet på hver sin rad for hvert enkelt WiFi-nettverk.

4 Daisy bok avspilling

- Koble Evo E10 til pc med USB kabel. Last ned Daisy bok fra for eks. nlb.no og lagre den i en mappe Vennligst sørg for å lagre Daisy bøker på standard «Daisy» mappe.
- Slå på Evo E10 for å få tilgang til hovedmappen, trykk opp eller ned-navigeringsknappen til en hører «Daisy» kunngjøring.
- Trykk så OK-knappen, tilgang til Daisy bøker, trykk opp eller ned-navigasjonsknappen flere ganger og velg Daisy boken en vil spille av.
- Trykk OK-knappen for å spille Daisy bok.

- Under Daisy bok avspilling trykker en på informasjon-knappen. Da vil en høre tittel, tid gått, total varighetstid, forfatter, utgiver, opptaker, publiseringsdato, formatkunngjøring og fortsetter deretter å spille videre.
Trykk på informasjon-knappen to ganger for å høre tid og dato før den fortsetter å spille videre.
Trykk på informasjon-knappen tredje gang for å høre statuskunngjøring på batterinivå før den fortsetter å spille.
Trykk på informasjon-knappen fjerde gang for å høre WiFi-tilkobling status kunngjøring før den fortsetter å spille.
- Under Daisy bok avspilling: Hvis du ønsker å justere avspilling alternativet, trykk på menyknappen ned/opp og så flere ganger på navigasjonsknappen for å høre «go to page», «go to heading», «speed», «pitch», «time jumpintervall» velg ett alternativ og følg trinnene nedenfor.
- Eksempel «go to page» for å gå til side 15: trykk OK-knappen, trykk navigasjonsknapp ned/opp til en hører «1», trykk på høyre-navigasjonsknapp til en hører «10». Trykk navigasjonsknapp ned/opp til en hører «15» og trykk så OK-knappen for å gå til side 15.
- Eksempel «go to heading» innstilling: Prosedyre samme som «go to page» innstilling.
- Under Daisy bok avspilling: Trykk OK-knappen for å pause avspilling, du høre «pause», trykk OK-knappen igjen for å fortsette avspillingen.



















5 Standard fabrikk innstilling

- Slå på Evo E10, trykk menyknappen og trykk så navigasjonsknapp ned/opp til en hører «default factory settings».
- Trykk OK-knapp til «default factory settings» og «restore factory settings?».
- Trykk OK-knapp for å gjenopprette standard fabrikkinnstillinger.

6 Funksjoner

- Daisy spiller.
- DODP.
- Internett-radio.
- Internett Podkast.
- Talememo.
- Snakkende alarmklokke med vibrasjonsminnemodus.
- Snakkende klokke og dato.
- Snakkende kalkulator.
- Nedtellings funksjon.
- Snakkende kompass.
- Snakkende påminnelse.
- Tale bokmerke.
- Opptaker, støtter PCM-opptak.
- OTG funksjon.

7 Oversikt over knapper

-  På/Av-knapp (øverst til venstre på frontpanelet).
-  Opptaksknapp (øverst til høyre på frontpanelet).
-  Opp-navigasjonsknapp (midt mellom På/Av og opptaksknapp).
-  Venstre navigasjonsknapp (nedenfor På/Av-knapp).
-  Bekreft-knappen (til høyre for venstre navigasjonsknapp).
-  Høyre navigasjonsknapp (til høyre for bekreft-knapp).
-  Ned navigasjonsknapp (nedenfor bekreft-knapp).
-  Meny-knapp (nedenfor venstre navigasjonsknapp).
-  Avslutt-knapp (nedenfor høyre navigasjonsknapp).
-  Volum ned-knapp (nedenfor meny-knapp).
-  Informasjon-knapp (midt mellom volum opp og volum ned-knapp).
-  Volum opp-knapp (nedenfor avslutt knapp).
-  Musikk-knapp (nedenfor volum ned-knapp).
-  Alternativknapp (nedenfor informasjonsknapp).
-  Bokmerke-knapp (nedenfor volum opp-knapp).
-  Hodetelefon-ikon.
-  Mikrofon-ikon.
-  Ikon for USB-port.

8 Vedlikehold, renhold

Det er ingen batterier, sikringer eller andre deler som skal ettersees eller byttes jevnlig.

Den kan rengjøres med en lett fuktet klut uten, eller med et svakt, rengjørings-middel. Den skal ikke senkes under vann eller på annen måte utsettes for mye fuktighet.

9 Feilsøk

Feil	Mulige årsaker	Mulig løsning
Kan ikke slå på.	Tomt batteri.	Lad batteriet med en gang.
Redusert batterilevetid.	1. Lavt batterinivå. 2. Bruker høyttaleren.	Lad batteriet med en gang. Prøv å bruke øreplugger.

	3. Tilgang til Internett hele tiden.	Koble fra Internett når det ikke er i bruk.
Knapper, ingen respons.	Krasjet.	Trykk og hold På/Av-knapp i 10 sekunder.
Filoverføring mislyktes.	USB-kabel frakoblet.	Koble til USB-kabelen på nytt
Slår av automatisk.	1. Auto avslåingstid. 2. Lavt batterinivå.	Juster automatisk avslåing. Lad batteriet med en gang.
Ikke noe volum, volum for lavt eller for høyt.	Volumnivå er ikke riktig justert.	Juster volumnivået til passende nivå.
Opptaksvolum er for lavt.	1. Er for langt unna mikrofon. 2. Opptak avspilling volumnivå er ikke justert riktig.	Snakk nærmere mikrofon. Juster volumnivået.
Daisy spiller virker ikke.	Det er ikke lagt inn lydbøker.	Legg inn lydbok i riktig mappe.
Internett radio virker ikke.	1. Det er ikke lagt inn radio stasjon. 2. Evo E10 er ikke koblet til internett.	Lagre radiostasjon i riktig mappe. Koble Evo E10 til internett.

10 Tekniske data

Type	Evo E10 Daisy player.
Betjening	Brytere på front.
Inn/utganger	Lader/strømforsyning, mikrofon, hodetelefon, USB, spor for minnebrikke.
USB-protokoll	USB 2.0.
Innebygd minne	4-32 GB Flash.
Eksternt minne	1-32 GB SD brikke.
Strømforsyning	Innebygd oppladbart batteri.
Brukstid	10 timer.
Språk	Engelsk samt innebygde avhengig av TTS.
Miljø	0-40°C.
Mål	123 x 50 x 17 mm.
Vekt	115 gram.