

Brukermanual



Snow 12 OCR

Kontaktinformasjon

Adresse: ProVista

Nils Hansens vei 20
0667 Oslo

Telefon: 22 69 61 00

Hjemmeside: www.provista.no

PROVISTA
spesialoptikk

Innhold

| | |
|------------------------------|---|
| Hva er i esken | 3 |
| Ta enheten i bruk..... | 5 |
| Lading av batteri..... | 5 |
| Slå På/Av..... | 5 |
| Hvilemodus..... | 5 |
| Juster forstørrelsen. | 5 |
| Kontrast | 5 |
| Frys og lagre bilde..... | 5 |
| Innstillingsmenyen | 5 |
| Tekstopplasing | 6 |
| Start opplesingsmodus..... | 6 |
| Start OCR | 6 |
| Teknisk spesifikasjoner..... | 6 |


Hva er i esken

Enheden blir levert med:

- Stativ
- Veske
- Brukermanual
- Strømadapter
- USB-kabel
- HDMI-kabel
- Adapter USB til USB-C
- Klut
- Oppsett

Enheden kan brukes alene eller i det medfølgende stativet.



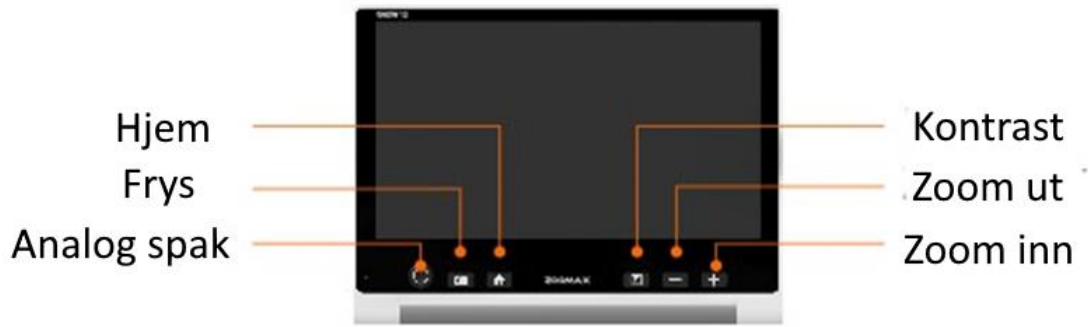

Ta enheten i bruk

Lading av batteri

Batteriet MÅ laddes helt opp før første gang enheten tas i bruk. Lad enheten ved å koble til laderen til strømkontakten på venstre side av enheten. Det tar ca 2 timer å lade enheten helt opp. Lysdioden vil lyse rødt men enheten lader. Når enheten er fullt oppladet vil lysdioden lyse grønt.

Slå På/Av

Holde På/Av-knappen nede i 3 sekunder for å starte enheten. Legg merke til at enheten bruker litt tid på å starte opp. Hold knappen inne igjen for å slå enheten helt av. Ved bruk av hvilemodus vil enheten starte raskere.4.2 Ström på/av

Hvilemodus

Sett enheten i hvilemodus ved å trykk kort på På/Av-knappen. I hvilemodus skrus skjerm av for å spare strøm. Trykk kort igjen for å avslutte hvilemodus. Om enheten ikke blir bruk på 30 minutter, mens den står i hvilemodus vil den slå seg helt av.

Juster forstørrelsen.

Bruk knappene Zoom inn og Zoom ut for å justere forstørrelsen. Det er mulig å bruke den analoge spaken for å navigere i det forstørrede bilde.

Kontrast

Bytt mellom kunstige farger ved å trykke på Kontrast-knappen. Det er 10 fargekombinasjoner å velge mellom. Hold knappen inne i 1 sekunder for å velge en favorittfarge. For å hente tilbake resten av fargene må knappen igjen trykkes inn i 1 sekund

Frys og lagre bilde.

Trykk raskt på Frys-knappen for å fryse bilde på skjermen. Trykk igjen for å gå tilbake til kamerabildet.

Innstillingsmenyen

Trykk Hjem-knappen for å åpne menyen på enheten. Bruk den analoge spaken for å velge menyalternativ. Bekreft valget ved å trykke på Kontrast-knappen.

Tekstopplering

Start opplesingsmodus

Trykk og hold Frys-knappen i 3 sekunder når kamerabildet vises. Tekstoppleringssymbolet vises på skjermen. Det er også mulig å aktivere opplesingsmodus via menyen. Trykk igjen på knappen i 3 sekunder for å gå tilbake til kameramodus. Det er også mulig å trykke på symbolet nederst i høyre hjørne på skjermen

Start OCR

Trykk en kort gang på Frys-knappen for å starte OCR av teksten under kamera. Symboler på skjerm gir mulighet til å starte og stoppe lesingen.

Teknisk spesifikasjoner

2,7X - 19X

2,5X - 19X (på stativ)

10 kunstige farger

12 tommers skjerm (FHD)

Kamera: Autofokus/PekEfokus; 13 megapixlar

Størrelse:

29*22*2,4 cm — Snow

12 35*23*4 cm — stativ

Vekt:

Snow 12: 960 g

Stativ: 1230 g

2,5 til 3 timers brukstid på batteri

2 timers ladetid

Strømadapter: Input: 100-240V; Output: 15V/4A

Minne: cirka 1,5 GB