



i-Reader2

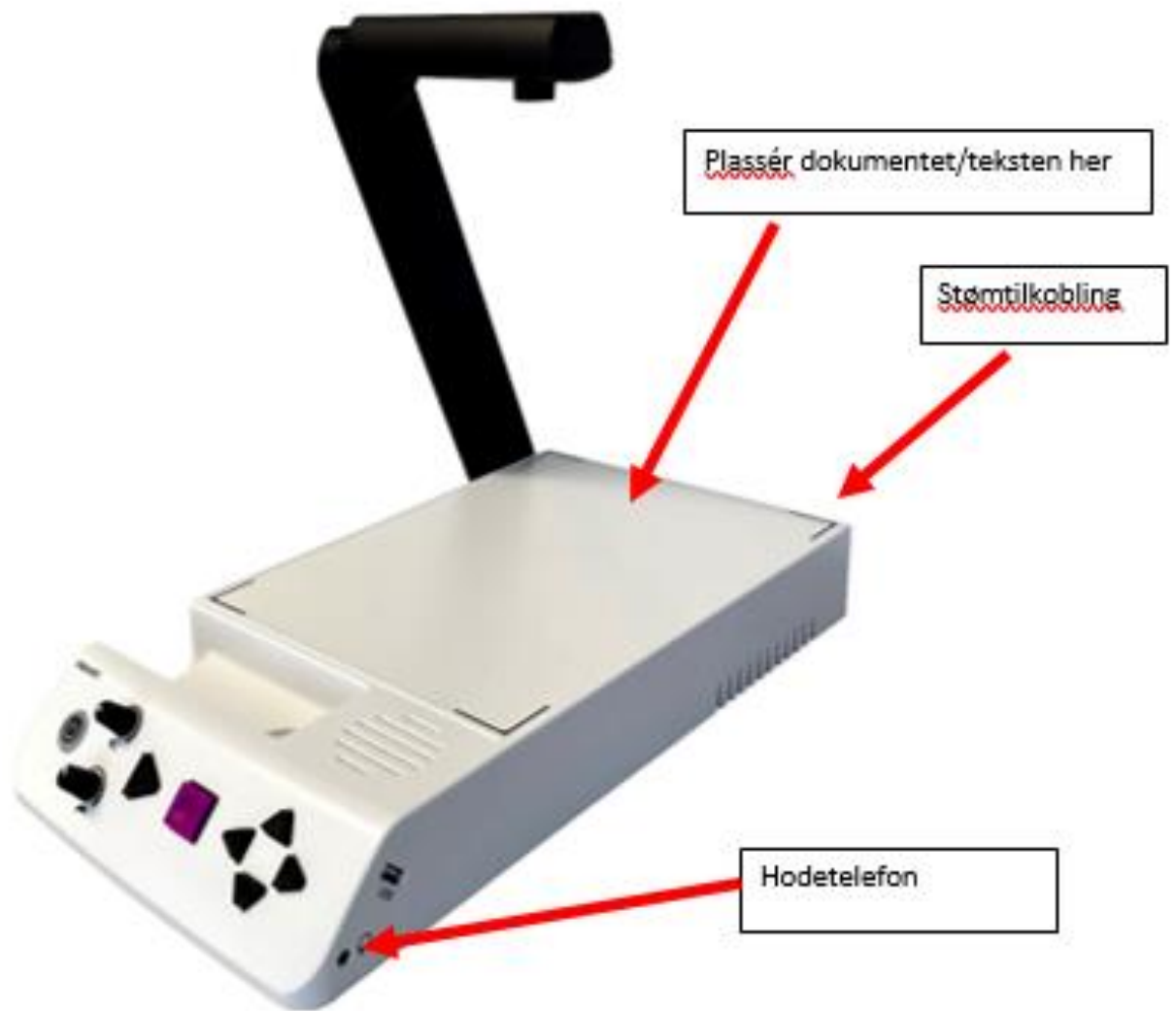

Brukermanual

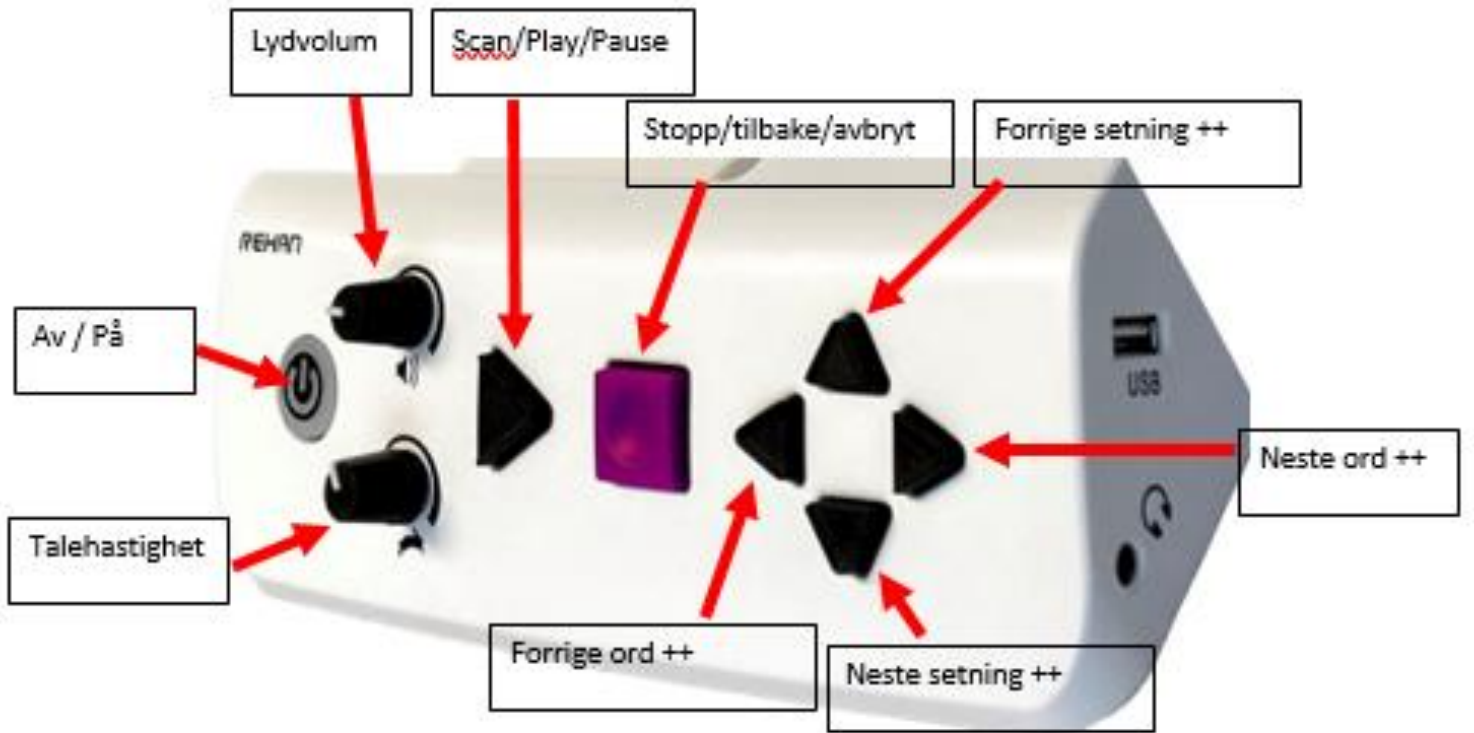

Innhold i esken:

- i-Reader 2 lesemaskin
- Strømforsyning og strømkabel
- Bæreveske
- Brukermanual

Innledning:

Skannekameraet med integrert LED -lys plasseres ned i enheten når det ikke er i bruk eller i transportposisjon. Kameraarmen er plassert på venstre side av enheten og må løftes for å bringe den i lesestilling. Høytaleren er plassert nederst til høyre. Det er taktile dokumentplasseringsmarkører øverst til venstre og på undersiden av kameraområdet for å justere dokumentet.

Alle betjeningsknapper er plassert på forsiden av enheten. Funksjonene til disse knappene varierer som følge av modusen enheten er i.

Tilkoblinger på høyre side:

På høyre side foran er det et rektangulært hull med USB2 -tilkobling. Hodetelefontilkoblingen er plassert nederst til høyre og er et rundt 3,5 mm hull.

Tilkoblinger på baksiden:



Strømadapterinngangen er plassert øverst til venstre og er oppdaget som en rektangulær boks med et lite hull for å koble til strømadapterens utgangskontakt.

To skjermtilkoblinger er plassert under strømkontakten. Digital HDMI til venstre og analog VGA på høyre side. I midten er 2 ekstra USB -tilkoblinger.

Disse kan brukes til en USB -mus for å kontrollere skriftstørrelsen når du bruker en VGA- eller LCD -skjerm.

Nederst til høyre er det 2 runde innganger. Til venstre er den grønne lydutgangen. Bruk denne linjeutgangen bare for eksternt lydutstyr, ikke bruk hodetelefonen med denne kontakten. Den rosa tilkoblingen har ingen funksjon, den er en del av det integrerte PC -kortet og er reservert for mulige fremtidige oppgraderinger.

Oppladbart batteri:

I-Reader 2 har et integrert Li-ion-batteri.

Ladingen av batteriet kan ta opptil 6 timer. Lysindikatoren i Av / På-knappen viser ladestatusen til enheten når strømadapteren er tilkoblet:

Grønn: Enheten er slått på og lading pågår.

Blå: Enheten lades og maskinen er slått av

Av: Enheten er slått av og batteriet er fulladet

Batteriet:

Hvis batteriet er tomt, vil enheten indikere dette med meldingen "Lavt batteri. Koble til adapter".

Når batteriet er tomt, slår enheten seg av. Utkoblingstonen høres, og den grønne lysindikasjonen på av / på-knappen slås av.

Batterisparer:

I-Reader 2 har en smart batteristrømkontroll og slår automatisk av enheten hvis den ikke har blitt brukt på 30 minutter. En indikasjonstone blir hørt og enheten slås av.

Lagringsforhold:

For å forlenge batteriets levetid når enheten lagres i lengre perioder, anbefales det å lade batteriet til omtrent 50% lading. Lad batteriet til dette nivået hvert halve år. Hold lagringstemperaturen til romtemperatur eller lavere. Høye temperaturer vil påvirke selvutladningen av batteriet negativt.

Første gangs bruk:

Pakk ut enheten og plasser den på et stabilt underlag. Koble til strømadapteren og slå på enheten ved å trykke på Av / På-knappen til en lyd høres. Det integrerte batteriet lades automatisk.

I-Reader 2 starter, og et tikkende klokkesignal høres. Når enheten er klar, vil den lese opp førstegangsbruk og sikkerhetsmerknad.

Denne meldingen leses bare opp én gang og kan avbrytes ved å trykke på STOPP -knappen

Kontrollpanelet:Slå i-Reader 2 på:

Til venstre på kontrollpanelet er PÅ/AV -knappen. Trykk på knappen til det høres en lyd. Dette vil slå enheten på eller av.

Endre volumet:

Til høyre for av/på -knappen finner du 2 vribrytere. Den øverste er volumkontrollen. Drei med klokken for å øke volumet og mot klokken for å redusere.

Endre lesehastigheten:

Til høyre for av/på finner du 2 vribrytere. Den nederste er lesehastighetskontrollen. Drei med klokken for å øke lesehastigheten og mot klokken for å redusere. Vær oppmerksom på at lesehastighetskontrollen har et indikasjonshakk som angir normal lesehastighet.

Play/pause:

På høyre side av vribrytrne er det en trekantet PLAY -knapp for å starte eller sette høytlesningsmodus på pause.

Stopp:

Til høyre for PLAY -knappen finner du STOPP -knappen.

Navigasjonstaster:

På høyre side av kontrollpanelet finner du 4 navigasjonstaster: OPP, NED, VENSTRE og HØYRE.

Batteristatus:

Trykk kort på PÅ/AV -knappen for å høre gjeldende batteriladestatus.

Dato og klokkeslett:

Trykk på PLAY og HØYRE samtidig for å høre gjeldende dato og klokkeslett. Hvis dato og klokkeslett er feil, kan de stilles i menyen.

Funksjoner:

Skann dokument:

Slå på enheten og sett kameraet i lesestilling. Juster dokumentet med dokumentplasseringsmarkørene. Trykk på PLAY -knappen for å skanne dokumentet. Enheten vil avgi en opptakslyd og begynner å tikke for å indikere at den behandler dokumentet. Trykk på STOPP -knappen for å avbryte behandlingen. Etter skanning starter opplesningsmodusen automatisk.

Lagre dokument:

Trykk på PLAY og STOPP -knappen samtidig for å skanne og lagre et dokument på den interne lagringen. Følg enhetsinstruksjonene for å skanne flere sider hvis du ønsker det.

Åpne dokumentleseren:

Trykk på VENSTRE og HØYRE -knappen samtidig for å åpne dokumentleseren.

Endre systemspråk:

Trykk på STOPP og OPP -knappen eller STOPP og NED -knappen samtidig for å endre systemspråket.

Endre systemstemme:

Trykk på STOPP- og VENSTRE -knappen eller STOPP- og HØYRE -knappen samtidig for å endre systemstemmen.

Slå automatisk språkgjennkjenning på eller av:

Trykk på OPP og NED -knappen samtidig for å slå automatisk språkgjennkjenning på eller av. Hvis dette er slått på, vil enheten behandle teksten og lese den på det observerte språket i dokumentet.

Skann dokument i kolonnemodus:

Trykk på PLAY og LEFT -knappen samtidig for å skanne dokumentet i kolonnemodus. Bruk dette hvis enheten ikke leser dokumenter som fakturaer eller bankkvitteringer som forventet.

Åpne menyen:

Trykk på OPP og VENSTRE -knappen samtidig for å åpne menyen. Menyene lar deg sjekke programvareversjonen, angi dato og klokkeslett og tilbakestille enheten til fabrikkinnstillinger.

Opplesning:

Når modusen Les høyt for i-Reader 2 er valgt, blir dokumentteksten og språket behandlet og dokumentet blir lest høyt.

Pause/spill avlesning:

Trykk på PLAY -knappen for å pause/spille av det gjeldende dokumentet høyt.

Stopp:

Trykk på STOPP -knappen for å stoppe lesingen og gå tilbake til startmodus.

Navigere i dokumentet:

Navigasjonstastene lar deg navigere gjennom dokumentet på følgende måter:

Trykk på VENSTRE eller HØYRE -knappen for å velge forrige eller neste ord. Enheten settes på pause slik at du kan navigere gjennom dokumentet.

Trykk på OPP- eller NED -knappen for å velge forrige eller neste setning.

Trykk lenge på OPP eller NED -knappen for å gå til forrige eller neste side hvis tilgjengelig.

Trykk lenge på VENSTRE eller HØYRE -knappen for å velge den forrige eller neste oppdagede tekstsonen.

Endre lesestemme:

Trykk på STOPP- og VENSTRE -knappen eller STOPP- og HØYRE -knappen samtidig for å endre lesestemmen.

Dokumentbehandler:

I-Reader 2 har muligheten til å lagre dokumenter på det interne minnet. Det er mulig å lagre opptil 999 eller 1 Gb dokumenter. Hvert dokument får et unikt navn med nummer tildelt når de blir lagret på det interne minnet.

Du kan åpne, slette, sikkerhetskopiere og gjenopprette dokumenter. Systemstemmen vil lese høyt dokumentnavnet, antall sider og hvilken side som er valgt hvis du åpner den for å lese høyt. Enheten husker den siste siden som ble lest for tidligere åpnede dokumenter, slik at du kan fortsette der du sluttet sist.

Navigere mellom dokumenter:

Navigasjonstastene lar deg navigere gjennom dokumentene på følgende måter: Trykk på OPP- eller NED -knappen for å velge forrige eller neste dokument.

Trykk på VENSTRE eller HØYRE -knappen for å velge forrige eller neste side i et dokument.

Åpent dokument:

Trykk på PLAY -knappen for å åpne dokumentet.

Slette et dokument:

Trykk på STOPP og VENSTRE -knappen samtidig for å slette det valgte dokumentet. Følg enhetsinstruksjonene for å bekrefte eller avbryte.

Lukk dokumentleseren:

Trykk på STOPP -knappen for å lukke dokumentleseren og gå tilbake til startmodus.

Sikkerhetskopier alle dokumenter:

Sett inn en USB -enhet i den fremre høyre USB -porten. En lyd vil spilles av. Trykk på OPP og HØYRE -knappen samtidig for å sikkerhetskopiere alle dokumenter til USB -enheten.

Trykk på PLAY eller STOPP -knappen for å starte eller avbryte sikkerhetskopiering av alle dokumenter.

Gjenopprett sikkerhetskopi

Trykk på NED- og VENSTRE -knappen for å starte gjenopprettingen av sikkerhetskopier fra den innsatte USB -enheten. Følg enhetsinstruksjonene for å velge en sikkerhetskopi og bekrefte eller avbryte gjenoppretting fra den sikkerhetskopien.

Meny:

Åpne menyen:

Trykk på OPP og VENSTRE -knappen samtidig for å åpne menyen.

Navigere i menyen:

Navigasjonstastene lar deg navigere i menyen på følgende måter: Trykk på OPP- eller NED -knappen for å velge neste eller forrige (under) menyelement. Trykk på VENSTRE eller HØYRE -knappen for å aktivere eller endre menyelementet (under).

Trykk på PLAY eller STOP -knappen for å angi eller avbryte dato, klokkeslett og fabrikkinnstillinger.

Menyen har følgende elementer:

Firmware:

Ved å velge dette elementet leses firmwareversjonen høyt.

Dato:

Ved å velge dette elementet kan brukeren endre den interne datoen.

Tid:

Ved å velge dette elementet kan brukeren endre den interne klokken.

Fabrikkinnstillinger:

Ved å velge dette elementet kan brukeren sette enheten tilbake til fabrikkinnstillinger.