

# Brukermanual Mag Lamp XL



## Kontaktinformasjon

Adresse: ProVista  
Nils Hansens vei 20  
0667 Oslo

Telefon: 22 69 61 00

Hjemmeside: [www.provista.no](http://www.provista.no)

**PROVISTA**  
spesialoptikk

## **OPPSETT**

1. Fjern all emballasje rundt lampen før bruk.
2. Fest den medfølgende klemmen på kanten av et bord eller arbeidsbenk. MERK: Det er viktig at klemmen er sikker FØR du fester lampen. Hvis den medfølgende klemmen ikke oppfyller dine eksakte krav, det er en valgfri bordfot (D52060) eller gulvstående (D53060 og D53070) tilgjengelig hos din lokale forhandler.
3. Sett stammen på lampearmen inn i hullet i klemmen og koble strømadapteren til en stikkontakt - lampen er nå klar til bruk.
4. Trykk på bryteren i midten av hodet, og lampen vil slå seg på med 100% lysstyrke. Lampen har to lysnivåer
5. Plasser lupehode i ønsket posisjon. Ved behov kan vingemutteren løsnes litt for å gjøre det lettere å bevege lampehodet.

## **VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING**

Lampen er utstyrt med lysdioder. Lampen må frakobles det elektriske strømnettet før rengjøring og vedlikehold. Lupelampa krever ikke spesiell vedlikehold. Hvis det blir tungt tilsmusset kan den tørkes med en fuktet klut som inneholder en mild såpeløsning. Ikke bruk store mengder veske da dette kan trekke inn i lampehodet og påvirke de elektriske kretsene.