


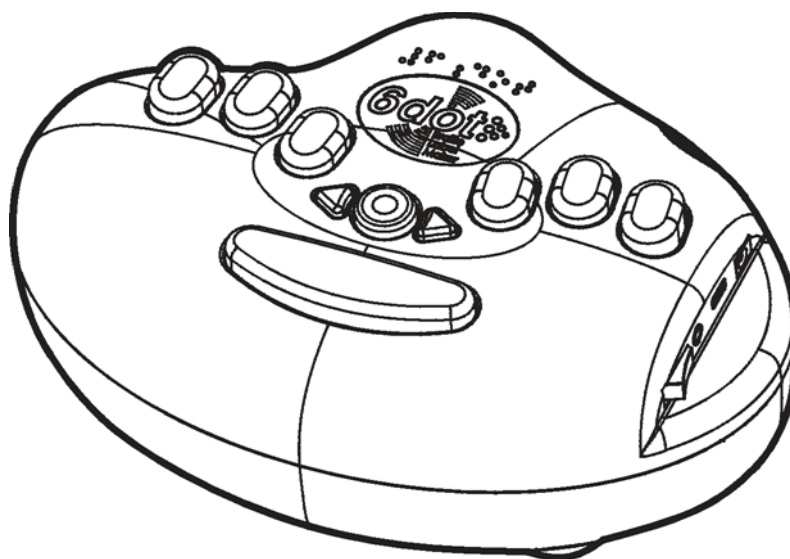

Braille Label Maker

Brukermanual



Innehold

1 Introduksjon	3
1.1 Innhold.....	3
1.2 Enheten	3
2 Hvordan bruke 6dot	3
2.1 Skriv etiketter	3
2.2 Klipp av etiketter	4
2.3 Feste etiketten.....	4
2.4 Bytte av Dymo-rulle	5
2.5 Bytte av batteri.....	5
3 Ce Declaration of Confomity	6


1 Introduksjon

1.1 Innhold

Esken inneholder:

1. 6dot
2. 10 ruller Dymo-teip
3. Strømadapter
4. Batteri
5. Bruksanvisning

1.2 Enheten

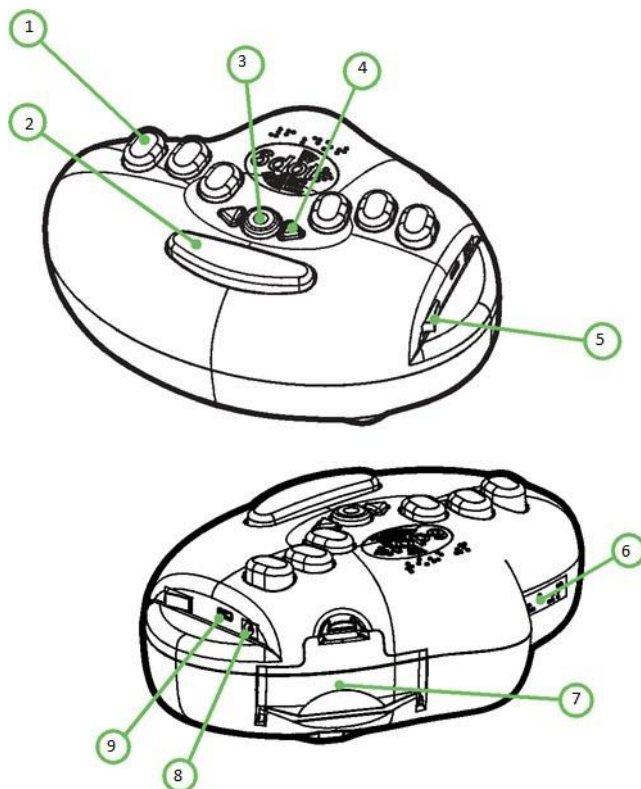

1. Punkttaster	6. Etikett utmatning
2. Mellomrom	7. Luke til taperuller
3. Enter/klipp knapp, rund knapp over mellomromsknappen	8. Strømuttak
4. Pil-taster	9. Micro USB-port
5. Strømbryter	

2 Hvordan bruke 6dot


2.1 Skriv etiketter

Før du starter

- Plasser enheten på et stabilt underlag eller i en bærereim.
- Slå på enheten

Det finns to måter å skrive etiketter:


1. Ved bruk av punktastaturet

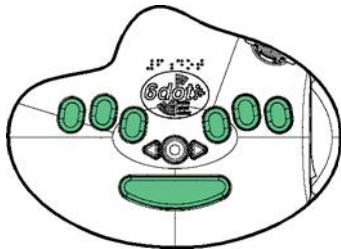

2. Bruk av USB-tastatur (krever overgang)

Punktetiketten begynner å skrive når det trykkes en tast. Etiketten kommer ut på baksiden av enheten. Legg merke til du ikke kan kjenne de siste punktene før etiketten er klippet. Når du er ferdig å skrive kan det hende at enheten trenger litt mer tid for å gjøre ferdig utskriften.

2.2 Klipp av etiketter

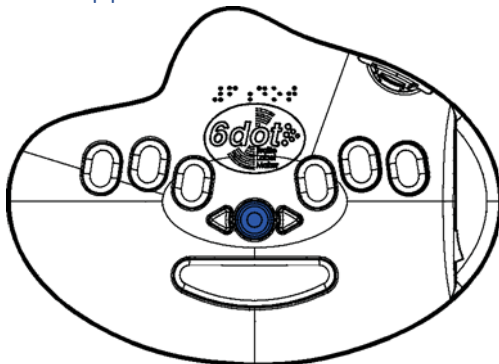

Trykk den runde blå knappen over mellomromstasten for å klippe tapen. Det er også mulig å trykke Enter-tasten på USB-tastaturet for å klippe tapen. Enhete vil pipe til etiketten er fjernet.

2.3 Feste etiketten


Plasser etiketten riktig vei:



Etiketten vil ha et tomt felt til høyre. Sørg for at dette blir plassert til høyre for at etiketten ikke skal stå oppned. Etiketten fester seg bra til forskjellige underlag. Dette kan for eksempel være Cder/DVDer, matbokser, flasker, etc. For best resultat bør overflaten være rengjort, tørt og plan.

2.4 Byte av Dymo-rulle


Sette in ny Dymo-rull

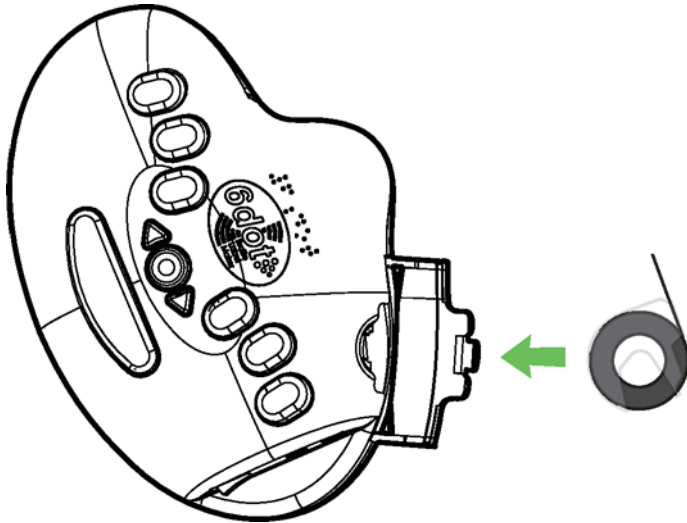

Når Dymo-rullen tom vil 6dot pipe tydelig.

- Kontroller at enheten er på.
- Åpen opp luka på baksiden.
- Ta bort den tomme rullen.
- Kontroller at det ikke ligger rester igjen.
- Klargjør den nye rullen: Dra teipen ca 5 cm ut av holderen.
- Plasser den nye teiprullen i enheten. Starten på teipen skal være mot høyre.
- Trykk mellomromstasten en eller to ganger for å aktivere innmatingen av teipen.
- Dytt starten av teipen inn å høyre side til enheten begynner å dra den frem selv.11. Slåpp teipen og låt maskinen ladda det till utgångsläget.
- Lukk luka på baksiden.

2.5 Bytte av batteri

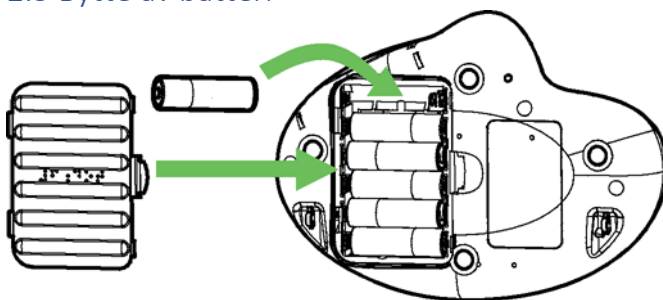

Batteriluken finner du på undersiden av enheten. Enheten bruker seks vanlige AA batterier. Se etter at strømbryteren er slått av før du bytter batteriene.

3 Ce Declaration of Conformity



Manufacturer: ProxTalker.com, LLC

Address: 327 Huntingdon Ave, Waterbury, CT 06708

Telephone: (203) 721-6074

Product: 6DOT1

Serial Number: 1-65,535

The undersigned hereby declares on behalf of ProxTalker.com, LLC that the above-referenced product, to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of:

- EN 55024:2010 ITE
- EN 55022:2010/AC:2011 Class B
- ICES-003 Issue 5 Class B
- CFR 47 FCC Part 15 Subpart B Class B
- EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

The Technical Construction File required by this Directive is maintained at the corporate headquarters of ProxTalker.com, LLC.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Dobbs'.

Glen Dobbs

President