

# Brukermanual Blaze ET



## Kontaktinformasjon

Adresse: ProVista

Nils Hansens vei 20

0667 Oslo

Telefon: 22 69 61 00



Hjemmeside: [www.provista.no](http://www.provista.no)

**PROVISTA**  
spesialoptikk

## Innhold

Beskrivelse og funksjoner .....	3
Hvordan ta i bruk Blaze ET .....	4
Skann og les med Blaze ET .....	6
Tekniske spesifikasjoner .....	7

## Beskrivelse og funksjoner

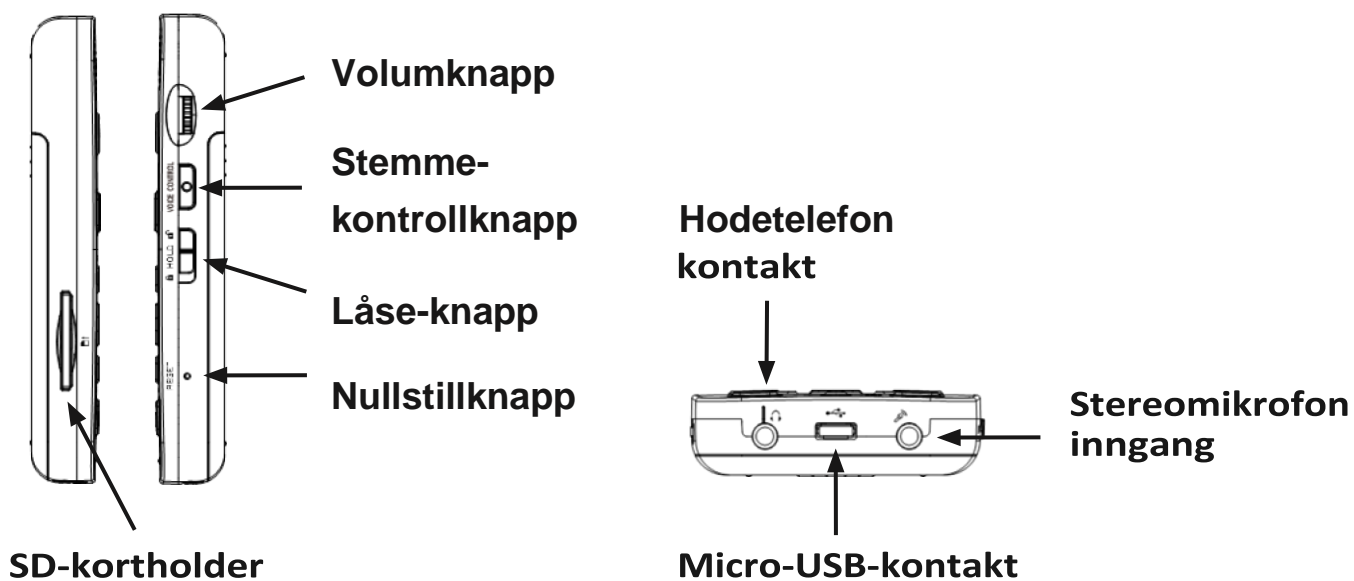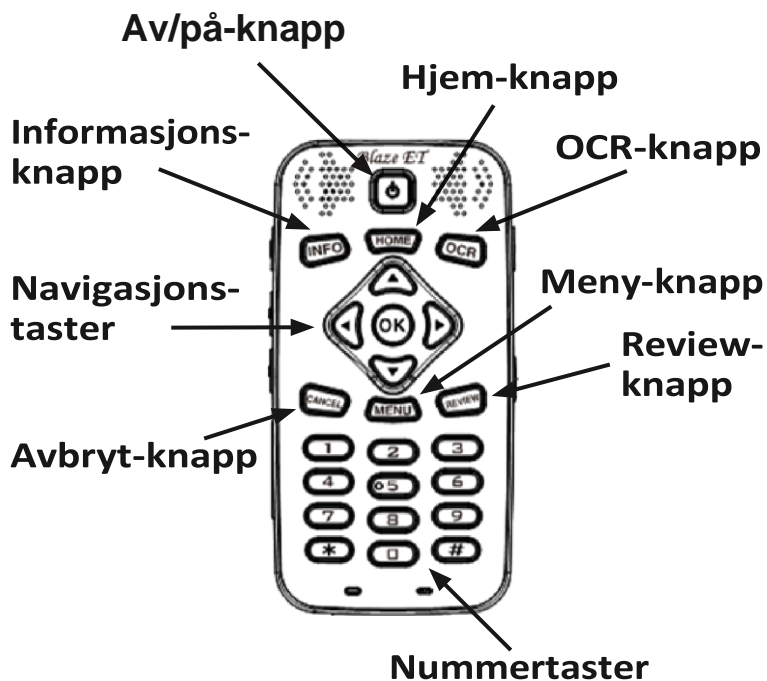

## Hvordan ta i bruk Blaze ET

Blaze ET er en kompakt lesemaskin med lydbokspiller.

Beskrivelse av tastene og tilkoblingene som finnes på spilleren.

### Forside:

- Av/på: Denne ligger øverst, midt på spilleren og er en firkantet, nedsenket tast. Trykk og hold i 3 sekunder for å slå av eller på. Et kort trykk leser tid og dato.

Under av/på-tasten følger tre taster ved siden av hverandre. Fra venstre mot høyre er disse:

- Informasjon: Leser opp ulik statusinformasjon.
- Hjem: Lukker aktuelt program og tar deg til hovedmenyen.
- OCR: Starter OCR-programmet. Er OCR-programmet startet, tas et bilde.

Under disse tre tastene ligger fire piltaster med en rund tast i midten:

- Venstre: flytter mot venstre.
- Opp: flytter opp.
- Høyre: flytter mot høyre.
- Ned: flytter ned.
- Rund tast i midten (OK): brukes for å bekrefte valg.

Videre følger tre nye taster. Fra venstre mot høyre er disse:

- Avbryt: Tar deg tilbake eller avbryter en funksjon.
- Meny: åpner programmenyen til programmet du befinner deg i.
- Gjenta: gjentar siste beskjed.

Så kommer 12 taster som utgjør et numerisk tastatur:

- Tastene 1 til 0 har ulike funksjoner avhengig hvilke program du befinner deg i.
- Stjerne (\*): Trykk og hold for å starte hjelp. Kort trykk for å stoppe hjelp. Når hjelp er på, kan du trykke en hvilken som helst tast for å lære hva den gjør.
- Firkant (#): Trykk og hold to sekunder for å slå på eller av tastelåsen. Kort trykk i et redigeringsfelt for å velge store bokstaver, små bokstaver, tall eller symboler

### Venstre side:

På venstre side finner du følgende fra toppen og nedover:

- VOICE CONTROL: Veksleknapp for å veksle mellom justering av lydstyrke, hastighet og stemmeleie.
- Pluss (+): Øker lydstyrke, hastighet eller stemmeleie.
- Minus (-): Reduserer lydstyrke, hastighet eller stemmeleie.

- Spor til SD-kort: Trykk for å løse ut SD-kort. Fjern beskyttelsen og sett inn et SD-kort for ekstra lagringsplass.

## **Høyre side**

Fra toppen og nedover finnes følgende taster:

- REC: Starter og stopper innspilling.
- HOLD: Skyv ned for å låse tastene, opp for å låse opp.
- RESET: Nesten nederst finnes et lite rundt hull. Dette brukes til å foreta en resett av Blaze ET. Stikk en binders eller lignende inn i hullet. Trykk og hold i 3 sekunder til du hører gjentatte lydssignaler.

## **Underside**

Her finner du tre kontakter. Fra venstre mot høyre er dette:

- Lydutgang: Hodetelefon eller ekstra høyttalere.
- Micro-USB: Tilkobling av lader eller datamaskin, USB-minne med egen medfølgende kort kabel.
- Linje inn: For ekstern mikrofon eller linje inn, alt etter som hva som er valgt innstillingene.

## **Bakside**

På baksiden av enheten finner du følgende: Helt øverst på midten av baksiden finner du mulighet til å feste en bærereim. Nedenfor festet for bærereim finner du kameraet. Det er viktig å pusse kameraglasset slik at det holdes rent for best mulig OCR-kvalitet. Lengre ned på baksiden finner du et riflet felt. Dette er den øverste delen av batteridekselet. Trykk inn og skyv nedover for å løsne batteridekselet. Batteriet kan så settes inn eller tas ut.

## Skann og les med Blaze ET

For å åpne OCR-programmet, trykk på den firkantede knappen øverst til høyre på tastaturet "OCR-knapp". Du vil da få en liste over alternativer: Ta bilde, Blits på/av, Åpne resultat, Se på fanget fil, Åpne ekstern fil og Innstillinger. Du blir automatisk plassert på "Ta bilde". Du kan dermed raskt ta et bilde hvor som helst på enheten ved å trykke på OCR-knappen etterfulgt av OK-knappen eller ved å trykke på OCR-knappen to ganger.

Bruk pil opp og pil ned til at navigere i menyen.

Hold kameraet i ca. 35 centimeter over det du vil skanne, og sørg for å komme så nær midten av papiret som mulig. Når du velger "Ta bilde", vil kameraet fokusere og bildet blir tatt. OCR-programmet gjenkjenner automatisk teksten og begynner å lese den høyt. En txt-versjon av den gjenkjente teksten og det tilsvarende jpg-bildet lagres automatisk på enheten.

Du kan velge språk (norsk/engelsk) og stemme (dame/mann) under innstillinger – globale innstillinger på hjem-menyen.

Du kan også åpne bildefiler andre steder på enheten og lage tekstgjenkjenning på dem med elementet "Åpne ekstern fil". Bruk alternativet Alternativer for å velge hvordan de skannede tekstene behandles og lagres.

## Tekniske spesifikasjoner

Lagringsminne	12 GB
USB	Ja
Minnekortspor	Ja
WiFi	Ja
Strømforsyning (V)	5V USB
Batteribrukstid timer	12
Ladetid timer	4
CD-spiller	nei (ekstern USB)
Dokumentleser	Ja
Norsk språk	Ja
Engelsk språk	Ja
Andre språk	Nei
Lydformat	MP3, MP4, WMA, WAV, WMV, OGG, ASF, AAC, AVI, FLAC, 3GP, MPG, M4A
Dokumentformat	TXT, RTF, HTML, HTM, XLM, DOC, DOCX, PDF, EPUB, FB2, BRL...
Veske inkl.	Ja
Størrelse mm BxHxD	59 x 117 x 16
Vekt i gr.	136