

Brukerhåndbok leselist

Orbit Reader 40



Innholdsfortegnelse

1 Presentasjon.....	5
2 Betjening av Orbit Reader 40.....	5
2.1. Frakoblet -modus.....	5
2.2 Tilkoblet modus.....	5
3 Punktskrift-publikasjoner.....	6
4 Automatisk oversettelse.....	6
5 Oversettelse til punktskrift.....	6
6 Å merke seg om håndboken.....	6
7 Eskens innhold.....	6
8 Funksjoner og egenskaper.....	7
9 Utseende og beskrivelse.....	7
9.1 Tasteplassering og -bruk.....	8
9.2 Panoreringstastene.....	9
9.3 8-punkts punktceller.....	9
10. Komme i gang.....	9
10.1 Lading av enheten.....	9
10.2 Slå PÅ og AV.....	10
10.3 Innsetting og formatering av SD-kortet.....	10
10.4 Om menyene og filnavn.....	11
10.5 Gå inn i og ut av menyene.....	11
10.6 Bruksmåter.....	11
11 Menyene.....	12
11.1 Adgang til menyene.....	12
11.2 Alternativer i menyene.....	12
11.2.1 Batteri.....	13
11.2.2 Markørblink (1).....	13
11.2.3 Sortering (Navn: Stigende).....	13
11.2.4 Orddeling (AV).....	14
11.2.5 Filter for Punkt 7 (PÅ).....	14
11.2.6 Innholdspakking (PÅ).....	14
11.2.7 Sammenslåing av mellomrom (PÅ).....	14
11.2.8 Scrolle-hastighet (verdi).....	14
11.2.9 Laste inn språk.....	14
11.2.10 Skifte språk.....	14
11.2.11 Koding.....	15
11.2.12 Versjon.....	15
11.2.13 Bversjon.....	15
11.2.14 Serienummer.....	15
11.2.15 Reset til standard.....	15
11.2.16 USB (HID-Orbit).....	15
11.2.17 Bluetooth (Auto).....	15
11.2.18 Paring (Just Works).....	16
11.2.19 Emulering (AV).....	16
11.2.20 Modus (Frakoblet).....	16
12 Frakoblet modus.....	16
13 Fil-manager.....	16

13.1	Kommandoer i Fil-manager.....	17
13.2	Mer om å kopiere og lime inn filer.....	17
13.3	Kommandoer for å flytte filer.....	17
13.4	Fil-typer.....	17
13.5	Støttede fil-typer.....	17
13.5	Forberedning av filer.....	17
14	Dokumentleser.....	17
14.1	Kommandoer i dokumentleser.....	17
14.2	Prosentvis forflytning frem- og bakover.....	17
14.3	Finne.....	17
14.4	Automatisk scrolling.....	17
15	Inntastings-felt.....	17
15.1	Kommandoer for inntastingsfeltet.....	17
16	Editoren.....	17
16.1	Kommandoer for editoren.....	17
16.2	Blokker i editoren.....	17
16.3	Kontekst-meny.....	18
17	Sammenkoblet modus.....	19
17.1	Før du kobler sammen enhetene.....	19
17.2	Benytte Bluetooth-forbindelse.....	20
17.3	Håndtering av forbindelsen.....	20
17.4	Sammenkobling med flere verter.....	21
17.5	Alternativer for USB-forbindelse.....	21
17.5.1	Human-interface-enhet (HID – Orbit).....	21
17.5.2	Human-interface-enhet (HID – Braille).....	21
17.5.3	Seriell USB-forbindelse.....	22
17.5.4	Ekstern disk.....	22
17.6	Buffer for inntasting som skal sendes til verten.....	22
17.7	iOS-enheter.....	23
17.7.1	Tilkobling til iOS-enheter via bluetooth.....	23
17.7.2	iOS-ressurser.....	23
17.7.3	iOS-kommandoer.....	23
17.8	Mac-maskiner.....	25
17.8.1	Tilkobling til Mac-maskiner via USB.....	25
17.8.2	Tilkobling til Mac-maskiner via bluetooth.....	25
Med standard bluetooth-profil «Just works», er Orbit Reader 40 klar til å pares med Mac-maskiner via bluetooth. Gå frem som følger for å pare enhetene:.....		
17.8.3	Styring av Orbit Reader 40 fra en Mac-maskin.....	25
17.9	Android-enheter.....	26
17.9.1	Tilkobling til Android-enheter via bluetooth.....	26
17.9.2	Inntasting og visning av tekst med BrailleBack.....	26
17.9.3	Kommandoer i BrailleBack.....	26
17.10	ChromeBook.....	26
17.10.1	Tilkobling til ChromeBook via USB.....	26
17.10.2	Innstillinger og kommandoer i ChromeVox.....	27
17.11	Fire-tablets.....	27
17.12	Windows PCer.....	27
17.12.1	Tilkobling til Windows via USB.....	27

17.12.2 Tilkobling til Windows via bluetooth.....	27
Med standard bluetooth-profil «Just works», er Orbit Reader 40 klar til å pares med Mac-maskiner via bluetooth. Gå frem som følger for å pare enhetene:.....	27
17.12.3 Tilgang fra NVDA.	28
17.12.4 Tilgang fra JAWS (Job Access with Speech).	28
17.12.5 System Access.....	31
17.12.6 Dolphin skjermleser.....	31
17.12.7 Window-Eyes.....	31
17.12.8 Narrator.....	32
18 Låse punktastaturet.	33
19 Varslinger fra systemet på Orbit Reader 40.	33
20 Omstart av enheten.	34
21.1 Nedlasting av oppdateringspakke.	34
21.2 Anvendelse av oppdateringsverktøy på PC.....	35
21.3 Anvendelse av SD-kort ved oppdatering.....	37
21.3.1 Feilsøking under oppdatering.....	38
22 Innstillinger for språk.....	38
22.1 Nedlasting av språkfiler.	38
22.2 Innlasting av språkfiler.	38
22.3 Endre språk.....	39
23 Feilsøking.....	39
24 Bruk på batteri og utskifting av batteriet.	39
25 Påsetting av bærerem.	40
26 Renhold av Orbit Reader 40.	40
27 Tekniske data.x.....	40
28. Ytterligere informasjon.	41

NB! Denne brukerhåndboken gjelder fra firmware-versjon B0.00.00.64r03.

1 Presentasjon.



Orbit Reader 40 er bærbar leselist som også kan brukes som frittstående noteringsverktøy. Den har følgende egenskaper:

- 40 stk. punktceller med støtte for 6- og 8-punkts punktskrift på svært mange språk.
- Markørhentere.
- Kan vise innholdet i filer på SD-kort i frakoblet tilstand.
- Kan tilkobles de fleste skjermlesere på PC, MAC og mobile enheter.
- Innebygd oversettelse fra tekst til punkt og omvendt.
- Innebygd støtte for mange språk.
- Enkelt redigeringsverktøy.
- Innebygd varsling med vibrasjoner og lydsignaler.
- Innebygd verktøy som kalkulator, kalender og alarm.

2 Betjening av Orbit Reader 40.

2.1. Frakoblet -modus.

Innhold på SD-kort kan leses på følgende måter:

- Nedlastet fra biblioteket.
- Produsert på PC eller MAC og kopiert til enheten.

I frakoblet modus vil Orbit Reader 40 kunne vise innholdet i filer på SD-kortet, og filene vises som de er. Filene tilrettelegges på forhånd på en datamaskin, og kan deretter lagres på SD-kortet. Dersom du vil lese filer i norsk 8 punkt punktskrift, må du med andre ord legge inn koder for norske tegn på forhånd, mao. før filen plasseres på SD-kortet.

2.2 Sammenkoblet modus.

Så fort Orbit Reader 40 er tilkoblet en datamaskin eller mobil enhet, kan du bruke den til følgende:

- Lese tilrettelagte bøker både fra kommersielle selskaper og NLB.
- Ta i bruk tilrettelagte teknologier under internettsurfing, bruk av PC-verktøy og mange opplærings-programmer.

3 Punktskrift-publikasjoner.

I Norge er publikasjoner i punktskrift tilgjengelig først og fremst fra Norsk Lyd- og Bilindeskriftsbibliotek og StatPed.

4 Automatisk oversettelse.

I tillegg til profesjonelt oversatte bøker og dokumenter, kan du også benytte dataprogrammer for å opprette punktskrift-filer eller dokumenter. Dette kan i mange tilfeller gi brukbare resultater.

5 Oversettelse til punktskrift.

- BrailleBlaster er en avansert software-pakke for oversettelse til punktskrift.
- DAISY Pipeline er en omfattende software-pakke for oversettelse til uformatert punktskrift, bl.a. PEF-formatet som brukes av bærbare punkt skrivere.

«Send-to-braille» er en snarvei på Windows «Send til»-menyen. Her vil du kunne oversette filer på PCen til uformaterte BRL- eller BRF-filer (**Braille Ready File**), men etter det vi kan se kun engelsk punktskrift.

6 Å merke seg om håndboken.

Legg merke til at i denne brukerhåndboken de følgende begrepene og skrivemåtene benyttet for å unngå misforståelser:

- Punktastene indikeres med «Punkt» etterfulgt av et siffer.
- Dersom flere punktastene brukes, skilles de ad med et mellomrom.
- Når modifierings-taster (f.eks. SHIFT, SPACE eller CTRL) blir benyttet, indikeres dette med et +-tegn. Husk at modifierings-tastene benyttes ved at de holdes ned (f.eks. SHIFT på et vanlig QWERTY-tastatur) samtidig som du trykker på en eller flere andre taster. På en punktastatur benyttes svært ofte MELLOMROM som modifieringstast når du taster inn en kommando.
- Trykk på «MELLOMROM» skrevet med store bokstaver betyr trykk på selve tasten, mens «mellomrom» skrevet med små bokstaver betyr tegnet mellomrom.
- Key mnemonics
- Navigeringstastene Opp, Ned, Venstre og Høyre refereres til som «piler» og «piltaster».
- Alle meldinger fra enheten blir vist etter en dobbel bindestrek (Punkt 2 5, 2 5 etterfulgt av mellomrom. I dokumentasjonen er dette skrevet som dobbel bindestrek.
- Ordene «Tast» og «Knapp» benyttes om hverandre.
- I forklaringen av de forskjellige meny punktene, indikeres hva som er standard verdi.
- Enhver referanse til «side» vil i frakoblet modus bety hopp med 1000 tegn, mao. 1000 tegn = 1 side.

7 Eskens innhold.

Når du mottar din nye Orbit Reader 40, skal følgende være inkludert i esken:

- Selve leselisten Orbit Reader 40.
- 1. stk. USB-lader.
- 1. stk. USB-C-kabel.

- 1 stk. SD-kort.
- 1 stk. hurtigguide.

Vær snill å kontrollere at alt dette følger med i pakningen.

8 Funksjoner og egenskaper.

Følgende er noen av de innebygde funksjonen på Orbit Reader 40:

- 40 punktceller i 8-punkt punktskrift.
- Markørhentere.
- Innebygd oversettelse fra tekst til punkt og omvendt.
- Bluetooth-interface med tilkobling til opptil 5 vertsenheter.
- Innebygd klokke som kan sette korrekt tidsmerke for oppretting eller endring av filer.
- Innebygd verktøy som kalkulator, kalender og alarm.
- Innebygd varsling med vibrasjoner og lydsignaler.
- 8 punkttaster og mellomrom-tast.
- Navigasjonstaster Opp, Ned, Venstre og Høyre samt OK.
- USB-C-tilkobling for opplading og USB-kommunikasjon.
- SD-kort tilkobling.
- USB-port for tilkobling av USB-minne.
- 2 knapper til bruk ved panorering.
- Utbyttbart batteri som brukeren kan skifte selv.

9 Utseende og beskrivelse.

For å få en god forståelse for hvordan Orbit Reader 40 virker, hvordan tastene brukes og hvordan du kan bruke informasjonen fra enheten, er det viktig å ha klart for seg hvor punktcellene, punkttastene og diverse tilkoblingspunkter er plassert.

Plassér Orbit Reader 40 foran deg på et bord slik at tastene vender oppover og punktcellene mot deg. Dette er den vanlige posisjonen å ha leselisten i når den skal benyttes.

Dersom du fører hånden over til bakre endekant av leselisten, finner du fra venstre mot høyre først Av/På-bryteren, deretter Sporet for SD-kortet og til slutt mikro-USB-tilkoblingen. Disse sitter i et innfelt område som sett forfra er plassert til venstre på bakre endekant. Av/På-bryteren stikke så langt ut at den er lett å finne. SD-kort-spolet er merket med to prikker mens USB-tilkoblingen er merket med én.

SD-kort-spolet er av standard utførelse med fjær-utkast. På SD-kortets ene kortsiden vil du kjenne at det er spor eller tenner. Vend kortet slik at tennene vender nedover og før kortet med denne enden først inn i kort-spolet helt til det låses fast med et svakt klikk. Kortet tas ut igjen ved at du trykker det innover og slipper slik at kortet spretter litt ut og du kan ta fatt i det med fingene.



9.1 Sidekantene

På leselistens høyre sidekant finner du fra fremst til bakerst Av/På-knappen, USB-C-tilkoblingen og en mini-jack-utgang for hodetelefoner. Mini-jack-utgangen er merket med to prikker mens USB-C-tilkoblingen er merket med én.




På leselistens venstre sidekant finner du USB-tilkonlingen for USB-minnepinner.




9.2 Baksiden.

På leselistens bakside sitter SD-kort-sporet. Kort-sporet er av standard utførelse med fjær-utkast. På SD-kortets ene kortsiden vil du kjenne at det er spor eller tenner. Vend kortet slik at tennene vender nedover og før kortet med denne enden først inn i kort-sporet helt til det låses fast med et svakt klikk. Kortet tas ut igjen ved at du trykker det innover og slipper slik at kortet spretter litt ut og du kan ta fatt i det med fingene.

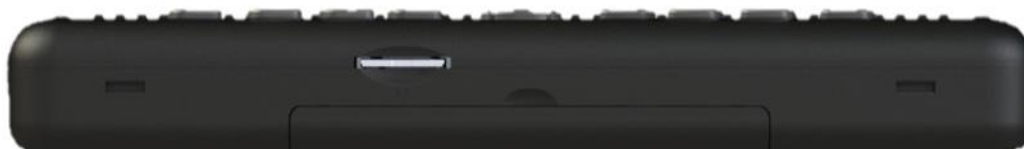

9.3 Tasteplassering og -bruk.

Med Orbit Reader 40 plassert riktig foran deg, sitter Mellomrom-tasten nærmest deg., og videre bakover finner du så punktcellene. Rett bak hver punktcelle sitter det en markørhenter. Til venstre og høyre for punktcellene sitter de to panoreringsknappene.

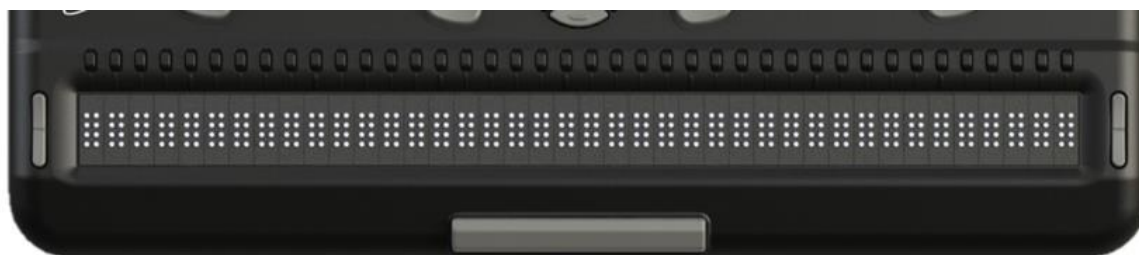

Videre bakover på leselisten finner du midt på leselisten navigeringspanelet som består av 5 knapper, OPP, NED, VENSTRE og HØYRE samt OK i midten. Til venstre og høyre for dette panelet finner du på hver side 4 punkt-taster. Helt ute til venstre PUNKT 7, og til høyre for den deretter PUNKT 3, 2 og 1. Helt ute til høyre finner du PUNKT8 og til venstre for den deretter PUNKT 6, 5 og 4.

9.4 Panoreringstastene.

De to panoreringstastene VENSTRE-PANORER- og HØYRE-PANORER-knappene, har hver to funksjoner alt ettersom hvor du trykker på dem. Dersom du trykker nede på dem, blir du til forrige visning på punktcellene, og dersom du trykker oppe på dem, blir du til neste visning. Trykk nede på panoreringstastene henvises til som VENSTRE/HØYRE-PANORER-BAKOVER mens trykk oppe på dem henvises til som VENSTRE/HØYRE-PANORER-FREMOVER.

9.5 8-punkts punktceller.

Dersom du ikke har brukt leselist tidligere, kan det være at du ikke kjenner til betydningen av de to nederste punktene som kalles punkt 7 og punkt 8. Mens punkt 7 brukes til å indikere stor bokstav, brukes punkt 8 til å indikere siffer eller tall. Nøyaktig betydning av disse to punktene avhenger av hvilken skjermleser du bruker til å styre Orbit Reader 40, og vi henviser til skjermleserens dokumentasjon for videre forklaring.

10. Komme i gang.

Orbit Reader 40 har to hovedvirkemåter, nemlig frakoblet modus og sammenkoblet modus. I frakoblet modus fungerer den som en dokumentleser der du kan lese innholdet i filer plassert på SD-kortet. I sammenkoblet modus fungerer den som andre leselister som styres av en skjermleser på datamaskin eller mobil-enhet.

I dette kapittelet forklares hvordan enheten lades opp, slås PÅ og AV, hvordan SD-kortet settes inn og Menyen åpnes.

10.1 Lading av enheten.

Når du mottar din nye Orbit Reader 40, kan det være at batteriet er delvis oppladet, men vi anbefaler likevel alltid at batteriet lades helt opp før du tar leselisten i bruk. Leselisten kan gjerne benyttes mens den lades så dette forkorter ikke tiden du har til å lese.

Når gjenstående kapasiteten på batteriet blir så lav som 10%, vil punkt 8 på celle-nummer 40 begynne å blinke. Dette gjøres for å varsle om batteriet snart bør lades.

Ved opplading kan du bruke den medfølgende laderen og USB-kabelen. Koble den minste enden av kabelen til i USB-C-inngangen på høyre sidekant av Orbit Reader 40 og sett den største enden inn i laderen, som deretter settes inn i en stikkontakt. Vær forsiktig når du kobler til den minste kabelenden, pluggen skal gå lett på plass. Hvis du må bruke kraft når pluggen settes inn, gjør du noe feil. Orbit Reader 40 kan også lades fra en PC.

Dersom du har ladet enheten i 4 timer og ingenting skjer, er det noe feil enten med lader, USB-kabel eller batteriet. Prøv igjen ved å trekke laderen ut av stikkontakten, koble USB-kabelen fra i begge ender, koble USB-kabelen til igjen begge ender og sette laderen på plass i en stikkontakt.

10.2 Slå PÅ og AV.

Den firkantede Av/På-knappen side i det innfelte området i enhetens venstre, bakre hjørne. Slå PÅ enheten ved å holde inne Av/På-knappen til du kjenner at alle punktcellene aktiveres og lukkes igjen. På denne måten varsles du om at Orbit Reader 40 slås PÅ og AV.

Når Orbit Reader 40 slås PÅ, gjenopptas visning av sist viste posisjon av sist brukte fil. Når du slår På Orbit Reader 40 for første gang eller det er første gang du setter inn et nytt SD-kort, vises navnet på første fil eller mappe på SD-kortet.

Dersom Bluetooth var i bruk sist du brukte Orbit Reader 40, vil den starte opp med Bluetooth neste gang den slås PÅ.

Punktcellene på Orbit Reader 40 viser meldingen «-- SD-kort mangler» når det ikke er satt et SD-kort inn i enheten.

Orbit Reader 40 er utstyrt med egen standby- eller sovemodus. Når enheten er påslått og operativ, vil et kort trykk på Av/På-knappen sette enheten i sovemodus. Når enheten er i sovemodus, vil et kort trykk på Av/På-knappen vekke den opp igjen. Når Editoren er i bruk eller Bluetooth er aktiv og ingen knapper trykkes på i løpet av 1 time, vil enheten automatisk gå i sovemodus. I alle andre tilfeller vil enheten gå i sovemodus etter 10 minutter uten aktivitet. Etter 5 timer i sovemodus, vil enheten slås helt AV for å spare strøm.

10.3 Innsetting og formatering av SD-kortet.

Orbit Reader 40 leveres med SD-kort på plass i kort-sporet. På dette kortet er det allerede plassert oversatte filer slik at du raskt kan lære hvordan enheten brukes.

Orbit Reader 40 benytter full-størrelse SD-kort av typen SDHC med kapasitet 4-32 GB. Kortet må være formatert med FAT32. Nye SD-kort kan ikke formateres på enheten, det må gjøres på en datamaskin. De fleste nye kort leveres ferdigformaterte.

Sporet for SD-kortet finner du i det innfelte området på enhetens bakre, venstre hjørne.

På SD-kortets ene kortside vil du kjenne at det er spor eller tenner. Vend kortet slik at tennene vender nedover og før kortet med denne enden først inn i kort-sporet. SD-kort skal gå lett på plass, hvis du må bruke kraft, gjør du noe feil. Skyv kortet innover helt til det står jevnt med kanten på kort-sporet og blir låst fast med et lite klikk. Mekanismen for SD-kortet er svært lik mekanismen du finner på mange kulepennner.

Pass godt på at SD-kort settes inn slik beskrevet ovenfor. Det er mulig å presse kortet inn med motsatt kortende først, og dette kan fort føre til skade på mekanismen og kontaktene for kortet.

Når du vil ta SD-kortet ut av kort-sporet, trykker du det først litt innover. Kortet vil da sprette ut nok til at får tak i det, og deretter kan trekke det helt ut med fingrene.

NB! Dersom SD-kortet tas ut av kort-sporet mens Editoren benyttes, kan dette resultere i bortkastet arbeid. Pass på at du har lagret arbeidet ditt og avsluttet Editoren før du tar SD-kortet ut.

Tilkobling av USB-minne.

På leselistens venstre sidekant er det et USB-tilkobling der et USB-minne kan tilkobles slik at du kan lese innholdet med Orbit Reader 40. Meldingen «-- USB-minne tilkoblet» vises når minnepinnen blir koblet til. Det er mulig å kopiere eller flytte filer fra USB-minnet til SD-kortet og omvendt.

10.5 Om menyene og filnavn.

Orbit Reader 40 viser de interne menyene og filnavn i 8-punkt computer braille.

10.6 Gå inn i og ut av menyene.

For å:	Gjør slik:
Åpne menyen.	Trykk på OK + OPP.
Gå ut av menyen.	Trykk på PUNKT 7.
Bla i menypunktene.	Trykk på OPP eller NED.
Bla i alternativene for et menypunkt.	Trykk på VENSTRE eller HØYRE.
Velge et alternativ på et menypunkt.	Trykk på OK eller PUNKT 8.

10.7 Enhetens bruksmåter.

Orbit Reader 40 har to hovedbruksmåter. Den første er frakoblet modus, der du f.eks. kan lese dokumenter på SD-kortet. Den andre er sammenkoblet modus, der den fungerer som andre leselister som styres av en skjermleser på datamaskin eller mobil-enhet.

I frakoblet modus, som er standard bruksmåte, kan du lese, redigere og bla i filene dine uten at enheten er tilkoblet andre enheter. Et SD-kort må være på plass i kort-sporet for å bruke enheten i frakoblet modus.

I sammenkoblet modus kan enheten kobles sammen med iPhone, iPad eller android-enheter samt datamaskiner. I denne modusen som kjøres enten via USB eller Bluetooth, kan tastene på Orbit Reader 40 brukes til inntasting på vertsenheten samtidig som punktcellene viser innholdet på vertsenhetens enkelte skjermelementer.

Du kan enkelt flytte frem og tilbake mellom frakoblet og sammenkoblet modus med følgende kommandoer:

- For å skifte til sammenkoblet modus: Trykk OK + HØYRE.
- For å skifte til frakoblet modus: Trykk OK + VENSTRE.

I frakoblet modus har du tilgang til følgende funksjoner:

- Menyene.
- Fil-manager.
- Dokument-leser.
- Editoren.

Sammenkoblet modus kan bruke følgende tilkoblinger:

- Bluetooth.
- Følgende protokoller for USB: HID-Orbit, HID-Braille, Seriell-USB og Ekstern disk.

10.8 Språk og oversettelse.

Orbit Reader 40 har støtte for en lang rekke språk. Ved levering er følgende språk installert på enheten:

- Engelsk (BANA) 8-punkt computer braille.

Andre språk kan lastes og installeres fra SD-kortet.

Orbit Reader 40 kan settes opp til å bruke samme eller forskjellige språk for systemmeldinger og behandling av innholdet i tekst- punktskrift-filer. Du kan f.eks. velge å ha systemmeldingene på norsk mens behandling av innholdet i filer foregår på engelsk.

Du kan endre språk på leselisten fra menyen og du kan alternativt endre språk med hurtigkommandoer.

11 Menyen.

Fra menyen på Orbit Reader 40 kan du endre innstilling for menypunktene, sjekke batteriet og endre bruksmåte for enheten.

Menyen åpnes ved å trykke på OK + OPP. Batteristatus sjekkes fra første menypunkt.

For noen menypunkter har du flere alternative innstillinger å velge mellom, mens det for andre bare vises informasjon f.eks. serienummer og firmware-versjon. Gjeldende alternativ for et menypunkt er markert med punkt 7 og 8. Bla i alternativene for hvert menypunkt med enten HØYRE- eller VENSTRE-knappene. Du velger et alternativ ved å trykke på OK eller PUNKT 8, med en gang vil alternativet markeres med punkt 7 og 8.

Du går ut av menyen ved å trykke på PUNKT 7.

Du flytter til neste menypunkt med OPP- eller NED-knappene. Menypunktene er plassert i en sløyfe slik at når du kommer til siste eller nederste menypunkt og trykker NED en gang til, vil du hoppe til første eller øverste menypunkt. På samme måte vil du hoppe til siste menypunkt dersom du står på første menypunkt og trykker OPP. På denne måten får du kjapp tilgang til de siste eller nederste menypunktene, og derfor er mange ofte brukte menypunkter plassert nederst i menyen.

11.1 Adgang til menyen.

Meny er tilgjengelig både i frakoblet og sammenkoblet modus. Trykk på OK + OPP for å åpne Meny. F.eks. for menypunktet

11.2 Alternativer i menyene.

Noen av menypunktene har en standard innstilling slik vist i parentesene i listen nedenfor. For de fleste punktene kan du bla mellom de forskjellige alternativene med VENSTRE- og HØYRE-tastene etterfulgt av et trykk på enten OK- eller PUNKT 8. Valgt alternativ blir vist med punkt 7 og 8 aktive. Vi henviser til de enkelte menypunktene for videre forklaring. Du finner følgende punkter på Meny:

Batteri
Markørblink (1)
Sortere (Navn: Stigende)
Orddeling (AV).
Filter for Punkt 7 (PÅ)
Pakke filinnhold (PÅ).
Slå sammen mellomrom (PÅ)

Scrolle-hastighet (verdi)
Laste inn språk (English Braille ASCII)
Endre språk.
Koding (ASCII)
Versjon
Bversjon
Serienummer
Reset til standard
USB (HID-Orbit)
Bluetooth (Auto)
Paring (Just Works)
Emulering (AV)
Modus (Frakoblet)

11.2.1 Batteri.

Fra dette menypunktet får du vist gjenstående, prosentvis kapasitet på batteriet. Når kapasiteten på batteriet blir så lav som 10%, vil punkt 8 på cellenummer 20 blinke, dette for å indikere at leselisten må lades.

Når leselisten er tilkoblet lader, vil dette vises. Meldingen «-- Lades XX%» indikerer at batteriet lades og at gjeldende kapasitet er XX%, f.eks. 25%. På samme måte vil ved første gangs bruk meldingen «-- Batteri XX%» vises.

11.2.2 Markørblink (1).

Innstillingen for Markørblink har kun noe å si når Inntastingsfeltet vises eller når Editoren er åpen. Fra dette punktet stiller du antall sekunder mellom blinkene. Standard verdi er 1 sekund, dvs. ett sekund mellom hvert blink. Alternative verdier er 1, , 15, 30 og 60 sekunder samt 0 som betyr at markøren ikke blinker. Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien.

11.2.3 Sortere (Navn: Stigende).

Fra dette menypunktet kan du endre rekkefølgen Fil-manager viser filene på SD-kortet vises med. Alternativene er «Navn-Stigende», «Navn synkende», «Dato», «Størrelse» og «Sist lest». Standard verdi for menypunktet er «Navn-Stigende» mao. A til Å. Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien.

I sammenkoblet modus er det ikke mulig å vise filene i sortert rekkefølge, men du kan endre innstilling fra menyen. Trykk på OK + OPP, denne kommandoen åpner menyen. Trykk på NED for å bla til menypunktet «Sortere».

Dersom Filmanager er åpen, kan du åpne menyen på samme måte, trykk på OK + OPP, og trykk på NED for å bla til «sortere».

Dersom Editoren er åpen, må denne lukkes før du på samme måte åpner menyen og blir til «Sortere».

I tillegg kan visningsrekkefølgen for en allerede vist oversikt endres fra Stigende til Synkende eller omvendt. Når en filoversikt vises, trykker du på HØYRE eller VENSTRE til du kommer til «Navn-Stigende» eller «Navn-Synkende» og videre på OK eller PUNKT 8, slik at oversikten vises i valgt rekkefølge.

11.2.4 Orddeling (AV).

Standard innstilling for orddeling er AV. Med denne innstillingen vil Dokumentleseren forsøke å vise så mye innhold som mulig uten å dele ordene. Hvis du heller ønsker 20 celler med punktskrift uavhengig av innholdet på hver visning, kan du sette Orddeling til PÅ. Når Orddeling er PÅ blir vil Dokumentleseren dele de siste ordene i hver visning, og andre del av et delt ord vil derfor komme frem når du trykker på PANORER HØYRE, mao. på neste visning. Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien.

11.2.5 Filter for Pkt 7 (PÅ).

Standard innstilling for dette menypunktet er PÅ. Dette gjør at punkt 7, som finnes i stort antall i mange BRL- eller BRF-filer, ikke vises. Dersom du vil at punkt 7 skal vises, endrer du dette menypunktet til AV. Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien.

11.2.6 Pakke innhold (PÅ).

Standard innstilling for dette menypunktet er PÅ. Dette gjør at ekstra mellomrom i punktskriftfiler som er formatert for utskrift, blir fjernet. Dette fører til at det blir enklere å lese filer på en 20-punkts leselist. Ekstra mellomrom opptrår ofte f.eks. ved linjeskift. Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien.

11.2.7 Slå sammen space (PÅ).

Bruk av sideskift, blanke linjer og tabulatorer vil føre til at det oppstår tomme felter i punktskriftdokumenter. Slike felter fører til bruk av unødvendig mye rom og reduserer lesehastigheten på en leselist. Fra dette menypunktet kan du bestemme om slike tomme felter skal fjernes ved visning eller vises slik dokumentet er skrevet.

Standard innstilling for dette menypunktet er PÅ. Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien.

11.2.8 Scrolle-hastighet (verdi).

Herfra kan du få vist gjeldende scrolle-hastighet i sekunder. Verdien kan ikke endres fra Menyen, men den kan endres slik det blir forklart i punktet «Auto-scroll» under «Dokumentleser».

11.2.9 Laste inn språk.

Fra dette menypunktet kan du laste inn språkfiler på Orbit Reader 40. Standard punkttabell på enheten er engelsk ASCII-punktskrift.

- Last inn Locale: Fra dette punktet kan du laste inn både loc-filen og lan-filen for ønsket land. Loc-filen inneholder de forskjellige systemtekstene for ønsket språk, mens lan-filene inneholder punkttabellene for samme språk. Disse filene er plassert på SD-kortet i mappen «Locale». Bla til ønsket fil og trykk på OK eller PUNKT 8 for å lese den inn.
- Last kun inn loc: Fra dette punktet kan du laste inn et annet system-språk for Orbit Reader 40. En oversikt over tilgjengelige loc-filer blir vist. Bla til ønsket fil og trykk på OK eller PUNKT 8 for å lese den inn.
NB! Du må også passe på at tegntabell for det innlastede språket er blitt lastet inn.
- Last kun inn lan: Fra dette punktet kan du laste inn en punkttabell. En oversikt over tilgjengelige lan-filer blir vist. Bla til ønsket fil og trykk på OK eller PUNKT 8 for å lese den inn.

11.2.10 Skifte språk.

Fra dette menypunktet skifter du raskt fra standard språk til det andre språket som er blitt lastet inn.

NB! Før dette kan gjøres, må det lastes inn et alternativt språk, se punkt 11.2.9 Laste inn språk.

11.2.11 Koding.

Tekst-filer er enten opprettet i ASCII- eller Unicode-format eller koding. For enkelte språk benyttes kun Unicode. Når du oppretter en fil på et språk som ikke er ASCII-basert, må du derfor velge Unicode-koding.

ASCII er standard koding. Du har følgende alternativer for koding:

1. ASCII.
2. UNICODE16LE.
3. UNICODE18BE.
4. UTF-8.

Dersom du vil opprette BRL- eller BRF-filer, må du bruke ASCII-koding. Filene vil eller kunne bli uleselige i andre programmer.

Innstillingen du velger vil kun påvirke filer som opprettes med kommandoen «Create new», og vil ikke ha innvirkning på allerede eksisterende filer som du redigerer. Filtypen kan ikke endres når en fil er åpnet for redigering.

11.2.12 Versjon.

Fra dette menypunktet får du vist hvilken versjon det er på firmwaren som er installert på Orbit Reader 40. Det kan være at du har bruk for versjonsnummeret når du ønsker support på leselisten. Du kan alltid finne de siste oppdateringspakkene med siste versjon på <http://www.orbitresearch.com/support/orbit-reader-20-support/orbit-reader-firmware-download>

11.2.13 Bversjon.

Fra dette menypunktet får du vist hvilken versjon det er på bootloader-softwaren som er installert på Orbit Reader 40. Det kan være at du har bruk for versjonsnummeret når du ønsker support på leselisten. Du kan alltid finne de siste oppdateringspakkene med siste versjon på <http://www.orbitresearch.com/support/orbit-reader-20-support/>

11.2.14 Serienummer.

Herfra får du vist serienummeret på din Orbit Reader 40.

11.2.15 Reset til standard.

Fra dette menypunktet kan du resette alle innstillingene på Orbit Reader 40 til standardverdier, altså slik de var ved levering. Trykk på OK eller PUNKT 8 for å foreta resetting. Når resetting er ferdig, vises første punkt i Menyen.

11.2.16 USB (HID-Orbit).

Under menypunktet USB, finner du de 4 alternativene for USB-protokoll, «HID-Orbit», «HID-Braille», «Seriell-USB» og «Ekstern disk modus». Standard USB-protokoll er «HID-Orbit». Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien.

Mer informasjon om dette finner du i punkt 17.5 Alternativer for USB-forbindelse.

11.2.17 Bluetooth (Auto).

Under menypunktet Bluetooth finner du de 3 alternativene for Bluetooth-forbindelsen, «Bluetooth Auto», «Bluetooth manuell» og «Bluetooth AV». Standard verdi er «Bluetooth Auto», her vil Orbit Reader 40 automatisk koble seg til vertsenhet når det oppdages trafikk fra skjermleseren og gå i sammenkoblet modus. Hvis du heller vil styre dette manuelt, kan du velge «Bluetooth manuell».

Dersom du vil slå Bluetooth helt av, kan du velge «Bluetooth AV». Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien.

Mer informasjon om dette finner du i punkt 17.2 Benytte Bluetooth-forbindelse.

11.2.18 Paring (Just Works).

Fra dette menypunktet bestemmer du hvordan paring av Orbit Reader 40 med andre enheter skal utføres. Det er 2 alternativer, «Just Works» og «Bekreftede kode». Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien.

- **Just works:** Dette er standard for paring. Ved bruk av denne metoden, vil Orbit Reader 40 pare seg med enhver enhet som sender forespørsel om paring.
- **Bekreftede kode:** Dette er den sikreste av de to metodene. Ved bruk av denne metoden vil Orbit Reader 40 vise en tilfeldig kode på punktcellene samtidig som samme kode vises på skjermen til vertsenheten. Dersom du vil bekrefte paringsforespørselen, må du sjekke om kodene er identiske og deretter trykke på PUNKT 8. For å avslå forespørselen trykker du på PUNKT 7.

11.2.19 Emulering (AV).

Herfra kan du bestemme hvordan Orbit Reader 40 presenterer seg overfor skjermleseren på vertsenheten, når leselisten står i tilkoblet modus. Dersom emulering av VarioUltra40 er valgt, vil leselisten presentere seg som «VarioUltra40». Dersom emulering er slått AV, vil leselisten presentere seg som «Orbit Reader 40». Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien.

11.2.20 Modus (Frakoblet).

Som standard vil Orbit Reader 40 starte i frakoblet modus der du kan benytte dokumentleseren og samt lese og skrive filer på SD-kortet. Leselisten kan også fungere i sammenkoblet modus enten via Bluetooth eller USB, og vil automatisk skifte til Bluetooth eller USB avhengig av hvor det er skjermleseraktivitet. Hvis du likevel vil f.eks. skifte fra tilkoblet modus til frakoblet modus eller fra Bluetooth til USB, kan du velge dette fra dette menypunktet. Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien.

12 Frakoblet modus.

Frakoblet modus er standard virkemåte for Orbit Reader 40. Et formatert SD-kort må være på plass i leselisten når den skal brukes i frakoblet modus, og filer som du eventuelt skal lese må være kopiert til minnekortet.

I frakoblet modus har du tilgang til følgende:

- Fil-manager.
- Menyen.
- Dokumentleseren.
- Editoren. to get started on the localization, Trykk på OK eller PUNKT 8 for å lagre verdien. to get started on the localization

13 Fil-manager.

13.1 Kommandoer i Fil-manager.

13.2 Mer om å kopiere og lime inn filer.

13.3 Kommandoer for å flytte filer.

13.4 Fil-typer.

13.5 Støttede fil-typer.

13.5 Forberedning av filer.

14 Dokumentleser.

14.1 Kommandoer i dokumentleser.

14.2 Prosentvis forflytning frem- og bakover.

14.3 Finne.

14.4 Automatisk scrolling.

15 Inntastings-felt.

15.1 Kommandoer for inntastingsfeltet.

16 Editoren.

16.1 Markørhenterne.

16.2 Kommandoer for editoren.

16.3 Blokker i editoren.

16.4 Kontekst-meny.

Med kontekst-menyen får du kjapp tilgang til funksjoner som «klipp ut», «kopiér» og «lim inn».

Når Editoren er åpen trykker du på OK for å åpne Kontekst-menyen. Det er to måter å benytte Kontekst-menyen på etter at den er åpnet:

1. Dersom du ikke vet snarveien i punkt, blar du i menyen med OPP eller NED og trykker på OK eller PUNKT 8.
2. Dersom du vet snarveien i punkt mao. punktskriften for bokstaven, skriver du den inn med punktastene.

Snarvei i punkt	Funksjon
E dvs. PUNKT 1 5	Exit
M dvs. PUNKT 1 3 4	Markér (Mark)
C dvs. PUNKT 1 4	Kopiér (Copy)
V dvs. PUNKT 1 2 3 6	Lim inn (Paste)
X dvs. PUNKT 1 3 4 6	Klipp ut (Cut)
F dvs. PUNKT 1 2 4	Finne (Find)
S dvs. PUNKT 2 3 4	Lagre (Save)

Editoren kan også avsluttes med to raske trykk på OK-tasten. Første trykket åpner Kontekst-menyen og det med det andre velger du første punkt i Kontekst-menyen.

17. Lydsignal og vibrasjon

Orbit Reader 40 kan gi varslinger med vibrasjon og lydsignal ved forskjellige handlinger utført av brukeren. Følgende tabell viser forskjellige handlinger og respektive vibrasjoner og lydsignaler.

17.1 Varslinger med lydsignal og vibrasjon.

Scenario.	Lydsignal.	Vibrasjon.
Orbit Reader 40 slås PÅ.	PÅ-signalet	Enkel, lang vibrasjon.
Orbit Reader 40 slås AV.	AV-signalet	2 korte vibrasjoner.
Under navigering i en liste f.eks. meny eller oversikt.	Navigerings-signalet	Enkel, kort vibrasjon
Siste punkt under navigering i en liste f.eks. siste meny punkt eller siste fil.	Navigerings-grense-signalet	2 korte vibrasjoner
Feil/ Problem/ Timeout f.eks. feil under lagring, parings-feil eller parings-timeout.	Feil-signalet	Enkel, lang vibrasjon
Fremdrift/ Opptatt- varslings f.eks. filkopiering, Bluetooth-skanning.	Opptatt-signalet	En kort vibrasjon hvert sekund.
Svakt-batteri- varslings (10%).	Lavt-batteri-signalet	En lang vibrasjon hvert sekund.
Går i sovemodus.	Tikke-lyd	Enkel, kort vibrasjon
Går ut av sovemodus.	Tikke-lyd	Enkel, kort vibrasjon
Endring av bruksmåte (modus).	Tikke-lyd	Enkel, kort vibrasjon
Til-/fra-kobling av lader.	Tikke-lyd	Enkel, kort vibrasjon
Slutten av linje eller avsnitt.	Linje-signalet	Enkel, kort vibrasjon

	Ingenting	To lange vibrasjoner (varsel om at enheten slås AV).
--	-----------	--

18 Sammenkoblet modus.

I tillegg til at Orbit Reader 40 kan benyttes som en frittstående dokumentleser og noteringsverktøy, kan den også kobles med vertsenheter (datamaskiner, mobile enheter og nettbrett) samt kalkulatoren «Orion TI-84 Talking Graphing Calculator» (mer info om den fra denne linken: http://tech.aph.org/gc_info.htm) for å benytte punktskrift ved inntasting og visning av innhold på disse. Enheten som skal kobles til må kunne kjøre software med støtte for punktskrift.

Vertsenhet	Skjermleser.
Windows-PCer	JAWS, Window-Eyes, System Access, NVDA, Dolphin ScreenReader, Windows Narrator.
MAC-maskiner og iOS-enheter	VoiceOver.
Android-enheter	BrailleBack, Braille TTY, Amazon VoiceView.
ChromeBook	ChromeVox.

Når Orbit Reader 40 benyttes som leselist (egentlig et display) for andre enheter, er det skjermleseren på vertsenheten som står for oversettelse fra tekst til punktskrift og ellers alt som har med innstillinger for punktskrift. Vi henviser til dokumentasjonen for skjermleseren.

Nedenfor følger en oversikt for de eneste hurtigkommandoene som ikke sendes til vertsenheten:

- Trykk på OK + OPP åpner menyen på Orbit Reader 40.
- Trykk på OK + VENSTRE setter Orbit Reader 40 tilbake til frakoblet modus.
- Trykk på OK + HØYRE setter Orbit Reader 40 tilbake til sammenkoblet modus.
- Trykk på OK + NED åpner et inntastingsfelt der du kan taste inn inntil 255 tegn til vertsenheten, trykk på Punkt 8 for faktisk å oversende det du har tastet inn eller OK for å avbryte.

18.1 Før du kobler sammen enhetene.

Før Orbit Reader 40 kobles sammen med vertsenheten, er det viktig å stille den inn slik at den blir gjenkjent av skjermleseren på verten. Nyere versjoner av skjermlesere vil gjenkjenne Orbit Reader 40. I oversikten nedenfor vises hvilke de første versjoner av skjermlesere som gjenkjenner Orbit Reader 40:

Skjermleser	Versjon
VoiceOver på iOS	10.2
VoiceOver på MAC	10.11
NVDA	2017.1
ChromeVox	61.0.3163.120
System Access	3.7.85
Dolphin ScreenReader	16.05

For å stille inn Orbit Reader 40 til å emulere VarioUltra40, åpner du Menyene, blar til «Emulering» og velger «VarioUltra40». Dersom du har planer om å koble til flere enheter og en av skjermleserne på

disse ennå ikke har støtte for Orbit Reader 40, må alle enhetene settes opp med samme emulering. Legg også merke til at dersom du allerede har satt emulering og du vil endre dette, må leselisten først kobles fra vertsenheten. Det er ikke mulig å endre innstilling for emulering mens enheten er tilkoblet en skjermleser. Det er lurt å midlertidig slå av støtte for punktskrift i skjermleseren før innstillingene endres.

Dersom du allerede har tilkoblet en Orbit Reader 40 med emulering avslått, må du fraparre den fra alle bluetooth-forbindelser før den kan brukes igjen.

18.2 Benytte Bluetooth-forbindelse.

Bluetooth er en teknologi som sørger for trådløs forbindelse mellom forskjellige enheter som f.eks. Orbit Reader 40 og vertsenheter som datamaskiner, mobile enheter og nettbrett. Når du f.eks. bruker en iPhone med VoiceOver aktivert, kan du styre telefonen fra punktastaturet på Orbit Reader 40 og samtidig lese hele brukergrensesnittet på punktcellene.

Dersom Orbit Reader 40 er påslått når vertsenheten slås PÅ eller vekkes fra standby, vil de to enheten automatisk kobles sammen på nytt. Når vertsenheten slås AV eller går i dvalemodus, vil Orbit Reader 40 automatisk gå i frakoblet modus eller koble til skjermleseren på en annen vertsenhet dersom den er tilkoblet også via USB.

I skrivende stund er det ikke mulig fra punktastene på Orbit Reader 40 å vekke opp en vertsenhet som er i dvalemodus. Det er 2 metoder for å vekke en vertsenhet:

- Ved å trykke på Av/PÅ-knappen.
- Mottak av varsling.

Før du kan begynne å bruke Bluetooth, er du nødt til å pare Orbit Reader 40 med vertsenheten, dette gjøres kun én gang. Når Orbit Reader 40 pares med nyere vertsenheter, gjør bruk av bluetooth-profilen «Just works» at paringsprosessen blir svært enkel. Dersom du vil koble til en eldre enhet som ikke støtter «Just works», kan det være at du må endre innstillinger for bluetooth-protokoll fra Menyen på Orbit Reader 40.

Dersom du har valgt å emulere VarioUltra40, vil leselisten vises på vertsenheten som «Refreshbraille####» der #-tegnene er erstattet av de siste fire sifrene i Serienummeret på Orbit Reader 40.

Videre fremgangsmåte for å pare forskjellige vertsenheter med Orbit Reader 40, er beskrevet nærmere i punktene du finner i tabellen nedenfor:

17.7.1 Tilkobling til iOS-enheter via bluetooth.
17.8.1 Tilkobling til Mac-maskiner via bluetooth.
17.9.1 Tilkobling til Android-enheter via bluetooth.
17.12.2 Tilkobling til Windows via bluetooth.

18.3 Håndtering av forbindelsen.

Når Bluetooth-forbindelse benyttes, er det mulig å avbryte kommunikasjonen mellom Orbit Reader 40 og vertsenheten. Hver gang vertsenheten vekkes vil den ta over styringen av leselisten. Dette oppførselen gjør samhandlingen i punktskrift mellom de to enhetene behagelig, men dersom du også bruker leselisten i frakoblet modus eller benytter USB-forbindelse mellom de to, kan det være at du ikke vil at leselisten blir forstyrret hver gang f.eks. iPhonen din vekkes. For å fortsette med det du

holdt på med mens iPhonen var i standby, må du trykke på dens Av/På-knapp slik at den sovner igjen.

For å forhindre at slike forstyrrelser skjer i det hele, kan det være smart å slå Bluetooth helt AV eller slå varslinger AV på vertsenheten. Bruk av Bluetooth styrer du kjapt med hurtigkommandoen MELLOMROM + PUNKT 4 7, som vekselvis slår den AV og PÅ. I tillegg kan du kjapt gå til frakoblet modus på Orbit Reader 40 med hurtigkommandoen OK + VENSTRE.

18.4 Sammenkobling med flere verter.

Det er mulig å pare Orbit Reader 40 med mer enn én vertsenhet. F.eks. kan det være at du ønsker å pare leselisten med både telefonen og nettbrettet ditt, slik at uansett hvilken av de to enhetene du benytter, så har du et grensesnitt i punktsskrift.

For å gjøre bruken av flere enheter så enkel som mulig, er det viktig at skjermleserne de benytter har samme emulering. Dersom alle skjermleserne støtter Orbit Reader 40 direkte, slår du emulering AV, hvis ikke må alle skjermleserne samt leselisten settes opp til emulering av VarioUltra40.

Dersom Orbit Reader 40 er satt opptil å virke mot flere vertsenheter, er det spesielt viktig at innstillingene for emulering passes nøye. Det kan være at kommunikasjonen virker å være OK, men likevel ikke fungerer korrekt da kommandoene for Orbit Reader 40 er forskjellige fra VarioUltra40.

18.5 Alternativer for USB-forbindelse.

USB er en teknologi som gjør sammenkobling av enheter svært enkel. Sammenlignet med Bluetooth har USB fortrinn ved at overføringshastighet er større og at batteriet på leselisten lades under bruk. Orbit Reader 40 har støtte for følgende fire typer USB-forbindelse, alle disse bruker samme USB-kabel:

1. Human Interface Device - Orbit, denne blir anbefalt.
2. Braille – HID.
3. Seriell.
4. Ekstern disk (brukes når du vil at SD-kortet på Orbit Reader 40 skal vises i utforskeren på vertsenheten).

18.5.1 Human-interface-enhet (HID – Orbit).

Når du benytter Orbit Reader 40 sammen med en skjermleser som støtter HID Orbit, går du frem på følgende måte:

1. Slå PÅ Orbit Reader 40. Det siste som ble vist på punktcellen blir vist på nytt.
2. Koble USB-kabelen til i vertsenheten og Orbit Reader 40. Meldingen «-- Lader tilkoblet» vises.
3. På Orbit Reader 40 trykker du nå MELLOMROM + PUNKT 2 7. Meldingen «-- HID Orbit» vises.
4. Start skjermleseren. Orbit Reader 40 vil nå vise det samme som er markert i skjermleseren. Dersom skjermleseren ikke støtter HID, henviser vi til «17.5.3 Seriell forbindelse».

Trykk på MELLOMROM + VENSTRE for å gå tilbake til frakoblet modus.

18.5.2 Human-interface-enhet (HID – Braille).

Når du benytter Orbit Reader 40 sammen med en skjermleser som støtter HID Braille, går du frem på følgende måte:

1. Slå PÅ Orbit Reader 40. Det siste som ble vist på punktcellen blir vist på nytt.

2. Koble USB-kabelen til i vertsenheten og Orbit Reader 40. Meldingen «-- Lader tilkoblet» vises.
3. På Orbit Reader 40 trykker du nå MELLOMROM + PUNKT 6 7. Meldingen «-- HID Braille» vises.
4. Start skjermleseren. Orbit Reader 40 vil nå vise det samme som er markert i skjermleseren. Dersom skjermleseren ikke støtter HID, henviser vi til «17.5.3 Seriell forbindelse».

Trykk på MELLOMROM + VENSTRE for å gå tilbake til frakoblet modus.

18.5.3 Seriell USB-forbindelse.

Når du benytter Orbit Reader 40 sammen med en skjermleser som støtter HID Braille, går du frem på følgende måte:

1. Slå PÅ Orbit Reader 40. Det siste som ble vist på punktcellen blir vist på nytt.
2. Koble USB-kabelen til i vertsenheten og Orbit Reader 40. Meldingen «-- Lader tilkoblet» vises.
3. På Orbit Reader 40 trykker du nå MELLOMROM + PUNKT 3 7. Meldingen «-- Seriell USB» vises.
4. Installér drivere etter behov. Vi henviser til nettsidene for ressurser for Orbit Reader 40 eller skjermleser-leverandørens support-sider.
5. Konfigurer skjermleseren. Vi henviser til informasjon for de forskjellige skjermleserne lenger bak i denne håndboken eller til dokumentasjonen for skjermleseren.

18.5.4 Ekstern disk.

Når et SD-kort er montert i Orbit Reader 40 og du ønsker at dette skal vises i utforskeren på vertsenheten, går du frem på følgende måte:

1. Slå PÅ Orbit Reader 40. Det siste som ble vist på punktcellen blir vist på nytt.
2. Koble USB-kabelen til i vertsenheten og Orbit Reader 40. Meldingen «-- Lader tilkoblet» vises.
3. På Orbit Reader 40 trykker du nå MELLOMROM + PUNKT 3 7. Meldingen «-- Ekstern disk modus» vises. Ut fra innstillingene på vertsenheten, vil det dukke opp varslingsmelding om at en lagringsenhet er blitt tilkoblet og kan benyttes.
4. Du kan nå lagre filer på PCen direkte på SD-kortet som sitter i Orbit Reader 40.

Trykk på MELLOMROM + VENSTRE for å gå tilbake til frakoblet modus. Dersom du gjør dette mens filer overføres, kan det forårsake feil.

Dersom visning av skjulte filer er påslått, kan det være at du kommer bort i følgende filer:

- .BKP-FILEHISTORY – Denne filen inneholder informasjon om sist leste posisjon i de siste 100 filene som ble lagret på enheten.
- .BKP-RECENTHISTORY – Denne filen inneholder nødvendig informasjon til å vise de sist brukte filene.
- .Logfile – Logfil som brukes ved debugging av software.

Ikke slett disse filene. De vil kun vises dersom du har visning av skjulte filer påslått.

18.6 Buffer for inntasting som skal sendes til verten.

Dersom du skriver svært raskt på punktastaturet, kan det være at vertsenheten henger etter og ikke viser tegnene med én gang du taster dem inn. Orbit Reader 40 har en egen buffer der det kan tastes

inn opptil 255 tegn slik at disse samtidig oversendes og du derfor unngår problemer med visningshastigheten i skjermleseren.

NB! Denne bufferen er kun tilgjengelig ved bruk av bluetooth, ikke ved bruk av USB.

Dersom du ønsker å benytte denne bufferen, trykker du på OK + NED slik at et inntastingsfelt vises, så fort markøren vises kan du starte inntastingen. Trykk på PUNKT 8 for faktisk å overføre det du har tastet inn til skjermleseren eller trykk på OK for å avbryte og lukke inntastingsfeltet.

18.7 iOS-enheter.

For tilkobling til iOS-enheter, må bluetooth benyttes.

18.7.1 Tilkobling til iOS-enheter via bluetooth.

Når du har koblet Orbit Reader 40 til en iOS-enhet, vil dette gi deg feedback i punktskrift samtidig som du kan styre iOS-enheten med tastaturet og piltastene på leselisten.

Ved bruk av en enhet med iOS-versjon eldre enn versjon 10.2, må du på Menyen på Orbit Reader 40 sette opp emulering av VarioUltra40.

Med standard bluetooth-profil «Just works», er Orbit Reader 40 klar til å pares med iOS via Bluetooth. Gå frem som følger for å pare enhetene:

1. Slå PÅ Bluetooth på Orbit Reader 40. Dette kan gjøres enten fra Menyen eller ved å trykke på MELLOMROM + PUNKT 4 7.
2. På iOS-enheten går du til Innstillinger-> Generelt-> Tilgjengelighet-> VoiceOver->Punktskrift.
3. Se etter navnet på leselisten i oversikten som vises, den vises enten som Orbit Reader 40 eller VarioUltra40 etterfulgt av de fire siste sifrene i dens serienummer.
4. Aktivér leselisten i oversikten slik at paring utføres.

Bekreftelseskoder med en tilfeldig sifferkombinasjon vises både på iOS-enheten og på Orbit Reader 40. Pass på at kodene stemmer overens og trykk på PUNKT 8 for å bekrefte paringen helt til slutt på «Pare»-knappen på iOS-enhetens skjerm.

Så fort paring er gjennomført, vil iOS-enheten sende punktskrift til Orbit Reader 40 og leseliste kan brukes til å styre iOS-enheten.

NB! VoiceOver må være påslått for at punktskrift skal sendes til leselisten.

Dersom du ønsker mer informasjon om iOS og leselister finner du det under «Braille displays for iOS» på Apples nettsider for tilgjengelighet.

18.7.2 iOS-ressurser.

- Apple Blind and Visually Impaired User Community.
- YouTube-videoer om iPad/i Phone og punktskrift.
- Braille Displays for iOS.

18.7.3 iOS-kommandoer.

iOS navigeringskommandoer	
Funksjon	Punktaster
Flytt til forrige.	MELLOMROM + PUNKT 1 eller VENSTRE.
Flytt til neste.	MELLOMROM + PUNKT 4 eller HØYRE.
Panorér mot venstre.	MELLOMROM + PUNKT 2.
Panorér mot høyre	MELLOMROM + PUNKT 5.

Flytt til første felt.	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3.
Flytt til siste felt	MELLOMROM + PUNKT 4 5 6.
Flytt en side til høyre:	MELLOMROM + PUNKT 1 3 5.
Flytt en side til venstre	MELLOMROM + PUNKT 2 4 6.
Flytt til Status-feltet	MELLOMROM + PUNKT 2 3 4.
Flytt til forrige punkt på Rotor	MELLOMROM + PUNKT 2 3.
Flytt til neste punkt på Rotor:	MELLOMROM + PUNKT 5 6.
Velg forrige innstilling for aktuelt Rotor-punkt	MELLOMROM + PUNKT 3.
Velg neste innstilling for aktuelt Rotor-punkt	MELLOMROM + PUNKT 6.
Åpne/Lukke Programveksler	2 ganger MELLOMROM + PUNKT 1 2 5.
Scrolle opp en side.	MELLOMROM + PUNKT 3 4 5 6.
Scrolle ned en side.	MELLOMROM + PUNKT 1 4 5 6.
Åpne Varslingssenter	MELLOMROM + PUNKT 4 6.
Åpne Kontrollcenter	MELLOMROM + PUNKT 2 5.

iOS lesekommandoer	
Funksjon	Punktaster
Les opp siden fra aktuelt felt:	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 5.
Les opp hele siden fra første felt:	MELLOMROM + PUNKT 2 4 5 6.
Pause/Fortsette opplesning	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 4.
Lese opp sidenummer eller vist rader	MELLOMROM + PUNKT 3 4.

iOS generelle kommandoer.	
Funksjon	Punktaster
Trykk på Tilbake-tasten (hvis den finnes)	MELLOMROM + PUNKT 1-2.
Trykk på Slette-tasten:	MELLOMROM + PUNKT 1 4 5 eller MELLOMROM + PUNKT 7.
Trykk på Retur-tasten	MELLOMROM + PUNKT 1 5 eller MELLOMROM + PUNKT 8.
Veksle forkortet/Ikke forkortet punktskrift	MELLOMROM + PUNKT1 2 4 5.
Slå talen Av/På:	MELLOMROM + PUNKT 1 3 4.
Trykk på Tab-tasten	MELLOMROM + PUNKT 2 3 4 5.
Kontekst-meny	MELLOMROM + PUNKT 3 5 6.
Endre punktskrift-inntasting	MELLOMROM + PUNKT 2 3 6.
Trykk på Volum-opp-knappen	MELLOMROM + PUNKT 3 4 5.
Trykk på Volum-ned-knappen:	MELLOMROM + PUNKT 1 2 6.
Slå skjerm-gardinen Av/På	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 4 5 6.
Velg all tekst	MELLOMROM + PUNKT 2 3 5 6.
Klipp ut valgt tekst	MELLOMROM + PUNKT 1 3 4 6.
Kopier valgt tekst	MELLOMROM + PUNKT 1 4.
Lim inn	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 6.
Angre	MELLOMROM + PUNKT 1 3 5 6.
Gjøre på nytt	MELLOMROM + PUNKT 2 3 4 6.
Trykk på Utløser-knappen	MELLOMROM + PUNKT 1 4 6.
Åpne/Lukke meldings-historikk	MELLOMROM + PUNKT 1 3 4 5.
Starte VoiceOver øvelse	MELLOMROM + PUNKT 1 3.
Avslutte VoiceOver øvelse	MELLOMROM + PUNKT 1 2.

iOS kommandoer for iPad	
Funksjon	Punkttaster
Flytt til forrige konteiner	MELLOMROM + PUNKT 1 7.
Flytt til neste konteiner	MELLOMROM + PUNKT 4 7.

18.8 Mac-maskiner.

Ved tilkobling av Orbit Reader 40 til en Mac-maskin, kan både USB og Bluetooth benyttes.

18.8.1 Tilkobling til Mac-maskiner via USB.

Enkleste måte å sammenkoble Orbit Reader 40 med en Mac-maskin er å benytte USB-kabelen som fulgte med i esken. Slå først på «HID – Braille» ved å trykke på MELLOMROM + PUNKT 6 7 eller velge HID – Braille for punktet USB (HID) i Menyen. Start så VoiceOver på Macen ved å trykke CMD + F5. Koble til slutt USB-kabelen til i begge ender. VoiceOver gjenkjenner leselisten automatisk og begynner straks å bruke den.

18.8.2 Tilkobling til Mac-maskiner via bluetooth.

Med standard bluetooth-profil «Just works», er Orbit Reader 40 klar til å pares med Mac-maskiner via bluetooth. Gå frem som følger for å pare enhetene:

1. Slå PÅ Bluetooth på Orbit Reader 40. Dette kan gjøres enten fra Menyen eller ved å trykke på MELLOMROM + PUNKT 4 7.
2. Når VoiceOver er påslått, åpnes programmet ved å trykke på CMD + F8.
3. Åpne kategorien «Punktskrift», klikk på «Leselister» og til slutt på «Legg til (+)».
4. Velg Orbit Reader 40 fra oversikten som vises. VoiceOver vil kun vise de bluetooth-enhetene som er innenfor rekkevidde og ser ut til å være en leselist.
5. Aktivér Orbit Reader 40 for paring.

Bekreftelseskoder med en tilfeldig sifferkombinasjon vises både på iOS-enheten og på Orbit Reader 40. Gå igjennom punktene 1 – 3. På Macen vises en dialog med en sikkerhetskode. Sammligne numrene på leselisten og Macen. Dersom de stemmer overens, kan du trykke på PUNKT 8 på leselisten for å velge «Ja» på Macen. Dersom de ikke stemmer overens, kan du trykke på PUNKT 7 på leselisten for å velge «Nei» på Macen, og deretter gå videre til den neste Orbit Reader 40 som vises på oversikten, se punkt 4 ovenfor. Bakgrunnen for denne prosedyren er at det samtidig skal være mulig å pare med mer enn én Orbit Reader 40 i samme rom uten at det pares med feil enhet.

Dersom ikke Orbit Reader 40 virker sammen med VoiceOver, skyldes dette sannsynligvis at Macen ikke kjører siste versjon av Mac OS. Du har da følgende muligheter:

1. Sett Orbit Reader 40 opp til emulering av VarioUltra40, og koble den til med slik emulering.
2. Se etter oppdateringer for Mac OS og oppdatér til siste versjon. Dette er anbefalt fremgangsmåte.

Dersom ikke Orbit Reader 40 vises i oversikten med Bluetooth-enheter (se punkt 4 ovenfor), må du kontrollere at bluetooth er påslått.

18.8.3 Styring av Orbit Reader 40 fra en Mac-maskin.

For å endre hvordan VoiceOver styrer leselisten, kan du gå frem som følger:

1. Åpne VoiceOver programmet ved å trykke på CMD + F8.
2. Bla til kategorien «Punktskrift».
3. Trykk på «Leselister».

18.9 Android-enheter.

Android-enheter kan kun tilkobles Orbit Reader 40 via bluetooth.

18.9.1 Tilkobling til Android-enheter via bluetooth.

Med standard bluetooth-profil «Just works», er Orbit Reader 40 klar til å pares med android-enheter via bluetooth. Gå frem som følger for å pare enhetene:

1. Slå PÅ bluetooth på Orbit Reader 40 enten fra Menyene eller ved å trykke på MELLOMROM + PUNKT 4 7.
2. Slå PÅ android-enheten der Bluetooth allerede er aktivert. Lydsignaler på både Android-enheten og leselisten varsler at kommunikasjonen er opprettet.
3. Kontrollér at alt virker.
4. Om nødvendig må du sette opp emulering.
I skrivende stund må du sette opp emulering til VarioUltra40 i Menyene. Så fort Orbit Reader 40 støttes av BrailleBack, vil det ikke lenger være nødvendig med emulering.
5. Oppsett av android-enheten.
For innstilling av Android-enheten henviser vi til siden «Installer og slå på BrailleBack» som du finner på siden <https://support.google.com/accessibility/android/answer/3535226?hl=no> på hjelpesidene for tilgjengelighet for Google Android.

18.9.2 Inntasting og visning av tekst med BrailleBack.

For å benytte punktastene på Orbit Reader 40, må du først slå på «Maskinvaretastatur for punktskrift punktskrift under «Språk og inndata». Dersom du prøver å bruke punktastene før dette, vil det vises en feilmelding.

For å redigere et tekstfelt, må du først markere tekstfeltet. Deretter kan OPP- og NED-tastene benyttes til å bla i teksten. Under redigering bruker BrailleBack 8-punkts punktskrift (Computer braille), og dette er i skrivende stund den eneste punktskriften som kan benyttes.

Du kan endre innstillinger for tastaturet under Apper-> Innstillinger-> Tilgjengelighet-> BrailleBack-> Innstillinger.

18.9.3 Kommandoer i BrailleBack.

Funksjon	Punktast
Tilbake	MELLOMROM + PUNKT 1 2 dvs. B.
Hjem	MELLOMROM + PUNKT 1 2 5 dvs. H.
Hjelp for BrailleBack	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3.
Varslinger	MELLOMROM + PUNKT 2 3 4 5 dvs. N.
Liste med åpne apper	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 5 dvs. R.
Enter (i inntastingsfelt)	MELLOMROM + PUNKT 8.
Tilbake (i inntastingsfelt)	MELLOMROM + PUNKT 7.

18.10. ChromeBook.

I skrivende stund er det kun mulig å koble Orbit Reader 40 med en ChromeBook via USB.

18.10.1 Tilkobling til ChromeBook via USB.

Når du vil benytte Orbit Reader 40 sammen med en ChromeBook via USB, går du frem på følgende måte:

1. Trykk på MELLOMROM + PUNKT 2 7 for å bruke HID Orbit. Alternativt kan du trykke på OK + OPP og deretter bla til USB.
2. Koble sammen Orbit Reader 40 med ChromeBooken vha. USB-kabelen. Etter noen sekunder oppdager ChromeBook leselisten og slår på ChromeVox.

18.10.2 Innstillinger og kommandoer i ChromeVox.

For å justere innstillingene for ChromeVox, henviser vi til siden «Bruk en leselist med Chromebooken din» på <https://support.google.com/chromebook/answer/7020014?hl=no> på hjelpesidene for tilgjengelighet for ChromeBook.

18.11 Fire-tablets.

For å pare Orbit Reader 40 med VoiceView på en Fire Tablet, går du frem som følger:

1. Sveip nedover med to fingre fra toppen av skjermen og dobbeltrykk på Innstillinger.
2. Find Tilgjengelighets-innstillingene og dobbeltrykk. Dobbelttrykk så på VoiceView skjermleser.
3. Bla til Punktskrift og dobbeltrykk. Dobbelttrykk så på «Pare bluetooth leselist».
4. Pass på at Orbit Reader 40 er påslått og at Bluetooth er påslått på den, og dobbeltrykk på Scanne.
5. Orbit Reader 40 skal nå vises i oversikten med Bluetooth-enheter. Dobbelttrykk på den for at de to enhetene skal pares.

For ytterligere informasjon henviser vi til «Use a Braille Display with Your FireTablet»:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeID=201829370> på sidene til Amazon Help and Customer Service.

18.12 Windows PCer.

For Windows-PCer kan du koble til enten med USB eller bluetooth.

18.12.1 Tilkobling til Windows via USB.

Dersom skjermleseren ikke støtter HID – Orbit, må du endre protokoll på Orbit Reader 40 til «Seriell», dette gjør du enten fra Menyen eller ved å trykke på MELLOMROM + PUNKT 3 7.

18.12.2 Tilkobling til Windows via bluetooth.

Dersom du vil koble Orbit Reader 40 til Windows-PCen, må du først velge parings-metode.

Med standard bluetooth-profil «Just works», er Orbit Reader 40 klar til å pares med Mac-maskiner via bluetooth. Gå frem som følger for å pare enhetene:

1. Slå PÅ Bluetooth på Orbit Reader 40. Dette kan gjøres enten fra Menyen eller ved å trykke på MELLOMROM + PUNKT 4 7.
2. Fra Windows utfører du et et Bluetooth-søk etter nye enheter.
3. Velg Orbit Reader 40 fra oversikten over bluetooth-enheter som vises. Paring blir utført.

Bekreftelseskoder med en tilfeldig sifferkombinasjon vises både på PCen og på Orbit Reader 40. Gå igjennom punktene 1 – 3. På PCen vises en dialog med en sikkerhetskode. Sammligne numrene på leselisten og PCen. Dersom de stemmer overens, kan du trykke på PUNKT 8 på leselisten for å velge «Ja» på PCen. Dersom de ikke stemmer overens, kan du trykke på PUNKT 7 på leselisten for å velge «Nei» på PCen, og deretter gå videre til den neste Orbit Reader 40 som vises på oversikten, se punkt 3 ovenfor. Bakgrunnen for denne prosedyren er at det samtidig skal være mulig å pare med mer enn én Orbit Reader 40 i samme rom uten at det pares med feil enhet.

PCen og leselisten pares og en innkommende virtuell bluetooth seriell COM-port settes opp på PCen.

Du må nå sjekke listen med porter i Windows Device Manger for å finne ut nummeret på COM-porten som er satt opp for utgående Bluetooth seriell port. Notér dette nummeret da det skal registreres i skjermleseren som COM-port for den aktive leselisten.

18.12.3 Tilgang fra NVDA.

Dersom du har NVDA versjon 2017.1 eller senere installert på en PC, vil Orbit Reader 40 automatisk gjenkjennes.

Legg merke til at NVDA kun fungerer på USB-tilkobling med protokollen HID – Orbit.

Dersom ikke Orbit Reader 40 vises i oversikten med anvendbare leselister, må du oppdater NVDA til siste versjon og prøve igjen. NVDA slår bruk av punktskrift PÅ så fort den er satt opp til å bruke Orbit Reader 40. Dersom du vil slå AV bruk av punktskrift, må du velge «Ingen leselist» på punktet for leselist under Leslist menyen.

18.12.3.1 Kommandoer i NVDA.

Kommandoer i NVDA	
Funksjon.	Taster.
Flytt oppover en linje	OPP-tasten
Flytt nedover en linje	NED-tasten
Flytt en bokstav mot venstre	VENSTRE-tasten
Flytt en bokstav mot høyre	HØYRE-tasten
Enter	OK-tasten

18.12.4 Tilgang fra JAWS (Job Access with Speech).

For JAWS versjon 2018.1803.24 og senere, trenger du ikke å installere drivere for Orbit Reader 40, men for tidligere versjoner er dette påkrevd. Nedlastinger av drivere kan gjøres fra support-sidene til Orbit Research <https://www.orbitresearch.com/support/>

For JAWS versjon 17 og tidligere må emulering av VarioUltra40 settes opp på Orbit Reader 40.

Når du bruker USB tilkobling mellom datamaskin og Orbit Reader 40, må leselisten settes opp til å benytte protokollen HID – Orbit. Denne aktiveres enten fra Menyene eller ved å trykke MELLOMROM + PUNKT 2 7.

Gå frem som følger for å bruke Orbit Reader 40 via USB:

1. Start eller restart JAWS.
2. Trykk Insert + J for å vise menyen i JAWS.
3. Trykk på Options.
4. Bla nedover til Punktskrift og trykk Enter.
5. Trykk på Legge til og trykk Enter.
6. Bla opp- eller nedover til Orbit Reader 40 og trykk på Mellomrom for å krysse av i avkryssingsfeltet.
7. Trykk på Neste-knappen.
8. Velg USB.
9. Trykk på Neste-knappen.
10. Velg Orbit Reader 40 som primærenhet.
11. Trykk på OK-knappen.
12. Restart JAWS.

Gå frem som følger ved bruk av Bluetooth:

1. Trykk på MELLOMROM + PUNKT 4 7 for å slå PÅ Bluetooth.
2. Følg videre punktene 1-7 ovenfor.
3. Velg COM-porten der Orbit Reader 40 er tilkoblet, dette noterte du under oppsett av USB-forbindelsen, men kan også finnes fra Windows Device Manager under COM-porter.
4. Følg videre punktene 9–12 ovenfor.

Hvis du vil slå av støtte for punktskrift, gjør du som følger:

1. Trykk på INSERT + J for å vise menyen i JAWS.
2. Trykk på Options.
3. Bla nedover til Punktskrift og trykk Enter.
4. Bla oppover til Ingen leselist.
5. Trykk på OK-knappen.
6. Restart JAWS.

18.12.4.1 Kommandoer i Jaws

Lese-kommandoer i JAWS.	
Funksjon.	Taster.
Flytte til venstre på skjermen	VENSTRE-tasten
Flytte til høyre på skjermen	HØYRE-tasten
Flytte en linje opp på skjermen.	OPP-tasten
Flytte en linje ned på skjermen.	NED-tasten
Panorere et punkt-vindu venstre	VENSTRE/HØYRE-PANORER-BAKOVER
Panorere et punkt-vindu høyre	VENSTRE/HØYRE-PANORER-FREMOVER
Flytte til toppen av aktivt vindu	ENTER + PUNKT 1 2 3
Flytte til bunnen av aktivt vindu	ENTER + PUNKT 4 5 6
Still punktskrift til gjeldende markør	ENTER + PUNKT 1 2 3 5 dvs R
Les opp gjeldende linje	MELLOMROM + PUNKT 1 4
Les opp gjeldende ord	MELLOMROM + PUNKT 2 5
Les opp gjeldende tegn	MELLOMROM + PUNKT 3 6

Navigerings-kommandoer i JAWS	
Funksjon	Taster
Forrige dokument-vindu	MELLOMROM + PUNKT 1 3
Neste dokument-vindu	MELLOMROM + PUNKT 4 6
Begynnelsen på filen	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3
Slutten på filen	MELLOMROM + PUNKT 4 5 6
Side opp	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 4 5
Side ned	MELLOMROM + PUNKT 1 2 4 5 6
Hjem	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 4
End	MELLOMROM + PUNKT 1 4 5 6
Pil-Oppover	MELLOMROM + PUNKT 1
Pil-Nedover	MELLOMROM + PUNKT 4
Forrige ord	MELLOMROM + PUNKT 2
Neste ord	MELLOMROM + PUNKT 5
Forrige tegn	MELLOMROM + PUNKT 3
Neste tegn	MELLOMROM + PUNKT 6

Redigerings-kommandoer i JAWS	
Funksjon.	Taster.
Backspace (fungerer som Shift-tast når du taster inn punktsskrift)	MELLOMROM + PUNKT 7
Enter	MELLOMROM + PUNKT 8
Tab	MELLOMROM + PUNKT 4 5
Shift + Tab	MELLOMROM + PUNKT 1 2
Slett gjeldende tegn	MELLOMROM + PUNKT 1 4 5 dvs. D
Markér alt	MELLOMROM + PUNKT 1 8
Markér til toppen av dokumentet	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 7 8
Markér til bunnen av dokumentet	MELLOMROM + PUNKT 4 5 6 7 8
Markér forrige side	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 4 5 7 8
Markér neste side	MELLOMROM + PUNKT 1 2 4 5 6 7 8
Markér til begynnelsen av linjen	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 4 7 8
Markér til slutten av linjen	MELLOMROM + PUNKT 1 4 5 6 7 8
Markér forrige linje	MELLOMROM + PUNKT 1 7 8
Markér neste linje	MELLOMROM + PUNKT 4 7 8
Markér forrige ord	MELLOMROM + PUNKT 2 7 8
Markér neste ord	MELLOMROM + PUNKT 5 7 8
Markér forrige tegn	MELLOMROM + PUNKT 3 7 8
Markér neste tegn	MELLOMROM + PUNKT 6 7 8
Kopier til utklippstavlen	MELLOMROM + PUNKT 1 4 8
Klipp ut til utklippstavlen	MELLOMROM + PUNKT 1 3 4 6 8
Lim inn	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 6 8
Angre	MELLOMROM + PUNKT 1 3 5 6 8

Windows-kommandoer i JAWS	
Funksjon.	Taster.
Start-knappen	MELLOMROM + PUNKT 1 3 4 7 8
Veksle meny-baren	MELLOMROM + PUNKT 2 3 4 dvs. M
Escape	MELLOMROM + PUNKT 1 3 5 6
Alt Tab	MELLOMROM + PUNKT 2 3 4 5 dvs. T
Minimere alle apper	MELLOMROM + PUNKT 1 4 5 7 8

Generelle kommandoer i JAWS	
Funksjon.	Taster.
Veksle for tastatur-hjelp	MELLOMROM + PUNKT 1 4 5 6
Slå PÅ eller Av innsatsing av 6-punkt punktsskrift fra leselisten	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 4 5 6
JAWS-markør	OK + PUNKT 2 4 5 dvs. J
PC-markør	OK + PUNKT 1 2 3 4 dvs. P
Flytte JAWS- markør til PC-markør	OK + PUNKT 1 4
Les opp alt til bunnen	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 4 5 6 7 8
Veksle gradering 2	MELLOMROM + PUNKT 1 2 4 5 dvs. G
Veksle gradering 2 for gjeldende ord	OK + PUNKT 2 4 5 6
Vise siste flash-melding	OK + PUNKT 1 2 4
JAWS finne	MELLOMROM + PUNKT 1 2 4
JAWS finne neste	MELLOMROM + PUNKT 2 5 7 8
JAWS finne forrige	MELLOMROM + PUNKT 2 5 7 8

Veksle aktiv markør følger punktskrift	OK + PUNKT 1
Veksle punktskrift følger aktiv markør	OK + PUNKT 4
Bla igjennom punktskrift-moduser	OK + PUNKT 2 3 4 dvs M
Vise 6-punkt punktskrift	OK + PUNKT 2 3 5
Vise 8-punkt punktskrift	OK + PUNKT 2 3 6
Veksle markørens utseende	OK + PUNKT 1 4 6
Begrense punktskrift-markøren	OK + PUNKT 1 2 3 5 dvs. R
Veksle tegn og attributter	OK + PUNKT 1 6
Punktskrift markert i farge	OK + PUNKT 1 4
Velge hvilke attributter som skal vises	OK + PUNKT 1 3
Bruk 8 tegn pr. mellomrom	MELLOMROM + PUNKT 2 3 6
Bruk ubegrenset antall tegn pr. mellomrom	MELLOMROM + PUNKT 1 3 6
Veksle 8 tegn/ubegrenset antall tegn pr. mellomrom	OK + PUNKT 1 3 4 6
Bla igjennom valg for lesing av tabeller	OK + PUNKT 2 3 4
Bla igjennom valg for overskrifter i tabeller	OK + PUNKT 1 2 5 dvs H
Label for grafikk	OK + PUNKT 1 2 4 5
Endre innstillinger i JAWS	MELLOMROM + PUNKT 1 2 3 6
JAWS-vindu	OK + PUNKT 2 4 5 dvs. J
Lese opp klokkeslett	OK + PUNKT 7 8
Vis filnavn for script	OK + PUNKT 1 2 3 4 5
Kjør JAWS-manager	MELLOMROM + PUNKT 2 3 7 8

18.12.5 System Access.

For å benytte Orbit Reader sammen med System Access, må USB-tilkobling og USB-protokollen HID-Orbit benyttes. Gå frem slik:

1. Trykk på MELLOMROM + PUNKT 2 7 for å bruke HID-Orbit. Alternativt kan du velge HID-Orbit fra menyen ved å trykke på OK + OPP og deretter bla til USB.

Etter at System Access er startet i med USB-protokollen HID-Orbit, kan du koble til USB-kabelen og vente i opptil 30 sekunder, System Access vil lese opp når Orbit Reader 40 er klar til bruk.

18.12.6 Dolphin skjermleser.

For bruk sammen med Dolphin Screen Reader må Orbit Reader 40 bruke USB-tilkobling og settes opp til å bruke protokollen HID-Orbit. Gå frem slik:

1. Trykk på MELLOMROM + PUNKT 2 7 for å bruke HID-Orbit. Alternativt kan du velge HID-Orbit fra menyen ved å trykke på OK + OPP og deretter bla til USB.
2. Koble til USB-kabelen, Dolphin ScreenReader vil automatisk gjenkjenne Orbit Reader 40 og begynne å vise punktskrift.

18.12.7 Window-Eyes.

Window-Eyes er avsluttet og det finnes derfor ikke drivere til Orbit Reader 40. Du må derfor sette opp emulering av VarioUltra40 dersom du ønsker å bruke Orbit Reader 40 mot Window-Eyes. I tillegg må USB-protokollen Seriell-USB velges. Gå frem som følger:

1. Trykk på MELLOMROM + PUNKT 2 7 for å bruke Seriell-USB. Alternativt kan du velge Seriell-USB fra menyen ved å trykke på OK + OPP og deretter bla til USB.

For å velge leselist i Window-Eyes, må du åpne punktet «Leselist» fra menyen. Det finnes ingen driver for Orbit Reader 40 i versjoner tidligere enn 7.1, men du kan likevel bruke den ved å velge en leselist med punktaster fra Baum, f.eks. Vario Connect og Braille Connect vil fungere. Velg leselist og sett opp hvilken COM-port som benyttes.

18.12.8 Narrator.

Narrator er i skrivende stund i beta-fasen. Vi kommer tilbake til denne skjermleseren i senere utgaver av brukerhåndboken.

19 Filoverføring via Bluetooth.

Filer kan via Bluetooth overføres fra Orbit Reader 40 til alle vertsenhetene den er parett med.

19.1 Sende en fil fra Orbit Reader 40.

Åpne fil-manageren og finn filen du vil sende. Trykk på MELLOMROM + PUNKT 2 3 4 5 7 for å sende filen til verten som er tilkoblet via Bluetooth.

En oversikt med vertsenheten som Orbit Reader 40 er parett med blir vist. Bla til ønsket vertsenhet og trykk OK eller PUNKT 8.

Status for fremdriften blir vist med meldingen «Sender XXX, YY%», der XXX er filnavnet og YY er prosentvis del av filen som er sendt. Når overføringen er ferdig, vises meldingen «Filen overført vellykket». Du kan avbryte overføringen ved å trykke på PUNKT 7, dette blir vist med meldingen «Overføringen avbrutt». Dersom vertsenheten avbrøt overføringen, vises meldingen «Overføringen ble stoppet».

Dersom det oppstår en feil under overføringen, vises meldingen «Overføringsfeil».

19.2 Motta en fil til Orbit Reader 40.

Når Orbit Reader 40 mottar en forespørsel om overføring av en fil, vises meldingen «XXX, YYY, ZZZ», der XXX er filnavnet, YYY er navnet på vertsenheten og ZZZ er størrelsen på filen.

Trykk på OK eller PUNKT 8 for å godta forespørselen og motta filen.

Status for fremdriften blir vist med meldingen «Mottar XXX, YY%», der XXX er filnavnet og YY er prosentvis del av filen som er mottatt. Når overføringen er ferdig, vises meldingen «Filen overført vellykket». Du kan avbryte overføringen ved å trykke på PUNKT 7, dette blir vist med meldingen «Overføringen avbrutt». Dersom vertsenheten avbrøt overføringen, vises meldingen «Overføringen ble stoppet».

Dersom det oppstår en feil under overføringen, vises meldingen «Overføringsfeil».

Orbit Reader 40 lagrer de mottatte filene i mappen «Bluetooth» på SD-kortet. Dette kan ikke endres.

20 Kalkulator.

21 Kalender.

22 Låse punkttastaturet.

Kommandoen «Låse punkttastaturet» gjør at ikke utilsiktede tastetrykk registreres. Du låser og låser opp tastaturet ved å holde PUNKT 7 og PUNKT 8 nedtrykket i 2 sekunder eller mer. Tasteaturet låses også opp dersom du slår Orbit Reader AV og PÅ igjen.

23 Varslinger fra systemet på Orbit Reader 40.

Varslinger fra systemet f.eks. « – Svakt batteri» indikeres med repetisjon av de 8 punktene i siste celle på Orbit Reader 40.

Dersom det ble vist noe i denne cellen før varslingen, vil dette bli vist på nytt etter varslingen.

Varslinger vises når Meny eller Kontekst-menyen for Editoren åpnes. Dersom det finnes flere varslinger, vil trykk på OK gjøre at den neste vises. Varslingen blir slettet så fort den er blitt vist.

Dersom det ikke er flere varslinger i listen, vil første punkt på Menyen eller Kontekst-menyen for Editoren vises når de åpnes. Trykk på PUNKT 7 vil slette alle uviste varslinger og vise første punkt på menyene.

Dersom varslinger er lengre enn 20 tegn, kan du bla i den med panoreringstastene. Dersom du allerede er i Menyen eller i Editorens Kontekst-meny når varslingen kommer, kan du se på varlingen ved å trykke på MELLOMROM.

24 Bruk av eksternt Bluetooth-tastatur.

24.1 Paring og tilkobling.

24.2 Kommandoer.

24.2.1 Kommandoer i Fil-manager.

24.2.2 Kommandoer i Dokument-leser.

24.2.3 Kommandoer i Editor.

24.2.4 Kommandoer i Inntastings-feltet.

24.2.5 Kommandoer ved navigering i menyen.

24.2.6 Kommandoer for å skifte modus.

24.2.7 Kommandoer i kalenderen.

24.2.8 Kommandoer i kalkulatoren.

24.2.9 Kommandoer for iOS.

24.2.10 Kommandoer for Brailleback.

24.2.11 Kommandoer for JAWS.

24.2.12 Kommandoer i NVDA.

24.2.13 Kommandoer for Mac.

24.2.14 Andre kommandoer.

25 Omstart av enheten.

Dersom det skulle hende at Orbit Reader 40 plutselig ikke reagere på tastetrykk og du vet at batteriet er ladet, kan du prøve å slå AV enheten ved samtidig å trykke ned HØYRE-PANORER-BAKOVER og PUNKT 8. Leselisten blir værende avslått etter av reset er foretatt, og du må trykke på Av/På-bryteren for å slå den PÅ igjen.

26 Oppdatering av enheten.

Nye versjoner av firmwaren på Orbit Reader 40 blir utgitt fra tid til annen, og disse inneholder forbedringer, bug-fixer og nye funksjoner. I dette punktet finner du forklaring på hvordan du oppdaterer firmwaren på Orbit Reader 40.

Firmwaren kan oppdateres på to måter, enten ved å benytte et oppdateringsverktøy på en Windows-PC via USB eller ved å bruke et SD-kort som inneholder oppdateringsfilene. For oppdatering med Windows-PC via USB behøves PCen under hele oppdateringsprosessen, og dette er den raskeste metoden. For oppdatering med SD-kort der oppdateringsfilene er plassert, behøves en datamaskin kun til nedlastning og kopiering av filene. Begge metodene består av to deler:

1. Nedlastning av oppdateringspakken.
2. Oppdatering av Orbit Reader 40.

Nedlastning av oppdateringspakken er felles for begge metodene.

26.1 Nedlasting av oppdateringspakke.

Gå frem som følger for å laste ned oppdatering for firmwaren på Orbit Reader 40:

1. Gå til supportsidene for Orbit Reader 40 hos Orbit Research.
<http://www.orbitresearch.com/support/orbit-reader-20-support/>

2. Velg «Download Most Recent Firmware» (<http://www.orbitresearch.com/support/orbit-reader-20-support/orbit-reader-firmware-download>). Alternativt kan du laste ned eldre utgaver av firmworen fra <http://www.orbitresearch.com/old-software-releases-archive>
3. Velg firmware-oppdateringspakke vB0.00.00XXrYY.
4. Lagre ZIP-filen på et sted du husker på PCen.

Når nedlastingen er fullført, går du frem som følger:

1. Gå til mappen du lagret filen i, dette er vanligvis «Nedlastinger».
2. Høyreklikk på filen og velg «Pakk ut alle».
3. Følg dialogen og pakk ut filen til mappen du ønsker å legge de utpakkede filene i.

Når dette er fullført skal det være en mappe ved navn etter firmware-utgivelsen, f.eks. «OR20_Firmware_Upgrade_Package B.XX.XX.XX», i mappen du valgte å pakke ut til. Notér navnet på denne mappen, den skal brukes i neste del av oppdateringen.

Dersom du ønsker informasjon om hva som er endret i den siste firmware-versjonen, finner du det under «Release Notes» på <http://www.orbitresearch.com/support/orbit-reader-20-support/orbit-reader-firmware-download>


26.2 Anvendelse av oppdateringsverktøy på PC.

Du trenger følgende dersom du vil kjøre firmware-oppdateringen fra en PC:


1. Orbit Reader 40.
2. Standard mikro-USB-kabel.
3. En Pc som kjører Windows XP eller senere.
4. Filen «Orbit Reader 40 Upgrade Utility» som ligger i den utpakkede mappen som ble opprette i foregående punkt.
5. Oppdateringsfilen for Orbit Reader 40, dette er en BIN-fil som også ligger i mappen som ble opprettet under utpakking av oppdateringspakken.

Gå frem som følger for å oppdatere firmworen på leselisten:


1. Pass på at Orbit Reader 40 er avslått.
2. Koble Orbit Reader 40 til PCen med den medfølgende USB-kabelen.
3. Fra den utpakkede mappen med firmware-oppdateringen, klikke du på filen «Orbit Reader 40 Upgrade Utility». Dersom du får feilmelding, henviser vi til punkt 21.3.1 Feilsøking under oppdatering. Dersom alt fungerer vil PCen vise meldingen «Note: Connect the device to the PC and put into upgrade mode. To enter Firmware Upgrade Mode press and hold the Right Panning forward button + Dot 5 key. Then press and release Dot 8 key. The other keys can be released after this».

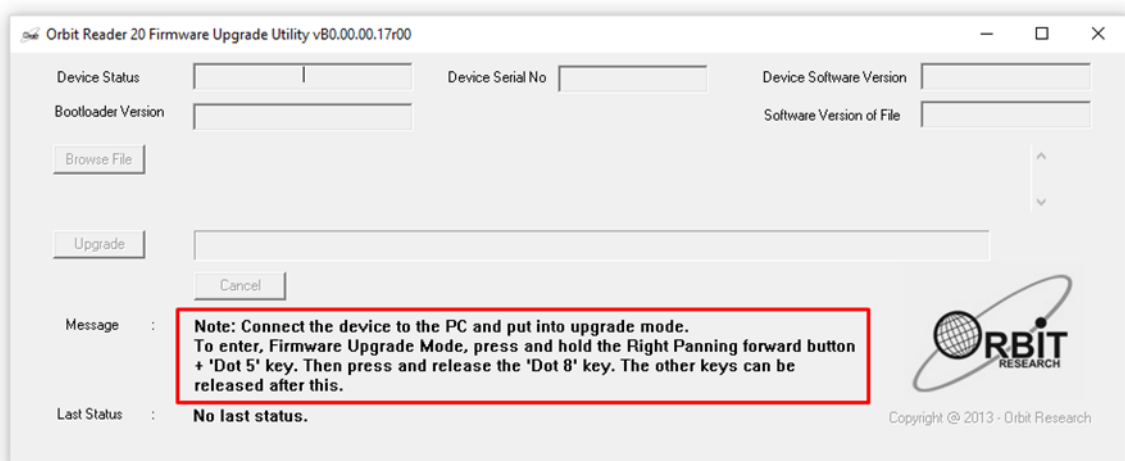

4. Hold nede HØYRE-PANORER-FREMOVER- og PUNKT 5-kanppene. Hold så også PUNKT 8 nede. På skjermen vises nå meldingen «Orbit Reader 40 is connected» i statusfeltet for enheten. Meldingen «Do you want to upgrade the device?» vises i meldingsfeltet på bunnen av skjermen.
5. Slipp først opp PUNKT 8 og deretter PANORER_HØYRE- og PUNKT 5-knappene. Dette vil sette Orbit Reader 40 i oppdatering-modus, og et lydsignal vil høres på PCen.
6. Oppdateringsverktøyet vil vise enhetens serienummer og gjeldende firmware-versjon i øvre venstre hjørne av vinduet. Hvis serienummeret er blankt, må du repetere punktene 4 og 5.
7. Trykk på knappen «Browse file».
8. Bla frem til mappen der oppdaterings-filen er plassert, dette er igjen en BIN-fil.
9. Så fort du har trykket på oppdaterings-filen, vil firmware-versjonen i den nye filen bli vist.

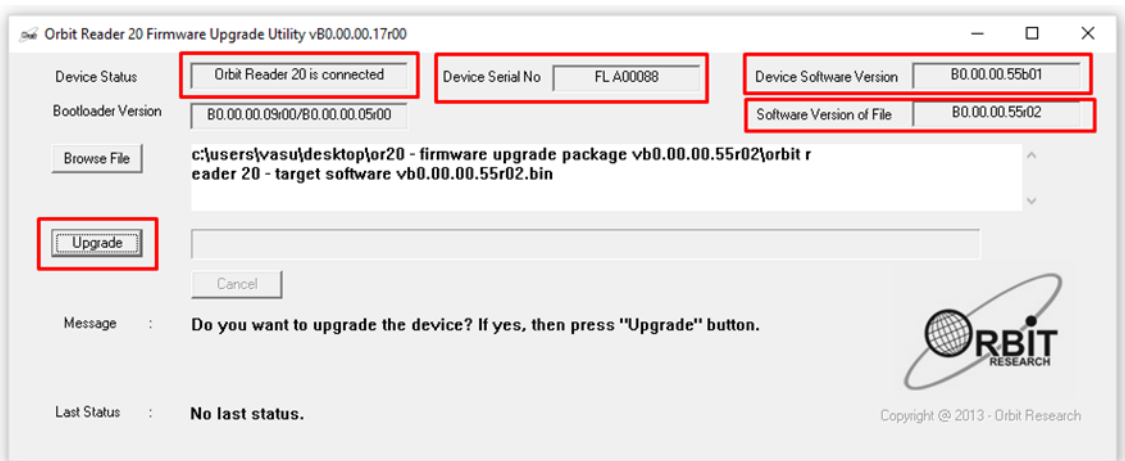

10. Trykk på «Upgrade»-knappen.
11. Verktøyet startet nå oppdatering av enheten.

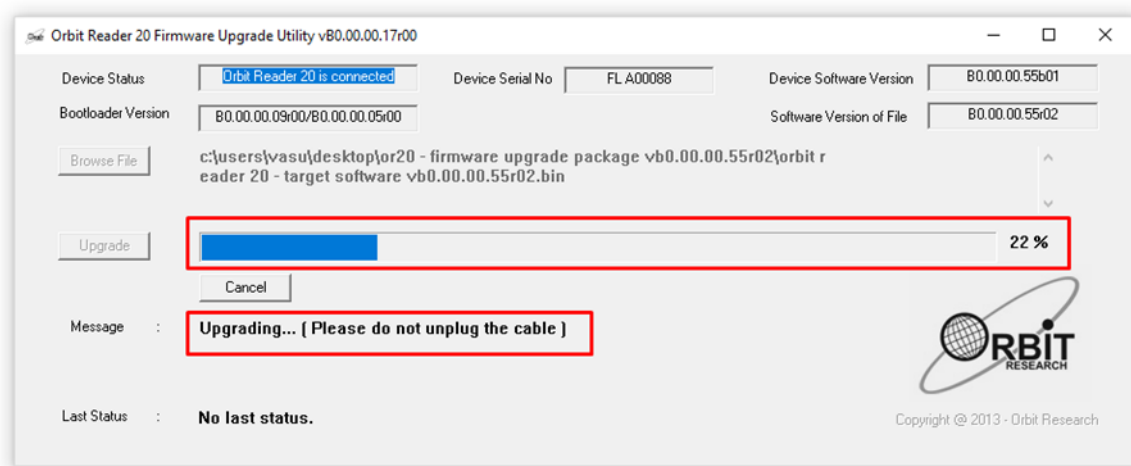

12. Ikke plugg fra kabelen! Vent til meldingen «Device upgrade has been completed» vises på skjermen eller Orbit Reader 40 slår seg av.

13. Orbit Reader 40 er nå oppdatert, og du kan slå den PÅ og begynne å bruke den.

For å kontrollere at enheten er blitt oppdatert, kan du åpne Menyen og gå til meny punkt «Ver». Her kan du se versjonen på firmwaren som akkurat ble installert, og denne skal samstemme med det som ble vist underveis i oppdateringsprosessen.

26.3 Anvendelse av SD-kort ved oppdatering.

Du trenger følgende dersom du vil kjøre firmware-oppdateringen fra et SD-kort:

1. Orbit Reader 40.
2. Oppdateringsfilen for Orbit Reader 40, dette er en BIN-fil som også ligger i mappen som ble opprettet under utpakking av oppdateringspakken.
3. Legg merke til at dersom du vil oppdatere fra et SD-kort, må Bootloaderen på enheten være vB0.00.00.10b04 eller senere. Bootloader-versjonen kan du sjekke fra Menyen. Trykk på OK + OPP for å åpne menyen og bla til til meny punkt «Bver». Alternativt kan du trykke MELLOMROM + PUNKT 1 2 7. Dersom Bootloadern er eldre enn dette, må du oppdatere den før du kan oppdatere firmwaren. Den siste oppdateringspakken for Bootloaderen finner du på <http://www.orbitresearch.com/support/orbit-reader-20-support/>
4. Et SD-kort formatert med FAT32.

Gå frem som følger for å oppdatere firmwaren på leselisten:

1. Kopiér filen «Orbit Reader 40 Target Software vB0.00.00.XXrYY.bin» fra mappen med oppdateringer til SD-kortet. Dette kan du gjøre direkte på PCen som ble brukt til nedlasting av firmware-oppdateringen eller ved hjelp av USB-protokollen «Ekstern disk». Når dette er gjort setter du SD-kortet inn i Orbit Reader 40.
2. Slå AV Orbit Reader 40.
3. Hold inne HØYRE-PANORER-FREMOVER- og PUNKT 4-tasten og trykk samtidig på Av/På-knappen på enheten. Meldingen «Forbereder...» vises på punktcellene og du kan nå slippe knappene. Vanligvis tar det 40-50 sekunder før alt er ferdig forberedt.
4. Så fort forberedningen er fullført, vil meldingen «Oppdaterer...» vises samtidig som punkt 6 blinker på de fire cellene etter meldingen.
5. Vanligvis tar det 2,5-3 minutter å oppdatere firmwaren, SD-kortet må ikke fjernes mens dette pågår.

6. Når oppdateringen er fullført, vil meldingen «Oppdatering installert» vises et par sekunder før Orbit Reader 40 automatisk resetter seg og slår seg AV.
7. Når du slår PÅ Orbit Reader 40 igjen, vil meldingen «Oppdatering fullført» vises. Denne meldingen vises ikke dersom du «oppdaterte» til samme eller en tidligere versjon.
8. Orbit Reader 40 er nå ferdig oppdatert og du kan begynne å bruke den som vanlig.

For å kontrollere at enheten er blitt oppdatert, kan du åpne Menyen og gå til menypunktet «Ver». Her kan du se versjonen på firmwaren som akkurat ble installert, og denne skal samstemme med navnet på oppdateringsfilen.

26.3.1 Feilsøking under oppdatering.

1. I tilfelle av at enheten låser seg eller ikke godtar noen kommandoer, kan du forta en gjenoppretting av den.
 - a. Prøve å bruke en annen knappe-kombinasjon (se nedenfor).
 - b. Kontroller at filen «Orbit Reader 40 Target Software vB0.00.00.XXrYY.bin» er på plass på roten av SD-kortet.
 - c. Hold inne HØYRE-PANORER-BAKOVER- og PUNKT 4-knappen og trykk samtidig på Av/På-knappen på enheten og vent på at Meldingen «Forbereder...» skal vises på punktcellene. Dersom ingenting skjer i løpet av 4-5 sekunder, kan du trykke på og slippe opp igjen PUNKT 8 og deretter slippe opp igjen de andre knappene.
 - d. Vent i ca. ett minutt. Orbit Reader 40 bør nå starte oppdateringsprosessen og vise meldinger «Oppdaterer...».
 - e. Vanligvis tar det 2,5-3 minutter å oppdatere firmwaren, SD-kortet må ikke fjernes mens dette pågår.
 - f. Når oppdateringen er fullført, vil meldingen «Oppdatering installert» vises et par sekunder før Orbit Reader 40 automatisk resetter seg og slår seg AV.
 - g. Når du slår PÅ Orbit Reader 40 igjen, vil meldingen «Oppdatering fullført» vises
2. Dersom ikke meldinger «Forbereder...» vises, må du kontrollere at du trykte på knappene i riktig rekkefølge. Hold inne HØYRE-PANORER-BAKOVER- og PUNKT 4-knappen og trykk samtidig på Av/På-knappen på enheten for å slå den PÅ.
3. Dersom du ikke har firmware-versjon B0.00.00.55r02 eller senere, kan det være at meldingen «Forbereder...» ikke vises skikkelig. Vent ca. ett minutt, meldingen «Oppdaterer...» vil da vises.
4. Dersom du ikke er sikker på hvor langt du er kommet i prosessen kan den alltid startes på nytt med tastekombinasjonen HØYRE-PANORER-BAKOVER- + PUNKT 8.
5. Dersom ikke meldingen «Oppdatering fullført» vises første gang du slår PÅ enheten etter en oppdatering, kan det hende at du har «oppdatert» enheten med samme eller en tidligere firmware-versjon. For å kontrollere hvilken firmware som er installeret, kan du åpne Menyen og gå til menypunktet «Ver». Her kan du se gjeldende versjon på firmwaren.

27 Innstillinger for språk.

27.1 Nedlasting av språkfiler.

27.2 Innlasting av språkfiler.

27.3 Endre språk.

28 Feilsøking.

Dersom Orbit Reader 40 ikke vil slå seg på eller låser seg under bruk, kan du prøve forslagene nedenfor i rekkefølge:

Forslag 1: Koble til laderen.

1. Koble til den medfølgende laderen og USB-kabelen for å være sikker på at batteriet lades. Dette er den mest pålitelige måte å sørge for at leselisten får strøm.
2. La leseliste lades opp i minimum 1 time.
3. Hold inne Av/På-knappen i minst 2 sekunder. Dersom Orbit Reader 40 er PÅ, vil den nå slå seg AV. Dersom Orbit Reader 40 er AV, vil den nå slå seg PÅ.

Forslag 2: Sjekk SD-kortet.

1. Ta ut SD-kortet.
2. Hold inne Av/På-knappen i 2 sekunder.

Forslag 3: Koble enheten fra.

1. Dersom enheten er tilkoblet kobler du den fra.
2. Hold inne Av/På-knappen i 2 sekunder.

Forslag 4: Reset enheten.

1. Trykk samtidig ned PUNKT 8 og PANORER-HØYR. **NB!** Når du gjør dette, virker det som om det ikke skjer noe og det er ingen endring på punktcellene.
2. Hold inne Av/På-knappen i 2 sekunder.

Forslag 5: Ta ut batteriet.

Se punktet 24 Bruk på batteri og utskifting av batteriet for forklaring på hvordan du tar ut og setter inn igjen batteriet. La batteriet være frakoblet i 5 minutter før det settes inn igjen.

Dersom du ikke får bukt med problemet kan du som siste utvei ta kontakt med leverandøren.

29 Bruk på batteri og utskifting av batteriet.

Orbit Reader 40 har et innebygd lithium-ion-batteri. Under optimale forhold lades batteriet helt opp på 3 timer. Ved vanlig bruk vil batteriet gi opptil 3 dagers bruk. Gjenstående kapasitet på batteriet kan sjekkes fra Menyen.

Når gjenstående kapasiteten på batteriet blir så lav som 10%, vil punkt 8 på celle-nummer 20 begynne å blinke. Dette gjøres for å varsle om batteriet snart bør lades.

Batteriet på Orbit Reader 40 vil vare i mange år, men det vil gradvis få mindre kapasitet. Når du synes at brukstiden på batteri er blitt for kort, er det på tide å skifte det ut. Gå frem som følger for å bytte batteri:

- Skaff deg først et nytt batteri. Bruk kun originale batterier som kan bestilles fra leverandøren.

- Batteriluken sitter på enhetens underside, og du begynner med å legge leselisten opp-ned på et mykt underlag.
- Fjern skruene i batteriluken og ta luken helt av.
- Koble fra det gamle batteriet ved å ta i kontakten, **ikke i ledningene**, og ta ut det gamle batteriet.
- Sett på plass det nye batteriet og koble det til.
- Sett på plass batterilokket og sett i skruene.

Brukte batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres inn til gjenvinning.

30 Påsetting av bærerem.

Nederst på venstre og høyre hjørne av fronten av Orbit Reader 40 finner du to hull. Disse hullene kan benyttes til nøkkelringer dersom du skulle ønske å sette en bærerem på leseliste. Nøkkelringene kan være 10-40 mm i diameter og opptil 3 mm i tykkelse.



31 Renhold av Orbit Reader 40.

Leselister utsettes for støv og fett, og Orbit Reader 40 bør derfor rengjøres av og til. Gå frem på følgende måte.

- Renhold bør kun utføres når enheten er avslått og alle pinnene er i nedre posisjon.
- Benytt en støvsuger med myk tupp til å fjerne støv fra området der pinnene sitter.
- Bruk en lofri klut til å tørke forsiktige av punktcellene.
- Kluten kan fuktes svakt med vann.
- Bruk av følgende under rengjøring må unngås:
 - Papirhåndklær og servietter
 - Sprit eller andre kjemiske væsker.
 - Midler med slipende effekt.
 - Trykkluft og spraybokser med luft.

32 Tekniske data.

Størrelse (bxhxd)	295x36x96 mm.
Vekt	750 g.
Punktceller	40 punktceller, oppfriskingshastighet <0,75 sekunder.
Punkttaster	8-punkttaster i Perkins-plassering samt mellomrom.
Andre taster og knapper	Av/På-knapp, navigeringstaster med OK, samt 2 panoreringstaster.
Støttede fil-formater	txt, brl, brf, bra

Støttede OS-formater	Windows: NVDA, JAWS, Window-Eyes, System Access, Dolphin Screen Reader. Mac OS X: VoiceOver. iOS: VoiceOver. Android: BrailleBack. Fire OS: FireView. ChromeBook: CkromeVox. Linux/Unix: BRLTTY.
Bluetooth-forbindelser:	Opptil 5 samtidige forbindelser.
Tilkoblinger:	1 x USB-C-port, USB 2.0, for USB-tilkobling til vertsenhet, firmware-oppdatering og opplading. 1 x USB-A-port for tilkobling av USB-minne. Bluetooth 5.0 klasse 2.
Kort-spor	1 x SD-kort (SDHC).
Batteri	Oppladbart lithium-io batteri, kan skiftes av brukeren.
Bruktid på batteri	3 dager med typisk bruk.
Opplading	Fra PC: opplading fra USB – 5V, 500mA max. Fra lader: opplading fra USB – 5V, 1000mA max.
Anbefalt bruksforhold	Ved bruk Temperatur 5–45°C. Luftfuktighet: 10-70% relativ luftfuktighet. Ved oppbevaring Temperatur 5–45°C. Luftfuktighet: 5-90% relativ luftfuktighet.

33 Ytterligere informasjon.

For ytterligere informasjon, tekniske detaljer, feilsøkingstips og detaljer om oppdatering, henviser vi til Orbit Researchs nettsider for Orbit Reader 40; <http://www.orbitresearch.com/support/orbit-reader-40-support/>