

BELLAVITA

badekarmontert personløfter



Brukerveiledning

Innhold

Innledning	03
Samsvarserklæring	03
Levetid	03
Produktetikett	03
Gjenbruk	03
Løfterens komponenter	04
Produktbeskrivelse	05
Definisjon	05
For din sikkerhet	05
Sikkerhetsregler	06
EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet	06
Montering og bruk	06
Innledende montering i badekar	07
Feste løfteren i bunnen av badekaret	07
Sette på/ta av trekk	09
Håndkontroll	09
Bruk under badeøkt	10
Vedlikehold	11
Rengjøring	12
Pleie av trekk	12
Montering av nye plugger til trekket	12
Vedlikehold	12
Transport / forflytning	13
Tekniske spesifikasjoner	14
Miljøforhold ved bruk	14
Miljøforhold ved lagring og transport	14
Avfallshåndtering	14

Innledning

Takk for at du valgte et produkt fra Drive DeVilbiss.

Du vil ikke bli skuffet over design, funksjonalitet og kvalitet på dette produktet.

Les denne bruksanvisningen nøye før første gangs bruk. De inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og verdifulle tips for riktig bruk og pleie. Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon, kan du kontakte din Hjelpemiddelsentral eller Varodd Velferdsteknologi som leverte produktet ditt.

Denne bruksanvisningen inneholder all viktig informasjon for justering og bruk. Den mest aktuelle bruksanvisningen er tilgjengelig som PDF online eller kan bestilles fra kundeservice.

Forstørrede formater for synshemmede kan vises. Blinde pasienter må instrueres av ledsager. Reparasjoner og noen justeringer krever spesiell teknisk opplæring og må derfor utføres av Hjelpemiddelsentralen eller Varodd Velferdsteknologi.

Samsvarserklæring

Det foreligger en samsvarserklæring fra produsent for dette produktet iht. til den europeiske forordningen om medisinsk utstyr: (EU) 2017/745.

Levetid

Produktet har en forventet levetid på fem år, forutsatt at det brukes som tiltenkt og alle vedlikeholds- og servicekrav overholdes.

Levetiden kan overskrides vesentlig hvis produktet brukes, håndteres, repareres og vedlikeholdes så lenge det ikke er noen tekniske begrensninger.

Levetiden kan imidlertid også bli vesentlig forkortet gjennom ekstrem og feil bruk. Bestemmelse av levetiden innebærer ikke at det gis ytterligere garanti.

Produktetikett



1 Artikkelnummer | 2 Produktnavn | 3 Produsentnavn | 4 Serienummer | 5 UDI-kode | 6 Maks brukervekt | 7 Les brukerveiledning | 8 Medisinsk utstyr | 9 Produksjonsdato (år-måned)

Gjenbruk

Dette produkt kan gjenbrukes. Vær oppmerksom på at alle tekniske dokumenter som trengs for sikker håndtering må leveres til ny bruker.

Produktet må kontrolleres av kyndig person, rengjøres og settes i best mulig stand.

Følg alltid produsentens instruksjoner under forberedelsen.

Tilbehør er tilgjengelig fra Varodd Velferdsteknologi.

Garanti

Produsenten Drive Medical gir to års garanti på dette produktet.

Slitasjedeler dekkes vanligvis ikke i løpet av den normale garantiperioden med mindre delene må byttes ut som en klar og direkte følge av en produksjons- eller materialfeil.

Vi forbeholder oss retten til endring og modifikasjoner på grunnlag av tekniske forbedringer og designendringer.

OMFATTES IKKE AV AV GARANTI

Deler som utsettes for slitasje, inkluderer (blant annet): Dekslar og sugekopper

Løfterens komponenter



BELLAVITA

- 1. Ryggdel
- 2. Settedel
- 3. Sideklaffer

- 4. Sakseløft
- 5. Base / bunnplate
- 6. Sugekopper

- 7. Låsemekanisme
- 8. Tannstang
- 9. Håndkontroll

Produktbeskrivelse

Takk for at du valgte et produkt fra Drive DeVilbiss. Dette solide og høykvalitetsproduktet vil gjøre det lettere for deg fra nå av å komme inn og ut av badekaret for bading.

Bellavita badeheis oppfyller de gjeldene standardene DIN EN ISO 10535: 2006 og DIN EN 60601-1: 1996.

Bellavita badeheis består hovedsakelig av resirkulerbar plast i høy kvalitet og lett design. Som et resultat er den lett å transportere og lagres. Bellavita er egnet for bruk hjemme, så vel som på et sykehjem eller på reiser.

Håndkontrollen inneholder et lithium-ion-batteri.

Ved hjelp av håndkontrollen er det enkelt å heve og senke til normal sittestilling. Det er også mulig å velge mellomstillinger.

Drivmotor og elektronikken er vanntette. Løfteren kan dermed også brukes når du dusjer i badekaret.

Den solide løfteren kan heve og senke setet fra 6.5 til 48 cm i høyden.

Drivenheten med integrert ryggstøtte er avtakbar og klikker på plass i setedelen, den låses automatisk når den blir hevet. Dette forhindrer at ryggstøtten utilsiktet legges fremover.

Bellavita har en integrert energikontroll som ikke tillater at den senkes ned i badekaret uten at det er strøm nok til å løfte den tilbake.

Ved en gjennomsnittlig bruksfrekvens (en gang daglig), anbefales det å bytte ut produktet etter 5 år (avhengig av produktets generelle tilstand).

Definisjon

Badehjelpemidler er produkter som gjør at brukeren uavhengig kan utføre daglig kroppspleie. De kompensere helt eller delvis for begrensede eller fraværende kroppsfunksjoner. Målet med å bruke tilsvarende hjelpemidler er å gjøre det mulig for syke eller funksjonshemmede å være så uavhengig av ekstern hjelp som mulig innen hygiene.

Badekarmontert personløfter

Badeheiser benyttes for å senke pasienter ned i badekaret samt løfte pasienten opp igjen til toppen av badekaret. De er hensiktsmessig for brukere som har funksjonsbegrensninger i øvre og/eller nedre ekstremitet, noe som kan gjøre det vanskelig å sitte under bading samt komme inn og ut av badekaret på egen hånd.



For din sikkerhet

Informasjon som må leses!

Sikker bading med badeheisen er bare mulig hvis brukerveiledningen leses nøye, og informasjonen den inneholder følges nøye!

Viktig informasjon!

- Badeheisen må ikke brukes som en stige, en enhet for å lette inn- og utstigning utenfor badekaret, et hjelpemiddel for stigning eller nedstigning, en støtte, en løfteplattform eller lignende. Den skal kun benyttes til bading av personer inne i badekaret
- Barn og dyr må holdes borte fra badeheisen.
- I tilfelle feil eller skade, må du kontakte din Hjelpemiddelsentral eller Varodd Velferdsteknologi umiddelbart. Ikke foreta uautoriserte modifikasjoner eller forandringer. Reparasjoner må kun utføres av autorisert personell. Manglende overholdelse av dette ugyldiggjør ethvert krav om reklamasjon.
- Løfteaksel må kun forlenges når ryggdelen er koblet til setedelen
- Bruk av høydeadapter er ikke tillatt Ikke oppbevar produktet i umiddelbar nærhet av varmekilder.

Oppbevar brukerveiledningen tilgjengelig

- Hvis løfteren skal transporteres må håndkontrollen kobles fra på forhånd.
- Hvis løfteren i lang tid har vært utsatt for lave temperaturer (for eksempel lang lagring om vinteren i et kjøretøy), må den først oppnå romtemperatur før den tas i bruk for å unngå skade.
- Når du bruker bade oljer eller badesalt, må du følge anbefalt dosering. Tilsteningsstoffene kan svekke glidebevegelsen til sakseløftemekanismen.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder eddik for å rengjøre badeheisen.

Informasjon om batteri, lader og håndkontroll:

- Bruk håndkontrollen kun til å betjene personløfteren.
- Personløfteren kan kun brukes med en original håndkontroll fra produsenten Drive DeVilbiss.
- Kast aldri håndkontrollen i et ildsted og ikke oppbevar den i nærheten av ild eller intense varmekilder.
- Håndkontrollen må ikke åpnes. Hvis den åpnes bortfaller garantien.
- Bruk bare den medfølgende laderen for å lade batteriet i håndkontrollen.
- Hvis håndkontrollen er skadet skal den ikke brukes.
- Av sikkerhetshensyn bør laderen kun brukes utenfor badet i tørre områder. Laderen skal bare benyttes til å lade håndkontrollen.
- Batteriet må lades før første gangs bruk, og etter hver gang badeheisen brukes. Hvis det er lengre perioder der badeheisen ikke brukes, bør batteriet lades opp hver tredje måned for å forlenge levetiden.
- Ikke sett inn noen ledende gjenstander (som en strikkepinne, metallnål, osv.) i kontakten på håndkontrollen
- Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før du rengjør laderen.
- Rengjør laderen kun med en ren klut.
- Personløfteren, laderen og batteriet har en solid konstruksjon, men de bør ikke slippes i gulvet. Hvis det er ytre synlige og/eller hørbare skader bør badeheisen ikke brukes. Kontakt din Hjelpemiddelsentral eller Varodd Velferdsteknologi i dette tilfellet. Vi anbefaler å notere kontaktinformasjon i slutten av denne brukerveiledningen!
- For mer informasjon, tekniske detaljer og adresser, les hele brukerveiledningen
- Hvis det oppstår en feil, må du først lese avsnittet «Feilsøking» i vedlegget til brukerveiledningen. Sørg for å følge informasjon og instruksjonene der. For din egen sikkerhet bør du ikke bruke badeheisen før feilen er utbedret.

Viktige sikkerhetsregler

- Sitt alltid midt på personløfteren med ryggen mot ryggstøtten, plasser beina litt fremover og legg den frie hånden enten på kanten av karet eller i fanget. Bruk den andre hånden til å regulere løfteren ned eller opp.
- Ved heving og senking av løfteren må du ikke plassere hendene mellom setekanten og badekaret eller under seteflaten da dette kan føre til skader.

- Personer med alvorlige fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelse må ikke bade uten tilsyn. Badeøkter kan utføres selvstendig hvis helsetilstanden din tillater dette. Ellers kun bade under oppsyn.
- Før du bruker badeheisen må du utføre en testkjøring (kjør den opp og ned og kontroller nødstopp - funksjonen).
- Ved feil eller skade må du ikke fortsette å bruke personløfteren før den er reparert.
- Ikke ta med løse gjenstander (f.eks. børster osv.) inn i badekaret!

EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet

Merk:

Dette produktet oppfyller beskyttelseskravene som er oppført i de europeiske standardene om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, IEC 60601-1-2) (89/336/EEC).

Det kan imidlertid ikke helt utelukkes at forstyrrelser mellom elektriske enheter kan oppstå, spesielt ved bruk av mobiltelefoner. Ikke bruk den badekarmonterte personløfteren i nærheten av elektronisk livsoppholdene utstyr eller medisinske tekniske behandlingshjelpemidler i tilfelle funksjonsfeil.

Under visse forhold kan slikt utstyr forstyrres eller forstyrre funksjonen til personløfteren. Hvis du oppdager funksjonsfeil, fjern personløfteren fra badekaret og informer Varodd Velferdsteknologi eller Hjelpemiddelsnarest mulig.

Montering og bruk

Utpakking

Følgende deler skal medfølge Bellavita badekarmontert personløfter:

- Drivenhet med integrert ryggdel og håndkontroll
- Setedel med sideklaffer
- Lader
- Brukerveiledning
- 4 stk. sugekopper ø75 mm for montering under bunnplaten


Hvis noen deler mangler eller er skadet kontakt din Hjelpemiddelsentral.

Kartongen kan gjenbrukes for transport og lagring av løfteren.

Batteriet må lades før bruk. For å gjøre det følg prosedyren.

Innledende montering i badekaret

1. Monter først de bakre sugekoppene med bevegelige låse plusser i undersiden av bunnplaten (**foto 1**).

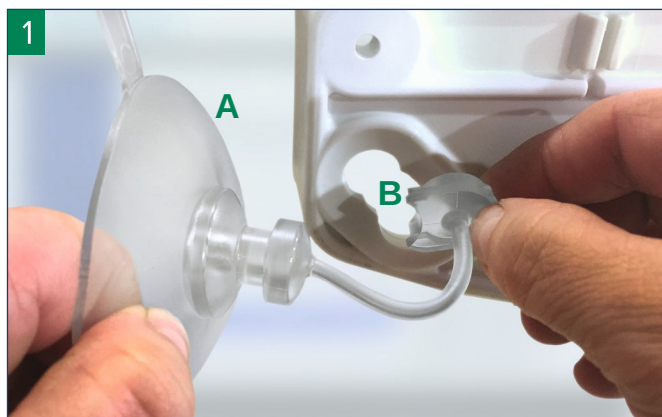

A) Sugekopp | B) Låsepluss

2. Skyv hode på sugekoppen gjennom den lille åpningen ved å rotere den forsiktig på plass. Sørg for at utløsertapp (C) vender bakover (**foto 2**).



C) Utløsertapp

3. Skyv låsepluggen inn i hullet ved siden av sugekopphode til den er i «lås» (**foto 3**).



4. Monter de fremre sugekoppene på samme måte, men nå vendes utløsertappene inn i utsparingen (**foto 4**).




Fest personløfteren til bunnen av karet

Informasjon som må overholdes:

Sugekoppen fester badeheisen til bunnen av badekaret. Sugekoppen må derfor være rene og tørre når badeheisen plasseres i badekaret som også er rent og tørt. Vi anbefaler regelmessig rengjøring av sugekoppene og badekaret med kommersielle rengjøringsmidler for å sikre best mulig grep.

1. Sørg for at bunnen i badekaret er ren og at det ikke er antisklimatter i karet.
2. Plasser seteenheten med sugekoppene montert på bunnplaten i det tomme badekaret slik at de bakre sugekoppene er i begynnelsen av skråningen på bakveggen på badekaret.
3. Monter deretter drivenheten med integrert ryggstøtte, som vist på bilde 5 – 6.



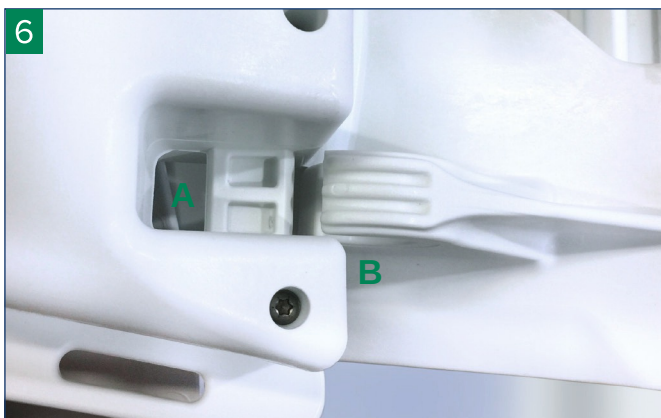


A) Lagring| B) Lås

Viktig! Det er viktig å sikre at begge akslinger er på plass i lagerskålene.

4. Bruk nå den andre hånden til å svinge ryggdelen opp-ved håndtakene (foto 7-8) og flytt den tilbake til ryggdelen stopper på bunnplaten.



C) Håndtak

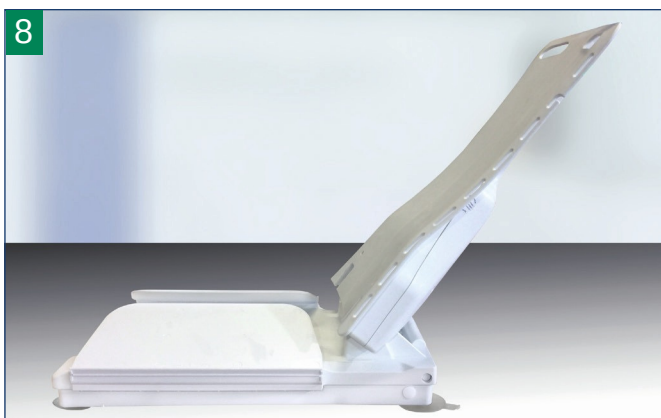

Merk: Hvis badekarets vegg er vertikal bak ryggen, og den derfor kan treffe veggen på karet, må løfteren settes opp utenfor badekaret og reguleres til høyeste posisjon før den plasseres i badekaret. Når den brukes under bading, er det ikke mulig å regulere ryggen i noen tilfeller siden det ikke er nok plass mellom ryggen og veggen på karet

5. Sørg for at løftestangen er riktig plassert i setedelen

Kontroller at den røde låsehendelen er i riktig posisjon (foto 9-10).



Korrekt



Feil

6. 6. Montere håndkontrollen til løfteren. For å gjøre det skyv kontakten på spiralkabelen inn i Jack-pluggen på løfteren til **den røde ringen på kontakten ikke lenger er synlig**. Badeheisen er nå klar til bruk (foto 11).



Sette på/ta av trekk

Trekkene kan enkelt tas på og av etter behov.

For å montere trekket plasserer du det i riktig posisjon på rygg og sete presser festeplugg inn i de respektive hullene (foto 12 - 15).

NB! Sideklaffene har ikke trekk.



Setetrekk



Ryggtrekk



Setetrekk



Ryggtrekk

Den badekarmonterte personløfteren kan også benyttes uten trekk.

For å fjerne trekket trekk de to pluggene ut av hullene med to fingre som vist på bilde over.

Håndkontroll

Kapasiteten til et fulladede batteri er tilstrekkelig for maksimalt 6 badeøkter, avhengig av brukerens vekt. Under badeøkten lyser indikatorlampen på håndkontrollen og er grønn.

Når ladestatusen til batteriet faller til en bestemt verdi, endres fargen på lyset til blinkende gult. Dette er en informasjon om at det nå kan tas kun et bad før den lades. Batteriet lades i henhold til instruksjonene

Hvis bruk av personløfteren fortsetter utover anvisningen over vil det gule lyset endres til blinkende rødt lys. Hvis dette skjer vil løfteren kun beveges seg oppover og dermed sikre at bruker blir løftet opp til badekarkanten.

Batteriet må nå lades umiddelbart i henhold til instruksjonene ved bruk av medfølgende lader.

GRØNT lys: personløfter er klar til bruk.

GULT lys: Løfter delvis i drift med nok strøm til kun én ytterligere badeøkt. Batteriet bør lades.

RØDT lys: Løfteren er ikke klar til bruk, den kan kun bevege seg oppover. Batteriet må lades med en gang.

NØDSTOPP-knapp (rød):

Hvis du noen gang er i en nødssituasjon hvor det er nødvendig å stoppe personløfteren, så trykker du på den røde NØDSTOPP-knappen (**bilde 16**).

For å aktivere badeheisen igjen, trykk på den grønne knappen. Hvis det ikke trykkes på noen knapp, kobler håndkontrollen automatisk ut etter 30 minutter. Hvis du vil slå av badeheisen trykker du på den røde knappen på håndkontrollen (indikatorlampen slukker).



- Ned-knapp (blå)
- Nødstopp-knapp (rød)
- Indikatorlys (LED)
- Opp-knapp (gul)
- Strømknapp (grønn)

Bruk under badeøkt

1. Før badeheisen tas i bruk første gang må du kontrollere at håndkontrollen er korrekt koblet til badeheisen via kontakten. Den er korrekt tilkoblet når den røde ringen på kontakten ikke lenger er synlig (**foto 17**).



2. Trykk på strømknappen (grønn) på håndkontrollen. Indikatorlampen lyser nå grønt.

3. Trykk nå på opp knappen (gul). Ryggdelen beveger seg til en oppreist stilling. Deretter går løfteren opp til øvre posisjon og slår seg automatisk av. Hvis knappen slippes stopper løfteren slik at mellomposisjoner også er mulig.

4. Sving ut sideklaffene slik at de hviler på badekarkanten. Hev personløfteren til sete er på tilsvarende høyde som øvre kant av badekaret og sideklaffene danner en horisontal overflate.

Viktig: Begge sideklaffer må ligge jevnt på badekarkanten.

5. Plasser personen som skal bade på personløfteren.

6. For å senke badeheisen, trykk på ned -knappen (blå). Personløfteren går først til nedre posisjonen. Deretter vinkles ryggen automatisk bakover. I sluttposisjon slår enheten seg av automatisk. Hvis knappen slippes, stopper løfteren slik at mellomposisjoner også er mulig.

Viktig! Når ryggen berører badekarets bakvegg, må du slippe den blå knappen umiddelbart.

7. Etter at badet er avsluttet trykker du på opp-knappen (gul) på håndkontrollen for å bringe løfteren tilbake til riktig høyde. **Sørg for at sideklaffene ikke kommer i klem hvis det er håndtak på badekaret.**

8. Bistå bruker med å komme ut fra badekaret.

Hvis håndkontrollen ikke brukes på 30 minutter, slår den seg automatisk av. Hvis du vil slå av personløfteren selv, trykker du på den røde knappen på håndkontrollen (indikatorlampen slukker).

Merk:

Når du løfter og senker løfteren, lener du deg mot ryggstøtten og legger hendene i fanget.

Hvis løfteren forblir i badekaret, bør håndkontrollen med det integrerte batteriet nå kobles fra og lades. Dette forhindrer at batteriet tappes ved et uhell.

Ta løfteren ut av badekaret


Bruk håndkontrollen til å senke badeheisen helt ned, la ryggdelen vinkles helt tilbake til motoren stopper av seg selv i sluttposisjon (**foto 18**). Sørg for at ryggdelen ikke treffer veggen på badekaret. Deretter må man koble fra håndkontrollen.

1. Fold sideklaffene over setet.
2. Legg ryggdelen fremover. For å holde løfteren, bruk håndtakene øverst på ryggdelen.




3. Sørg for at løftestangen er kjørt helt tilbake (**foto 20**).

NB! Norsk modell har ikke trekk på sideklaffene

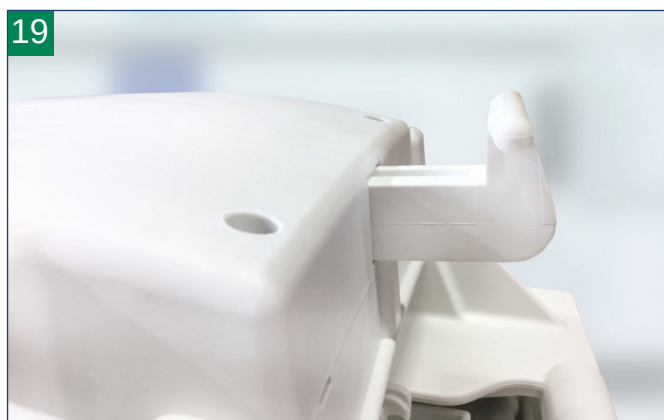

Feil

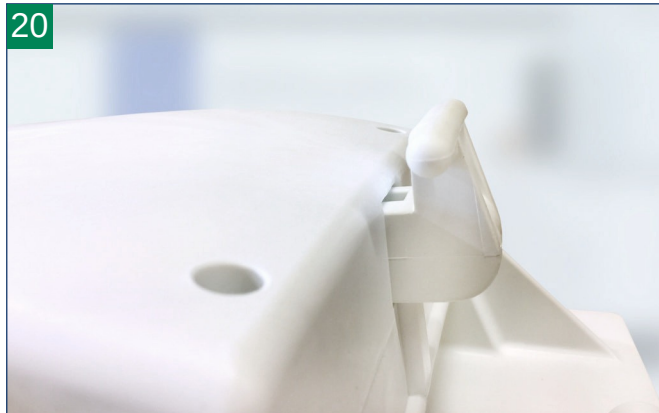

Korrekt

2. Ryggdelen kan nå frigjøres fra seterammen i pilens retning (**foto 21**).

Merk:

Ryggdelen kan bare fjernes i en bestemt vinkel. Den kan derfor ikke fjernes fra seterheten når den er brettet helt frem siden den der låses igjen. Løft ryggdelen til vinkelen som vist på bilde 24, og fjern den deretter fra seterammen i pilens retning.

4. Løsne begge de bakre sugekoppene ved å trekke i utløsertappene. Løft deretter bunnplaten i bakkant, noe som vil føre til at de fremre sugekoppene ventileres og slippes automatisk. Ta nå seterheten ut av badekaret.



Vedlikehold

Vedlikehold av badekarmontert personløfter

Badeheisen er utstyrt med vedlikeholdsfrie bæringer og lager flater. Derfor kreves ingen smøring.

Badeløfteren bør inspiseres periodisk (visuell inspeksjon av brukeren) minst hver 6. måned. Dette inkluderer en visuell inspeksjon spesielt av de bærende delene og sikkerhetsfunksjonene, samt all nødvendig funksjonstesting.

Hvis det periodiske ettersyn avslører feil, slitasje eller andre skader som setter sikkerheten til løfteren i fare, må den tas ut av drift og manglene rettes. Tak kontakt med din Hjelpemiddelsentral eller Varodd Velferdsteknologi hvis løfteren har behov for reparasjon.

Reparasjoner må kun utføres av autorisert personell.

OBS: Håndkontrollen må kun åpnes av produsent!

Rengjøring

Løfteren må rengjøres umiddelbart etter bruk (helst ved å skylle med varmt vann) for å holde personløfteren i best mulig stand. For rengjøring må personløfteren skylles grundig etter hver badeøkt. For rengjøring av løfteren (uten trekk), bruk husholdnings-rengjøringsmidler uten skuremidler, i tillegg til tilgjengelige kommersielt desinfeksjonsmidler.

Pleie av trekk

Materialet i de avtagbare trekkene er hygienisk på grunn av den glatte overflaten og antibakterielle egenskaper.

Trekkene rengjøres regelmessig enten for hånd eller i vaskemaskinen ved 60°C. Bruk et ikke biologisk vaskemiddel uten enzymer. Vær oppmerksom på at badesåpe som inneholder olje du bruker under bading kan forårsake flekker på trekket. Hvis trekkene ikke rengjøres regelmessig, kan de misfarges

Merk: Eventuell misfarging av trekkene dekkes ikke av garantien.

- Trekkene kan enkelt fjernes for vask.
- Trekkene henge-tørkes, må ikke tørkes i tørketrommel.
- I tillegg anbefales det å benytte et desinfeksjonsmiddel.
- Følg produsentens anvisninger!

Montering av nye plugger på trekket

Før den nye pluggen ovenfra gjennom hullet i trekket, som forsterkning settes medfølgende skive på fra undersiden som forsterkning (**foto 22 - 23**).



Vedlikehold

Vedlikehold av laderen

Laderen er vedlikeholdsfri. Huset tørkes av med en lett fuktig klut. På den måten kan du sørge for at det ikke trenger fuktighet inn i laderen. Før du tar den i bruk må du sørge for at laderen er helt tørr. Om nødvendig må laderen plasseres i et tørt og ventilert sted til den er tørr.

Lading før bruk

Lad batteriet helt opp før bruk. Spenningsinformasjonen på laderen må stemme overens med spenningen på strømforsyningen.

Merk:

Før rengjøring må laderen kobles helt ut strømmettet ved å trekke ut støpselet.

Lading av batteri

1. Laderens jackplugg kobles inn i håndkontrollens stikkontakt.
2. Koble laderen til en stikkontakt.
3. Den røde indikatorlampen på håndkontrollen lyser rødt til batteriet er oppladet. Når batteriet er fulladet tennes et grønt lys. Hvis batteriet skal lades fullt opp må du la laderen være tilkoblet strømforsyningen. Laderens kontrollsystem avslutter ladeprosessen etter ca. 4 timer. Det for å unngå overlading av batteriet.
4. Koble laderen fra stikkontakten
5. Trekk laderens kontakt ut av stikkontakten på håndkontrollen.

Viktig informasjon:

Hvis ladeindikatoren ikke lyser etter at du har koblet til håndkontrollen, må du kontrollere følgende punkter:

- Kvaliteten på tilkoblingene (kontakten satt helt inn i ladekontakten).
- Kontroller håndkontroll, spiralkabel med stikkontakt og ladekabel for skader.

Merk: Hvis laderen er skadet må den byttes ut.

Transport / Mobil bruk

Ve **mobil bruk** av løfteren, må du i tillegg huske på følgende:

1. Håndkontrollen må transporteres separat
2. Under transport (for eksempel i et kjøretøy) må du alltid sikre personløfteren fra å skli.
3. Hvis batteriet som er integrert i håndkontrollen blir utsatt for lave temperaturer (for eksempel om vinteren ved lagring i et kjøretøy), la batteriet varmes opp til romtemperatur og lades om nødvendig.
4. Vær oppmerksom på komponentenes totalvekt når du løfter: seteenheden veier ca. 5,5 kg og ryggdelen (uten håndkontroll) veier ca. 3,8 kg.

Transport av løfteren

Sete- og ryggdelen har håndtak og kan enkelt bæres.

**Transport som komplett enhet**

Den badekarmonterte personløfteren kan også transporteres montert.



Tekniske spesifikasjoner

Total lengde	830 mm
Total bredde	700 mm
Setebredde	380 mm
Setedybde	380 mm
Min. setehøyde	65 mm
Maks setehøyde	480 mm
Rygg høyde	640 mm
Rygg bredde	320-360 mm
Rygg regulering	10° - 50°
Base bredde	310 mm
Baselengde	560 mm
Maks brukervekt	140 kg
Totalvekt u/ håndkontroll	9,3 kg
Totalvekt m/ håndkontroll	9,7 kg

Miljøforhold ved bruk


Temperatur	+10° - +50°
Relativ luftfuktighet	10% - 100%
Lufttrykk	700 hPa - 1060 hPa

Miljøforhold ved lagring

Temperatur	-10° - +40°
Relativ luftfuktighet	10% - 100%
Lufttrykk	700 hPa - 1060 hPa

Avfallshåndtering

Avhending av enheter eller deler skal foregå på en måte som ikke skader miljøet og i henhold til nasjonal lovgivning. Kontakt din lokale myndighet for å få opplysninger om, hvor og hvordan man kan avhende utslitt utstyr.

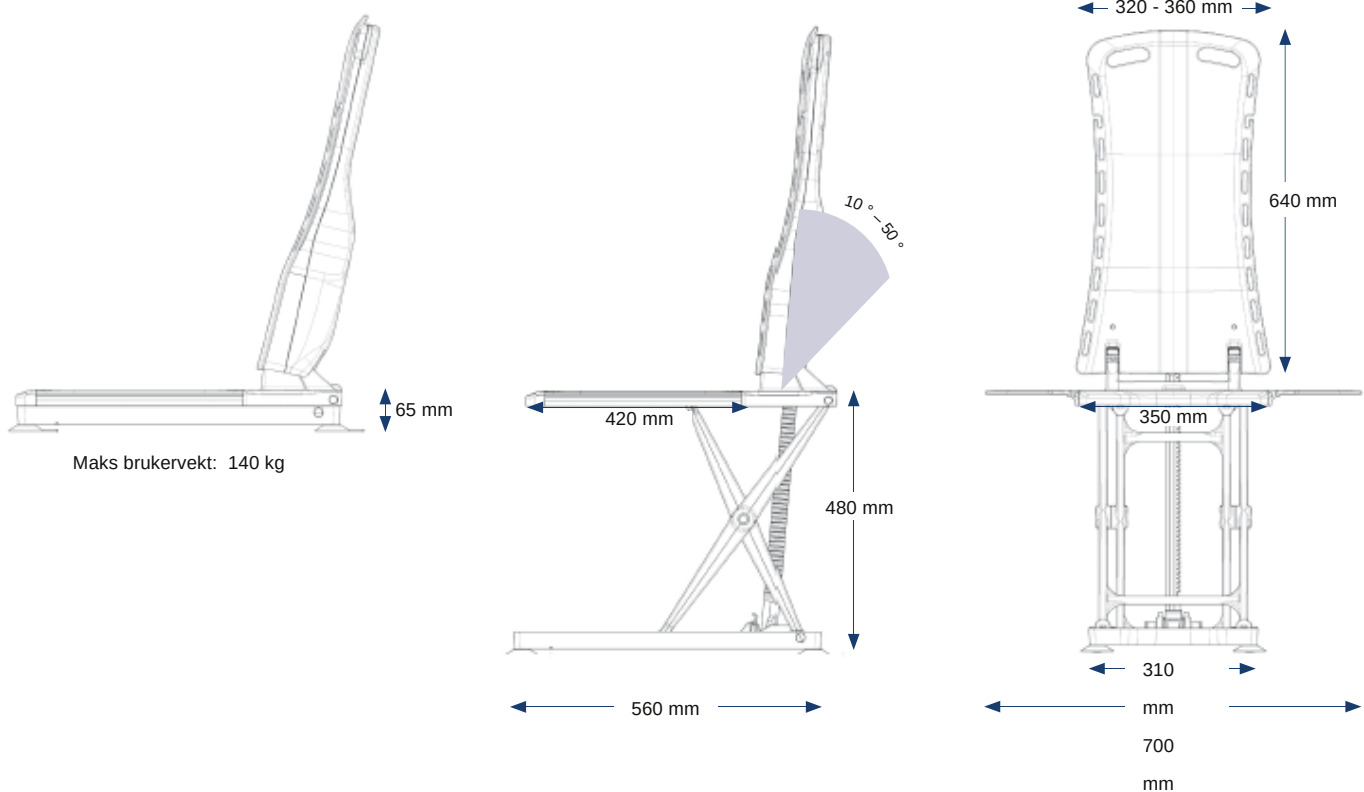

Beskrivelse	HMS nr.:	Art. nr.:
Bellavita badekarmontert personløfter	292406	674000
Dreieskive, rund	292407	674156
Dreieskive, sideveis	292408	674155
Hoftebelte	292409	674158
Brystbelte	292410	674159
Beskytter til sideklaffer	292411	674160
Rensevæske	292412	674162
Sideklaff, 100 mm	292413	674163
Sideklaff, 75 mm	292414	674164
Sideklaff, 55 mm	292415	674165
Drivenhet	292416	674280
Sideklaff (standard)	292417	674281
Bolt 8 mm m/klipper	292418	674282
Bolt lang m/klipper	292419	674283
Bolt 10 mm m/klipper	292420	674284
Låsebolt, løfteaksel	292421	674285
Bolt kort m/klipper	292422	674287
Slide	292423	674288
Bunnplate	292424	674289
Løfteaksel	292425	674290
Sakseløft	292426	674291
Underramme	292427	674292
Håndkontroll m/batteri	292428	674293
Lader	292429	674294
Stopper	292430	674296
Seteplate	292431	674297
Batteri	292432	674298
Trekk	292433	674286
Sugekopp	292434	674299
Plugg	292435	674300

– Vi gjør hverdagen enklere!

Varodd Velferdsteknologi AS

Rigedalen 41 | 4626 Kristiansand | Postboks 8343

38 14 48 00 | hjelpemidler@varodd.no

Org.nr. 919 571 039 | www.hjelpemidler.varodd.no

