

joyvest

Brukermanual



En god klem

Vesten føles som
en klem å ha på

MusicBox

Favorittsangene i
en liten boks

MotionSens

Når brukeren
beveger på seg
spilles musikken

Busenkelt att använda!


Start



Stopp



To knapper

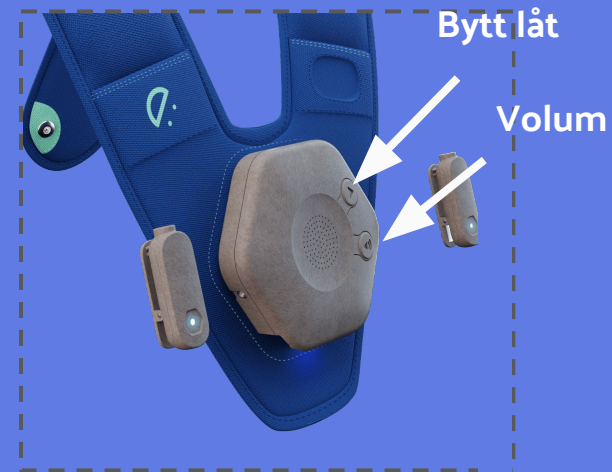

Ta ut en eller begge MotionSens brikkene, fest de på ermer eller ben på brukeren. Trykk på Play eller volumknappen for å starte. Joyvesten kontrolleres av bare to knapper, en for bytte av sang og en for å endre volumet. Om du holder inne volumknappen lengre enn ett trykk, vil den gå i davle.



Nyttig å vite



Du kan vaske Joyvest på 60 grader og den kan også sprites. Husk å ta av musikkboksen før den vaskes.



Batteriet varer i ca. 10 timer. Ved normal bruk tilsvarer dette ofte mer enn 10 dager. Musikkboksen lades med USB kablen som følger med. .



Joyvest kan brukes sammen med hodetelefoner med 3.5 mm AUX plugg.



For å bytte ut musikken i Musikkboksen kan du koble Joyvest til en datamaskin med den medfølgende USB kablen.



“

Flere opplysninger og svar på FAQ finner du på:

<https://www.klubben.no/tips/terapi/joyvest>

Har du spørsmål om Joyvest utover de du finner på vår hjemmeside?

Send en mail til info@klubben.no

Bruk gjerne taggen #joyvest i sosiale medier for å dele din brukeropplevelse av produktet.

”

