

NO

Zitzi
Delfi Pro



Bruksanvisning

Bruksanvisning, monterings-/justeringsinstruksjoner,
service og vedlikehold samt avfallshåndtering



Denne bruksanvisningen refererer til sittesystem Zitzi Delfi Pro med tilbehør. For fullstendig oversikt over tiltenkt tilbehør se produktets bestillingsunderlag.

Innholdsfortegnelse

Produsent	3	Montering av tilleggsfeste på	
Spesialtilpasning	3	hodestøttebrakett	30
Introduksjon	4	Montering av vest	31
Innledning	4	Hoftebelte	32
Korrespondanse - merking	4	Ankelstøtter	33
CE-merking - klassifisering	4	Armstøtte	34
Samsvarserklæring	4	Armstøtte fra rygg	35
Tiltenkt bruk	4	Overarmstøtte	36
Symboler	5	Håndbøyle	37
Produktmerking	6	Bord, fast	38
Sikkerhetsinstruksjoner	7	Bord, utsvingbart	39
Opplæring og kvalifikasjoner	7	Bord, forsterket monteringsbeslag	40
Advarsler/Forholdsregler	8	Støttebord	41
Kontroller før bruk	9	Fotstøtte	42
Begrensninger	9	Delt fotstøtte	43
Gjenværende risiko	10	Fotstøtte, hel justerbar	44
Kombinasjoner	10	Fotstøtte, delt justerbar	45
Avvik/hendelser	10	Fotstøtte, oppfellbar	46
Teknisk data	11	Fotstøtte, fjærende fotstøtteadapter	46
Tilpasning og spesialtilpasning	13	Fotbrett enkelstag	47
Monterings- og justeringsinstruksjoner	14	Fra enkelstag til dobbelstag	48
Montering på understell	15	Leggstøtte	49
Adaptersystem	16	Aktivitetsbøyle	50
Planskive	17	Kjørebøyle	51
Justering av sittedel	17	Kalesje	51
Montering/demontering av rygg	20	Korsryggstøtte/Korsryggstøtte med pumpe	52
Justering av ryggvinkel	21	Varmepakke	52
Justering av rygghøyde	22	Oppsummering og oppfølging	53
Lås- og justerbar flexfunksjon (MLD)	22	Transport i kjøretøy	54
Forsterket rygg	23	Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner	55
Justerbare sidestøtter	24	Kontroller før bruk	55
Utsvingbare sidestøtter	25	Service og utbedrende vedlikehold	56
Bekkenstøtte	26	Resirkulering	57
Hoftestøtte	27	Avfallshåndtering	60
Hodestøtte	28	Garanti og retur	61
Sidejusterbart hodestøttefeste	28	Revisjon	62
Nedfellbart hodestøttefeste	29		

Produsent

Produktet er produsert av Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postadresse	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøksadresse	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-post	info@anatomicsitt.com
Nettside	anatomicsitt.com
Instruksjonsfilmer	youtube.com/anatomicsitt
Følg oss på	facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Spesialtilpasning



Kryss av i ruten ved eventuell spesialtilpasning av produktet.

CE-merkingen slutter å gjelde for spesialtilpassede produkter.



Introduksjon

Innledning

Gratulerer med valg av hjelpemiddel. Vi håper du vil få stor glede av å bruke dette produktet. For at du skal få mest ut av produktet på en trygg og sikker måte, er det viktig at du leser denne bruksanvisningen nøye. Dette gjelder alle personer i brukerens nærhet.

Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Nye utgaver kan lastes ned fra vår hjemmeside: www.anatomicsitt.com. Revisjon er på forsiden sammen med datoen.

Korrespondanse - merking

På produktetiketten finnes produktets artikkelnummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numrene skal angis ved korrespondanse med Anatomic Sitt angående produktene. Du finner serienummeret på baksiden av sitteplaten.

CE-merking - klassifisering

Hjelpemiddelet med dets tilbehør er et CE-merket medisinteknisk produkt, klasse I i henhold til klassifiseringsreglene i vedlegg VIII (EU) 2017/745.

Samsvarserklæring

Produktet oppfyller kravet for medisintekniske produkter i henhold til forordning (EU) 2017/745 om medisintekniske produkter. Se aktuell EU-samsvarserklæring om overrenstemmelse for produktvarianter og tilbehør, se www.anatomicsitt.com/dokument

Tiltenkt bruk

Zitzi Delfi er et modulært dynamisk sittesystem for barn og ungdommer med sitteproblemer hvor sete- og ryggstøtten har flere instillingsmuligheter og kan utstyres med diverse tilbehør for å oppnå en bestemt sittestilling. Sittesystemet er ment å brukes med understell. Zitzi Delfi er et gjenbrukbart produkt.

Symboler

	<p>Dette symbolet finnes i bruksanvisningen og gjør leseren oppmerksom på f.eks viktig sikkerhetsinformasjon m.m.</p>	 <p>Angir batchnummeret til produksjonen slik at batch kan identifiseres.</p>
	<p>Dette symbolet indikerer eventuell klemfare.</p>	 <p>Angir at produktet er et medisinteknisk produkt.</p>
	<p>Instruksjoner og tips som forenkler bruken av produktet.</p>	 <p>Angir produsentens referansenummer/ artikkelnummer slik at det medisintekniske produktet kan identifiseres.</p>
 <p>www.anatomicsitt.com</p>	<p>Angir at bruksanvisningen alltid bør leses før bruk. Nettadresse indikerer hvor dokumentet befinner seg elektronisk.</p>	 <p>Angir produsentens serienummer slik at et spesifikt medisinteknisk produkt kan identifiseres.</p>
	<p>Angir at bruksanvisningen må leses for å få viktig sikkerhetsinformasjon om f.eks advarsler som ikke finnes på det medisintekniske produktets etikett.</p>	 <p>Unik produktidentifikator som muliggjør entydig identifikasjon av spesifikke medisintekniske produkter.</p>
	<p>Angir produsenten av det medisintekniske produktet iht. definisjon i (EU) MDR 2017/745. Kan også brukes sammen med produksjonsdato.</p>	 <p>Indikerer at produktet er CE-merket i henhold til gjeldende EU-direktiver.</p>
	<p>Angir datoen da det medisintekniske produktet ble produsert.</p>	

Produktmerkning

Etikett på hovedprodukt

The label for the main product, Zitzi Delfi Pro str. 2 (Uten rygg), contains the following information:

- MD** Zitzi Delfi Pro str. 2 (Uten rygg)
Zitzi Delfi Pro size 2 (without back)
- REF** 285002 | 2023-11-15 | **SN** 61224
- Barcode: 7 322472 850024
- Maxlast 90 kg
- Anatomic Sitt i Norrköping AB
Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping
- www.anatomicsitt.com
- UDI (UDI=GTIN+(21)SN) (01)7322472850024(21)61224

Annotations with red arrows point to:

- Produktnavn
- Strekkode (EAN-13 eller REF samt SN)
- Maks. belastningsvekt
- UDI-transportør: QR-kode (GS1-128)
- UDI= GS1-128

Etikett på tilbehør

The label for the accessory, Armstøtte str. 1 kpl. sittedel L230mm (par) - Delfi Pro, contains the following information:

- MD** Armstøtte str. 1 kpl. sittedel L230mm (par) - Delfi Pro
Armrest size 1, cpl.
- REF** 285061 | 2023-10-30 | **LOT** FM712889
- Barcode: 7 322472 850611
- Barcode: FM712889
- Anatomic Sitt i Norrköping AB
Terminalgatan 1, SE 603 61 Norrköping
- www.anatomicsitt.com
- UDI (UDI=GTIN+(10)LOT) (01)7322472850611(10)FM712889

Annotations with red arrows point to:

- Produktnavn
- Strekkode (EAN-13 eller REF samt LOT)
- UDI-transportør: QR-kode (GS1-128)
- UDI= GS1-128

Sikkerhetsinstruksjoner

Opplæring og kvalifikasjoner

- Montering, service og resirkulering skal alltid utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Vedtak om tilpasning/spesialtilpasning skal gjøres av kompetent medisinsk personell og utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Innstillinger, justeringer samt utprøving av hjelpemiddelet skal alltid utføres av kvalifisert medisinsk personell (fagperson på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Hjelpemiddelets forskriver eller person med tilsvarende kompetanse og kunnskap om bruker og hjelpemiddel skal alltid være til stede for å prøve ut produktet og foreta en risikovurdering før førstegangsbruk.

Advarsler/Forholdsregler

-  Les alltid bruksanvisningen før bruk.
-  Innstillinger skal kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Det er kun tillatt å gjøre innstillinger på den måten som beskrives i denne bruksanvisningen.
-  Sjekk produktets funksjonalitet før det leveres ut til bruker.
-  Den som foreskriver hjelpemiddelet er ansvarlig for å instruere brukeren og/eller andre personer i dets nærmiljø hvordan produktet anvendes på en sikker måte. Funksjonskontroller alltid produktet før bruk.
-  Hjelpemiddelets forskriver eller person med tilsvarende kompetanse og kunnskap om brukeren skal balansere det valgte setet for å sikre at eventuell tipperisiko utelukkes.
-  Justeringer skal kun utføres slik som beskrevet i denne bruksanvisningen.
-  Etter all monterings- justerings eller servicearbeid skal alle festeskruer og muttere kontrolleres og strammes.
-  Sørg alltid for at sittesystemet sitter ordentlig fast i understellet før brukeren plasseres i sittesystemet! En sikkerhetsstropp leveres med setet med hensikt å strammes fra setets ryggprofil og rundt understellets kjørebøyle. Denne sikkerhetsstroppen må alltid brukes ved transport i kjøretøy. Sørg for at denne stroppen er stabil og stram.
-  Bruk aldri fotplaten ved inn- og utstigning fra hjelpemiddelet.
-  Overbelast aldri hjelpemiddelet, se avsnitt "Begrensninger for gjeldende maksimal belastning".
-  Vær oppmerksom på at dersom brukeren tar tak i gjenstander utenfor hjelpemiddelet eller lener seg for langt ut fra hjelpemiddelet, kan det oppstå en forskyvning av tyngdepunktet som kan føre til økt risiko for å velte.
-  Løft alltid i understellet - aldri i sitteenheten.
-  Utfør aldri service mens produktet brukes.
-  La aldri brukeren være uten tilsyn når hjelpemiddelet er i bruk.
-  Sjekk alltid brukeren for rødhet eller trykkmerker etter bruk av hjelpemiddelet.

Kontroller før bruk

Inspeksjon og kontroll skal utføres før hver bruk i henhold til punktene nedenfor:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader. Sjekk spesielt skruer og muttere, samt grep.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, som ryggvinkel for mobilitet og låsing.
- Kontroller belter og seler for slitasje, funksjon og feste.

Dersom det oppdages feil og mangler, ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp.

Begrensninger

Maks. vekt

Den høyeste belastningsvekten er 90 kg og gjelder for samtlige størrelser. Med belastningsvekt menes den maksimale vekt som sittesystemet kan utsettes for, for eksempel bruker og evt. annen vekt. Maks. belastningsvekt for transport i kjøretøy er 75 kg.

Levetid

Forventet levetid for produktet er 5 år ved normal bruk i henhold til produktets tiltenkte bruk, forutsatt at instruksjonene i denne bruksanvisningen følges. Den faktiske levetiden varierer imidlertid avhengig av hvor ofte og intensivt produktet brukes, men det anbefales å ikke overstige 10 år.

Gassfjærer

Om produktet skal lagres over en lengre periode, vurder følgende: Gassfjærer bør brukes regelmessig for å opprettholde sin funksjon. Når produktet ikke brukes må gassfjæren aktiveres minst en gang hver 6. måned. I tillegg bør de lagres på en slik måte at gassfjærstangen er rettet nedover, ellers kan gassfjærens forsegling gå i stykker og den slutter å fungere.

Gjenværende risiko

Vær oppmerksom på at produktet og dets tilbehør er riktig innstilt slik at brukeren ikke opplever ubehag eller får skader under bruk. Hvis dette skjer, foreta justeringer eller installer passende tilbehør.

Kombinasjoner

For å opprettholde CE-merkingen på en sikker måte må hjelpemiddelet brukes sammen med produkter, tilbehør og reservedeler levert av Anatomic Sitt AB. Se produktets bestillingsskjema for mulige tilbehør og reservedeler.

Produktet kan imidlertid utstyres med CE-merkede belter/seler og hodestøtter/nakkestøtter fra andre leverandører med CE-merking dersom punktene nedenfor er oppfylt:

- Det skal fremgå klart av tredjeparts dokumentasjon at kombinasjonen er mulig og godkjent (at tredjeparts produkt er ment å brukes på manuelle rullestoller eller sittesystemer og at tredjeparten godkjenner bruk på andres sittesystemer).
- At sittesystemets originale festepunkter benyttes og at belter/seler hodestøtter/nakkestøtter er festet til festene på dette sittesystemet fra Anatomic Sitt AB. Festene må passe til gjeldende tredjepartsprodukt. Ingen innvirkning/justering kan gjøres på noen av produktene for å muliggjøre kombinasjonen.
- Monteringsanvisning for hodestøtter og belter/seler fra Anatomic Sitt AB skal følges og finnes under avsnittet "Monterings- og justeringsinstruksjoner" senere i denne dokumentasjonen. Ingen andre produkter eller tilbehør kan derfor kobles til tredjepartsproduktet.

Merk at det alltid skal gjennomføres en risikovurdering når produkter fra ulike leverandører kombineres. Produktet må aldri bli farlig for brukeren eller personer i nærheten.

Avvik/hendelser


Ved funksjonsfeil, kontakt hjelpemiddelsentral eller forhandler/produsent.

Dersom det inntreffer en hendelse som kunne ha ført til alvorlig skade, må det rapporteres til Anatomic Sitt AB og landets kompetente myndighet. Produktet skal også sendes til Anatomic Sitt i nåværende tilstand for videre undersøkelse.

Teknisk data

DELFI PRO / DELFI PRO +

Artikkelnr: 2840XX-serien

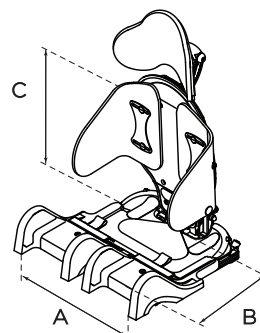

Zitzi Delfi Pro	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
Brukerlengde, ca cm:	60 - 100	90 - 130	120 - 160	140 - 170
Setebredde (A) cm:	24, 27, 30	28, 31, 34	32, 35, 38	32, 35, 38
Setedybde (B) cm:	17 - 26*	24 - 33	31 - 40	36 - 45
Akselhøyde (C) cm:	17 - 27	24 - 34	30 - 40	30 - 40
Brukervekt samtlige størrrelser: maks. 90 kg				
Ryggvinkel samtlige størrrelser: - 10° til + 30°				* Setedybde 14-26 i kombinasjon med rygg str. 0

SITTEDEL

Windswept

Windswept:
Windswept mulighet 9°

Abduksjon/Adduksjon

Abduksjon:
Samtlige størrrelser 0° til +18°
Adduksjon:
Samtlige størrrelser 0° til -9°

Benlengde

FOTSTØTTE

	A x B
Hel str. 0	310 x 255 mm
Hel str. 1	315 x 195 mm
Hel str. 2	345 x 225 mm
Hel str. 3	380 x 260 mm
Hel str. 4	380 x 300 mm
Helt justerbar str. 1	155 x 190 mm
Helt justerbar str. 2	160 x 220 mm
Helt justerbar str. 3	180 x 255 mm
Delt str. 1	155 x 190 mm
Delt str. 2	160 x 220 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm
Delt justerbar str. 1	155 x 190 mm
Delt justerbar str. 2	160 x 220 mm
Delt justerbar str. 3	180 x 255 mm

Fotstøtte størrelse	0-1	2	3	4
Fotstøttesstag profilengde (cm)	25	30	35	35
Lenge innfestning taggledd (mm)	30	30	80	150

HODESTØTTE

20 - 160 mm

Delfi 120 mm
Sharky 200 mm

Hodestøtte	A x B
str. 1	220 x 150 mm
str. 1 lang	280 x 160 mm
str. 2	240 x 190 mm
str. 2 lang	280 x 210 mm

BORD

Bord	MÅL			
	A	B	C	D
Str. 1	480 x 450	240 x 250		
Str. 2	540 x 515	260 x 290		
Str. 3	570 x 570	280 x 340		

STØTTEBORD

Støttebord	MÅL			
	A	B	C	D
Str. 1	380 x 450	230 x 260		
Str. 2	430 x 510	260 x 300		
Str. 3	490 x 580	300 x 340		
Str. 4	540 x 640	330 x 380		
Str. 5	600 x 710	360 x 420		

FOTBRETT


Fotbrett str.1 passer til fotstøtte str. 1 osv.

A (høyde fra fotplate)	
str. 1	180 mm
str. 2	180 mm
str. 3	210 mm
str. 4	240 mm

TEKNISK DATA - DELFI PRO / DELFI PRO +

JUSTERBAR RYGG

Alle mål er målt med polster

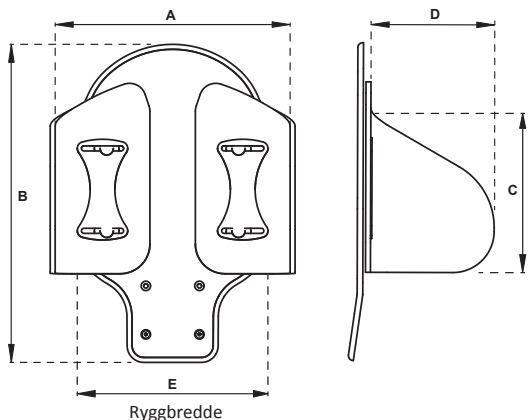

	str. 0	str. 1	str. 2	str. 3-4
Ryggprofilens lengde:	33	36	45	52 cm

RYGG målt i cm

	B x E
Rygg str. 0	31 x 21 cm
Rygg str. 1	34 x 21 cm
Rygg str. 2	39 x 26 cm
Rygg str. 3	45 x 29 cm

SIDESTØTTE målt i cm

	C x D
Sidestøtte str. 0	16 x 12 cm
Sidestøtte str. 1	20 x 13 cm
Sidestøtte str. 2	23 x 15 cm
Sidestøtte str. 3	25 x 18 cm

SIDESTØTTE BREDEJUSTERING (A) cm inkl. polster

	Rygg 0	Rygg 1	Rygg 2	Rygg 3
Sidestøtte 0	17 - 26	17 - 26	19 - 28	21 - 30*
Sidestøtte 1	17 - 26	17 - 26	19 - 28	21 - 30*
Sidestøtte 2	19 - 28	19 - 28	21 - 30	23 - 30*
Sidestøtte 3	19 - 28*	19 - 28*	21 - 30*	23 - 32


Grå ruter er standardkonfigurasjon *

Ikke optimal høydejustering.

HÅNDBØYLE

	A
Str. 1	305 mm
Str. 2	345 mm
Str. 3	425 mm
Str. 4	480 mm
Str. 5	520 mm

Mål mellom rørsentrum

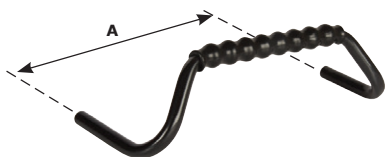


OVERARMSTØTTE


Mål pute*	A	B
Str. 0-1	85 mm	100 mm
Str. 2-4	125 mm	150 mm

Puten kan dreies 90 grader ved montering.

* for mål med polstring + 20 mm

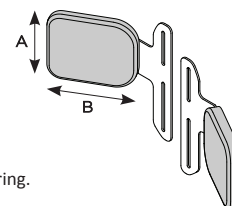



ARMSTØTTE FRA RYGG

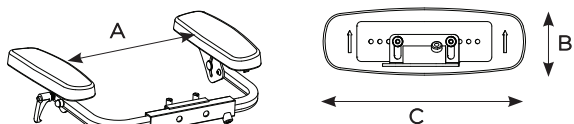

Mål	A	B	C
Str. 1	240 - 340 mm	75 mm	230 mm
Str. 2	280 - 440 mm	75 mm	230 mm
Str. 3	280 - 440 mm	75 mm	330 mm

HOFTESTØTTE

Mål:	A x B
Str. 1	160 x 130 mm
Str. 1 rakt	160 x 125
Str. 2	175 x 160
Str. 2 rakt	175 x 150

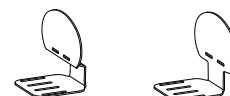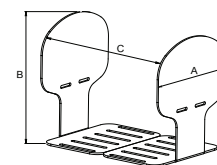

Mål i cm	Sete- størrelse bredde	Hoftestøtte bredde- justering C	Hoftestøtte rakt bredde- justering C
Delfi 0/1	24	19 - 29	25 - 35
Delfi 0/1	27	22 - 32	28 - 38
Delfi 0/1	30	25 - 35	31 - 41
Delfi 2	28	19 - 29	27 - 35
Delfi 2	31	22 - 32	30 - 38
Delfi 2	34	25 - 35	33 - 41
Delfi 3/4	32	19 - 29	28 - 35
Delfi 3/4	35	22 - 32	31 - 38
Delfi 3/4	38	25 - 35	34 - 41

ARMSTØTTE FRA SETE



	A x B
Str. 1	230 x 75 mm
Str. 2	230 x 75 mm
Str. 3	230 x 75 mm
Str. 4	330 x 75 mm

	C
Str. 1	140 - 205 mm
Str. 2	140 - 205 mm
Str. 3	190 - 280 mm
Str. 4	190 - 280 mm

C målt fra toppen av sittedelen til armstøttens topp


Bredde mellom armstøttetagen D

Str. 0/1	250 - 390 mm
Str. 2	300 - 440 mm
Str. 3/4	300 - 440 mm

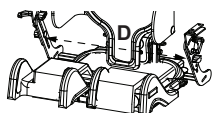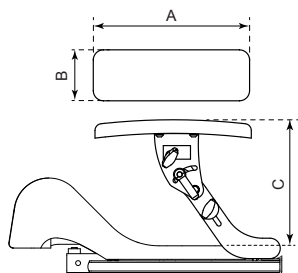

BEKKENSTØTTE

	A x B
Str. 1	150 x 70 mm
Str. 2	200 x 100 mm

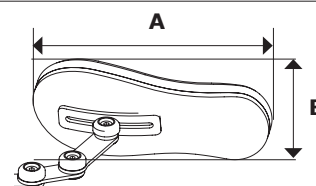

Tilpasning og spesialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet endres på noe vis må en vurdering gjøres på om det er en tilpasning eller spesialtilpasning.

En tilpasning er en endring som gjøres innenfor rammene for produktets CE-merking. Alt annet er spesialtilpasning. Tilpasninger kan kun gjøres av en kvalifisert fagperson og skal alltid utføres på en profesjonell måte.

Tillatte tilpasninger innenfor rammen av CE-merking

Lengden på fotstøtteprofilen kan forkortes for å passe brukeren bedre.

Lengden på ryggprofilen kan forkortes. Profilen må aldri være kortere enn at samtlige fester til ryggplaten kan monteres på denne.

Risikoanalyse


Merk at en risikoanalyse alltid skal gjøres, både ved tilpasning og ved spesialtilpasning av et hjelpemiddel. Produktet må aldri være farlig for brukeren eller personer i dets nærhet, til bruk etter tilpasning.

Merking

Ved merking skal det fremkomme om at det er en tilpasning til en spesifikk bruker, slik at det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Monterings- og justeringsinstruksjoner

Montering skal alltid utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddel-sentral eller tilsvarande). Instruer brukeren og/eller andre personer i dets nærmiljø om produktets funksjoner for at hjelpemiddelet skal kunne brukes på en sikker måte.

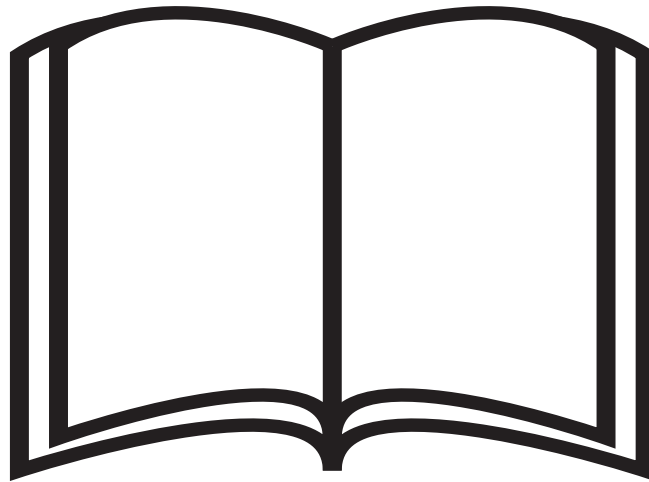

Verktøy

Verktøysnøkkelen du behøver for å gjøre justeringer er integrert i toppen av ryggprofilen som du finner på baksiden av stolen. (4 mm unbrakonøkkel)



 = Justeringsnøkkel 

Montering på understell



Montering av festeplate

Monter festeplaten med de medfølgende skruene, skivene og låsemutterne på understellets festeplate.

Montering av Delfi Pro

Sittesystemet monteres enkelt og sikkert på understellet ved hjelp av en festeplate. Festeplaten er utstyrt med 2 styrepinner som gjør at sittesystemet sitter på plass, samt et grep under for å opprettholde sittesystemets posisjon.

Sett inn sittesystemet som vist på bildet. Skyv deretter sittesystemet bakover til det stopper og du hører et klikk. Stram deretter håndskruen med klokken under sitteplaten for å feste sittesystemets posisjon.

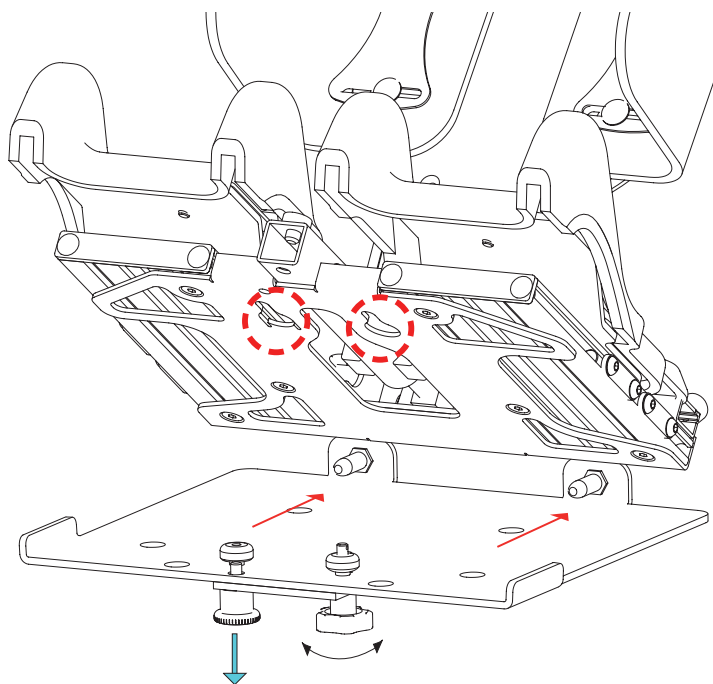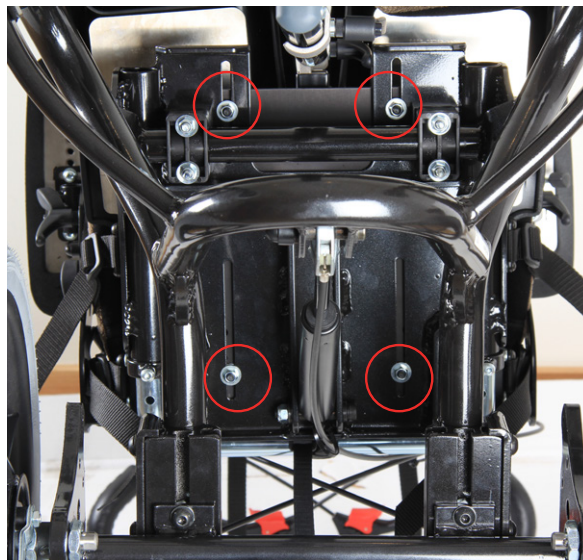

Hullbilde

Draretning

Dra nedover for å åpne

Håndskruer



Pass på at låsen klikker på plass og at du har strammet håndskruen!


Adaptersystem

Montering av adaptersystem

Begynn med å montere bunnplaten (A) på bunnen ved å skru den fast med de medfølgende skruene, skivene og mutrene (B).

Monter deretter adapterplaten (C) ved å skyve tønnemutrene (D) inn i sporene på undersiden av sittesystemet. Stram til skruene (E) når ønsket posisjon er nådd.

Når adapterplate og bunnplate er montert på sittesystemet og understellet, kan disse kombineres. Sittesystemet er riktig festet når en klikklyd høres.

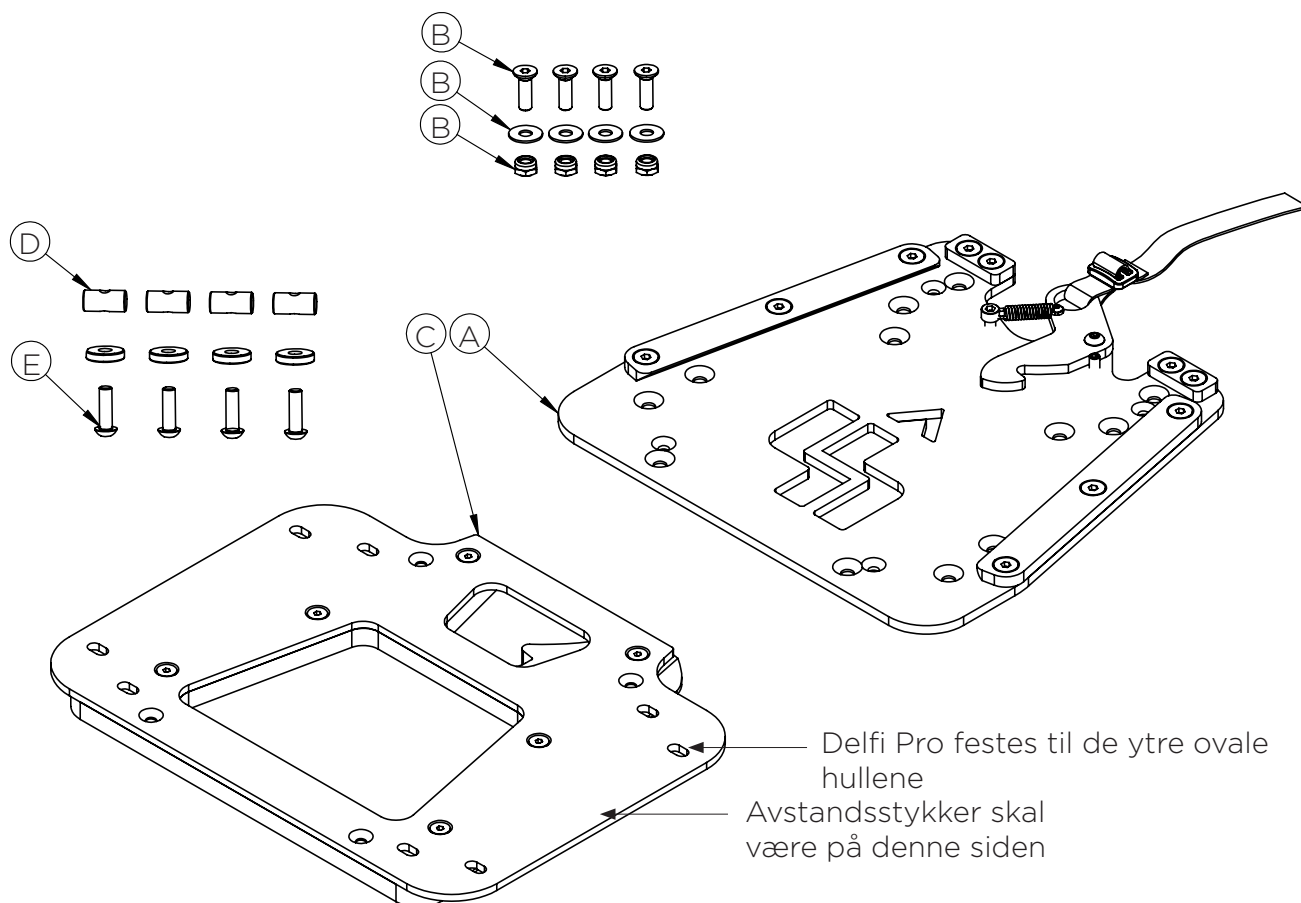

Pass på at sittesystemet er godt festet til understellet før bruk.




Ved bruk av Adaptersystem Pro (153047) skal sikkerhetsstroppen på baksiden av sittesystemet alltid brukes og strammes rundt kjørebøylen eller tilsvarende på understellet (se bilde). Pass på at stroppen er stram og festet slik at den ikke kan skli av.




Planskive

Skru sammen skrue, plate, avstandsstykke og tønnemutteren. Skyv alle 4 tønnemutrene inn i profilen som vist, og stram deretter skruene godt.

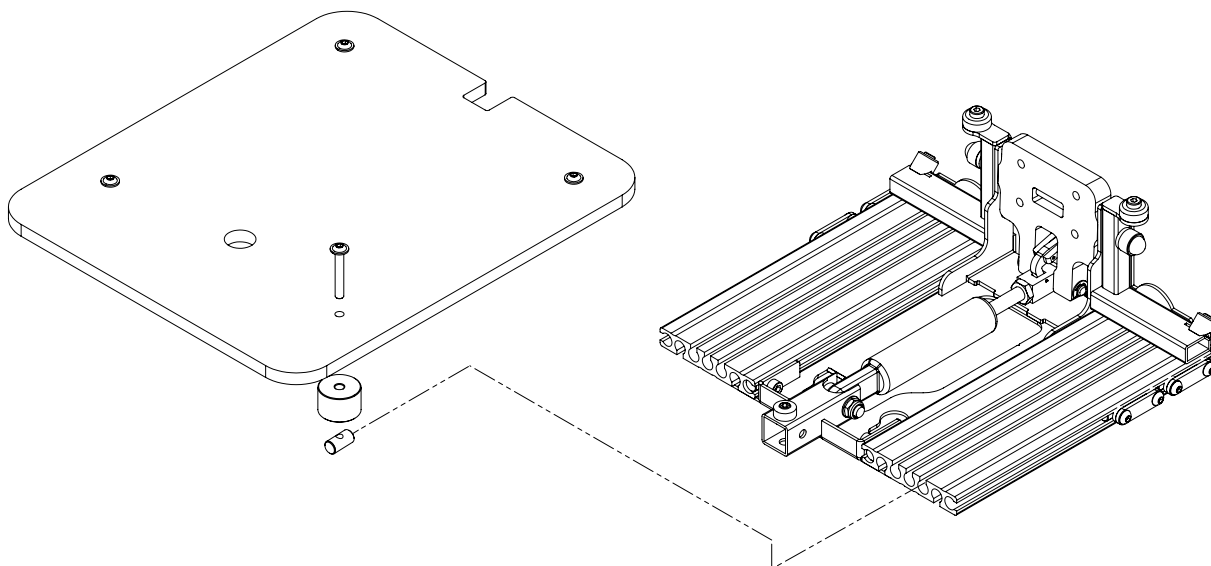

Justering av sittedel


Sittedybde, benlengdeforskjell og eventuell abduksjon/adduksjon av bena justeres enkelt. Fjern setepolsteret og åpne dekselet for å få tilgang til justeringsskruene. Merk at du ikke skal skru skruen helt ut, det er nok å løsne den.

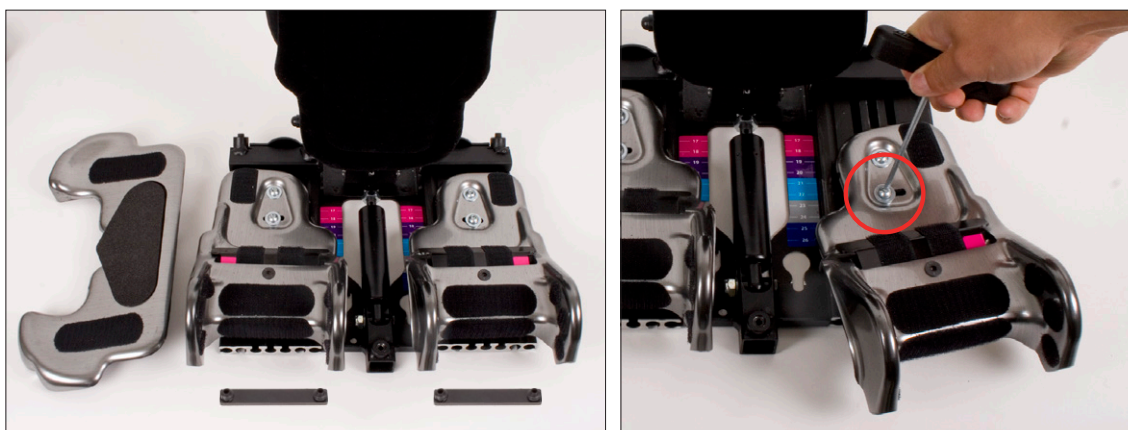

Sittebreddejustering



For maksimal sittebredde setter du tønnemutteren i spor 3, og for minimum sittebredde setter du tønnemutteren i spor 1. Bendelerne leveres grunninnstilt i spor 1,

1. Løsne den fremre skruen på bendeleren ved hjelp av justeringsnøkkelen.
2. Flytt bendeleren til ønsket spor og posisjon for en bredere sittebredde.
3. Stram skruene når du har nådd ønsket posisjon.

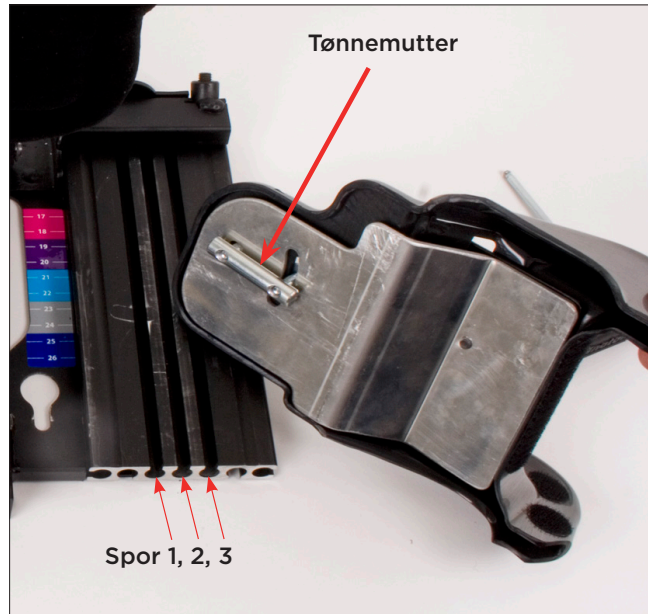

Benlengdeforskjell/sittedybde



Løsne den fremre skruen (A) på setefronten med justeringsnøkkelen. Trekk setefronten til ønsket posisjon og stram skruen.

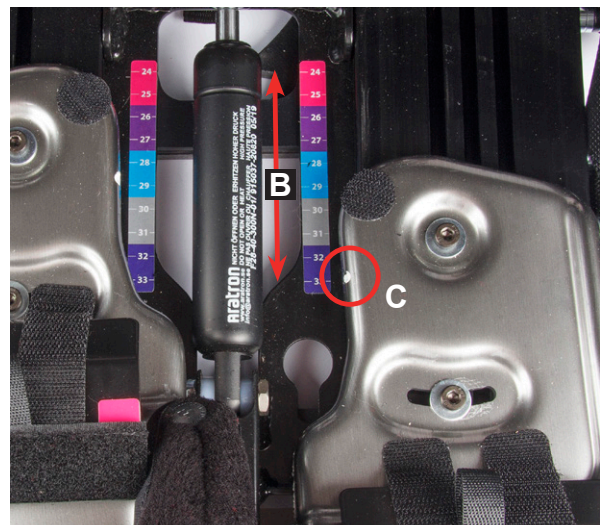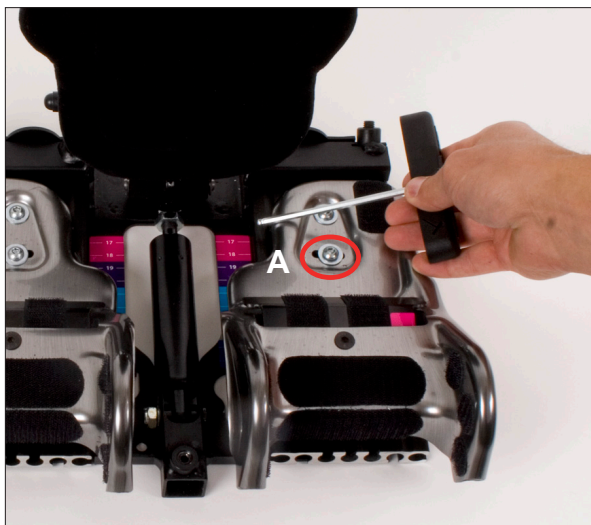

Pass på at du ikke justerer setet utenfor det godkjente justeringsområdet (B). Spor (C) markerer maksimal justering (se bilde).


Sittegropsjustering

Ved justering av sittedybde bør også sittegropsjustering inkluderes. For eksempel om sittedybden er justert til 23 cm (grått felt), bør også sittegropsjusteringen skyves ut til det grå feltet for å opprettholde størrelsen på sittegropen, for å få en riktig sittestilling. Løsne skruen til bendeleren (D) med justeringsnøkkelen. Dra sittegropen til ønsket posisjon. Stram skruen.

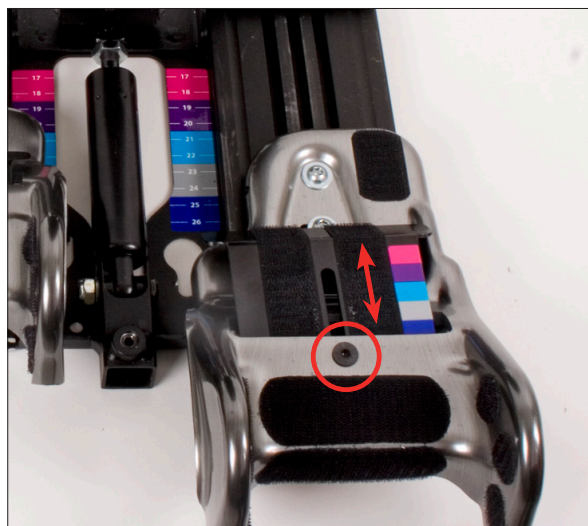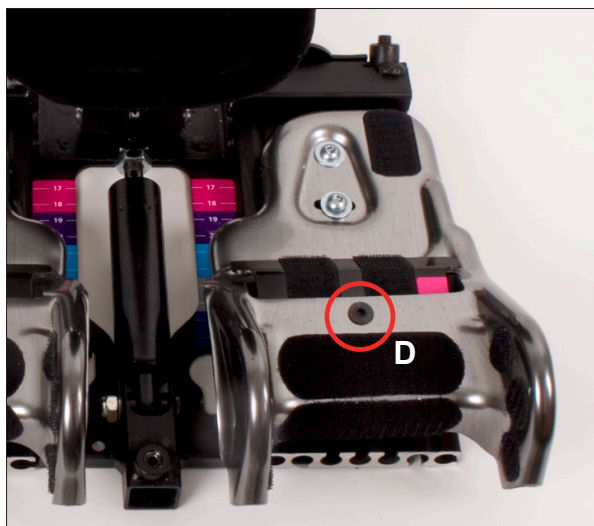

Abduksjon og adduksjon

Løsne den fremre skruen på bendeleren med justeringsnøkkelen. Flytt bendeleren til ønsket posisjon og stram skruen når du har nådd ønsket posisjon.

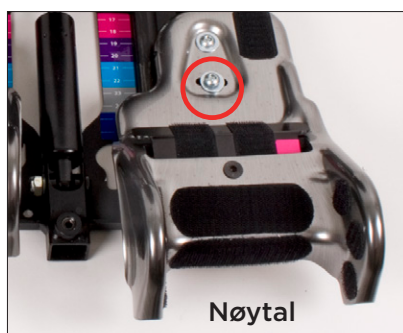

Montering/demontering av rygg

Ryggens innfestning består av 4 skruer. Skyv ryggprofilen ned i tønnemutrene og stram de fire medfølgende skruene (merket rødt på bildet).


Ryggen havner automatisk i riktig posisjon ved hjelp av stopperen i ryggprofilen.



Obs! Ved høy brukertonus bør forsterket rygg benyttes.




Justering av ryggvinkel

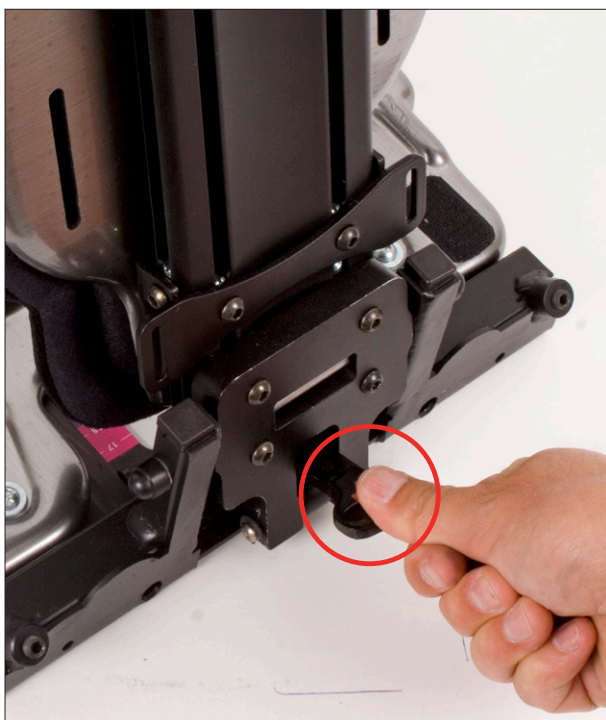

Sett først låsespaken i aktiveringsmodus ved å trekke den rett ut og deretter opp. For å justere vinkelen på ryggstøtten trykker du låsespaken nedover, deretter frigjøres ryggstøtten slik at du kan stille den i ønsket posisjon. Når du har nådd ønsket vinkel, slipper du spaken igjen.



Det er svært viktig at spaken plasseres i barne-sikringsposisjon, pekende nedover, etter justering av ryggvinkelen.

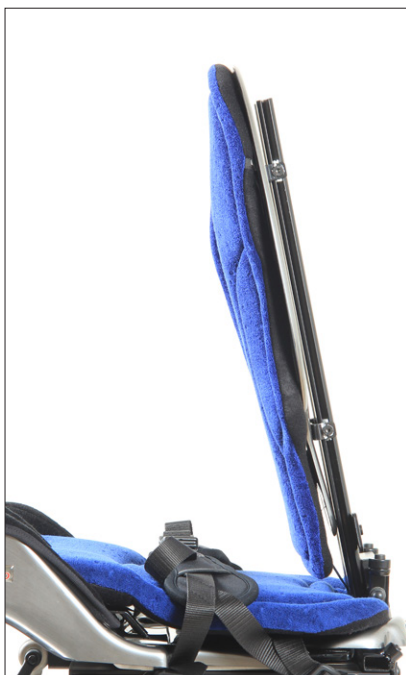

Justering av ryggghøyde



- Løsne skruene iht. (A) på begge sider av ryggprofilen (2 på hver side).
- Juster høyden.
- Stram skruene.


Plasser ryggen slik at du bruker ryggens integrerte korsryggstøtte!



Lås- og justerbar flexfunksjon (på sittedel MLD - Delfi+)


Vri skruen med klokken (A) for å låse flex-funksjonen i ryggen og få den fast.

For å aktivere flex-funksjonen skrur du skruen mot klokken (B), du kan også stille inn hvor langt ryggen skal bevege seg avhengig av hvor langt skruen er skrudd ut.

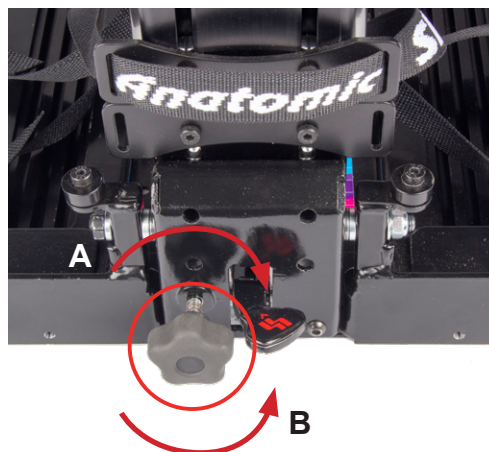

Forsterket rygg

Forsterkningsplaten festes til bakplaten ved hjelp av dobbelsidig tape. Pass på at alle spor og hull vender mot hverandre. Platen holdes deretter på plass via boltene som fester sidestøtten i sporene.

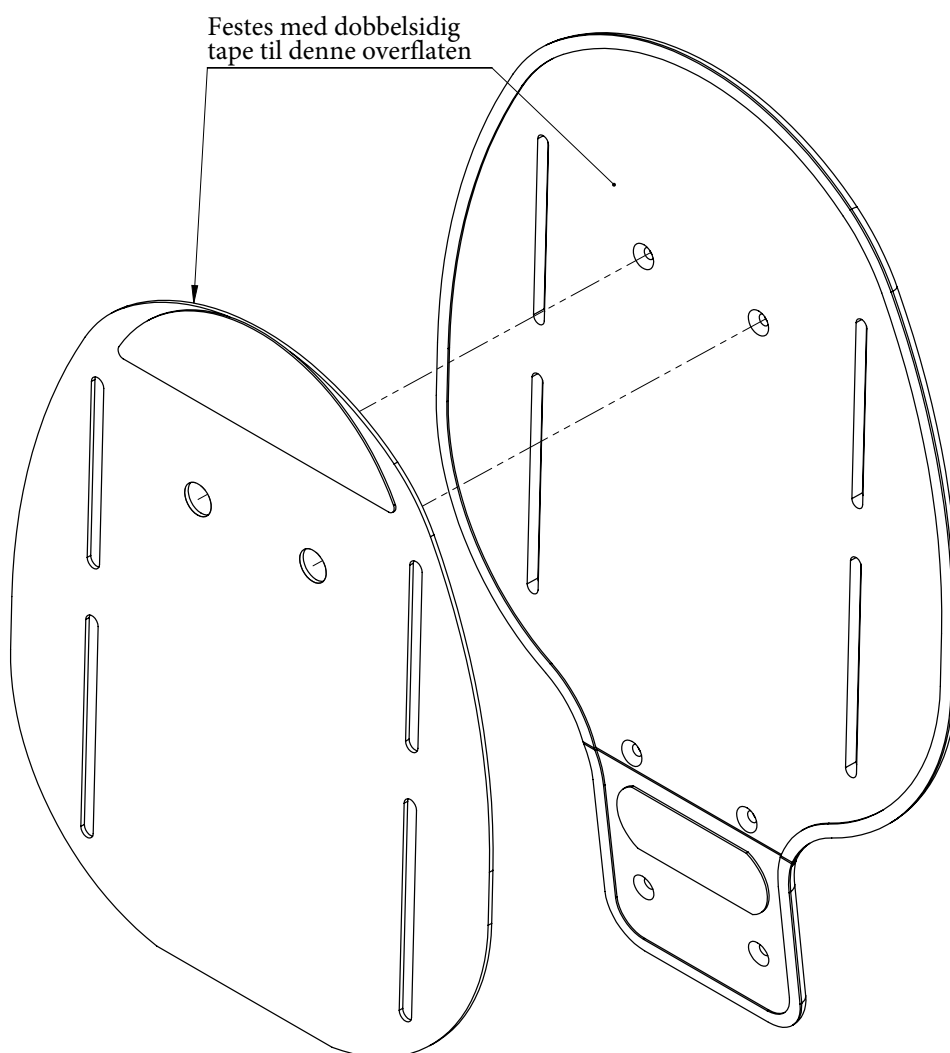

Justerbare sidestøtter

Montere sidestøtte



Monter sidestøtten med medfølgende skrue, avstandsstykke, skive og gantergrep (se bilde).

Avstandsstykket bør plasseres mellom sidestøtten og ryggen slik at polsteret ikke kommer i klem.



Justering sidestøtte

- Løsne grepene (to på hver side).
- Juster deretter sidestøttens bredde og høyde.
- Stram håndskruene når du har nådd ønsket posisjon.

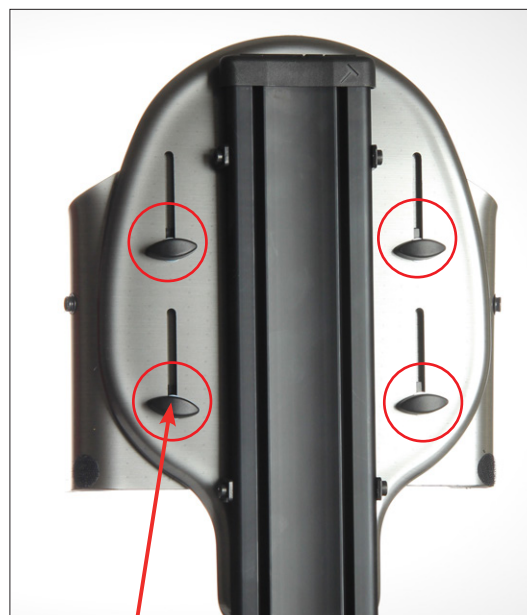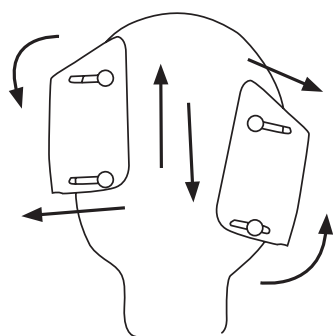

Håndskruer


Utsvingbare sidestøtter

Montere sidestøtte

Monter sidestøtten med den medfølgende skruen (1), avstandsstykke (2), skive (3) og håndskrue (4), (se bilde). Avstandsstykket skal plasseres mellom sidestøtten og ryggen slik at polsteret ikke kommer i klem. Fest låsestroppen (6) som vist på bildet.

Dra sidestøtten til siden

Trykk inn knappen (5) og dra støtten til siden.

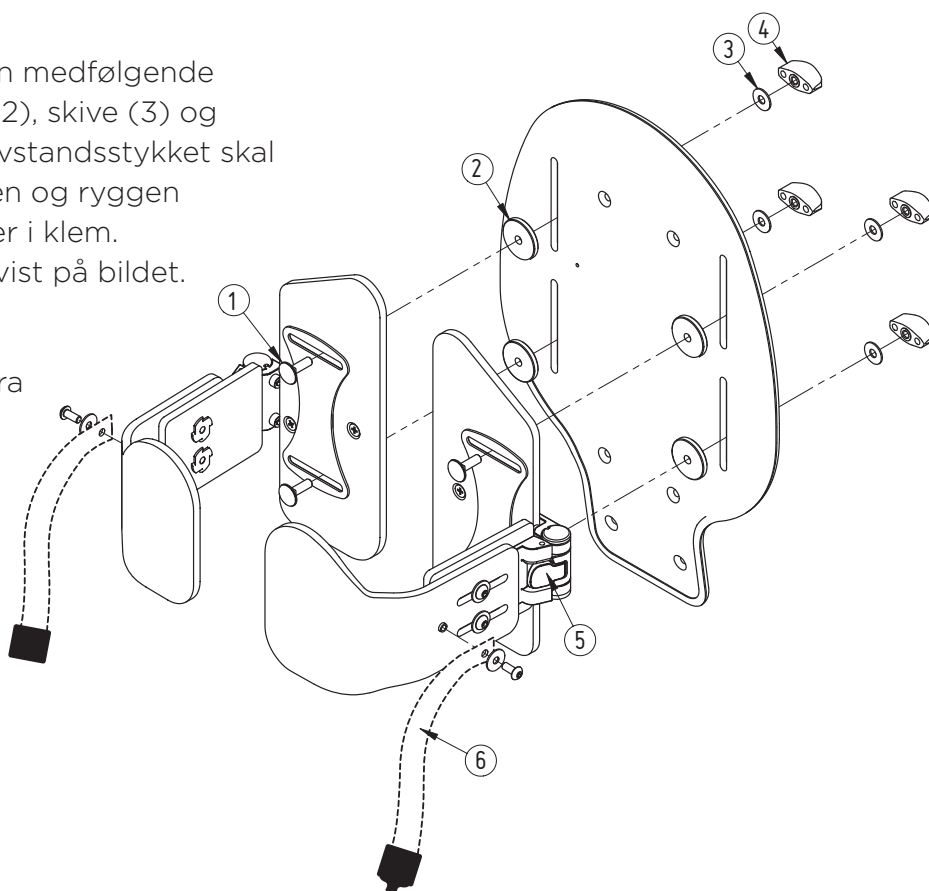

Bekkenstøtte



Montering av bekkenstøtte

Før du kan montere bekkenstøtten, må du fjerne beskyttelsesdekselet (A). Skru ut skruen (B) og løft deretter av dekselet.

Monter bekkenstøtten der beskyttelsesdekselet (A) var og fest med skruen (B).

Justering av bekkenstøtte


For å justere vinkelen på bekkenstøtten, løsne skruen (B), (C) eller (D) avhengig av innstillingene du ønsker å gjøre. For å justere høyden på bekkenstøtteplaten, skru ut skruene (E) og flytt platen til ønsket posisjon. Skru deretter inn skruen (E) igjen.

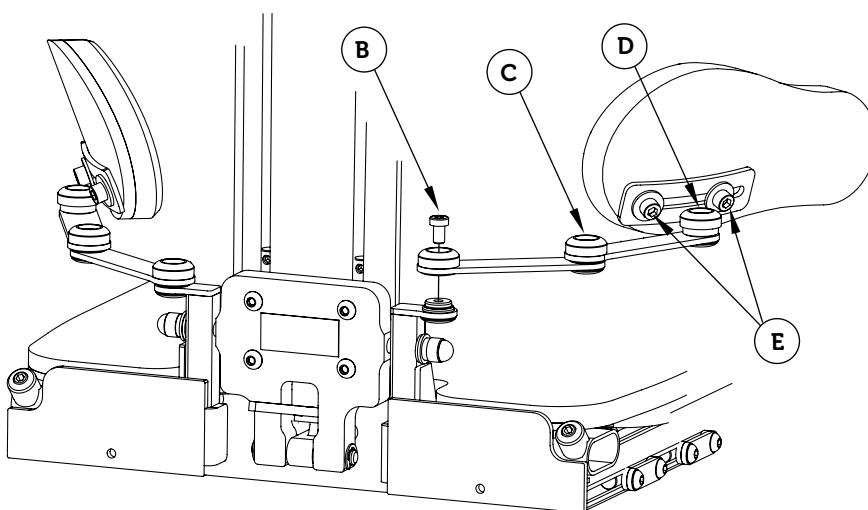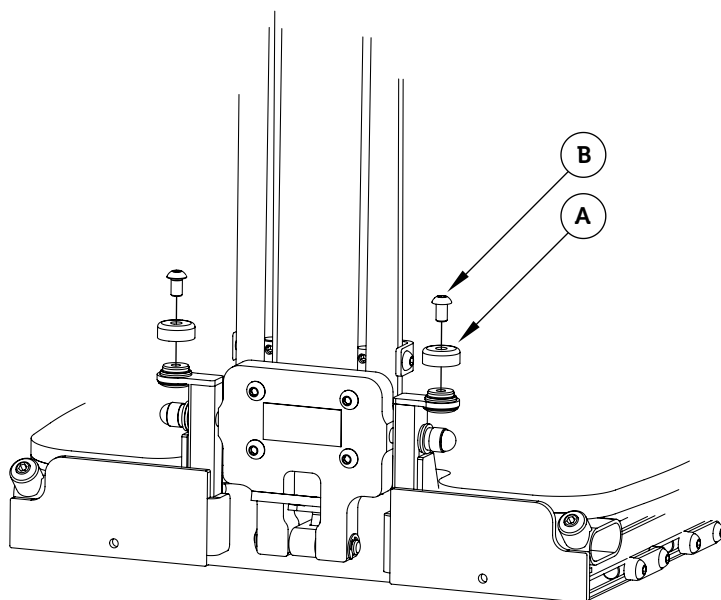

Hoftestøtte

Skru løs de to skruene som fester bendeleren og bytt ut skruene i det medfølgende settet som er ett steg (5 mm) lengre. Ved montering av de nye skruene, plasser hoftestøtten mellom bendeleren og foten som vist på bildet, (mellom de to svarte profilene for Sharky) slik at hoftestøtten hviler mot basen.

Velg hvilke spor i hoftestøtten du bruker avhengig av hvor langt fremover/bakover du ønsker å plassere støtten, juster deretter støtten sidelengs før du strammer skruene skikkelig.

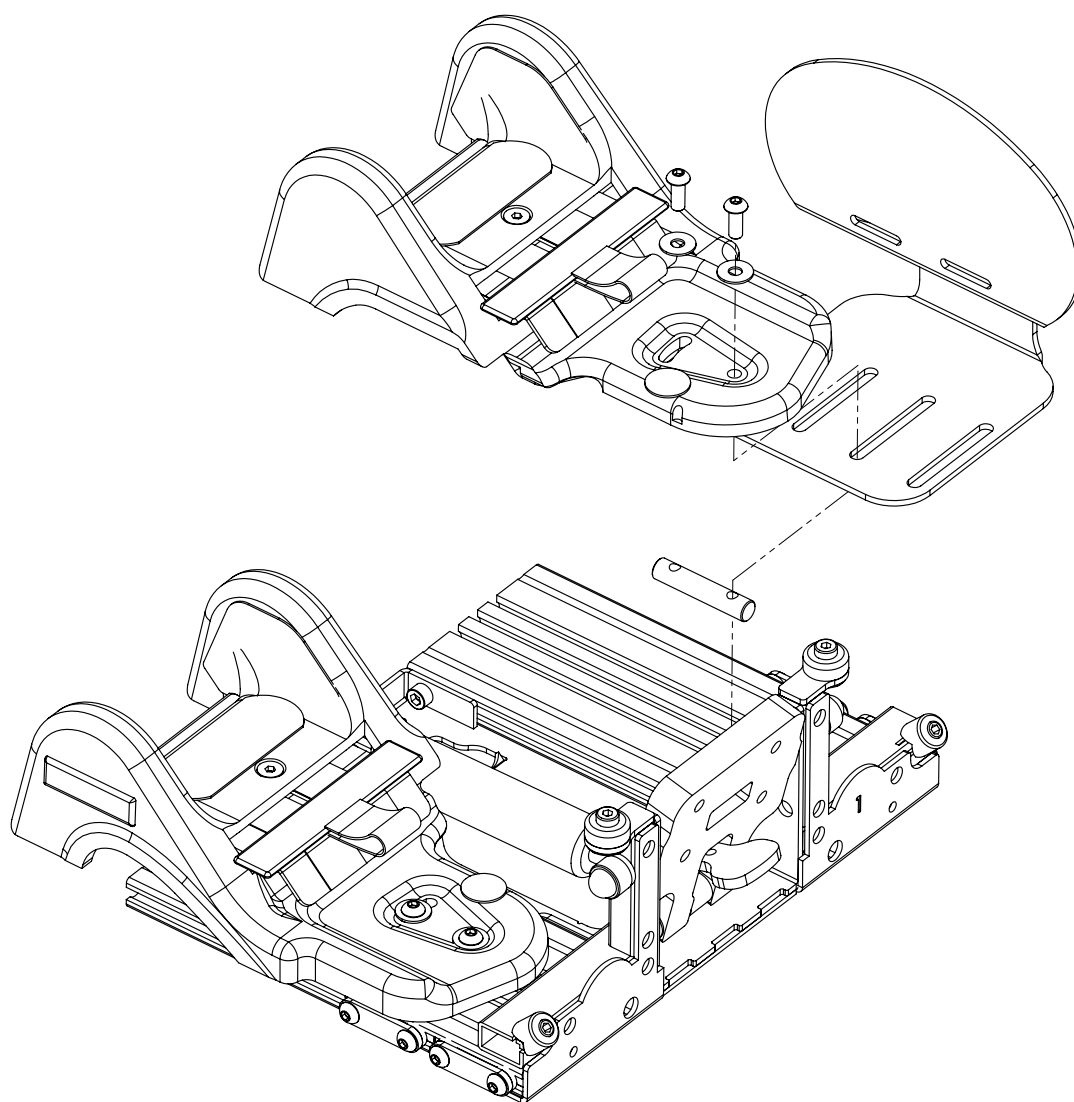

Hodestøtte

 = Justeringsnøkkel 

A - Montering av hodestøttefeste

Fjern først den integrerte justeringsnøkkelen som sitter plassert på toppen av ryggprofilen. Skyv deretter hodestøttefestet til ønsket posisjon i sporene på ryggprofilen. Stram skruene!

B - Monter deretter hodestøtten i

hodestøttefestet. Juster til ønsket posisjon. Lås grepet!

C - Justering av hodestøtten

Løsne justeringsskruene (C) akkurat nok til at hodestøtten kan justeres manuelt til ønsket posisjon, lås deretter skruene (C). Hvis hodestøtten må heves høyere, justeres dette ved å løsne grepet (B) og deretter flytte hodestøtten til ønsket høyde. Lås deretter grepet (B).



(B) Høydejusteringsgrep

(A) Hodestøttefeste, 4 skruer med sargsprinter.

Sidejusterbart hodestøttefeste


Montering av sidejusterbart hodestøttefeste

Fjern først den integrerte justeringsnøkkelen som er plassert på toppen av ryggprofilen. Skyv deretter den sidejusterbare hodestøttefestet ned til ønsket posisjon i sporene på ryggprofilen. Stram skruene!

Monter deretter hodestøtten i hodestøttefestet, juster til ønsket posisjon. Lås grepet!

Justering av hodestøtten

For å sidejustere hodestøtten, løsne skruer (A), (2 stk). Ønskes mer justering, løsne skruene (B), (4 stk). Stram skruene!

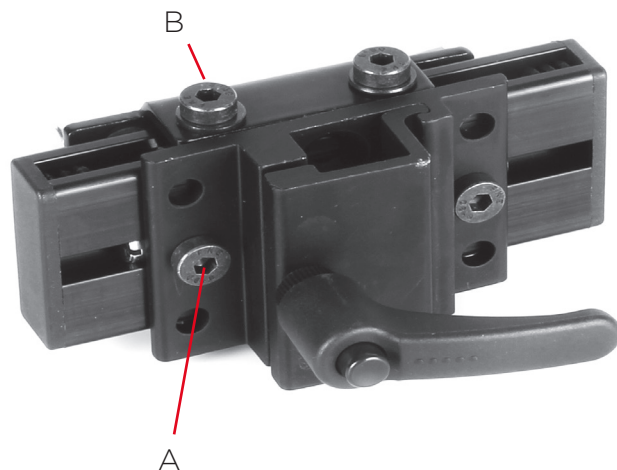

Nedfellbart hodestøttefeste


Montering av nedfellbart hodestøttefeste

Fjern først den integrerte justeringsnøkkelen som er plassert på toppen av ryggprofilen. Skyv deretter det nedfellbare hodestøttefestet (A) til ønsket posisjon i sporene på ryggprofilen. Stram skruene!

B - Monter deretter hodestøtten i hodestøttefestet, juster til ønsket posisjon. Lås grepet!

C - Justering av hodestøtten

Løsne pinnen for å kunne folde bort hodestøtten. Når du låser det nedfellbare hodestøttefestet; sørg for at pinnen låses.

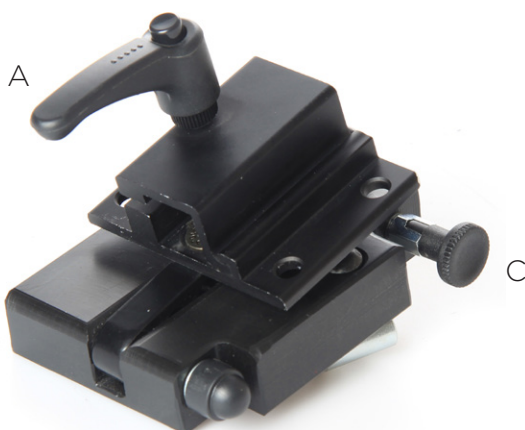

Montering av tilleggsfeste på hodestøttebrakett

Løsne skruene (A) og fjerne hodestøtten fra hodestøttefestet. Monter festet med den medfølgende skruen (B) og stram skruene.

Sett deretter hodestøtten tilbake på hodestøttebraketten og stram skruene (A).

Feste Headpod



Feste Panneband




Montering av vest

Øvre festebeslag
(A)



(B) Nedre monteringsfeste, inkludert som standard

Alternativ nedre monteringsfeste
(alternativ 285140)

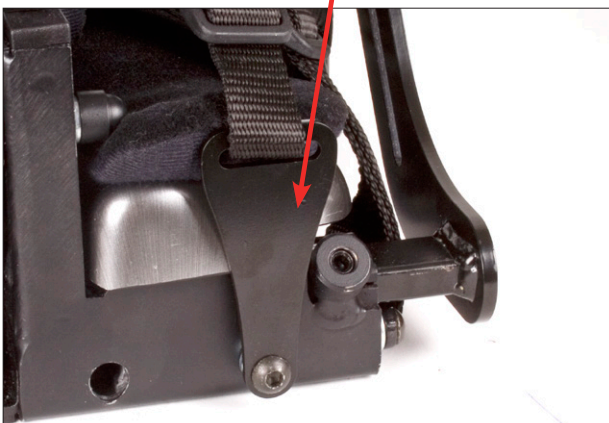

Montering av øvre monteringsfeste (A)

Fjern først den integrerte justeringsnøkkelen som sitter øverst på ryggprofilen og evt. hodestøttefestet. Skyv deretter de øvre festebrakettene ned til ønsket posisjon i sporene på ryggprofilen.

Justering av øvre monteringsfeste


Løsne skruene og juster til ønsket høyde og vinkel. Juster høyden på monteringsbraketten slik at beltedraget havner litt over skulderpartiet. Stram skruene!

Montering av vest

Tre vestens øvre stropper gjennom sporet og inn i spennen. Tre deretter de nedre festepunktene til vesten inn i den nedre braketten. Bruk den medfølgende Triglide spennen E.

Justering av dreretning og bredde

Løsne skruene på den øvre monteringsbraketten og juster høyden, og lås deretter den øvre skruen. Juster vinkelen og lås deretter den nedre skruen.

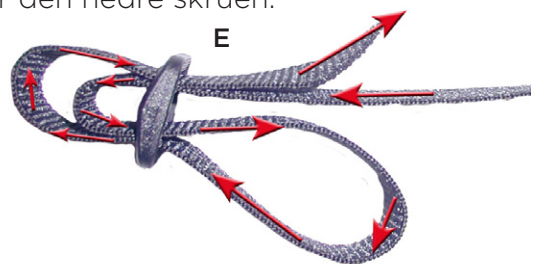

Kontroller at vesten ikke strammer rundt halsen på bruker. Kontroller at vest- og beltespennere er plassert hensiktsmessig i forhold til trykkavlastning og posisjonering.

○ = Justeringsnøkkel 



Hoftebelte

Justering av hoftebeltefeste

For å flytte posisjonen til hoftebeltefestet, løsne skruene (A) litt og juster til ønsket posisjon. Stram deretter til skruene (A).

Montering av hoftebelte

Når hoftebeltet skal monteres i hoftebeltefestene, bruker du en Triglide-spenne. For montering i henhold til Triglide-metoden, gjør som bildet viser.

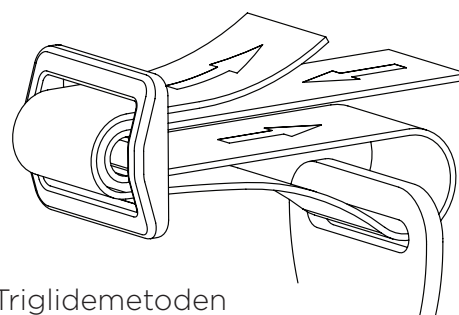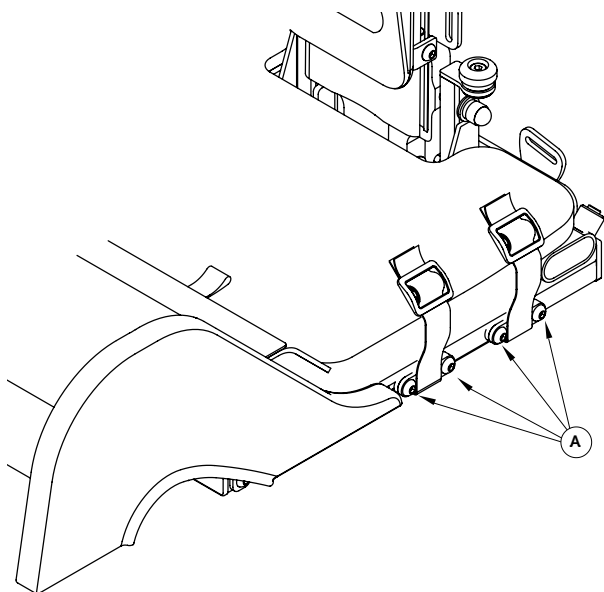

Triglidemetoden




Pass på at stroppen ikke kommer i klem mellom avstandsstykket og festet.

Ankelstøtter

Fotplaten er forberedt for montering av ankelstøtter. Montering av ankelstøttene på fullt justerbare og delte justerbare fotstøtter gjøres under den justerbare fotplaten.



Kontroller at
polsteret ikke vrir
seg på ankelstøtten

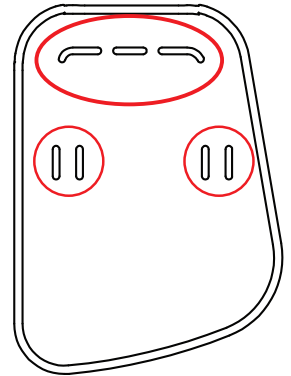

Armstøtte

For å montere armstøtten, skyv armstøtten i festet på siden av sitteenheten. Stram deretter skruen. Se posisjon (A).


Breddejustering: Løsne skruen (A) og juster til ønsket posisjon. Stram skruen.

Dybdejustering: Løsne skruene (B) og (C) helt og juster til ønsket posisjon. Sett skruene tilbake og stram dem.

Rotasjon: Løsne skruen (C) og juster til ønsket posisjon. Stram skruen.

Høydejustering av armstøtteplate - D : Løsne håndskruen og juster til ønsket posisjon. Lås håndskruen.

Vinkeljustering av armstøtteplate - E : Løsne gantergrepet og juster til ønsket posisjon. Lås gantergrepet.

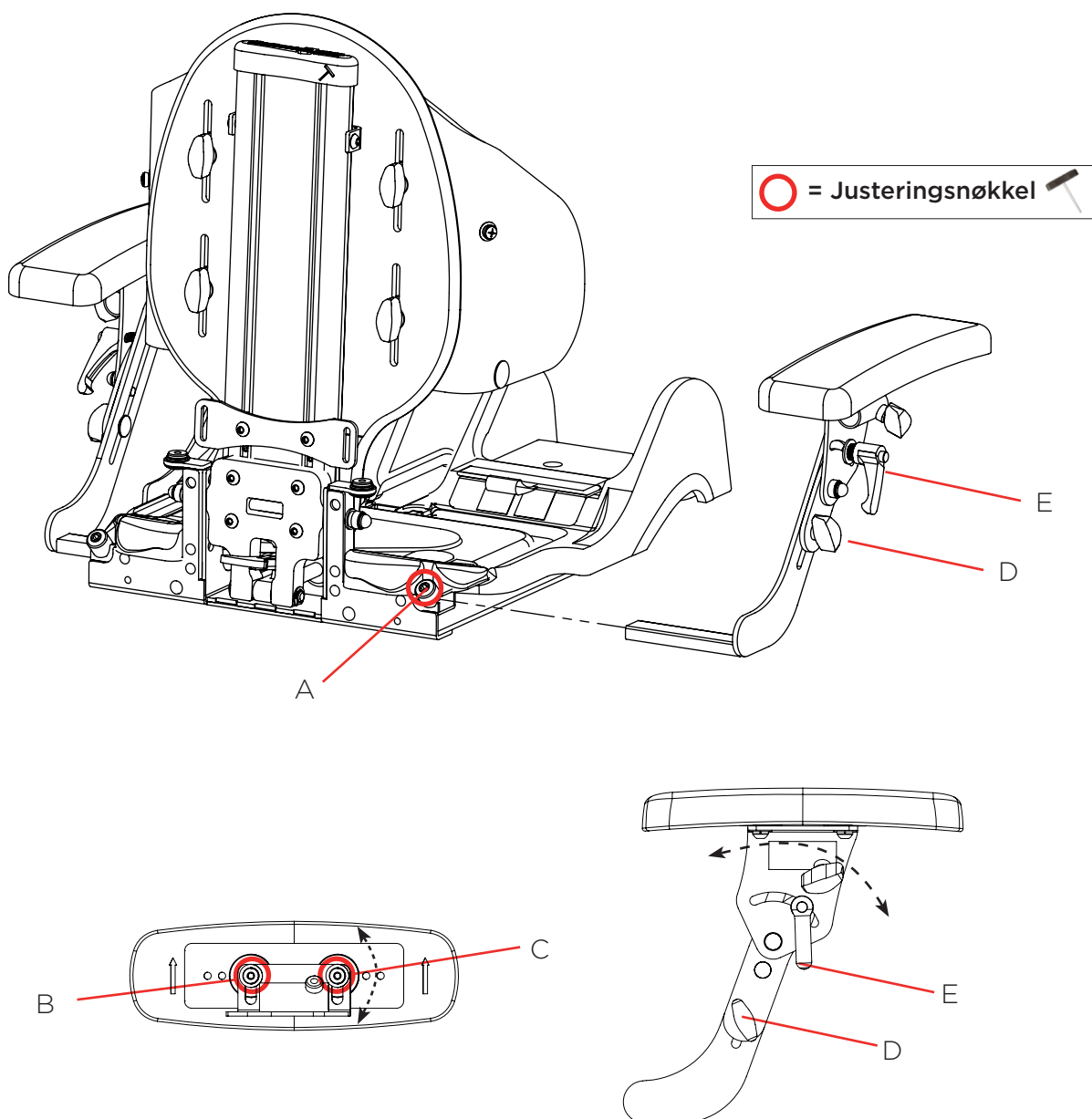

Armstøtte fra rygg

Montering av armstøtte fra rygg

Før montering av armstøtte fra rygg, må du først fjerne justeringsøkkelen og eventuelle andre detaljer som kan være i veien, som for eksempel hodestøtter, øvre monteringsfester og kjørebøyle.

Løsne stoppskruene (A) og juster armstøttefestene (B) for å få tilgang til skruene (C) på midtbraketten gjennom hullene. Løsne disse skruene tilstrekkelig til å kunne tre tønnemutrene (D) inn i sporene på ryggprofilen. Juster deretter festet til passende høyde og stram til skruene. Juster armstøttefestene til passende bredde og trekk til stoppskruene. Monter eventuelt delene du fjernet igjen for å kunne montere armstøttefestet.

Høydejustering

For å justere høyden på armstøtten, løsne skruene (C) litt, og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Stram deretter til skruene (C).

Breddejustering


For å endre bredden på armstøtten, løsne settskruene (A) og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Stram deretter til skruene.

Vinkeljustering opp/ned

For å justere vinkelen på armstøtten, løsne gantergrepet (E) og drei deretter armstøtten til ønsket vinkel. Trekk deretter til gantergrepet (E).

Sidevinkeljustering

For å justere platen sideveis og i vinkel, løsne skruene (F) og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Stram deretter til skruene (F).

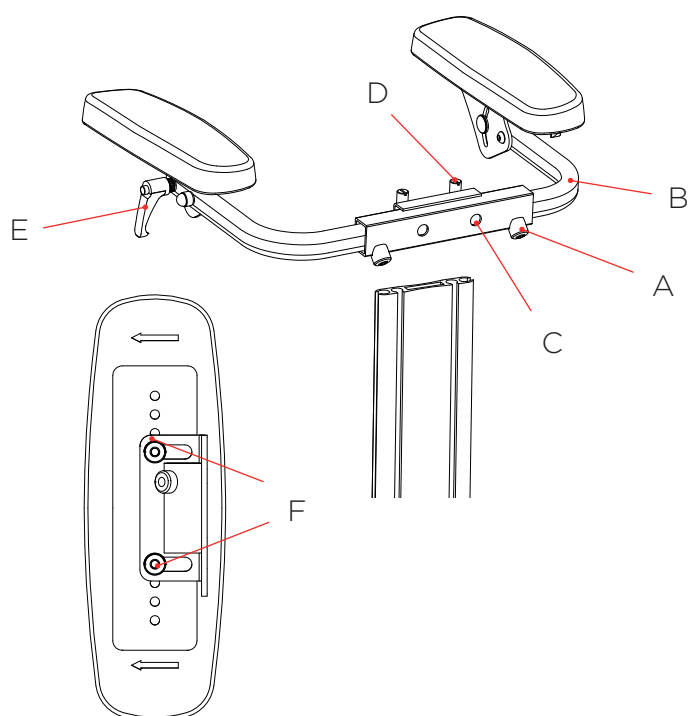

Montering av skålformede armstøtter:

Armstøttene skal monteres som vist med de høye sidene utover, vekk fra kroppen.



Overarmstøtte

Montering av overarmstøtte

Monter overarmstøtten ved hjelp av håndskruen (A), skiven (B), avstandsstykket (D) og skruen (E). Merk at skruen i sidestøtten må skiftes ut med den medfølgende lengre skruen. For en mer detaljert beskrivelse av hvordan du monterer sidestøtten, se sidene 24-25 i denne bruksanvisningen. Sett skruen (E) gjennom sidestøtten og ryggplaten. Monter deretter avstandsstykket (D), overarmstøttebrakett (C), skive (B) og til slutt håndskruen (A).

Høydejustering av overarmstøtte

For å høydejustere overarmstøtten, løsne håndskruen (A) og juster deretter til ønsket høyde.


Stram håndskruen (A) når du har nådd ønsket posisjon.

Breddejustering av overarmstøtte

For å breddejustere overarmstøtten, løsne skruene (E) og juster deretter til ønsket bredde. Stram til skruene (E) når du har nådd ønsket posisjon.

Polstring

Når polstringen skal vaskes, kan du enkelt trekke den av overarmstøtteplaten ved å strekke strikken på baksiden av polstringen. For å sette sammen polstringen igjen, tre polstringen over overarmstøtteplaten og sørg for at den er sentrert på overarmstøtteplaten.

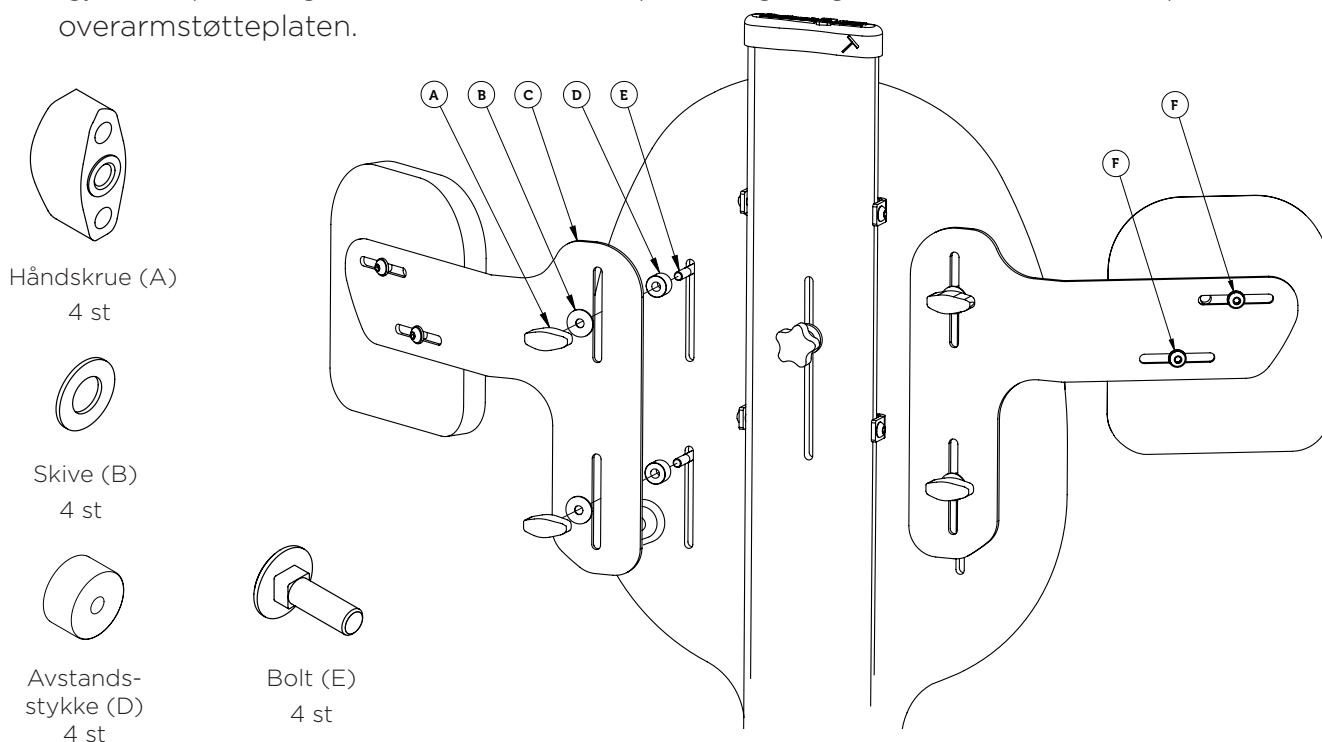


Skruen i sidestøtten må skiftes ut med den medfølgende lengre skruen ved montering av overarmstøtten. Ved justering av overarmstøtten frigjøres også sidestøtten for justering.

Håndbøyle

Montering av håndbøyle

Bøylen skyves inn i et rør under armstøtteplaten og låses med håndskruen (A) på begge sider. Bøylen kan skyves ut på brukerens venstre side og roteres bort mens høyre side fortsatt sitter i monteringsrøret.

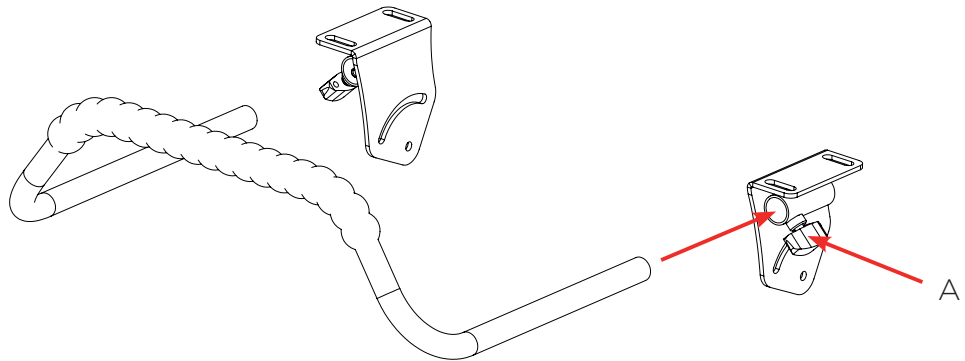


Bord, fast

Montering av bord

Plasser bordet på armstøtteplatene og vri deretter inn bordets monteringsbeslag under armstøtteplaten. Monteringsbeslaget skal dreies til det havner innenfor opphøyningen under armstøtteplaten.

Bytte av monteringshull

Det fins 3 innfestningsbredder å velge mellom. For å endre bredden brukes et valgfritt monteringshull under armstøttepolstringen i bordets bakkant. Som standard er låsearmen festet til midthullet. For å skifte monteringshull må du først løfte polstringen i bakkant. Markeringene på ytre bakkant av bordet viser kun størrelsen på bordet.

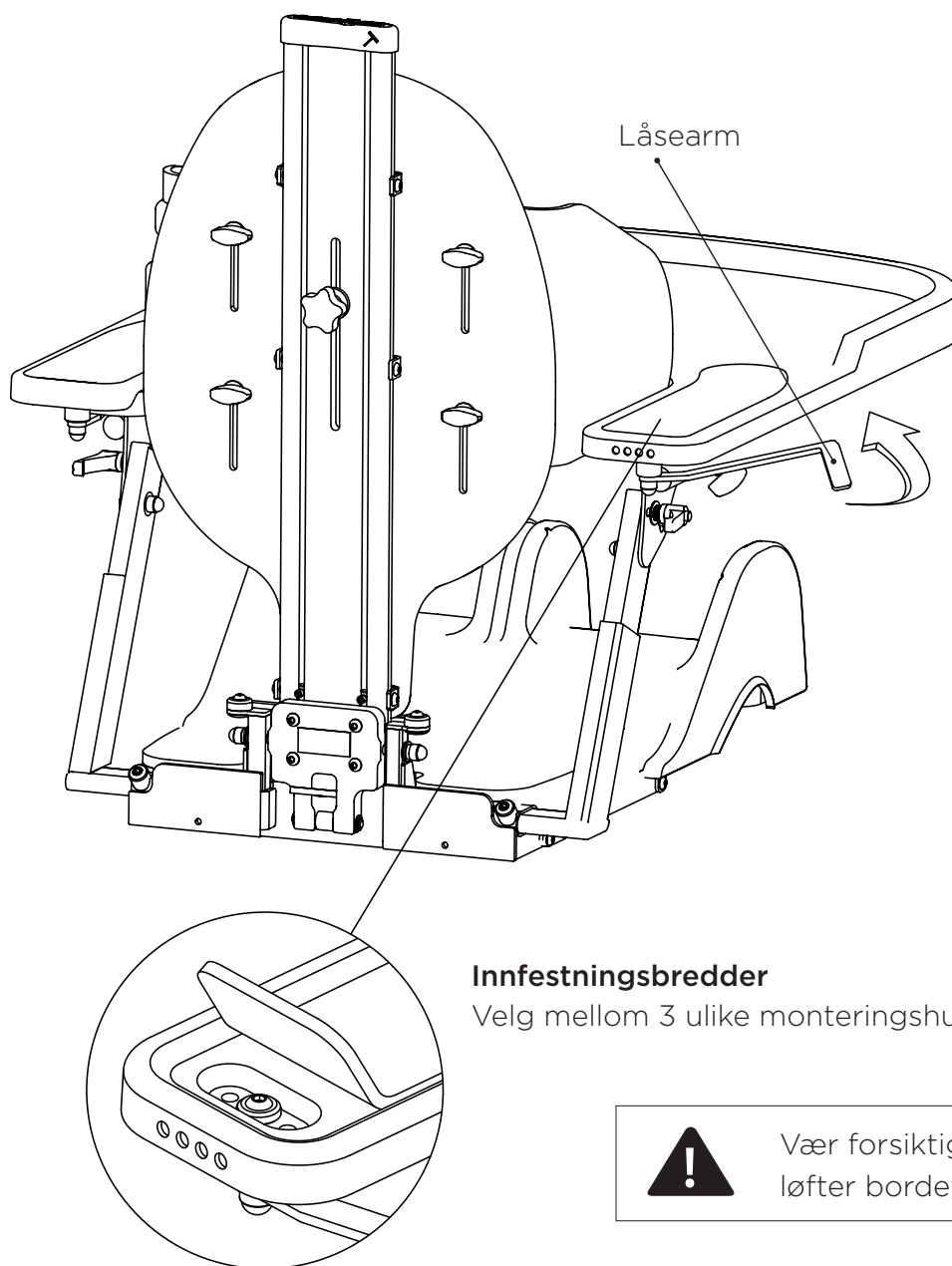

Innfestningsbredder

Velg mellom 3 ulike monteringshull.



Vær forsiktig så du ikke løfter bordet i framkant

Bord, utsvingbart





Montering av bord, utsvingbart

For å montere det utsvingbare bordet, sett inn bordets monteringsrør (A) gjennom røret (B) som er plassert under armstøtteplaten. Skyv bordet til ønsket posisjon og la det hvile på armstøtteplatene. Stram håndskruen (C) for å låse bordet.

Bruke den utsvingbare funksjonen

For å dreie bordet til siden, løsne grepet (C) litt. Løft deretter bordet litt og trekk det fremover. Løft bordet ytterligere og dreii det til siden. Når bordet er i laveste posisjon, skyv det bakover igjen og stram håndskruen (C).

- 1) Trekk bordet fremover
- 2) Løft og trekk til siden
- 3) Fell ut bordet sideveis slik at bordplaten henger ned. Skyv monteringsrøret tilbake på plass og stram håndskruen.

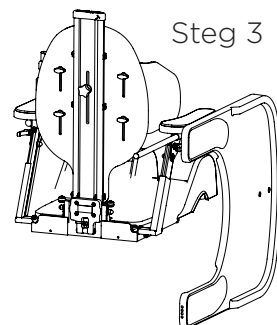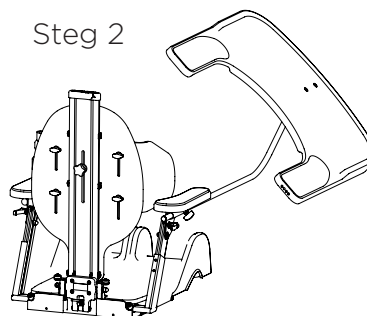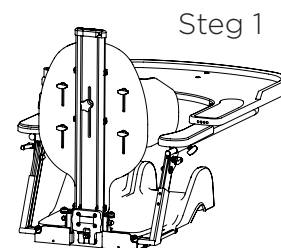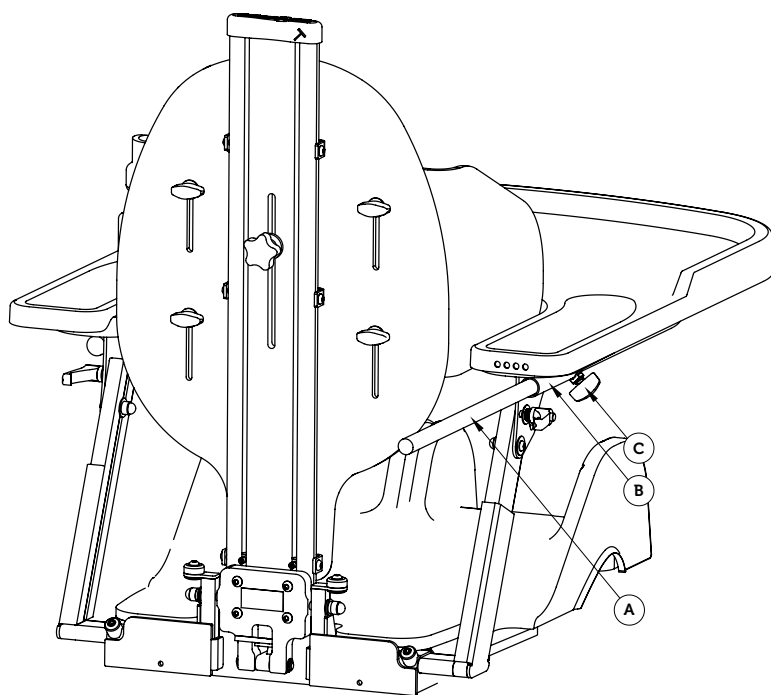

Ikke glem å stramme håndskruen (C) etter at bordet er foldet ut. Pass på å trekke bordet langt nok frem opp for bruksstilling slik at brukeren ikke blir skadet.

Bord, forsterket monteringsbeslag

Montering av forsterket bord



For å montere det forsterkede bordet, tre inn bordets monteringsrør (A) gjennom røret (B) som er plassert under armstøtteplaten. Skyv deretter bordet i ønsket posisjon og la det hvile på armstøtteplatene.

Stram håndskruer (C) for å låse bordet. Vri deretter inn låsearmen til den passer innenfor kanten av armstøtteplaten.

Breddejustering av forsterket bord

I stedet for å justere bredden på armstøttene, kan du justere bredden på bordfestebraketten slik at den passer til monteringsrørene i armstøttebrakettene. For å justere bredden på bordet løsner du skruene (D) litt og justerer til ønsket posisjon. Stram deretter til skruene (D).

Forsterket bord sett fra undersiden

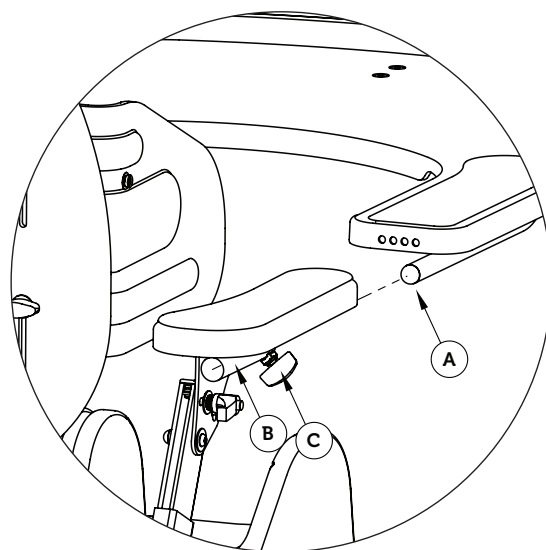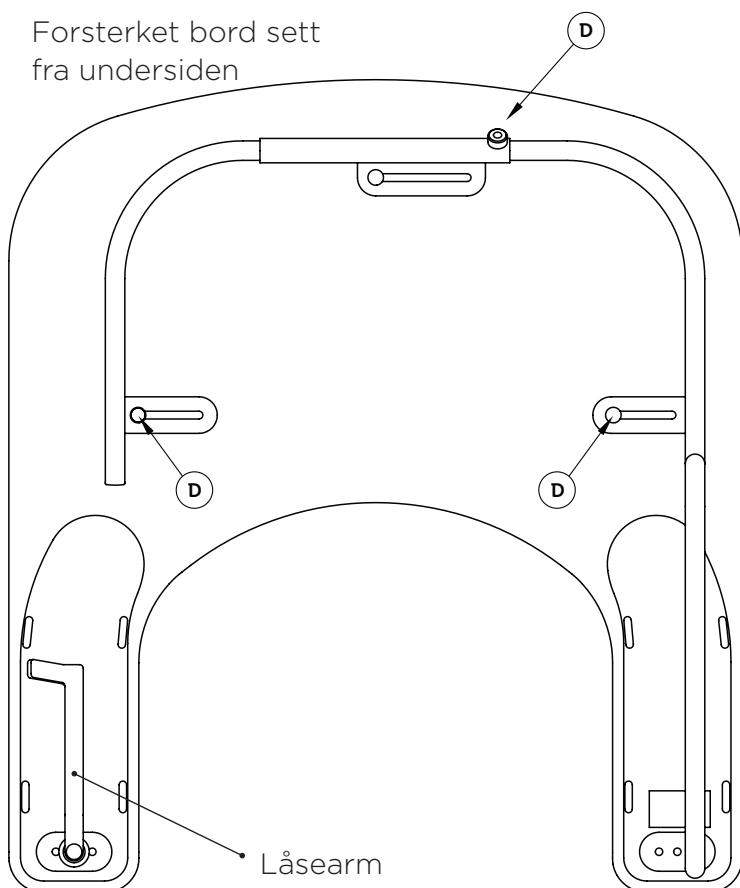


Hvis breddejusteringen i bordfestebraketten ikke er tilstrekkelig, kan det hende at det må gjøres justering av armstøttens bredde.

Støttebord

Montering av bordet

Plasser bordet på armstøtteplatene og skru deretter inn låsearmen (A) på underarmsstøtteplaten (B).

Låsearmene skal dreies til de havner innenfor kanten av armstøtteplaten.

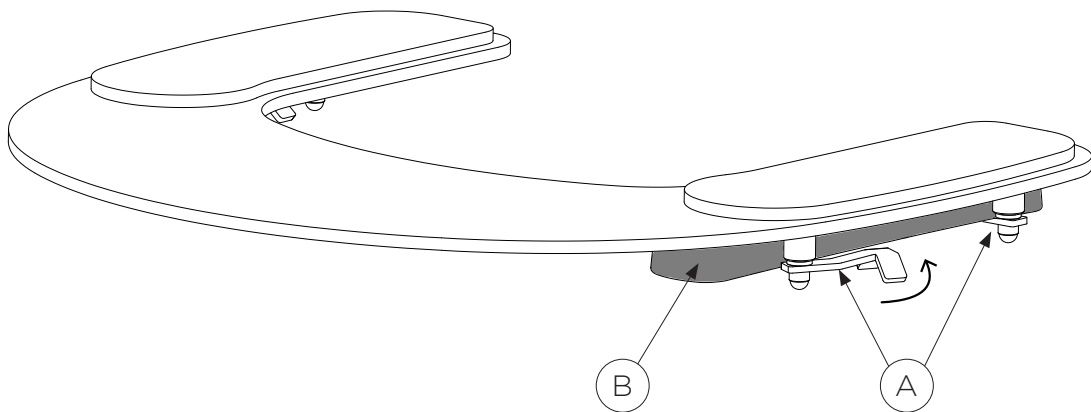

Fotstøtte



Montering av fotstøtte - A

Monter fotstøtten i innfestningen (firkantør). Lås fotstøtten med settskruen.

Justering av vinkel av kneledd - B

Løsne gantergrepet og juster til ønsket vinkel. Lås gantergrepet når ønsket vinkel er nådd.


Viktig - Etter justering må taggene gå i hverandre slik at de låser seg. Stram skruen hardt!

Justering av vinkel ved fotledd - C

Løsne skruen og juster til deretter til ønsket vinkel. Stram skruen når ønsket vinkel er nådd.

Høydejustering av fotplate - D

Løsne gantergrepet og juster deretter til ønsket vinkel. Lås gantergrepet når ønsket høyde er nådd.

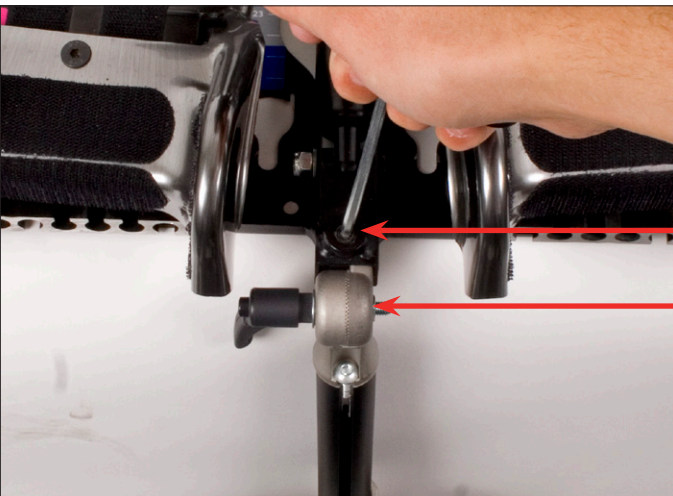

(A) Innfestning, fotstøtte

(B) Gantergrep til kneledd




 = Justeringsnøkkel 

(C) Skruer for vinkeljustering

(D) Gantergrep for høydejustering

Delt fotstøtte

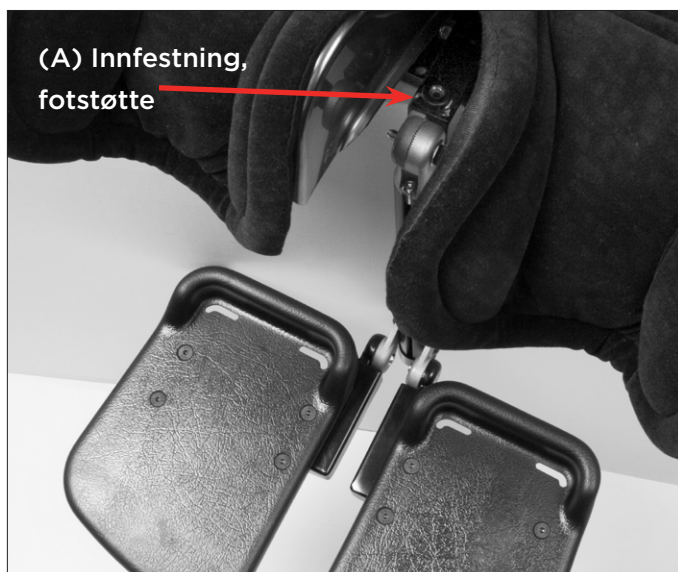

Montering av fotstøtte - A

Monter fotstøtten i innfestningen (firkanttrør). Lås fotstøtten med settskruen.


Justering av vinkel av kneledd - B

Løsne grepet og juster til ønsket vinkel. Lås gantergrepet når ønsket vinkel er nådd.

Viktig - Etter justering må taggene gå i hverandre slik at de låser seg. Stram skruen!


Høydejustering av fotplate - C

Løsne skruen (C+D), og juster deretter til ønsket høyde. Stram skruen når ønsket høyde er nådd.

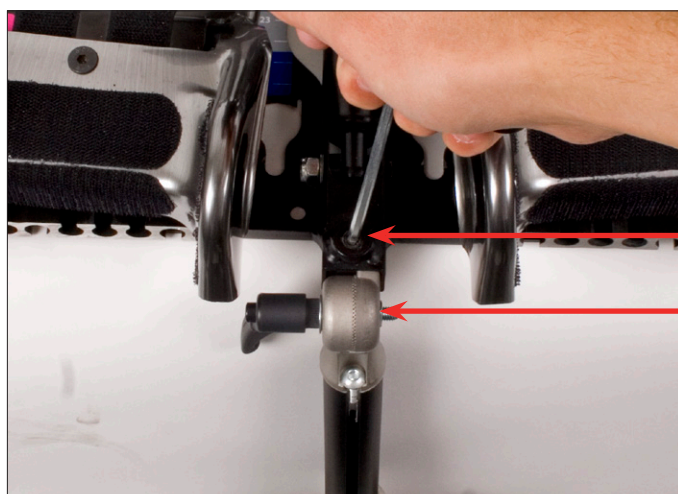

(A) Innfestning, fotstøtte

(B) Justeringsgrep for kneledd

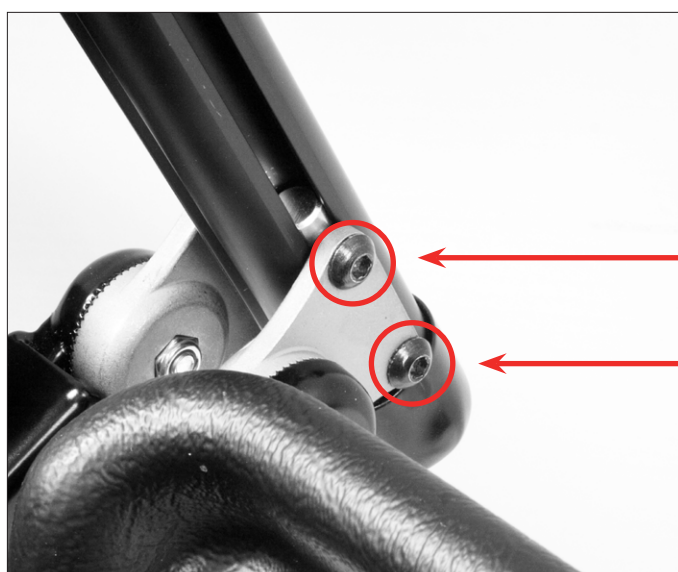

(C) Skruen

(D) Skruen

Fotstøtte, hel justerbar

Justering av vinkel av kneledd - A

Løsne gantergrepet og juster til ønsket vinkel. Lås gantergrepet når ønsket vinkel er nådd.

Høydejustering av fotplate - B


Løsne gantergrepet og juster til ønsket høyde. Lås gantergrepet når ønsket høyde er nådd.

Justering av vinkel ved fotledd - C

Løsne skruen og juster til ønsket vinkel. Lås skruen når ønsket vinkel er nådd.

Justering av fotplate - D

Fotplatene kan justeres både i bredde og dybde. Løsne skruene og juster til ønsket posisjon. Lås skruene når ønsket vinkel er nådd.

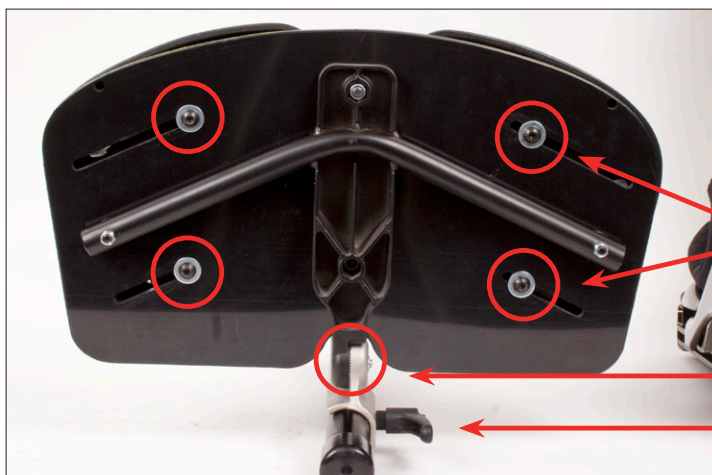

○ = Justeringsnøkkel 

(D) Justeringsskruer til fotplaten

(C) Justeringsskruer for fotstøttevinkel

(B) Gantergrep for fotplatens høyde

Fotstøtte, delt justerbar

Justering av vinkel i kneledd - A

Løsne gantergrepet og juster til ønsket vinkel. Lås gantergrepet når ønsket vinkel er nådd.

Høydejustering av fotplate - B

Løsne gantergrepet og juster til ønsket høyde. Lås gantergrepet når ønsket høyde er nådd.

Justering av vinkel ved fotledd - C

Løsne skruene og juster til ønsket vinkel. Stram skruen når ønsket vinkel er nådd.

Justering av fotplate - D

Fotplatene kan justeres både i bredde og dybde. Løsne skruen og juster til ønsket posisjon. Stram skruen når ønsket vinkel er nådd.



(D) Justeringsskruer til fotplaten



(C) Justeringsskruer for fotstøttevinkel

Fotstøtte, oppfellbar

Montering av fotstøtte - A

Monter fotstøtten i innfestningen (firkanttrør).
Lås fast fotstøtten med settskruen.

Justering av vinkel ved kneledd - B


- Løsne håndskruen i henhold til posisjon B.
- Juster til ønsket vinkel.
- Stram håndskruen.

Høydejustering av fotplate - C

- Løsne gantergrepet i henhold til posisjon C.
- Juster til ønsket høyde.
- Stram gantergrepet.

Justering av vinkel ved ankel - D

- Løsne skruen. Juster deretter til ønsket vinkel.
- Stram skruen når ønsket vinkel er nådd.

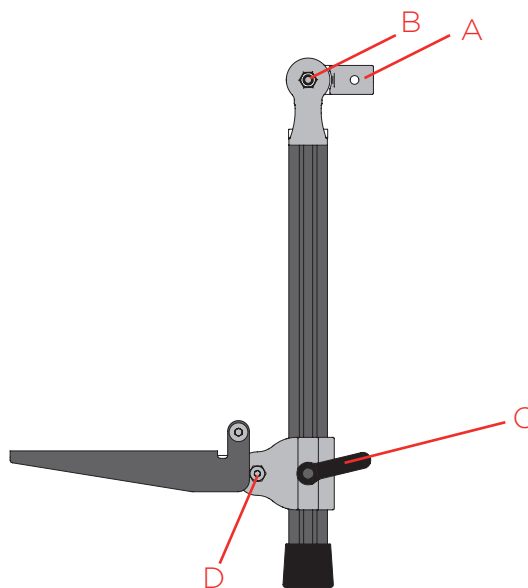

Fotstøtte, fjærende fotstøtteadapter

Fjærende fotstøtte


Zitzi Delfi Pro kan også utstyres med fjærende fotstøtter for å bryte enhver spastisitet og skape dynamikk i stillingen.

Høydejustering

Løsne settskruer iht. posisjon A.

Vinkeljustering på fotstøtte

Løsne settskruene iht. posisjon B og vinkle fotstøtten til ønsket vinkel.

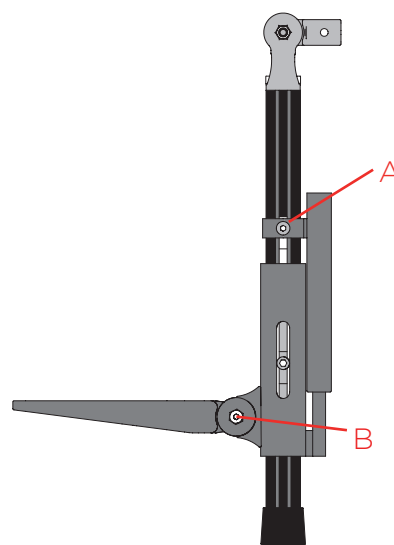

For at flex-funksjonen skal fungere optimalt, bør fotstøttestaget være vertikalt rettet.

Fotbrett enkelstag


Montering av fotbrett med enkelt stag ved etterbestilling

Bytt ut det nåværende fotbrettet med det medfølgende. Fordi fotkassen er utformet på en slik måte at den passer både enkeltstag og dobbeltstag, må fotbrettet bores avhengig av hvilken type fotbrett du har.

For å montere fotkassen, start med å skyve tønnermutteren (A) inn på fotkassen (B) i fotstøttefestet (C). Juster deretter fotstøtten (D) til ønsket høyde og trekk til gantergrepet (E). Juster ønsket høyde og bredde på fotkassen med skruene (F) og (G). Plaststaget (H) på fotbrettet må føres gjennom sporet (I) på fotstøtteplaten. Avslutt med å montere den medfølgende polstringen og sjekk at alle skruene er skikkelig strammet.

Montering av fotbrett med enkelt stag ved bestilling med fotkasse

For å montere fotbrettet, start med å skyve inn tønnermutter (A) på fotbrettet (B) i fotstøttefestet (C). Juster deretter fotstøtten (D) til ønsket høyde og trekk til gantergrepet (E). Juster ønsket høyde og bredde med fotbrettet med skruene (F) og (G). Plaststaget (H) på fotbrettet må føres gjennom sporet (I) på fotbrettet. Avslutt med å montere den medfølgende polstringen og sjekk at alle skruene er skikkelig strammet.

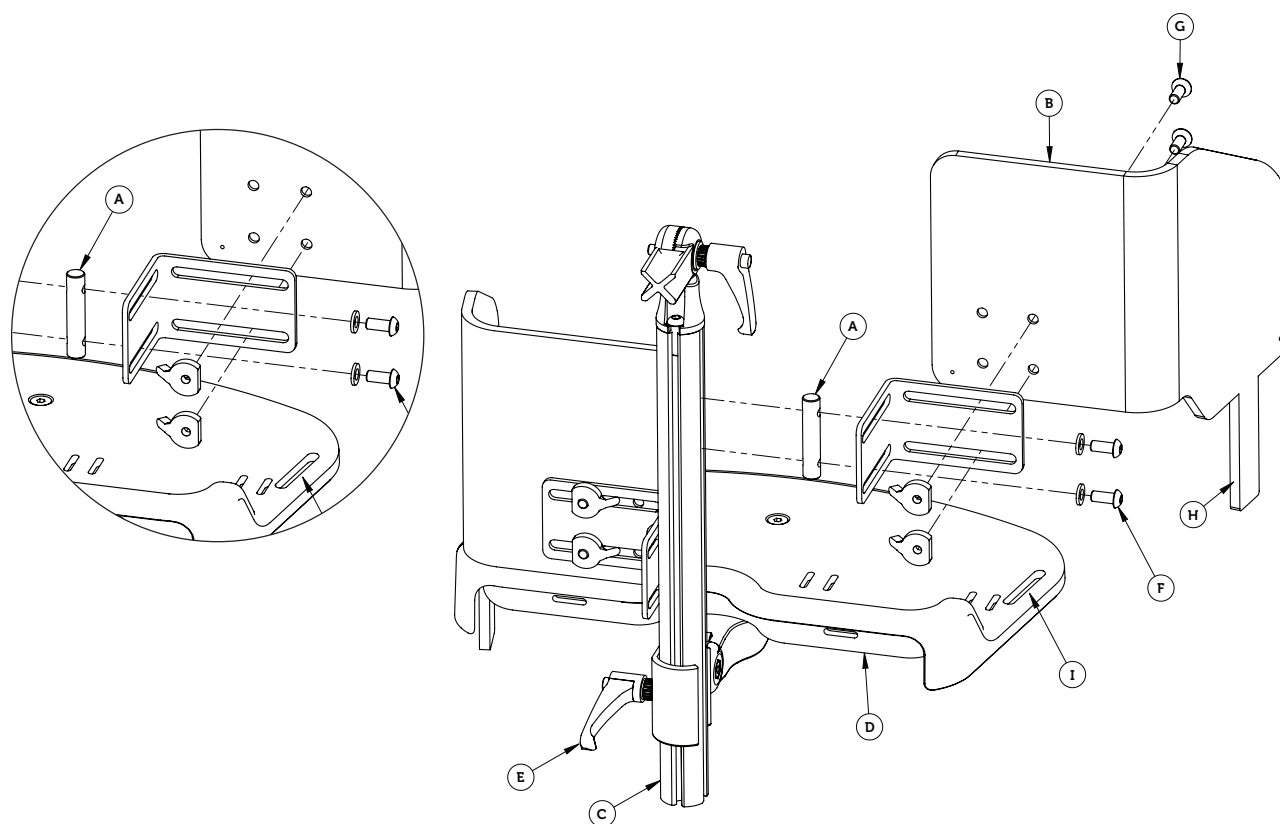



Etter justering av ønsket høyde kan plaststaget (H) kuttes eller varmes under fotstøtteplaten etter eget ønske. Merking for borehull er også merket under fotplaten.

Fra enkelstag til dobbelstag


Fra enkelt stag til dobbelt stag og omvendt

Som standard vil fotstøtter i størrelse 2, 3 og 4 være ferdigmontert for doble stag og støttelse 1 er ferdigmontert for enkelt stag.

For å skifte mellom de ulike variantene, dreier vinkelplaten (A) 180 grader og bytter deretter siden på sargsprinten (B).

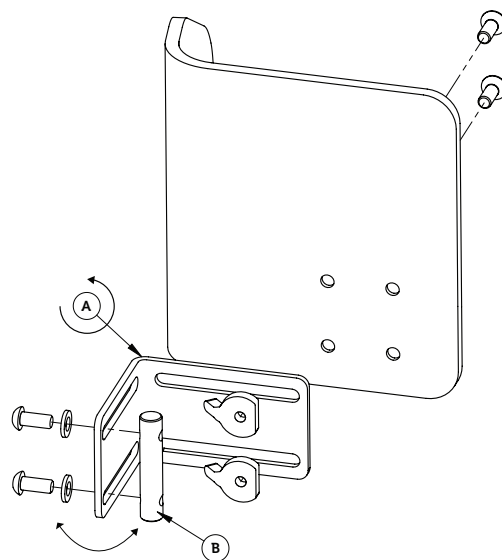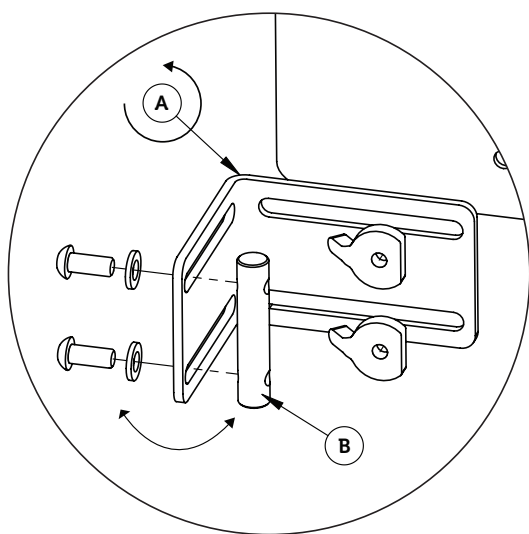

Teknisk data

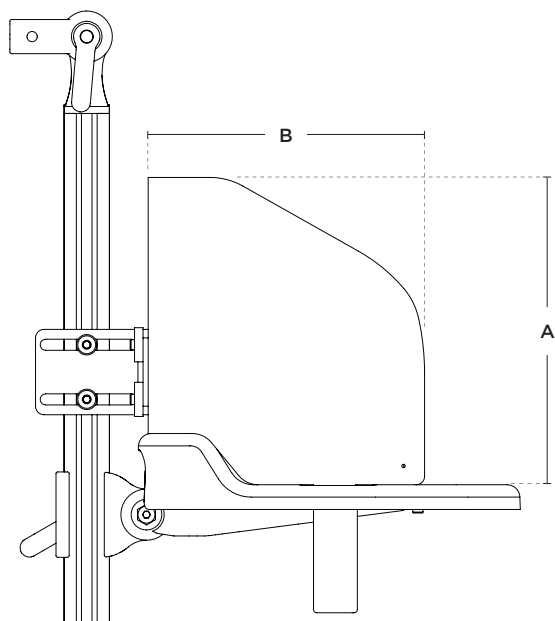


For hel / delt fotplate	Str.	Høyde (A)	Dybde (B)
990041 / 990046	1	140 mm	130 mm
990042 / 990047	2	170 mm	160 mm
990043 / 990048	3	205 mm	190 mm
990044 / 990049	4	235 mm	240 mm

Leggstøtte


Løsne skruene (A) for å justere til ønsket høyde og dybde. Stram til skruene når ønsket innstilling er oppnådd. Løsne skruene (B) for å justere bredden på leggstøtteplatene.

Stram til skruene når ønsket innstilling er oppnådd.

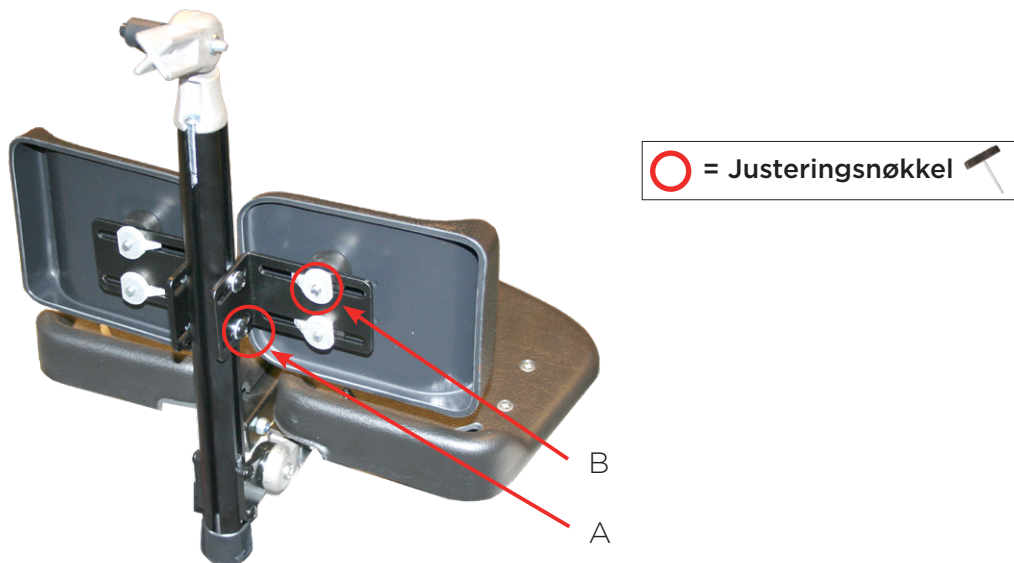

Aktivetsbøyle

Aktivetsbøylefestet monteres på ryggprofilen. Fjern først justeringsnøkkelen som er integrert i ryggprofilen. Før så aktivetsbøylefestet ned i sporet på ryggprofilen i henhold til posisjon B. Lås deretter posisjonen til aktivetsbøylefestet ved hjelp av skruene (C). Når aktivetsbøylefestet er på plass og låst i posisjon, fører du ned aktivetsbøylen i henhold til posisjon (D).

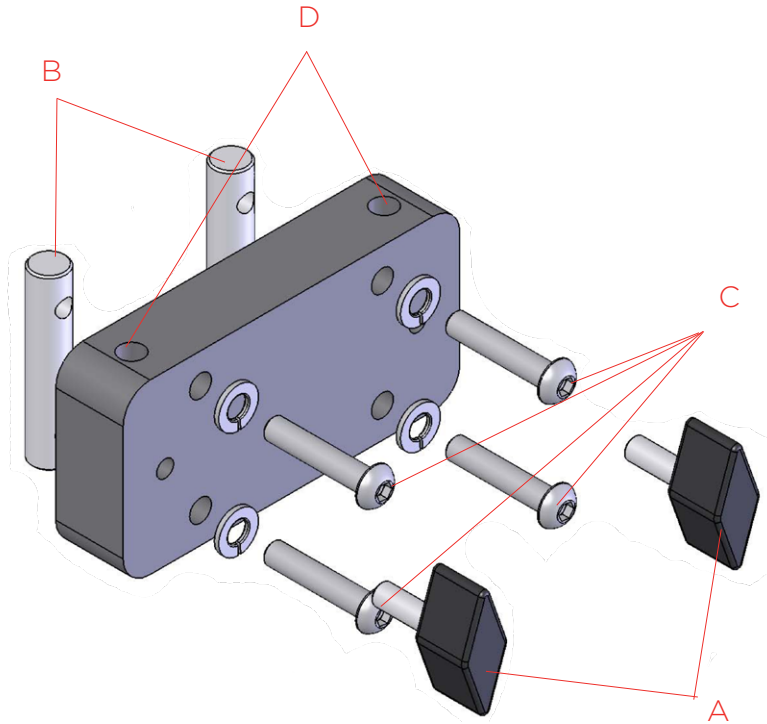


Montering av hodestøtte ved bruk av aktivetsbøyle

Dersom det også skal monteres hodestøtte, monteres hodestøttefestet på festet til aktivetsbøylen. Festes med lengre skrue og fjærskive.



Kjørebøyle


- 1) Ta bort justeringsnøkkelen fra ryggprofilen.
- 2) Sett inn tønnemutrene (A) i sporene på ryggprofilen (B2) og før kjørebøylen til ønsket posisjon.
- 3) Stram til skruene.

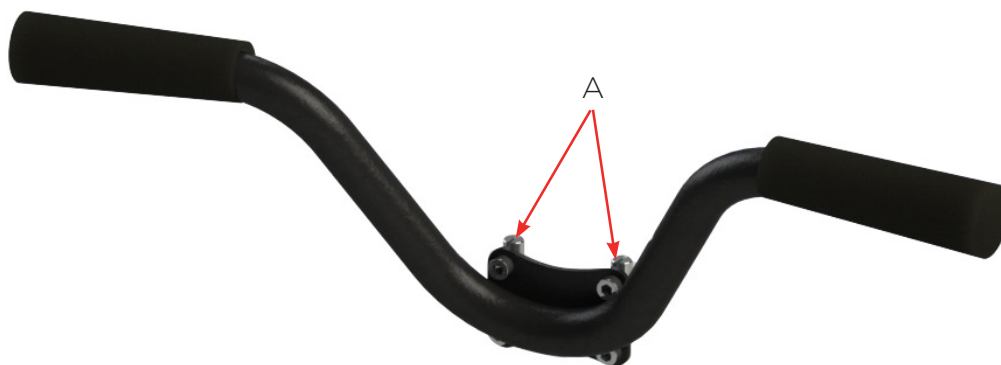

Kalesje


Montering av kalesje

Begynn med å fjerne eventuell hodestøtte. Løsne deretter skruene (A) og sett inn tønnemutrene (B) inn i profilen. Juster til passende høyde og stram skruene. Kalesjen kan fjernes ved å løsne håndgrepet (C) og trekke kalesjen ut til siden.

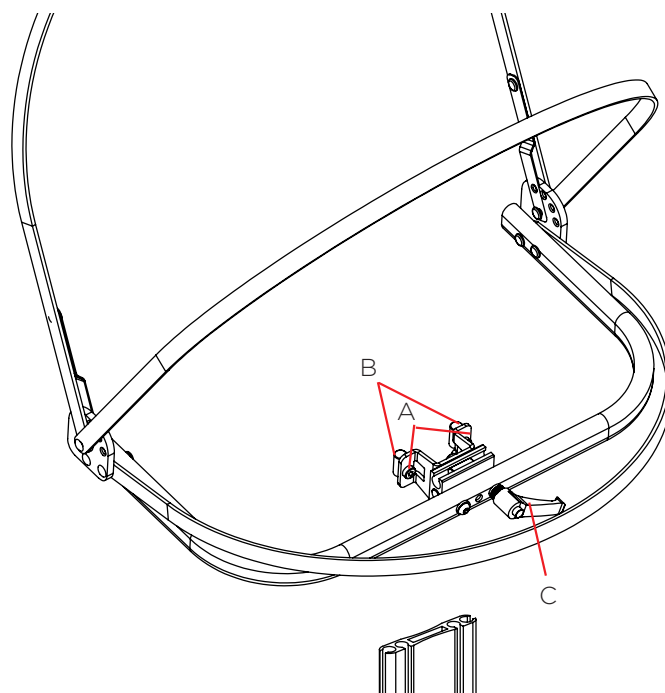

Korsryggstøtte/Korsryggstøtte med pumpe

- A) Fjern ryggpolsteret.
- B) Fest korsryggstøtten til ryggpolsteret (innenfor det merkede området) ved hjelp av den medfølgende borrelåsen.
- C) Sett tilbake ryggpolsteret.

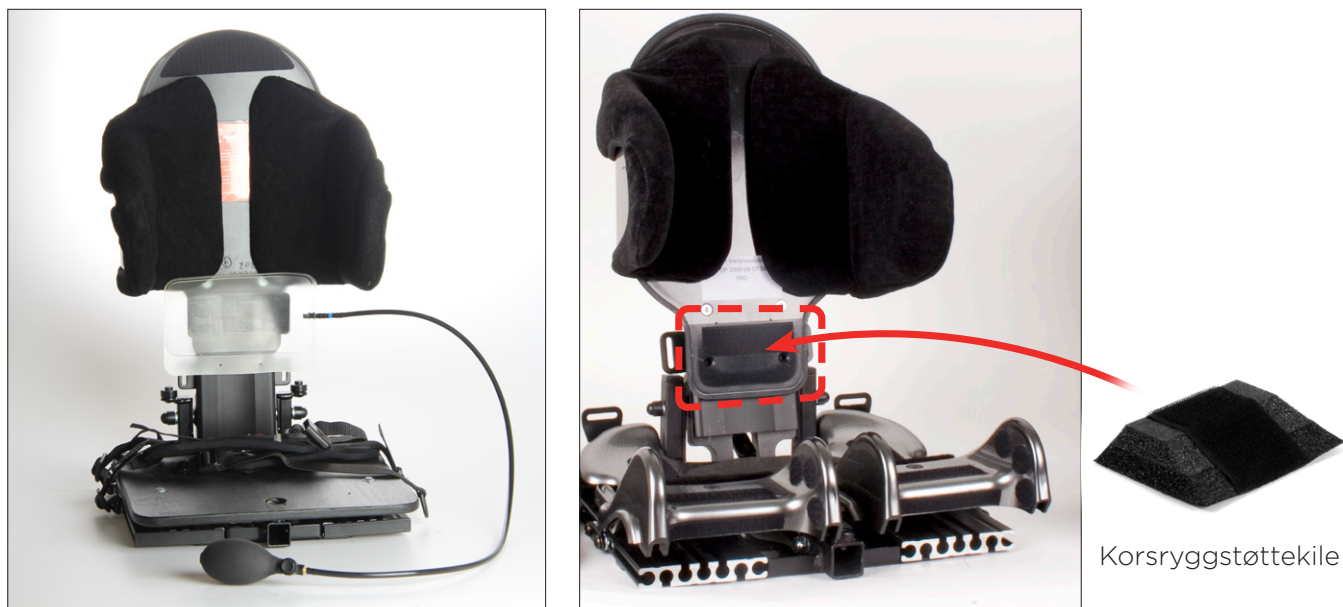

Varmepakke

Varmepakken holder kroppstemperaturen oppe og forhindrer avkjøling ved kaldt vær. Når kroppstemperaturen er oppnådd, slår varmekpakken seg av for å spare energi. Hvis temperaturen synker, aktiveres det igjen og varmer på nytt opp til kroppstemperatur. Varmeplatene festes på polsteret med borrelåsen.



- A) Sitteplate
- B) Ryggplate
- C) Batteri og kontrollboks

Oppsummering og etterkontroll

Etter montering og/eller justering er gjennomført, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og at produktet fungerer som tiltenkt.

Kontroller innstillingene til produktet og dets tilbehør slik at brukeren har riktig sittestilling.

Etter all montering-, justering- eller servicearbeid må alle gantergrep, festeskruer og muttere kontrolleres og etterstrammes.

Kontroller at hjelpemiddelet er riktig balansert for å sikre at eventuell velterisiko er utelukket.

Hvis det oppdages feil, ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp til utbedring.

Transport i kjøretøy

Ved transport i bil med Delfi Pro montert på understell, skal instruksjoner fra produsenten av understellet følges.

Sikkerhetsstropper

En sikkerhetsstropp leveres med med setet med den hensikt å strammes fra seteryggen og rundt understellets kjørebøyle. Pass på at denne stroppen alltid er stabil og stram under transport.

Krasjtestet og godkjent

Produktet er krasjtestet og godkjent i henhold til ISO 16840-4. Denne standarden gjør at sittesystemet kan brukes på understell som er godkjent i henhold til ISO 7176-19 samtidig som krasjgodkjenningen opprettholdes.



Krasjgodkjenning gjelder brukervekt opptil 75 kg.

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

Dette produktet er et medisinteknisk utstyr beregnet for flergangsbruk. For at hjelpemiddelet skal fungere trygt og sikkert og nå estimert levetid, er det viktig med tilsyn, vedlikehold og rengjøring. Ved utskifting av deler i forbindelse med vedlikehold og service skal det alltid benyttes originale deler fra Anatomic Sitt.

Definisjoner:

Generelt skilles det mellom utbedrende vedlikehold, service og forebyggende vedlikehold.

- **Utbedrende vedlikehold** refererer til tiltak for å reparere et ødelagt produkt, akutt vedlikehold, vanskelig å planlegge i tide og ofte avhengig av produktets bruk.
- **Service** refererer til en enklere overhaling som kan forlenge levetiden til produktet. Dette inkluderer for eksempel kontroll av skruer og festemidler, bevegelige deler, generell slitasje etc., samt mindre reparasjoner.
- **Forebyggende vedlikehold** refererer til handlinger forårsaket av forutsigbare begrensninger i produktets ytelse. Denne typen vedlikehold kan ses på som handlinger av engangskarakter som planlegges med tanke på tid, art og omfang. For dette produktet er det ikke nødvendig med forebyggende vedlikehold i løpet av produktets forventede levetid.

Kontroller før bruk

For at hjelpemiddelet skal fungere trygt og sikkert, er tilsyn og renhold viktig.

Inspeksjon og kontroll må utføres før hver bruk i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader. Sjekk spesielt skruer og muttere, samt håndskruer.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Sjekk produktets bevegelige funksjoner, for eksempel ryggvinkel angående bevegelighet og låsing.
- Kontroller belter og seler for slitasje, funksjon og feste.

Hvis det oppdages mangler: ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp til utbedring.

Renhold

Rengjøringsbehovet varierer og må vurderes basert på bruk av produktet, men minst en gang i uken anbefales.

Rengjør plast- og metalleder med en klut/svamp og anitbakterielle, milde rengjøringsmidler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, etsende eller løsningsmidler.

Polster/trekk og belter/seler kan vaskes på 60°C finvask. Følg separate vaskerådsetiketter på produktene. For mer informasjon, se gjeldende bruksanvisning for de respektive posisjoneringshjelpemidlene.

Service og utbedrende vedlikehold

Service utføres primært for å forlenge produktets levetid og for å sjekke om det er behov for utbedrende vedlikehold. Behovet for inspeksjon/service varierer og kan vurderes fra sak til sak avhengig av produktets bruk og slitasje, men det anbefales minst en gang hver 6. måned.

Arbeidet skal alltid utføres av kvalifisert personell, se avsnitt Sikkerhetsanvisninger i bruksanvisningen. Ved utskifting av ødelagte, slitte eller sprukne deler, bruk kun originaldeler fra Anatomic Sitt slik at produktet beholder CE-merket. Reservedeler kan bestilles etter egen reservedelsliste for det aktuelle produktet.

Ved enhver service skal det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at produktet er trygt å bruke. Hvis det er mangler som påvirker sikkerheten og ikke kan utbedres, må produktet tas ut av drift.

For rengjøring av produktet, se avsnittet Renhold.

Kontroller følgende og korriger om nødvendig:

- Kontroller produktets samtlige funksjoner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje eller skader.
- Kontroller at alle skruer, muttere og bolter er strammet skikkelig.
- Kontroller at alle grep er intakte og fungerer.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller sikkerhetsbeltet på baksiden og at det er uskadd og låser seg riktig.
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, for eksempel ryggvinkel. Både vedrørende justeringsmuligheter, mobilitet og låsning.
- Kontroller at stampelet låses i valgt posisjon.
- Kontroller eventuelle slitasjer på skjøter og braketter. Pass på at de låses ordentlig.
- Kontroller belter og seler for slitasje, funksjon og feste.
- Kontroller merker, etiketter og advarselsymboler slik at de er hele og leselige.

Etterkontroll

Når service utføres, sjekk at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og fungerer etter hensikten.

Resirkulering

Resirkulering gjøres hensiktsmessig dersom hjelpemiddelet er personlig og skal gis til ny bruker eller ved langtidslagring. Arbeidet skal alltid utføres fagmessig av kvalifisert personell, se avsnitt Sikkerhetsinstruksjoner i bruksanvisninger. Ved utskiftning av deler skal det brukes originaldeler fra Anatomic Sitt.

For informasjon om produktet og dets funksjoner, se bruksanvisningen på www.anatomicsitt.com. For mer informasjon om produktets levetid, se avsnittet Begrensninger i bruksanvisningen.

Sjekk alltid ved resirkulering at hjelpemiddelet ikke er spesialtilpasset før det sendes til ny bruker.

Ved hver resirkulering bør det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at det er trygt å bruke. Hvis det er mangler som ikke kan rettes opp, må produktet tas ut av drift og resirkuleres.

Rengjøring

Rengjør plast- og metaldeler med en svamp/klut og antibakterielle, milde rengjøringsmidler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, etsende eller løsningsmiddel.

Fjern polstring, trekk og belter/seler. Polstring er en forbruksvare og bør skiftes ut om nødvendig. Trekk og belter/seler kan vaskes på 60°C finvask. Følg separate vaskerådsetiketter på produktene. For mer informasjon, se gjeldende bruksanvisning for de respektive posisjoneringshjelpemidlene.

Produktet kan med fordel rengjøres på 60°C i maks 10 minutter. Fjern polster og belter/seler ved rengjøring av sittesystemet.

Tørk

Sittesystemet kan tørkes i skap ved maksimalt 60°C i opptil 10 minutter.

Kontroller ved resirkulering

Etter rengjøring og tørking, sjekk produktet for skader/slitasje. Vær oppmerksom på at produktets levetid er begrenset (se avsnittet Begrensninger i bruksanvisningen) når det skal vurderes om produktet er egnet for resirkulering.

Ødelagte, slitte eller sprukne deler skiftes ut. Bruk kun originaldeler fra Anatomic Sitt. Reservedeler kan bestilles i henhold til egen reservedelsliste for gjeldende produkt. For at produktet skal beholde sin CE-merking kan hjelpemiddelet kun utstyres med reservedeler levert av Anatomic Sitt AB.

Kontroller at alle skruer og muttere er strammet. Sørg for at bruksanvisningen og alle originale etiketter følger den nye bestillingen.

Etiketter/klistremerker

Ved behov for nye etiketter/klistremerker, kontakt Anatomic Sitt. For plassering på hjelpemiddelet, se www.anatomicsitt.com hvor du også finner bruksanvisninger.

Kontrollpunkter

Overordnet:

- Sjekk hele produktet og dets tilbehør for å identifisere ødelagte, sprukne eller slitte deler som skal byttes ut.
- Sjekk produktets samtlige funksjoner, eller slitte deler som skal byttes ut.

Sitte-/ryggdel:

- Sjekk at alle skruer og muttere er stramme.
- Sjekk at stolens justeringsmuligheter fungerer.
- Sjekk at ryggvinkelfunksjonen fungerer og at stemplene låses i valgt posisjon.
- Sjekk trekket og bytt om nødvendig.

Fotstøtte:

- Utfør funksjonskontroll av høyde- og vinkeljustering.
- Sjekk evt. slitasje på alle ledd og sørg for at de låses ordentlig.

Hodestøtte:

- Sjekk polsteret/trekket og bytt ved behov.
- Sjekk at hodestøtteleddet låses.
- Sjekk festet på hodestøtten og at den låses.

Armstøtte:

- Kontroller armstøttens justeringer for høyde, dybde og bredde.
- Kontroller armstøttefestene at de låser seg slik de skal.

Festesystem:

- Kontroller funksjonen slik at den låser seg.

Sikkerhetsstropp:

- Sjekk sikkerhetsstroppen på baksiden, at den ikke er skadet og at den låser seg.

Andre evt. tilbehør:

- Kontroller alle deler etter slitasje og bytt ved behov.
- Kontroller evt. låsninger og justeringsmuligheter.

Etterkontroll

Når resirkulering utføres, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og fungerer som ment. Sjekk også at merking, etiketter og advarselssymbolene er komplette og lesbare.

Avfallshåndtering

Gjenvinning

En brukt del eller produkt må demonteres. Delene skal separeres etter materialtype og etterlates på gjenvinningsstasjon eller tilsvarende. Batteri- og gassfjærer sorteres som farlig avfall.

Garanti og retur

Garanti og reklamasjon

Garanti gjelder generelt i ett (1) år mot fabrikkfeil fra leveringsdato eller etter avtale. Det gis ikke garanti for ytre påvirkninger eller unormal håndtering. Defekte varer må returneres for garantibehandling. Legg alltid ved følgeseddel.

For best mulig vurdering av reklamasjonen, må produktet være tørt og rengjort når det sendes tilbake.

Beskriv feilen og årsaken så grundig som mulig. Se garantireparasjon eller mulig erstatningsgaranti. Legg ved en kopi av fakturaen og oppgi at produktet skal returneres til deg etter reparasjon. Oppgi leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer. Reklamasjonsskjema kan lastes ned fra vår nettside.

Pakk produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å skrive ned forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal kunne spore forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.

Retur

Feilbestilte eller feilleverte varer skal returneres innen 20 dager fra leveringsdato. Legg alltid ved kopi av både følgeseddel og faktura. Skriv inn årsaken til at du returnerer varene dine. Returskjema er tilgjengelig på www.anatomicsitt.com.

Pakk produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å skrive ned forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal kunne spore forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.

Vær oppmerksom på at tilpassede produkter ikke kan returneres!

Revisjon

Følgende endringer er gjort i denne versjonen av bruksanvisningen.

Produktmerking

Nye etiketter s. 7

Kombinasjoner

Ny tekst s. 10

Monterings- og Justeringsanvisninger

Benlengdeforskjell/sittedybde s. 18

Revisjonsliste

rev. 2.0 - 2021-03-09

rev. 2.1 - 2021-05-25

rev. 2.2 - 2021-12-21

rev. 2.3 - 2023-02-20

rev. 2.4 - 2023-08-15

rev. 2.5 - 2023-09-13

SE

Anatomic Sitt AB (producent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besøksadresse

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

