

# AZAR



ERGOSEAT

---

BRUKERMANUAL




CE

[WWW.ERGOSEAT.NO](http://WWW.ERGOSEAT.NO)

# FORORD

---

Gratulerer med ditt nye Azar understell fra Ergoseat. Vi håper du blir fornøyd med produktet og funksjonaliteten enten du er bruker, assistent, forelder eller terapeut. Det er viktig at du setter deg inn i brukermanualen før produktet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet, vær god og sett det tilbake i plastlommen der du fant det.

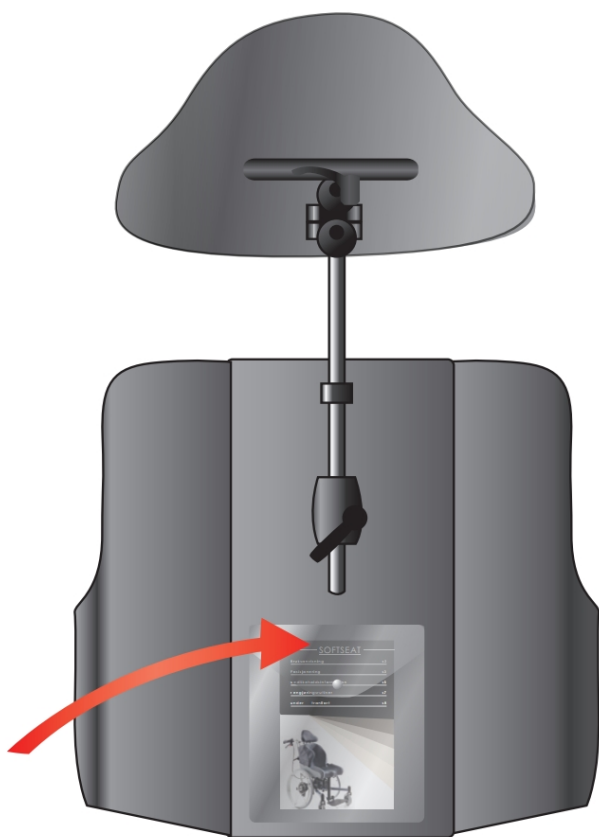

Produktet kan resirkuleres i sin helhet. Du finner mer informasjon om dette på [www.ergoseat.no](http://www.ergoseat.no)



# INNHALDSFORTEGNELSE

---

Forord	2
Innholdsfortegnelse	3
Sikkerhet	4
Tiltenkt bruk	6
Understell	7
Transport	12
Rengjøring	13
Vedlikehold	14
Teknisk informasjon	15
Utlevering med instruksjon i bruk	17

---

Bilder merket med (\*) inneholder komponenter som ikke er standard for dette produktet. Disse komponentene kan kjøpes som tilbehør direkte hos Ergoseat.

# SIKKERHET

---

- Enhver som skal benytte seg av dette produktet må lese gjennom brukermanual før bruk.
- Produsenten av produktet tar ikke ansvar for skader og feil som skulle oppstå dersom brukermanual ikke er fulgt.
- Benytt kun produktet dersom det er i forskriftsmessig stand.
- Dersom en feil eller skader blir oppdaget, skal produsent kontaktes før videre bruk.
- Følg alle instruksjoner og advarsler merket på produktet.
- Bruk bare produktet som angitt i kapittelet om tiltenkt bruk.
- Ikke gjør endringer i konstruksjonen.
- Azar understell er ikke godkjent for brukertransport i kjøretøy dersom bruker overskrider 120kg.
- Produktet er tiltenkt brukere opp til 190cm.

# SIKKERHET

---

- Ikke fjern deler eller komponenter fra produktet uten avklaring med produsent, da dette kan påvirke produktets egenskaper.
- Ettermontering og endringer av tilbehør uten Ergoseats godkjenning vil endre produktet og dets godkjenninger. Slike modifikasjoner kan føre til farlige situasjoner både for ledsager og bruker.
- Ikke benytt produktet i rulletrapp.
- Den som betjener produktet må ha fått opplæring i bruk, være tilregnelig og ikke påvirket av rusmidler.
- Produktet må følges opp ihht. rutiner for ettersyn beskrevet i servicemanual.

# TILTENKT BRUK

---

Denne brukermanualen gir en generell veiledning til hvordan produktet skal brukes trygt og korrekt. Ikke bruk understellet uten å lese denne manualen først.

Produktet har lovfestede reklamasjonsrettigheter ihht. EU/EØS.

For å kunne benytte produktet til brukertransport i bil eller buss, er det avgjørende at kravene i kapittel "Transport" følges.

Azar er et understell for benyttelse sammen med Ergoseat sitt Softseat individuell tilpassede sete.

Om produktet er sammenkoblet med et sete fra en annen produsent skal det foreligge kombinasjonsavtale eller full risikovurdering fra godkjent produsent. Det skal også tydelig fremgå av merking på produktet hvem som er ansvarlig for sammenkobling.

Ergoseat tilbyr en rekke tilbehør til Azar. Dersom det benyttes tilbehør fra annen produsent gjelder samme retningslinjer som i foregående punkt.

Dersom bruker av dette produktet ikke er i stand til å betjene det fullt og helt selv må det aldri benyttes uten tilsyn av person som er ansvarlig for bruk av produktet.

Azar er kun til bruk i et begrenset miljø på flatt underlag, inne eller ute, og skal ikke benyttes i terrenget.

# UNDERSTELL

---



Drivhjul

Styrehjul

Hurtigtløser aksel

Tilthendler



Kjørehåndtak

Bremsehendler

Tippesikring

# UNDERSTELL

---

## Bremser

Azar understell er utstyrt med integrerte Shimano skivebremser. De kan brukes til å bremse i fart, men også som en parkeringsbrems. De mindre røde hendlene er aktivering for låsing til parkeringsbrems.

Vær forsiktig ved bremsing i høyere hastighet, slik at bremsene ikke låser seg.



Unngå rask oppbremsing ved rygging eller sidehelning, dette kan føre til at understellet tipper.




# UNDERSTELL

---

## Tilt

Understellet er utstyrt med en mekanisk tiltvugge som opereres manuelt. Denne gjør at setet kan tiltes opp til 34° bakover. For å justere tilt må du først låse bremsene på drivhjulene. Trykk på den mindre hendelen på kjørehåndtaket. Juster til ønsket tilt er oppnådd, deretter slipp hendelen.



 Ved benyttelse av tilt forskyves brukers tyngdepunkt i stolen fremover og ned, dette for å hindre at stolen tipper bakover. Sett deg allikevel grundig inn i hvordan dette fungerer før du tilter stolen med bruker i setet. Utvis alltid forsiktighet ved benyttelse av tilt funksjon, og hold alltid med begge hender i kjørehåndtak.

# UNDERSTELL

---

## Hjul

Det er lett å ta av og på drivhjulene, da disse er montert med hurtigkobling på aksler. Før demontering av drivhjulene skal bremsehendlene låses.

For å ta av drivhjul trykk på knappen som vist på bildet, og trekk hjulet fra rammen.

For å ta på drivhjul, trykk inn den samme knappen, deretter før akslingen inn i hjulnavet og skyv mot rammen. Roter hjulet til det låser med et hørbart "klikk".



Hurtigtløser aksel



Pass på for klemfare ved av og på montering av drivhjul

# UNDERSTELL

---

## Tippesikring

Tippesikring er montert på innsiden av begge drivhjulene. Tippesikringen kan felles inn ved å trykke foten på den røde delen som er synlig. Denne vil da felles inn under rullestolen, noe som gjør det lettere å forsere hindringer, som fortauskanter eller trapper. For å aktivere tippesikringen igjen, svinges den tilbake i utgangsposisjon ved bruk av foten.



! Tippesikringen skal låse ved et hørbart "klikk". Tippesikringen kan ikke aktiveres/deaktiveres av bruker selv.

ErgoSeat anbefaler at tippesikring alltid er aktivert ved all benyttelse av understellet.


# TRANSPORT

---

Softseat eller baseplate fra Ergoseat i kombinasjon med Azar understell er godkjent som sete i motorvogn i henhold til ISO 7176-19. Dette medfører at bruker kan sitte i rullestolen under transport, dersom lovpålagt ordinært sikkerhetsbelte benyttes i tillegg. Dette er godkjent dersom rullestolen er utstyrt med 4 røde transportfester.

Sørg for å sette bremsen i lås etter at rullestolen er plassert riktig i kjøretøyet, med bruker i kjøreretning. De 4 røde transportfestene er montert i hvert sitt hjørne av rullestolen. Tilse at du bruker fire individuelle godkjente stropper for rullestoltransport. Monter stroppene med kroker, én i hvert feste. Kroken i motsatt ende, må monteres i et godkjent festepunkt i bilens karosseri.

Typegodkjenning bortfaller ved montering av andre seteløsninger fra andre produsenter.

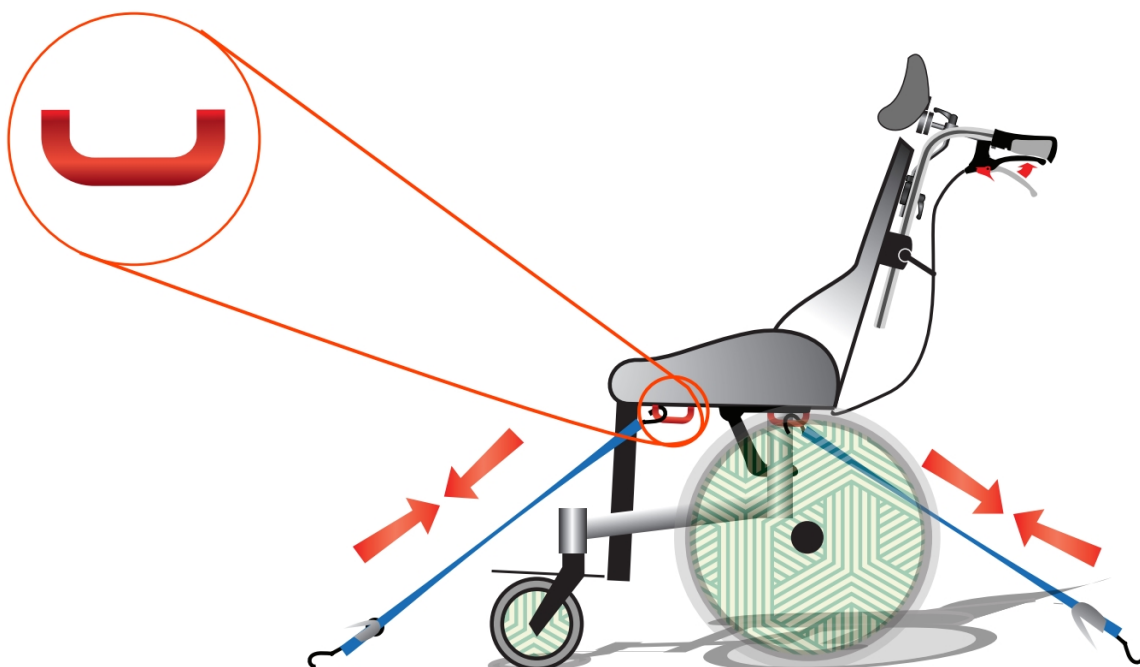

Sjekk alltid at din rullestol er godkjent for persontransport i bil.

# RENGJØRING


---

## Daglig renhold

Rengjøring av understellet må gjøres regelmessig med varmt vann og såpe. Tørk bort skitt og smuss med en klut eller svamp.



Pass på å ikke spyle vann direkte inn i viktige komponenter og deler som bremses og hjullager.

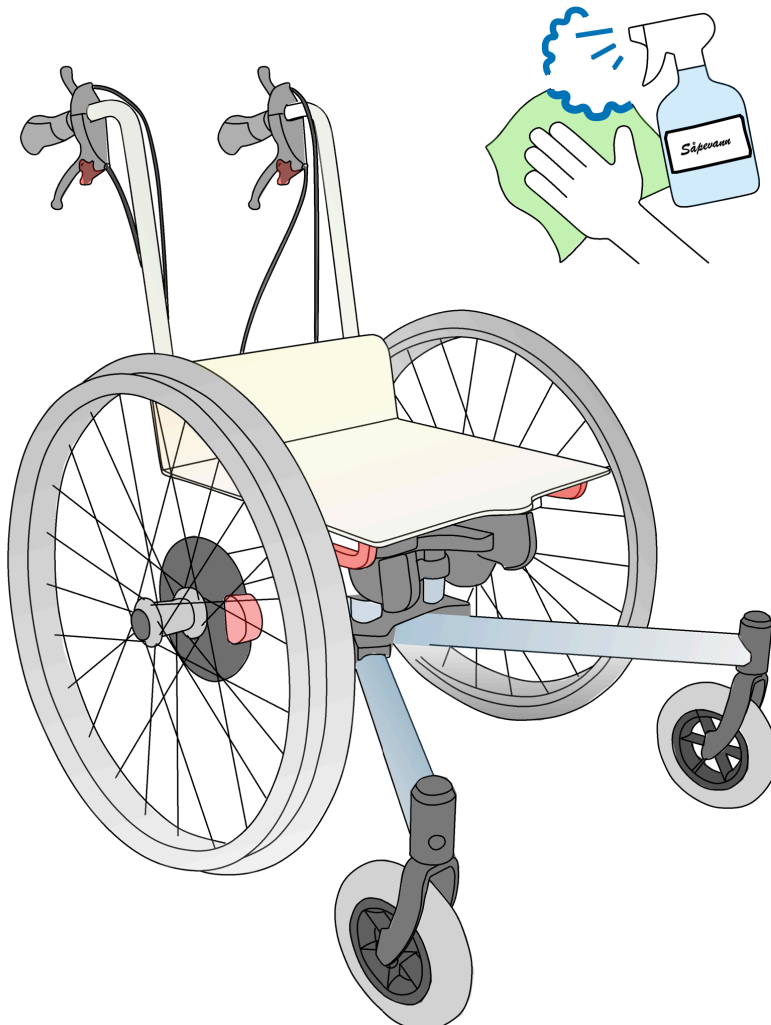

Unngå å spyle vann direkte mot lagrene i hjul, da dette kan gjøre skade.

# VEDLIKEHOLD

---

## Regelmessig vedlikehold og tilsyn

Understellet må vedlikeholdes riktig for å sikre pålitelig og sikker drift. Ikke bruk høytrykkspyler, da det kan skade understellet.

Sjekkpunkter	Beskrivelse	Intervall
Rengjøring	Understellet kan desinfiseres med et klorbasert desinfeksjonsmiddel, f.eks kloramin. Understellet kan også tørkes av med en fuktig klut	Månedlig
Hjul	Sjekk at trinser snurrer fritt og at låsing fungerer på hvert hjul.	Månedlig
Tiltvugge	Test tilt og påse at vinkelen ikke endres etter justering.	Månedlig
Tiltvaier	Sjekk at vaier ikke er rustet, bøyd eller skadet på annen måte. Sjekk særlig overganger til mekaniske deler. Bytt ved mistanke om feil.	Månedlig
Tilthendel	Sjekk at hendelen ikke er løs, og at koblingen mellom hendel og vaier ikke er oppfliset.	Månedlig
Sjekk at alle skruer og grep er strammet	Over tid og ved kjøring på ujevnt underlag.	Månedlig

# VEDLIKEHOLD

---


## Feilsøking

Dersom det skulle oppstå problemer med noen av komponentene, anbefaler vi å kontakte autorisert personell for veiledning og utbedring.

Før du kontakter autorisert personell er det noen punkter som kan undersøkes:

- Tilsjå at ingen skruer eller bolter er løse.
- Sjekk at alle wirene er stram og festet korrekt.
- Kontroller at setet er fastmontert på understellet, og sitter korrekt.
- Kontroller de aktuelle komponentene for slitasje.
- Se over alt tilbehør til både sete og understell for skader.

# TEKNISK INFORMASJON

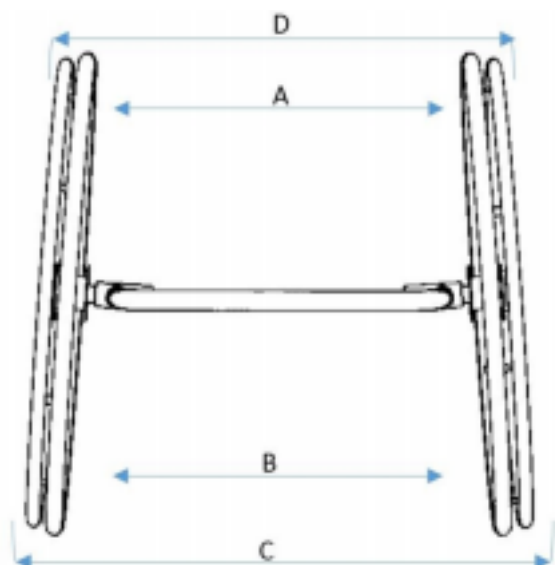

A= Innside oppe

B= Innside nede

C= Utside nede

D= Utside oppe

BESKRIVELSE	IA	XS 12"-16"	XL 16"-24"
<b>VEKT UNDERSTELL</b>	KG	19,4kg	22,4kg
<b>MAKS BRUKERVEKT</b>	120KG	120kg	120kg
<b>MAKS BRUKER HØYDE</b>	CM	150cm	190cm
<b>TILT</b>	34°		
<b>VINKEL FOTBRETTINNFESTNING</b>	45°		
<b>VINKEL ANKEL</b>	0-18°		
<b>LEGGLENGDE FOTSTØTTE</b>	11-40CM		
<b>Størrelser:</b>		<b>12"- 16"- 22"</b>	<b>16"- 20"- 22"- 24"</b>
<b>A</b>		44cm-43cm-42cm	66,5cm-66cm-66cm-66cm
<b>B</b>		46cm-47cm-47cm	71cm-71cm-72cm-72cm
<b>C</b>		58cm-59cm-59cm	83cm-83cm-84cm-84cm
<b>D</b>		54cm-55cm-54cm	78,5cm-79cm-79cm-78cm



Levert i kombinasjon med Softseat og originalt tilbehør er Azar godkjent etter ISO7176-19 for brukertransport i bil med maks brukervekt 120 kg.



# UTLEVERING MED INSTRUKSJON I BRUK

---

**Dato:** .....

**Personell fra Ergoseat:** .....

**Vi bekrefter å ha gjennomgått instruksjoner i daglig bruk sammen med terapaut fra Ergoseat.**

**Vi er gjort oppmerksom på faremomenter, og hvor vi skal søke ytterligere opplysninger om produktet dersom det er behov for dette.**

**Til stede:**







**ERGOSEAT**

Kontakt oss



**WWW.ERGOSEAT.NO**



**POST@ERGOSEAT.NO**



**55101600**



**LØNNINGSFLATEN 28  
5258 BLOMSTERDALEN**



**ERGOSEAT**