

ZITZI FLIPPER G2

BRUKSANVISNING



Innhold

Denne brosjyren inneholder informasjon om hvordan Zitzi Flipper G2 skal brukes, hvordan vedlikeholde den, advarsler om ting man skal være oppmerksom på og andre viktige opplysninger. Før Zitzi Flipper G2 tas i bruk, anbefales det å lese denne bruksanvisningen. Hvis du har spørsmål om Zitzi Flipper G2, kontakt Hjelpemiddelspesialisten AS.

1. Produsent	3
2. Spesialtilpasning	3
3. Introduksjon	3
3.1 Innledning.....	3
3.2 Kontakt og korrespondanse.....	4
3.3 CE-merking - klassifisering.....	4
3.4 Samsvarserklæring.....	4
4. Tiltenkt bruk	4
5. Symboler	5
6. Produktmerking	6
7. Sikkerhetsinstruksjoner	7
7.1 Opplæring og kvalifikasjoner.....	7
7.2 Advarsler og forholdsregler.....	7
7.3 Sjekk før bruk.....	9
7.4 Begrensninger.....	10
7.5 Gjenværende risiko.....	11
7.6 Godkjente kombinasjoner.....	11
7.7 Avvik/hendelser.....	11
8. Tekniske data	12
9. Tilpasning og spesialtilpasning	13
10. Monterings- og justeringsinstruksjoner	14
10.1 Montering av kjørebøyle.....	14
10.2 Montering av kjørehåndtak.....	14
10.3 Parkeringsbrems.....	15
10.4 Retningslås.....	15
10.5 Toppesikring.....	16
10.6 Rammeforlengelse.....	16
10.7 Montering av sittesystem.....	17
10.8 Justering av setehøyde - gassfjær.....	18
10.9 Justering av setehøyde - aktuator.....	18
10.10 Tiltfunksjon.....	19
10.11 Lading av batteri.....	20
10.12 Elektronisk boks.....	20
10.13 Fotstøtte.....	21
10.14 Fotbrett.....	22
10.15 Leggstøtte.....	23
11. Oppsummering og etterkontroll	24
12. Transport i kjøretøy	24
13. Kontroll av produktet	24
14. Service og vedlikehold	25
15. Avfallshåndtering	29
16. Garanti og retur	29
17. Revisjon	30

1. Produsent

Produktet er produsert av Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postadresse: Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping

Besøksadresse: Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping

Telefon: 011-161800

E-post: info@anatomicsitt.com


Webside: anatomicsitt.com

Instruksjonsfilmer: youtube.com/anatomicsitt

Facebook: facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

2. Spesialtilpasning

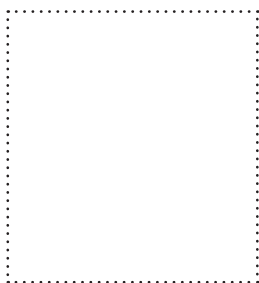

Kryss av i ruten ved eventuell spesialtilpasning av produktet.

CE-merkingen slutter å gjelde for spesialtilpassede produkter.



3. Introduksjon

3.1 Innledning

Gratulerer med valg av hjelpemiddel. Vi håper du vil få stor glede av å bruke dette produktet. For at du skal få mest ut av produktet på en trygg og sikker måte, er det viktig at du leser denne bruksanvisningen nøye.

Dette gjelder bruker og alle personer i brukers nærhet.

Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Nye utgaver kan lastes ned fra Anatomic Sitt sin hjemmeside: www.anatomicsitt.com.

Kontaktinformasjon

Hjelpemiddelspecialisten AS
Rosenholmveien 22
1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70

E-post: firmapost@hm-spes.no

Webside: www.hm-spes.no

3.2 Kontakt og korrespondanse

Produktetiketten inneholder produktets artikkelnummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numrene må oppgis i korrespondanse med Anatomic Sitt angående produktene.

3.3 CE-merking - klassifisering

Hjelpemiddelet med tilbehør er et CE-merkets medisinsk utstyr, klasse I, i henhold til klassifiseringsreglene i vedlegg VIII (EU) 2017/745.

3.4 Samsvarsklæring

Produktet oppfyller kravene til medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr, Se gjeldende EU-samsvarserklæring for produktvarianter og tilbehør, www.anatomicsitt.com/dokument.

4. Tiltent bruk

Zitzi Flipper G2 er et innendørs understell med hjul. Produktet kan heves og senkes og er beregnet for bruk med et sittesystem eller enkeltsete fra Anatomic Sitt. Zitzi Flipper G2 er et gjenbrukbart produkt.

5. Symboler



Dette symbolet finnes i bruksanvisningen og gjør leseren oppmerksom på f.eks viktig sikkerhetsinformasjon.



Dette symbolet indikerer eventuell klemfare.



Instruksjoner og tips som forenkler bruken av produktet.



Angir at bruksanvisningen må leses før produktet tas i bruk. Symbolet finnes på produktet.



www.anatomicsitt.com

Angir at bruksanvisningen alltid må leses før bruk. Nettadresse indikerer hvor dokumentet befinner seg elektronisk.



Angir at bruksanvisningen bør leses for å få viktig sikkerhetsinformasjon om f. eks advarsler som ikke finnes på etiketten til det medisinske utstyret.



Angir produsenten av det medisintekniske utstyret som definert i (EU) MDR 2017/745. Kan også brukes med produksjonsdato.



Indikerer datoen da det medisintekniske produktet ble produsert.



For å identifisere en pasienttilknyttet del av type BF. (For elektrisk utstyr i helsevesenet).



Angir at produktet er dobbeltisolert, dvs. av isolasjonsklasse II.



Angir batchnummeret til produksjonen slik at batch kan identifiseres.



Angir at produktet er et medisintekniske produkt.



Angir produsentens referanse- nummer/artikkelnummer slik at det medisintekniske utstyret kan identifiseres.



Angir produsentens serie- nummer slik at et spesifikt medisintekniske produkt kan identifiseres.



Unik produktidentifikator som muliggjør entydig identifikasjon av spesifikke medisintekniske enheter.



Indikerer at produktet er CE-merket i henhold til gjeldende EU-direktiver.



Angir hvilke temperaturgrenser produktet kan eksponeres for.



Viser hvor laderen skal kobles til håndkontrollen.



Indikerer at elektroniske produkter ikke skal kastes som vanlig avfall.

6. Produktmerking

Etikett på hovedprodukt

The main product label for 'Flipper G2' contains the following information:

- MD** Inneunderrede **Flipper G2**
- Zitzi Flipper G2 stl. 3 - EI (gaskolvtilt)**
- REF** 844306 **SN** 52499 **2021-04-30**
- Anatomic Sitt i Norrköping AB**
- Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping
- CE** **UDI** (01)7322478443060(21)52499
- www.anatomic sitt.com** Enhetsvekt 22 kg Maxlast 75 kg
- !** **i** **UDI** (01)7322478443060(21)52499
- !** Driftscykel 10%, max 2min/18min Totalvekt 97 kg

Annotations on the right side of the label:

- Type produkt
- Produktgruppe
- Produktnavn
- UDI transportør
- Maks. belastningsvekt inkl. bruker
- Forholdet for maksimal driftstid kontra hvile på det elektriske systemet.

Etikett på tilbehør

The accessory label for 'Flipper G2' contains the following information:

- MD** Tillbehör **Flipper G2**
- Ramförlängning (par) - Flipper G2 stl. 4**
- REF** 844357 **LOT** 64057 **2021-04-30**
- Anatomic Sitt i Norrköping AB**
- Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping
- CE** **UDI** (01)7322478443572(10)64057
- !** **i** **UDI** (01)7322478443572(10)64057

Annotations on the right side of the label:

- Type produkt
- Produktgruppe/produktgrupper
- Produktnavn
- UDI transportør

7. Sikkerhetsinstruksjoner

7.1 Opplæring og kvalifikasjoner

- Montering, service og resirkulering skal alltid utføres av kvalifisert personell (teknikere ved Hjelpemiddelsentralen, Hjelpemiddelspecialisten eller tilsvarende).
- Vedtak om tilrettelegging/spesialtilpasning skal tas av kvalifisert medisinsk personell og utføres av kvalifisert fagpersonell (teknikere ved Hjelpemiddelsentralen, Hjelpemiddelspecialisten eller tilsvarende).
- Innstillinger, justeringer, samt utprøving av hjelpemiddelet skal alltid utføres av kvalifisert personell (spesialistpersonell ved hjelpemiddelsentralen, Hjelpemiddelspecialisten eller tilsvarende).
- Foresatt, ergoterapeut eller person med tilsvarende kompetanse og kunnskap om bruker og hjelpemiddelet, skal alltid foreta en risikovurdering før bruk.

7.2 Advarsler og forholdsregler



Les alltid bruksanvisningen før bruk.



Innstillinger skal kun gjøres av kvalifiserte fagfolk. Det er kun tillatt med innstillinger på den måten som er beskrevet i denne bruksanvisningen.



Kontroller produktet for feil og mangler før det leveres ut til bruker.



Den som foreskriver hjelpemiddelet er ansvarlig for å instruere brukeren og/eller andre personer i dets nærmiljø hvordan produktet skal brukes på en sikker måte. Kontroller alltid produktets funksjon før bruk.



Justeringer kan kun gjøres på den måten som er beskrevet i denne bruksanvisningen.



Etter all montering og justering, eller servicearbeid, kontroller og stram alle festeskruer og mutre.



Kontroller at sittesystemet er godt festet til understellet før bruk.



Bremsene skal alltid være låst ved inn- og utstigning.



Bremser som virker på dekkene er ikke ment å brukes som brems under kjøring, men skal kun brukes som låsebrems.



Bruk aldri fotplaten når du går inn og ut av hjelpemiddelet.



Vurder klemfaren når du senker og hever setehøyden, og endrer tilten. Unngå å ha hender under setet når du foretar justeringer. Unngå å vippe setet bakover maksimalt når det er i laveste posisjon for å redusere risikoen for skade på setet/adapteren.



Vær forsiktig og oppmerksom på den økte risikoen for velt når du bruker understellet på ujevnt underlag. Understellet må kun parkeres på vannrette og jevne underlag.



Løft alltid i understellet - aldri i sitteenheten.



Utfør aldri service når produktet er bruk.



Merk at dersom brukeren tar tak i gjenstander utenfor hjelpemiddelet eller lener seg for langt ut av hjelpemiddelet, kan det oppstå en tyngepunktforskyving som kan føre til økt velterisiko.



Overbelast aldri enheten, se avsnitt for "Begrensninger for gjeldende maksimal belastning".



La aldri brukeren være uten tilsyn når hjelpemiddelet er i bruk.



Sjekk alltid brukeren for rødhet eller trykkmerker etter bruk av hjelpemiddelet.

7.3 Sjekk før bruk

Inspeksjon og kontroll skal utføres før hver bruk i henhold til punktene nedenfor.

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader. Sjekk spesielt skruer og muttere, samt grep.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller stabiliteten til produktet.
- Kontroller eventuelle tippesikringer.
- Kontroller bremsene.
- Sjekk tilstanden til hjulene og at de sitter fast.
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, som ryggvinkel, tilt, høydejustering etc. angående mobilitet og låsing.
- Kontroller justeringen av tilt og ryggvinkel, slik at de fungerer slik de skal.
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, som for eksempel ryggvinkling, tilt, høydejustering etc.

Dersom det oppdages feil og mangler. Ikke bruk produktet. Kontakt din distributør for hjelp.



EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet

Generell info

Det elektriske systemet i Flipper G2 El. er CE-merket og samsvarer med EMC-direktivet 2014/30/EU og er testet i henhold til kravene i IEC 60601-1-2:2014.

Tredjeparts komponenter

Bruk av andre komponenter og kabler enn de som er produsert og levert av leverandøren, kan skape en økning av elektromagnetiske utslipp eller redusere den elektromagnetiske immuniteten til det elektriske systemet og føre til interferens av ytelsen.

Interferens med annet utstyr, generell/RF

Unngå å bruke elektronikk i nærheten av annet elektrisk utstyr da det kan forringe ytelsen. Dersom det er nødvendig å bruke anlegget i nærheten av andre elektriske anlegg, må disse overvåkes for å se at de fungerer normalt.

Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr bør ikke brukes nærmere enn 30 cm fra noen del av det elektriske systemet. Dette er på grunn av risiko fra ytelsesforringelse.

Hvis det registreres uvanlig oppførsel i det elektriske systemet, spesielt hvis systemet er i nærhet av mobiltelefoner, mikrobølger og radio, kan dette være en indikasjon på elektromagnetisk interferens. Hvis dette oppstår, prøv å flytte Flipper G2 El. lengre unna det forstyrrende utstyret.

Ved bruk av elektrisk hev/senk eller tilt, er Flipper G2 El. internt drevet, da den er utstyrt med et batteri.



Type BF del

Flipper G2 El. er klassifisert som type BF del.



Klasse II

Flipper G2 El. under lading klassifisert som et klasse II-produkt ettersom laderen er klasse II

7.4 Begrensninger

Maks. belastning

Den høyeste belastningsvekten er 50 kg (str. 2), 75 kg (str. 3) og 130 kg (str. 4).

Med belastningsvekt menes den maksimale vekten som understellet kan utsettes for, som for eksempel brukere og sittesystemer.

Produktets levetid

Forventet levetid på produktet er 3-5 år ved normal bruk i henhold til produktets tiltenkte formål, forutsatt at instruksjonene i denne bruksanvisningen følges. Den faktiske levetiden kan imidlertid variere avhengig av hvor hyppig og intensivt produktet brukes.

Grenseverdier for bruk

Flipper G2 med el-funksjoner:

+5°C til +40°C

20 til 90% luftfuktighet

800hPa til 1060hPa atmosfæretrykk



Grenseverdier for lagring og transport

Flipper G2 med el-funksjoner:

-25°C til +70°C

20 til 90% luftfuktighet

800hPa til 1060hPa atmosfæretrykk



Gassfjær

Dersom produktet skal lagres over lengre tid, vurder følgende:

Gassfjær bør brukes regelmessig for å opprettholde funksjonen. Når produktet ikke er i bruk, må gassdemperen aktiveres minst en gang hver 6. måned. I tillegg bør den oppbevares på en slik måte at stempelstangen er rettet nedover, ellers kan gasstempelstangen ryke og slutte å fungere.

7.5 Gjenværende risiko

Vær oppmerksom på at produktet og dets tilbehør er riktig innstilt slik at brukeren ikke opplever ubehag eller får skader under bruk. Hvis dette skjer, foreta justeringer eller installer passende tilbehør.

Begrenset tid for hudkontakt angående varme (gjelder Flipper G2 EI.)

Underdeler kan nå en temperatur på over 41°C og må derfor ikke være i kontakt med brukerens hud lengre enn det som er angitt i tabellen under (med **t** menes tiden).

Del	Maksimal temp.	Maks. tid
Håndkontroll	42°C	10 min ≤ t
Tilt	45°C	1 min ≤ t 10 < min
Løfteaktuator	51°C	t < 1 min
Ladere	44°C	1 min ≤ t 10 < min



7.6 Godkjente kombinasjoner

For at produktet skal beholde sin CE-merking, må hjelpemiddelet kun leveres med tilbehør og reservedeler levert av Anatomic Sitt AB. Se produktets bestillingsdokumentasjon for mulig tilbehør og reservedeler.


7.7 Avvik/hendelser

Ved funksjonsfeil, ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen, Hjelpemiddelspesialisten eller produsenten. Hvis det oppstår en alvorlig hendelse, bør det rapporteres til Anatomic Sitt AB.

8. Tekniske data - Zitzi Flipper G2

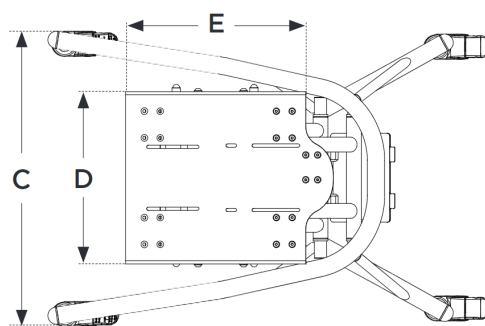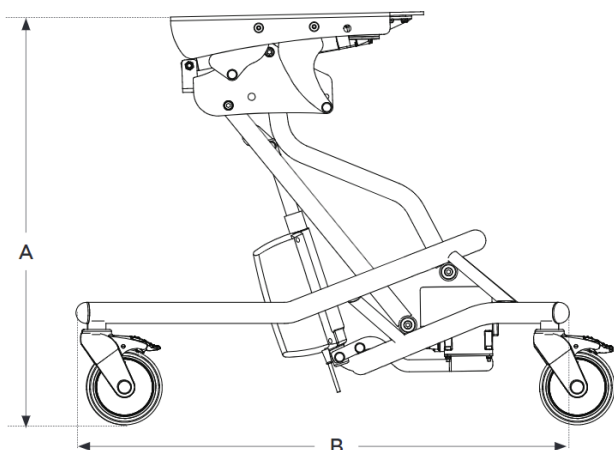

	Høyde (A)	Lengde (B)	Bredde (C)	Sitteplass DxEx	Belastningsvekt	Vekt Manuell	Vekt Elektrisk	Tilt
Str. 2	28-64 cm	65 cm	59 cm	26x32 cm	Maks. 50 kg	18 kg	21 kg	0° til 30° alt. -5° til 25°
Str. 3	28-64 cm	77 cm	59 cm	26x32 cm	Maks. 75 kg	19 kg	22 kg	0° til 30° alt. -5° til 25°
Str. 4XL	45-71 cm	87 cm	61 cm	34x35 cm	Maks. 130 kg	--	26 kg	0° til 30° alt. -5° til 25°

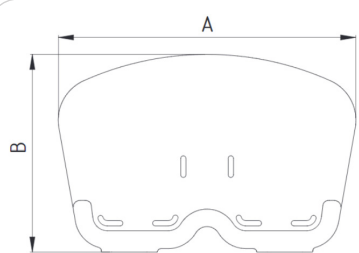

FOTSTØTTE

A X B


Helt str. 2	345 x 225 mm
Helt str. 3	380 x 260 mm
Helt str. 4	380 x 310 mm
Helt str. 5	430 x 310 mm
Helt str. 6	480 x 310 mm

A X B


Delt str. 2	160 x 220 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm
Delt str. 4	175 x 308 mm

Størrelse 2 - 6

Fotstøttestag profillengde	35 cm
Langde tagged	80 cm

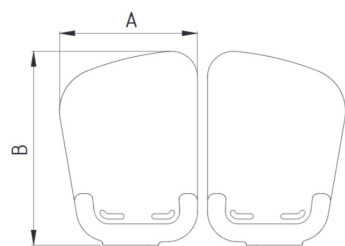

FOTBRETT

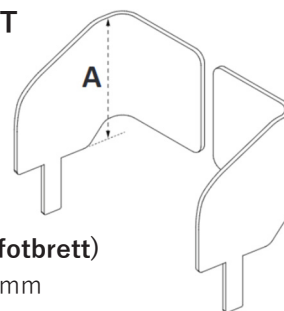


A (høyde fra fotbrett)


Str. 2	180 mm
Str. 3	210 mm
Str. 4	240 mm
Str. 5	240 mm
Str. 6	240 mm

Fotbrett str. 2 passer fotstøtte str. 2 osv.

KJØREBØYLE

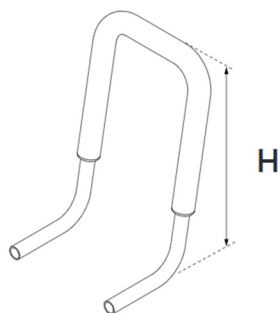

KJØREHÅNDTAK

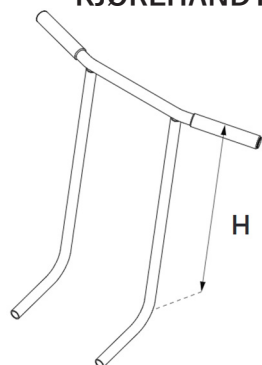

	Høyde (H)
Kjørebøyle str. 1	13 cm
Kjørebøyle str. 2	35 cm
Kjørehåndtak	50 cm

Høydemålene er fra toppen av sitteplaten til håndtaket.

9. Tilpasning og spesialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet endres på noen måte, skal det vurderes om det er en tilpasning eller en spesialtilpasning.

En tilpasning er en endring som gjøres innenfor rammen av produktets CE-merking. Alt annet er spesialtilpasning. Justeringer kan kun foretas av den som anses som kvalifisert for oppgaven og skal alltid utføres på en profesjonell måte.

Tillatte tilpasninger innenfor rammen av CE-merking

Lengden på fotstøtteprofilen kan forkortes for å bedre passe brukeren.

Hull i sitteplaten kan legges til for montering. Imidlertid må følgende kriterier følges:

- Ikke fler enn 4 hull
- Hull må ikke være større enn 6,5 mm
- Hull skal ikke være mindre enn 15 mm fra eksisterende hull og spor.
- Hull skal ikke være mindre enn 15 mm fra kanten av platen.

Risikoanalyse


Merk at det alltid skal foretas en risikovurdering, både ved tilpasning og spesialtilpasning. Produktet må aldri være en fare for brukeren eller personer i nærheten, etter tilpasningen.

Merking

Produktet bør merkes med informasjon om at det er tilpasset en bestemt bruker, slik at det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

10. Monterings- og justeringsinstruksjoner

Montering skal alltid utføres av kvalifiserte fagfolk (teknikere ved hjelpemiddelsentralen, Hjelpemiddelspesialisten eller tilsvarende). Instruer brukeren og/eller andre personer om produktets funksjoner slik at hjelpemiddelet kan brukes på en sikker måte.

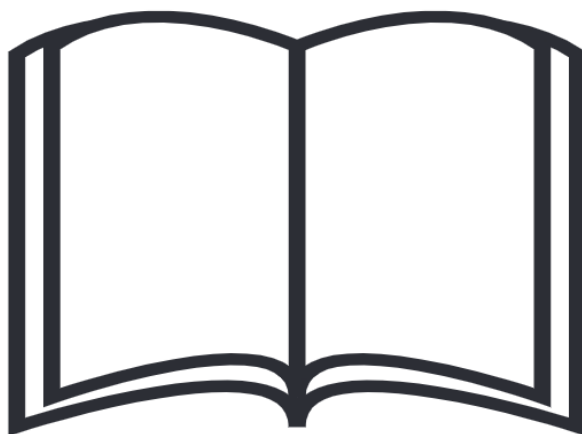

10.1 Montering av kjørebøyle

Sett styret inn i rørrammen og stram skruene (A) godt etter montering.



10.2 Montering av kjørehåndtak

Sett kjørehåndtaket inn i rørrammen. Stram skruene (A) godt etter montering. (Se bilde over).




10.3 Parkeringsbrems

Lås og lås opp parkeringsbremsen

For å låse hjulene i gjeldende posisjon, tråkk på bakkanten av pedalen. For å låse opp hjulene igjen, tråkk på pedalens fremre kant.

Ved aktivering av låsen, låses både **hjulenes rullefunksjon og hjulenes retning**.

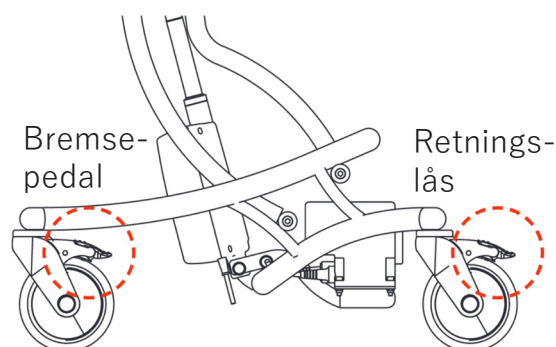

Låst brems



Åpen brems

Hurtigguide

- **Låse**
Lås hjulene ved å tråkke på bakkanten av pedalen.
- **Låse opp**
Frigjør hjulet ved å tråkke på pedalens fremre kant.

10.4 Retningslås

Montering

Hjul med retningslås (grå pedal) er tilgjengelig som ekstrautstyr i størrelse 2-3 (standard 4) og er montert på høyre, bakre hjulposisjon. (**OBS!** Ingen brems på dette hjulet).

Lås og lås opp retningslåsen

Du aktiverer retningslåsen ved å tråkke på bakkanten av pedalen (grå pedal). Når hjulet er rettet fremover, vil retningslåsen begynne å fungere. For å låse opp retningslåsen, tråkk på forkanten av pedalen.



Retningslås aktivert



Retningslås deaktivert

10.5 Tippesikring

Montering av tippesikringen (A) gjøres ved først å løsne skruen som holder hjulet. Skyv deretter tippesikringen over hjulet mot rammerøret. Lås tippesikringen fremover i retning av rammen ved hjelp av de tre skruene (B). Skru på hjulet igjen.



10.6 Rammeforlengelse

Montering

Montering av rammeforlengeren gjøres ved først å løsne skruen (A) og ta av hjulet fra rammen. Fjern deretter endepluggen (B) på rammerøret. Skyv inn rammeforlengelsen (C) og fest forlengelsesdelen med den vedlagte skruen (D) med skive. Skru hjulet tilbake i forlengelsesseksjonen med skruen (A).




Ved bruk av Active sete på Flipper G2, må det benyttes rammeforlengelse pga. risiko for å tippe. Det samme gjelder andre sittesystemer som er montert langt frem. Ved behov kan det også monteres tippesikringer for økt sikkerhet.

10.7 Montering av sittesystem

Montering av sittesystem

Sittesystemets festeplate monteres enkelt på understellet med 4 skruer, skiver og mutre i merkede spor (A) på understellets sitteplate.

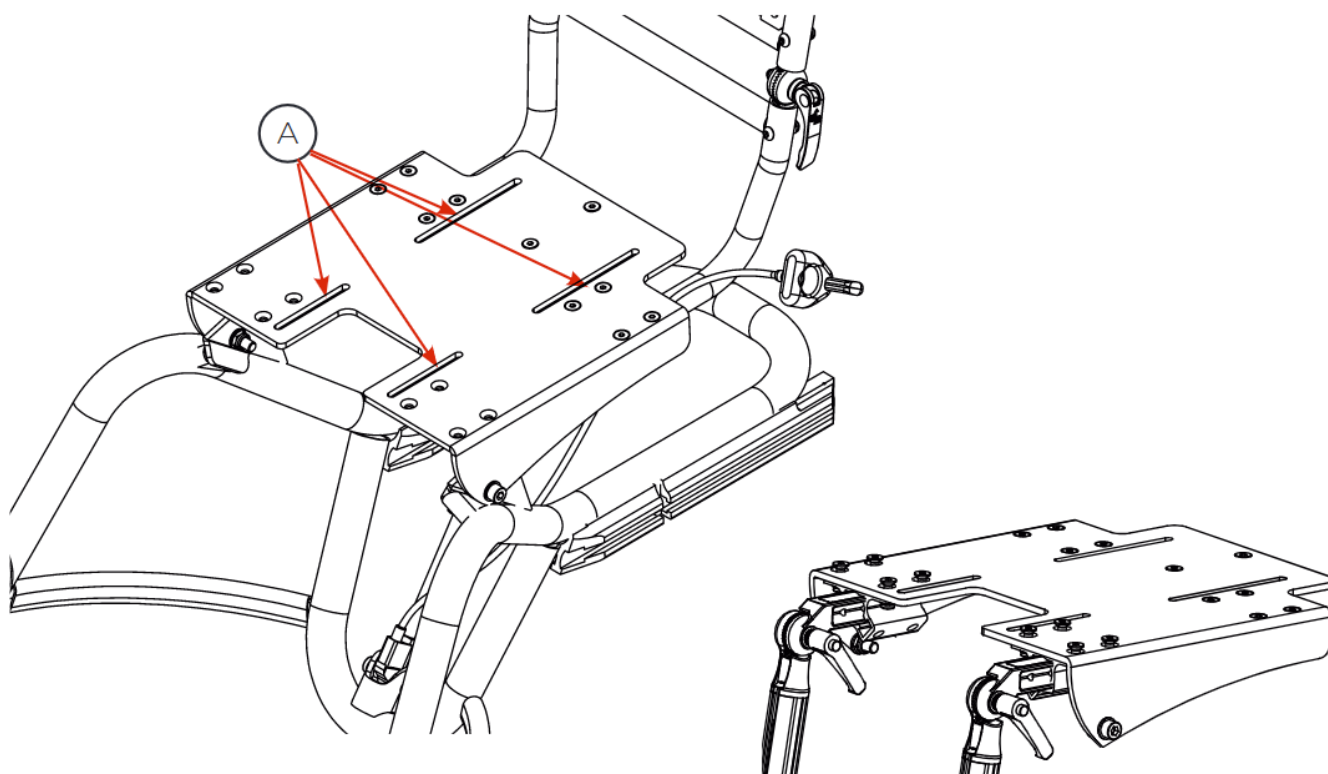

For ytterligere informasjon om monteringsplater, se bruksanvisning for valgt sittesystem.



Unngå å montere setet for langt bak. Det er en risiko for at setet tar inn understellet ved senking ved maksimal tilt og da kan setet skyves løs og falle av understellet. Kontroller alltid klaringen og balansen når du monterer setet i ekstreme posisjoner med hensyn til høyder og tilt.

10.8 Justering av setehøyde - gassfjær

Setehøyden justeres enkelt ved hjelp av fotpedalen. Husk å alltid holde en hånd på sittesystemet ved justering.

- Aktiver gassfjæren ved å trykke ned fotpedalen.
- Juster sittesystemet til ønsket høyde.
- Slipp fotpedalen når du har nådd ønsket høyde. Høyden er nå låst.




Vær oppmerksom på eventuell klemrisiko



10.9 Justering av setehøyde - aktuator

Setehøyden justeres med en elektrisk håndkontroll. Alltid hold en hånd på sittesystemet ved justering.

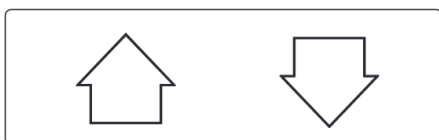

- Pil opp (A) hever sitteplaten
- Pil ned (B) senker sitteplaten




Vær oppmerksom på eventuell klemrisiko

10.10 Tiltfunksjon

Tiltfunksjon

Flipper G2 har to forskjellige posisjoner for tilt som stilles inn ved hjelp av hull ved siden av seteplaten. I standardversjonen er festet i det nedre hullet. Ønskes mer negativ tilt, kan du flytte festet til det øvre hullet.

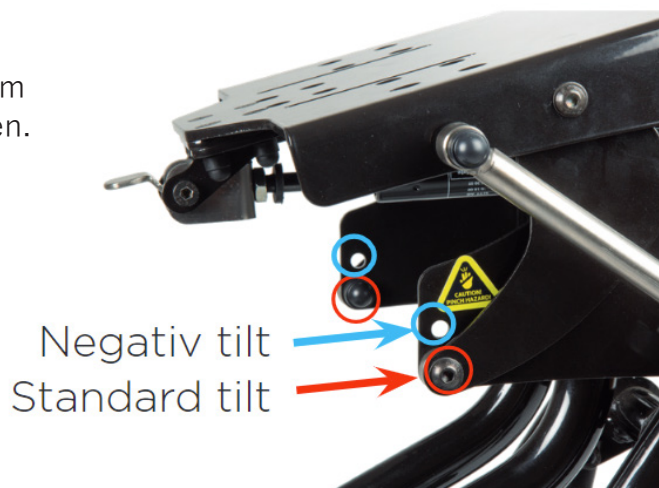

Tiltfunksjon med gassfjær

Vinkelen på setet justeres ved å løsne grepet (A) og skyv spaken på aktiveringshuset nedover (sitter i bakkant av setet). Skyv deretter ned og forover. Slipp håndspaken (B) for å låse ønsket vinkel og stram deretter grepet (A) for å sikre at vinkelen er låst.



For å tilbake stille sete vinkelen til sin opprinnelige posisjon, løsne gantergrepet (A), trykk på håndspaken og trekk seteplaten opp og bakover ved å trekke i kjørebøylen.

Kontroll


Sjekk alltid at tilten er låst når du har nådd ønsket vinkel.

Låsing

Gantergrepet (A) må alltid være låst etter enhver justering.

Tiltfunksjon med aktuator

Juster tiltposisjonen ved å holde nede trykkknappen (C) for forovertilt og trykkknappen (D) for bakovertilt. Slipp trykkknappen på håndkontrollen når ønsket tiltposisjon er nådd.

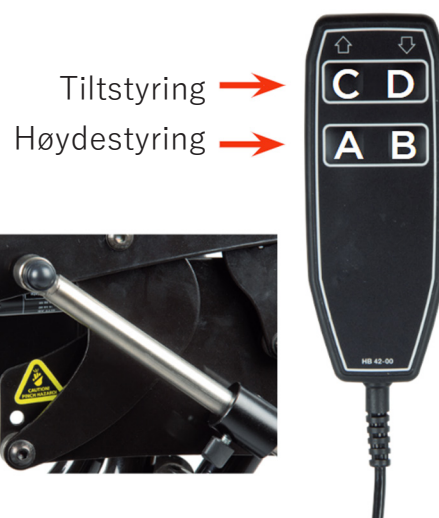

Vær oppmerksom på eventuell klemrisiko



Plasser håndkontrollen for å minimere risikoen for utilsiktet aktivering av heve- og senkfunksjonen, f. eks. når den plasseres ved siden av et bord,

10.11 Lading av batteri


Koble laderpluggen til kontakten på siden av håndkontrollen. Koble deretter laderens strømkabel til en stikkontakt (220 V).

Laderen har et lys som viser enten grønt eller gult.

Grønt = Vedlikeholdslading

Gult = Normal lading

For å koble fra lading/strømforsyning, koble laderen fra stikkontakten.

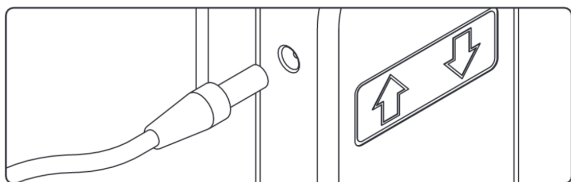

Ladekontakten er plassert på siden av håndkontrollen og er merket med et symbol som vist.




Den første ladingen skal vare i 24 timer. Lading deretter anbefales at skal gjøres hver natt. Batteriet må aldri være helt utladet, da batteriet kan slutte å fungere. Kun originale ladere må brukes.



Husk at laderen skal være lett tilgjengelig under hele ladingen. Husk derfor å ikke legge noe i veien for kontakten.

10.12 Elektronisk boks

Ved tilkobling av den elektroniske boksen, skal kontakten for hev/senk-aktuator kobles til boks-kontakt merket 1. Tiltfunksjonaktuator kobles til boks-kontakt merket 2.

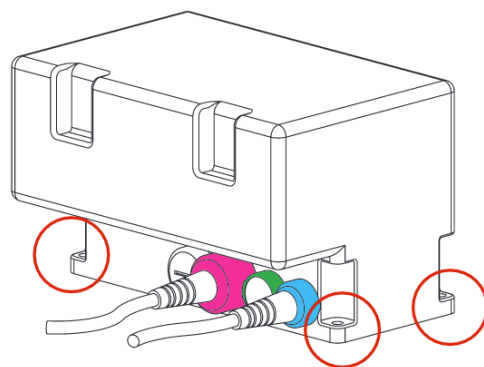


For å skifte ut den elektroniske boksen, koble først fra alle kabler. Løsne deretter 4 skruer som vist ovenfor. Gjør i omvendt rekkefølge for å installere den nye.

HÅNDKONTROLL

AKTUATOR (TILT)

AKTUATOR (LØFT)

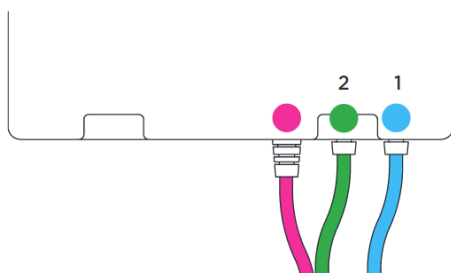

10.13 Fotstøtte

Montering av fotstøtte

Følgende skruer (C) brukes til å montere de to brakettene til fotstøttene.

Brakettene monteres som vist på bildet med fire skruer/brakett i forkant av seteplaten.

Merk at låseskruene (B) skal peke innover/nedover. Monter fotstøttens firkantrør (A) i fotstøttefestene under seteplatens fremre del. Lås fotstøtten med låseskruene (B) på begge sider.

Sikkerhetsstopp

Sikkerhetsstopp (D) i form av en tønne-mutter er montert i bunnen av fotstøtteprofilen.

Sikkerhetsstoppet kan også brukes til å finne tilbake til en forhåndsinnstilt høydeposisjon.





Monter et ekstra sikkerhetsstopp over fotstøtten i fotstøtteprofilens spor for enkelt å finne tilbake til en alternativ høydeposisjon (for eksempel med eller uten sko).

Justering av vinkel ved kneleddet

Når fotstøtten er montert i setteplaten, er det mulig å justere vinkelen på fotstøtten i kneleddet. Løsne gantergrepene (E) litt og juster til ønsket vinkel. Stram deretter gantergrepene.

Justering av fotstøttens høyde

Når fotstøtten er montert i setteplaten, er det mulig å justere høyden på fotstøtten ved ankel. Løsne gantergrepene (F) litt og juster til ønsket høyde. Stram deretter gantergrepene.

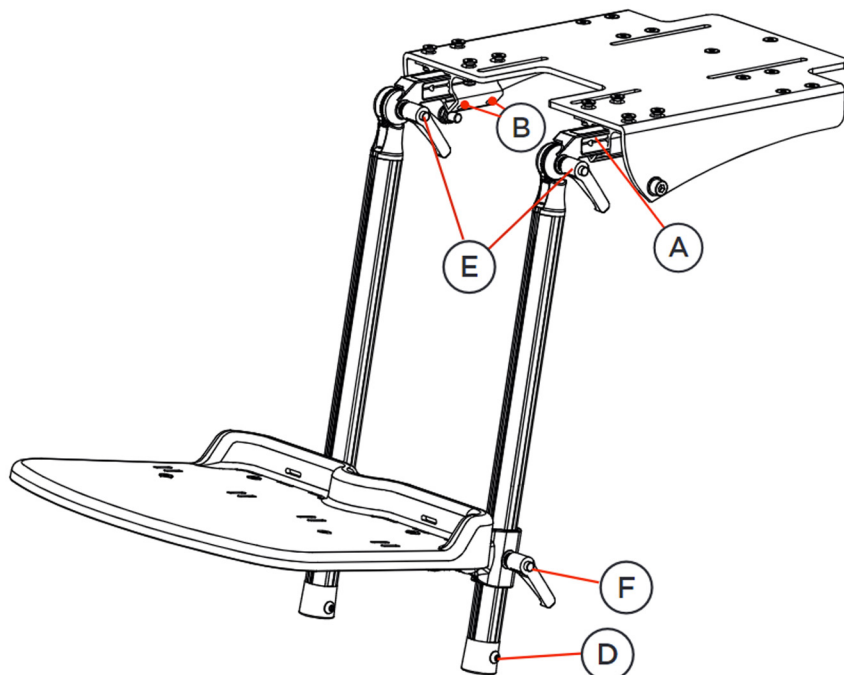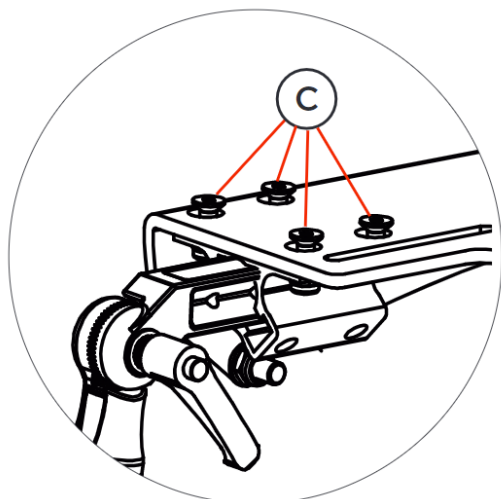


10.14 Fotbrett

Fotbrett dobbelstag

For å montere fotbrett, start med å skyve tønnemutteren (A) inn på fotbrettet (B) i fotstøttebraketten (C). Juster deretter fotstøtten (D) til ønsket høyde og stram ganteregrepet (E).

Juster ønsket høyde og bredde på fotbrettet med skruene (F) og (G). Plastbraketten (H) på fotbrettet skal føres gjennom sporet (I) på fotsøtteleplaten. Avslutt med å montere medfølgende polstring og sjekk at alle skruer er skikkelig strammet.

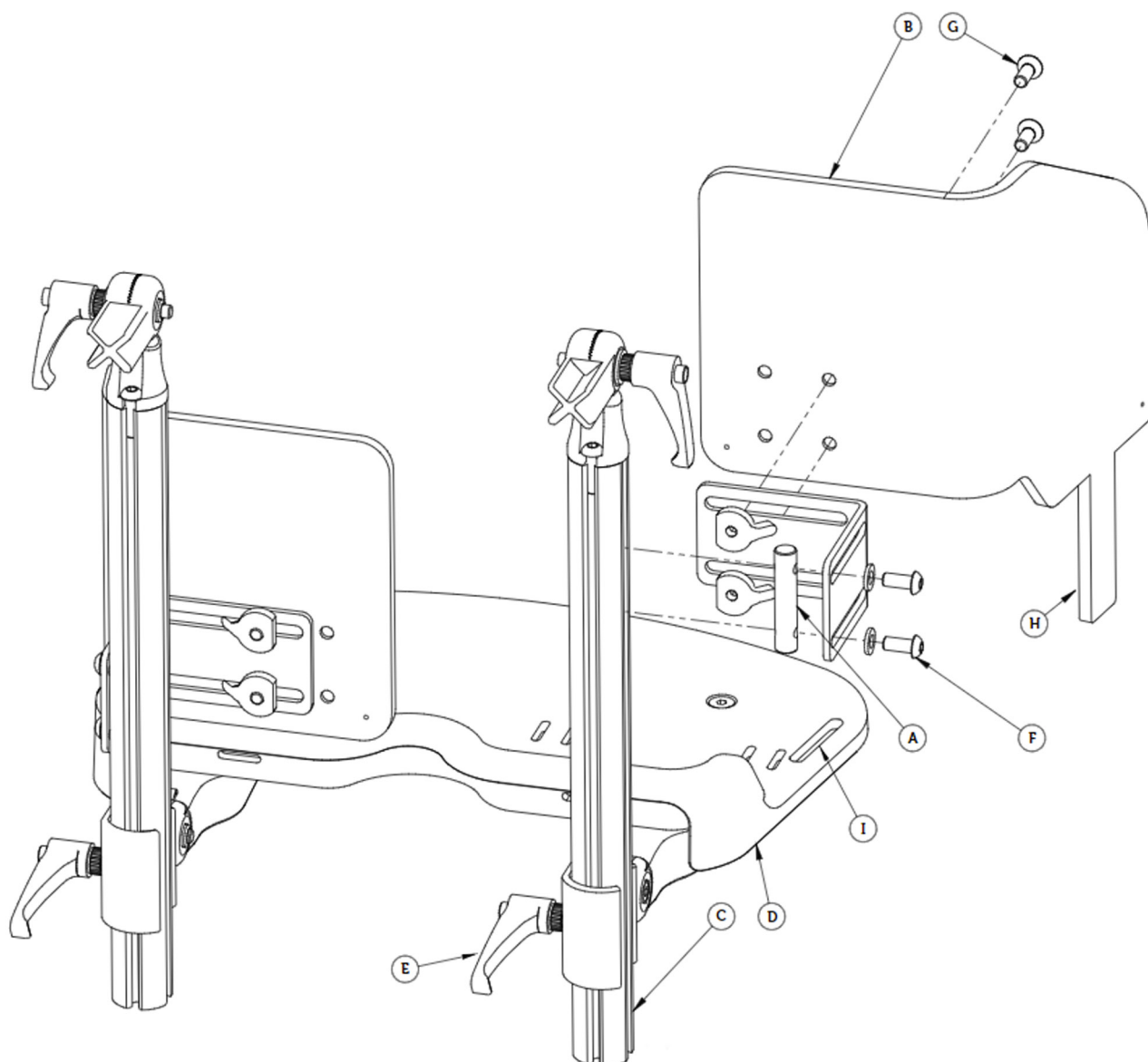

Etter justering av ønsket høyde kan plaststaget (H) kuttes eller varmes opp under fotstøtteleplaten etter eget ønske.

10.15 Leggstøtte

Montering av leggstøtte

Før du monterer leggstøtten, må du først fjerne eventuelle fotstøtter. Start med å ta av endedekelet (G) og løsne deretter gantergrepet (F) som holder fotstøtten på plass på fotstøttestaget. Trekk deretter fotstøtteleplaten og dens braketter ned.


Monter leggstøtten ved å skyve tønnemutteren (C) i fotstøttebraketten, juster til ønsket høyde og stram skruene (E). Sett deretter på fotstøtten og endestykket.

Høydejustering av leggstøtte

For å justere høyden på leggstøtten, løsne skruene (E) litt og juster deretter til ønsket høyde. Stram deretter til skruene (E).

Breddejustering av leggstøtte

For å justere bredden på leggstøtten, løsne skruene (A) litt og juster deretter til ønsket bredde. Stram deretter skruene (A).

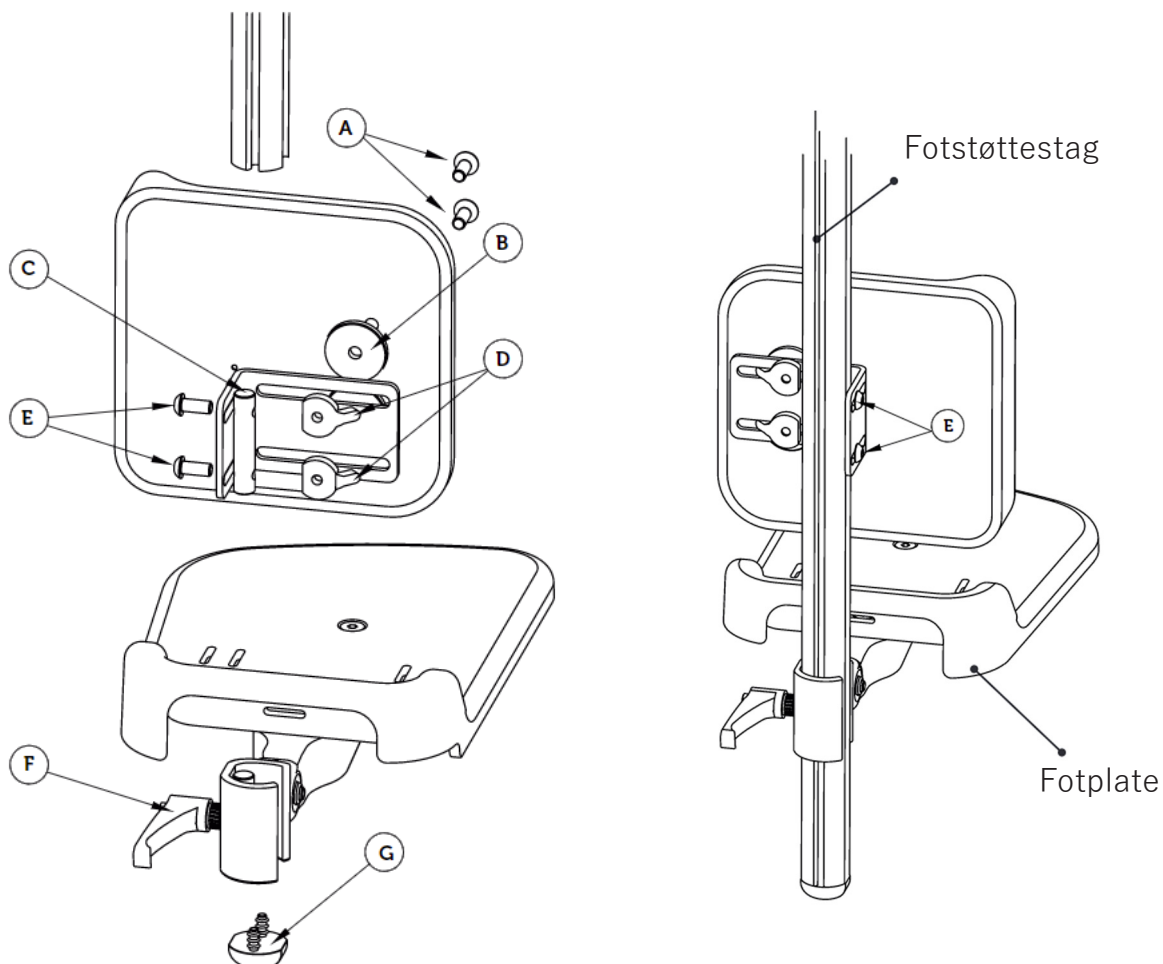

11. Oppsummering og etterkontroll

Etter montering og/eller justering, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen som tiltenkt.

Kontroller innstillingene til produktet og dets tilbehør slik at brukeren har en riktig sittestilling.

Etter all montering, justering eller servicearbeid, skal alle gantergrep, monteringsskruer og muttere kontrolleres og strammes til.

Kontroller at hjelpemiddelet er riktig balansert for å sikre at eventuell velterisiko er utelukket.

Hvis det oppdages feil, ikke bruk produktet. Kontakt din distributør for hjelp til handling.

12. Transport i kjøretøy

Produktet er ikke ment å brukes til å transportere brukere i kjøretøyet med. Krasjtesting er derfor heller ikke aktuelt for dette produktet.

13. Kontroll av produktet

For at hjelpemiddelet skal fungere trygt og sikkert, er det viktig med kontroll av produktet.

Kontroll må utføres før hvert bruk i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader. Sjekk spesielt skruer, muttere og gantergrep.
- Kontroller at setet sitter ordentlig fast på understellet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller eventuelle tippesikringer.
- Kontroller at bremsene fungerer.
- Kontroller hjulenes funksjon og at de sitter fast.
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, som for eksempel ryggvinkel, tilt, høyde justering, etc. angående mobilitet og låsing.

Hvis det oppdages feil, ikke bruk produktet. Kontakt din distributør for hjelp til handling.

Vedlikehold

Rengjøringsbehovet varierer og må vurderes fra sak til sak avhengig av bruken av produktet, men minst en gang i uken er anbefalt.

Rengjør produktet med en svamp/klut og antibakterielle, milde rengjøringsmidler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller er etsende.

Elektronikken er IP-klassifisert: IPX0. Det betyr at den kun kan rengjøres med en lett fuktig klut. Elektronikken må fjernes før vask.

14. Service og vedlikehold

For at produktet skal fungere trygt og sikkert, må det utføres regelmessig service på produktet. Behovet for service varierer og kan vurderes fra sak til sak avhengig av produktets bruk og slitasje, men det anbefales minst en gang hver 6. måned.

Arbeidet skal alltid utføres av kvalifisert personell. Ved utskifting av deler skal det alltid brukes originaldeler fra Anatomic Sitt AB.

Ved enhver service skal det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at produktet er trygt å bruke. Dersom det er feil som påvirker sikkerheten og kan utbedres, må produktet tas ut av drift.

Kontroller følgende og korriger om nødvendig:

- Kontroller alle funksjonene til produktet.
- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, skjevheter, slitasje og skader.
- Kontroller at alle skruer, muttere og gantergrep er skikkelig strammet.
- Sjekk at alle gantergrep er intakte og fungerer.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller at eventuelle tippesikringer fungerer.
- Kontroller bremsenes funksjon.
- Funksjonstest og smør alle bevegelige ledd, vaiere, hjul, gantergrep etv. Bruk egnet olje eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, teflonsprat etc.)
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, som ryggvinkel, sittestilling, høydejustering osv. Både når det gjelder justeringsmuligheter, mobilitet og låsing.
- Kontroller at stemplene låses i valgt funksjon.
- Kontroller at ledningene er riktig plassert og riktig justert.
- Kontroller hjulenes funksjon: Kontroller at alle hjulene sitter fast og står godt på bakken. Sjekk at stoler ruller tilfredsstillende.
- Kontroller om nødvendig eventuelle slitasjer på alle skjøter, tagger og braketter. Pass på at de låses ordentlig.
- Kontroller merker, etiketter og advarselssymboler slik at de er fullstendige og leselige.

Tillegg for el- funksjoner

- Kontroller at aktuatorene og batteriene er riktig montert og fungerer.
- Kontroller at kabler, koblinger og tetningsringer er intakte og uten synlige skader.
- Kontroller at håndkontrollen og laderen er i god stand og fungerer.

Etterkontroll

Når service er utført, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og fungerer som forutsatt.

Resirkulering

Resirkulering gjøres hensiktsmessig dersom hjelpemiddelet er personlig og skal gis til ny bruker eller lagres over lengre tid. Arbeidet skal alltid utføres av kvalifisert personell.

Ved utbytting av deler, skal alltid originaldeler fra Anatomic Sitt AB brukes.

Ved resirkulering må du alltid kontrollere at hjelpemiddelet ikke er spesialtilpasset før du sender det til ny bruker.

Ved hver resirkulering bør det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at det er trygt å bruke. Hvis det er mangler som ikke kan rettes opp ved resirkulering, må produktet tas ut av drift og resirkuleres.

Rengjøring

Rengjør produktet med en svamp/klut og antibakterielle, milde rengjøringsmidler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller er etsende.

Produktet kan rengjøres i vaskeskap: 65°C i maks. 10 minutter. Ved rengjøring av understellet skal det festes og plasseres stående med låste hjul.

Elektriske komponenter skal fjernes fra understellet før rengjøring i vaskeskap.

Tørking

Understellet kan tørkes i kabinett i maks. 70°C i opptil 10 minutter.

Kontroller ved resirkulering

Etter rengjøring og tørking, sjekk produktet for skader/slitasje. Vær oppmerksom på at produktets levetid er begrenset når det skal vurderes om produktet er egnet for resirkulering.

Ødelagte, slitte eller sprukne deler skiftes ut. Bruk kun originaldeler fra Anatomic Sitt AB. Reservedeler kan bestilles i henhold til egen reservedelsliste for gjeldende produkt. For at produktet skal beholde sin CE-merking, kan hjelpemiddelet kun utstyres med reservedeler levert av Anatomic Sitt AB.

Funksjonstest og smør alle bevegelige ledd, vaiere, hjul og gantergrep etc. Bruk egnet olje eller smøremiddel (f.eks. CRC 5-56, teflonspray, etc.).

Kontroller at alle skruer og muttere er strammet.

Etiketter/klistremerker

Ved behov for nye etiketter/klistremerker, kontakt Anatomic Sitt. For plasseringen på hjelpemidlet, se www.anatomicsitt.com.

Riper og farge

For å forhindre korrosjonsskader eller reparere riper kan reparasjonsfarge bestilles fra Anatomic Sitt AB. Artikkelnnummer: 387299. Reparasjonsfarge understell G2, matt sort.

Kontrollpunkter

Alt i alt

- Sjekk hele produktet og dets tilbehør for å identifisere ødelagte, sprukne eller slitte deler.
- Sjekk alle funksjonene til produktet.
- Kontroller at hjelpemiddelet ikke er skjevt og at det står stødig med alle hjul på underlaget.

Understell/stol

- Sjekk at alle skruer og muttere er stramme.
- Sjekk at tiltfunksjonen fungerer og at stempelet låses i valgt posisjon.
- Sjekk at ledningene er riktig plassert og riktig justert.
- Sjekk at kjørebøylens justeringsmuligheter og ledd fungerer og at polstring er komplett.
- Sjekk at gassfjæren fungerer som det skal.

Hjul/bremser

- Sjekk at skruene til hjulene er skikkelig strammet.
- Sjekk at hjulene fungerer etter hensikten.
- Sjekk at bremsefunksjonen fungerer på samtlige hjul.
- Sjekk at understellet ruller lett og rett.

Fotstøtte

- Utfør funksjonssjekk av høyde- og vinkeljustering.
- Sjekk eventuelle slitasjer tannhjulsledd og sørg for at de låses ordentlig.

Festesystem

- Sjekk funksjonen slik at den låser seg.

Annet tilbehør

- Sjekk alle deler for slitasje, skift ut om nødvendig.
- Sjekk låser og justeringsmuligheter.

Elektriske funksjoner

- Sjekk aktuatorer og batterifester slik at ingenting mangler eller er ute av drift.
- Sjekk at ledninger, plugger og tetningsringer er intakte og uten synlige skader.
- Sjekk at håndkontrollen og laderen er i god stand og fungerer.

Etterkontroll

Når resirkulering er utført, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og fungerer som forutsatt. Sjekk også at merker, etiketter og advarselssymboler er fullstendige og leselige.

15. Avfallshåndtering

Gjenvinning

En brukt del eller produkt må demonteres. Delene skal separeres etter materialtype og etterlates på gjenvinningsstasjon eller tilsvarende. Batteri- og gassfjær sorteres som farlig avfall.

16. Garanti og retur

Garanti og reklamasjon

Garanti gjelder generelt i ett (1) år mot fabrikkfeil fra leveringsdato eller etter avtale. Det gis ikke garanti for ytre påvirkninger eller unormal håndtering. Defekte varer må returneres for garantibehandling. Legg alltid ved følgeseddel.

For best mulig vurdering av reklamasjonen, må produktet være rengjort og tørt når det sendes tilbake.

Beskriv feilen og årsaken så grundig som mulig. Se garantireparasjon eller mulig erstatningsgaranti. Legg ved en kopi av fakturaen og oppgi at produktet skal returneres til deg etter reparasjon. Oppgi leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer. Skjema for klage kan lastes ned fra Anatomic Sitt sin hjemmeside.

Pakk produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å skrive ned forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal kunne spore forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.

Retur

Feilbestilte eller feilleverte varer skal returneres innen 20 dager fra leveringsdato. Legg alltid ved kopi av både følgeseddel og faktura. Skriv inn årsaken til at du returnerer varene dine. Returskjema er tilgjengelig på www.anatomicsitt.com.

Pakk produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å skrive ned forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal kunne spore forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.

Vær oppmerksom på at tilpassede produkter ikke kan returneres!

17. Revisjon

Følgende endringer er gjort i denne versjonen av bruksanvisningen.

Korrespondanse og merking

- Beskrivelse hvor produktetiketten er plassert.

Sikkerhetsinstruksjon

- Advarsler og forhåndsregler supplert med en ny advarsel.

Monterings- og justeringsinstruksjoner

- Montering av sittesystemet supplert med varseltekst.

Revisjonsliste

ver. 2.0 - 2020-09-28

ver. 2.1 - 2021-05-26

ver. 2.2 - 2021-10-15

SE

Anatomic Sitt AB (produsent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besøksadresse

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt



Hjelpemiddelspesialisten as

Hjelpemiddelspesialisten AS

Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70

firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no