

## 1. Indledning

Vi glæder os over, at du har købt et kvalitetsprodukt fra Mobilex. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt brug af produktet. Derfor bedes du læse denne vejledning grundigt, før produktet tages i anvendelse. Venligst vær opmærksom på alle forholdsregler, især sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så du opnår en sikker og langvarig anvendelse af produktet.

## Formålsbeskrivelse

Badebænken giver mulighed for at sidde i forbindelse med bad og hygiejnevask foran håndvask. Højdeindstillingsmulighederne gør det muligt for såvel bruger som hjælper uden brug af værktøj at opnå korrekte ergonomiske arbejdsstillinger. Intimudskæringen letter vask og det bløde og skridsikre PUR-sæde giver en god og sikker siddekomfort for brugeren. Kan forsynes med PUR-ryglæn uden brug af værktøj.

## Indikationer

Badebænken er beregnet som et siddemøbel til brug under brusebadet og på badeværelset for ældre, personer i kørestol og andre personer med begrænset bevægelighed i lænderyggen, knæ eller hofter og for alle, der har svært ved at udføre daglig personlig hygiejne i stående stilling. Det er forbudt at bruge badebænken til andre formål end de ovenfor anførte.

## Kontraindikationer

Badebænken er ikke beregnet til de patienter, der ikke kan opretholde en korrekt kropsbalance i siddende og stående stilling. Badebænken må ikke anvendes, hvis brugeren har problemer med nedsat opfattelsesevne. Kontraindikationer kan ikke relateres til ét bestemt sygdomsbillede, og de afhænger af en individuel vurdering af den potentielle brugers helbredstilstand. Valget af ortopædisk hjælpemiddel, der passer til et givet sygdomsbillede, skal altid foretages med hjælp fra en speciallæge eller fysioterapeut.

Ved spørgsmål til produktet bedes du henvende dig til forhandleren eller direkte til Mobilex A/S

### Mobilex A/S

Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex.dk

## 2. Sikkerhedsanvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til Mobilex A/S.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Kontroller at alle 4 låseclips i benene sidder korrekt før ibrugtagning.
- Badebænken er til at sidde på. Der må ikke stå på den.

## 3. Beskrivelse

### Produktbeskrivelse

Badebænken er lavet af korrosionsbestandig aluminium, og leveres som standard med et blødt PUR-sæde. Badebænken kan højdeindstilles i 8 positioner i intervaller på 2,5 cm. Der findes 4 størrelser: en smal (302070-71), en standard (302072-73) og en bred (302078-79) model. Herudover en XL-model testet til 250 kg. (30207X).

### Leverede dele samt montagevejledning

Badebænken leveres i en kasse med følgende indhold:

- ✓ 1 ramme
- ✓ 4 ben
- ✓ 1 sæde
- ✓ Denne brugervejledning

### Montagebeskrivelse

De fire ben monteres i rørene og sikres i den ønskede position med de 4 medfølgende låseclips. PUR-sædet monteres oven på badebænken ved nemt at klikke det på plads.

## Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af Badebænken og oplyser bl.a. max. brugervægt.



Billede af typeskiltet Badebænk 302070

	QR-code link til hjemmesiden		Produktionsdato
	Producent		Max belastning
	Se brugervejledningen		Max bredde
	Til indendørs/udendørs brug		serienr.
	CE mærket produkt		Varenr.
	Max belastning kurv		Medicinsk udstyr
	Kun til indendørs brug		

Oversigt ikon betydning

## 5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand. Kan rengøres med rengøringsmidler og overfladedesinfektion med ethanol 70-85% (v/v) samt klorprodukt med indhold svarende til min. 1000 ppm. Tåler maskinvask og lufttørring efter Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i henh. hjemmepleje og i plejeboliger.

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men bør regelmæssigt gennemgå en kontrol, der kan foretages af en sagkyndig. Ved en sådan kontrol anbefaler vi at følgende kontrolleres og udføres:

- ✓ Rengøring og desinficering af produktet
- ✓ Ramme/produkt tjekkes for skævheder og tegn på brud
- ✓ Sliddele kontrolleres og skiftes hvis nødvendigt

**Anbefalet levetid:** Normalt 10 år afhængigt af brugen.

### Opbevaring

Vi anbefaler opbevaring på et tørt sted.

### Genanvendelse

Produktet er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse, hvor en ny bruger skal overtage produktet, skal produktet være kontrolleret i henhold til pkt. 5.

## 6. Generel problemafhjælpning

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Badebænken er ustabil	Benene er indstillet i forskellige højder	Kontroller at alle 4 ben er sikret med splitter og er indstillet til samme højde

## 7. Bortskaffelse af produktet

Produktet kan ikke bortskaffes med almindeligt affald men skal afleveres på en lokal genbrugsplads.

## 8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal du straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

## Samling af stolen:

Badebænken leveres i en papkasse, hvori de nederste dele af fødderne er inkluderet separat. For at samle stolen klar til brug skal du indsætte de 4 fodstøtter i de medfølgende rør og fastgøre dem i den ønskede højde ved hjælp af de medfølgende clips (se illustrationen nedenfor). Kontroller også, at det bløde PUR-sæde sidder korrekt på stellet, da det kan have løsnet sig fra stolen under transporten. Det kan være nødvendigt at trykke knapperne på undersiden af PUR-sædet ind i hullerne på rammen.

## Bemærk! Kontroller, at alle 4 fødder er indstillet i samme højde.

For at kontrollere det skal du tælle hullerne i højdejusteringen, hvor clipsene er placeret.

## Håndtering ved transport

Ved transport kan benene enten afmonteres eller placeres i højeste position for at reducere størrelsen. Den smalle model (302070-71) og standard modellen (302072-73) leveres med 3 stk. i hver kasse og den brede model (302078-79) og XL-modellen (30207X) med 2 stk. i hver kasse. Badebænkene fra Mobilex kan nemt stables.

## Montering af ryglæn (Tilbehør, ikke en del af denne levering)


Badebænkens ryglæn (tilbehør) monteres enkelt ved at indsætte de medfølgende 4 låseclips i de dertilhørende rør under sædet.



## Samlevejledning

Indstilling af sædehøjde (benhøjde): Sædehøjden bør indstilles ergonomisk korrekt så den passer til brugeren. Som tommelfingerregel er sædehøjden korrekt indstillet når brugeren kan nå underlaget med begge fødder.

- Fjern låseclips (A) fra stolens ben
- Juster det teleskopberbare ben til den ønskede højde
- Indsæt låseclips (A) i benets dertilhørende låsehul (B)
- Gentag 1-3 for de øvrige 3 ben

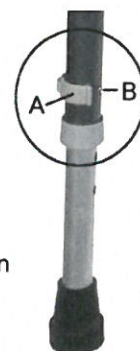

**Vigtigt:** Indstil ikke sædehøjden mens brugeren anvender stolen og sørg altid for at alle 4 ben er en samme højde og låseclips er korrekt monteret. Benene er monteret med skridsikre dupsko

## Tilbehør

Til Badebænken fås følgende tilbehør med varenr. 302075 og 302076. Kontakt din forhandler for mere information.

## 4. Tekniske data

Badebænk	Smal model (302070+71)	Standard model (302072+73)	Bred model (302078+79)	XL (30207X)
Dimension (BxDxH)	51,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	56,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	62,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	68,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm
Sædemål (BxD)	40,7 x 33,5 cm	45,2 x 33,5 cm	50 x 33,5 cm	50 x 33,5 cm
Bredde ml. håndtag	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm
Udvendig bredde	51,5 cm	56,5 cm	62,5 cm	66,5
Sædehøjde	41,7 - 58,5 cm	41,7 - 58,5 cm	41,7 - 58,5 cm	41,7 - 58,5 cm
Håndtagshøjde	60,4 - 77,1 cm.	60,4 - 77,1 cm.	60,4 - 77,1 cm.	60,4 - 77,1 cm
Vægt	2,7 kg	2,9 kg	3,3 kg	3,86 kg
Max. belastning	150 kg	150 kg	200 kg	250 kg
HMI nr.	46563	46565	62407	128783

Badebænkene kan både leveres i en hvid og en sølv model i de 3 størrelser (302070-79) og i hvid i XL-versionen (30207X).