





## **Neater Eater**

Manuell modell



- 1:**  
Åpne klemmene  
og fest Neater Eater  
til et stødig bord.

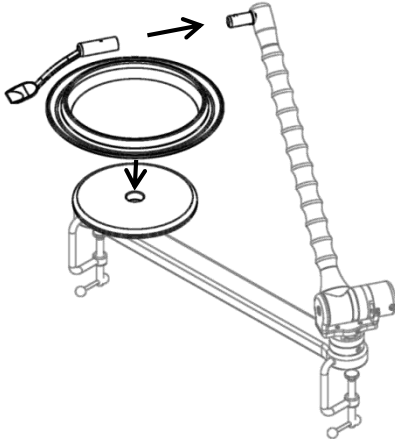
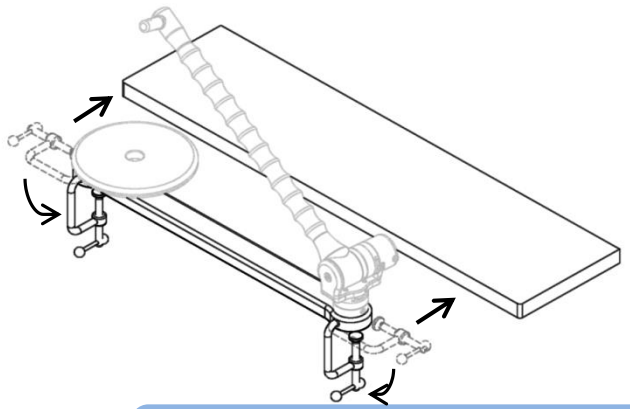


## 2: Bestikk og tallerken

Press bestikk på plass, sjekk at det låses. Peggen under tallerken settes ned i hullet på grunnplaten.

## 3: Posisjon



Sitt tett inntil Neater Eater og juster slik at skjeen treffer ved munnen.

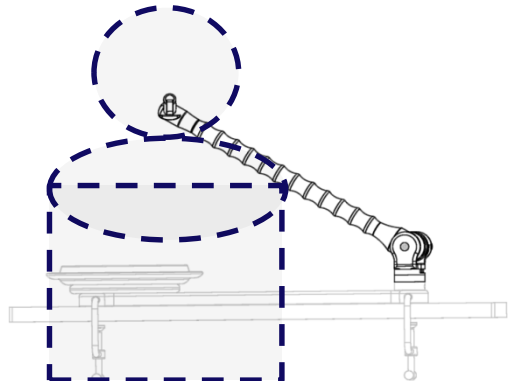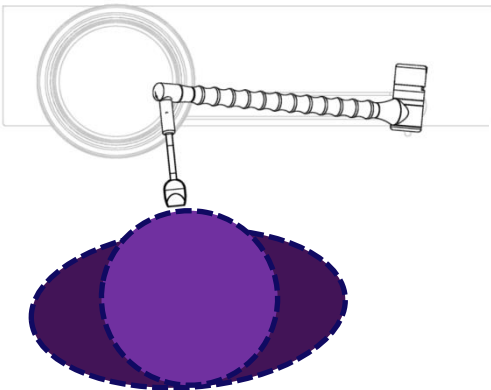


#### 4: Justering av "stop"

Benytt den lille unbrakonøkkelen til justering.


Øvre og front stopp justeres slik at skje treffer i front av munn

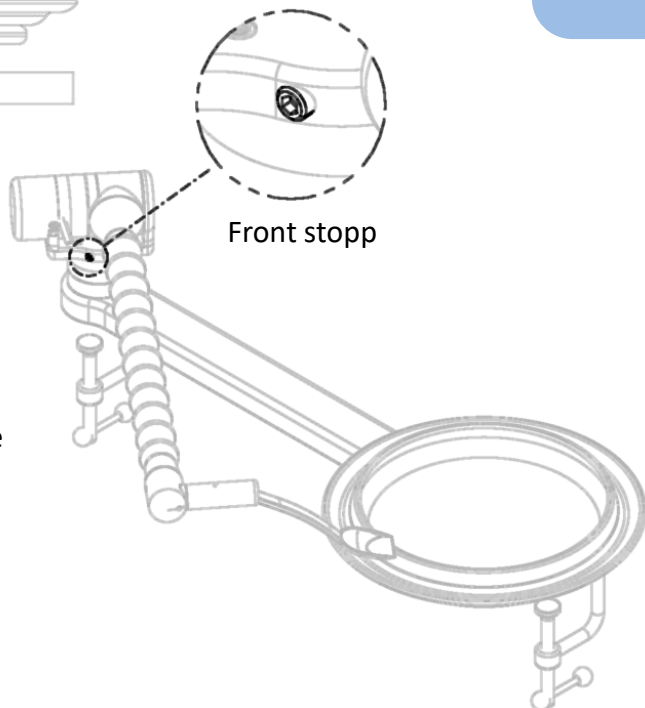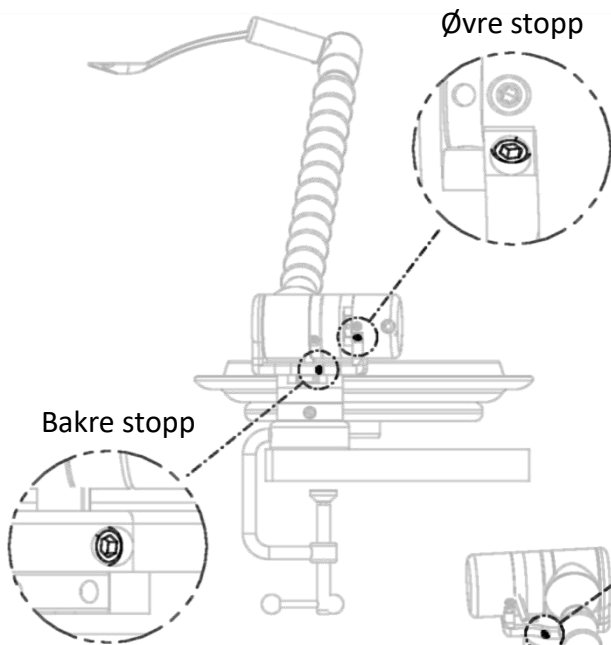

**Bakre stopp** er normalt forhåndsinnstilt slik at det er mulig å skrape skjeens underside mot tallerken, samtidig som skje ikke fester seg i tallerkenkant.

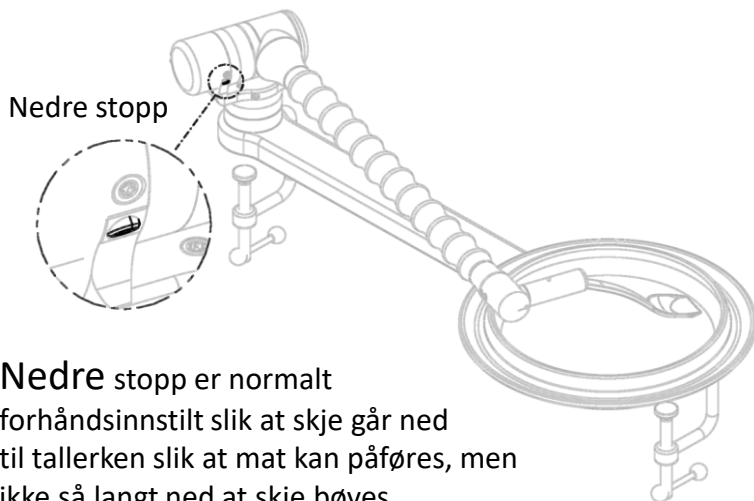

**Nedre stopp** er normalt forhåndsinnstilt slik at skje går ned til tallerken slik at mat kan påføres, men ikke så langt ned at skje bøyes.

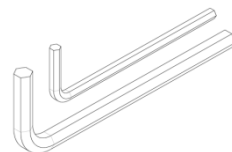

Unbrakonøkler 3 mm og 5 mm medfølger.



**Støtdemping** er forhåndsinnstilt.

Juster (+) for å absorbere tremor.

Juster (-) for å gjøre bevegelsene lettere.

Benytt liten unbrakonøkkel for å justere.

Beveg arm opp og ned, frem og tilbake for å «aktivere» justeringene.

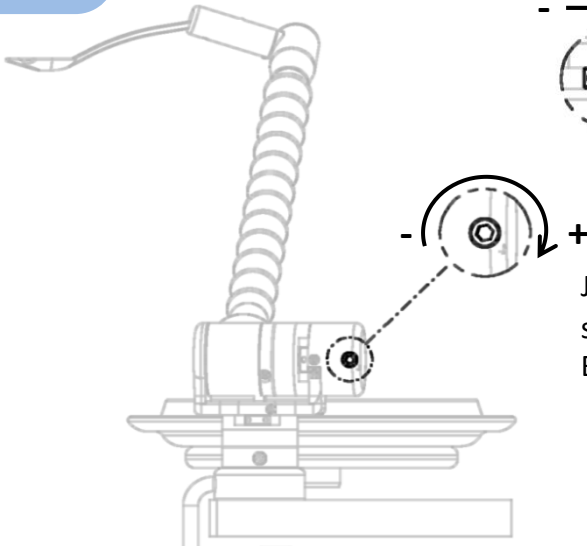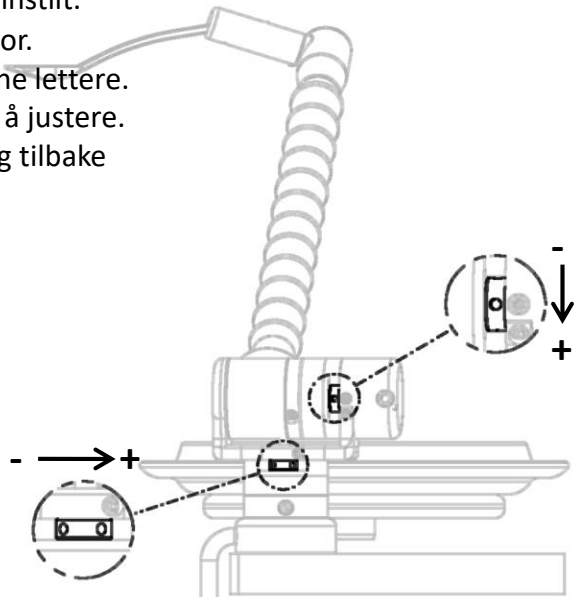



Juster **løftefjær** for raskere eller saktere bevegelse av arm.  
Benytt 5 mm unbrakonøkkel.

Dersom fjær for bevegelse fremover er montert vil skje etter å ha kommet opp bevege seg frem mot munn.

Justering:

- Før arm mot deg.
- Løsne forsiktig skrue (Se ill.)
- Roter del for å endre fjærens stramming.
- Skru til skrue igjen.

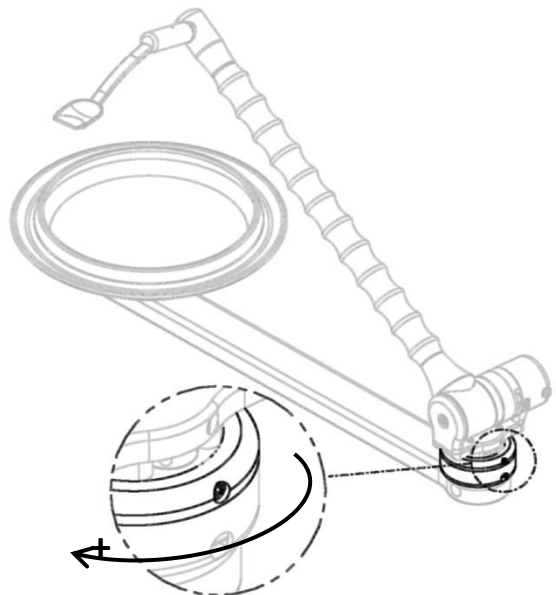

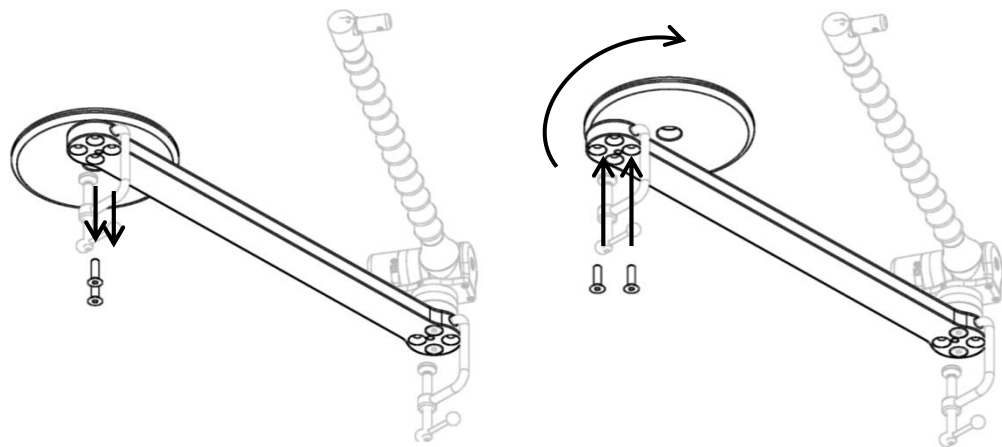

**Tallerkenholder** kan flyttes fremover for å bedre tilgjengelighet.  
Ofte benyttet av personer i rullestol.

### Riktig plassering er viktig.

- Sitt nærme Eater Neater.
- Forsikre deg om at skje kommer i høyde med munn.

### Første gang Neater Eater er i bruk.

- Start med lite mat på tallerken.
- Plasser maten langs kanten av tallerken, ikke noe i midten.
- Del maten i passe store biter. (Avhenger av barn eller voksen etc.)

### Hente mat fra tallerken.

- Beveg arm bak og ned slik at skje treffer midt i tallerken.
- Hold skje nede samtidig som den skyves mot bruker, mat påføres skje ved hjelp av kanten på tallerken.
- Slipp arm som så beveger seg opp, beveg hode frem og ta maten fra skjea.
- Vri tallerken for å få tilgang til mer mat.
- Drypp fra skje kan avverges ved å føre underkant av skje mot tallerkenkant.

### Vedlikehold og renhold.

- Neater Eater er designet for et langt vedlikeholdsfritt liv så lenge den holdes ren.
- Tørk med en fuktig klut og lett vaskemiddel for å fjerne matrester.
- Senk ikke Neater Eater ned i vann.
- Tallerken og bestikk kan vaskes i oppvaskmaskin lengst vekk fra varmeelement.
- Håndvask vil forlenge holdbarhet til tallerken og bestikk.

**Benytt aldri plasttallerken eller plasttallerkenstativ i mikrobølgeovn eller i en stekeovn.**