


Bruksanvisning

Audior Microphone T20 nær- og møtemikrofon

Introduksjon

Audior Microphone T20 er en kombinert nær- og møte/bordmikrofon som inngår i Audiors trådløse mikrofonsystem. Den kan brukes alene eller sammen med en annen Audior mikrofon, og sende til et valgfritt antall Audior mottakere.

Mikrofonen skifter automatisk innstilling til nærmikrofon når den bæres loddrett (rundt halsen), og til møtemikrofon når den ligger på bordet.

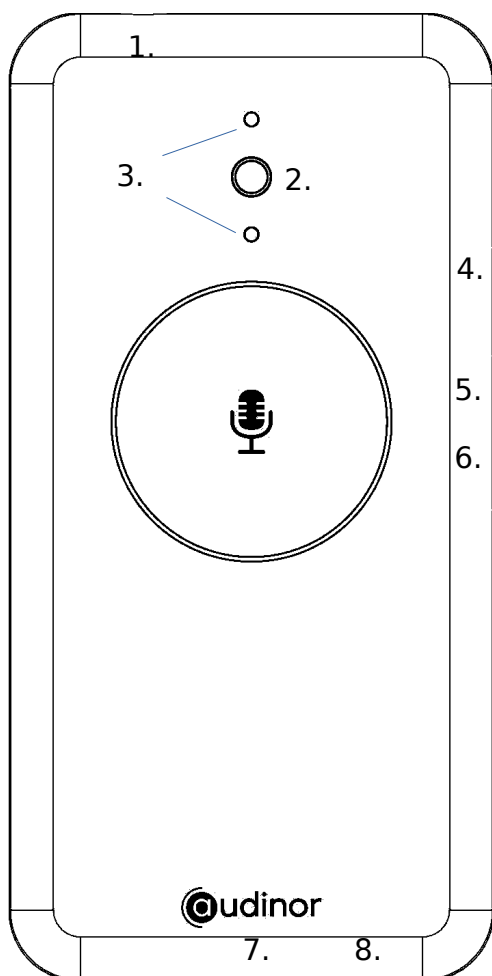

1. Av-/på-knapp
2. Lampe
3. Interne mikrofoner
4. Inngang for ekstern mikrofon (3,5 mm jack)
5. Funksjonsknapp opp: paring / zoom mode
6. Funksjonsknapp ned: dempe/«mute»
7. Ladekontakt/audioinngang, magnetisk kontakt
8. Hull for nullstilling

Funksjoner

Lade

Enheten bør fulllades før bruk. Et tomt batteri tar ca. 2 timer å lade opp. Sett i den magnetiske strømkontakten i bunnen av enheten. Når enheten lades opp lyser lampen rødt, og når den er fullt oppladet lyser lampen grønt. Enheten går automatisk over i vedlikeholdsladning når den er fullt oppladet, og kan derfor bli i laderen når den ikke er i bruk. Man behøver ikke å skru mikrofonen av for å lade den.

Slå på/av

- På: Trykk og hold av-/på-knappen inne i 1 sekund for å slå på enheten, inntil den grønne lampen slukker. Den blinker etterfølgende grønt.
- Av: Trykk og hold av-/på-knappen inne i 1 sekund for å slå av enheten inntil den røde lampen slukker.

Bruk enheten som bordmikrofon

Mikrofonen kan brukes som bord/møtemikrofon til mindre møter med opptil seks personer. Plasser mikrofonen på bordet – den skifter automatisk til møte mikrofoninnstilling.

Zoom modus – bordmikrofon

Mikrofonen er i utgangspunktet i omni (360°) mikrofonkarakteristikk når den brukes som bordmikrofon. Ved å trykke kort på den øvre funksjonsknappen (5) kan man aktivisere retningsmikrofon også i bord-modus. Plasser mikrofonen så den peker i retning av den ønskede samtalepartner. Lampen blinker med hvitt lys når mikrofonen er i zoom. Trykk kort på den øvre funksjonsknappen igjen for å komme tilbake til normal mikrofon-modus.

Bruk enheten som forelesermikrofon

T20 kan brukes som forelesermikrofon/nærmikrofon ved å bære den rundt halsen. Enheten skifter automatisk til direksjonell mikrofonkarakteristikk, som bidrar til optimal demping av bakgrunnsstøyen.

Man kan alternativt tilkoble en ekstern mikrofon (hodebøyle- eller myggmikrofon), i mikrofoninngangen på siden av enheten (4). De interne mikrofonene blir dempet når en ekstern mikrofon er tilkoblet.

Dempe «mute»

Trykk på funksjonsknapp ned (6) for å dempe/mute mikrofonen. Lampen lyser rødt når enheten er dempet. Når mikrofonen ligger på bordet kan du alternativt dempe den ved å vende den opp-ned.

Kobling til eksterne lydkilder

Bruk en Audinor lyd kabel til (7) for å koble mikrofonen til en ekstern lydkilde, for eksempel bærbar PC eller nettbrett. Lydkabelen kobles til lydkildens hodetelefon/lydutgang i den ene enden og til T20 mikrofonens ladekontakt/audioinngang i den andre. Den interne mikrofonen blir dempet når en ekstern lydkilde er tilkoblet.

Batteristatus:

Med et kort trykk på av/på knappen på T20 kan du høre batteristatus. Den formidles med engelsk tale og kan høres via Audinor mottakeren, for eksempel «microphone battery 80 percent».

Lavt batteri

Ved lavt batteri vil lampen blinke rødt. Lad opp enheten når du ser indikasjonen for lavt batteri.

Paring / unik kodenøkkel

Normalt vil enhetene være parete ved levering. Du kan bruke paringsknappen på mikrofonen til å tilkoble/pare enheten til et eksisterende nettverk eller å skape en unik kodenøkkel i et nytt nettverk. Hvis man ikke skaper en unik kodenøkkel vil mikrofonen fungere med standard-nøkkelen.

Skap unik kodenøkkel – nytt nettverk:

- Skru av eventuelt andre Audinor mikrofoner i nærheten
- Skru på T20 mikrofonen
- Innenfor 30 sekunder: Trykk knappen for paring (knapp opp på siden av enheten) og hold den inne i 5 sekunder. Lampen blinker blått som bekreftelse på ny kodenøkkel.

Pare/tilkoble mikrofonen til et eksisterende nettverk:

- Skru på referansemikrofonen. Hold mikrofonene innenfor 2 meters avstand
- Skru på den nye mikrofonen. Innenfor 30 sekunder: Trykk knappen for paring (knapp opp på siden av enheten) og hold den inne i 5 sekunder. Lampen blinker blått som bekreftelse på mottatt kodenøkkel

Fabrikkinnstilling

Du kan gjenetablere enhetens fabrikkinnstilling ved å trykke på både av/på knappen og samtidig trykker inn nullstillings-knappen. Hold av/på knappen inne mens du trykker inn nullstillings-knappen (kort trykk): bruk en binders eller lignende og før den inn i hullet for nullstilling. Slipp av/på knappen først når det lilla lyset slukker, det tar ca. 4 sekunder. Denne funksjonen kan brukes til å gjenetablere paringsnøkkel/kode og voluminnstilling til fabrikkinnstilling.

Rengjøring

Rengjør enheten med en lett fuktig klut. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler. Tilbehør som halssnor, halsslynge og silikoncover kan tas av og rengjøres separat.

Problemløsning

Jeg kan ikke slå på enheten

Forsikre deg om at enheten er fullt oppladet. Trykk og hold av-/på-knappen inne i 1 sekund, og slipp knappen når den grønne lampen slukker. Hvis enheten har kort brukstid kan det være at batteriet bør skiftes. Kontakt Hjelpemiddelsentralen for mer informasjon.

Radioforholdene/rekkevidden er ikke god

Forsøk å skru mikrofon og mottaker av og på igjen. Forsøk å redusere avstanden mellom mikrofon og mottaker hvis det er mulig. Mennesker og andre fysiske hindringer så som vegger kan påvirke den effektive rekkevidden. Det samme gjelder trådløse rutere (trådløst internett) og lignende.

Lydkvaliteten er ikke god

T20 brukt som er møtemikrofon er beregnet til relativt rolige lyd miljøer med lite bakgrunnsstøy. Forsøk å flytte mikrofonen nærmere den som snakker for å se om det hjelper, alternativt få samtalepartner til å bære mikrofonen rundt halsen.

Jeg kan ikke høre noe

Forsikre deg om at alle enhetene er slått på, lampene blinker og at enhetene er korrekt parett sammen. Still høreapparat i T/MT. Skru opp for lyden på mottakeren.

- Hvis man bruker en ekstern mikrofon, koble den fra og snakk inn i den interne mikrofonen.
- Erstatt halsslyngen med standard hodetelefoner. Hvis du nå kan høre lyd, er det sannsynlig at halsslyngen er defekt.

Tilbehør

Det finnes et utvalg av tilbehør til enheten:

- Ekstern mikrofon
 - Hodebøylemikrofon (Boom)
 - Myggmikrofon (Lapel)
- Lydkabel med magnetisk kontakt + USB strømtilkobling
- Lydkabel, enkel med magnetisk kontakt.
- Separat ladesystem for 2, 3 og 4 enheter
- Silikondeksel i forskjellige farger
- Filtveske for 2 enheter (liten)
- Filtveske for 4 enheter (stor)
- Mobilit ladesystem for 4 enheter
- Mobilit ladesystem for 20 enheter
- Billader for 2, 3 og 4 enheter
- Bånd til håndledd for all enhetene (forskjellige farger)
- Halsbånd

Tekniske data

Radio 2.4GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering

Radio rekkevidde: opptil 15 meter (innendørs bruk)

Antenne: Innebygd 2.4GHz

Audio frekvens båndbredde: fra 100 Hz opptil 8.000 Hz

Fysiske dimensjoner: 90 x 45 x 12 mm

Vekt: 47g

Brukstid: Inntil 14 timer

Batteri: Oppladbart Li-Polymer 3.7V 700 mAh

Kontakt (fylles ut av NAV Hjelpemiddelsentralen):



Produsert av:

Audior ApS

Benediktevej 5, DK-3480 Fredensborg

www.audior.dk