


Bruksanvisning

Audinor Receiver R20 mottaker

Introduksjon

Audinor Receiver R20 er en mottaker i Audinors trådløse mikrofonsystem. Enheten kan brukes med enten hodetelefoner (3.5mm jack) eller en Audinor halsslynge. Man kan ha et valgfritt antall mottakere tilkoblet mikrofonnettverket.

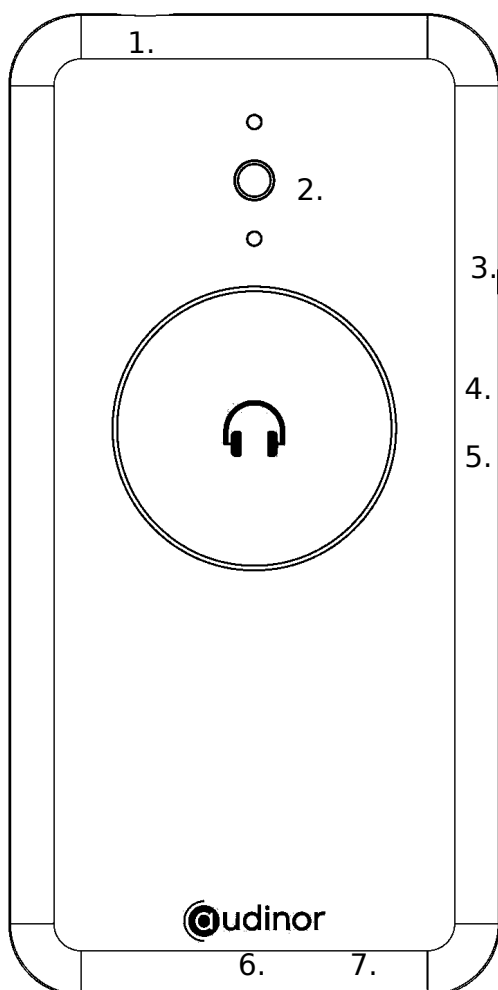

1. Av-/på-knapp
2. Lampe
3. Lyduttgang (3,5 mm jack)
4. Volum + / Langt trykk: Paring
5. Volum - /langt trykk: Mute
6. Ladekontakt/audioinnngang, magnetisk kontakt
7. Hull for nullstilling

Funksjoner

Lade

Enheten bør fulllades før bruk. Et tomt batteri tar ca. 2 timer å lade opp. Sett i strømkontakten i den magnetiske strømkontakten (6) i bunnen av enheten. Når enheten lades opp, lyser lampen rødt, og når den er fullt oppladet, lyser lampen grønt. Enheten går automatisk over i vedlikeholdsladning når den er fullt oppladet, og kan derfor bli i laderen når den ikke er i bruk. Man behøver ikke å skru mottakeren av for å lade den.

Slå på/av

- På: Trykk og hold av-/på-knappen inne i 1 sekund for å slå på enheten, inntil den grønne lampen slukker. Den begynner så å blinke grønt.
- Av: Trykk og hold av-/på-knappen inne i 1 sekund for å slå av enheten, inntil den røde lampen slukker.

Lytte

Det er mulig å koble et par standard hodetelefoner (3.5mm jack) til mottakerens lydutgang. Alternativt kan man tilkoble en Audinor halsslynge for å bruke systemet sammen med høreapparater. Still i så tilfelle høreapparatene til et T/MT (teleslynge) program.

Bruk volumkontrollen for å justere lydstyrken. Trykk på volum+ knappen for å justere lydnivået opp ett trinn, og trykk på volum- knappen for å regulere lydnivået ett trinn ned. Lampen blinker rødt flere ganger når lydstyrken når maksimums- eller minimumsnivå.

Dempe/mute

Du kan mute mottaker ved å holde volum- «ned» knappen inne i 5 sekunder. Lampen lyser rødt når enheten er mutet. Trykk kort på Volum +/- for å få lyden tilbake igjen.

«Mer kaffe?» funksjonen

Ved å heve mottakeren opp til vannrett posisjon er det mulig å høre via mottakerens interne mikrofon. Bruk funksjonen når du ønsker å høre en person nær deg og mikrofonen/senderen for eksempel er tilkoblet tv-en. Den trådløse mikrofonen mutes så lenge «mer kaffe?» funksjonen er aktiv. Når du slipper enheten ned til loddrett posisjon igjen gjenetableres forbindelsen til den trådløse mikrofonen.

NB: Funksjonen skal aktiveres første gang man tar den i bruk: Hold enheten vannrett og trykk-og-hold på volum+ knappen i 5 sekunder inntil den hvite lampen blinker. Nå er funksjonen aktiv. Fortsett med å holde enheten vannrett og trykk på volum+ knappen flere ganger til du oppnår ønsket lydstyrke. Etterfølgende husker enheten dine foretrukne lydinnstillinger.

Funksjonen kan deaktiveres ved å holde mottakeren vannrett og trykke flere ganger på volum – knappen til den røde lampen blinker.

Batteristatus

Med et kort trykk på av/på knappen på R20 kan du høre batteristatus via hodetelefon/halsslynge. Den formidles med norsk tale, for eksempel «batteri 80 prosent».

Lavt batteri

Ved lavt batteri vil lampen blinke rødt. Lad opp enheten når du ser indikasjonen for lavt batteri.

Pare (tilkoble)

Normalt vil enhetene være paret ved levering. Hvis det ikke er tilfelle skal mottakeren pares til mikrofonen:

- Skru på enhetene. Hold mikrofon og mottaker innenfor 2 meters avstand
- Trykk og hold mottakerens volum+/pare knapp i 7 sekunder. Du ser et blått blink og hører en to-tone som bekreftelse i mottaker.
NB: Hvis mottaker holdes vannrett kommer du først til å aktivere «mer kaffe?» funksjonen. Trykk på paringsknappen igjen for å pare mottakeren. Du kan pare mottakeren direkte ved å holde den loddrett.

Fabrikkinnstilling

Du kan gjenetablere enhetens fabrikkinnstilling ved å trykke på både av/på knappen og samtidig trykker inn nullstillings-knappen. Hold Av/på knappen inne mens du trykker inn nullstillingsknappen (kort trykk): bruk en binders eller lignende og før den inn i hullet for nullstilling. Slipp av/på knappen først når det lilla lyset slukker, det tar ca. 4 sekunder. Denne funksjonen kan brukes til å gjenetablere paringsnøkkel/kode og voluminnstilling til fabrikkinnstilling.

Rengjøring

Rengjør enheten med en lett fuktig klut. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler. Tilbehør så som halsslynge, halssnor og silikon cover kan tas av og rengjøres separat.

Problemløsning

Jeg kan ikke slå på enheten

Forsikre deg om at enheten er fullt oppladet. Trykk og hold av-/på-knappen inne i 1 sekund, og slipp knappen når den grønne lampen slukker. Hvis enheten har kort brukstid kan det være at batteriet bør skiftes.

Radioforholdene/rekkevidden er ikke god

Forsøk å skru mikrofonen og mottakeren av – og så på igjen. Reduser avstanden mellom mikrofon og mottaker hvis det er mulig. Mennesker og andre fysiske hindringer så som vegger kan påvirke den effektive rekkevidden. Det samme gjelder trådløse rutere (trådløst internett) og lignende utstyr.

Lydkvaliteten er ikke god

Forsikre deg om at alle ledninger er ordentlig satt i kontakten (halsslyngen, ekstern mikrofon mm) Noen steder kan man oppleve støy når høreapparatet/CI står i et T/MT (teleslynge) program. Det har ikke noe med mikrofonsystemet å gjøre, men skyldes elektriske maskiner eller installasjoner i nærheten. Forsøk å finne en alternativ plassering hvor problemet oppleves mindre generende. Hvis man bruker mottaker sammen med hodetelefoner vil man ikke oppleve denne støyen.

Jeg kan ikke høre noe

Forsikre deg om at alle enhetene er ladet opp, slått på og at enhetene er korrekt paret sammen. Ved korrekt radioforbindelse vil både mikrofon og mottaker blinke langsomt grønt. Sett høreapparat/CI i MT/T. Skru opp for lyden på mottakeren.

Bruksanvisning Receiver R20_NO_20220419_01
Artikkel
HMS-nr.

Tilbehør

Det finnes et utvalg av tilbehør til enheten:

- Audinor halsslynger
- Hodetelefoner
- Lydkabel med magnetisk kontakt + USB strømtilkobling
- Lydkabel, enkel med magnetisk kontakt.
- Separat ladesystem for 2, 3 og 4 enheter
- Filtveske for 2 enheter (liten)
- Filtveske for 4 enheter (stor)
- Ladekoffert for 20 enheter, inkludert strømforsyning
- Billader for 2, 3 og 4 enheter
- Snor til håndledd for all enhetene (forskjellige farger)
- Halsbånd, når man bruker hodetelefoner

Tekniske data

Radio 2.4GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering.

Radio rekkevidde: opptil 15 meter (innendørs bruk)

Antenne: Innebygd 2.4GHz

Audio frekvens båndbredde: fra 100 Hz opptil 8.000 Hz

Lydutgang: Differensiell utgang L-R+GND 3.5mm jack.

Fysiske dimensjoner: 90 x 45 x 12 mm

Vekt: 47g

Brukstid: Opptil 14 timer

Batteri: Oppladbart Li-Polymer 3.7V 700 mAh

Kontakt (fylles ut av NAV Hjelpemiddelsentralen):



Produsert av:
Audinor ApS
Benediktevej 5, DK-3480 Fredensborg
www.audinor.dk