



Beskrivelse

Luftig og myk pute med bendelere, posisjoneringsstøtte på sidene og ekstra trykkavlastning i sittegroppen. Puten består av fire lag med skum som til sammen gir god trykkavlastning for sitteknutene

Fungerer godt for brukere som er følsomme for smerte eller som har økt risiko for trykksår.

Avstanden mellom kuber og 3D-mesh-overtrekk gir økt luftsirkulasjon.

Liste over tilbehør

Trekk standard 3D-mesh, ikke beskyttet mot inkontinens.

Trekk beskyttet mot inkontinens.

Hygienehette

Bruksanvisning / Instruksjoner for håndtering / Vedlikeholdsinstruksjoner/Monteringsanvisning

1. Ta puten ut av posen. Puten ligger inne i trekket. Både puten og trekket er merket med etiketter som viser hvordan puten skal plasseres på stolen. Ta hensyn til denne merkingen; det er viktig at puten blir riktig plassert.
2. Kontroller størrelsen på puten. Hvis den ikke passer, velg en annen størrelse.
3. Trekket er som standard IKKE beskyttet mot inkontinens.
4. **Rengjøring og vedlikehold** Ved behov eller mellom to brukere, vask for hånd og desinfiser f.eks. med Virkon. Dynebasen tørkes horisontalt. Trekket kan vaskes i maskin på 60 grader og tåler tørketrommel og tørkeskap.
5. **Instruksjoner for avhending.** Kastes som brennbart avfall
6. **Justering.** Justering av mål, setevinkel, benlengdeforskjell m.m. gjøres i henhold til beskrivelse/skisse på fabrikk. Det er mulig å gjøre mindre beskjæringer i skummet for å oppnå ekstra avlastning.

Nima Kub Visco er en luftig og myk pute med bendeler, posisjoneringsstøtte og ekstra trykkavlastning i sittegroppen.

Putens base

Avfasede kanter på undersiden av puten som passer til både hengekøyeseter og flatseter.

Bunn i hard celleplast gjør puten formstabil

Putens kjerne består av kuber for å gi økt luftgjennomstrømning. Under setegroppen og halebenet består kubene av viskoelastisk skum for å gi økt trykkavlastning.

Toppsjikt i mykt skum for økt komfort.

Putens trekk i 3D-mesh bidrar til sittekomfort og mikroklimate.

Putens høyde er ca. 8,5 cm målt under lårene 5 cm fra forkant

Vaskeråd

Puten kan desinfiseres utenpå ved hjelp av midler som finnes på markedet, men den kan ikke vaskes i maskin.

Trekket vaskes i maskin på 60 grader og kan tørkes i trommel.

Putens vekt

0,5-1,3 kg, avhengig av størrelse.

Brukervekt

Maks 150 kg

Produktet er CE-merket

Puten kan bestilles i valgfri størrelse