

Comfort Cushions

M2, Acta-Embrace[®], Curve

Operation Manual



M2



Acta-Embrace



Curve

permobil

Kontaktinformasjon



The Comfort Companies, LLC
1960 South Calhoun Road
New Berlin, Wisconsin 53151, USA

USA: 800-736-0925

Utenfor USA: +1-262-432-0830

Faks: +1-406-522-8563

Kundestøtte:

orders.comfort@permobil.com

permobil.com



ADVARSEL

Unnlatelse av å følge den spesifiserte prosedyren kan medføre potensielt farlige omstendigheter, som igjen kan forårsake alvorlig personskade.



OBS!

Unnlatelse av å følge den spesifiserte prosedyren kan medføre potensielt farlige omstendigheter, som igjen kan forårsake mindre til moderat personskade eller skade på utstyret eller annen eiendom.

Varsling om uønskede hendelser

Ta kontakt med kundestøtte hvis det oppstår en alvorlig uønsket hendelse eller personskade.

Merk

Denne brukerhåndboken omhandler følgende produkter: Comfort M2-pute (Anti-thrust), Comfort Acta-Embrace-pute (Anti-thrust), Comfort Curve-pute.

Leverandør: Disse anvisningene skal gis til brukeren av dette produktet.

Bruker (individ eller omsorgsperson): Les anvisningene før produktet tas i bruk, og ta vare på dem for senere bruk.

Produktene kan omfattes av ett eller flere patenter og varemerker i USA og andre land, herunder Acta-Embrace®, STRETCH-AIR® og COMFORT-TEK®.

Produktinformasjon endres etter behov – oppdatert produktinformasjon er tilgjengelig på permobil.com. Ta kontakt med kundestøtte for eldre versjoner av produktinformasjonen.

The Comfort Companies, LLC er en del av Permobil.










© 2019, 2022 Permobil

REV 2022-07-13

Innhold

| | |
|--|-------|
| Tiltenkt bruk | 42 |
| Viktig sikkerhetsinformasjon | 43-44 |
| Detaljtegninger av deler | 45 |
| Plassering av puten | |
| Ta av og sette på trekk | 46 |
| Feilsøking | |
| Vedlikehold, rengjøring og desinfeksjon | 47-48 |
| Oppbevaring, transport, kassering og gjenvinning | 49 |
| Garanti | |
| Produktspesifikasjoner | 50 |

Symboler

| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
|  | Produsent |  | Vekt |
|  | Antall |  | Medisinsk utstyr |
|  | Passer til |  | Produktets forside |
|  | Modellnummer |  | Produktets bakside |
|  | Serienummer |  | Produktets underside |
|  | Oppfyller brann-sikkerhetskrav |  | Størrelse (bredde x dybde x høyde) |
|  | Se bruksanvisningen | | |
|  | Autorisert representant i Den europeiske union | | |

TILTENKT BRUK

Comfort Acta-Embrace-puten (Acta-Embrace) er en bruksklar sitteflate for rullestol, beregnet på å fremme god sittestilling og bekkenstabilitet, og for å gi hudbeskyttelse og komfort. Acta-Embrace er beregnet på de som er i fare for å utvikle trykkskader. Acta-Embrace skal ha riktig størrelse for personen og skal brukes med et kompatibelt trekk. Acta-Embrace har en vektgrense – se produktspesifikasjonene i dette dokumentet.

Comfort M2-puten (M2) er en bruksklar sitteflate for rullestol, beregnet på å fremme god sittestilling og bekkenstabilitet samtidig som det maksimale trykket reduseres på områder med høy risiko, for eksempel sitteben, haleben og korsben. M2 er beregnet på de som er i fare for å utvikle trykkskader. M2 skal ha riktig størrelse for personen og skal brukes med et kompatibelt trekk. M2 har en vektgrense – se produktspesifikasjonene i dette dokumentet.

Comfort Curve-puten (Curve) er en bruksklar sitteflate med lav vekt for rullestol, beregnet på å fremme trykkfordeling og gi en stabil og komfortabel sitteflate. Curve skal ha riktig størrelse for personen og skal brukes med et kompatibelt trekk. Curve har en vektgrense – se produktspesifikasjonene i dette dokumentet.

STRETCH-AIR-trekket er et væskeavstøtende stoffhylster som skal beskytte puten mot væske eller forurensning i fast form.

COMFORT-TEK-trekket er et væskeavstøtende stoffhylster som skal beskytte puten mot væske eller forurensning i fast form.

Inkontinensinnlegget er et væskeavstøtende stoffhylster beregnet på å brukes med et STRETCH-AIR-trekk eller COMFORT-TEK-trekk for ytterligere å beskytte puten mot væske.

Det er ingen kjente kontraindikasjoner for produktene som er omtalt i denne håndboken, forutsatt at de brukes som spesifisert i erklæringene om tiltenkt bruk ovenfor.

En kliniker som har erfaring med sittestilling og posisjonering, skal fastslå om produktet egner seg til personens spesifikke behov hva angår sittestilling. Denne beslutningen skal ikke tas ene og alene på bakgrunn av erklæringen om tiltenkt bruk for produktet.

De medisinske produktene som er omtalt i dette dokumentet, skal bare være ett ledd i en helhetlig behandlingsplan som omfatter alt sitte- og mobilitetsutstyr og all medisinsk behandling. En kliniker som har erfaring med sittestilling og posisjonering, skal identifisere denne behandlingsplanen etter å ha evaluert personens fysiske behov og generelle helsetilstand.

En kliniker skal også foreta en evaluering med tanke på visuell og kognitiv svekkelse samt svekkede leseferdigheter for å fastslå om personen har behov for bistand fra en omsorgsperson eller annen hjelpeteknologi, for eksempel anvisninger i store skrifttyper, for å sikre at produktet brukes på riktig måte.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON**ADVARSLER:**

- Nedbrytning av hud/bløtvev kan oppstå som følge av en rekke faktorer, som varierer fra person til person. Kontroller huden ofte, minst én gang om dagen. Rødhet, blåmerker eller mørkere områder (sammenlignet med normal hud) kan tyde på overflatisk eller dyp vevsskade og må utbedres. STANS BRUKEN umiddelbart hvis det oppstår misfarging av hud/bløtvev. Ta straks kontakt med helsepersonell hvis misfargingen ikke forsvinner innen 30 minutter etter at bruken har opphørt.
- Bruk IKKE puten oppå, eller i kombinasjon med, andre produkter eller materialer, med unntak av det som er angitt i denne håndboken. Bruk av ikke-kompatible produkter eller materialer, enten på innsiden eller utsiden av trekket: 1) kan redusere eller eliminere fordelene med puten, med økt risiko for hud og annet bløtvev, og 2) kan føre til at personen blir ustabil eller utsatt for fall.
- Legg IKKE gjenstander mellom personen og puten. Puten og trekket MÅ være compatible i størrelsen og MÅ brukes i samsvar med anvisningene i denne håndboken. Plassering av andre gjenstander mellom personen og puten enn de compatible trekkene som er oppført i «Produktspesifikasjoner» i denne håndboken: 1) kan redusere eller eliminere fordelene med puten, med økt risiko for hud og annet bløtvev, og 2) kan føre til at personen blir ustabil eller utsatt for fall.
- Bruk IKKE denne puten som flyteutstyr (f.eks. som livbøye). Den holder deg IKKE flytende i vann.
- Putens overflate tilpasser seg omgivelsestemperaturen. Ta nødvendige forholdsregler, særlig hvis puten kommer i kontakt med ubeskyttet hud.
- Eksponer IKKE produktet for sterk varme, åpen ild eller svært varm aske. Påstander fremsatt i sammenheng med testing eller sertifisering, herunder om antenelighet, gjelder ikke nødvendigvis for dette produktet ved bruk i kombinasjon med andre produkter eller materialer. Kontroller påstander fremsatt i sammenheng med testing og sertifisering, for alle produkter som brukes i kombinasjon med dette produktet.
- Kontroller komponentene for slitasje og skade med jevne mellomrom, og skift ut ved behov. Se «Feilsøking».
- Hvis det er noen av oppgavene i denne håndboken du ikke klarer å utføre, skal du be om hjelp ved å ta kontakt med klinikeren, utstyrsleverandøren, distributøren eller kundestøtte.
- Oppbevar små komponenter utilgjengelig for barn og andre som har en tendens til å putte uspiselige gjenstander i munnen. Svelging eller inhalasjon kan medføre alvorlig personskade eller dødsfall. Oppsøk legevakt UMIDDELBART.



OBS! Modifiser IKKE puten eller trekket. Dette kan medføre skade på produktet og vil gjøre garantien ugyldig.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON, FORTS.**ADVARSLER – TRANSPORT I MOTORKJØRETØY:**

- Hvis det ikke tas hensyn til disse advarslene, kan det oppstå alvorlig personskade på personen i rullestolen eller på andre.
- Såfremt det er mulig, skal du flytte deg ut av rullestolen og over i et bilsete som er montert av produsenten, uten puten. Bruk også kjøretøyets kollisjonstestede setebeltesystem.
- Puten må installeres, brukes og vedlikeholdes riktig og forsvarlig i tråd med anvisningene og advarslene fra puteprodusenten.
- Når rullestolen brukes som bilsete, skal puten kun brukes med rullestolrammer som er utstyrt med festepunkter spesifisert i ANSI/RESNA WC-4:2017, del 19 (WC19) eller ISO 7176-19, og som har blitt kollisjonstestet på en rullestol i forovervendt posisjon.
- En rullestol med puten skal brukes med et effektivt sikringsystem for rullestoler og et korrekt posisjonert, kollisjonstestet bekken- og skulderselesystem, eller et WTORS-system (Wheelchair Tiedown and Occupant Restraint System), i samsvar med produsentens anvisninger.
- Hvis puten har vært involvert i en ulykke under transport, kontroller puten for skade og skift den ut om nødvendig. Se delen «Feilsøking» i denne håndboken.
- Se: <http://wctransportation-safety.umtri.umich.edu/ridesafe-brochure> for mer informasjon om trygg transport av rullestolbrukere.
- En Permobil-pute var inkludert i et rullestolsittesystem som ble dynamisk testet av et tredjeparts testanlegg for bruk i et motorkjøretøy. Det testede systemet oppfyller alle gjeldende kriterier for rullestolsittesystemer som er foreslått i del 5.1 i ANSI/RESNA WC-4:2017 del 20 «Wheelchair Seating Systems for Use in Motor Vehicles».
- Testresultater gjelder for sittesystemer som er tiltenkt for bruk av voksne og barn med en total kroppsmasse over 23 kg (51 pund, eller omtrent 6 år gammel) som transporteres forovervendt i rullestolen i alle typer kjøretøy.
- Hvis du vil finne ut om tredjepartstesting av motorkjøretøyer er utført med en bestemt kombinasjon av sittesystem, kan du se i alle medfølgende brukerhåndbøker for utstyret eller kontakte utstyrsprodusenten.

DETALJTEGNINGER AV DELER

Pakningens innhold: pute, trekk*, brukerhåndbok

M2
(Anti-thrust)



Acta-Embrace
(Anti-thrust)



Curve



Inkontinensinnlegg



Du finner merket med serienummeret på putens underside.

Se delen med produktspesifikasjoner i denne håndboken for informasjon om trekkets materialer.

Ta kontakt med utstyrsleverandøren eller kundestøtte for å bestille nye deler.

*Tilgjengelige trekk:

- STRETCH-AIR (vist), tilgjengelig til alle puter.
- COMFORT-TEK, tilgjengelig med Curve eller som tilbehør til M2 og Acta-Embrace.
- Inkontinensinnlegg, tilgjengelig som tilbehør til alle puter.

PLASSERING AV PUTEN


⚠ ADVARSLER:

- **Fallrisiko:** Inkontinensinnleggets underside er glatt – bruk IKKE inkontinensinnlegget uten et trekk.
- Puten må brukes med kompatible trekk.
- Inspiser trekket og skumplasten for skade, og skift ved behov.
- Bruk borrelåsen til å feste puten enda bedre til sitteflaten, hvis det er mulig.

- 1 Legg puten inn i trekket/-ene.
Se neste side.
- 2 Legg puten på setet.
- 3 Kontroller retningen før du setter deg på puten: Se retningsfeltet og påse at glidelåsen er på baksiden. Bærehåndtaket skal være foran for Embrace- og M2-puter.
- 4 Brukeren skal sitte på puten i sin vanlige sittestilling. Påse at puten har riktig størrelse for personen.

Pute med trekk: Retning

Glidelås på baksiden

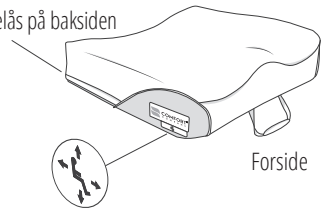

Retningsfelt: Den sittende figuren viser produktretningen.

⚠ **VIKTIG!** Hvis du bruker en ATI (Adjustable Technology Insert for posisjonering) med M2-puten eller Acta-Embrace-puten, plasserer du ATI på innsiden av trekket og under puten (og under inkontinensinnlegget dersom det anvendes). Se anvisningene for ATI for plassering og justering.

TA AV OG SETTE PÅ TREKK

Merknad om trekk: STRETCH-AIR- eller COMFORT-TEK-trekket følger med for å beskytte puten. Inkontinensinnlegget er tilgjengelig som tilbehør.


⚠ ADVARSLER:

- **Fallrisiko:** Inkontinensinnleggets underside er glatt – bruk IKKE inkontinensinnlegget uten et trekk.
- Trekket og inkontinensinnlegget MÅ vende i riktig retning på puten, som vist nedenfor.

Ta av trekk: Åpne glidelåsene på trekket (og inkontinensinnlegget dersom det anvendes). Ta trekket av puten.

Sette på trekk: Åpne glidelåsen. Legg puten i inkontinensinnlegget først, dersom det anvendes, og plasser den deretter i trekket. Lukk glidelåsen. Se bildene nedenfor for riktig retning.

VIKTIG: Ved bruk av inkontinensinnlegg plasserer du puten i inkontinensinnlegget først, og deretter i trekket.

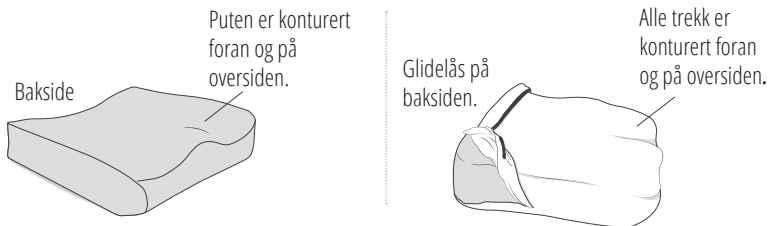

FEILSØKING

Ta kontakt med utstyrsleverandøren, distributøren eller kundestøtte hvis du trenger mer hjelp.

Puten er ukomfortabel eller ustabil.

- » Bekreft at puten ligger midt under personen.
- » Bekreft at puten har riktig størrelse i forhold til personen og rullestolen.

Hvis puten fortsatt føles ubehagelig eller ustabil etter å ha sjekket alt ovenfor, må du umiddelbart ta kontakt med rekvirerende helsepersonell.

Puten sklir på rullestolen.

- » Påse at putetrekkets sklisikre underside vender ned.
- » Bruk retningsmerkene på puten og trekket for å påse at puten legges riktig vei.
- » Bruk borrelås til å feste puten enda bedre til sitteflaten, hvis det er mulig. Borrelås følger ikke med produktet.

En komponent er skadet.


Ta kontakt med kundestøtte for skaffe en ny.

RENGJØRING OG DESINFEKSJON

ADVARSLER:

- Rengjøring og desinfeksjon er separate prosesser. Rengjøring må utføres før desinfeksjon. Før det brukes av en annen person: rengjør, desinfiser og kontroller produktet for skader, og bekreft at pakningen inneholder alle deler som følger med produktet.
- Vask produktet med jevne mellomrom og når det blir skittent.
- Følg alle sikkerhetsreglene fra produsenten av blekemiddelet og det bakteriedrepende desinfeksjonsmiddelet. Ta kontakt med utstyrsleverandøren eller lokale helsemyndigheter for en liste over godkjente desinfeksjonsmidler.
- Etter rengjøring og desinfeksjon, og før bruk, må du kontrollere alle komponenter for skade, og skifte ut om nødvendig.

Vaskeanvisninger for trekket

 **OBS!** Hyppig tørking med varme samt bleking vil bryte ned stoffet. Lufttørking og rengjøring uten blekemiddel anbefales såfremt det er mulig, for å forlenge trekkets levetid.

Slik identifiserer du trekket:

Se modellnummeret på merkelappen for vaskeanvisninger for trekket:

STRETCH-AIR-trekk har **FRS** i modellnummeret.

Eksempel: [REF] «M2-FRSA-18W/18D ...»

COMFORT-TEK-trekk har **FRF** i modellnummeret.


Eksempel: [REF] «M2-FRFA-18W/18D ...»

Inkontinensinnleggets modellnummer begynner med **BINC**.

Overflaterengjøring og desinfeksjon – kun for COMFORT-TEK-trekk og inkontinensinnlegg: Spray med kommersielt tilgjengelige eller vanlige antibakterielle rengjørings- eller desinfeksjonsmidler. Tørk av med en klut fuktet kun med vann etter desinfeksjon. La tørke helt før bruk.



Rengjøring og desinfeksjon (alle typer stoff)

 **OBS!** Fjern trekket fra skumplasten og eventuelle innlegg før rengjøring eller desinfeksjon.

Rengjøre trekket: Produktet skal, såfremt det er mulig, håndvaskes i varmt vann med et mildt rengjøringsmiddel, skylles grundig med rent vann og lufttørkes (la tørke helt før bruk). Det kan eventuelt maskinvaskes på 40 °C med vanlig vaskemiddel og tørkes på lav varme i tørketrommel. Skal IKKE damprenjøres eller autoklaveres. Skal IKKE strykes.



Desinfisere trekket: Maskinvask på 60 °C med vanlig vaskemiddel. Alternativt håndvaskes trekket på 40 °C med 1 del husholdningsblekemiddel per 8 deler vann. La produktet være vått av blekemiddelløsning i 10 minutter, og skyll deretter grundig. Tørk det i tørketrommel på lav varme, eller la det lufttørke.





VASKEANVISNINGER FOR SKUMPLAST på neste side.

RENGJØRING OG DESINFEKSJON, FORTS.

Vaskeanvisninger for skumplast


OBS!

- Skumplast skal IKKE vaskes i maskin eller tørkes i tørketrommel.  
- Legg IKKE skumplast i vann eller annen væske.
- Skumplast skal ikke eksponeres for lys lenge om gangen. Lys vil misfarge skumplasten.

Merk: Misfarging påvirker ikke funksjonaliteten. Det er ikke nødvendig å «rengjøre» misfarging som er forårsaket av lyseksponering.

Rengjøring av skumplastkomponenter: Rengjør ved å fukte en klut og deretter vri den for å fjerne overflødig vann. Tørk forsiktig med kluten og vanlig vaskemiddel. Tørk deretter én gang til med en ren, lett fuktet klut. La skumplasten lufttørke grundig før trekket settes på.



 ADVARSEL: Desinfeksjonsmidler er ikke virksomme på porøse flater som skumplast. Hvis skumplastdelen av produktet blir tilsmusset eller kontaminert, må den IKKE brukes av forskjellige personer. Skift ut tilsmussede eller kontaminerte skumplastkomponenter.

Vaskesymboler



Tørk med en fuktig klut.



Håndvask på 40 °C.



Skal ikke vaskes i maskin.



Maskinvask på 40 °C.



Maskinvask på 60 °C med normal sentrifugering.



Tørkes på lav varme i tørketrommel.



Tørkes på snor.



Tørkes flatt i skyggen.



Skal ikke tørkes i tørketrommel.



Blekemiddel
(1 del blekemiddel:
8 deler vann)

VEDLIKEHOLD

Kontroller komponentene for slitasje og skade med jevne mellomrom, og skift ut ved behov. Se «Feilsøking».

OPPBEVARING, TRANSPORT, KASSERING OG GJENVINNING

Oppbevaring og transport: Rengjør og desinfiser produktet. Legg produktet i en beholder som beskytter produktet mot fuktighet, kontaminasjon og skade. Etter oppbevaring eller transport skal produktet inspiseres for å sikre at det ikke har blitt skadet (se «Feilsøking»). Følg anvisningene for å klargjøre produktet til bruk.

Kassering: Komponentene i produktene i denne håndboken er ikke tilknyttet kjente miljøfarer ved forsvarlig bruk og kassering i tråd med alle lokale/regionale forskrifter. Når produktets nyttetid er slutt, skal det behandles som helseavfall og kastes i samsvar med lokale retningslinjer for helseavfall. Destruer produktet sammen med annet helseavfall. Destruksjon skal utføres ved et kvalifisert, lisensiert anlegg for avfallsdestruksjon.

Gjenvinning: Ta kontakt med et lokalt gjenvinningsfirma for å finne ut hvilke gjenvinningsmuligheter som finnes for produktet.

GARANTI

Dette produktet har livstidsgaranti mot fabrikkfeil. Hvis det skulle oppstå en fabrikkfeil, skal bruken av produktet straks opphøre. Vær oppmerksom på at produktet vil bli erstattet uten kostnad for kjøper. Slitasje som følger av regelmessig bruk regnes ikke som fabrikkfeil. Reservedeler kan skaffes ved å ta kontakt med en leverandør, distributør eller forhandler.

Følgende vil medføre at garantien blir ugyldig: modifisering i et forsøk på tilpasning til andre produkter (der kompatibiliteten er begrenset, som beskrevet i produktinformasjonen), endringer på produktet eller feil som følge av uvanlig bruk.

Prosedyre for utskiftning under garantien

Garantikrav skal fremsettes av den opprinnelige kjøperen, som skal ta kontakt med DME-leverandøren, -distributøren eller -forhandleren som produktet ble kjøpt av, hvis denne er tilgjengelig, eller en annen autorisert Permobil DME-leverandør, -distributør eller -forhandler.

DME-leverandøren, -distributøren eller -forhandleren med garantisaken skal, hvis det er mulig, ta kontakt med kundestøtte og oppgi opprinnelig bestillingsnummer, ordrenummer eller fakturanummer. Kundestøtte må utstede et returautorisasjonsnummer (RMA) før en bestilling på, eller tilbud om, utskiftning under garantien kan behandles.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

| M2 Anti-thrust | | | | | Vektgrense | |
|---|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| | Minste bredde | Minste dybde | Største bredde | Største dybde | Bredde cm (tommer) | Vektgrense kg (pund) |
| cm | 25,4 | 26,7 | 61,0 | 62,9 | ≤35,5 (14) | 91 (200) |
| tommer | 10,0 | 10,5 | 24,0 | 24,8 | 40,6 (16) | 113 (250) |
| Gjennomsnittlig vekt (basert på pute i størrelse 1616): 1,9 kg (4,2 pund) | | | | | 45,7 (18) | 136 (300) |
| Minimumshøyde på nedre lårstøtte (putens forside): 7,6 cm (3 tommer) | | | | | 50,8 (20) | 159 (350) |
| Putematerialer: tolags polyuretanskumplast med høy tetthet, gelinnlegg | | | | | 55,9 (22) | 181 (400) |
| Acta-Embrace Anti-thrust | | | | | | |
| | Minste bredde | Minste dybde | Største bredde | Største dybde | Bredde cm (tommer) | Vektgrense kg (pund) |
| cm | 25,4 | 24,1 | 61 | 62,9 | ≤35,5 (14) | 91 (200) |
| tommer | 10 | 9,5 | 24 | 24,8 | 40,6 (16) | 113 (250) |
| Gjennomsnittlig vekt (basert på pute i størrelse 1616): 0,9 kg (2,1 pund) | | | | | 45,7 (18) | 136 (300) |
| Høyde på nedre lårstøtte (putens forside): 7,6 cm (3 tommer) | | | | | 50,8 (20) | 159 (350) |
| Putematerialer: tolags polyuretanskumplast med høy tetthet | | | | | 55,9 (22) | 181 (400) |
| Curve | | | | | | |
| | Minste bredde | Minste dybde | Største bredde | Største dybde | Bredde cm (tommer) | Vektgrense kg (pund) |
| cm | 25,4 | 25,4 | 61 | 52,4 | ≤30,5 (12) | 45 (100) |
| tommer | 10 | 10 | 24 | 20,6 | 35,5 (14) | 68 (150) |
| Gjennomsnittlig vekt (basert på pute i størrelse 1616): 0,5 kg (1,2 pund) | | | | | 40,6 (16) | 113 (250) |
| Høyde på nedre lårstøtte (putens forside): 5,7 cm (2,25 tommer) | | | | | 45,7 (18) | 136 (300) |
| Putematerialer: polyuretanskumplast med høy tetthet | | | | | 50,8 (20) | 159 (350) |
| | | | | | 55,9 (22) | 181 (400) |

Trekkets materialer: COMFORT-TEK-trekk: toveis stretch, væskeavstøtende overside og sider, med glidelås, sklisikker underside og borrelås for å feste puten til rullestolen. STRETCH-AIR-trekk: toveis stretch, med glidelås, sklisikker underside og borrelås for å feste puten til rullestolen. Inkontinensinnlegg: toveis stretch, væskeavstøtende overside og sider, med glidelås. Merket med vaskeanvisninger for trekket viser materialinnhold og samsvar med brann sikkerhetskrav.

1 tomme = 2,54 cm = 25,4 mm

*Alle oppgitte mål er omtrentlige.

Forventet levetid: puter: 5 år, trekk: 1 år

Kompatible trekk og tilleggsutstyr:

Adjustable Technology Insert (ATI) for posisjonering – kun M2 og Acta-Embrace

COMFORT-TEK-trekk, STRETCH-AIR-trekk, inkontinensinnlegg

permobil

1960 South Calhoun Rd.
New Berlin, WI 53151 USA



EUROPE
Permobil
Box 120

861 23 Timrå, Sweden
+46 60 59 59 00
permobil.com

CE