

# SCOOT

## BRUKSANVISNING



# Innhold

Vennligst les alle instruksjoner nøye før bruk. Alle instruksjoner finnes også på nettside: [www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com), samt videoer, mål og FAQ.

1. Tiltent bruk.....	3
2. Sertifisering.....	5
3. Advarsler og forsiktighetsregler.....	5
4. Vilkår for garanti.....	7
5. Sikkerhetsinformasjon.....	7
6. Forholdsregler og kontraindikasjoner.....	9
7. Rengjøring og vedlikehold.....	10
8. Daglig produktsjekk.....	10
9. Redistribuering og Fireflyprodukter.....	12
10. Service.....	12
11. Instruksjoner for bruk.....	13
12. Teknisk informasjon.....	23
13. Symboler.....	24
14. Ofte stilte spørsmål.....	25

## Kontaktinformasjon

Hjelpemiddelspecialisten AS  
Rosenholmveien 22  
1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70

E-post: [firmapost@hm-spes.no](mailto:firmapost@hm-spes.no)

Webside: [www.hm-spes.no](http://www.hm-spes.no)

## 1. Tiltenkt bruk

Scoot er en 4-i-1 konfigurert mobilitetssykkel ment for å hjelpe barn med spesielle behov å utvikle, utforske og delta på en måte som passer best deres fysiske og kognitive evner både for morsomme og terapeutiske formål.

### **Crawl**

Crawl-konfigurasjonen har til hensikt å støtte barnets overkropp i liggende stilling som gjør at hender og føtter er fri til å mobilisere. I denne stillingen vil barnet jobbe med å utvikle hode- og kroppskontroll, skulderstabilitet og andre bevegelser.

### **Scoot**

Scoot-konfigurasjonen har til hensikt å støtte barnets bekken og overkropp i en oppreist sittende stilling. I denne stillingen vil barnet arbeide for å utvikle styrke og koordinering, samt kontinuerlig utvikling av hodekontroll.

### **Ride**

Ride-konfigurasjonen har til hensikt å støtte barnets bekken, over- og underkropp i en oppreist sittestilling. I denne stillingen vil barnet arbeide for å utvikle overkroppskoordinasjon og styrke hodekontroll.

### **Pooosh**

Pooosh-konfigurasjonen har til hensikt å støtte barnets bekken, over- og underkropp i en oppreist sittestilling. I denne stillingen vil barnet arbeide for å utvikle overkroppskoordinasjon og styrke hodekontroll med assistanse fra omsorgsperson.

Scoot er generelt egnet for barn med cerebral parese GMFCS III-V. På grunn av sin konfigurertbarhet, kan terapeutisk bruk for barn med cerebral parese GMFCS I-II også bruke Scoot. Bruk av Scoot for terapeutisk utfall vil sannsynligvis sammenfalle med pågående intervensjon fra en rekke tverrfaglige team for å utvikle barnets fysiske, kognitive, sosiale og sensoriske funksjon.

Bruken av enheten baseres på brukerens behov. Crawl-konfigurasjonen må kun brukes i korte tidsperioder basert på barnets toleranse, mens Scoot,- og Ride-konfigurasjonen kan brukes som barnets primære mobilitetsapparat og derfor opptil flere timer per dag basert på barnets toleranse.


## Deler




**Ryggstøtte**



**Skyvestang**

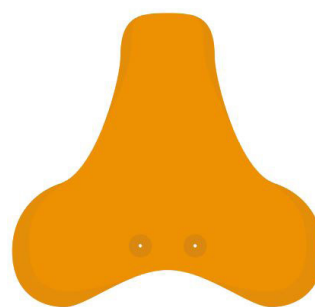

**Scoot base**

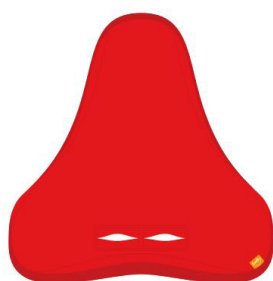

**Polstret trekk**



**Hjul og fotbrett**

Vi anbefaler at det utføres daglige produktinspeksjoner (i henhold til avsnitt 8 i denne bruksanvisningen) for å sikre forsvarlig bruk av produktet.

James Leckey Design Ltd er ikke ansvarlig dersom produktet brukes utenfor tiltenkt sikker bruk. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt Firefly Kundeservice på: UK 0800 318265, ROI 1800 626020 eller [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)

## 2. Sertifisering

Scoot er klassifisert som et medisinsk utstyr i klasse I i henhold til EUs og Storbritannias regelverk. Som produsent erklærer James Leckey Design Limited, at dette produktet samsvarer med Medical Device Regulation (2017/745), UK Medical Device Forskrifter 2002, Medical Device Direktiv (93/42 EEC) og EN 12182:2012 Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne, generelle krav og testmetoder.



**Varsel til bruker og/eller pasient: Enhver alvorlig hendelse som oppstår i forhold til enheten skal rapporteres til produsenten og kompetent myndighet der brukeren og/eller pasienten befinner seg.**

**NB!**

### Generelle brukerråd

Dersom man ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til fysisk skade, skade på produktet eller skade på miljøet!

## 3. Advarsler og forsiktighetsregler

### Advarsel om finger-/hånd-klemfare

- Når et barn er i Pooosh-konfigurasjonen, pass på at barnets hender ikke er i nærheten av hjulene.
- Vær oppmerksom på klemfare i hjuleiker, mellom setebasen, fotstøtten, hjul og gulv.
- Gjør minst mulig justeringer mens brukeren bruker produktet.

### Advarsel om fot-klemfare

- Vær oppmerksom på klemfare mellom setebunn, fotstøtte, hjul og gulv.
- Gjør minst mulig justeringer mens brukeren bruker produktet.

## **Advarsel om velfare**

- Bruk aldri produktet på skråninger med mer enn 5 grader eller på ujevnt underlag eller ujevnt terreng.

## **Sikkerhet under bruk**

- Inn- og utstigning av produktet må gjøres med tilsyn.
- Sørg for at beltet er sikkert påført og festet.
- Dersom barnet viser noen form for ubehag, ta barnet ut av produktet snarest.
- Barnet bør ikke etterlates uten tilsyn mens det bruker Scooot.
- Sørg for at stropper og annet tilbehør holdes borte fra brukerens hals, når barnet plasseres på Scooot og under bruk av produktet, for å unngå kvelningsrisiko.
- Pass på å ikke få fingre i klem under montering og justering.

## **Advarsel om daglige kontroller**

- Produktet skal kontrolleres daglig før bruk for å sikre at alle komponenter er sikkert festet og trygt å bruke.

## **Advarsel om rengjøring**

- Rengjør produktet regelmessig for å hindre oppbygging av smuss. Akkumulert smuss kan ødelegge stoffet. Bruk kun rengjøringsprodukter uten slipende eller etsende innhold. Bruk en fuktig klut for å rengjøre produktet, men ikke bruk rennende vann på trekket mens det fortsatt er festet til produktet. Se Rengjøring og pleieinformasjon i bruksanvisningen.

## **Advarsel om kraftig rengjøring**

- Ikke bruk hageslange eller høytrykkspyler ved rengjøring av produktet. Se Rengjøring og pleieinformasjon i bruksanvisningen.

## **Advarsel ved resirkulering**

- Ved resirkulering av produktet, se retningslinjer for resirkulering i ditt nærområde.

## **Advarsel før bruk**

- Før bruk, la produktet stå i 2 timer for å akklimatisere seg til romtemperatur.

## **4. Vilkår for garanti**

UK/ROI: Varer kan returneres til produsent for garantireparasjon eller erstatning opptil 12 måneder fra mottak. I alle tilfeller er det kundens ansvar å sikre at varene som returneres er hensiktsmessig pakket, fortrinnsvis i original emballasje.

### **Internasjonale kunder:**

Varer kan returneres til produsent for garantireparasjon eller erstatning opptil 12 måneder fra mottak. Vennligst kontakt produsenten for å få saksreferanse-ID iht. den internasjonale returprosedyren. Kunden er ansvarlig for kostnaden for å returnere varene. Når produktet er returnert til produsenten, vil det repareres eller byttes ut og varen returnes til kunden innen 14 dager.

## **5. Sikkerhetsinformasjon**

- 1.** Unnlatelse av å følge instruksjonene kan sette deg og/eller barnet ditt i fare. Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk.
- 2.** Scoot må brukes under tilsyn av en voksen til enhver tid.
- 3.** Kontroller at alle komponenter er forsvarlig festet før bruk.
- 4.** Ikke modifier din Scoot eller bruk andre komponenter enn Firefly-godkjente komponenter. Scoot skal ikke brukes dersom noen av komponentene er defekte.
- 5.** Ikke bruk andre komponenter dersom en del blir ødelagt – reservedeler kan bestilles ved å kontakte kundeservice i Storbritannia: 0800 318265, ROI 1800 626020, mail: [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com) eller Hjelpemiddelspesialisten AS.

6. Hold løse deler unna små barn, da de kan utgjøre kvelningsfare.
7. Husk alltid at Scooot ikke har bremses, og at den bør kun brukes på flate og jevne overflater. Scooot skal ikke brukes på eller i trapper.
8. Utfør eventuelle posisjonsjusteringer og sørg for at belter og spenner er helt festet mens barnet sitter i Scooot. I Ride-konfigurasjonen bør fotstøtten justeres slik at barnets føtter ikke strekker seg utover enden av fotstøtten.
9. Skyvestangen skal kun brukes i Ride-konfigurasjonen. Det er ikke trygt å bruke skyvestangen når barnet kjører selv ved hjelp av beina. Sørg for at Scooot står stødig eller er rygget opp mot en vegg før barnet settes i/på produktet.
10. Hvis barnet ditt bruker Scooot ute og er selvgående i Ride-konfigurasjonen, er det viktig å sjekke at hjulene er rene.
11. Når Scooot ikke er i bruk, bør den oppbevares forsvarlig på et tørt sted og vekk fra ekstreme temperaturer.
12. Sjekk at omgivelsene er trygge før du lar barnet ditt bruke Scooot. Husholdningsartikler eller møbler kan utgjøre fare hvis de har skarpe hjørner eller skaper hindringer.
13. Ikke dytt Scooot ved motstand, da barnet kan bli skadet.
14. Det anbefales at barnet har på seg joggesko ved bruk av produktet av sikkerhetsmessige årsaker. Bare føtter, sandaler eller tøfler er ikke anbefalt.
15. Ved montering av Ride-konfigurasjonen, sikre at hjulbeskyttelsesfester er sikre og fotstøtten er justert og sikret i henhold til avsnitt 11.2.
16. Hvis du er i tvil om trygg bruk av Scooot eller eventuelle deler skulle bli ødelagt, vennligst slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt Firefly kundeservice i Storbritannia 0800 318265, ROI 1800 626020, mail: [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com) eller Hjelpemiddelspesialisten AS.
17. Scooot-trekket overholder brannsikkerhetsforskrifter i samsvar med EN1021-1. Produktet skal likevel alltid holdes unna åpen ild eller høye temperaturer.
18. Rengjør produktet regelmessig i samsvar med § 7 i denne bruksanvisningen. Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel. Utfør vedlikeholdssjekker med jevne mellomrom og sikre at produktet ditt fungerer slik det skal.



**Når et barn er i Poosh-konfigurasjon, sørg for at barnets hender holdes unna hjulene!**



## 6. Forholdsregler og kontraindikasjoner

### Forholdsregler

- Ryggdeformiteter som f.eks skoliose eller kyfose.
- Alvorlige muskelkontrakturer.
- Alvorlig muskel eller skjelett asymmetri inkludert hoftedislokasjon.
- Progressiv og muskelsvinnforhold.
- Høy risiko eller nylig beinbrudd.
- Høy risiko for trykkrelatert skade eller åpne sår.
- Sterke, ukontrollerte bevegelsemønstre.
- Dårlig kontrollert anfallsaktivitet.
- Barn avhengig av bruk av perkutan endoskopisk gastrostomi.
- Medisinsk ustabilitet inkludert kompromitterte luftveier eller kardiovaskulær funksjon.
- Avhengig av 3. parts livsoppretholdende apparater som f.eks oksygentank.
- Betydelige lærevansker og/eller atferdsproblemer.

### Kontraindikasjoner

Det er ingen kontraindikasjoner knyttet til bruken av Scoot.

Alle forholdsregler og kontraindikasjoner tas etter skjønn av terapeut eller forelder. Leckey og Firefly anbefaler at en utdannet og erfaren terapeut er tilstede under alle vurderinger, oppsett og konfigurasjoner for å minimere risiko.

## 7. Rengjøring og vedlikehold

Plastoverflatene på Scooot kan eventuelt tørkes ren med varmt såpevann og en myk klut eller svamp. Slipende rengjøringsmiddel kan skrape eller lage merker på Scooot.

Ikke rengjør noen av delene med rengjøringsmiddel som inneholder blekemiddel.

### Hoftebelte og pute

- Beltet kan fjernes fra ryggstøtten for vask. Oppbevar tilbehør/deler på et trygt sted og unna barn.
- Trekket kan vaskes i vaskemaskin på 40° C eller lavere. Ved førstegangs vask av Scooot-pute eller belte, bør det vaskes separat fra andre plagg for å redusere risikoen for smitte av farge.
- Ikke bruk tørketrommel, eller stryk puten og/eller beltet.
- Fjern flekker så raskt som mulig med klut eller svamp. Klut med varmt såpevann er effektiv for fjerning av vanlig smuss og mindre søl.
- Antiseptiske rengjøringsmidler kan brukes på kraftigere flekker. Sørg for at rengjøringsmidler er helt fjernet etter vask.
- Ikke bruk løsemidler til å rengjøre eller fjerne flekker fra beltet eller puten.
- Ikke blek produktet.
- Ikke tørrens puten eller hoftebeltet.

## 8. Daglig produktsjekk

Vi anbefaler at ulike sjekk på Scooot utføres før bruk for å sikre at produktet er trygt. De anbefalte sjekkene er detaljert nedenfor.

### Crawl

1. Sjekk at puten er godt festet som vist i avsnitt 11.2.
2. Sjekk at strikken ikke er løs eller i kontakt med andre beslag.
3. Sjekk at strikken ikke er vridd.
4. Sjekk at det fremre hjulet er montert og sikkert.

## **Scoot**

5. Sørg for at ryggstøtten er festet ordentlig.
6. Hvis du bruker trekket, gjennomfør sjekk 1-3.
7. Sørg for at beltet er godt festet til ryggstøtten og at spennen fungerer som den skal.
8. Sjekk at det fremre hjulet er montert og sikkert.

## **Ride**

9. Sjekk at festene til hjulet er sikkert montert.
10. Sørg for at ryggstøtten er festet i henhold til sjekk 5-8.
11. Hvis du bruker trekket, gjennomfør sjekk 1-3.
12. Sjekk at hjulenheten er festet sikkert (se avsnitt 11.2 Trinn 4-7).
13. Sørg for at fotstøtten er justert og tilpasset barnet ditt.
14. Sørg for at fotstøtten er sikker.
15. Sjekk at fremre hjul er fjernet fra basen.

## **Pooosh**

16. Sørg for at ryggstøtten er sikker i henhold til sjekk 5-8.
17. Sørg for at skyvestangen er sikker som i steg 8 på s.19.
18. Sørg for at de myke berøringsknappene på kjørehåndtaket er sikre og skrudd godt fast.

## **Avansert ryggpute**

19. Sørg for at den avanserte ryggstøtteputen sitter riktig på som på s.19.
20. Pass på at knappene på sidene er festet riktig som på s.19.

Hvis du er i tvil om sikker bruk av ditt Firefly-produkt eller hvis noen deler skulle svikte, vennligst stopp bruk av produktet og kontakt kundeservice så snart som mulig.

## 9. Redistribuering av Fireflyprodukter

Før du utsteder et produkt på nytt, anbefales at det at den desinfiseres ved å bruke følgende prosedyrer:

**NB: Rengjør alltid produktet først for å fjerne smuss før desinfisering.**

1. Dersom det er mulig, anbefaler vi bruk av automatisert "fogger" desinfeksjonssystem som brukes for å dekke produktets hele overflater med et desinfeksjonsmiddel. Produsentens instruksjoner for det valgte systemet skal henvises til før bruk og følges nøyaktig.
2. Dersom automatisert desinfeksjonssystem er ikke tilgjengelig, bør produktets overflater tørkes over med desinfiserende servietter eller flytende desinfeksjonsmiddel med en myk klut. Egnede produkter er 70 % IPA, 70 % alkohol eller fortynnet blekemiddel. Produsentens instruksjoner for valg av produkt skal følges. Produkttrekk og tekstiler bør rengjøres grundig i henhold til avsnitt, "Rengjøring og vedlikehold", i denne bruksanvisningen.

Sørg for at en kopi av bruksanvisningen følger med produktet. Hvis du er i tvil om sikker bruk av ditt Firefly-produkt eller hvis noen deler er ødelagte, vennligst slutt å bruke produktet og ta kontakt med kundeservice på: UK 0800 318265, ROI 1800 626020 eller [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com).

## 10. Service

Defekte produkter kan repareres eller erstattet av Firefly, hvis produktet fortsatt er dekket av garantien. Produktet returneres til Firefly for videre befarig. Gebyr for transport kan tilkomme.

For alle servicerelaterte problemer kontakt Kundeservice på :UK 0800 318265, ROI 1800 626020 eller [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com).

## 11. Instruksjoner for bruk

### 11.1 Hvordan vite om Scooot passer for barnet ditt

#### Vurdering

Scooot er et tidlig mobilitetsprodukt, designet for å gi barn en morsom opplevelse og mulighet for uavhengig bevegelse. Scooot er ment for barn fra ca 2-6 år (avhengig av størrelse) og Gross Motor Function Classification (GMFCS) nivåer I - IV, avhengig av deres utviklingsnivå.

Barnet ditt vil få mest mulig ut av Scooot (i alle konfigurasjoner) hvis de er i stand til å holde hodet oppe, og har god kontroll i sittende stilling, noe som betyr at de kan sitte på gulvet med litt bekkenstøtte.

Hvis barnets hodekontroll fortsatt er i utvikling, anbefaler vi å vente til den blir bedre før barnet bruker Scooot.

#### Se videoer på:

[www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com)  
for ytterligere detaljer.



## 11.2 Pakke ut og montere Scoot

Pass på at du ikke skjærer gjennom boksen da du kan skade delene på innsiden. Delene ligger i polyetylenposer. Sjekk at du har alle delene som følger med.

### Slik monterer du din Scoot:

Velg hvilken konfigurasjon du ønsker å sette sammen:

Crawl




Scout




Ride




Pooosh

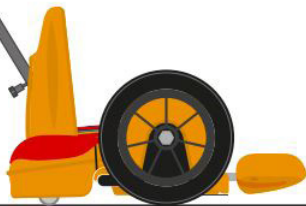


### Deler som følger med:

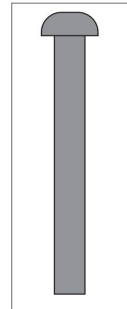


A 1xM8x65mm

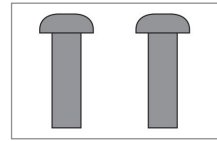


C 2xM8x25mm

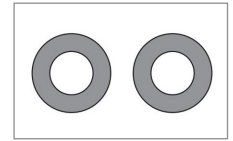


D 2xM8x25skive

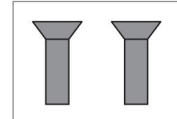


E 2xM5x10mm

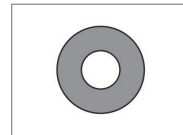


B 1xM8 skive

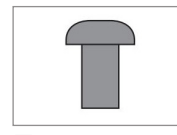


F 1x10x16mm

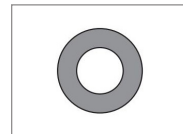


G 1xM10 skive

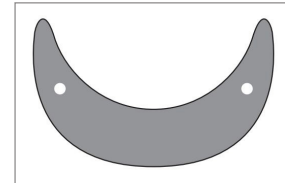


H Hestesko plate

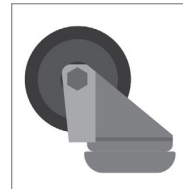


I 1x hjul

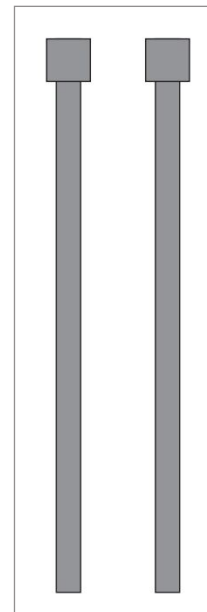

J 2xM6x120mm

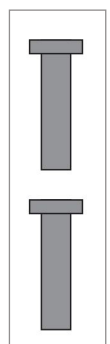

K 2xM6 møbelkoblinger

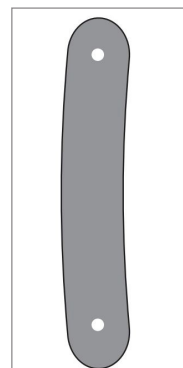


J Ryggstøtteplate



Hold polyetylenposer vekk fra barn.


Din Scoot kommer med en instruksjons-pakke som inneholder alle deler og verktøy du trenger for montering.

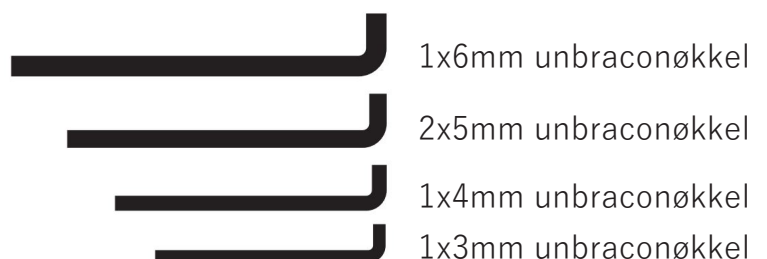

## Steg 1


Hvis du ønsker å bruke Scoot i Scoot eller Crawl-konfigurasjon, må du feste det fremre hjulet. Ta hjulet I, beslag F og skive G, og fest til Scootbasen med verktøyet som er inkludert i pakken.

Det fremre hjulet skal ikke monteres hvis du bruker Scoot i Ride eller Pooosh-konfigurasjon.

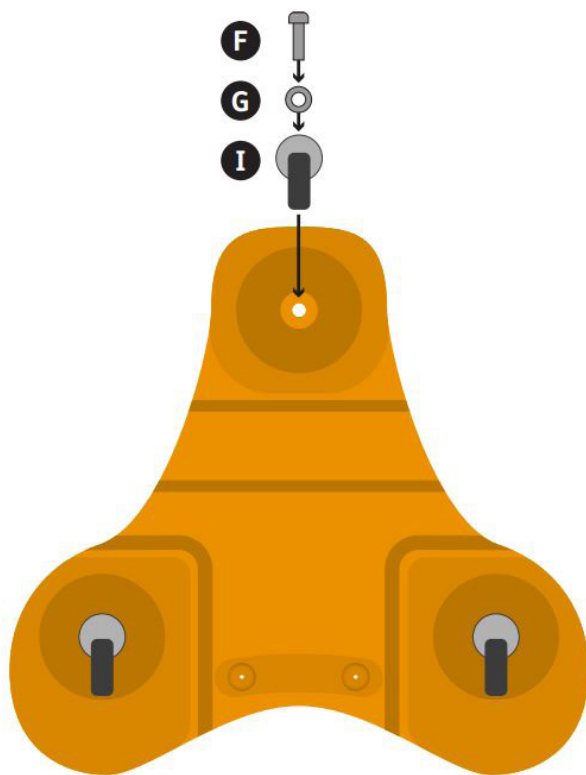

## Steg 1


Monter trekket til basen. Fest trekket med den elastiske strikken med den myke siden opp. Rett inn sporet i polstringen med de to hullene i toppen av basen.

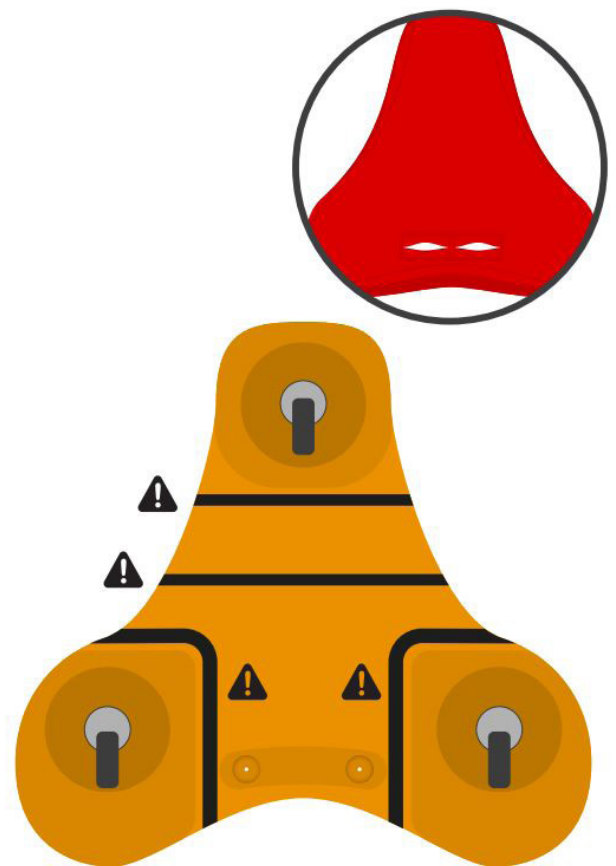


Monter den elastiske strikken som vist, for å sikre at det ikke vil komme i klem i hjulene.

### Steg 3

For å feste ryggstøtten, sett inn ryggstøttefestet gjennom sporene i trekket så begge sitter godt i hullene på Scoot-basen.

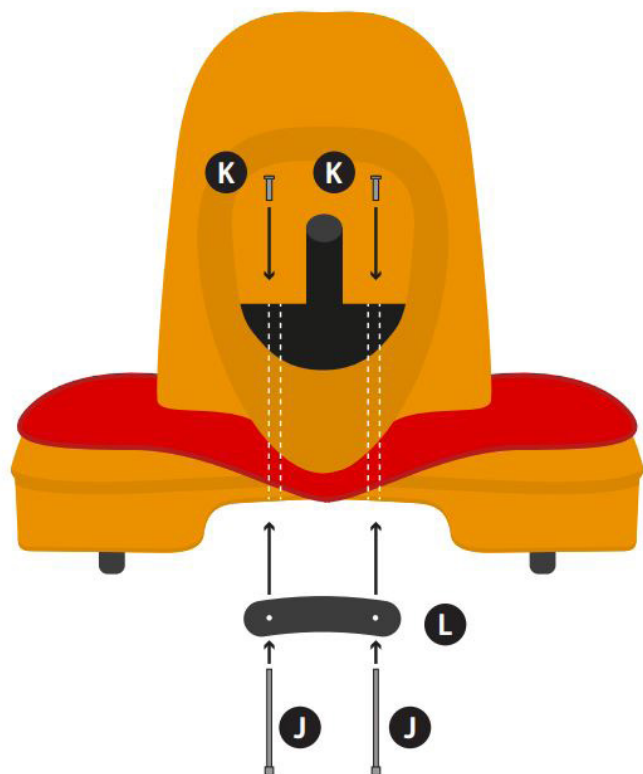

Fest ryggstøtten, braketten og møbelkoblingene til undersiden med ryggstøtteplaten og skruene som vist. Bruk verktøyene som følger med for å stramme skruene og sikre ryggstøtten. Sørg for at ryggstøtten ikke vinger.

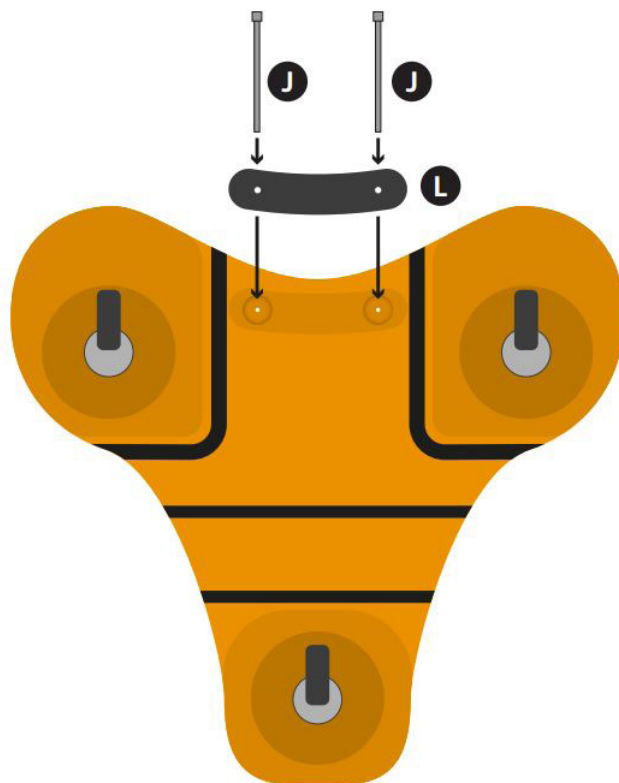


Hvis det er bevegelse i ryggstøtten, stram til boltene.



## Steg 4

Skyv Scoot-basen opp og på de tre utstående pinnene på hjulmonteringen slik at de passer inn i hullene.

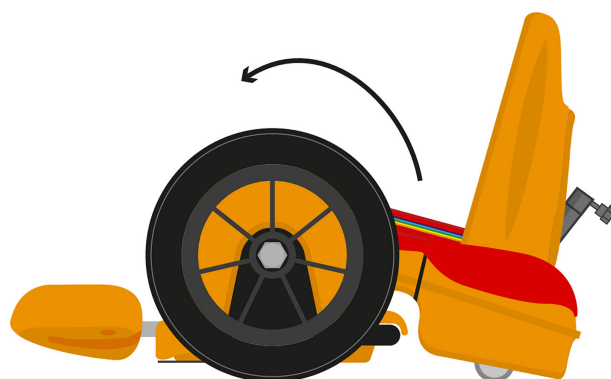


## Steg 5

Snu Scoot for å få tilgang til undersiden. Med boltene og skivene, monter Ride-konfigurasjonen på de tre stedene ved hjelp av verktøyet som følger med.



**Sjekk at hjulene  
sitter godt fast**

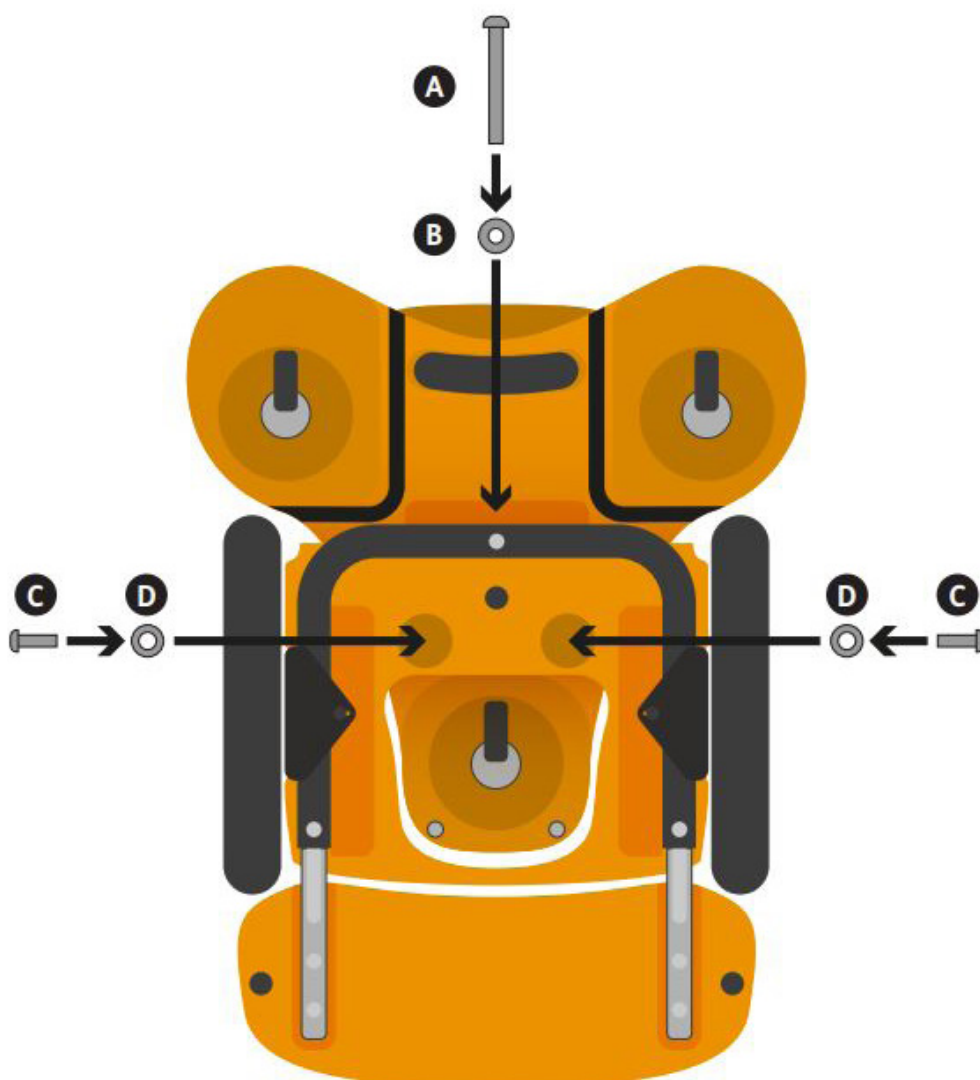

## Steg 6

Juster lengden på fotstøtten slik at den passer barnet ditt ved å løsne de uthevede boltene og skyv fotstøtten inn eller ut.



Sørg for at boltene er strammet helt til før barnet bruker Scoot.

## Steg 7

Bruk de to festene (E) for å feste hestesko-platen (H) foran på Scoot som vist på bildet under.



I Ride-konfigurasjonen er det nødvendig å fjerne fronthjulet før bruk.

Fjern hjulet og beslagene (deler F,G,I) og oppbevar de på et trygt sted.


Du kan nå bruke Scoot i Ride-konfigurasjon.



## Steg 8

For å feste skyvehåndtaket plasserer du stangen innenfor det viste området. Stramme skrue A for å sikre at stangen sitter godt fast. Juster stangen til din passende høyde og stram med skrue B.

Sørg for at stangen er sikker før bruk.

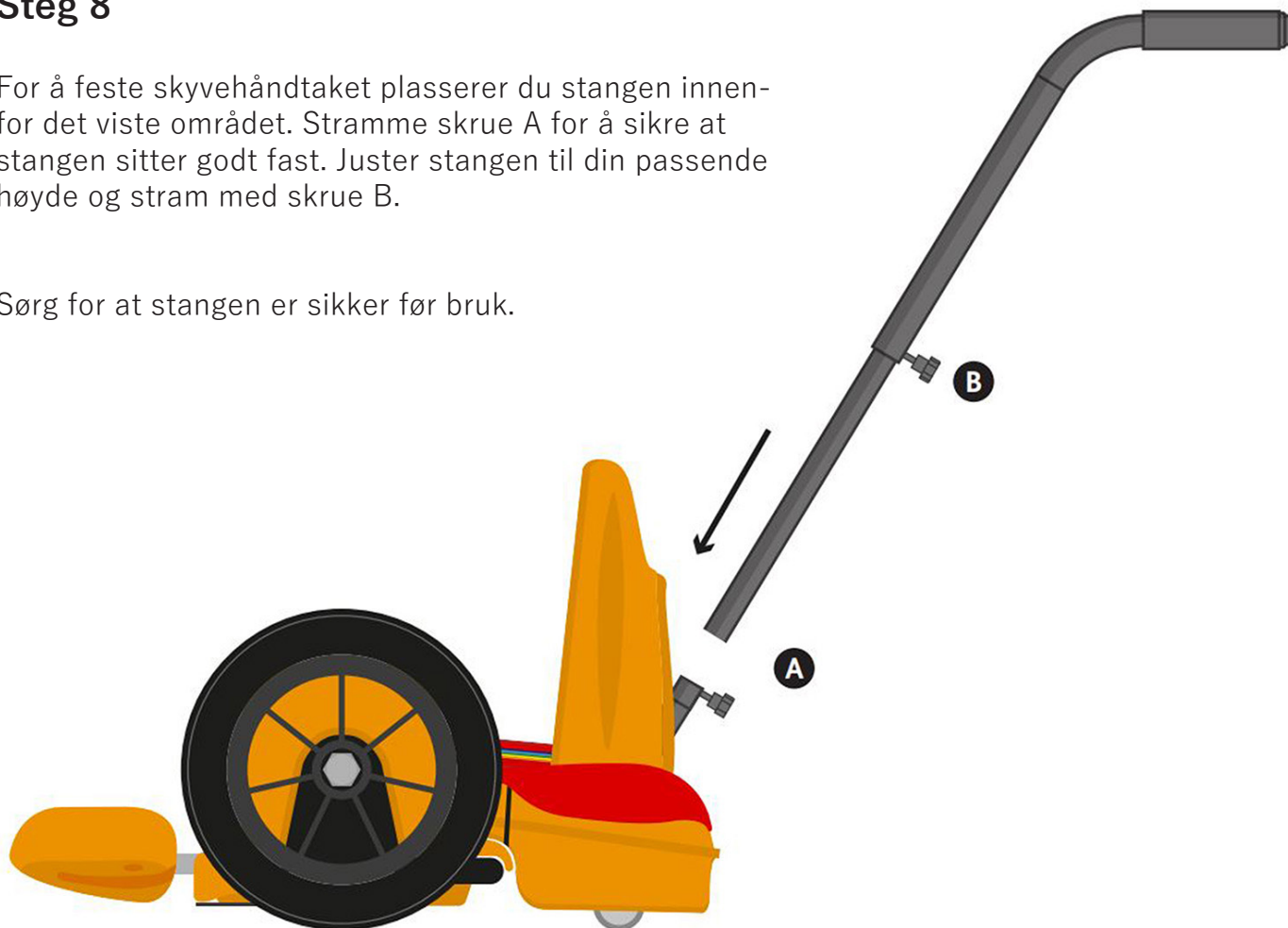


## Feste avansert ryggstøtte

Hvis du har valgt avansert ryggpute som tilbehør, skyv den på ryggstøtten før du fester ryggstøtten til Scoot.

Trekk puten over plastryggen. Hekt strikken over for å feste trekket til ryggstøtten. Krok endedelen av dekselet over bakkdelen av ryggstøtten. Plasser støttene i sporene som vises og fest dem.

Flytt for å justere høyden på støttene opp og ned mellom de fire festene.

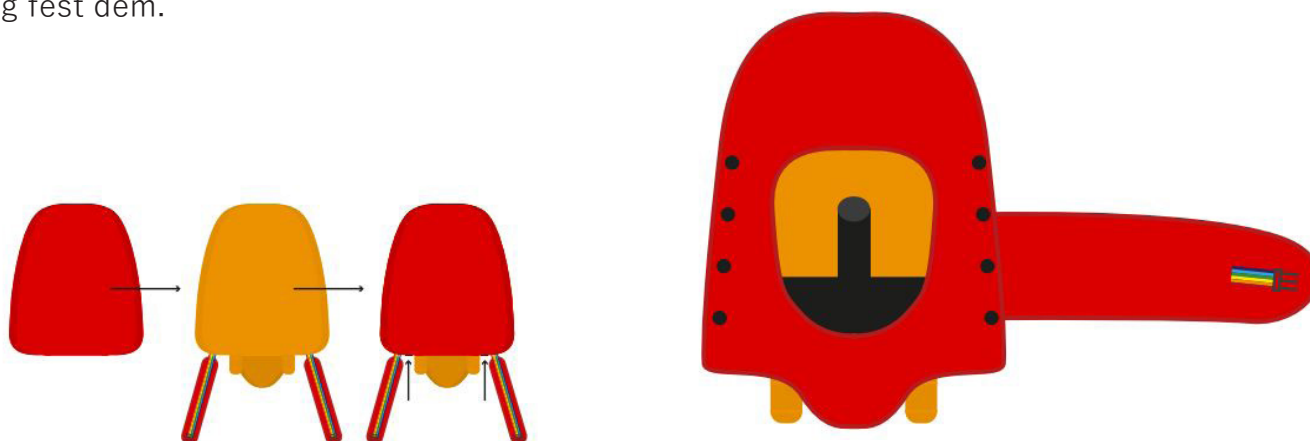

## 11.3 Sette barnet på Scooot

Før du begynner å bruke Scooot, sørg for at alle komponenter er justert og strammet. Sjekk elastiske stropper for tegn på skade eller slitasje. Hvis det er tegn på skade, ikke bruk produktet og kontakt kundeservice for råd. Sett Scooot i en stilling slik at den ikke beveger seg mens barnet ditt setter seg på den. Hold den stødig eller plasser den mot en vegg for ekstra støtte.

### 1 Scooot i Crawl-konfigurasjon

Barnet ditt bør bruke Crawl på mageleie som vist på bildet. Barnets hode vil vende mot fronten av Scooot (hvor Firefly-logoen er plassert).

Husk at det ikke er bremses på Scooot, så bruk Crawl-konfigurasjonen på en flat overflate. Overvåk barnet ditt for å sikre at hendene ikke kommer under hjulene.



### 2 Scooot i Scoot-konfigurasjon

Før du bruker Scooot i Scoot-konfigurasjon, sikre at alle komponenter er justert slik som anbefalt i Seksjon 11.2, og sjekk elastiske stropper for tegn på skade eller slitasje. Hvis det er skade, ikke bruk produktet og kontakt kundeservice for råd. Pass på at Scooot ikke beveger seg når barnet setter seg på den.

Hold den stødig eller plasser den mot en vegg for ekstra støtte.

Sørg for at ryggstøtten er festet sikkert ved å følge monteringsinstruksjoner i avsnitt 11.2 Steg 3.

Åpne beltet og plasser barnet ditt slik at ryggen vender mot ryggstøtten.

Fest beltet rundt barnets midje. Klikk sammen og trekk de to D-ringene vekk fra midten for å stramme beltet. Pass på at beltet ikke blir vridd.

Når du bruker Scoot, kan barnet dytte seg bakover, forover eller sidelengs ved å bruke bena. Husk at det ikke er bremses på Scooot, så bruk den på en flat overflate. Pass på at barnet ikke får hendene i klem under hjulene.



**Forsikre deg om at barnet ditt er komfortabelt og stabilt i Scoot-konfigurasjon før bruk.**

### 3 Scoot i Ride-konfigurasjon

Før du begynner å bruke Scoot, sørg for at alle komponenter er justert og strammet for å passe. Sjekk elastiske stropper for tegn på skade eller slitasje. Hvis det er tegn på skade, ikke bruk produktet og kontakt kundeservice for råd. Sett Scoot i en stilling slik at den ikke beveger seg mens barnet ditt setter seg på den. Hold den stødig eller plasser den mot en vegg for ekstra støtte.

Juster fotstøtten slik at den passer barnets benlengde slik at føttene deres ikke strekker seg utover enden av fotstøtten. Se avsnitt 11.2 Steg 4-6.

Åpne beltet og plasser barnet slik at ryggen er opp mot ryggstøtten.

Fest beltet rundt barnets midje. Klikk sammen og trekk de to D-ringene vekk fra midten for å stramme beltet. Pass på at beltet ikke blir vridd.

Når du bruker Ride-konfigurasjonen, kan barnet dytte seg selv fremover eller bakover ved hjelp av hjulene. Ved å dytte fremover på høyre hjul vil det resultere i en venstresving, og ved å dytte fremover på venstre hjul vil det resultere i en høyresving. Ved å dytte bakover på høyre hjul vil det resultere i en høyresving og ved å dytte bakover på venstre hjul vil det resultere i en venstresving.



**Forsikre deg om at barnet ditt er komfortabelt og stabilt i Ride-konfigurasjon før bruk.**





## 4 Poosh

Følg instruksjonene i henhold til Ride-konfigurasjonen. Sørg for at skyvestangen er montert på ryggstøtten før du setter barnet i Scoot. Sørg for at begge knottene på skyvestangen er godt festet. En voksen eller eldre barn må dytte og overvåke barnet mens det sitter på Scoot til enhver tid.



Vær oppmerksom på barnets hender når du bruker Poosh funksjonen. Sørg for at hendene ikke kommer i nærheten av eikene til hjulene for å minimere risikoen for at hendene kommer i klem.



Når et barn er i Poosh-konfigurasjon, sørg for at barnets hender er borte fra hjuleneheten.

## 11.4 Scoot og barnets utvikling

Uansett hvilken konfigurasjon av Scoot barnet bruker, vil de ha muligheter for å utvikle fysiske, kognitive og sensoriske evner samtidig som de har det kjempegøy!

Aktiv bevegelse bidrar til kognitiv utvikling – det hjelper barn å lære retningsbestemte instruksjoner (fremover, bakover etc.) samt dybde- og avstandsperspeksjon som er nødvendig for å se hindringer. Ved å gjøre dette, forbedres kroppsbevisstheten ettersom barnet får en bedre følelse av hvordan de kan forholde seg til omgivelsene deres. Dette kan også føre til bedre hånd- og øyekoordinasjon, samt koordinasjon og trening av ben, armer, nakke, mage og rygg. I Crawl og Ride-konfigurasjon, er små hender eksponert for et bredere spekter av sensoriske erfaringer og styrking av skuldre – dette betyr også forbedret manipulasjonsevne.

## 12. Teknisk informasjon

<b>Fotplatejustering</b> <b>Avstand fra ryggstøtte</b> (benlengde sittende fra sete til føtter)	Ved minimumsinnstilling: 52 cm Ved maksimumsinnstilling: 63 cm (fra front til fotstøtte)
<b>Hjulbuebredde</b>	23 cm
<b>Setebredde</b> <b>Maks. anbefalt hoftebredde</b>	23 cm
<b>Ryggbredde</b>	26 cm
<b>Rygghøyde</b> (fra sete)	30 cm
<b>Størrelse</b>	<b>Crawl:</b> L: 46cm B: 45cm H:16cm  <b>Scoot:</b> L: 46cm B: 45cm H:32cm  <b>Ride (v/min.innstilling):</b> L: 62cm B: 45cm H:32cm  <b>Ride (v/maks.innstilling):</b> L: 73cm B: 45cm H:32cm
<b>Ytterligere mål</b>	<b>Ryggstøtte:</b> B: 26cm  <b>Avansert ryggstøtte:</b> B: 42cm  <b>Skyvestang:</b> H: 89cm (maks. fra gulv) H: 80cm (min. fra gulv)

## 13. Symboler



Medisinsk enhet



Produksjonsdato



Les bruksanvisning



Latexfri



CE-merking



Unik enhetsidentifikasjon




Advarsel



Maskinvask - 40° C



Produsent

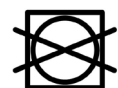

Ikke bruk tørketrommel



Produktkode



Ikke bruk strykejern



Serienummer



Ikke bruk blekningsmiddel



Maks. brukervekt



Ikke rensing



## **14. Ofte stilte spørsmål**

### **1. Hvordan vet jeg om Scooot er egnet for barnet mitt?**

Scooot er et mobilitetsprodukt, designet for å gi barn en morsom opplevelse og mulighet for selvstendig bevegelse. Scooot er laget for barn fra ca. 2-6 år (avhengig av deres størrelse) og Gross Motor Function Classification System (GMFCS) nivåer I - IV, avhengig av deres utviklingsnivå.

Barnet ditt vil få mest mulig ut av sin Scooot (i alle konfigurasjoner) dersom de er i stand til å holde sitt eget hode oppe, og har god kontroll i sittende stilling, eventuelt sittende stilling med sidestøtte.

Barnet ditt vil finne det vanskelig å bruke Scooot (i hvilken som helst konfigurasjon) hvis de har begrenset hode- og kroppskontroll, eller sitteevne.

### **2. Er det grunner til å ikke bruke Scooot?**

Hvis barnet ditt ikke har god kroppskontroll, eller hatt visse typer operasjoner, anbefales det å søke råd fra fysioterapeut og/eller lege.

### **3. Hvor lenge bør barnet mitt bruke Scooot?**

Dette kan variere avhengig av barnets evner, humør og tid på dagen. Dersom barnet blir trøtt og sliten kan dette påvirke deres evner i andre daglige aktiviteter.

### **4. Hvor mange ganger i uken bør barnet mitt bruke Scooot?**

Dersom barnet ditt har glede av å bruke Scooot ofte, kan det brukes daglig. Hvis barnet har behov for pauser, eller har diagnose som indikerer kortere bruk, må det følges.

### **5. Barnet mitt liker ikke en av konfigurasjonene. Hva burde jeg gjøre?**

Scooot skal være en morsomt aktivitet som gir terapeutiske fordeler. Det er mest sannsynlig at barn misliker Crawl-konfigurasjonen, hvor barnet skal holde hodet oppe hvilket kan være tungt. Hvis du ønsker å jobbe videre med hodekontroll, bør dette gjøres litt etter litt og ikke presse barnet. Man trenger ikke å bruke Scooot i alle konfigurasjoner.

### **6. Kan jeg bruke Scooot utendørs?**

Scooot kan fint brukes ute på flate og jevne overflater. Bruk på grus og gress anbefales ikke. Hvis barnet ditt er selvgående, er det viktig at du sjekker at hjulene er rene til alle tider.





Fireflyfriends Ltd  
19c Ballinderry Road  
Lisburn BT28 2SA  
Northern Ireland

**T: (+44) 28 9267 8879**  
**E: [hello@fireflyfriends.com](mailto:hello@fireflyfriends.com)**

**USA Distributor / Canadian Distributor**

**[fireflyfriends.com](http://fireflyfriends.com)**

Hjelpemiddelspesialisten AS  
Rosenholmveien 22  
1252 Oslo

**T: (+42) 66 81 60 70**  
**E: [firmapost@hm-spes.no](mailto:firmapost@hm-spes.no)**

**[hm-spes.no](http://hm-spes.no)**

