

Veiledning for OriClock

En digital klokke som hjelper bruker å orientere tid, dag og dato.



Om OriClock- dagkalender med døgnorientering

OriClock er et hjelpemiddel for personer som har kognitive vansker og utfordringer med tid og døgnorientering.

OriClock er en digitalt enhet som lar bruker enkelt orientere seg om tidspunkt, dag, dato og døgnorientering. En stiller enkelt inn klokken til å vise informasjonen som er aktuell for bruker. Enheten har en klar skjerm i 8" størrelse i et stående format, dette gjør det enkelt å lese informasjonen som står på den.

Klokken kan vise klokkeslett enten analogt med urskive eller digitalt, tiden på døgnet, dato og ukedagen.

Det er mulig å få klokkeslettet lest opp, samt hvilken tid (for eks ettermiddag) det er på døgnet og datoen. Dette gjøres ved å trykke på de aktuelle feltene på skjermen.

Brukerveiledningen er ment til støttepersoner tilknyttet bruker.

Merk: Enheten er kun til innendørs bruk.

OriClock er utviklet av NorMedia AS

Innhold

- Enhet i 8" størrelse med innebygget bordstøtte
- Strømadapter
- Brukerveiledning

Merk: OriClock må stå tilkoblet strømnettet. Det er kun den medfølgende strømadapteren som må brukes.

Kom i gang med *OriClock*

Strømkabel må plugges i på enhetens bakside og stå i plagget hele tiden. Enheten lagrer innstillingene, men skjermen skrus av dersom man tar ut strømmen.

Oversikt

Skjermen er 8" i stående format, det er innebygde høyttalere.



Ved å trykke på Av/På knappen, går enheten i dvale. Dersom enheten ikke reagerer, kan man holde knappen inne i 20 sekunder.

Tilpass din OriClock

Det er flere tilpasninger du kan gjøre på OriClock sitt utseende for å tilpasse det din bruker.

For å komme til innstillinger skal du dobbel-trykke på tannhjulet oppe i høyre hjørne. Når du er inne i innstillinger vil det stå "ferdig" der tannhjulet var. Når du er ferdig å redigere trykker du på "ferdig" for å komme ut til startsidene igjen.

Klokkevisning

Kan være analogt med urskive eller digital med tall - som standard får en begge deler

Det er ulike urskiver å velge mellom.

Det er ulike utforminger på klokkeslettet vist i tall

Døgnorientering

OriClock forteller brukeren hvilken tid på døgnet det i form av tekst - det vil stå morgen, formiddag, ettermiddag, kveld, natt - avhengig av når på døgnet det er.

OriClock er standard innstill med følgende tidsperioder

Morgen fra 06.00 - 10.00

Formiddag fra 10.00 - 14.00

Ettermiddag fra 14.00 -18.00

Kveld fra 18.00 -22.00

Natt fra 22.00-06.00

Det er mulig å skru de forskjellige intervallene av eller på.

Nattmodus

Når enhetens nattmodusfunksjon er skrudd på vises symbolet for natt på skjermen.

For nattmodus kan man velge å skru av/på tid og dato. Det er mulig å velge alternative bakgrunnsfarger for nattmodus. Som standard er en mørk bakgrunnsfarge aktiv.

Nattmodus følger OriClock sine tidsinnstillinger for "natt" og denne er regulerbare hvis bruker har behov for kortere/lengre nattmodus på sin enhet.

Få symbol på ukedagen

OriClock har mulighet for symbolisering på ukedagen.

Denne følger dag/natt modus og vil ha sol ikon i dagtimene og måne ikon i nattperioden.

Funksjonen kan skrus av/på.

Fargevalg

Du kan enkelt skifte forgrunnsfarge og bakgrunnsfarge, eller velge en av de ferdig definerte fargekombinasjonene

Dato

Du kan innstille skrifttype og velge formatet, samt overstyre dagens dato dersom du har skrudd av automatisk tid og klokkeslett.

Eksempler:

- Lang dato: 2. August 2022
- Kort dato: 2. August
- Lang tall: 2.8.2022
- Kort tall: 2.8
- Dato av: Ingen dato vises

Visning av dag kan skrus av eller på. Dagen vises foran dato.

WiFi

Du kan velge å koble enheten til et trådløst nettverk, dersom du ønsker at klokken skal hente oppdatert tid og tidssone automatisk.

Justere klokken

Dersom du ønsker å stille klokken manuelt, velger du å skru av automatisk tid og automatisk tidssone.

Her velger man også om man vil ha 24 timers eller 12 timers klokke.

Innstillinger for opplesning

For opplesning kan følgende innstillinger tilpasses:

Opplesning av klokke gitt at klokka er 16.05

- Lang: "Klokken er 16:05"
- Kort "16:05"
- Lang 12-timers: "Klokken er 5 minutter over 4"
- Kort 12-timers: "5 minutter over 4"

Valg for komplett opplesing (Av/På):

- Fortell tid (Av/På)
- Fortell ukedag (Av/På)
- Fortell tidspunkt på dagen (Av/På)
- Fortell dato (Av/På)

Sommertid/Vintertid

Enheten vil skifte sommertid og vintertid automatisk.

Tilbakestille

For å tilbakestille enheten, gå i innstillinger og trykk på Tilbakestill innstillinger

Få teksten opplest

Ved trykk på de gitte feltene skjer følgende

Område som trykkes på	Handling
Klokke (Digital eller analog)	Tidspunktet leses opp (Klokken er 16.00)
Dato	Dato leses opp, i forhold til innstilt format.
Tid på dagen	Teksten leses opp (F.eks. ettermiddag, natt)
Dag	Navnet på dagen leses opp (F.eks. Tirsdag)

Dersom alternativet for komplett opplesing er skrudd på, så leses de elementene som er valgt opp, uansett hvor man trykker på skjermen. Se punktet om Innstillinger for opplesning.

Språk:

OriPlanner kommer med norsk og engelsk tekst og tale.

Videoguide

Gå på <https://normedia.no/support/oriclock>, eller skann QR-koden på baksiden av klokka.

Support:

Du finner brukerveiledninger og tips til bruk på <https://normedia.no/support/oriclock>

Trenger du hjelp kan du kontakte oss på

Telefon: 66915440

E-post: support@normedia.no

Tekniske spesifikasjoner

Vekt	512 gram
Høyde	211.8mm
Bredde	132mm
Dybde	104mm
Høytalere	2 x 2W
Tilkobling	Kablet nettverk Strøm (12V, 1.5A) Hodetelefon eller ekstern høyttaler
Display	8" vertikalt