



Et sted for ALLE

Sansehornet



Mobilex rullator "LEOPARD"

Installasjons- og bruksinstruksjoner



1. Introduksjon

Monterings- og brukerhåndboken inneholder en detaljert produktbeskrivelse og viktige instruksjoner for riktig bruk av produktet. Les derfor denne bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Vær oppmerksom på alle forholdsregler, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, og følg dem alltid for å oppnå en sikker og langvarig bruk av produktet.

Formålsbeskrivelse

Rullatoren er beregnet på personer som på grunn av bevegelsesproblemer trenger stabil støtte når de går, men som er i stand til å bruke rullatoren selv uten fare for å skade seg selv eller påføre andre. Rullatoren avlaster redusert gangfunksjon og balanseevne. Takket være setet og parkeringsbremsene kan brukeren sette seg ned når som helst for en pause. Rullatoren må kun brukes til å komme seg rundt og til å sitte på en kort stund.

NB

Rullatoren skal kun brukes av personer som på grunn av sin helsetilstand trenger stabil støtte når de går. Rullatoren skal ikke brukes av personer med for eksempel svekket muskelstyrke, og som derfor ikke kan bruke rullatoren uten fare for å skade seg selv eller andre. Har du spørsmål om produktet, vennligst kontakt oss.

2. Sikkerhetsinstruksjoner

- Bruk kun produktet i feilfri tilstand.
- Dersom det oppdages mangler eller feil på produktet, må forhandler kontaktes umiddelbart.
- Vær oppmerksom på informasjonen på typeskiltet.
- Bruk kun produktet til det angitte formålet.
- Ingen strukturelle endringer kan gjøres på produktet uten produsentens skriftlige tillatelse.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene eller får andre skader i alle ledd på rullatoren og ifm. med justeringer, folding o.l.
- Kontroller at begge bremsene fungerer før igangkjøring.
- Bruk bare rullatoren når den er helt utfoldet og med låsemekanismen helt innkoblet.
- Produktet skal kun brukes på en flat og stabil overflate innendørs og utendørs.
- Alle hjul må være i kontakt med bakken. Dette sikrer at rullatoren er i balanse og unngår dermed mulig ulykke.
- Når rullatoren brukes til å sitte på, må parkeringsbremsene være aktivert.
- Begge bremsespakene må være aktivert og blokkert samtidig.
- La aldri en rullator være ulåst i bremsefunksjonen.
- Produktet må aldri utsettes for større belastning enn totalt 150 kg.
- Handleposen er testet til 5 kg.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Mobilex "Leopard" rullator har en lett ramme laget av pulverlakkert aluminium og er utstyrt med 4 hjul. Aluminiums-rammen gjør det enkelt å brette sammen rullatoren og oppbevare og transportere den. Den er lett å manøvrere og er veldig stabil. Kjørehåndtakene kan justeres i høyden enkelt og uten bruk av verktøy. Rullatoren er fra fabrikk utstyrt med montert sete, stokkholder, ryggbelte og handlepose.

Leveransen inkluderer

- ✓ 1 "Leopard" rullator sammenlagt inkl. sete, stangholder, ryggbelte og handlepose
- ✓ 1 monterings- og brukermanual

Kontroll

Sjekk ved hjelp av ovenstående at ingenting mangler. Hvis noe mangler, kontakt forhandleren av produktet umiddelbart.

Forberedelse

- Ta rullatoren ut av esken og plasser den med hjulene på gulvet. Trykk på den røde knappen og ta tak i rørene ved setet. Trykk disse ned til det høres et lett klikk i låsmekanismen.

Rullatoren er nå utfoldet og sikret mot sammenlegging.

- Kontroller før bruk at boltene som fester hjulene er riktig festet og at rullatoren er stabil slik at ingen deler kan bevege seg.
- Kontroller også funksjonen til bremsen før du bruker rullatoren.



Folding av rullatoren

- For å folde sammen rullatoren, dra oppover i stroppen i midten av setet.
- Låsmekanismen frigjøres deretter og rullatoren kan enkelt foldes sammen.

Høydejustering av skyvehåndtaket

- For å justere høyden på kjørehåndtakene, løsne tommelskruen.
- Håndtakene justeres deretter til ønsket høyde, hvorefter skruen trekkes til igjen.

Vær oppmerksom på at begge håndtakene må stilles i samme høyde. Riktig justerte håndtak skal ca. være i albuehøyde for brukeren når han står med armene hengende løst.

Tilbehør

Det finnes forskjellig tilbehør til rullatoren, kontakt oss dersom dette er nødvendig.

Håndtering under transport

Det anbefales å transportere rullatoren i sammenslått stilling. Dens konstruksjon og lave vekt gjør at den kan foldes ut og brettes på en enkel måte. Du bør sørge for at rullatoren er i en stabil posisjon under transporten slik at den ikke blir skadet.

Applikasjon

Stå i midten bak bakhjulene, ta tak i håndtakene og slipp bremsene. Bremsene er spesielt utviklet slik at de enkelt kan aktiveres uten å slippe håndtaket.

4. Tekniske data

Se neste side.

Mobilex rullator Leopard	Standard	Softhjul	Small
Høyde på skyvehåndtak (justérbar)	74 – 102 cm	74 – 102 cm	66 – 86 cm
Anbefalte brukerhøyde	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm
Setehøyde	62 cm	62 cm	55 cm
Total bredde åpen / sammenfoldet	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Innvendig bredde mellom skyvehåndtak	46 cm	46 cm	46 cm
Lengde (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm
Vekt (+ taske 380 g)	7,4 kg	7,6 kg	7,3 kg
Max. belastning (rullator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunksjon		
Hjul	Forhjul og bakhjul: 200 x 35 mm		

5. Vedlikehold

Smuss kan vanligvis tørkes av med en klut med mildt såpevann. Sterkt alkaliske rengjøringsmidler eller alkoholholdige produkter må ikke brukes og stive børster og skarpe gjenstander bør ikke brukes til rengjøring.

Produktet er normalt vedlikeholdsfritt, men bør jevnlig gjennomgå en sjekk som kan utføres av en ekspert. Ved en slik inspeksjon anbefaler vi at følgende kontrolleres og utføres:

- ✓ Rengjøring og desinfisering av produktet
- ✓ Ramme/produkt kontrolleres for skjevheter og tegn på brudd
- ✓ Slidedeler kontrolleres og skiftes ut om nødvendig
- ✓ Generell tilstramming av produktet

Anbefalt levetid: Vanligvis 10 år avhengig av bruk.

Rengjøring av hjul

Det anbefales å rengjøre hjulene med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Smør også lagrene ved å spraye et smøremiddel en gang iblant eller når hjulene begynner å knirke.

Advarsel

Hvis produktet utsettes for svært kalkholdig vann, kan det oppstå binding og ansamling av kalk på hjullager og andre bevegelige deler. I dette tilfellet kan produktet rengjøres med et kalkoppløsende middel og deretter smøres med smøreolje.

Advarsel

Ved bruk i svært klorholdige miljøer kan det oppstå ekstra sterk korrosjon og garantien bortfaller.

Advarsel

Vær oppmerksom på at hvis rammen er bøyd eller ødelagt skal produktet skiftes ut.

Oppbevaring

Vi anbefaler oppbevaring på et tørt sted.

6. Avhending av produktet

Når dette produktet ikke lenger kan brukes, skal det leveres inn på en kommunal gjenvinningsplass.

8. Garanti

Sansehjørnet AS gir 2 års garanti mot material- og produksjonsfeil. Vi påtar oss ikke ansvar for skader som følge av dårlig vedlikehold av produktet, skader som følge av feil utførte reparasjoner eller skader som følge av normal slitasje. Hvis det gjøres strukturelle endringer på produktet uten vår skriftlige aksept, faller CE-merkingen og vårt produktansvar bort. Dersom det oppdages material- eller produksjonsfeil, må du umiddelbart kontakte forhandleren av produktet eller Sansehjørnet AS direkte. Garantien dekker ikke transportkostnader og inkluderer ikke erstatning for personskade eller manglende bruk av produktet under reparasjon. Det gis ingen kompensasjon for skader forårsaket av ikke å følge denne bruksanvisningen.